

RHK-003 for Europe

## Sonic Alert

### Sonic Boom Wecker & Vibrationskissen

#### Model SBJ525SS



### BEDIENUNGSANLEITUNG


**Wichtig** – Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Bezugnahme auf. Siehe Bedienungsanleitung auf der Rückseite.  
Verwenden Sie zum Anschließen des Geräts nur den mitgelieferten Adapter.

**Warnung:** Um die Gefahr eines Brandes oder Elektroschocks auszuschließen, darf dieses Gerät nicht dem Regen oder der Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Bevor das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wird, muss gewährleistet sein, dass die am Gerät angegebenen Anforderungen der verfügbaren Stromquelle entsprechen, d. h. 120 V~ 60Hz oder 230 V~ 50 Hz.

- Die Lüftung darf nicht durch Abdecken der Lüftungsöffnungen mit Gegenständen wie einer Zeitung, Tüchern, Vorhängen usw. blockiert werden.
- Auf das Gerät darf keine Quelle einer offenen Flamme wie z. B. Kerzen gestellt werden.
- Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden. Keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie z. B. Vasen auf das Gerät stellen.
- Das Gerät darf nicht in geschlossene Schränke oder Regale ohne ausreichende Lüftung gestellt werden.
- Wenn der Netzstecker als Trenngerät verwendet wird, muss das Trenngerät weiterhin betriebsbereit bleiben.

### ALLGEMEINE DATEN

Leistungsaufnahme: Adapter 9 V~ 900 MA  
Für Europa zugelassener CE-Transformator

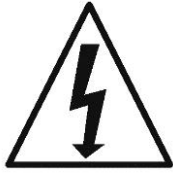

Das Blitzsymbol im Dreieck ist ein Warnzeichen, das Sie auf gefährliche Spannung im Inneren des Produkts hinweist.

**ACHTUNG:**

UM DAS RISIKO EINES ELEKTROSCHOCKS ZU REDUZIEREN, DIE ABDECKUNG ODER RÜCKSEITE) DES PRODUKTS NICHT ENTFERNEN. IM INNEREN DES PRODUKTS BEFINDEN SICH KEINE TEILE, DIE VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN KÖNNEN. FÜR WARTUNG UND SERVICE WENDEN SIE SICH AN IHREN SONIC ALERT-HÄNDLER.



Das Ausrufezeichen im Dreieck ist ein Warnzeichen, das Sie auf wichtige Anleitungen für das Produkt hinweist.

WARNUNG: UM DIE GEFAHR EINES BRANDES ODER ELEKTROSCHOCKS ZU VERMEIDEN, DAS GERÄT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.


- Die Batterie auf umweltverträgliche Weise entsorgen.
- bezeichnet separate Sammlung für elektrische und elektronische Geräte.

***1 JAHR EINGESCHRÄNKTE GARANTIE VON SONIC ALERT***  
Für den Sonic Boom Wecker Modell SBJ525ss gilt eine Garantie von einem (1) Jahr ab Kaufdatum auf Verarbeitungs- und Materialfehler. Innerhalb dieses Garantiezeitraums repariert oder ersetzt Sonic Alert auf Ihren Wunsch den SBJ525ss, ohne Kosten für Teile und Arbeit in Rechnung zu stellen. Senden Sie den SBJ525ss (unter Übernahme der Frachtkosten) und eine Kopie Ihres Kaufbelegs einfach an:  
**Sonic Alert Inc., 1050 E. Maple Road, Troy MI 48083, USA.**

# ANLEITUNG

## LED WECKER MIT VIBRIERKISSEN

### MODEL SBJ525SS

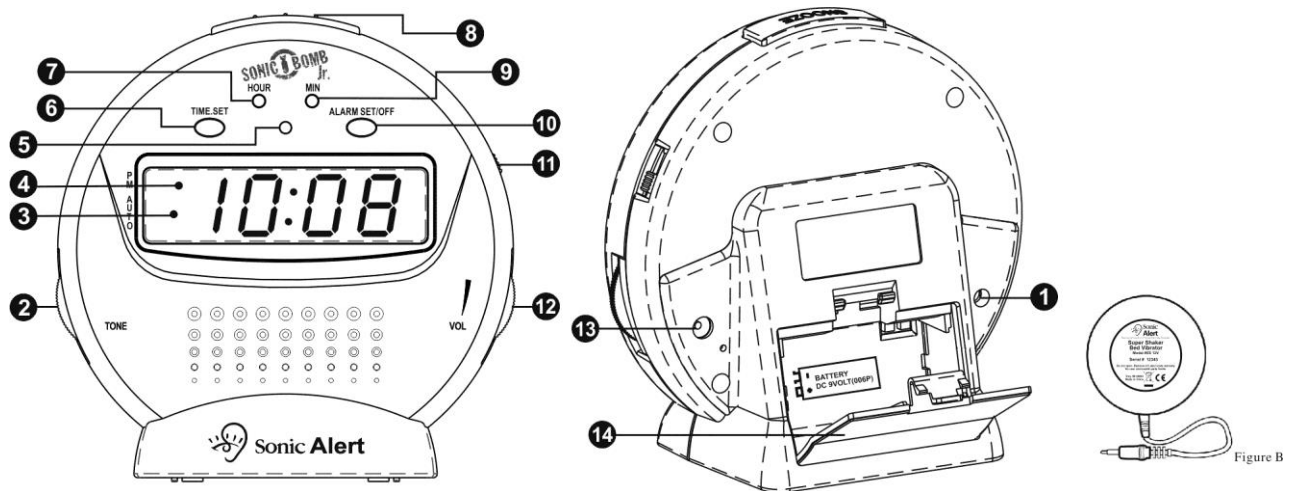

Auf Abbildung oben dargestellte Funktionen:

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Adapteranschluss       | 9. Minuten                 |
| 2. Lautstärkeneinstellung | 10. Alarm An/Aus           |
| 3. Alarmanzeige           | 11. Weckruftaste           |
| 4. PM Anzeige             | 12. Lautstärkeneinstellung |
| 5. Blinkendes LED         | 13. Vibrierkissenanschluss |
| 6. Zeiteinstellung        | 14. Batteriefach           |
| 7. Stunden                |                            |
| 8. Snooze                 |                            |

#### Einstellen der korrekten Uhrzeit -

- 1) Drücken und halten Sie die Zeiteinstellungstaste (6) und drücken Sie gleichzeitig die Stundentaste (7), um die Uhrzeitanzeige auf die gewünschte Zeit vorzustellen.
- 2) Drücken und halten Sie die Uhrzeittaste (6) und drücken Sie gleichzeitig die Minutentaste (9), um die Uhrzeitanzeige auf die gewünschte Zeit vorzustellen. Ein Leuchtpunkt (4) oben links in der Uhrzeitanzeige steht für Nachmittag (PM). Wird kein Leuchtpunkt angezeigt, bedeutet das Vormittag (AM).

#### Einstellen der Weckzeit –

- 1) Drücken und halten Sie die Zeiteinstellungstaste (10) und drücken Sie gleichzeitig die Stundentaste (7) um die Stunde einzustellen.
- 2) Drücken und halten Sie die Zeiteinstellungstaste (10) und drücken Sie gleichzeitig die Minutentaste (9) um die Minuten einzustellen.
- 3) Vergewissern Sie sich, dass die Weckzeit richtig auf Vormittag (AM) oder Nachmittag (PM) eingestellt ist, wobei der Leuchtpunkt (4) auf Nachmittag hinweist. Achten Sie darauf, die Tasten HOUR und MIN Set loslassen, bevor Sie die ALARMTaste loslassen.

#### Aufwachen mit Weckruf –

- 1) Funktionsschalter (11) auf „VIB“, „BUZZ“ oder „VIB/BUZZ“ schieben.
- 2) Gewünschte Lautstärke (12) für den Weckton einstellen.
- 3) Die Weckzeit gemäß Anleitungen zum Einstellen der Weckzeit oben einstellen.

### **Batterie-Backup –**

Um die Backup-Batterie zu verwenden, eine 9-Volt-Alkalibatterie an der Rückseite des Weckers unter der Batteriefachabdeckung (14) einlegen. Batterie im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte beachten Sie, dass auf der LED-Anzeige zwar während eines Stromausfalls nichts angezeigt wird, die Uhr jedoch korrekt weiterläuft, bis die Stromversorgung wieder hergestellt ist.

**HINWEIS:** Für beste Ergebnisse wird empfohlen, dass die Batterie alle sechs bis acht Monate ausgewechselt wird. Wenn der Wecker längere Zeit nicht verwendet wird, sollte die Batterie heraus genommen werden, damit sie nicht auslaufen kann.

### **Abschalten des Weckrufs –**

Der Weckruf kann temporär für den Tag oder permanent abgeschaltet werden.

- 1) Wenn der Weckruf ertönt, einfach die Taste „AL off“ (10) drücken. Der Weckruf schaltet sich selbst für den Tag aus und ertönt am nächsten Tag wieder zur gleichen Zeit, sofern die Weckzeit nicht geändert wurde.
- 2) Um den Weckruf permanent abzuschalten, schieben Sie den Funktionsschalter (11) in die Aus-Position. Der Weckruf ertönt erst dann wieder, wenn der Funktionsschalter (11) auf „VIB“, „BUZZ“ oder „VIB/BUZZ“ gestellt wird.

### **Schlummerbetrieb –**

SNOOZE-Taste (8) – nach dem Ertönen des Weckrufs drücken. Der Weckruf wird für neun Minuten ausgeschaltet, sodass Sie neun Minuten lang weiterschlafen können. Nach neun Minuten ertönt der Weckruf erneut. Dies kann bis zu 119 Minuten wiederholt werden.

### **Weckruf –**

Stellen sie die gewünschte Weckzeit ein und schieben sie die Weckruftaste (11) in die gewünschte Position schieben. Für Bettvibrator auf VIB, für Weckruf auf BUZZ oder für beide Funktionen auf VIB/BUZZ schieben.

### **Weckton –**

Um den Weckton einzustellen, am Wecktonregler (2) zu der gewünschten Einstellung.

### **Lautstärke –**

Um die Lautstärke einzustellen, am Lautstärkereglern (12) oben rechts am Wecker drehen.

### **Bettvibrator/Vibrator – Abbildung B**

- 1) Den Bettvibratoranschluss an der Rückseite des Weckers am Anschluss VIBRATOR-Eingang (13) einstecken.
- 2) Um den Vibrator zu aktivieren, den Funktionsschalter (11) auf VIB oder VIB/BUZZ schieben.
- 3) Den Vibrator unter die Matratze oder das Kissen legen.

### **AC 9V -Eingang**

Den Netzanschlussstecker befindet sich auf der Rückseite des Weckers am Anschluss AC-9V IN (11)  
Wichtig: Netzanschluss nicht mit Vibrator-Ausgang verwechseln.