

GEEMARC

CLEAR SOUND™

HEAR THE DIFFERENCE

AMPLICALL™ 30/40

TRAGBARER KONTROLLGERÄT



geemarc™
Telecom SA

Deutsch

INHALT

INHALT	1
EINLEITUNG	2
Das AMPLICALL™30/40 auspacken	4
BESCHREIBUNG	5
Allgemeine Beschreibung	5
INSTALLATION	9
Einstellung	9
Aufbau	10
Bereich	11
PAARBILDUNG	12
Paarbildung Ablauf	12
Paarbildung im Register löschen	14
GEBRAUCH DES AMPLICALL™30	15
Verzögerte Zeiteinstellung	15
Sensor Empfindlichkeitseinstellung	16
AMPLICALL™30 benutzen	17
GEBRAUCH DES AMPLICALL™40	19
AMPLICALL™40 benutzen	19
PROBLEMLÖSUNG	20
SICHERHEITSINFORMATIONEN	22
GARANTIE	26
RECYCLING ANWEISUNGEN	29

EINLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Geomarc AMPLICALL™30 oder AMPLICALL™40. Das AMPLICALL™30 ist eine tragbare Babyanlage welche Ihr Baby hört und ein Signal an die Empfangseinheit sendet, wenn Ihr Baby ein Geräusch von sich gibt. So können Sie sichergehen, daß es Ihr Baby gemütlich hat und glücklich ist und Sie sich in einem anderen Zimmer befinden. Das AMPLICALL™40 hat einen zusätzlichen Piezo-Summer. Ist er eingefügt, schaltet er das interne Mikrofon aus. Eine der Nutzungen des AMPLICALL™40 ist das Erkennen der Türklingel.

Das AMPLICALL™30 und AMPLICALL™40 hat nützliche Funktionen wie die Einstellung von Verzögerung oder Empfindlichkeit zusammen mit den offensichtlichen Anforderungen an einen guten, klaren Empfang bei einfacher

EINLEITUNG

Nutzung und Einrichtung.

Es ist wichtig, daß Sie die folgenden Anweisungen lesen, um das volle Potential des Amplical30/40 nutzen zu können.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf für spätere Einsichtnahme.

EINLEITUNG

Das AMPLICALL™30/40 auspacken

Wenn Sie das AMPLICALL™30 auspacken, sollte Sie folgendes in der Schachtel vorfinden:

- 1 AMPLICALL™30/40 Gerät
- 3 AAA Batterien (mitgeliefert)
- 1 Externen Piezo-Summer (nur AMPLICALL™40)



Für Produktbetreuung und Hilfe besuchen
sie unsere Webseite auf


www.geemarc.com/de

Telefon +49(0)228/ 74 87 09 0
oder Fax +49(0)228/ 74 87 09 20

BESCHREIBUNG


Allgemeine Beschreibung

Vorderansicht- Beschreibung

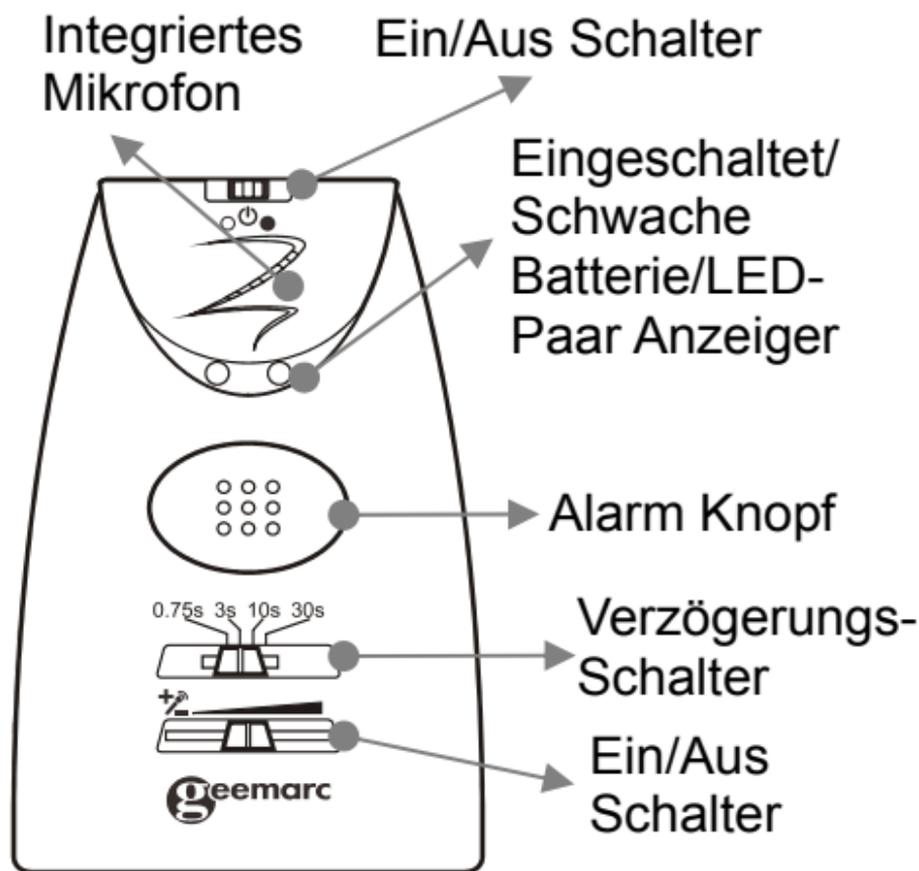


BESCHREIBUNG

Hinteransicht-Beschreibung

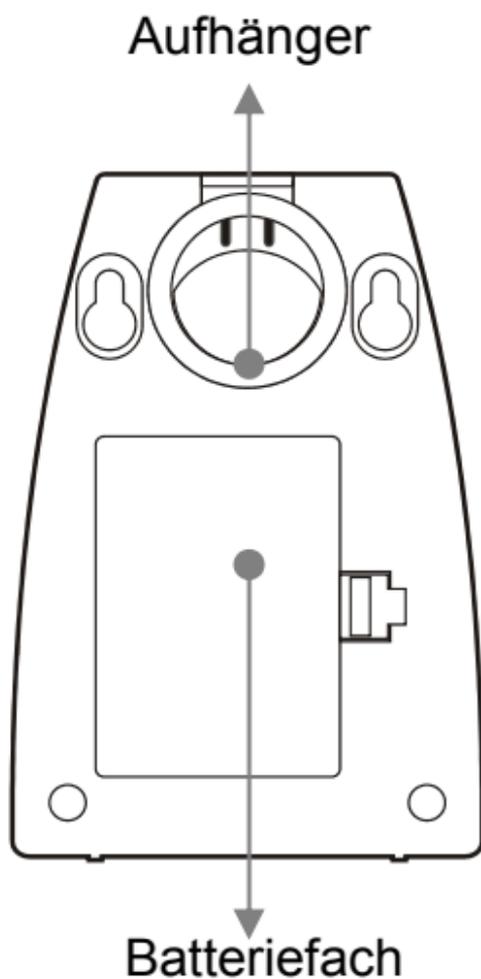


BESCHREIBUNG

Beschreibung der rechten Seite
Beschreibung der linken Seite

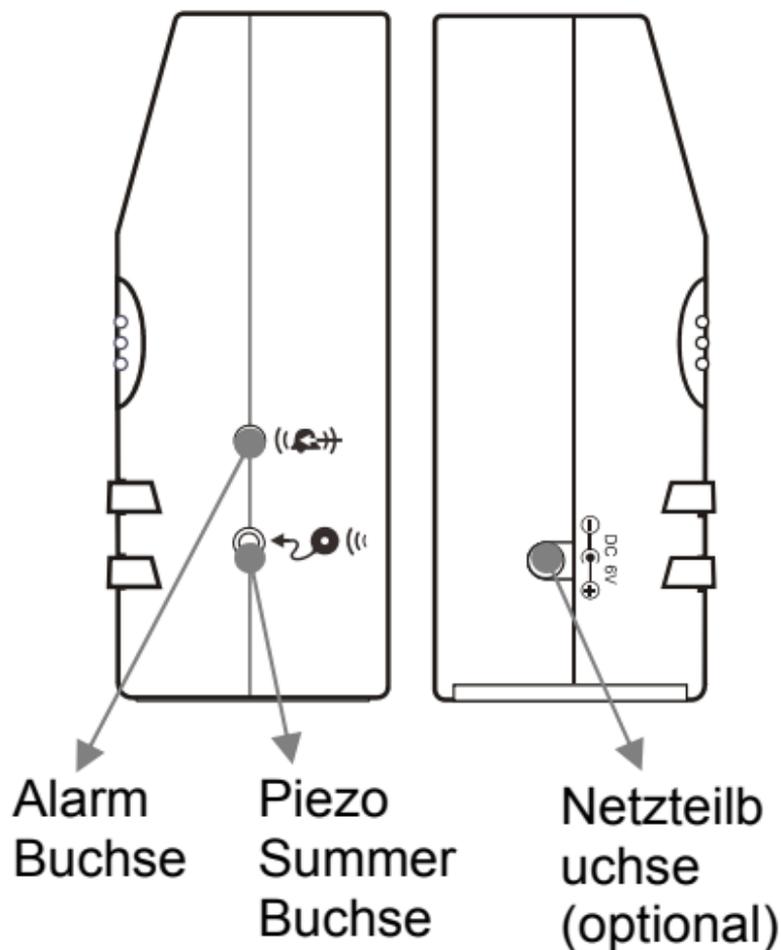

BESCHREIBUNG

Externen Piezo Summer (nur AMPLICALL™ 40)

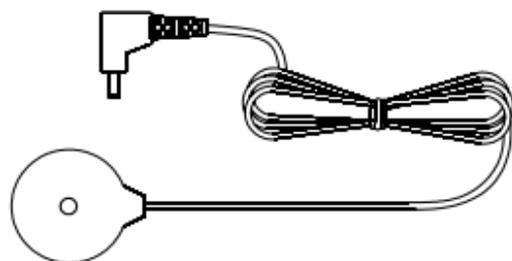

INSTALLATION

Einstellung

Für das tragbare Elternteil-Kontrollgerät, öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Gerätes. Legen Sie 3 Alkaline-Batterien (Größe AAA 1.5 V-Typ, sind im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach. Überprüfen Sie die Polarität der Batterien beim Einlegen der Batterien. Batteriefach wieder schließen – rastet wieder ein.

Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter auf Ein um es zu aktivieren.

Hinweis :

Wenn die LED Anzeige rot blinkt, ist es Zeit die Batterien auszuwechseln.

Alternativ können Sie ein Netzteil verwenden (nicht mitgeliefert). Einfach den Anschluss in die Buchse an der linken

INSTALLATION

Seite des Gerätes stecken und dann in eine geeignete Steckdose. Schalten Sie die Steckdose an und schieben Sie den An/Aus-Schalter auf An um es zu aktivieren.

Installation

Platzieren Sie das AMPLICALL™30/40 in dem Zimmer wo sich das Baby befindet, um jedes Geräusch aufzunehmen, daß das Baby von sich gibt. Das AMPLICALL™30/40 kann mit dem Aufhänger an die Wand gehängt werden, auf den Tisch gestellt und an die Wand montiert werden.

Wandhalterung

1. Bringe Sie zwei eigne Schrauben (nicht mitgeliefert) in der Wand in einem Abstand von 42,5 mm voneinander und in einer horizontalen Linie an.

INSTALLATION

2. Platzieren Sie das AMPLICALL™30/40 auf die Schraubköpfe und schieben Sie es zur Sicherung nach unten.

Bereich

Stellen Sie das Gerät mindestens 1 Meter von Ihrem Baby entfernt auf. Stellen Sie sicher, daß alle Teile außer Reichweite sind. Unter keinen Umständen sollten Sie ein Teil des Kontrollgerätes auf dem Kinderbett platzieren. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, daß das Kontrollgerät nicht weiter als 4 Meter vom Baby entfernt platziert wird.

PAARBILDUNG

Ablauf der Paarbildung

Das AMPLICALL™30/40 kann entweder mit dem AMPLICALL™15, AMPLICALL™20 oder AMPLICALL™50 zusammen arbeiten. Allerdings müssen die Geräte gekoppelt sein, bevor sie miteinander betrieben werden können.

Paarbildung mit dem AMPLICALL™15

Drücke und halte die Paarbildung/Test-Taste des AMPLICALL™15 und die Alarmtaste des AMPLICALL™30/40 bis das Stroboskop blinkt. Das Gerät macht einen Piepston um die erfolgreiche Koppelung zu bestätigen.

Paarbildung mit dem AMPLICALL™20, AMPLICALL™50 und CL2L

Drücke und halte die Paarbildungs/Test-Taste des AMPLICALL™20, AMPLICALL™50 oder CL2L bis das Gerät einen Piepston von

PAARBILDUNG

sich gibt und die 1.LED leuchtet. Sie haben den Paarbildungsmodus betreten.

Drücke und halte die Paarbildungstaste/Test-Taste des AMPLICALL™20, AMPLICALL™50 oder des CL2L und die ALARM-Taste des AMPLICALL™30/40 zur gleichen Zeit bis das Stroboskop blink und das Gerät einen Piepston zur Bestätigung einer erfolgreichen Verbindung von sich gibt. (Beim AMPLICALL™50 leuchtet die LED in der Mitte und das Gerät macht einen langen Piepston um eine erfolgreiche Verbindung zu bestätigen)

Um zu überprüfen ob die Geräte einwandfrei funktionieren und Sie korrekt verbunden wurden, drücken Sie die ALARM-Taste einmal. Beim AMPLICALL™20, AMPLICALL™50 oder CL20L sollte der Alarm klingeln (vorausgesetzt der Alarm ist nicht auf Aus geschaltet), vibrieren (wenn auf An geschaltet) und blinken.

PAARBILDUNG

Abmelden vom AMPLICALL™20, AMPLICALL™50 oder CL2L

1. Drücke und halte die Paarbildungstaste/Test-Taste des Innengerätes/Empfänger (AMPLICALL™20, AMPLICALL™50 oder CL2L) für 5 Sekunden bis alle LED Blinkanzeigen die Sie eingegeben haben sich abgemeldet haben.
2. Drücke und halte die Paarbildungstaste/Test-Taste des Innengerätes/Empfänger einmal (AMPLICALL™20, AMPLICALL™50 oder CL2L), die 1. LED wird blinken. Drücke und halte die Paarbildungstaste/Test-Taste bis die 1. LED erlischt und ein Pieps es bestätigt. Das AMPLICALL™30/40 ist jetzt abgemeldet.

Verzögerte Zeiteinstellung

Sie können eine der 4 Zeitverzögerungen einstellen, indem Sie den Zeitverzögerungsschalter verschieben. Dies ist eine sehr nützliche Einrichtung, weil Sie eine Zeitverzögerung zwischen der Registrierung durch das Kontrollgerät und Ihrer tatsächlichen Benachrichtigung einstellen können. Vielleicht wünschen Sie eine längere Verzögerung bei einem älteren Baby um sicher zu gehen, daß das Baby auch wirklich wach ist .

1. Wenn Sie unmittelbar beim Weinen, sogar bei wenig weinen, benachrichtigt werden wollen, können Sie die Wartezeit auf 0.75 Sek. einstellen. Wenn das Baby zum weinen beginnt, werden sie umgehend benachrichtigt.
2. Weint das Baby nur zeitweise, können Sie die Wartezeit auf 5 Sek. einstellen.

GEBRAUCH DES AMPLICALL™30

Das AMPLICALL™30/40 sendet dann nach 5 Sek. das Weinen an Sie weiter um Sie zu alarmieren.

3. Weint das Baby nur zeitweise und unregelmäßig und sie sind sich bewusst das alles in Ordnung ist, können Sie eine Wartezeit von 10 Sek. oder 30 Sek. einstellen. Das AMPLICALL™30/40 sendet dann nach 10Sek./30Sek. das Weinen an Sie weiter um Sie zu alarmieren.

Sensor

Empfindlichkeitseinstellung

Wollen Sie etwas Entspannen oder ist Ihr Baby schon ein wenig älter und Sie möchten nicht jedes Geräusch aus dem Kinderzimmer hören. Das AMPLICALL™30 hat die Besonderheit einer Empfindlichkeitseinstellung, daß erst ab einem bestimmten Grenzwert signalisiert z.B. erst bei einem Schrei und

GEBRAUCH DES AMPLICALL™30

nicht schon beim glucksen. Sie können die gewünschte Empfindlichkeit des Mikrofons einstellen indem Sie die Taste für die Empfindlichkeit des Mikrofons verändern.

1. Ist das Weinen des Baby's leise oder ist das Kontrollgerät zu weit weg vom Baby installiert, empfiehlt es sich die Empfindlichkeit an eine höhere Position anzubringen um das Weinen zu erkennen.
2. Ist das Weinen des Baby's laut oder ist das Kontrollgerät zu nahe am Baby installiert, empfiehlt es sich die Empfindlichkeit an eine niedrigere Position anzubringen um das Weinen zu erkennen.

AMPLICALL™30 benutzen

Wenn das AMPLICALL™30 ein
Weinen/Stimme erkennt oder der

ALARM-Knopf ist gedrückt, wird das gekoppelte Innengerät ein Alarmklingeln oder ein Blinken von sich geben um Sie auf die Geräusche aufmerksam zu machen.

AMPLICALL™40 benutzen

Das AMPLICALL™40 hat alle nützlichen Funktionen und arbeitet in der gleichen Weise wie das AMPLICALL™30. Es ist jedoch mit einem zusätzlichen externen Piezo-Summer ausgestattet. Wenn Sie den Piezo-Summer in das AMPLICALL stecken und Sie kleben das andere Ende in die Nähe einer Klangquelle, wird das interne Mikrofon des AMPLICALL™40 ausgeschaltet und es kann als Erkennung der Türklingel verwendet werden.

PROBLEMLÖSUNGEN

Kontrollgerät geht nicht an

- Stellen Sie sicher, daß die Batterien richtig eingelegt wurden und die passende Leistung haben.
- Stellen Sie sicher, daß die Netzspannung richtig angeschlossen ist

Der Empfänger (AMPLICALL™50) macht ein hochgezogenes Geräusch (feedback)

- Stellen Sie sicher, daß das AMPLICALL™30/40 und das AMPLICALL™50 mehr als 3 m voneinander entfernt sind.
- Eingangslautstärke niedrig stellen.

Der Empfänger (AMPLICALL™50) warnt mich nur mit Unterbrechungen oder warnt mich überhaupt nicht

- Stellen Sie sicher, ob die Geräte richtig gekoppelt sind. Durchlaufen Sie nochmals die Verknüpfungen.

PROBLEMLÖSUNGEN

- Stellen Sie sicher, ob das AMPLICALL™30/40 und das AMPLICALL™50 eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, ob das AMPLICALL™50 nicht ausgeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, daß die Batterien richtig eingelegt wurden und die passende Leistung haben.
- Stellen Sie sicher, daß die Netzspannung richtig angeschlossen ist
- Vielleicht sind die Geräte zuweit auseinander und deshalb außer Reichweite.
- Eingestellte Zeitverzögerung zu niedrig und Geräuschempfindlichkeit zu hoch.

Klangqualität ist gesunken

- Stellen Sie sicher, daß die Batterien richtig eingelegt wurden und die passende Leistung haben.

Rotes LED blink

- Batterien auswechseln oder Netzstrom verwenden

Allgemein

Das Gerät nicht öffnen (außer zum Batteriewechsel). Notrufstelle anrufen für alle Reperaturen.

Das AMPLICALL™30 ist dafür gedacht, Kinder zu überwachen und ist kein Ersatz für die Aufsicht von Erwachsenen.

Das Produkt ist kein Spielzeug.

Das Kontrollgerät überträgt über einen öffentliche Äther. Ihr Gespräch könnte von einem anderen Gerät mitgehört werden, wenn beide Geräte auf der gleichen Frequenz arbeiten.

Elektrisch betriebene Gegenstände und deren Kabel immer außerhalb der Reichweite von Babys und Kindern halten.

Stellen Sie kein Teil des Kontrollgerätes in oder auf das Bett.

Stellen Sie sicher, daß Kinder mit den Kabeln nicht verdreht werden und nicht darüber stolpern können.

Säubern

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie niemals Polituren oder Reinigungsmittel - diese könnten die Oberfläche oder die Elektronik beschädigen. Wenn verbunden, schalten Sie die Stromversorgung vor der Reinigung aus.

Umwelt

Keinem direkten Sonnenlicht aussetzen. Achten Sie immer darauf, daß ein freier Luftstrom über der Oberfläche des Gerätes fließt.

Stellen Sie kein Teil Ihres Produktes ins Wasser und verwenden Sie es nicht in feuchter Umgebung z. B. Badezimmer.

Setzen Sie Ihr Produkt keinem Feuer oder anderen gefährlichen Bedingungen aus.

Batterien

Einsetzen und Herausnehmen der Batterien sollte nur von einem Erwachsenen oder unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.

Passen Sie besonders auf, daß die Batterien korrekt eingelegt wurden, beachten Sie die (+) und (-) Polarität Zeichen auf den Batterien und auf dem Produkt.

Entfernen Sie gebrauchte Batterien aus dem Gerät.

Keine Akkus verwenden.

SICHERHEITSINFORMATIO

Mischen Sie keine alten (gebrauchten) und neuen Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs.

Legen Sie keine Batterien in den Hausmüll, achten Sie auf Batterie-regelungen zur Entsorgung von Batterien..

Entfernen Sie die Batterien aus Ihrem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht verwenden.

Verwenden Sie die notwendigen Batterien des gleichen oder eines vergleichbaren Typs.

GARANTIE

Von dem Zeitpunkt, an dem Sie Ihr Ihrer Geemarc Produkt erwerben, übernimmt Geemarc zwei Jahre Garantie. Alle Reparaturen und Ersatzteile (nach unserem Ermessen) sind innerhalb dieser Zeit kostenfrei. Sollte mit Ihrem Geemarc Produkt ein Problem auftreten, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.geemarc.com. Die Garantie umfasst keine Unfälle, Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an allen Teilen. Das Produkt darf nur von autorisierten Geemarc-Vertretern repariert werden. Die Geemarc Garantie beschränkt auf keinen Fall Ihre Rechte.

WICHTIG: IHR KASSENBNON IST TEIL IHRER GARANTIE UND MUSS IM FALL EINES GARANTIEANSPRUCHS VORGELEGT WERDEN.

GARANTIE

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis:
Die Garantie gilt nur für
Deutschland

ERKLÄRUNG: Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt gemäß den erforderlichen Vorgaben und andere wichtiger Bestimmungen der Radio- und Telekommunikations-Endgeräte-Bestimmungen 1999/5/EEC und im Besonderen der Artikel 3 Absatz 1a, 1b und Absatz 3 hergestellt wurde

Die Konformitätserklärung kann unter www.geemarc.com/de eingesehen werden.



GARANTIE

Stromversorgung: Der Apparat ist nur für eine Stromversorgung von 230V 50 Hz geeignet. (Eingestuft als "gefährliche Spannung" gemäß der Norm EN60950). Bei der Installation des Gerätes stellen Sie sicher, dass die Steckdose leicht zugänglich ist.

RECYCLING ANWEISUNGEN

Der elektronische und elektrische Abfall sollte nach seiner Nutzungsdauer an Ort und Stelle auf bestem Wege recyclet werden.

Wenn dieses Produkt defekt ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren Hausmüll. Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Batterien und werfen Sie diese in einen geeigneten Rücknahmecontainer. Geben Sie das Produkt bei einer Altgerätesammelstelle ab.

- Oder geben Sie das alte Produkt dem Händler zurück. Beim Kauf eines neuen Gerätes sollte der Händler das Altgerät annehmen.

RECYCLING ANWEISUNGEN

Wenn Sie sich an diese Anweisungen halten, stellen Sie den Schutz der Gesundheit und Umwelt sicher.



Für Produktbetreuung und Hilfe besuchen
sie unsere Webseite auf

www.geemarc.com/de

Telefon +49(0)228/ 74 87 09 0
oder Fax +49(0)228/ 74 87 09 20



UGAmplicall30,40_Ge_Ver 1.0

geemarc™ United Kingdom
Telecom SA

5 Swallow Court
Swallowfields
Welwyn Garden City
Hertfordshire, AL7 1SB
For product support:
01707 384438
www.geemarc.com

geemarc™ FRANCE
Telecom SA

Parc de l'Etoile
2, rue Galilée BP20061
59791 Grande Synthe CEDEX
Tél. service après vente :
03 28 58 75 99
ww.geemarc.com

geemarc™ Deutschland
Telecom SA

Siemensstrasse 10,
53121 Bonn
Deutschland
Tel: +49(0)228/ 74 87 09 0
Fax: +49(0)228/ 74 87 09 20
www.geemarc.com