


THE RED LINE IS DIE CUT,
NO NEED TO BE PRINTED

FRONT SIDE

REAR SIDE

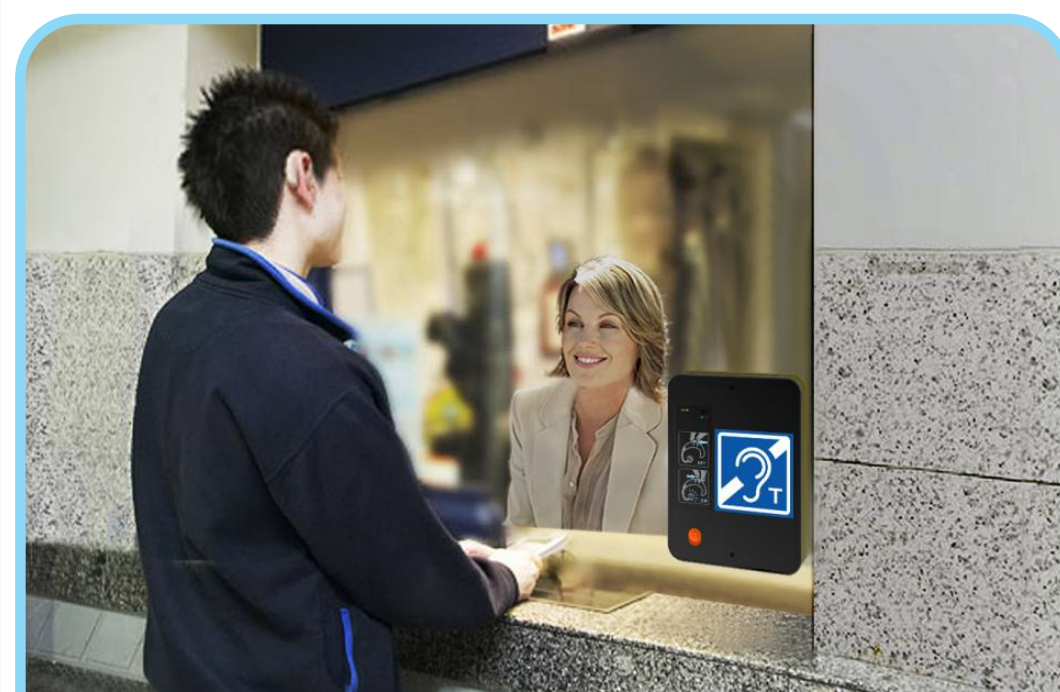

geemarc™ Hear the Difference
loophear™

Fr Boucle d'induction LoopHEAR™ 150 GUIDE RAPIDE

Veuillez vous connecter à notre site www.geemarc.com pour consulter le guide d'utilisation détaillé et afficher tous les accessoires.



Fr 1. INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi le système Geemarc™ LoopHEAR™ 150. Le LoopHEAR™ est une boucle d'induction mobile utilisable dans tous lieux publics et professionnels.

Ce système couvre une zone d'environ 2 m² /10 pieds². Une boucle en fil externe optionnelle permet d'élargir la zone couverte. Il est nécessaire d'utiliser un microphone externe (fourni). Cette boucle d'induction mobile transmet directement les signaux à la prothèse auditive équipée d'une bobine (qui doit être placée en position T) pour aider les utilisateurs.

Remarque: les porteurs de prothèses auditives doivent s'assurer que le système a bien été programmé pour être utilisé avec le paramètre T.



Il est important de lire la notice d'utilisation du Geemarc™ LoopHEAR™ 150, afin de pouvoir profiter de toutes ses capacités. Conservez ce guide d'utilisation en lieu sûr pour référence ultérieure.


RECOMMANDATION

Pour préserver l'environnement, nous vous recommandons de mettre le bouton marche/arrêt sur OFF après chaque utilisation.

Déballage du LoopHEAR™

Une fois le colis déballé, vérifiez que vous disposez de l'ensemble des éléments présentés ci-après:

- Un système LoopHEAR™ avec son guide d'utilisation et un ensemble de vis et de chevilles pour le montage au mur.
- Un adaptateur secteur à têtes remplaçables - Plusieurs prises spécifiques à chaque région, notamment la Grande-Bretagne, l'Europe et les Etats-Unis sont fournies avec l'adaptateur secteur. Veuillez employer l'adaptateur requis dans le pays où vous allez l'utiliser.

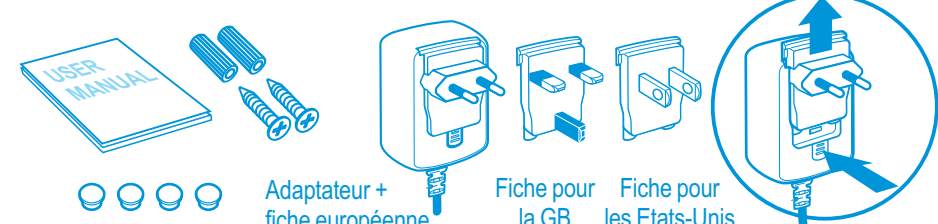

Fr 2. Description générale

Fig 1: Vue des deux côtés

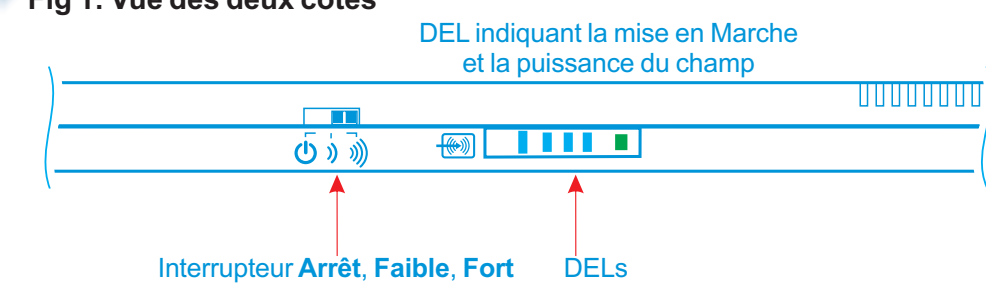


Fig 2: Vue de face



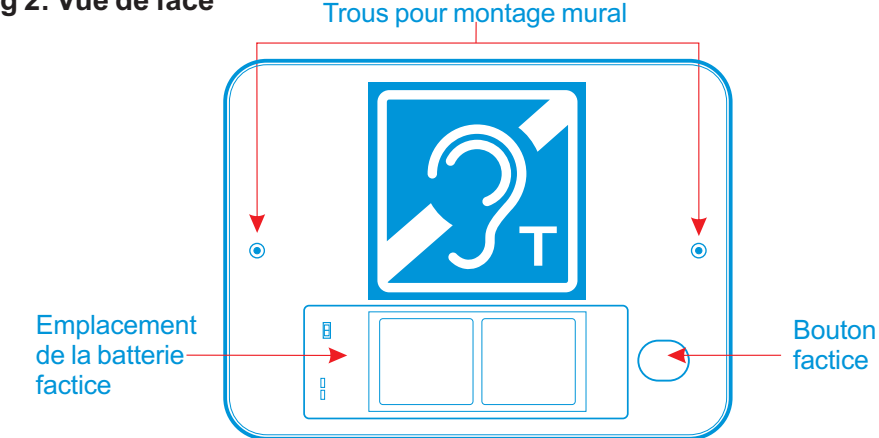


Fig 3: Vue arrière

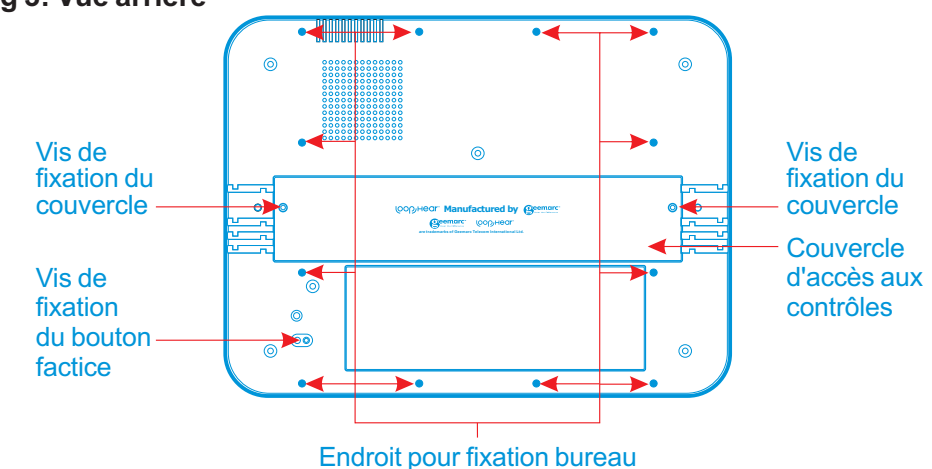

Fr 3.

Fig 4: Niche de commandes

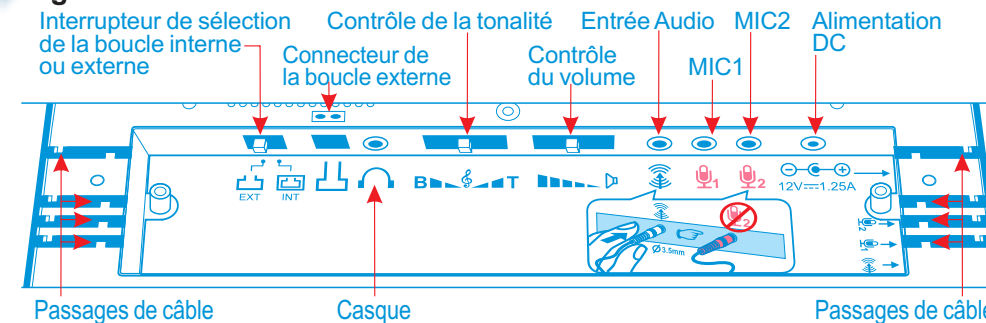

Mise en place

Vous devez installer l'unité avant d'assembler le support ou de la placer en position d'utilisation (Se référer au guide d'utilisation du SUPPORT).

Fonctionnement électrique :

1. Dévissez les deux vis de la porte en niche (voir la figure 3 : Vue arrière).
2. Branchez le câble CC de l'adaptateur CA dans la prise électrique installée dans la zone de commandes en niche de l'unité (voir la Fig 4).
3. Branchez le micro-cravate dans le CONNECTEUR MIC1 qui se trouve à l'arrière de l'unité. Vous pouvez brancher un second microphone (disponible en option) dans le CONNECTEUR MIC2.
4. Branchez votre équipement audio dans la prise de courant de 3,5 mm (bleue). Le LH150 peut transmettre du son à travers la boucle, provenant d'une source audio externe, comme le téléviseur, les lecteurs MP3/MP4 ou un ordinateur.
5. Mettez l'unité en marche en mettant le bouton placé sur le bord avant, sur Marche.

REMARQUE: la position Faible correspond au réglage de volume défini à l'étape 6 et la position Fort se réfère au volume maximum.

6. Réglez le volume à l'aide du bouton de réglage à 5 positions.

7. Réglez la tonalité à l'aide du bouton de réglage de tonalité à 5 positions.

REMARQUE: si l'un ou l'autre des microphones est en cours d'utilisation, le voyant LED bleu placé sous les lentilles lumineuses clignote avec plus ou moins d'intensité, suivant la force du signal magnétique transmis à travers la boucle.


8. Une fois les réglages terminés, remettez la porte en place et revissez les 2 vis.

POUR TOUTES LES AUTRES OPÉRATIONS ET OPTIONS, CONSULTEZ LES GUIDES D'UTILISATION FOURNIS AVEC LES ACCESSOIRES PERTINENTS OU CONNECTEZ-VOUS A NOTRE SITE INTERNET www.geemarc.com.

Fr 4. Localisation du LoopHEAR™ 150

Afin que le LoopHEAR™ 150 diffuse une audio optimale, il vaut mieux le placer en face de l'utilisateur.

La distance et l'angle de couverture idéaux se présentent comme suit:

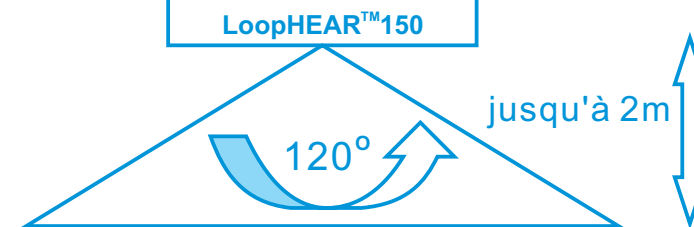

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Généralités

Ne pas ouvrir l'appareil. En cas de problème, appeler le Service Après Vente.

Nettoyage de l'appareil

Nettoyer le LoopHEAR™ avec un chiffon doux. Ne jamais utiliser de produits d'entretien, car ils pourraient endommager les composants électriques placés à l'intérieur de l'appareil.

Environnement

Ne pas exposer le LoopHEAR™ au soleil.

Ne pas couvrir, ni bloquer les conduits de circulation d'air pour éviter la surchauffe de l'unité.

Veillez à ce qu'un flux d'air circule librement autour du LoopHEAR™.

Ne jamais immerger aucune pièce du produit dans l'eau et ne pas l'utiliser dans des conditions humides, par exemple dans la salle-de-bains.

Ne pas exposer le produit au feu, ni à toute autre condition dangereuse.

DIRECTIVES DE RECYCLAGE

La directive DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) a été mise en place dans le but d'assurer la collecte sélective en vue de la valorisation, de la réutilisation ou du recyclage des produits en fin de vie. Si votre produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas dans votre poubelle ménagère.

Suivez l'une des procédures décrites ci-dessous:

- Retirez les batteries et déposez-les dans un lieu de collecte DEEE approprié. Déposez le produit dans un lieu de collecte DEEE approprié.
- Ou rappez votre ancien appareil au magasin, qui, en cas de rachat d'un nouvel appareil, devrait être accepté.

Par conséquent, si vous respectez ces instructions, vous contribuez à protéger l'environnement et la santé.

Fr 5. GARANTIE

Votre appareil Geemarc™ est garanti pendant 2 ans, suivant la date de votre achat. Au cours de cette période, toutes les réparations, ainsi que les remplacements d'appareils (à notre discrétion), s'effectuent sans frais. En cas de problèmes, veuillez contacter notre service après-vente ou vous connecter à notre site Internet www.geemarc.com. La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou la casse d'une des pièces. Le produit ne doit pas être démonté ou altéré par une personne autre qu'un représentant agréé de Geemarc™. La garantie de Geemarc™ ne limite en aucun cas vos droits légaux.

IMPORTANT: LE REÇU DE PAIEMENT FAIT PARTIE INTÉGRANTE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ÊTRE CONSERVÉ ET PRODUIT EN CAS DE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.

**Veuillez noter:
la garantie est applicable uniquement dans la France.**

DÉCLARATION: Geemarc™ Telecom SA confirme par la présente que son produit est conforme aux exigences essentielles, ainsi qu'à d'autres dispositions pertinentes de la norme européenne 1999/5/EEC concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, notamment les sections 1a, 1b et 2 de l'article 2.

Il est possible de consulter la déclaration de conformité sur le site Internet www.geemarc.com.

Raccordement électrique: l'appareil est prévu pour fonctionner uniquement avec l'adaptateur secteur 230V 50Hz fourni. (Tension classée « dangereuse » selon les critères de la norme EN60950).

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements FCC [ainsi qu'avec la norme RSS-210 de Industry Canada].
Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes:
(1) cet appareil ne doit pas provoquer des interférences dangereuses, et
(2) doit accepter toutes les interférences reçues, notamment celles susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement de celui-ci.



Si vous avez besoin d'aide ou de soutien technique, consultez notre site Internet: www.geemarc.com
Ou Geemarc France:
Parc de l'étoile, 2 rue Galilée,
59791 GRANDE-SYNTHE Cedex
Tél: + 33 (0) 3 28 58 75 99 Ou Fax +33 (0)3 28 58 75 76

Fr 6. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


REMARQUE: AVANT D'INSTALLER LE LH150 ET DE L'UTILISER, VEILLEZ À COMPLÉTER LA PROCÉDURE DE MISE EN OEUVRE, DÉCRITE EN Page 3 DE CE MANUEL.

MONTAGE DIRECT AU MUR :



1. PERCER 2 TROUS, D'UN DIAMÈTRE ADAPTÉ AUX CHEVILLES MURALES DE 24mm FOURNIES, (ET À DISTANCE ADEQUATE) DANS LE MUR OU LE PANNEAU SUR LEQUEL VOUS SOUHAITEZ INSTALLER LE LH150.
2. INSÉRER LES CHEVILLES MURALES
3. FIXER FERMEMENT LE LH150 SUR LE MUR OU LE PANNEAU AVEC LES 2 VIS ET LES CHEVILLES DE FIXATION MURALE FOURNIES
4. INSÉRER LES BOUCHONS À VIS PLACÉS SUR LA TÊTE DES VIS FOURNIES.

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION CHEZ VOTRE FOURNISSEUR

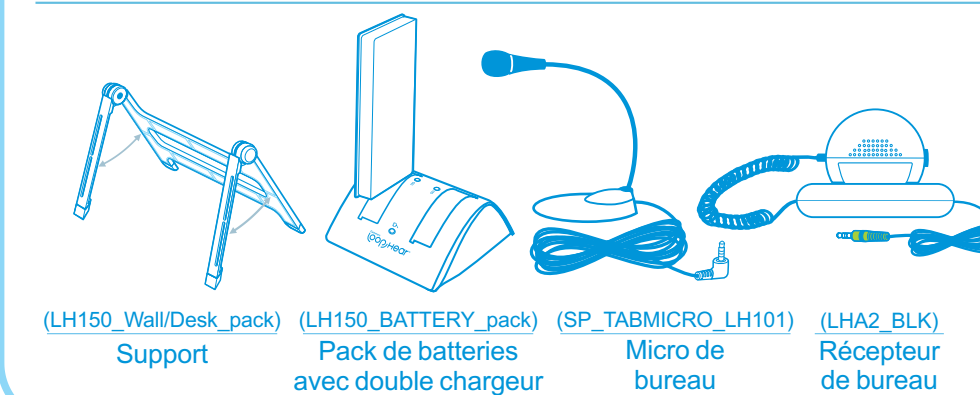

geemarc™ FRANCE
Telecom SA
Parc de l'étoile
2 rue Galilée
59791 GRANDE-SYNTHE Cedex
TEL.SERVICE APRES-VENTE:
03 28 58 75 99
www.geemarc.com

SIZE: 420x295mm (A3)
TO FOLD to 1/4: 210x147mm (A5);

