

Sonic Alert

Réveil Boom Sonic et vibrateur de lit

Modèle SBJ525SS



MODE D'EMPLOI

IMPORTANT – Veuillez lire attentivement cette notice et la conserver pour toute référence ultérieure. Consultez les instructions de fonctionnement au verso du document.

- Utilisez exclusivement l'adaptateur fourni pour brancher l'unité.

Avertissement : pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Avant de raccorder l'appareil au réseau électrique assurez-vous que les exigences spécifiées sur l'appareil correspondent à l'alimentation électrique disponible, soit CA 230V 50Hz.

-- La ventilation ne doit pas être entravée, les orifices d'aération doivent rester libres de tout objet, tel que des journaux, des nappes, des rideaux, etc. ;

-- Aucune source de flamme nue, comme une bougie allumée ne devra être placée sur l'appareil.

-- L'appareil ne sera pas installé à proximité d'un dispositif qui goutte ou soumis à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide ne devra être placé sur l'appareil, tel qu'un vase par exemple.

-- Ne placez pas l'appareil dans un meuble fermé ou sur un rack ne disposant pas d'une ventilation adéquate.

-- Lorsque la fiche secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, celle-ci doit toujours être facilement accessible.

INFORMATIONS GÉNÉRALES


Consommation électrique : adaptateur CA9V~ 600MA)

Le transformateur pour l'Europe est approuvé par la CE

INSTRUCTIONS

RÉVEIL À DEL AVEC VIBREUR POUR LIT

MODÈLE SBJ525SS

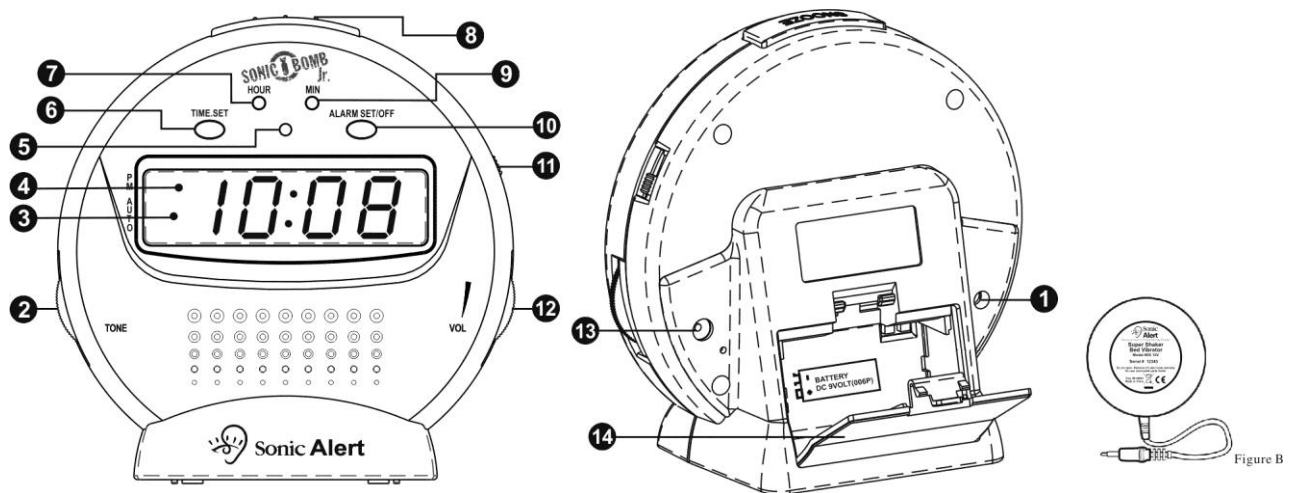

Les caractéristiques du produit figurent dans le schéma ci-dessus :

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Adaptateur CA | 9. Minutes |
| 2. Bouton de tonalité | 10. Alarme activée / désactivée |
| 3. Indicateur de réveil | 11. Commutateur de fonction |
| 4. Indicateur PM | 12. Bouton de volume |
| 5. DEL clignotante | 13. Connecteur externe du vibreur |
| 6. Réglage de l'heure | 14. Porte du logement de pile |
| 7. Heure | |
| 8. Rappel d'alarme | |

Réglage de l'heure –

- 1) Appuyez simultanément sur les boutons **Time Set (6) (réglage de l'heure)** et **Hour (7) (heure)** et maintenez-les enfoncés pour faire défiler rapidement les heures jusqu'au réglage correct.
- 2) Appuyez simultanément sur les boutons **Time Set (6) (réglage de l'heure)** et **Minute (9) (minutes)** et maintenez-les enfoncés pour faire défiler les minutes jusqu'au réglage correct. Un **Point lumineux (4)** dans le coin supérieur gauche de l'horloge indique les heures de l'après-midi au format américain (12h). Pour les heures matinales (AM), le point lumineux n'est pas allumé.

Réglage de l'heure de déclenchement de l'alarme –

- 1) Appuyez simultanément sur les boutons **Alarm Set (10) (réglage de l'alarme)** et **Hour (7) (heure)** et maintenez-les enfoncés pour faire défiler rapidement les heures jusqu'au réglage correct.
- 2) Appuyez simultanément sur les boutons **Alarm Set (10) (réglage de l'alarme)** et **Minute (9) (minutes)** et maintenez-les enfoncés pour faire défiler rapidement l'écran d'alarme jusqu'au réglage correct.
- 3) Assurez-vous que l'heure de déclenchement de l'alarme est correctement réglée pour le matin (AM) ou l'après-midi (PM), le **point lumineux (4)** indiquant les heures de l'après-midi. Veillez à relâcher les boutons **HOUR** et **MIN** avant de relâcher le bouton **ALARM**.

Alarme du réveil –

- 1) Positionnez le **commutateur de fonction (11)** sur « VIB », « BUZZ » ou « VIB / BUZZ » selon votre choix.
- 2) Réglez le volume de l'avertisseur sonore, à l'aide du **bouton de volume (12)**.
- 3) Réglez l'alarme de réveil selon les instructions citées ci-dessus.

Batterie de secours –

Afin de pouvoir utiliser la batterie de secours, vous pouvez installer une pile alcaline de 9-volts au dos de l'horloge, sous le couvercle de la pile (14). La pile n'est pas incluse. Veuillez noter que lors d'une panne de courant l'écran DEL n'affiche plus l'heure, mais l'horloge continue de fonctionner et affichera l'heure correcte dès que l'appareil sera à nouveau alimenté en électricité.

REMARQUE : pour des résultats optimaux, il est recommandé de changer la batterie tous les 6-8 mois. Si l'horloge n'est pas utilisée pendant une longue période, il est recommandé de retirer la pile afin d'éviter les fuites d'acide.

Éteindre l'alarme –

L'alarme peut être arrêtée temporairement pour la journée ou de manière permanente.

- 1) Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez simplement sur le bouton **AL off (10) (arrêt de l'alarme)**. L'alarme s'arrête automatiquement pour la journée et sera réactivée le lendemain à la même heure si le réglage de l'alarme n'a pas été modifié.
- 2) Pour arrêter l'alarme de façon permanente, faites glisser le **commutateur de fonction (11)** sur la position off (arrêt). L'alarme ne sera pas réactivée tant que le **commutateur de fonction (11)** n'aura pas été repositionné sur l'une des positions „VIB“ ou „BUZZ“ ou „VIB/BUZZ“.

Fonctionnement du rappel d'alarme–

Appuyez sur le bouton **SNOOZE (8)** (rappel d'alarme) après que l'alarme ait retenti. L'alarme sera désactivée et vous bénéficierez de 9 minutes de sommeil supplémentaire. L'alarme retentira à nouveau après 9 minutes. Vous pouvez répéter plusieurs fois cette opération, jusqu'à 119 minutes.

Alarme –

Réglez l'heure de déclenchement d'alarme souhaitée et faites glisser le **commutateur de fonction (11)** sur la position désirée. Réglez-le sur la position VIB pour le vibreur de lit, sur BUZZ pour le son, ou sur VIB/BUZZ pour la combinaison des deux.

Tonalité –

Réglez la tonalité en tournant la **molette de tonalité (2)** jusqu'au niveau désiré.

Volume –

Pour régler le volume, faites tourner la **molette de volume (12)** jusqu'au niveau désiré.



Vibreur de lit / Vibreur – Figure B

- 1) Fixez le connecteur du vibreur de lit au dos de l'horloge, sur l'**entrée du VIBREUR (13)**.
- 2) Pour activer le vibreur, faites glisser le commutateur de fonction (11) sur l'une des positions VIB ou VIB / BUZZ.
- 3) Placez le vibreur sous le matelas ou l'oreiller.


Alimentation d'entrée CA 9V –

Fixez l'adaptateur de tension CA au dos de l'horloge sur l'entrée référencée AC9V IN (1).

Important : ne pas confondre l'entrée CA et l'entrée du vibreur.

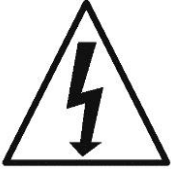 <p>L'éclair et la flèche qui clignotent à l'intérieur du triangle sont des symboles d'alertes qui vous préviennent d'une tension dangereuse présente dans l'enceinte du produit.</p>	<p>MISE EN GARDE : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAR LE COUVERCLE (OU LA PARTIE ARRIÈRE) DU PRODUIT. AUCUNE PIÈCE REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR N'EST INTÉGRÉE AU PRODUIT. VEUILLEZ VOUS ADRESSER À VOTRE REVENDEUR SONIC ALERT.</p>	 <p>Le point d'exclamation à l'intérieur du triangle est un symbole d'avertissement qui vous signale la présence d'instructions importantes sur le produit.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.


- Nous attirons votre attention sur les aspects environnementaux à prendre en compte, lorsque vous vous débarrassez des piles ;
-  les points de collecte sont différents s'il s'agit d'appareils électriques ou électroniques.

RECOMMANDATIONS POUR LE RECYCLAGE

La directive DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) a été mise en place dans le but d'assurer la collecte sélective en vue de la valorisation, réutilisation ou recyclage des produits en fin de vie. Lorsque votre produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas dans votre poubelle ménagère.

Suivez l'une des procédures décrites ci-dessous:

- Déposez les piles et votre ancien appareil dans un lieu de collecte approprié.
- Ou rapportez votre ancien appareil chez le distributeur qui vous vendra le nouveau. Il devra l'accepter. Ainsi, si vous respectez ces instructions vous faites un geste pour l'environnement et vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.

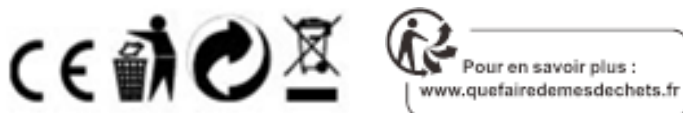

DECLARATION CE: Ce produit respecte les exigences demandées par la directive européenne tel que la directive Compatibilité électromagnétique (EMC) 2004/108/EC et la directive basse tension (LVD) 2006/95/EC. (Si applicable).

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site: www.geemarc.com

GARANTIE LIMITÉE A DEUX ANS SUR LE PRODUIT SONIC ALERT

Le réveil Sonic Alert est garanti pendant deux (2) ans, à compter de sa date d'achat. La garantie ne couvre pas les accidents, les pièces cassées, les liquides renversés, ni la négligence de l'utilisateur. La garantie Sonic Alert ne limite en aucun cas les droits que vous accorde la loi. Le produit est couvert par la garantie légale de conformité telle que prévue par la réglementation applicable.

Important: votre facture d'achat est un élément essentiel de votre garantie. elle vous sera demandée en cas d'intervention sous garantie.

Geemarc Telecom: SAV au (0)3 28 58 75 99

Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59791 Grande-Synthe Cedex, FRANCE

Distribué par:  **FRANCE**

**Parc de l'étoile, 2 rue Galilée,
59791 Grande-Synthe Cedex**

Tel: +33 (0) 3 28 58 75 75 Fax: +33 (0) 3 28 58 75 76

www.geemarc.com