

KURZANLEITUNG

De

Da eventuell wichtige Updates und Veränderungen, die Ihnen bekannt sein sollten, vorgenommen werden können, bitte gehen Sie auf unsere Webseite: www.geemarc.com, um eine aktualisierte Bedienungsanleitung zu erhalten

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Geemarc AMPLIDECT 295 Telefons. Dieses Telefon bietet alle Vorteile der Schnurlos-Technologie (erfüllt die Anforderungen der Digital Enhanced Cordless Telecommunications, DECT-Norm) zusammen mit einem gut sichtbaren Tastenfeld mit großen Tasten, ideal für sehgeschwache Menschen. Dieses Telefon ist auch hörrhilfenkompatibel. Um Ihr Geemarc Telefon in vollem Umfang nutzen zu können, ist es wichtig, dass Sie die nachfolgende Anleitung lesen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf, um später bei Bedarf darauf zurückgreifen zu können.


ACHTUNG: Verwenden Sie nur den mitgelieferten Akku. Es besteht Explosionsgefahr, wenn ein falscher Batterietyp für die Elterneinheit verwendet wird. Der Akku darf während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Transports in großer Höhe keinen hohen oder niedrigen extremen Temperaturen und niedrigem Luftdruck ausgesetzt werden. Die Entsorgung der Batterie ins Feuer oder einen heißen Ofen oder mechanisches Zerquetschen oder Schneiden oder die Batterie kann zu einer Explosion führen. Wenn Sie den Akku in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen belassen, kann dies zu einer Explosion oder dem Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen. Akkus, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt sind, können zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.

Normale Betriebstemperatur für das Produkt (z.B. 0°C ~ 40°C). Verwenden Sie nur die unten aufgeführten Adapter und Akkus.


Informationen zum Netzteil: Ausgang: 6V DC 0.45A, 2.7W. Vtech Telekommunikation Limited Modell: VT05EEU06045 (EU), VT05EUK06045 (GB)

Wiederaufladbarer Akku: Modell: NI-MH AAA500x2. 2,4V, 500mAh. Corun.

Basisstation

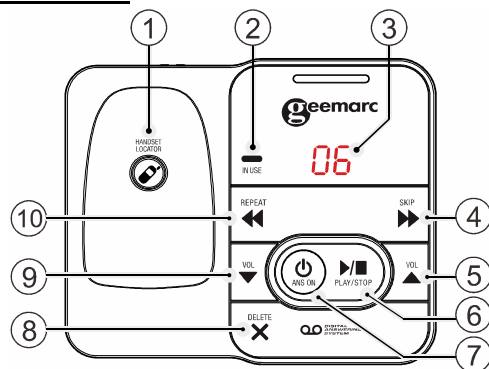


Handapparat

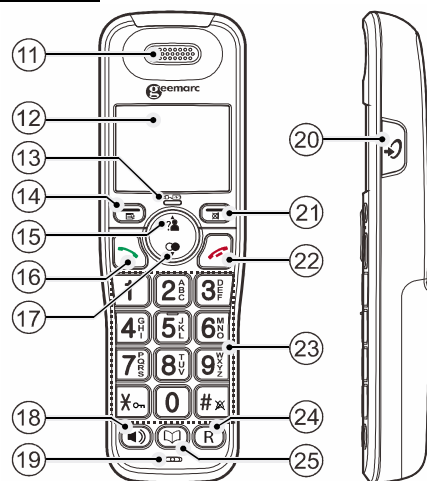

1

Anschluss Basisstation

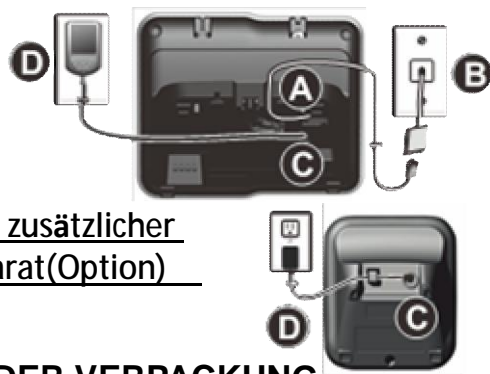

Anschluss zusätzlicher Handapparat (Option)

INHALT DER VERPACKUNG

1 Telefon-Basisstation, 1 kabelloser Handapparat, 1 Netzteil, 1 Telefonkabel, 1 NiMH Akkupack, 1 Kurzanleitung.

EINRICHTUNG

Anschluss des Telefons

Telefonkabel an die Telefonanschlussbuchse (A) und an den Telefonanschluss in der Wand anschließen (B).

Netzteil-Klinke an die Basisstation (und das DC Ladegerät) (C), danach den Netzteilstecker an eine Wandsteckdose anschließen (D).

Ausschließlich das mit dem Telefon mitgelieferte Netzteil verwenden.

Anschluss des Akkupacks

Klinke des Akkupacks fest in den Anschluss im Batteriefach des Handapparates einstecken.



Das mitgelieferte Akkupack wie angezeigt einlegen.

Die Abdeckung flach an das Batteriefach legen und aufwärts schieben, bis sie einrastet.

Akkupack laden

Das Akkupack beim ersten Ladevorgang mindestens 16 Stunden laden.

ÜBERBLICK

Basisstation

1- /ORTUNG DES HANDAPPARATS

Drücken, während das Telefon nicht benutzt wird, um alle Handapparate zu rufen.

2- BELEGT

EIN wenn ein Handapparat belegt ist, oder wenn der Anrufbeantworter einen eingehenden Anruf beantwortet.

EIN, wenn ein Handapparat registriert wird.

Blinkt, wenn ein Anruf eingeht oder wenn Handapparate registriert werden.

Blinkt, wenn ein anderes Telefon auf derselben Leitung benutzt wird.

3- NACHRICHTENZÄHLER

Blinkt, wenn ein Anruf eingeht.

4- /ÜBERSPRINGEN

Drücken, um eine Nachricht zu überspringen.

5- LS (▲)

Während des Abspielens von Nachrichten drücken, um die Hörerlautstärke zu erhöhen. Im Bereitschaftsmodus drücken, um die Klingellautstärke der Basisstation zu erhöhen.

6- / ABSPIELEN/STOPP

Drücken, um das Abspielen der Nachrichten zu starten oder zu stoppen.

7- /ANTW EIN

Drücken, um den integrierten Anrufbeantworter ein- oder auszuschalten.

8- X/LÖSCHEN

Drücken, um die momentan abspielende Nachricht zu löschen. Drücken Sie lang, um alle alten Nachrichten zu löschen, wenn das Telefon nicht benutzt wird.

9- LS (▼)

Während des Abspielens von Nachrichten drücken, um die Hörerlautstärke zu verringern. Im Bereitschaftsmodus drücken, um die Klingellautstärke der Basisstation zu verringern.

10- /WIEDERHOLEN

Drücken, um eine Nachricht zu wiederholen. Zwei Mal drücken, um die vorhergehende Nachricht abzuspielen.

Telefonapparat

11. HÖRMUSCHEL

12. LCD-DISPLAY

13. LADELEUCHE ()

Leuchtet dauerhaft, wenn der Handapparat im Ladegerät geladen wird.

14. MENÜ/OK ()

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf das Hauptmenü zuzugreifen. Im Untermenü-Modus: Drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um auf Intercom / Telefonbuch / Wiederwahlliste / Anrufliste zuzugreifen.

15. OBEN/ANRUFLISTE ()

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf die Anrufliste zuzugreifen. Im Menümodus: Drücken, um die Menüpunkte nach oben zu blättern.

In der Telefonbuchliste/Wiederwahlliste/Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach oben zu blättern.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach links zu bewegen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um die Hörerlautstärke zu erhöhen.

Während des Klingelns: Drücken, um die Klingellautstärke zu erhöhen.

16. SPRECHEN EIN ()

Im Bereitschaftsmodus/vor dem Wählen: Drücken, um einen Anruf in Hörermodus zu tätigen.

In der Telefonbuchliste/Wiederwahlliste/Anrufliste: Drücken, um den in der Liste markierten Eintrag per Hörermodus anzurufen.

Während des Klingelns: Drücken, um einen Anruf in Hörermodus zu beantworten.

17. UNTEN/WIEDERWAHLLISTE ()

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf die Wiederwahlliste zuzugreifen.

Im Menümodus: Drücken, um die Menüpunkte nach unten zu blättern.

In der Telefonbuchliste/Wiederwahlliste/Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach unten zu blättern.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach rechts zu bewegen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um die Hörerlautstärke zu verringern.

Während des Klingelns: Drücken, um die Klingellautstärke zu verringern.

18. FREISPRECHANLAGE ()

Im Bereitschaftsmodus/vor dem Wählen: Drücken, um einen Anruf im Freisprechmodus zu tätigen. Erneut drücken, um in den Hörermodus zu wechseln.

In der Telefonbuchliste/Wiederwahlliste/Anrufliste: Drücken, um den in der Liste markierten Eintrag im Freisprechmodus anzurufen. Erneut drücken, um in den Hörermodus zu wechseln.

Während des Klingelns: Drücken, um einen Anruf im Freisprechmodus zu beantworten. Erneut drücken, um in den Hörermodus zu wechseln.

19. MIKROFON

20. LAUTSTÄRKE-VERSTÄRKUNG ()

Während eines Gesprächs: Drücken Sie , um die Funktion LAUTSTÄRKE-VERSTÄRKUNG zu aktivieren/deaktivieren.

21. ABBRUCH/STUMM ()

Im Hauptmenü-Modus: Drücken, um zum Bildschirm Bereitschaftsmodus zurückzugehen.

Im Untermenü-Modus: Drücken, um zum vorhergehenden Menü zurückzugehen

Im Untermenü-Modus: Drücken und halten, um zum Bildschirm Bereitschaftsmodus zurückzugehen.

Im Bearbeitungsmodus/vor dem Wählen: Drücken, um ein Zeichen/eine Ziffer zu löschen.

Im Bearbeitungsmodus/vor dem Wählen: Drücken und halten, um alle Zeichen/Ziffern zu löschen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um Mikrofon stumm zu stellen/wieder zu aktivieren.

Während des Klingelns: Drücken, um die Klingel des Handapparats stumm zu stellen.

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um mit einem anderen Handapparat zu kommunizieren.

22. SPRECHEN AUS ()

Während eines Gesprächs: Drücken, um ein Gespräch zu beenden und zum Bereitschaftsbildschirm zurückzugehen. Im Menü-/Bearbeitungsmodus: Drücken, um zum vorhergehenden Menü zurückzugehen

Im Menü/Bearbeitungsmodus: Drücken und halten Sie, um zum Bereitschaftsbildschirm zurückzugehen.

Im Bereitschaftsmodus: Drücken und halten Sie, um den Handapparat auszuschalten.

Drücken und halten Sie, um ihn einzuschalten, wenn er ausgeschaltet ist.

23. ALPHANUMERISCHES TASTENFELD, STERNCHEN (*), RAUTE (#)

Vor der Wahl oder im Bearbeitungsmodus: Drücken, um eine Ziffer / einen Buchstaben / * / einzufügen.

* Taste im Bereitschaftsmodus: Drücken und halten Sie, um die Tastensperre zu aktivieren/deaktivieren.

Taste im Bereitschaftsmodus: Drücken und halten Sie, um die Klingel ein-/auszuschalten.

0 Taste in Bereitschaftsmodus/vor dem Wählen/Nummerbearbeitungsmodus: Drücken und halten Sie, um eine Pause einzufügen.

24. R

Während eines Gesprächs: Drücken, um einen Anruf entgegenzunehmen, wenn Sie bei Ihrem Dienstleistungsanbieter die Anklöp-Option abonniert haben.

25. TELEFONBUCH ()

Im Bereitschaftsmodus: Drücken, um auf das Telefonbuch zuzugreifen.

Die Telefon-Einstellungen erfolgen stets in der gleichen Weise:

Drücken Sie die **Menü/OK** -Taste, um das Hauptmenü zu öffnen. Mittels der **▼▲**-Tasten können Sie einen Eintrag markieren und durch Drücken der **Menü/OK** -Taste bestätigen.

Der voreingestellte PIN-Code lautet **0000**.

Beispiel:



Einstellen der Sprache auf dem Handapparat

Drücken Sie auf **MENÜ/OK**, markieren Sie dann **▼▲** HA-Einstellungen, drücken Sie auf **MENÜ/OK**, wählen Sie

2

3

4

dann ▼▲ Sprache, drücken Sie auf **MENÜ/OK** , wählen Sie dann die ▼▲ gewünschte Sprache und drücken Sie zur Bestätigung auf **MENÜ/OK** .

MENÜ EINSTELLUNG

Telefonapparat

TELEFONBUCH

►LISTE EINSEHEN

in einem Eintrag: ►HINZUFÜGEN ►ANSICHT ►BEARBEITEN
►LÖSCHEN ►ALLE LÖSCHEN ►TB STATUS ►KURZWahl

ANRUFLISTE

►LISTE EINSEHEN

in einem Eintrag: ►ZU TB HINZUFÜGEN ►LÖSCHEN ►ALLE LÖSCHEN ►DETAILS ►KATEGORIE

BS EINSTELLUNGEN

► BS KLINGEL ► KLINGELLAUTSTÄRKE ► HA LÖSCHEN ► WÄHLVERFAHREN ► BLINKDAUER ► PIN ÄNDERN

HA EINSTELLUNGEN

► KLINGEL KONFIGURIEREN ► TON KONFIGURATION ► BASISSTATION WÄHLEN ► SPRACHE ► HA UMBENENNEN ► HA ANZEIGEN ► AUTO-ANNAHME

DIREKT MEM : ►M1-M2-M3-M4

DATUM & UHRZEIT

► DATUMSFORMAT ► UHRZEITFORMAT ► UHRZEIT EINSTELLEN ► DATUM EINSTELLEN

WECKRUF : ►EIN ►AUS

REGISTRIERUNG : ►BASISSTATION 1, 3 oder 4

VOREINGABE : ►PIN? **0000** Voreingabe

ANR. BEANTWORTER

► NACHR. ABSPIELEN ► ALLE LÖSCHEN ► MEMO ► AB EIN/AUS

► AB EINSTELLUNGEN (ANTWORTMODUS, SPRACHE, BEGRÜESSUNG EINSTELLUNGEN, ANTWORTVERZÖGERUNG, AUFNAHMEDAUER, KOMPRIMIERUNG, BS SCREENING, FERNZUGRIFF, PIN ÄNDERN)


HANDAPPARAT REGISTRIERUNG

Hinweis: Handapparat und Basisstation sind vorregistriert.


Es können für eine einzelne Basisstation bis zu fünf Handapparat registriert werden.

Im Falle der Neuregistrierung ist die PIN **0000**.

Registrierung eines Handapparats




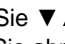
Am Handapparat: Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie ▼▲ REGISTRIERUNG.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie ▼▲ BASIS (1-4), Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , geben Sie 4-ziffrige PIN für die Basisstation ein.

Zugleich an der **Basisstation:** Drücken und halten Sie  / **ORTUNG DES HANDAPPARATS** auf der Basisstation, um auf den Registriermodus zuzugreifen.

Nach kurzer Verzögerung ertönt bei erfolgreicher Registrierung ein Bestätigungston und das Display des Handapparats kehrt in den Bereitschaftsmodus zurück, wobei die neue Handapparatenummer angezeigt wird. Die Anzeige der Basisstation kehrt auch in den Bereitschaftsmodus zurück.

Abmeldung

Am Handapparat: Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie ▼▲ BS EINSTELLUNGEN, drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie ▼▲ HA LÖSCHEN, drücken Sie auf **MENÜ/OK** , geben Sie PIN **0000** ein, drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie ▼▲ eine der Handapparatenummern, die Sie abmelden möchten, drücken Sie

zur Bestätigung auf **MENÜ/OK** .

INTERCOM

Interner Anruf

Drücken Sie auf **C/STUMM** , geben Sie die gewünschte Handapparatenummer auf dem Tastenfeld ein.

HINWEIS: Ist nur ein kabelloser Handapparat für die Basisstation registriert, ist Interner Anruf nicht verfügbar.

Alle Handapparat anrufen

Drücken Sie auf **C/STUMM** , geben Sie auf dem Tastenfeld "9" ein.

Weiterleitung eines Auswärtsgespräch

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie ▼▲ INTERCOM,


Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , geben Sie die gewünschte Handapparatenummer auf dem Tastenfeld ein.

Nach Herstellung der Verbindung beenden Sie den Aufruf auf dem Handapparat.

Konferenzschaltung

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie ▼▲ INTERCOM,

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , geben Sie die gewünschte Handapparatenummer auf dem Tastenfeld ein.

Nach Herstellung der Verbindung drücken und halten Sie  bis KONFERENZ erscheint.

HINWEIS: Falls ein Teilnehmer einer Konferenzschaltung auflegt, bleibt die Verbindung zum Auswärtsgespräch für den anderen Teilnehmer bestehen.

TELEFONBUCH

Ihr Telefon kann im kabellosen Handapparat und an der Basisstation bis zu 50 private Telefonbucheinträge mit Namen und Nummern speichern. Jeder Telefonbucheintrag kann aus maximal 20 Ziffern für die Telefonnummer und 12 Zeichen für den Namen bestehen. Sie können für Ihre Telefonbucheinträge auch unterschiedliche Klingeltöne wählen.

Telefonbucheinträge werden alphabetisch nach Namen gespeichert.

Hinzufügen eines neuen Eintrags

Im Bereitschaftsmodus :

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie ▼▲ TELEFONBUCH, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen (oder leer),

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , um HINZUFÜGEN zu markieren.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , um NAME zu wählen, und geben Sie den Namen ein.


Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , um NUMMER zu wählen, und geben Sie die Nummer ein.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und ▼▲, um den gewünschten Klingelton für Ihren Telefonbucheintrag zu wählen und ▼▲, um den gewünschten Klingelton für Ihren Telefonbucheintrag zu wählen.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , um zu speichern.

DIREKT MEM

Ihre AMPLIDECT295 Basisstation kann als weitere Handapparate auch mit einem bestimmten Handapparat/Gerät wie unserem PhotoDECT295 oder EMERGENCY295 gekoppelt werden, die erfordern, dass direkte Speichernummern in die Basisstation einprogrammiert werden. Diese Zahlen (4 max) müssen über den herkömmlichen Handapparat hinzugefügt werden.

Am Handapparat : Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie ▼▲ DIREKT MEM,

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie ▼▲ M1 - M2 - M3 - M4,

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , geben Sie die Nummer ein, drücken Sie dann auf OK.


ANRUFBEANTWORTER

Die Basisstation Ihres Telefons enthält einen Anrufbeantworter, der, wenn eingeschaltet, nicht angenommene Gespräche aufzeichnet. Der Anrufbeantworter kann bis zu 59 Nachrichten mit einer maximalen Aufzeichnungsdauer von etwa 15 Minuten speichern. Neben der Aufzeichnung eingehender Nachrichten können Memos für andere Benutzer des Telefons aufgezeichnet werden.

Drücken Sie auf /ANTW EIN/AUS, um den Anrufbeantworter EIN oder AUS zu schalten.

FERNGESTEUERTE VORGÄNGE

Wenn Sie nicht zuhause sind, können Sie Ihren Anrufbeantworter über ein anderes Telefon mit Mehrfrequenzwahl anrufen, um ihn ein- oder auszuschalten, und um Nachrichten abzuören.

1. Wählen Sie von einem Telefon mit Mehrfrequenzwahl.
2. Wenn der Anrufbeantworter anspringt und die Begrüßung abspielt, drücken Sie auf .
3. Die 4-ziffrige Fernzugriff-PIN eingeben (voreingestellte PIN ist **0000**).
4. Folgende Tasten drücken, um die gewünschte Funktion auszuführen.



Die	Funktionen	
	Während keine Nachricht abgespielt wird	Während eine Nachricht abgespielt wird
2		Aktuell abgespielte Nachricht löschen
4		Aktuelle Nachricht vom Anfang an erneut abspielen. Zwei Mal drücken, um zur vorhergehenden Nachricht zurück zu springen.
5	Nachricht abspielen	
6		Vorwärts springen, um nächste Nachricht abzuspielen
7	Anrufbeantworter einschalten	
8		Abspielen der aktuellen Nachricht abbrechen
9	Anrufbeantworter ausschalten	
*	Die 4-ziffrige Fernzugriff-PIN eingeben	

HINWEIS: Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll und der Antwortmodus ANTW & AUFZEICHNUNG eingestellt ist, wechselt der Antwortmodus in NUR ANTWORTEN.

Sobald einige Nachrichten gelöscht wurden, wechselt er automatisch in den Modus ANTW & AUFZEICHNUNG.

Sie können neue Nachrichten nicht löschen, bevor sie abgehört wurden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

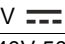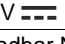Grundlagen	
Reichweite	Im Haus: 50m / Draußen:300m
Mobilteil-Betriebszeiten	Standby-Zeit: 100 Stunden Gesprächszeit: ungefähr 10 Stunden.
RF Parameter	
Frequenz	1.88 GHz bis 1.9GHz
Anzahl der Kanäle	10
Strahlungsleistung	<250mW
Strom	
Basis	Input 100-240V 50/60Hz; Output DC6V  0.45A, 2.7W Adapter
Ladegerät	Input 100-240V 50/60Hz; Output DC6V  0.45A, 2.7W Adapter
Mobilteil	Wieder aufladbar NiMh-Akku mit 2.4V/500 mAh

PFLEGE

Reinigen Sie die Oberfläche des Gehäuses mit einem weichen, fusselreifen Tuch. Bitte verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungen.

GARANTIE

Geemarc™ bietet AMPLIDECT™ 295 eine Garantie für den Zeitraum von zwei Jahre ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie gratis. Sollten Sie ein Problem feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internet-Seite unter www.geemarc.com/de. Die Garantie deckt weder Unfälle noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es auseinandergebaut werden von jemandem, der kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc-Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

WICHTIG: IHRE QUITTUNG IST TEIL IHRER GARANTIE. SIE MUSS AUFBEWAHRT UND IM FALL VON GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHEN VORGELEGT WERDEN.

ERKLÄRUNG:

Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses AMPLIDECT™295 die grundlegenden Anforderungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU.

Die Konformitätserklärung kann unter www.geemarc.com eingesehen werden.

Elektrische Anschlüsse: Dieses Gerät ist ausschließlich für den Betrieb mit 230 V und 50 Hz vorgesehen. (Klassifiziert in der Norm EN62368-1 als 'gefährlicher Spannungswert'). Der Apparat verfügt über keinen eingebauten Ein-/Ausschalter. Um die Stromzufuhr abzustellen, müssen Sie entweder das Kabel vom Wandstecker unterbrechen oder den Netzadapter vom Apparat abziehen. Sorgen Sie bei der Montage des Apparates dafür, dass der Wandstecker leicht zugänglich ist.

Telephone connection: Die im Telekommunikationsnetz vorherrschende Spannung wird gemäß der Norm EN62368-1 klassifiziert als TNV-3 (Telecommunication Network Voltage).

VORSCHRIFTEN FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihres Produktlebenszyklus auf die beste Art und Weise zu recyceln.

Wenn dieses Produkt unverwendbar geworden ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren normalen Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Akkus und werfen Sie sie in den entsprechenden WEEE Müllcontainer. Werfen Sie auch das Gerät selbst in den dafür vorgesehenen WEEE Container.

- Ersatzweise können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte er das alte zurücknehmen.

Indem Sie diese Anweisungen befolgen, gewährleisten Sie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und den Schutz unserer Umwelt.



Produktunterstützung und Hilfe erhalten Sie auf unserer

Webseite unter www.geemarc.com/de

E-mail: kundendienst@geemarc.com

Telefon: **+49(0)30 209 95 789**

Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59791 Grande-Synthe, France.

Manufacturer: Vtech (Dongguan) Telecommunications Limited.
Vtech Science Park, Xia Ling Bei Management Zone, Liaobu, Dongguan, Guangdong.

Von Geemarc Telecom im China hergestellt