



SCHNELLANLEITUNG

De

Da eventuell wichtige Updates und Veränderungen, die Ihnen bekannt sein sollten, vorgenommen werden können, bitte gehen Sie auf unsere Webseite: www.geemarc.com, um eine aktualisierte Bedienungsanleitung zu erhalten.

ACHTUNG: Verwenden Sie nur den mitgelieferten Akku. Es besteht Explosionsgefahr, wenn ein falscher Batterietyp für die Elterneinheit verwendet wird. Der Akku darf während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Transports in großer Höhe keinen hohen oder niedrigen extremen Temperaturen und niedrigem Luftdruck ausgesetzt werden. Die Entsorgung der Batterie ins Feuer oder einen heißen Ofen oder mechanisches Zerquetschen oder Schneiden oder die Batterie kann zu einer Explosion führen. Wenn Sie den Akku in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen belassen, kann dies zu einer Explosion oder dem Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen. Akkus, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt sind, können zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.

Normale Betriebstemperatur für das Produkt (z.B. 0°C ~ 40°C).

Verwenden Sie nur die unten aufgeführten Adapter und Akkus.


Informationen zum Netzteil: Ausgang: 6V DC 0,45A, 2,7W. Vtech Telekommunikation Limited. Modell: VT05EEU06045 (EU), VT05EUK06045 (GB)

Wiederaufladbarer Akku: Modell: KH-AAAJ600-D x 3 Stück. 1,2V, 600mAh. Corun.

PACKUNGSINHALT


1 TCHARGER, 1 kabelloses Mobilteil, 1 Steckernetzteil, 3 NiMh Batteriepackung, 1 Schnellanleitung.

BASISVERBINDUNGEN

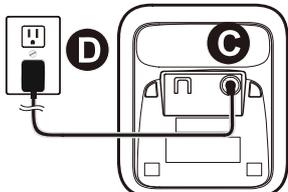

MOBILTEIL

1

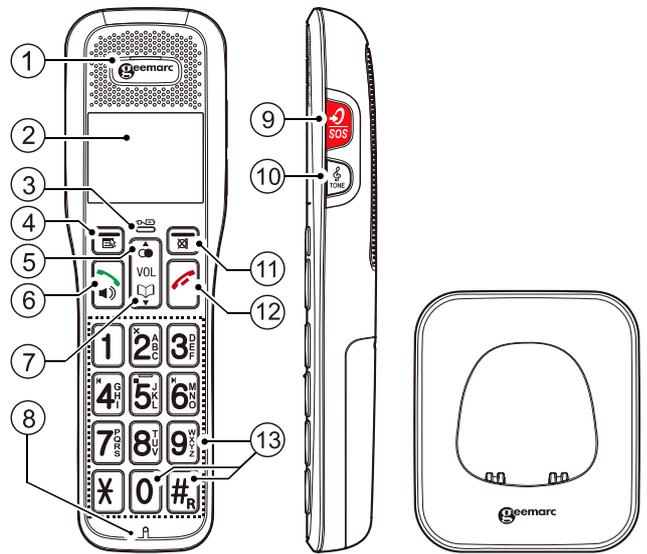

INSTALLATION

Das Telefon verbinden

Verbinden Sie das Kabel des Steckernetzteils mit der Basis (C) und stecken Sie das Steckernetzteil in die Steckdose (D).

Hinweis: Verwenden Sie nur das mit dem Telefon gelieferte Steckernetzteil.

Die Batterien einsetzen

Schieben Sie den Batteriedeckel nach unten. Setzen Sie die 3 Batterien wie angegeben ein und beachten Sie die jeweiligen Polaritätsangaben (+, -). Setzen Sie den Deckel flach auf das Batteriefach und schieben Sie ihn nach oben, bis er einrastet.

Laden des Akkus

Laden Sie die Batterien für mindestens 16 Stunden auf, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal aufladen.

ERSTE VERWENDUNG IHRES MOBILTEILS

Nachdem Sie die Batterien eingesetzt haben, werden Sie auf dem Bildschirm aufgefordert, Ihre Sprache zu wählen, indem Sie die ∇/\blacktriangle (5/7) Tasten verwenden. Drücken Sie zur Bestätigung auf **MENÜ/OK** (4).

Geben Sie dann über die Tastatur das Datum ein, und bestätigen Sie dieses, indem Sie auf **MENÜ/OK** (4) drücken.

Geben Sie die richtige Stundenangabe über die Tastatur ein, und bestätigen Sie diese, indem Sie auf **MENÜ/OK** (4) drücken.

MOBILTEIL-REGISTRIERUNG

Hinweis: Es können für eine einzelne Basisstation bis zu vier Mobilteile registriert werden.

Registrierung eines Mobilteils

Auf der **Basisstation**: / **ORTUNG DES MOBILTEILS (1)** auf der Basisstation gedrückt halten, bis Sie einen Ton hören, um auf den Registrierungsmodus zuzugreifen.

Zugleich **am Mobilteil**: Drücken Sie auf **MENÜ/OK** (4) und verwenden Sie ∇/\blacktriangle , um **MT EINSTELLUNGEN** zu wählen, und drücken Sie auf **MENÜ/OK** (4). Verwenden Sie die ∇/\blacktriangle Tasten, um **ANMELDEN** anzuwählen, drücken Sie auf **MENÜ/OK** (4), jetzt sollte auf dem Bildschirm **ANMELDUNG** angezeigt werden.

Nach einer kurzen Verzögerung ertönt bei erfolgreicher Registrierung ein Bestätigungston und das Display des Mobilteils kehrt in den Standby-Modus zurück, wobei die neue Mobilteilnummer angezeigt wird. Die Anzeige der Basisstation kehrt auch in den Standby-Modus zurück.

ÜBERSICHT

Mobilteil

1. HÖRMUSCHEL

2. LCD-DISPLAY

3. LADELEUCHE ()

Leuchtet dauerhaft, wenn das Mobilteil im Ladegerät geladen wird.

4. MENÜ/OK ()

Im Standby-modus: Drücken, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.

Im Untermenü-Modus: Drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um auf Intercom / Telefonbuch / Wiederwahlliste / Anrufliste zuzugreifen.

5. NACH OBEN/ANRUFLISTE ()

Im Standby-modus: Drücken, um auf die Anrufliste zuzugreifen.

Im Menümodus: Drücken, um in den Menüpunkten nach oben zu springen.

2

In der Telefonbuchliste / Wiederwahlliste / Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach oben zu springen.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach links zu bewegen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um die Hörerlautstärke zu erhöhen.

Während des Klingelns: Drücken, um die Klingellautstärke zu erhöhen.

6. SPRECHMODUS AN () LAUTSPRECHER ()

Im Standby-Modus / vor dem Wählen: Drücken, um einen Anruf im Hörermodus zu tätigen.

In der Telefonbuchliste / Wiederwahlliste / Anrufliste: Drücken, um den in der Liste markierten Eintrag im Hörermodus anzurufen.

Während des Klingelns: Drücken, um einen Anruf im Hörermodus zu beantworten.

7. NACH UNTEN/TELEFONBUCH ()

Im Standby-Modus: Drücken, um auf das Telefonbuch zuzugreifen.

Im Menümodus: Drücken, um in den Menüpunkten nach unten zu springen.

In der Telefonbuchliste / Wiederwahlliste / Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach unten zu springen.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach rechts zu bewegen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um die Hörerlautstärke zu verringern.

Während des Klingelns: Drücken, um die Klingellautstärke zu verringern.

8. MIKROFON

9. LAUTSTÄRKE-VERSTÄRKUNG SOS (/SOS)

Während eines Anrufs: Drücken, um die Funktion LAUTSTÄRKE-VERSTÄRKUNG zu aktivieren / deaktivieren.

Im Standby-Modus: 3 Sekunden gedrückt halten, um den Notruf über das Mobilteil zu wählen.

Im Anrufmodus: 2 Sekunden gedrückt halten, um den Notruf zu beenden.

10. TON ()

Während eines Anrufs: Drücken Sie diese Taste, um die hohen oder niedrigen Frequenzen lauter zu stellen.

11. ABRUCH / STUMM ()

Im Hauptmenü-Modus: Drücken, um zum Bildschirm Standby-Modus zurückzukehren.

Im Untermenü-Modus: Drücken, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

Im Bearbeitungsmodus / vor dem Wählen: Drücken, um ein Zeichen / eine Ziffer zu löschen.

Im Bearbeitungsmodus / vor dem Wählen: Drücken und halten, um alle Zeichen / Ziffern zu löschen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um Mikrofon stumm zu stellen / wieder zu aktivieren.

Während des Klingelns: Drücken, um den Klingelton des Mobilteils stumm zu schalten.

Im Standby-Modus: Drücken, um mit einem anderen Mobilteil zu kommunizieren.

12. SPRECHFUNKTION AUS ()

Während eines Anrufs: Drücken, um ein Gespräch zu beenden und zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Im Menü/Bearbeitungsmodus: drücken, um zum Standby-Bildschirm zurückzugehen.

13. ALPHANUMERISCHES TASTENFELD, STERNCHEN (0), RAUTE (#R)

Vor dem Wählen / im Nummernbearbeitungsmodus: Drücken, um eine Ziffer / einen Buchstaben **/X/#** einzufügen.

#R **Während eines Gesprächs:** Gedrückt halten, um einen Rückruf zu tätigen.

0 **Taste in Standby-Modus / vor dem Wählen / Nummerbearbeitungsmodus:** Gedrückt halten, um eine Pause einzufügen.

INTERCOM

Interner Anruf

1) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** (), und **▼▲**, um **INTERCOM** anzuwählen, drücken Sie auf **MENÜ/OK** ().

2) Wählen Sie die gewünschte Mobilteilnummer., dann auf **MENÜ/OK** () drücken.

Wenn Sie einen Anruf auf der Basis im Freisprechmodus erhalten, dann wird der Anruf automatisch auf das Mobilteil weitergeleitet, wenn sich das Mobilteil nicht auf der Ladestation befindet.

Alle Mobilteile anrufen

Wie Punkt 1 im Kapitel zu internen Anrufen und **ALLE** wählen.

Einen externen Anruf weiterleiten

Wie Punkt 1 im Kapitel zu internen Anrufen und dann die gewünschte Mobilteilnummer anhand der Tasten **HOCH / RUNTER** anwählen.

Nachdem die Verbindung eingerichtet wurde, können Sie den Anruf auf dem Mobilteil beenden, indem Sie  drücken.

Konferenzschaltung

Wie Punkt 1 im Kapitel zu internen Anrufen, wählen Sie dann die gewünschte Mobilteilnummer, indem Sie die Tasten **▼/▲** verwenden.

Nachdem die Verbindung eingerichtet wurde, **X** gedrückt halten, bis **KONFERENZ** angezeigt wird.

HINWEIS: Falls ein Teilnehmer einer Konferenzschaltung aufliegt, bleibt die Verbindung zum Auswärtsgespräch für den anderen Teilnehmer bestehen.

PFLEGE

Reinigen Sie die Oberfläche des Gehäuses mit einem weichen, fusselfreien Tuch. Bitte verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungen.

GARANTIE

Geemarc™ bietet AMPLIDECT595 U.L.E HS eine Garantie für den Zeitraum von zwei Jahre ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie kostenlos. Sollten Sie ein Problem feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internet-Seite unter www.geemarc.com.

Die Garantie deckt weder Unfälle noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es von einer Person auseinandergelöst werden, die kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc-Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

WICHTIG: IHRE QUITTUNG IST TEIL IHRER GARANTIE. SIE MUSS AUFBEWAHRT UND IM FALL VON GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHEN VORGELEGT WERDEN.

ERKLÄRUNGEN:

CE Richtlinien

Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses AMPLIDECT595 U.L.E HS die grundlegenden Anforderungen der RE-Richtlinie 2014/53/EU.

Die Konformitätserklärung kann unter www.geemarc.com eingesehen werden

Strahlungsleistung	< 250mW
Strom	
Ladegerät	Input 100-240V 50/60Hz; Output DC6V  0.45A, 2.7W Adapter
Mobilteil	3 Batterien AAA 1.2V / 600mAh wieder aufladbar

VORSCHRIFTEN FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihres Produktlebenszyklus auf die beste Art und Weise zu recyceln.

Wenn dieses Produkt unverwendbar geworden ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren normalen Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Akkus und werfen Sie sie in den entsprechenden WEEE Müllcontainer. Werfen Sie auch das Gerät selbst in den dafür vorgesehenen WEEE Container.

- Ersatzweise können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte er das alte zurücknehmen.

Indem Sie diese Anweisungen befolgen, gewährleisten Sie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und den Schutz unserer Umwelt.



Produktunterstützung und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.geemarc.com/de

E-mail: kundendienst@geemarc.com

Telefon: +49(0)30 209 95 789

Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, France.

Hergestellt in China für Geemarc Telecom S.A.



QUGAMPLIDECT595 U.L.E_HS_Ge_A4_V1.6