

## 4G Telefon mit SOS-Notruffunktion

Deutsch



### HINWEIS:

Dieses Telefon kann von Personen mit Hörproblemen verwendet werden. Es verfügt über einen Hörer mit variabler Lautstärke bis 40 dB. Stellen Sie beim ersten Gebrauch sicher, dass die Lautstärke des Mobilteils auf Minimum eingestellt ist. Anschließend kann der Hörgeschädigte die Lautstärke entsprechend seinen Bedürfnissen erhöhen.

# Inhalt

Eine aktuelle Bedienungsanleitung finden Sie auf unserer Webseite: **www.geemarc.com**, da es möglicherweise wichtige Aktualisierungen und Änderungen gibt, die Sie beachten müssen!

<b>Inhalt</b> .....	<b>1</b>
<b>Vor der ersten Verwendung</b> .....	<b>5</b>
- Herzlichen Glückwunsch .....	5
- Sicherheitsvorkehrungen .....	6
- Installation .....	7
• Packungsinhalte überprüfen .....	7
• Standort auswählen .....	7
• Akku einsetzen & Netzteil anschließen .....	7
- Anschluss des Telefons .....	8
- Wandhalterung .....	9
- Aufbau des Telefons .....	10
- Beschreibung der Tasten .....	11
- LCD-Beschreibung .....	12
<b>Einstellungen</b> .....	<b>14</b>
- Telefoneinstellungen .....	14
• Zeit & Datum .....	14
• Sprache .....	14
• Auf Werkseinstellungen zurücksetzen .....	15
- Anrufeinstellungen .....	15
• Voicemail-Server .....	15
• Anruf umleiten .....	15
• Anruf in der Warteschleife .....	15
• Anruf gesperrt .....	16
• SMS-Antwort nach Anrufablehnung .....	16
• Anrufzeit-Minuten-Erinnerung .....	16
- Display .....	16
• Kontrast .....	16
• Hintergrundbeleuchtung .....	16

- Sicherheit.....	17
• PIN.....	17
• Schwarze Liste.....	17
- Verbindung.....	18
- Version.....	18
- LED-Anzeige.....	18
- Niedriger Batteriestand SMS.....	18
- Boost-Einstellung.....	19
• Tonsteuerung.....	19
• Automatische Aktivierung der Boost-Funktion.....	19
- Weitere Einstellungen.....	20
• Kurztaste.....	20
• Lautlosmodus.....	20
<b>Profile.....</b>	<b>20</b>
- Klingeltoneinstellungen.....	20
- Lautstärke anpassen.....	21
- Weitere Alarmtöne.....	21
<b>Nutzung des Telefons.....</b>	<b>22</b>
- Ausgehende Anrufe.....	22
- Eingehender Anruf & Anruf empfangen (CID).....	23
- Kontakt anwählen.....	23
- Direktwahltasten.....	23
- Anruf mit Fototaste.....	24
- Wählen einer Nummer aus der Wahlwiederholungsliste..	24
- Wählen einer Nummer aus der Liste verpasster Anrufe.....	24
- Wählen einer Nummer aus der Liste empfangener Anrufe..	24
- Mikrofon stummschalten.....	24
- Verwendung der Verstärkersfunktion.....	25
- Verwendung des Telefons mit Hörgeräten.....	25
- Freisprechfunktion.....	25
- Tonresonanz.....	25

# Inhalt

<b>Telefonbuch</b> .....	<b>26</b>
- Telefonbuch .....	26
- Telefonbucheintrag erstellen .....	26
- Telefonbucheintrag anzeigen .....	27
- Optionen innerhalb des Telefonbuchs .....	27
- Nummer auf Direktwahl- oder Fototaste speichern .....	28
<b>SMS</b> .....	<b>29</b>
- Nachricht (SMS) .....	29
- Nachricht senden .....	29
- Nachricht empfangen .....	30
- Gespeicherte Nachrichten (Posteingang) .....	30
- Gesendete und gespeicherte Nachrichten (Postausgang) .....	30
- Entwürfe .....	31
- Nachricht löschen .....	31
- Vorlagen .....	31
- Broadcast-Nachrichten .....	32
- Nachrichteneinstellungen .....	32
- Nachrichtenkapazität .....	32
<b>Anruflisten</b> .....	<b>33</b>
- Verpasste Anrufe .....	33
- Verpasste Anrufe anzeigen .....	33
- Ausgehende Anrufe anzeigen .....	34
- Eingegangene Anrufe anzeigen .....	34
- Alle löschen .....	34
- Anrufdauer .....	34
<b>Anwendungen</b> .....	<b>35</b>
- Anwendungen .....	35
• Alarm .....	35
• Timer .....	35
• Bluetooth .....	35
- Name aufnehmen .....	36

<b>SOS</b> .....	<b>37</b>
- Notrufarmband .....	37
- SOS-Funktion .....	38
- SOS Nummern einrichten .....	38
- Aktivieren der SOS-Ansage .....	38
- SOS-Nachricht aufzeichnen .....	39
- SOS Textnachricht .....	39
- Hinzufügen eines Notrufarmbands .....	39
- Batterie austauschen .....	40
- Reichweite .....	40
<b>Technische Spezifikationen</b> .....	<b>41</b>
<b>Funktionen</b> .....	<b>42</b>
- Hauptfunktionen .....	42
<b>Fehlersuche</b> .....	<b>43</b>
<b>Sicherheitsinformationen</b> .....	<b>45</b>
<b>Hörgeräteinformationen</b> .....	<b>47</b>
<b>Netzwerk-Dienstleistungen</b> .....	<b>48</b>
<b>Garantie</b> .....	<b>49</b>
<b>Recycling-Richtlinien</b> .....	<b>50</b>

# Vor der ersten Verwendung

## Herzlichen Glückwunsch

---

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf unseres Produkts.

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, um alles über die verfügbaren Funktionen und die Funktionsweise Ihres Telefons zu erfahren. Dies wird Ihnen helfen, das Beste aus Ihrem neuen Telefon herauszuholen.



## Sicherheitsvorkehrungen

---

Um das Risiko von Stromschlägen und Verletzungen zu vermeiden, befolgen Sie bitte die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, bevor Sie das Telefon verwenden:

1. Lesen und befolgen Sie die Anweisungen in dieser Anleitung sorgfältig.
2. Das Telefon ist in der Lage, Töne auf eine hohe Lautstärke zu verstärken. Es ist wichtig, alle potenziellen BenutzerInnen in die ordnungsgemäße Bedienung einzuweisen. Es wird empfohlen, die Lautstärke bei Nichtgebrauch auf die niedrigste Stufe (Niedrig) einzustellen und andere BenutzerInnen darauf aufmerksam zu machen, dass bei unsachgemäßer Verwendung möglicherweise Gehörschäden auftreten können.
3. Trennen Sie beim Reinigen zunächst den Netzstecker des Telefons. Wischen Sie es anschließend mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine Flüssig- oder Aerosolreiniger.
4. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel, da dies zu Schäden führen kann.
5. Verwenden Sie dieses Telefon nicht in feuchten Umgebungen oder in Umgebungen, in denen Explosionsgefahr besteht.
6. Überlassen Sie die Wartung nur qualifiziertem Servicepersonal.
7. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.
8. Richten Sie das Telefon so ein, dass niemand auf das Kabel treten oder darüber stolpern kann.
9. Überlasten Sie Steckdosen oder Verlängerungskabel nicht, da dies die Gefahr von Bränden oder Stromschlägen erhöhen kann.
10. Stecken Sie niemals Gegenstände durch die Schlitze im Telefon. Sie könnten gefährliche Spannungspunkte berühren oder Teile kurzschließen, was zu einem Brand- oder Stromschlagrisiko führen kann.
11. Verschütten Sie niemals Flüssigkeiten jeglicher Art auf dem Telefon.

# Vor der ersten Verwendung

## Installation

---

### PACKUNGSINHALTE ÜBERPRÜFEN

Die Packung sollte folgendes enthalten:

- Hörer mit Spiralkabel und Telefonbasis
- 3,7 V, 900 mAh Li-Polymer-Akku
- Benutzerhandbuch
- Notrufarmband mit Batterie CR2025
- Netzteil (5V DC 2,0A, 10W)
- USB-Kabel vom Typ A auf Typ C (Länge 1,8 m)
- Wandhalterung

### STANDORT AUSWÄHLEN

Das Gerät sollte an einem Ort aufgestellt werden, an dem die visuelle Anzeige und das beleuchtete Display gut zu sehen sind.

Wählen Sie einen Ort, der Ihre Alltagsaktivitäten nicht einschränkt, damit Sie nicht dagegenstoßen oder die Gefahr besteht, über Kabel zu stolpern.

### AKKU EINSETZEN & NETZTEIL ANSCHLIESSEN

Zur Nutzung aller Funktionen, z.B. Freisprecheinrichtung und Verstärkung: Es ist wichtig, dass das Telefon über das Netzteil oder den Akku mit Strom versorgt wird.

Lösen Sie das Akkufach mit einem Schraubenzieher. Verbinden Sie den Akkustecker mit der Akkubuchse und achten Sie auf die richtige Polarität.


Verwenden Sie ausschließlich den mit dem Telefon gelieferten Akku. Schließen Sie den Akkufachdeckel.

Achten Sie darauf, dass das Telefon beim Einsetzen oder Austauschen des Akkus nicht an das Stromnetz angeschlossen ist.

**Akku schwach:** Wenn der Akku schwach ist, gibt das Telefon einen lauten **PIEPTON** von sich, zeigt „**Batterie schwach**“ im Display an und sendet eine SMS an die gespeicherte Telefonnummer. Bitte schließen Sie das USB-Typ-C-Netzteil an das Gerät an.

## Anschluss des Telefons

- Schließen Sie das Spiralkabel des Hörers an (RJ9-Anschluss) (1).
  - Stecken Sie Ihre **Nano-SIM**-Karte in den SIM-Steckplatz auf der Rückseite der Basis (2).
  - Lösen Sie den Deckel des Akkufachs mit einem Schraubenzieher und legen Sie den Akku ein. (3).
- Bei Stromausfall ist ein Akku für den Klingelton erforderlich.
- Lassen Sie das Akkufach wieder einrasten.
  - Schließen Sie das USB-Kabel (Stecker Typ A) an den Netzadapter an (4).
  - Schließen Sie das Adapterkabel (Stecker Typ C) an das Telefon an (5).
  - Schließen Sie den Adapter an Ihre Steckdose (\*) an (6).

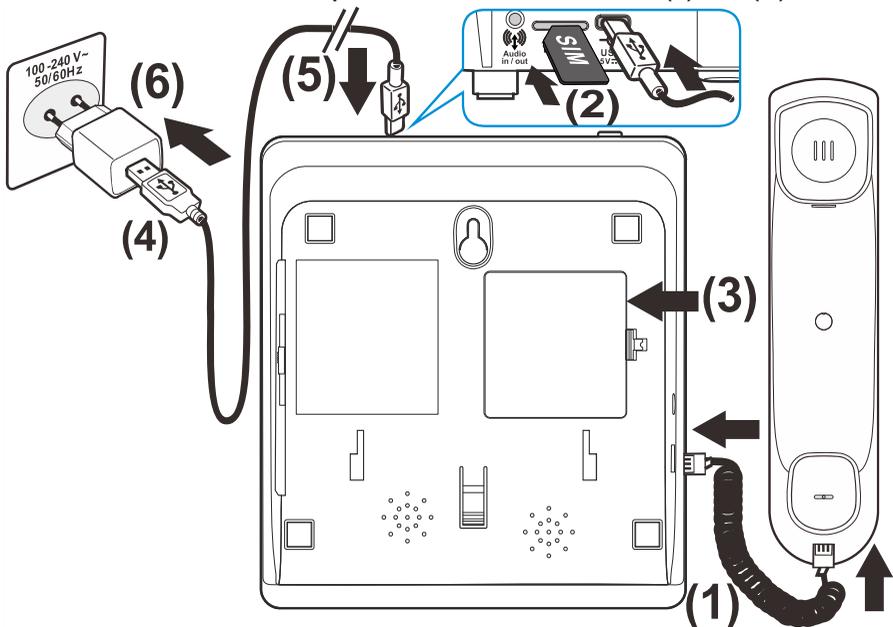

- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste (Stummschaltung) gedrückt, um das Telefon einzuschalten.


(\*) Gemäß der Norm EN62368-1 als „gefährliche Spannung“ eingestuft.

**Hinweis: Der wiederaufladbare Akku dient als Backup für den Fall eines Stromausfalls. Sie sollten deshalb unbedingt ein USB-Netzteil vom Typ C anschließen.**

# Vor der ersten Verwendung

## Wandhalterung

Das Telefon kann auch an der Wand montiert werden. Um das Telefon an der Wand zu befestigen, benötigen Sie zwei Schrauben.

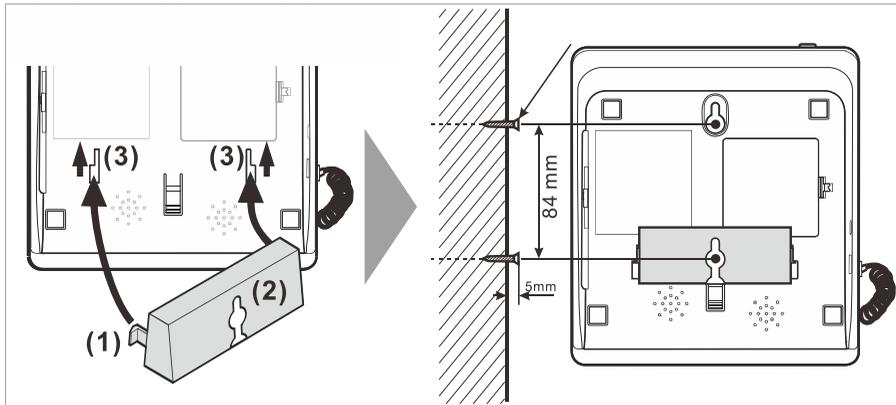


Schablone zur wandmontierbar

84 mm Führen Sie die Führungsglaschen (1) der Wandhalterung (2) in die Schlitze (3) auf der Rückseite des Telefons ein. Schieben Sie die Wandhalterung (2) 10 mm nach oben, bis sie hörbar einrastet.

**Achtung:** Stellen Sie sicher, dass sich unter der Wandoberfläche, an der Sie die Löcher bohren möchten, keine Kabel, Rohre usw. befinden.

Bohren Sie zwei Löcher mit einem vertikalen Abstand von **84 mm**, setzen Sie die Schrauben ein und lassen Sie sie **5 mm** aus der Wand herausragen.


Positionieren Sie das Telefon auf der Halterung, setzen Sie die Schrauben in die Schlitze ein und schieben Sie das Telefon ein wenig nach unten.

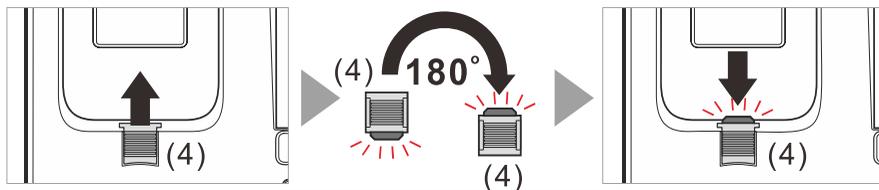

Drehen Sie den Hörerhaken (4) in der Hörerhalterung um 180°, damit der Hörer eingehängt werden kann.

# Vor der ersten Verwendung

## Aufbau des Telefons

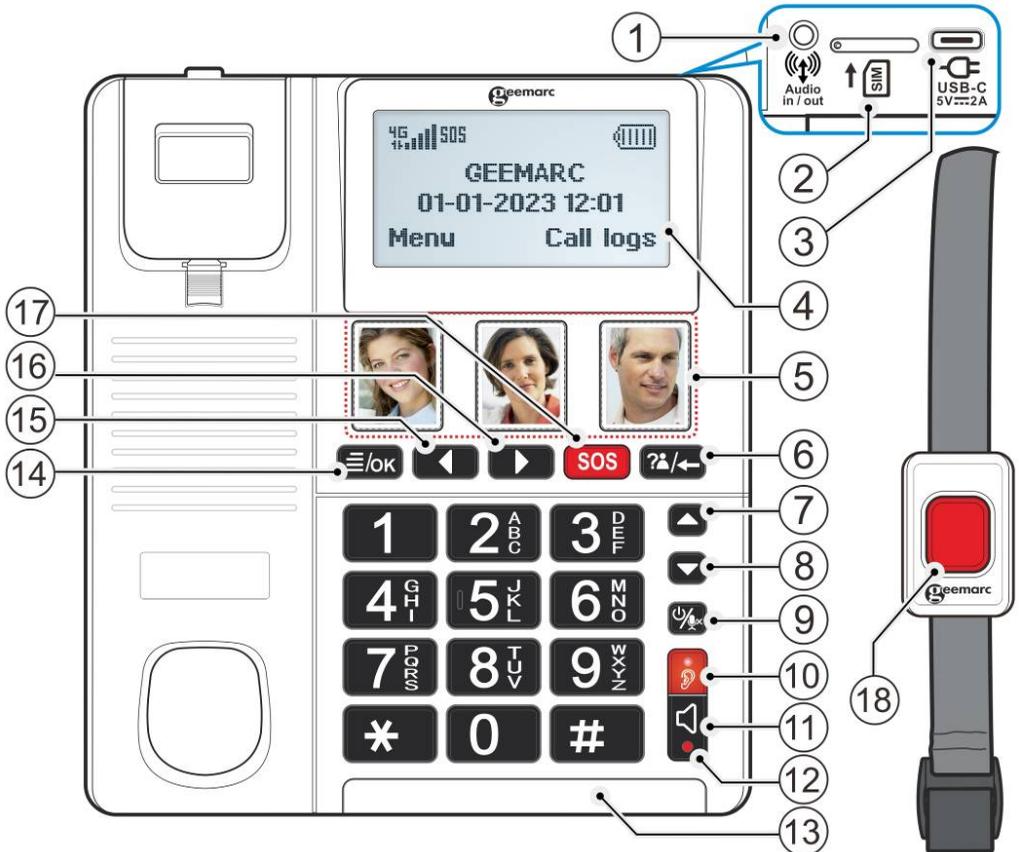

1. Audio-Ein-/Ausgang (Ø3,5mm)CTIA	10. Boost-Taste Hörerlautstärke +40dB
2. Nano-SIM-Kartensteckplatz	11. Freisprechfunktion
3. Netzteilanschluss (Typ-C)	12. Freisprechmodusanzeige
4. Bildschirm	13. LED-Anzeige für eingehenden Anruf/neuen Anruf
5. Fototasten (x3)	14. Menü / OK-Taste
6. Anrufprotokoll/Zurücktaste/Löschen	15. Links / Tel-Buch
7. Nach oben/Lautstärkeeinstellung	16. Rechts / SMS schreiben
8. Nach unten/Lautstärkeeinstellung	17. SOS-Taste
9. Ein-/Ausschalten(Stummschaltung)	18. Notrufarmband

# Vor der ersten Verwendung

## Beschreibung der Tasten

	Die 3 Bildtasten werden als Direktwahltasten verwendet.
	Drücken Sie diese Taste, um das <b>Menü</b> aufzurufen. Drücken Sie diese Taste, um auf die Funktion <b>BEARBEITEN</b> zuzugreifen, wenn Sie im Telefonbuchkontakt sind. Drücken Sie diese Taste, um auf die Funktion <b>LÖSCHEN</b> oder <b>ALLES LÖSCHEN</b> zuzugreifen, wenn Sie sich auf der <b>CID</b> -Nummer befinden. Drücken Sie <b>OK</b> , um Ihre Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie <b>OK</b> , um einen Anruf zu starten, wenn der Kontakt ausgewählt ist.
	<b>Anrufprotokolle / Zurücktaste / Löschen</b> Anrufprotokollliste, wie auf <b>Seite 24</b> beschrieben. Wenn Sie eine Telefonnummer wählen, drücken Sie diese Taste, um die letzte(n) Ziffer(n) zu löschen.
	<b>Links-/Rechts</b> -Tasten, Kurzbefehl im Standby-Modus: <b>Linke Taste:</b> Kontaktliste. <b>Rechte Taste:</b> SMS schreiben.
	Diese Taste dient zur Notrufwahl.
	Zum Auswählen oder Durchscrollen der Menüoptionen. <b>Verknüpfung:</b> Lautstärkeeinstellung
	<b>Ein-/Aus</b> -Taste, <b>Stummschalt</b> taste. Lange drücken, um das Telefon ein- und auszuschalten
	Wenn Sie diese Taste während eines Gesprächs drücken, aktivieren Sie die Boost-Funktion. Die LED leuchtet.
	<b>Freisprechfunktion/Anruf tätigen, annehmen, beenden</b> Wenn Sie diese Taste während eines Gesprächs drücken, aktivieren Sie die <b>Freisprechfunktion</b> (S. 25). Die LED leuchtet.


# Vor der ersten Verwendung

	<b>Rautetaste</b> Drücken Sie diese Taste, um zwischen verschiedenen Eingabemodi zu wechseln, während Sie eine Textnachricht verfassen oder einen Kontaktnamen bearbeiten. Im Standby-Modus gedrückt halten, um den Stummschaltungsmodus zu aktivieren / deaktivieren.
	<b>Sternchentaste</b> Drücken Sie diese Taste, um ein oder mehrere Symbole einzufügen, während Sie eine Nachricht verfassen oder den Namen eines Telefonbucheintrags bearbeiten. (Weitere Einzelheiten finden Sie unter <b>S.22: Sternchentaste</b> ).

**Hinweis:** Die **Menütaste (OK)**  und die **Anrufprotokolltaste (Zurücktaste)**  funktionieren auch als Softkeys, d. h. sie übernehmen je nach angezeigtem Menü unterschiedliche Funktionen. Die aktuelle Funktion wird immer in der unteren linken und rechten Ecke des Displays angezeigt.

## LCD-Bildschirm

Der LCD-Bildschirm ist in drei verschiedene Bereiche unterteilt:

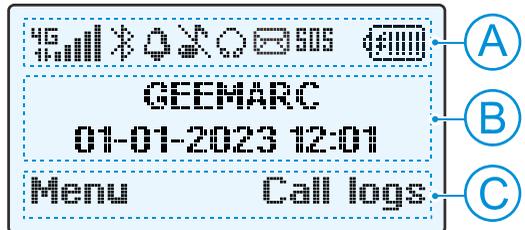

**A Der Symbolbereich (Statusleiste).** Diesen finden Sie oben auf dem Bildschirm. Hier werden die verschiedenen Systemsymbole angezeigt, die Ihnen bei der Bedienung des Telefons helfen.

**B Der Hauptbereich.** Dieser befindet sich in der Mitte des Bildschirms. Es wird Folgendes angezeigt:

- Gewählte Nummer
- Anrufer-ID-Informationen
- Telefonbuch
- Menüinformationen
- Im Standby-Modus aktuelle Uhrzeit, Datum und Name des Diensteanbieters.

**C Der Softkey-Bereich.** Diesen finden Sie am unteren Bildschirmrand.

# Vor der ersten Verwendung

	<b>Signalstärke-Symbol</b> Dies wird immer angezeigt, wenn Ihr Telefon eingeschaltet ist. Es zeigt die aktuelle Signalstärke an. Mehr Balken bedeuten eine höhere Signalstärke. Es wird ein Symbol pro SIM angezeigt. „E“ steht für das 2G Netzwerk.
	<b>VoLTE</b> Sie sind im 4G-Netz und können gut telefonieren. „E“ steht für das 2G Netzwerk.
	<b>Alarm-Symbol</b> Der Alarm wurde so eingestellt, dass er zu einer bestimmten Zeit klingelt.
	<b>Batteriestatus-Symbol</b> Dies wird immer angezeigt, wenn Ihr Telefon eingeschaltet ist. Es zeigt den Ladezustand des Akkus an. Mehr Balken bedeuten mehr Akkuladung.
	<b>Roaming-Symbol</b> Es findet ein Roaming-Anruf statt, also ein Auslandsgespräch – ausgehend oder eingehend.
	<b>SMS-Symbol</b> Eine neue SMS (Textnachricht) wurde empfangen.
	<b>Lautlos-Symbol</b> (drücken und halten Sie die #-Taste zum Aktivieren / Deaktivieren gedrückt) Das Telefon befindet sich im Lautlosmodus. Es erfolgt keine Anrufbenachrichtigung.
	<b>Headset-Symbol:</b> Das Headset ist angeschlossen.
	<b>Bluetooth-Symbol:</b> Bluetooth ist eingeschaltet.
	<b>Ohr-Symbol:</b> Boost-Funktion ist aktiviert.
	<b>Verpasster Anruf</b>
	<b>Während eines Gesprächs:</b> Sie sind in der Leitung.
	<b>SOS ist AN</b>
	<b>Nur Netzteil wird verwendet</b>  <b>Nur Batterie wird verwendet</b>
	<b>Batterie wird aufgeladen</b> /  <b>Batterie ist vollständig aufgeladen</b>

## Telefoneinstellungen

---

### Zeit und Datum

Uhrzeit und Datum sind von Ihrem Dienstanbieter voreingestellt. Sie können sie jedoch wie folgt manuell ändern.

- Drücken Sie die **Menü/OK-Taste** , um die Hauptmenüliste anzuzeigen.
- Drücken Sie die  Tasten, um zu **Einstellungen** →  → **Telefoneinstellungen** →  → **Uhrzeit und Datum** zu gelangen und drücken Sie , um zu **Uhrzeit einstellen** zu gelangen.
- Drücken Sie die  Taste zweimal, geben Sie die korrekten Stunden und Minuten über die Tastatur ein und drücken Sie dann  .
- Drücken Sie die  Taste, um zu **Datum einstellen** zu gelangen, drücken Sie die  Taste, geben Sie mit den Tasten  oder  den richtigen Tag, Monat und Jahr ein und drücken Sie  .
- Drücken Sie die  Taste, um zum **Zeitformat** zu wechseln. Drücken Sie die  Taste , verwenden Sie die Taste  oder , um zum gewünschten Datumsformat **12 Stunden** oder **24 Stunden** zu gelangen, und drücken Sie dann  .
- Drücken Sie die  Taste, um zum **Datumsformat** zu wechseln. Drücken Sie die  Taste, verwenden Sie die Taste  oder , um zum gewünschten Datumsformat **Jahr-Monat-Tag/Monat-Tag-Jahr** oder **Tag-Monat-Jahr** zu gelangen und drücken Sie dann  .
- Drücken Sie die  Taste, um zu **Zeiteinstellungen aktualisieren** zu gelangen. Drücken Sie die  Taste. Gehen Sie mit der Taste  oder  zu **Zeit automatisch aktualisieren** oder **Zeit manuell aktualisieren** und drücken Sie dann  .
- Drücken Sie die Taste , um den Vorgang zu beenden.
- Drücken Sie die Taste , um das Menü zu verlassen.

**Hinweis: Wenn Sie die Funktion CID in Ihrem Netzwerk haben, werden Datum und Uhrzeit beim ersten Anruf automatisch eingestellt.**

### Sprache

Menu/OK  → Settings → Phone settings → language

# Einstellungen

Der/Die BenutzerIn kann die Sprache ändern. Es stehen 12 Sprachen zur Verfügung: (Englisch / Französisch / Deutsch / Spanisch / Portugiesisch / Arabisch / Niederländisch / Italienisch / Hebräisch / Russisch / Polnisch / Tschechisch).

## Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Der / Die BenutzerIn kann das Telefon auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Dafür ist ein Passwort erforderlich, es lautet: **1-2-3-4**.

## Anrufeinstellungen

---

Menü/OK /OK → Einstellungen → /OK → Anrufeinstellungen

### Voicemail-Server

Mit der Voicemail-Funktion können Sie alle Voicemail-Nachrichten abhören, die andere für Sie hinterlassen haben.

Die Voicemailbox ist ein Netzwerkdienst, den Sie möglicherweise abonnieren müssen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Dienstanbieter.

Wenn Ihr Dienstanbieter Ihnen Zugriff auf die Voicemail gewährt, ist die Telefonnummer, über die Sie auf das Voicemail-System zugreifen, normalerweise auf Ihrem Telefon eingerichtet. Ist dies nicht der Fall, können Sie hier Ihre Voicemail-Nummer manuell eingeben.

Im Standby-Modus können Sie auf die Voicemail zugreifen, indem Sie die „1“ gedrückt halten. Sie werden mit der Voicemail verbunden.

### Anruf umleiten

Eingehende Anrufe können an eine bestimmte Telefonnummer (im Allgemeinen Voicemail-Nummer) umgeleitet werden. Mit dieser Funktion stehen 5 Optionen zur Verfügung:

- **Alle umleiten:** Die Anrufumleitung wird auf alle eingehenden Anrufe angewendet.
- **Bei Besetzt:** Die Anrufumleitung wird auf alle eingehenden Anrufe angewendet, wenn Ihre Leitung besetzt ist.
- **Wenn keine Antwort:** Die Anrufumleitung wird auf alle eingehenden Anrufe angewendet, wenn Sie den Anruf nicht entgegennehmen.
- **Bei Nichterreichbarkeit:** Die Anrufumleitung wird auf alle eingehenden Anrufe angewendet, wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist oder Sie sich nicht in einem Versorgungsgebiet befinden.
- **Alle Umleitungen aufheben.**

### Anruf in der Warteschleife

Dies kann aktiviert oder abgebrochen oder der Status überprüft werden. Bitte prüfen Sie, ob dieser Dienst bei Ihrem Dienstanbieter verfügbar ist.

## Anruf gesperrt

Hier gibt es verschiedene Einstellungen:

**Anruf Sperre:** Ein- und ausgehende Anrufe zu und von Ihrem Telefon können eingeschränkt werden. Mit dieser Funktion stehen 4 Optionen zur Verfügung:

- **Alle ausgehenden Anrufe:** Es können keine ausgehenden Anrufe getätigt werden.
- **Alle eingehenden Anrufe:** Es können keine eingehenden Anrufe empfangen werden.
- **Eingehende Anrufe beim Roaming**
- **ISD-Anrufe:** Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle ausgehenden internationalen Anrufe blockiert. (Passwort ist 0000).
- **Wählen während des INTL-Roaming:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, können während des Roamings keine ausgehenden Anrufe getätigt werden (Passwort ist 0000).
- **Alle Sperren aufheben.**

## SMS-Antwort nach Anrufablehnung:

Wenn Sie die Option auf EIN setzen und der/die BenutzerIn den eingehenden Anruf ablehnt, zeigt das Display „1 verpasster Anruf“ an, um Sie darüber zu informieren, dass Sie einen Anruf verpasst haben. Wählen Sie **BEENDEN**, dann wird **Antworten** angezeigt. Klicken Sie auf **OK**, dann können Sie als Antwort eine Muster-SMS-Nachricht senden.

## Anrufzeit-Minuten-Erinnerung

Wenn Sie die Option auf **EIN** setzen, gibt das Telefon entsprechend Ihrer Einstellung einen Piepton ab. Sie können die Einstellung anpassen, wenn Sie daran erinnert werden möchten, wie lange Sie schon telefoniert haben. Sie haben die Möglichkeit, **AUS, 50, 55, 60** Sekunden einzustellen oder diese Zeit individuell anzupassen.

## Display

---

Menü/OK  → Einstellungen → Display

### Kontrast

- Verwenden Sie die **Links-**  / **Rechts-**  Tasten, um zum gewünschten Kontrast zu gelangen und drücken Sie dann zur Bestätigung **Menü/OK** .

### Hintergrundbeleuchtung

Automatische Abschaltzeit der Hintergrundbeleuchtung (15 Sek. / 30 Sek. / 1 Min. / 5 Min.), Standardeinstellung ist 15 Sekunden.

# Einstellungen

- Verwenden Sie die **Aufwärts-** / **Abwärts-** Tasten, um zur gewünschten Zeit zu gelangen und drücken Sie dann zur Bestätigung **Menü/OK**.
- Drücken Sie die  Taste, um den Vorgang zu beenden.

## Sicherheit

---

**Menü/OK** → **Einstellungen** →  → **Sicherheit**

### PIN

Mit diesem Mobiltelefon können Sie einen PIN-Code einrichten, um Ihr Telefon vor unbefugter Nutzung zu schützen.

Die PIN- und PIN2-Codes werden mit Ihrer **SIM-Karte** geliefert. Der PIN-Code hilft, die SIM-Karte vor unbefugter Nutzung zu schützen. Für den Zugriff auf bestimmte Dienste ist der PIN2-Code erforderlich.

Die Codes **PUK (PIN)** und **PUK2 (PIN2)** können mit der SIM-Karte geliefert werden. Wenn Sie den PIN-Code dreimal hintereinander falsch eingeben, wird der PUK benötigt. Wenn die Codes nicht bereitgestellt werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.

### Schwarze Liste

Die Möglichkeit, Nummern mit Ausnahme der SOS-Nummern abzulehnen und auf die schwarze Liste zu setzen.

- **Schwarze Liste:** Wählen Sie **Schwarze Liste** und dann **Optionen**, verwenden Sie die Tasten  und , um **Neu** auszuwählen (geben Sie den Namen und die Telefonnummer ein) oder **Kontakte importieren** und drücken Sie dann  zur Bestätigung.
- Wählen Sie Ihren Kontakt in der Liste aus und drücken Sie dann  zur Bestätigung.
- Wählen Sie **Markieren** und drücken Sie dann  zum Bestätigen.
- Wählen Sie **Optionen** und drücken Sie dann .
- Drücken Sie die  Taste, um den Vorgang zu beenden.

**Hinweis:** Sie haben optional die Möglichkeit, einen Kontakt oder alle Kontakte der schwarzen Liste zu löschen oder zu bearbeiten.

## Verbindung

---

**Menü/OK**  **→ Einstellungen → OK → Verbindung**

Sie haben die Möglichkeit, den **Datendienst** oder das **Datenroaming** einzustellen.

**Netzauswahl:** Sie haben die Möglichkeit, Ihren Netzbetreiber auszuwählen.

**Netzwerktyp:** Wählen Sie den Netzwerktyp aus.

**Volte:** Voice over Long-Term Evolution, diese Funktion dient zum Telefonieren in 4G-Qualität.

## Version

---

**Menü/OK**  **→ Einstellungen → OK → Version**

Hier wird die Hardware- und Softwareversion angezeigt. Normalerweise ist dieser Bereich für die technische Serviceabteilung bestimmt.

## LED-Anzeige

---

**Menü/OK**  **→ Einstellungen → OK → LED-Schalter**

Sie haben die Möglichkeit, die LED-Anzeige ein- oder auszuschalten, um Sie über eine neue Nachricht oder einen neuen Anruf zu informieren.

## Niedriger Batteriestand SMS

---

**Menü/OK**  **→ Einstellungen → OK → Niedriger Batteriestand SMS**

Wenn Sie diese Funktion aktiviert haben, erhält die von Ihnen festgelegte Telefonnummer zwei SMS: eine, um Sie darüber zu informieren, dass der Akku fast leer ist, und eine zweite eine Stunde später.

In diesem Fall müssen Sie noch einmal überprüfen, ob das Netzteil richtig angeschlossen ist oder warten, bis der Stromausfall behoben ist.

# Einstellungen

## Boost-Einstellung

---

Menü/OK  / OK → Einstellungen → OK → Boost-Einstellung

In diesem Menü können Sie den Ton Ihres Hörers einstellen und die Verstärkung automatisch aktivieren oder deaktivieren.

### Tonsteuerung:

Sie können aus drei Möglichkeiten auswählen: **Normal**, **Mittel** und **Hoch**.

Wenn Sie **Hoch** wählen, erhöhen Sie die hohen Frequenzen, wenn Sie **Bass** wählen, erhöhen Sie die niedrigen Frequenzen.

Während Ihres Anrufs können Sie Ihre Einstellung mit den Tasten **Links** () / **Rechts** () ändern. Auf dem Display sehen Sie die von Ihnen gewählte Klangregelungsposition.

Die Klangmodifikationen werden nur aktiviert, wenn die Boost-Funktion aktiviert ist.

### Automatische Aktivierung der Boost-Funktion

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird die Verstärkung jedes Mal automatisch aktiviert, wenn Sie ein Gespräch mit dem Hörer führen.

## Weitere Einstellungen

---

### • Kurztaste

Durch Drücken einer Kurztaste haben Sie direkten Zugriff auf die folgenden Funktionen:

Pfeil nach oben : **Lautstärkeanpassung (Profile)**

Abwärtspfeil : **Lautstärkeanpassung (Profile)**

Pfeil nach rechts : **SMS schreiben**

Pfeil nach links : **Kontaktliste**

### • Lautlos-Modus

Halten Sie die  Taste gedrückt, um den Lautlosmodus im Standby-Modus zu aktivieren. Wenn der Stummschaltungsmodus aktiviert ist, wird das **Stummschaltungsmodus-Symbol**  angezeigt.

Halten Sie die Taste  gedrückt, um den Stummschaltungsmodus zu deaktivieren.

Im Menü Profile können Sie z.B. die Lautstärke des Alarms, des Klingeltons und des Gesprächs einstellen:

## Klingeltoneinstellungen

- Eingehender Anruf
- Nachricht / SMS
- Sprachausgabe / Sprachansage CID

## Lautstärkeinstellungen Klingelton

- Eingehender Anruf
- Nachricht / SMS
- Alarm
- Lautsprecher
- Empfangslautstärke Hörer
- Sprechende Tastatur
- AN- / AUS Ton

## Weitere Alarmtöne

- Warnung bei niedrigem Akkustand

## Klingeltoneinstellungen

---

Sie haben die Möglichkeit, Ihren Klingelton für eingehende Anrufe oder eingehende Nachrichten sowie die CID Sprachansage auszuwählen.

### • Klingelton für eingehende Anrufe

Menü/OK /OK → Profile → Klingeltoneinstellungen → Klingelton eingehende Anrufe

Wählen Sie mit den Tasten  und  den gewünschten der 10 Klingeltöne aus, die Sie beim Ändern hören können und drücken Sie dann /OK zum Bestätigen.

### • Klingelton für Nachrichten

Menü/OK /OK → Profile → Klingeltoneinstellungen → Klingelton Nachrichten

Verwenden Sie die Tasten  und , um den gewünschten Nachrichten Klingelton aus den 6 auszuwählen, die Sie beim Ändern hören können und drücken Sie dann /OK zum Bestätigen.

### • Sprachansage Tastatur

Menü/OK /OK → Profile → OK → Klingeltoneinstellungen → OK → CID Sprachansage

# Profile

Wenn diese Funktion aktiviert ist und Sie die Zifferntasten auf der Tastatur drücken, sagt das Telefon die von Ihnen gedrückten Nummern an.

Wenn Sie einen Anruf erhalten, sagt das Telefon deren Telefonnummer an.

## Lautstärke anpassen

---

Menü/OK  → Profile → Lautstärke ändern

oder verwenden Sie die oben genannte Kurztaste , um auf die verschiedenen Funktionen unten zuzugreifen.

Sie können folgende Einstellungen vornehmen:

- **Klingelton für eingehende Anrufe:** Lautstärke für den Klingelton für eingehende Anrufe einstellen.
- **Klingelton für Nachrichten:** Klingelton einstellen, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten.
- **Klingelton für Alarmer:** Klingelton für Ihre Alarmer einstellen.
- **Lautsprecherlautstärke:** Lautstärke der Lautsprecher einstellen.
- **Hörer-Lautstärke:** Empfangslautstärke für den Hörer einstellen.
- **An-/Aus-Klingelton:** Einstellen der Lautstärke des AN-/AUS-Tons.
- **Sprechende Tasten:** Lautstärke der Stimme einstellen, wenn Sie eine Taste drücken.

### **Hinweis:**

- *Benutzen Sie die **Links** () / **Rechts** () Taste, um das gewünschte Level einzustellen und drücken Sie zum Bestätigen auf .*
- *Die Position 0 dient zum Stummschalten der Lautstärke.*

**Während eines Gesprächs:** Der/Die BenutzerIn kann die **Lauter- oder Leiser-Taste** ( und ) drücken, um die Lautstärke des **Hörers** oder des **Lautsprechers** (wenn der Anruf im Freisprechmodus erfolgt) zu ändern.

## Weitere Alarmtöne.

---

Menü/OK  → Profile → Klingeltoneinstellungen → weitere Alarmtöne

- **Niedriger Akku:** Wenn der Akku fast leer ist, sendet das Telefon einen Alarmton.

## Ausgehende Anrufe

---

1. Wählen Sie die Nummer. Auf dem Display wird die von Ihnen gewählte Nummer angezeigt und gesprochen (falls aktiviert). Drücken Sie die Taste  (**Anrufprotokoll / Zurücktaste / Löschen**), um eine falsche Ziffer zu löschen.
2. Nehmen Sie den Hörer ab **oder** Drücken Sie die **SPK-Taste**  (SPK LED ist AN).
3. Anschließend wird Ihre eingegebene Rufnummer angewählt.

### **ODER**

Nehmen Sie den Hörer ab **oder** drücken Sie die **SPK-Taste** und geben Sie dann die Nummer ein, die Sie wählen möchten.

***Hinweis:** Während des Wählens der Nummer können Sie den Hörer wieder auf die Gabel legen oder die **SPK-Taste**  erneut drücken, um den Wählvorgang zu beenden.*

### **Sternchentaste \***

Drücken Sie diese Taste, um ein oder mehrere Symbole einzufügen, während Sie eine Nachricht verfassen oder den Namen eines Kontakteintrags bearbeiten. Navigieren Sie dann mit den Navigationstasten zu den Symbolen, die Sie einfügen möchten.

Wenn Sie eine Telefonnummer bearbeiten möchten, drücken Sie diese Taste, um Sonderziffern einzufügen (z.B. **\*** / **+** / **P**(Pause) / **W**).

Um einen internationalen Anruf zu tätigen, müssen Sie vor der Landesvorwahl **+** drücken. Drücken Sie einfach zweimal die **\*-Taste**.

Einige ausländische Telefonnetze verfügen über Durchwahlen, die nicht als Durchwahl gewählt werden können, sondern über die Tastatur eingegeben werden müssen. Um diese direkt anzurufen, drücken Sie nach der Rufnummer dreimal kurz hintereinander **\***. Das **P**-Zeichen erscheint und Sie können dann die Durchwahl eingeben.

### **Rautetaste #**

Drücken Sie diese Taste, um zwischen verschiedenen Eingabemodi zu wechseln, während Sie eine Textnachricht verfassen oder einen Kontaktnamen bearbeiten.

# Nutzung des Telefons

## Eingehender Anruf & Anruf empfangen (CID)

Wenn ein Anruf eingeht, sagt das Telefon die Nummer des Anrufers an (sofern die Funktion „CID Sprachansage“ aktiviert ist), klingelt und die LED-Anzeige unten blinkt.



- \* Gehen Sie auf **Menü/OK**  → **Profile** → **Klingeltoneinstellung** → **Sprachansage** um die CID-Sprachfunktion zu aktivieren.
- \* Gehen Sie auf **Menü/OK**  → **Einstellungen** → **LED-Schalter**, um die LED-Anzeige ein- oder auszuschalten.

1. Um einen Anruf anzunehmen, heben Sie den Hörer ab, drücken Sie auf SPK-Taste  oder drücken Sie die Taste auf dem Notrufarmband und sprechen Sie. Wenn Sie die SOS-Taste auf dem Notrufarmband drücken, befindet sich Ihr Telefon im Freisprechmodus.
2. Passen Sie die Lautstärke bei Bedarf an, indem Sie die Taste  oder  drücken.
3. Um einen Anruf zu beenden, legen Sie das Mobilteil auf die Basisstation oder drücken Sie .

Sie können auch die SOS-Taste auf dem Notrufarmband drücken, um den Anruf nur über die Freisprecheinrichtung zu beenden.

## Kontakt anwählen

**Menü/OK**  → **Tel-Buch** → **OK**  oder **linke Kurztaste**

Gehen Sie mit den **Auf-**  und **Ab-**  Tasten zur gewünschten Kontaktnummer, die Sie anrufen möchten oder drücken Sie auf die ersten Buchstaben Ihres Kontaktnamens. Zum Beispiel wäre auf der Taste 3 ein Mal Drücken für einen Kontakt mit D.

Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die SPK-Taste  (die LED der SPK-Taste leuchtet).

## Direktwahltasten

Sie können den Zifferntasten 2–9 Telefonnummern zuweisen. Wenn die Telefonnummer unter 2–9 gespeichert ist, können Sie durch Drücken und Halten von 2–9 im Standby-Modus die Nummer wählen, die im Kurzwahlspeicher gespeichert ist.

Um eine Direktwahltaste zu speichern, gehen Sie auf **Seite 28 (Nummer auf Direktwahl-oder Fototaste speichern)**.

## Anruf mit Fototaste

Sie können den Telefontasten (**M1-M3**) eine Telefonnummer zuweisen. Wenn Sie im Standby-Modus die Fototaste gedrückt halten, wird die Nummer gewählt, die auf der Fototaste gespeichert ist.



Um eine Fototaste zu speichern, gehen Sie auf **Seite 28 (Nummer auf Direktwahl-oder Fototaste speichern)**.

## Wählen einer Nummer aus der Wahlwiederholungsliste

**♀/◀ (Anrufprotokolle) → Gewählte Anrufe → OK (☰/ok)**

Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Nummern aus, die gewählt wurden (**Gewählte Anrufe**) und drücken Sie dann die **SPK-Taste** **📞** oder nehmen Sie den Hörer ab.

## Wählen einer Nummer aus der Liste verpasster Anrufe

**♀/◀ (Anrufprotokolle) → Verpasste Anrufe → OK (☰/ok)**

Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Ihren Kontakt anzuzeigen und zu finden und drücken Sie dann die **SPK-Taste** **📞** oder nehmen Sie den Hörer ab.

## Wählen einer Nummer aus der Liste empfangener Anrufe

**♀/◀ (Anrufprotokolle) → Empfangene Anrufe → OK (☰/ok)**

Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Ihren Kontakt anzuzeigen und zu finden und drücken Sie dann die **SPK-Taste** **📞** oder nehmen Sie den Hörer ab.

## Mikrofon stummschalten

Während eines Gesprächs können Sie das Mikrofon Ihres Telefons vorübergehend stummschalten. Der andere Teilnehmer kann Sie dann nicht mehr hören.

**Um Ihr Mikrofon stummzuschalten**, drücken Sie die **📞** Taste. Ihr Mikrofon ist stumm. Auf dem Display wird die Meldung Stummschaltung aktiviert angezeigt.

**Um die Stummschaltung Ihres Mikrofons aufzuheben**, drücken Sie erneut die **📞** Taste. Sie können Ihr Gespräch mit dem Anrufer fortsetzen.

# Nutzung des Telefons

## Verwendung der Verstärkerfunktion

---

Sie können die Lautstärke entsprechend Ihren eigenen Höranforderungen erhöhen. Mit der Taste **+40 dB**  (**Boost**) Taste können Sie die Extraempfangsfunktion während des Gesprächs aktivieren oder deaktivieren.

Wenn die Funktion aktiviert ist, leuchtet das rote Licht auf der Taste  (**Boost**). Das Boost-Symbol  wird auf dem Bildschirm angezeigt.

**ACHTUNG: Dieses Telefon kann sehr hohe (laute) Geräuschpegel erzeugen. Die wiederholte Belastung durch Verstärkungspegel über 18 dB kann auch für Menschen ohne Hörverlust gesundheitsgefährdend sein. Stellen Sie den Lautstärkeregler nach dem Telefonieren immer auf die minimale Einstellung ein.**

## Verwendung des Telefons mit Hörgeräten

---

Ihr Telefon kann mit Hörgeräten verwendet werden, die mit einer Telefonspule (T-Spule) ausgestattet sind. Stellen Sie Ihr Hörgerät auf die **T-Position** ein. Achten Sie darauf, dass Sie den Hörer nah an Ihr Hörgerät halten.

## Freisprechfunktion

---

Während eines Anrufs können Sie die im Telefon integrierte Freisprecheinrichtung einschalten. In diesem Modus können Sie den Komfort der Freisprechfunktion genießen.

**Um den Lautsprecher einzuschalten**, drücken Sie während eines Anrufs die  Taste und legen dann den Hörer auf die Basisstation.

Das rote LED-Symbol  ist aktiviert.

**Um den Lautsprecher auszuschalten**, nehmen Sie einfach den Hörer ab und Sie können über den Hörer weitersprechen. Das LED-Symbol  erlischt.

## Anpassung der Lautsprecherlautstärke

Im Lautsprechermodus können Sie die Lautsprecherlautstärke durch Drücken der  oder  Taste anpassen.

## Tonresonanz

---

Wenn die Verstärkung während des Anrufs aktiviert ist, können Sie die Tonresonanz mit den Tasten **Links** () / **Rechts** () ändern.

## Telefonbuch

Telefonnummern und Namen können im Telefonbuch gespeichert werden. Diese werden sowohl auf der SIM-Karte, als auch im Telefonspeicher gespeichert. Das ermöglicht Ihnen, häufig verwendete Nummern zu speichern, sodass Sie problemlos einen Anruf tätigen können, ohne sich die Telefonnummer merken oder eingeben zu müssen. Sie können Nummern suchen und aufrufen, um einen Anruf zu tätigen, eine Nachricht zu senden oder einen Eintrag als Notfallkontakt zu verwenden. Das Telefonbuch kann mindestens **500** Einträge enthalten. Sollten Sie versuchen, einen neuen Eintrag hinzuzufügen, wenn der Speicher voll ist, wird eine Warnmeldung angezeigt. Um die neue Telefonnummer hinzuzufügen, müssen Sie einen vorhandenen Eintrag löschen. Die im SIM-Kartenspeicher gespeicherten Kontakte werden durch das **SIM**-Symbol angezeigt. Der Vorteil der Speicherung auf der SIM-Karte besteht darin, dass Sie die Daten auf ein anderes Telefon übertragen können.

## Telefonbucheintrag erstellen

1. **Menü**  → **Tel-Buch** → **OK**  → **Optionen** → **Neu**
2. **OK**  → **SIM** oder **Telefon**, dann auf **OK**  drücken.
3. Drücken Sie unter **Name** auf **OK** , um **Bearbeiten** auszuwählen. Erstellen Sie mit dem Ziffernblock (siehe unten) einen Namen (maximal 15 Zeichen) für den Telefonbucheintrag und drücken Sie , um den Namen zu bestätigen.

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
*	0	#
4. Drücken Sie die **Abwärtstaste** , um **Nummer** auszuwählen und drücken Sie dann **OK** . Geben Sie eine Nummer (maximal 20 Ziffern) für den Telefonbucheintrag ein und drücken Sie , um die Nummer zu bestätigen.
5. Drücken Sie die **Abwärtstaste** , um **Voreingestellter Klingelton** auszuwählen, drücken Sie dann **OK** , wählen Sie **BEARBEITEN** und drücken Sie dann **OK** . Weisen Sie einen bestimmten Klingelton zu, indem Sie diesen aus der Liste der verfügbaren **Klingeltöne** auswählen. Sie haben die Möglichkeit, einen Audiodateinamen auszuwählen oder Ihrem Kontakt einen Audiodateinamen zuzuweisen.

# Telefonbuch

6. Drücken Sie die **OK**-Taste , drücken Sie die **Abwärtstaste** , um **SPEICHERN** auszuwählen und drücken Sie dann zur Bestätigung **OK** .

Auf den Tasten des Ziffernblocks sind auch Zeichen aufgedruckt. Diese Zeichen werden zum Eingeben eines Textes, zum Eintragen und Ändern der Telefonbucheinträge, zum Verfassen von SMS-Texten und zum Suchen nach einem Eintrag im Telefonbuch verwendet.

Drücken Sie jede Taste entsprechend oft, um den gewünschten Buchstaben zu erhalten, z.B. um den Buchstaben J zu erhalten, drücken Sie einmal die Taste **5**, um den Buchstaben S zu erhalten, drücken Sie die Taste **7** viermal schnell hintereinander.

Um zum nächsten Buchstaben zu gelangen, warten Sie eine Sekunde bis der Cursor | nach dem letzten von Ihnen eingegebenen Buchstaben erscheint. Sie können nun den nächsten Buchstaben eingeben. Um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln, verwenden Sie die **#**-Taste. Der Eingabemodus wird auf dem Display angezeigt. Wählen Sie mit der Auf- oder Ab-Taste den Eingabemodus aus und drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.

Drücken Sie **0**, um ein Leerzeichen einzufügen.

Drücken Sie die **LÖSCHEN**-Taste (**Zurücktaste**) , um das letzte eingegebene Zeichen zu löschen, während Sie eine Telefonnummer oder einen Namen eingeben. Halten Sie den Softkey **LÖSCHEN** (**Zurücktaste**)  gedrückt, um die Eingabe auf dem Display zu löschen.

## Telefonbucheintrag anzeigen

---

1. Menü  → **Tel-Buch** → Menü  oder drücken Sie direkt die Kurztaste , um auf die Kontaktliste zuzugreifen.
2. Scrollen Sie mit  und  durch die Liste, bis Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben oder suchen Sie alphabetisch nach einem Kontakt. Geben Sie einfach das erste Zeichen des Namens ein und Sie werden automatisch im richtigen Teil des Telefonbuchs positioniert.

## Optionen im Telefonbuch

---

1. Menü  → **Tel-Buch** → **OK**  oder drücken Sie direkt die Kurztaste , um auf die Kontaktliste zuzugreifen.
2. Scrollen Sie mit  und  durch die Liste, bis Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben.
3. Drücken Sie die **OK**-Softtaste ().

4. Für diesen Kontaktdatensatz stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Anruf
- Details
- Neu
- Kurzwahl oder Bilder
- Löschen
- Mehrere löschen
- Nachricht schreiben
- Kontakt kopieren
- Memory-Status

## Nummer auf Direktwahl-oder Fototaste speichern

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Nummer auf einer Direktwahl- oder Fototaste zu speichern:

1. **Menü/OK**  **OK**  → **Tel-Buch** → **OK**  → **Optionen-Softtaste**.
2. Wählen Sie das Element **Kurzwahl** und drücken Sie dann , um die Optionsliste aufzurufen: **M1, M2, M3 (3 Fototasten), 2–9**, verwenden Sie die Tasten  und , um **2–9** auszuwählen, **M1, M2 oder M3**.
3. Drücken Sie **OK**  → **Bearbeiten** → Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie dann **OK** .
4. Drücken Sie **Beenden**  .

***HINWEIS:** Sie können einem Telefonbucheintrag eine Kurzwahlnummer zuweisen. Das bedeutet, dass Sie jederzeit ganz einfach eine Telefonnummer wählen können, indem Sie die zugehörige Nummer drücken.*

1. **Menü/OK**  → **Tel-Buch** → **OK**  → **Optionen-Softtaste** → **Kurzwahl**
2. Wählen Sie entweder **2-9, M1, M2, M3**.
3. Drücken Sie **OK**  → **Bearbeiten** → **Tel-Buch**
4. Verwenden Sie die **Auf-**  und **Ab-**  Tasten, um einen Kontakt auszuwählen.
5. Drücken Sie **OK** , um die Telefonnummer anzuzeigen. Wenn alles richtig ist, drücken Sie zur Bestätigung **OK** .
6. Drücken Sie **Beenden**  .

## Nachricht (SMS)

---

Menü /OK → Nachrichten → Menü /OK

Wenn Sie eine SMS-Nachricht erhalten haben, wird auf dem Display ein Briefumschlagsymbol  angezeigt.



Die LED für neue Nachrichten blinkt ebenfalls (sie befindet sich etwa in der Mitte des Telefons)



**Hinweis:** Das Briefumschlagsymbol (und die LED Neue Nachricht/Anruf) werden so lange auf dem Display angezeigt, bis Sie die NEUEN SMS-Nachrichten gelesen haben.

## Nachricht senden

---

Eine Textnachricht über dieses Telefon kann bis zu 160 Zeichen inklusive Leerzeichen enthalten.

1. Menü /OK → Nachricht → OK → Nachricht schreiben → OK oder  Kurzwahltaste, dann **Nachricht schreiben** wählen.
2. Schreiben Sie Ihre Textnachricht (siehe Texteintrag auf **Seite 26: Telefonbucheintrag erstellen**).
3. OK /OK → Senden → Geben Sie die Nummer über die Tastatur ein oder drücken Sie OK , wählen Sie mit der  Taste **Tel-Buch** aus und drücken Sie dann die Taste /OK OK.
4. Verwenden Sie die Tasten  und , um einen Kontakt auszuwählen, drücken Sie **Optionen**, wählen Sie **Markieren** für einen einzelnen Kontakt oder wählen Sie **Alle markieren**, um alle Kontakte auszuwählen und drücken Sie dann die Taste OK .
5. OK /OK → Senden → OK

## Nachricht empfangen

---

Beim Empfang einer SMS ertönt ein Klingelton. Auf dem Bildschirm wird ein Briefumschlagsymbol  oder die Nachricht **1 neue Nachricht** angezeigt.

1. Drücken Sie die **LESEN**-Taste () , um die Nachricht anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Taste **OK** () , um alle verfügbaren Optionen anzuzeigen, die für diese ausgewählte Textnachricht ausgeführt werden können.
3. Diese Optionen sind:  
**Löschen, Antworten, Weiterleiten, Anrufen, Verschieben, Absender hinzufügen, Details**

## Gespeicherte Nachrichten (Posteingang)

---

1. **Menü**  → **Nachricht** → **Posteingang** → **OK** oder  Kurzwahltaste, dann **Posteingang** wählen.
2. Scrollen Sie zu der Nachricht, die Sie einsehen möchten.
3. Drücken Sie auf **Optionen**  → **Ansehen**, um die Nachricht einzusehen.

Sie können auch auf die folgenden Optionen zugreifen:

**Antworten, Löschen, Alle löschen, Weiterleiten, Anrufen, In Kontakten speichern, Wiederholte Nummern löschen, Zur Blacklist hinzufügen**

## Gesendete und gespeicherte Nachrichten (Postausgang)

---

Im Postausgang werden erfolgreich gesendete und gespeicherte zuzusendende Nachrichten angezeigt.

1. **Menü**  → **Nachricht** → **Postausgang** → **OK** oder  Kurzwahltaste, dann **Postausgang** wählen.
2. Scrollen Sie zu der Nachricht, die Sie einsehen möchten.
3. Drücken Sie **Optionen**  , um alle verfügbaren Optionen anzuzeigen, die für die ausgewählte Textnachricht ausgeführt werden können.
4. Diese Optionen sind:  
**Anzeigen, erneut senden, löschen, alle löschen.**

## Entwürfe

---

In Entwürfe werden Nachrichten gespeichert, die Sie gespeichert, aber noch nicht gesendet haben. Sie haben nun die Möglichkeit, die Nachricht zu senden, mit der Bearbeitung fortzufahren oder diese zu löschen.

1. **Menü**  → **Nachricht** → **Entwürfe** → **OK** oder  Kurzwahltaste, dann **Entwürfe** wählen.
2. Scrollen Sie zu der Nachricht, die Sie einsehen möchten.
3. Drücken Sie die **Optionstaste** () , um alle verfügbaren Optionen anzuzeigen, die für diese ausgewählte Textnachricht ausgeführt werden können.
4. Diese Optionen sind: **Löschen**, **Alle löschen** und **Bearbeiten**.

## Nachricht löschen

---

Sie können Nachrichten in **Posteingang**, **Postausgang**, **Entwürfe** oder **Gesendet** löschen.

1. **Menü**  → **Nachricht** oder  Kurzwahltaste.
2. Wählen Sie entweder **Posteingang**, **Entwürfe**, **Postausgang** oder **Gesendet** und dann → **OK**.
3. Drücken Sie **Optionen**  → **Löschen** oder **Alle löschen** → **OK**  → **OK**  zur Bestätigung.

## Vorlagen

---

Sie haben Zugriff auf eine Liste verschiedener aufgezeichneter Kurznachrichten, die Sie jederzeit verwenden können, wenn Sie SMS-Nachrichten schreiben.

Sie haben die Möglichkeit, wie folgt eine neue Kurznachricht in die Liste einzufügen:

1. **Menü**  → **Nachrichten** → **Vorlagen** → **OK** oder  Kurzwahltaste, dann **Vorlagen** wählen.
2. Scrollen Sie nach unten, bis Sie „Leer“ sehen, und drücken Sie dann auf **BEARBEITEN** .
3. Geben Sie Ihre Nachricht ein und drücken dann die Taste **OK** () , um Ihre neue Nachricht zu speichern.

## Broadcast-Nachrichten

---

Dieses Telefon unterstützt Broadcast-Nachrichten, d. h. Informationsdienste Ihres Diensteanbieters.

Menü  → Nachricht → Broadcast-Nachrichten → OK   
→ Einstellungen → Broadcast-Nachricht/Kanaleinstellungen  
/Sprachen auswählen

Sie können Optionen wie den Empfang dieser Nachrichten, die Sendesprache und die Kanaleinstellungen auswählen.

## Nachrichteneinstellungen

---

Servicecenter verteilen SMS-Nachrichten. In Ihrem Mobiltelefon muss die Rufnummer des Servicecenters einprogrammiert sein. In der Regel ist dies bereits von Ihrem Dienstanbieter eingerichtet.

Es gibt viele Einstellungsoptionen, z. B. können Sie festlegen, dass die Nachrichten im SIM- oder Telefonspeicher gespeichert werden. Für weitere Einstellungen wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.

Hier finden Sie:

**Nachrichtencenter, SMS-Gültigkeitsdauer, Statusbericht, Antwortpfad, Bevorzugter Speicher.**

## Nachrichtenkapazität

---

Hier finden Sie die Anzahl der im SIM- oder Telefonspeicher registrierten Kontakte.

SIM 1/30: 1 Nachricht im SIM-Speicher, 30 maximal.

Telefon 6/200: 6 Nachrichten im Telefonspeicher, 200 maximal.

***Hinweis:*** Wenn die maximale Anzahl erreicht ist, sollten Sie Nachrichten löschen, um Speicherplatz zu schaffen.

# Anruflisten

## Verpasste Anrufe

Wenn Sie Anrufe verpasst haben, wird eine Meldung auf Ihrem Display angezeigt. Die LED 1 **Verpasster Anruf** und Neue Nachricht / Anruf blinkt. Die LED für neue Nachrichten / Anrufe erlischt nur, sobald Sie sich die verpassten Anrufe angeschaut haben.



Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, wird das Symbol **Anruf verpasst**  auf dem Display angezeigt.



## Verpasste Anrufe anzeigen

Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint das Symbol **Anruf verpasst**  auf dem Display. Drücken Sie die Taste **Details** () , um weitere Informationen anzuzeigen, wenn Sie die Nachricht 1 verpasster Anruf haben oder drücken Sie **Beenden** () , um den Vorgang zu beenden. Sie können verpasste Anrufe auch wie folgt über das Menü überprüfen.

1. **Anruflisten**  → **Verpasste Anrufe** → **OK** .
2. Scrollen Sie mit  und  durch die Liste, bis Sie den verpassten Anruf gefunden haben.
3. Drücken Sie die Softkey-Taste **Optionen** (). Folgende Aktionen stehen für diesen Anrufeintrag zur Verfügung:

**Details, Anrufen, Nachricht schreiben, Zu Kontakten hinzufügen, Zur schwarzen Liste hinzufügen, Löschen, Alle löschen**

## Ausgehende Anrufe anzeigen

---

1. **Anrufprotokoll** → **Getätigte Anrufe** → **OK** (≡/ok). oder drücken Sie (👤/←) und wählen Sie **Getätigte Anrufe** → **OK** (≡/ok).
2. Scrollen Sie mit ▲ und ▼ durch die Liste, bis Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben.
3. Drücken Sie die Softkey-Taste **Optionen** (≡/ok). Folgende Aktionen stehen für diesen Anrufeintrag zur Verfügung:

**Details, Anrufen, Nachricht schreiben, Zu Kontakten hinzufügen, Zur schwarzen Liste hinzufügen, Löschen, Alle löschen**

## Eingegangene Anrufe anzeigen

---

1. **Anrufprotokoll** → **Empfangene Anrufe** → **OK** (≡/ok). oder drücken Sie (👤/←) und wählen Sie **Empfangene Anrufe** → **OK** (≡/ok).
2. Scrollen Sie mit ▲ und ▼ durch die Liste, bis Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben.
3. Drücken Sie die Softkey-Taste **Optionen** (≡/ok). Folgende Aktionen stehen für diesen Anrufeintrag zur Verfügung:

**Details, Anrufen, Nachricht schreiben, Zu Kontakten hinzufügen, Zur schwarzen Liste hinzufügen, Löschen, Alle löschen**

## Alle löschen

---

1. **Anruflisten** → **Alle löschen** → **OK** → **Alle löschen?** oder drücken Sie (👤/←) und wählen Sie **Alle löschen** → **OK** (≡/ok).
2. Drücken Sie die **OK**-Taste (≡/ok). Alle Anrufe in den Anruflisten werden gelöscht.

## Anrufdauer

---

Hier können Sie den letzten Anruf, empfangene Anrufe, ausgehende Anrufe und die Dauer aller Anrufe einsehen.

# Anwendungen

## Anwendungen

Menü  → Anwendungen → Alarm / Timer / Bluetooth

### 1. Alarm

Sie können einen Alarm einstellen oder hinzufügen. Es stehen bis zu 5 Alarmer zur Verfügung.

### 2. Timer

Der Countdown-Timer ist verfügbar. Drücken Sie **Optionen** () → **Start** → **OK** () , um den Countdown zu starten.

Sie haben die Möglichkeit, die Stopp-Taste  kurz zu drücken, um den Zähler anzuhalten und erneut  zweimal zu drücken, um ihn neu zu starten.

### 3. Bluetooth

Hier können Sie die Verbindung mit einem Bluetooth-Headset herstellen.

Wenn Bluetooth **eingeschaltet** ist, wird das Bluetooth-Symbol  auf dem Display angezeigt.



Wählen Sie **Gekoppeltes Gerät** und **Neues Gerät hinzufügen**, um das zu koppelnde Gerät zu suchen.

Wählen Sie anschließend dieses Gerät aus und drücken Sie zum Koppeln die Kurzwahltaete **Paaren** .

## Name aufnehmen

---

Der/Die BenutzerIn kann Audiodateien aufzeichnen (maximal 5) und diese als Klingelton für Kontakte zuweisen.

Nachdem Sie Ihre Dateien aufgezeichnet haben, gehen Sie zu **Kontakt**,

1. Wählen Sie mit den Tasten  und  den Telefonkontakt aus (funktioniert nicht mit den SIM-Kontakten) und drücken Sie dann die Softtaste **Optionen**.
2. Drücken Sie die  Taste, um **Details** auszuwählen und drücken Sie dann die OK-Taste.
3. Drücken Sie die Softtaste **Optionen**, wählen Sie **BEARBEITEN** und drücken Sie dann die Taste OK.
4. Drücken Sie die  Taste, um „Standardklingeltöne“ auszuwählen und drücken Sie dann die OK-Taste.
5. Wählen Sie **BEARBEITEN**, indem Sie die OK-Taste drücken.
6. Drücken Sie die  Taste, um „Aus Sounddateien auswählen“ auszuwählen, und drücken Sie dann die OK-Taste.
7. Verwenden Sie die Tasten  und , um die Audiodatei für Ihren Kontakt zuzuweisen, drücken Sie dann die Softtaste **Optionen**, wählen Sie OK und drücken Sie zum Bestätigen die Taste OK.
8. Drücken Sie die Softtaste **Optionen**, wählen Sie **SPEICHERN** und drücken Sie die Taste OK.
9. Drücken Sie  zum Beenden.

## Notrufarmband

Im Lieferumfang Ihres CL9000 ist ein wasserdichtes SOS-Armband enthalten. Im Notfall können Sie die SOS-Taste am Armband (oder die SOS-Taste am Telefon) drücken.

Um Ihren SOS-Notruf zu tätigen, müssen Sie Ihre SOS-Notrufnummern einrichten.



Menü /ok → SOS

1. Drücken Sie **OK**  → **Einstellungen**, verwenden Sie die Tasten  und , um **AUS**, **Notrufnummern** oder **Notrufzentrale festlegen** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK** . Wenn SOS auf **EIN** eingestellt ist, wird das „SOS“ Symbol  auf dem Display angezeigt.



2. Gehen Sie dann zu „**SOS-Nummern**“, um Ihre SOS-Nummern (bis zu 5 Nummern) festzulegen, oder zu „**Notrufzentrale**“, um Ihre Notrufnummer (die Nummer Ihrer Notrufzentrale) festzulegen.
3. Gehen Sie dann auf „**SOS SMS**“, dort erscheint standardmäßig die Meldung „Ich habe meine Notruftaste gedrückt. Kontaktieren Sie mich umgehend.“ Sie können diese Nachricht bearbeiten. Verwenden Sie die linke Softtaste **LÖSCHEN**, um ein Zeichen zu löschen.  
**Hinweis: Während des SOS-Wählvorgangs wird diese Notfallnachricht auch an Ihre SOS-Nummer gesendet.**
4. Sie können jetzt die ausgehende Notrufstimme einstellen. Das Telefon verfügt standardmäßig über eine Sprach- und Benutzeraufzeichnungsfunktion. Im Notfall wird die Notrufstimme über die Leitung abgespielt.
5. Dann können Sie im Notfall Ihr Notrufarmband oder Ihre **SOS**-Taste  (am Telefon) verwenden.

**Hinweis: Wenn Sie ein oder mehrere Notrufarmbänder hinzufügen möchten, können Sie so viele koppeln, wie Sie wünschen.**

## SOS-Funktion

---

Im Notfall können Sie **3 Sekunden** lang die SOS-Taste drücken, um Hilfe zu rufen.

Wenn Sie eine **SOS-Nachricht** voreingestellt haben, sendet das Telefon nach dem Drücken der SOS-Taste die SOS-Textnachricht an Ihre SOS-Nummer, bevor diese angerufen wird.

Auf der SOS-Nummer können bis zu **5 Nummern** voreingestellt werden. Das Telefon wählt die Nummern auf dieser SOS-Liste automatisch nacheinander an. Wenn ein Besetzzeichen erkannt wird oder ein Anruf vom / von der BenutzerIn abgelehnt wird, wird sofort die nächste Nummer gewählt. Das Telefon wählt diese Nummern, bis der Endbenutzer „0“ drückt, um den Anruf anzunehmen.

Wenn jemand **0** drückt, wird der SOS-Vorgang gestoppt.

Wenn niemand die **0** drückt, werden alle 5 Nummern wiederholt gewählt.

Wenn Sie den SOS-Modus verlassen möchten, drücken Sie die **SOS-Taste** erneut **3 Sekunden** lang.

## SOS Nummern einrichten

---

Sie können bis zu 5 SOS-Nummern einrichten oder eine Nummer für eine Notrufzentrale festlegen.

1. Menü /OK → **SOS** → **SOS Nummern** → **SOS-Nummer von 1 bis 5 auswählen** → **Geben Sie die SOS-Nummer über die Zifferntastatur ein und drücken Sie dann OK**   
(Je nachdem, wen Sie im Notfall anrufen möchten).

oder

2. Menü /OK → **SOS** → **Notrufzentrale** → **Geben Sie die Notrufnummer über die Zifferntastatur ein und drücken Sie dann OK** (Wenn Sie einen SOS-Anruf an die Notrufzentrale tätigen möchten, müssen Sie diese aktivieren und einen Haken setzen bei **Notrufzentrale** in **SOS** → **Einstellungen** → **Notrufzentrale** → **OK**).

## Aktivieren der SOS-Ansage

---

Wenn Sie den Modus auf Notrufzentrale eingestellt haben, haben Sie die Möglichkeit, die SOS-Ansage zu entfernen.

SOS → Einst. Sprachansage: Wählen Sie Ein, damit das Telefon beim Empfang eines Anrufs die Sprachansage sendet.

Wählen Sie Aus, um die SOS-Ansage zu unterdrücken.

## SOS-Nachricht aufzeichnen

---

Zeichnen Sie eine informative Nachricht auf, die Ihren Helfern im Notfall hilft, z. B. **„Hier ruft Jane Smith an, ich habe mich verletzt. Bitte kommen Sie zu mir nach Hause und helfen Sie mir. Drücken Sie 0, um den Anruf anzunehmen.“**

Menü /OK → SOS → Ausw. Sprachansage → Persönlich → OK → Aufnahme, Drücken Sie die OK-Taste , um die Aufnahme zu starten. Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, drücken Sie auf Speichern  (die Nachricht kann bis zu 20 Sekunden lang sein).

Sie haben die Möglichkeit, die Nachricht anzuhören, indem Sie **„ABSPIELEN“** auswählen.

Wenn Sie die werkseitige SOS-Nachricht bevorzugen, wählen Sie **„Standard“** anstelle von **„Persönlich“**.

## SOS Textnachricht

---

Sie können eine SOS-Textnachricht eingeben. Diese wird an Mobiltelefone auf Ihrer Liste gesendet.

Menü /OK → SOS → SOS SMS → Informative Textnachricht eingeben → OK 

Mit der linken Softtaste **„LÖSCHEN“** können Sie Zeichen löschen.

## Hinzufügen eines Notrufarmbands

---

Sie haben die Möglichkeit, weitere Notrufarmbänder hinzuzufügen.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein neues Gerät zu koppeln:

Menü /OK → SOS → Einst. Armband → Notrufarmband hinzufügen → OK

Drücken Sie auf die rote Taste Ihres neuen Notrufarmbands.

Auf dem Bildschirm wird **„Erfolgreich gekoppelt“** angezeigt, um zu bestätigen, dass Ihr neues Notrufarmband gekoppelt ist.

Sie haben die Möglichkeit, alle Notrufarmbänder zu entfernen, indem Sie **„Alle Armbänder löschen“** auswählen und dann zur Bestätigung OK drücken.

## Batterie austauschen

---

Drücken Sie kurz die SOS-Taste am Notrufarmband. Die LED leuchtet auf. Wenn die LED nicht mehr aufleuchtet, nachdem sie gedrückt und gehalten wurde, tauschen Sie bitte die Batterie wie unten beschrieben aus.

- Entfernen Sie die 2 Schrauben auf der Rückseite des Armbands mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher.
- Führen Sie die Spitze eines kleinen Schraubendrehers in die Kerbe ein und öffnen Sie das Gehäuse.
- Ersetzen Sie die Batterie CR2025. Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs. Achten Sie auf die richtige Polarität.
- Schließen Sie das Gehäuse und setzen Sie die 2 Schrauben wieder ein.

## Reichweite

---

Wenn die Taste auf dem Notrufarmband gedrückt wird, verfügt sie über ein Übertragungsfeld von **20 bis 30 Metern** zwischen dem Sender und dem Telefon. Diese Reichweite hängt von den Materialien in der Wand und der Strahlung von Elektrogeräten ab.

# Technische Spezifikationen

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Trägerfrequenz	433 MHz (Notrufarmband)
Reichweite Notrufarmband	Max. 20-30 Meter (offener Bereich)
Gewicht Notrufarmband	30 Gramm
Betriebsspannung	Telefonbasis: DC 5V 2,0A, 10W Wiederaufladbarer Li-Polymer-Akku: 3,7 V, 900 mAh Notrufarmband: 3V Li-Metall-Batterie CR2025
Hochfrequenzleistung	<20 dbm

## Hauptfunktionen:

- 4G (LTE-FDD)
- 3G – CDMA: 2100/1900/900/850
- 2G – 850/900/1800/1900
- RF 433 MHz Notrufarmband
- NANO-SIM-Buchse
- 3 x Fototasten
- Tastatur mit Sprachfunktion/Anrufer-ID (Nummer mit Sprachfunktion, vom/von der BenutzerIn aufnehmbar)
- Vom/von der BenutzerIn aufzeichenbare SOS-Nachricht
- 500 Kontakte Telefonbuchspeicher
- 90 dB lauter Klingelton
- Vom/von der BenutzerIn veränderbarer Klingelton
- +40 dB Verstärkung der Empfangslautstärke mit LED-Anzeige, große Tasten
- Großes Dot-Matrix-Display (128 x 64)
- 12 LCD-Anzeigesprachen (Englisch / Französisch / Deutsch / Spanisch / Portugiesisch / Arabisch / Niederländisch / Italienisch / Hebräisch / Russisch / Polnisch / Tschechisch)
- Anrufliste mit 80 Einträgen (Uhrzeit/Tag des Anrufs)
- 200 SMS-Nachrichten
- Echtzeituhr (12/24-Stunden-Anzeige)
- Anzeige neuer Anrufe: LED und Symbol
- Rückruf mit Anrufer-ID-Speicher
- 2-Wege-Freisprecheinrichtung mit LED-Anzeige
- Wahlwiederholung der letzten Nummer
- Ruftonanzeige (rote LED)
- Kompatibilität mit Hörgeräten (ETS300381 bevorzugter Bereich)
- Bluetooth (unterstützt Bluetooth-Headsets)
- Tisch- und Wandmontage möglich
- 3,5-mm-Audio-Eingangsbuchse

# Fehlersuche

## **Telefon lässt sich nicht einschalten**

- Überprüfen Sie, ob der Akku eingelegt ist, ob er richtig eingelegt ist und ob das Netzteil eingesteckt ist.

## **Auf dem Display erscheint nichts**

- Überprüfen Sie, ob das Telefon eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie, ob der Akku und die SIM-Karte richtig eingelegt sind.
- Überprüfen Sie, ob das Netzteil richtig eingesteckt ist.

## **Beim Einschalten des Telefons ist das Display gesperrt**

- Geben Sie den PUK ein, um die SIM-Karte zu entsperren.

## **Es wird kein Signalsymbol angezeigt**

- Es besteht keine Netzwerkverbindung. Bewegen Sie sich umher und versuchen Sie, in einen Bereich zu gelangen, in dem es möglicherweise Abdeckung gibt.
- Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.

## **Meldung, dass eine Funktion nicht möglich ist**

- Ihr Dienstanbieter bietet die betreffende Funktion möglicherweise nicht an oder Sie müssen diesen Dienst abonnieren. Kontaktieren Sie den Dienstanbieter.

## **Keine Anzeige während des Ladevorgangs**

- Der Akkuladestand ist sehr niedrig. Warten Sie ein paar Minuten.

## **Die Meldung „SIM einfügen“ oder „Eingeschränkter Service“ wird angezeigt**

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte richtig eingelegt ist.

## **Der Akku ist schnell entladen oder kann überhaupt nicht geladen werden.**

- Laden Sie den Akku 4 Stunden lang auf.

## **Fehler beim Herstellen einer Verbindung zum Netzwerk**

- Das Signal ist zu schwach oder es liegt möglicherweise eine Funkstörung vor.
- Ist die SIM-Karte falsch installiert oder beschädigt? Wenn die SIM-Karte beschädigt ist, bitten Sie Ihren Dienstanbieter um Ersatz.

## **Es kann kein Anruf getätigt werden**

- Überprüfen Sie, ob die Mobilfunkgebühren bezahlt wurden.
- Überprüfen Sie, ob die SIM-Karte gültig ist.
- Prüfen Sie, ob die Rufnummernbeschränkung eingestellt ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Taste  gedrückt haben.
- Ist die SIM-Karte im Netzwerk registriert?
- Ist die Funktion zum Sperren ausgehender Anrufe aktiviert?
- Möglicherweise liegt ein Problem mit dem Netzwerk vor. Rufen Sie Ihren Dienstanbieter an.

## **Anruf kann nicht entgegengenommen werden**

- Überprüfen Sie, ob die Mobilfunkgebühren bezahlt wurden.
- Überprüfen Sie, ob die SIM-Karte gültig ist.
- Prüfen Sie, ob die Rufnummernbeschränkung eingestellt ist.
- Ist die Funktion zum Sperren eingehender Anrufe aktiviert?
- Ist die Rufumleitungsfunktion aktiviert?

## **Kein hörbarer Klingelton**

- Stellen Sie sicher, dass der Klingelton nicht auf die niedrige Position eingestellt ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Telefon nicht im Ruhemodus befindet.

## **Keine Verstärkung**

- Überprüfen Sie, ob die Verstärker-Taste auf „Ein“ steht. Die rote LED +40 dB sollte leuchten.

## **Rauschen, statische Aufladung, Interferenzen während der Verwendung des Hörers**

- Überprüfen Sie, ob Sie über ein korrektes Netzwerk verfügen, indem Sie die Barr-Anzahl überprüfen.
- Bewegen Sie das Telefon und prüfen Sie, ob die Qualität besser wird.

## **Informationen zur Anrufer-ID werden nicht angezeigt**

- Der Anrufer hält möglicherweise seine Nummer zurück.

# Sicherheitsinformationen

## Allgemein

Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang des Produkts enthaltene Netzteil.

Verwenden Sie nur den mitgelieferten zugelassenen Akku.

Öffnen Sie weder das Mobilteil noch die Basisstation (außer zum Austauschen der Hörerbatterien oder der SIM-Karte). Wenden Sie sich für alle Reparaturen an die Hotline.

Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer. Es besteht die Gefahr einer Explosion und/oder der Freisetzung giftiger Chemikalien.

Wenn Sie sicher sind, dass Sie das Telefon länger als einen Monat nicht benutzen werden, entfernen Sie den Akku

## Reinigung

Reinigen Sie das Telefon mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie niemals Polituren oder Reinigungsmittel—diese könnten die Oberfläche oder die Elektrik im Inneren beschädigen.

## Umwelt

Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht aus.

Sorgen Sie stets für einen freien Luftstrom über die Oberflächen des Telefons.

Legen Sie keinen Teil Ihres Produkts ins Wasser und verwenden Sie es nicht in feuchten oder feuchten Umgebungen, z.B. Badezimmer.

Setzen Sie Ihr Produkt keinem Feuer oder anderen gefährlichen Bedingungen aus.

Ziehen Sie bei Gewitter den Stecker Ihres Telefons aus der Telefonsteckdose, da es sonst beschädigt werden könnte. Ihre Garantie deckt keine Gewitterschäden ab.

Das Telefon ist für den Betrieb in einem Temperaturbereich von 5 °C bis 45 °C ausgelegt.

## **Nutzung**

Lesen Sie zusammenfassend diese Richtlinien. Nichtbeachtung kann gefährlich oder illegal sein.

### ***SICHER EINSCHALTEN***

Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn die Verwendung von Mobiltelefonen verboten ist oder es zu Störungen oder Gefahren kommen kann.

### ***VERKEHRSSICHERHEIT STEHT AN ERSTER STELLE***

Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze. Halten Sie während der Fahrt immer die Hände frei, um das Fahrzeug zu bedienen. Ihre erste Überlegung beim Autofahren sollte die Verkehrssicherheit sein.

### ***INTERFERENZ***

Alle drahtlosen Geräte können störanfällig sein. Dies könnte die Leistung beeinträchtigen.

### ***IN KRANKENHÄUSERN ABSCHALTEN***

Befolgen Sie etwaige Einschränkungen. Schalten Sie das Gerät in der Nähe von medizinischen Geräten aus.

### ***IM FLUGZEUG AUSSCHALTEN***

Befolgen Sie etwaige Einschränkungen. Drahtlose Geräte können Störungen im Flugzeug verursachen.

### ***BEIM TANKEN AUSSCHALTEN***

Benutzen Sie das Gerät nicht an einer Tankstelle sowie nicht in der Nähe von Kraftstoff oder Chemikalien.

### ***IN DER NÄHE VON SPRENGUNGEN AUSSCHALTEN***

Befolgen Sie etwaige Einschränkungen. Benutzen Sie das Gerät nicht während Sprengungen.

# Hörgeräteinformationen

Bei einigen Telefonen wird die Kompatibilität mit Hörgeräten geprüft. Wenn auf der Verpackung Ihres speziellen Modells „Zugelassen für Hörgeräte“ aufgedruckt ist, gilt die folgende Erklärung. Wenn Mobiltelefone in der Nähe von Hörgeräten (Hörgeräte und Cochlea - Implantate) verwendet werden, können BenutzerInnen ein summendes, brummendes oder heulendes Geräusch wahrnehmen. Einige Hörgeräte sind bei diesen Störgeräuschen weniger anfällig als andere und Telefone unterscheiden sich in der Stärke der von ihnen erzeugten Störungen. Die Mobilfunkbranche hat für einige ihrer Mobiltelefone Bewertungen entwickelt, um Hörgerätenutzern dabei zu helfen, Telefone zu finden, die möglicherweise mit ihren Hörgeräten kompatibel sind. Nicht alle Telefone wurden bewertet. Bei Telefonen mit einer Bewertung steht die Bewertung auf der Verpackung oder ein Etikett auf der Verpackung. Die Bewertungen sind keine Garantien. Die Ergebnisse variieren je nach Hörgerät und Hörverlust des/der Benutzers/in. Wenn Ihr Hörgerät anfällig für Störungen ist, können Sie ein zertifiziertes Telefon möglicherweise nicht erfolgreich nutzen. Das Ausprobieren des Telefons mit Ihrem Hörgerät ist die beste Möglichkeit, es an Ihre persönlichen Bedürfnisse anzupassen.

# Netzwerk-Dienstleistungen

Um dieses Telefon nutzen zu können, benötigen Sie einen Mobilfunkanbieter. Viele der Funktionen dieses Geräts hängen von Funktionen im drahtlosen Netzwerk ab. Diese Netzwerkdienste sind möglicherweise nicht in allen Netzwerken verfügbar oder Sie müssen möglicherweise spezielle Vereinbarungen mit Ihrem Dienstanbieter treffen, bevor Sie die Netzwerkdienste nutzen können. Ihr Dienstanbieter muss Ihnen möglicherweise zusätzliche Anweisungen zur Nutzung geben und erklären, welche Gebühren anfallen. Bei einigen Netzwerken gelten möglicherweise Einschränkungen, die sich auf die Nutzung von Netzwerkdiensten auswirken. Beispielsweise unterstützen einige Netzwerke möglicherweise nicht alle sprachabhängigen Zeichen und Dienste.

Ihr Dienstanbieter verlangt möglicherweise, dass bestimmte Funktionen auf Ihrem Gerät deaktiviert oder nicht aktiviert werden. Wenn dies der Fall ist, werden diese nicht im Menü Ihres Geräts angezeigt. Möglicherweise wurde Ihr Gerät auch speziell konfiguriert. Diese Konfiguration kann Änderungen an Menünamen, Menüreihenfolge und Symbolen umfassen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

# Garantie

Geemarc gewährt eine zweijährige Garantie ab Kaufdatum dieses CL9000 Geemarc-Gerätes. Während dieses Zeitraums werden sämtliche Reparaturen und Ersatzteile kostenlos (nach unserem Ermessen) bereitgestellt. Wenden Sie sich bei Störungen an unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Webseite unter **[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)**.

Von dieser Garantie sind Unfälle, unsachgemäße Bedienung oder mangelnde Sorgfalt ausgeschlossen.

Veränderungen oder ein Auseinandernehmen des Gerätes sind ausschließlich durch qualifizierte Geemarc-Mitarbeiter zulässig.

Ihre Rechte werden von dieser Geemarc-Garantie in keiner Weise beeinträchtigt.

**Wichtig:** IHR RECHNUNG IST TEIL DER GARANTIE. SIE MUSS AUFBEWAHRT UND IM GARANTIEFALL VORGELEGT WERDEN.

**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG:** Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass das CL9000 den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Funkanlagenrichtlinie 2014 / 53 / UE entspricht.

*Die Konformitätserklärung ist unter **[www.geemarc.com/de](http://www.geemarc.com/de)** verfügbar*

**Elektrischer Anschluss:** Das Gerät ist nur für den Betrieb mit einer 230 V 50 Hz-Versorgung ausgelegt. (Gemäß der Norm EN62368-1 als "gefährliche Spannung" eingestuft). Das Gerät verfügt nicht über einen integrierten Ein-/Aus-schalter. Um die Stromzufuhr zu unterbrechen, schalten Sie entweder die Stromversorgung an der Steckdose ab oder ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose. Stellen Sie bei der Installation des Geräts sicher, dass die Steckdose leicht zugänglich ist.

SAR Test:

Kopf: 0.01 W/kg

Körper: 1.647 W/kg

Glieder: 2.977 W/kg

# Recycling-Richtlinien

Die WEEE-Richtlinie (Elektro-und Elektronikaltgeräte) wurde aufgestellt, damit Altgeräte auf beste Art und Weise verwertet werden.

Wenn dieses Produkt defekt ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren Hausmüll. Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten.

- Entfernen Sie die Batterien und werfen Sie diese in einen geeigneten Rücknahmecontainer. - Geben Sie das Produkt bei einer Altgerätesammelstelle ab.
- Geben Sie das alte Produkt beim Händler zurück. Beim Kauf eines neuen Geräts sollte der Händler das Altgerät zurücknehmen.

Durch Einhaltung dieser Anweisungen, tragen Sie zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei.



Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter

**[www.geemarc.com/de](http://www.geemarc.com/de)**

E-mail: **[kundendienst@geemarc.com](mailto:kundendienst@geemarc.com)**

Telefon: **+49 30 209 95789**

Erreichbarkeit: Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, France.

Hergestellt für Geemarc Telecom S.A. in China





UGCL9000\_GE\_V1.0