

Telefon mit Lautsprecher,
Sprachansage und SOS-
Notruffunktion

Deutsch



HINWEIS:

Dieses Telefon kann von Personen mit Hörproblemen verwendet werden. Es besteht die Möglichkeit, die Lautstärke des Hörers anzupassen. Stellen Sie die Lautstärke beim ersten Gebrauch auf das Minimum ein, die hörgeschädigte Person kann die Lautstärke dann je nach Bedarf erhöhen.



Eine aktuelle Bedienungsanleitung finden Sie auf unserer Webseite: **www.geemarc.com**, da es möglicherweise wichtige Aktualisierungen und Änderungen gibt, die Sie beachten müssen!

Inhalt	1
Vor der ersten Verwendung	4
- Herzlichen Glückwunsch	4
- Sicherheitsvorkehrungen	5
- Einrichtung	6
- Position der Kontrollen	8
- Beschreibung der Tasten	10
- LCD-Beschreibung	11
- Wandhalterung	13
Hauptfunktionen	14
- Anrufe tätigen	14
- Zuletzt gewählte Nummer erneut wählen	14
- Eine der zehn letzten Nummern erneut wählen	14
- Anrufe annehmen	15
- Mikrofon stummschalten	15
- Verwendung der Lautstärke-, Boost- und Ton-Funktion ...	16
- Nutzung des Telefons mit Hörgeräten	17
- Freisprech-Funktion	17
- Fototasten und Direktwahltasten	18
• Nummern für Fototasten oder Direktwahltasten speichern ...	18
• Anruf über Fototaste oder Direktwahltaste	18
- Blinksignal	19
- Anrufer-ID	20
• Anrufliste einsehen	20
• Nummer aus der Anrufliste anwählen	20
• Anruflistenoptionen nutzen	20
- Telefonbuch	21
• Einen Telefonbucheintrag hinzufügen	22
• Telefonbucheinträge einsehen	22
• Telefonbuchoptionen nutzen	23

Menüfunktionen	24
- Menüauswahl.....	24
- Menükarte	24
Anzeige-Einstellungen	26
- Spracheinstellungen	26
- Stundenformat einrichten.....	26
- Datumsformat einrichten.....	27
- Uhrzeit & Datum einstellen	27
- LCD-Kontrast einstellen.....	28
- Hintergrundbeleuchtung einstellen	28
- Kleinere Schriftgröße auswählen.....	28
Telefoneinstellungen	29
- Melodie, Lautstärke, Rufton, LED-Anzeige einstellen	29
- Tastenton einstellen.....	29
- Boost-Funktion für den Hörer	30
- Hörertonfunktion	30
- Blinkzeit einstellen	31
- Menüsperre einstellen	31
- Automatische On-Hook Funktion.....	31
Spracheausgarbe.....	32
- Sprechende Tasten	32
- CID-Sprechfunktion	32
- Sprechendes Menü.....	33
SOS-Einstellungen	34
- SOS-Nummern speichern.....	35
- SOS-Nachricht aufnehmen.....	36
- SOS-Nachricht abspielen	36
- SOS-Nachricht löschen	37
- SOS-Notruf	37
- SOS-PIN Code einrichten.....	37

Inhalt

- SOS-Temperatur Anruf.....	38
- Sensoralarm	39
Notruf-Armband Informationen	40
- Ein neues Notruf-Armband registrieren	40
- Kopplung für alle Notruf-Armbänder aufheben.....	40
- Anruf mit dem Notruf-Armband annehmen	41
Blockierte Nummern einrichten	42
- Blockierte Nummern	42
- Liste mit blockierten Nummern einsehen	42
Verwendung der Audio-Buchsen	43
Anrufer-ID für Anrufe in der Warteschleife	44
Funktionsübersicht	45
Troubleshooting	46
Sicherheitshinweise	47
Garantie	48
Recycling-Richtlinien	49

Vor der ersten Verwendung

Herzlichen Glückwunsch

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf unseres hochwertigen Produkts.

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, um alles über die verfügbaren Funktionen und die Funktionsweise Ihres Telefons zu erfahren. Dies wird Ihnen helfen, das Beste aus Ihrem neuen Telefon herauszuholen.



Sicherheitsvorkehrungen

Um das Risiko von Stromschlägen und Verletzungen zu vermeiden, befolgen Sie bitte die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, bevor Sie das Telefon verwenden:

1. Lesen und befolgen Sie die Anweisungen in dieser Anleitung sorgfältig.
2. Dieses Telefon kann Anrufe auf eine hohe Lautstärke verstärken. Es ist wichtig, dass jeder Benutzer dieses Telefons über seine Funktionsweise informiert ist.

WICHTIG: Stellen Sie den Lautstärkeregler auf die niedrigste Stufe (NIEDRIG), wenn Sie es nicht verwenden. Machen Sie alle Benutzer darauf aufmerksam, dass eine falsche Verwendung dieses Telefons zu Hörschäden führen kann.

3. Trennen Sie beim Reinigen zunächst den Netzstecker des Telefons. Wischen Sie es anschließend mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine Flüssig- oder Aerosolreiniger.
4. Verwenden Sie dieses Telefon nicht in feuchten Umgebungen oder in Umgebungen, in denen Explosionsgefahr besteht.
5. Trennen Sie dieses Telefon von der Steckdose und überlassen Sie die Wartung nur qualifiziertem Servicepersonal.
6. Verwenden Sie ausschließlich **das mitgelieferte Netzteil**.
7. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel. Installieren Sie das Telefon so, dass niemand auf das Kabel treten oder darüber stolpern kann.
8. Überlasten Sie Steckdosen oder Verlängerungskabel nicht, da dies die Gefahr von Bränden oder Stromschlägen erhöhen kann.
9. Stecken Sie niemals Gegenstände durch die Schlitze im Telefon. Sie könnten gefährliche Spannungspunkte berühren oder Teile kurzschließen, was zu einem Brand- oder Stromschlagrisiko führen kann.
10. Verschütten Sie niemals Flüssigkeiten jeglicher Art auf dem Telefon.
11. Stellen Sie das Telefon außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
12. Benutzen Sie das Telefon nur in der beschriebenen Weise.
13. Benutzen Sie das Telefon nicht, wenn es beschädigt ist.

Einrichtung

PACKUNGSGEHÄLTE ÜBERPRÜFEN

Die Packung sollte folgendes beinhalten:

- 1 Mobilteil mit Spiralkabel und 1 Telefonbasis
- 1 Telefonkabel

WICHTIGE ANKÜNDIGUNG

** Heutzutage besitzen die meisten Endverbraucher ein/e/n Modem / Internetbox / Router. Aus diesem Grund hat Geomarc entschieden, den Telefonstecker, der bisher in den Verpackungen der Festnetztelefone enthalten war, zu entnehmen.*

*** Dieser ist optional und auf Anfrage der Endkunden erhältlich.*

- 1 Benutzerhandbuch
- 1 Notruf-Armband für Notrufe (Fassung Serenities100 & Packung Serenities100)
- 1 Netzteil (7 V DC / 0,5 A / 3,5 W)
- 1 Audioausgangskabel (nur Version Serenities 100V2T)

STANDORT AUSWÄHLEN

Das Gerät sollte an einem Ort aufgestellt werden, an dem die visuelle Anzeige und das beleuchtete Display gut zu sehen sind.

Wählen Sie einen Ort, der nicht im Weg für normale Alltagsaktivitäten ist, damit Sie nicht dagegenstoßen oder die Gefahr besteht, über Kabel zu stolpern.

ADAPTER EINSETZEN

Damit das Telefon voll funktionsfähig ist, einschließlich LCD-Display, Hintergrundbeleuchtung und anderen Sonderfunktionen, müssen Sie das mitgelieferte Netzteil anschließen. Verbinden Sie das Kabel des Netzteils mit der DC-Klinkenbuchse auf der Rückseite des Telefons. Stecken Sie dann das Netzteil in eine 13-Ampere-Steckdose. Benutzen Sie eine Steckdose in der Nähe des Telefons, damit Sie im Falle eines Problems das Netzteil schnell herausziehen können.

ACHTUNG: Schließen Sie immer das Kabel des Netzteils an die Gleichstrombuchse des Telefons an, BEVOR Sie das Netzteil an eine Netzsteckdose anschließen. Wenn das Telefon nicht mehr verwendet wird oder Sie es an einen anderen Ort bringen müssen, ziehen Sie immer den Netzadapter aus der Netzsteckdose, BEVOR Sie das Netzadapterkabel aus der Gleichstrombuchse am Telefon ziehen.

Vor der ersten Verwendung

Batterie-Backup

Legen Sie 4 wiederaufladbare 1,2-V-/600-800-mA-Standardbatterien vom Typ AAA ein (nicht im Lieferumfang enthalten), sodass alle Funktionen des Telefons auch bei einem Stromausfall (Stromausfall) einige Stunden lang weiter funktionieren.

HINWEIS: Auch ohne Backup-Batterien ist es weiterhin möglich, Anrufe zu tätigen und entgegenzunehmen.

Das Batteriesymbol auf dem Display blinkt, um anzuzeigen, dass die Batterien geladen werden. Das Symbol leuchtet weiterhin auf, wenn die Akkus geladen sind (Netzteil angeschlossen).

HINWEIS: Es dauert einige Stunden, bis die Akkus vollständig aufgeladen sind.

Im Falle eines Stromausfalls zeigen die 3 Balken auf dem Batteriesymbol den Ladezustand des Akkus an.

WARNUNG: Verwenden Sie niemals nicht wiederaufladbare Batterien. Diese könnten auslaufen und das Telefon dauerhaft beschädigen.


NETZKABEL ANSCHLIESSEN

Stecken Sie ein Ende des mitgelieferten Netzkabels in die Netzbuchse auf der Rückseite des Telefons. Stecken Sie dann das andere Ende des Telefonkabels in die Telefonsteckdose.


* Wenn Sie über ein digitales Telefonnetz verfügen, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um zu erfahren, wie Sie dieses Telefon am besten über einen digitalen Sprach- oder ATA-Adapter mit dem Netzwerk verbinden.

Notrufarmband einschalten

Drücken Sie die Taste etwa 10 Sekunden lang, bis die LED rot aufleuchtet.

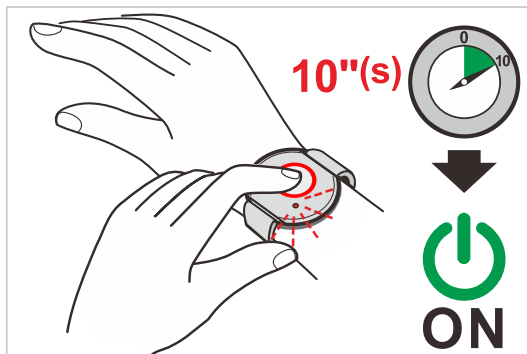


Position der Kontrollen

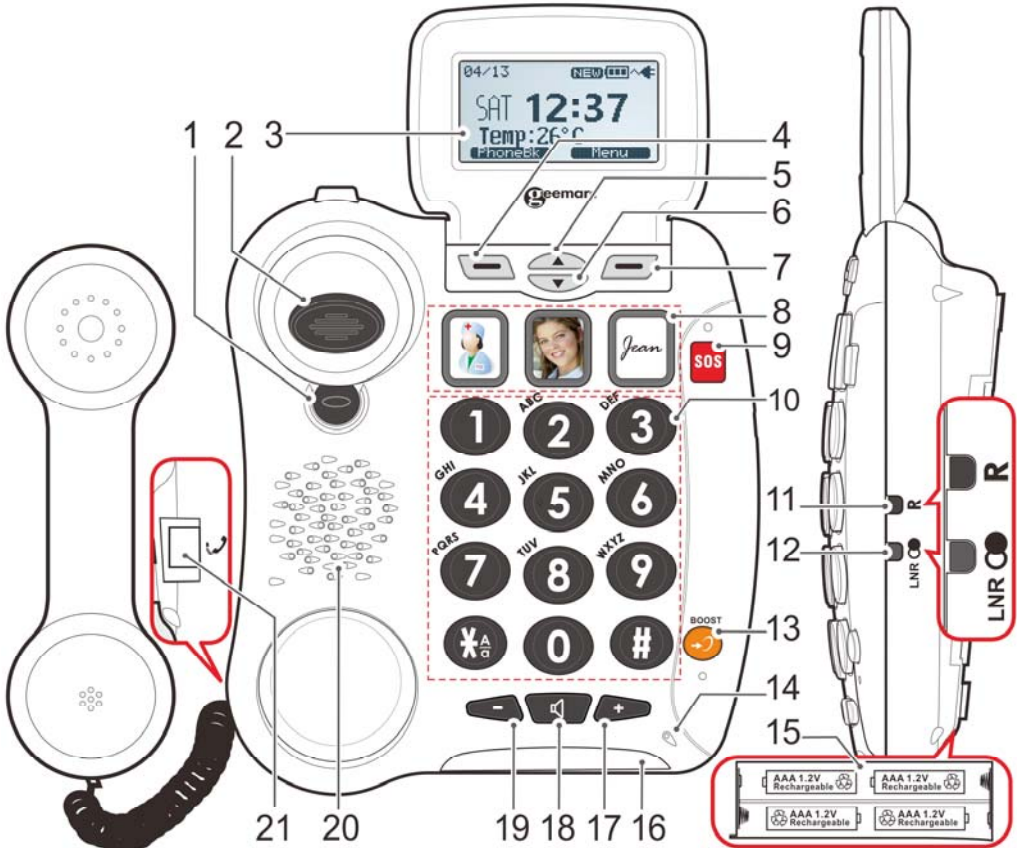

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Schalter zum Aufhängen des Hörers | 12. LNR-Taste (Wahlwiederholung der letzten Nummer). Im Wählmodus eine Pause einfügen |
| 2. Hakenschalter | 13. Boost-Taste |
| 3. Großer LCD-Bildschirm | 14. Mikrofon |
| 4. Linke Softkey-Taste | 15. Batteriefach |
| 5. Nach oben scrollen | 16. LED „Klingelton/Neuer Anruf/Im Gespräch“. |
| 6. Nach unten scrollen | 17. Lauter-Taste |
| 7. Rechte Softkey-Taste | 18. Lautsprechertaste |
| 8. 3 Fototasten | 19. Leiser-Taste |
| 9. SOS-Taste | 20. Freisprecheinrichtung |
| 10. Wähltasten | 21. Buchse für Hörerkabel |
| 11. R-Taste (Blinklicht). | |

Vor der ersten Verwendung

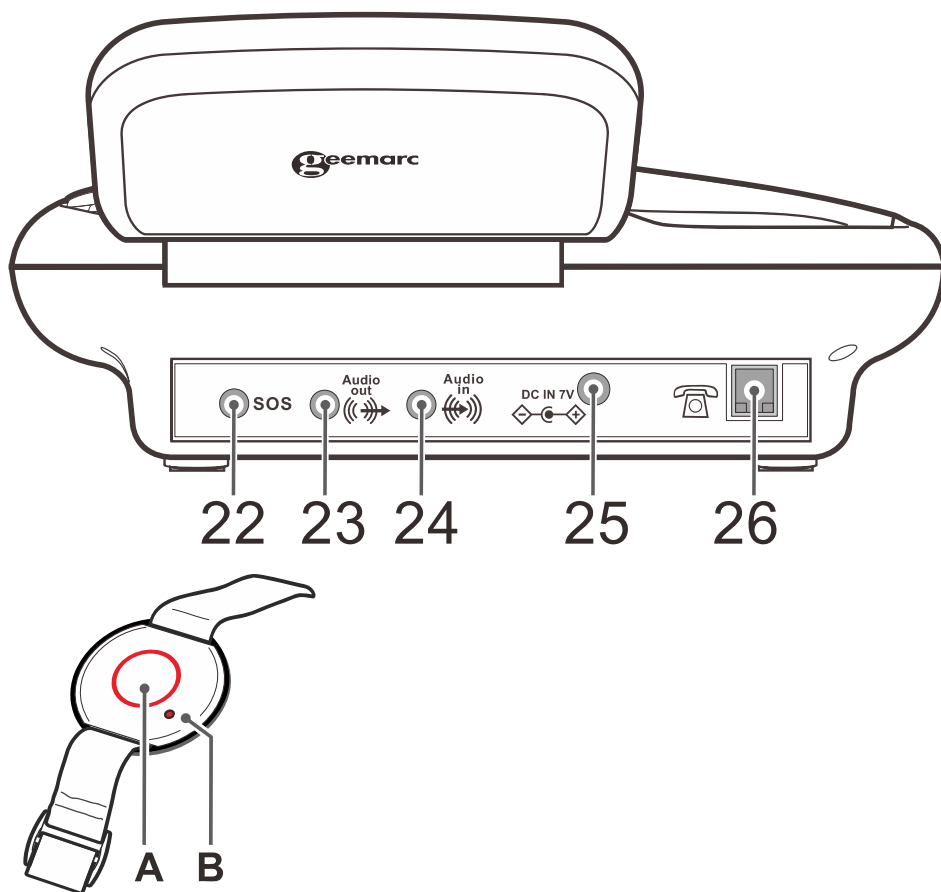

22. SOS-
Buchsensensoranschluss
(Kontakt offen oder Kontakt
geschlossen)

23. Audio OUT-Buchse 3,5mm

24. Audio-IN-Buchse 3,5mm

25. Stromadapter

26. Telefonkabelanschluss

A -> SOS-Taste

Diese Taste drücken, um einen
Notruf zu starten oder das
Notruf-Armband bei der
Basisstation zu registrieren.

B -> Remote-Anzeige

(Jedes Mal, wenn Sie die Taste
auf dem Notruf-Armband
drücken, leuchtet die Anzeige
rot.)

Beschreibung der Tasten


HINWEIS: Manche Tasten haben mehr als eine Funktion.

	Drücken Sie diese Taste, um die Menüoptionen hervorzuheben oder durch sie zu scrollen. So gelangen Sie zur CID-Liste - siehe Seite 20 .
	Führen Sie die Funktionen aus, die im Text direkt darüber (in der unteren Zeile des Displays) angegeben sind.
	Foto-Speichertasten. Drücken Sie diese Taste, um eine wichtige / regelmäßig verwendete gespeicherte Nummer schnell anzurufen.
	Drücken Sie diese Taste, um eine gespeicherte Notfallkontaktnummer schnell anzurufen.
	Drücken Sie diese Taste, um die Hörerverstärkung einzuschalten (um die Stimme des Anrufers lauter zu machen). Drücken Sie sie erneut, um die Hörerverstärkung auszuschalten.
	Einen Anruf tätigen / annehmen / beenden. Drücken Sie diese Taste, um die Freisprechfunktion während eines Anrufs zu aktivieren, siehe Seite 17
	Mit diesen Tasten erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke des Hörers oder der Freisprecheinrichtung.
	Drücken Sie diese Taste, um die letzte Nummer erneut zu wählen – siehe Seite 14 . Richten Sie für den Wählmodus eine Pause ein.
	Mit dieser Taste können Sie einen Anruf trennen und den Wählton wiederherstellen oder zu einem anderen Anrufer wechseln, wenn Sie benutzerdefinierte Anrufdienste wie Anklopfen nutzen.

Vor der ersten Verwendung

LCD-Beschreibung

LCD-Display im Standby-Modus:

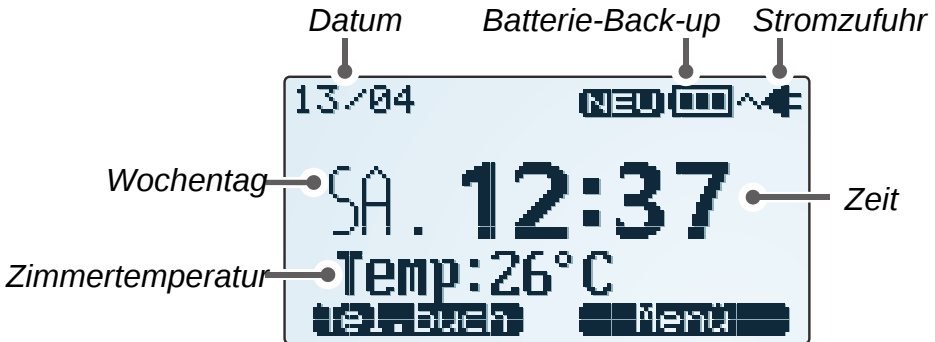

Das Display zeigt Uhrzeit, Datum, Wochentag, Raumtemperatur, Batterie-Backup und Stromversorgungsstatus an. Im unteren Teil des Displays werden Softkey-Funktionen angezeigt.

Wenn der Stecker des Telefonkabels nicht in die Telefonsteckdose eingesteckt ist, erscheint „**Keine Leitung**“ auf dem Display.




Wenn Sie die **Menü**-Softtaste drücken, zeigt das Display das Hauptmenü an. Scrollen Sie mit den  Tasten durch das Menü, bis Sie die Menüoption finden. Drücken Sie zur Bestätigung den Softkey „**Auswählen**“.



Wenn ein neuer Anruf eingeht, zeigt das Display die Telefonnummer des Anrufers und den Namen (falls verfügbar) an. Das **neue** Symbol () wird angezeigt.



Wenn ein Anruf blockiert ist, sehen wir das Symbol  links neben dem Akku und das Telefon klingelt nicht.

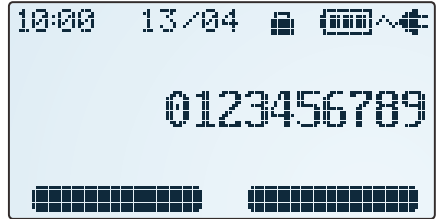

Diese Meldung wird angezeigt, wenn jemand aus einem Gebiet anruft, in dem die Telefongesellschaft keine Anruferidentifizierungsdienste anbietet oder in Ihrem Gebiet noch keine Nummernzustellung verfügbar ist.



Diese Nachricht wird angezeigt, wenn jemand anruft, aber die Telefonnummer verbergen möchte.



Wandhalterung

1. Drehen Sie die Lasche der Mobilteilaufhängung um 180 Grad – siehe **Abbildung 1**. Dadurch wird verhindert, dass das Mobilteil aus der Halterung fällt, wenn das Telefon an der Wand montiert wird.
2. Befestigen Sie zwei selbstschneidende Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) auf einer vertikalen Linie in einem Abstand von 80 mm voneinander an einer Wand.
3. Platzieren Sie das Telefon auf den Schraubenköpfen und schieben Sie es nach unten, um es zu befestigen – siehe **Abbildung 2**.

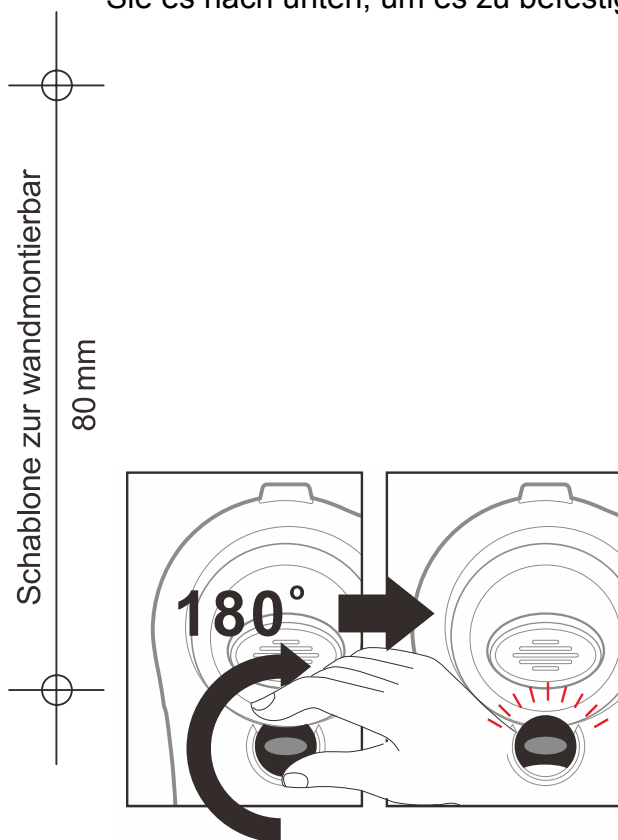


Abbildung 1

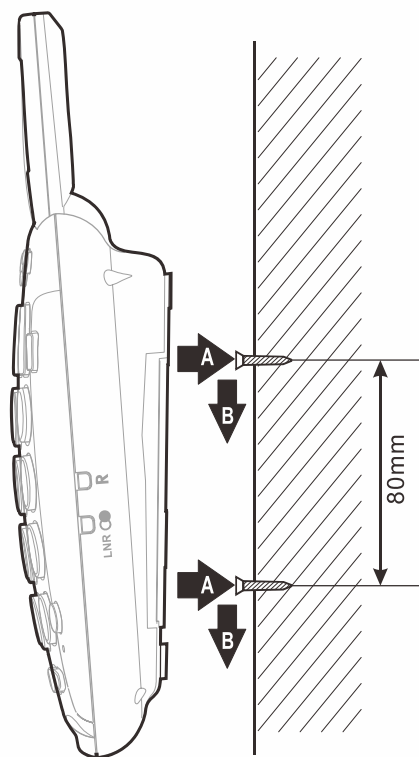


Abbildung 2

Anrufe tätigen

1. Heben Sie den Hörer ab und achten Sie auf den Wählton. Passen Sie die Lautstärke und die Toneinstellungen des Hörers an – siehe Seite 16.
2. Wählen Sie eine Nummer manuell mit den Zifferntasten (0–9).
3. Um den Anruf zu beenden, legen Sie den Hörer auf die Basisstation oder drücken Sie die Freisprechtaste, um den Anruf im Freisprechmodus zu beenden.

Sie können eine Telefonnummer wählen, wenn sich das Telefon im Standby-Modus befindet. Mit der Vorwahlfunktion können Sie vor dem Wählen wie folgt Korrekturen vornehmen:

1. Geben Sie eine Telefonnummer ein (bis zu 32 Ziffern). Überprüfen Sie diese. Wenn Sie bei der Eingabe einer Zahl einen Fehler gemacht haben, drücken Sie die Softtaste „**Löschen**“, um die Nummer zu bearbeiten oder verwenden Sie eine der drei Fototasten, um eine gespeicherte Nummer zu wählen – siehe Seite 18.
2. Wenn die Nummer korrekt angezeigt wird, heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die  Taste.

Zuletzt gewählte Nummer erneut wählen

Das Telefon kann bis zu 32 Ziffern erneut wählen.

1. Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die  Taste, um die Nummer zu wählen.
2. Drücken Sie die **LNR**  Taste (auf der rechten Seite der Basisstation). Das Telefon beginnt automatisch mit der Wahlwiederholung der letzten Nummer

Eine der zehn letzten Nummern erneut wählen

Das Telefon speichert die zehn zuletzt gewählten Nummern.

1. Um eine dieser zehn Nummern erneut zu wählen, drücken Sie im Standby-Modus die **LNR**  Taste, drücken Sie wiederholt die  Tasten, bis Sie die gewünschte Nummer gefunden haben, die Sie anrufen.
2. Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die  Taste, das Telefon wählt dann automatisch die Nummer.

Optionen für die Wahlwiederholungsliste

Sie können eine Nummer zum Telefonbuch hinzufügen oder eine Nummer aus dem Wahlwiederholungsbuch löschen.

1. Drücken Sie im Standby-Modus die **LNR**  Taste.
2. Gehen Sie mit den  Tasten auf die gewünschte Nummer.
3. Wenn die Nummer auf dem Display angezeigt wird, drücken Sie die Softtaste **Optionen**, um die gewünschte Option auszuwählen:
 - **Löschen**: ermöglicht Ihnen das Löschen der ausgewählten Nummer.
 - **Alles löschen**: ermöglicht es Ihnen, das gesamte Wahlwiederholungsbuch zu löschen.
 - **Zu Tel. Buch Hinz.:** ermöglicht es Ihnen, die Nummer zum Telefonbuch hinzuzufügen. Geben Sie einen Namen ein, den Sie mit dieser Nummer verwenden möchten, und drücken Sie dann die Softtaste **Speichern**. Wählen Sie die gewünschte Klingeltonmelodie für Ihren Kontakt aus und drücken Sie dann die Softtaste **Auswählen**.
4. Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die Softtaste **Zurück**.

Anrufe annehmen

Wenn das Telefon einen neuen Anruf erhält, klingelt das Telefon und die visuelle Rufanzeige blinkt.

1. Um einen Anruf entgegenzunehmen, heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprechtaste und sprechen Sie.
2. Passen Sie bei Bedarf die Lautstärke- und Toneinstellungen an – siehe Seite **16**.
3. Um den Anruf zu beenden, legen Sie den Hörer auf die Basisstation oder drücken Sie die Freisprechtaste.

Mikrofon stummschalten

Während eines Gesprächs können Sie das Mikrofon Ihres Telefons vorübergehend stummschalten. Der andere Teilnehmer hört Sie nicht mehr.

Um das Mikrofon stummzuschalten, drücken Sie während des Gesprächs die **Stummschalttaste**. Auf dem LCD erscheint „**Mute**“.

Um die Stummschaltung des Mikrofons aufzuheben, drücken Sie den Softkey **Stummschaltung aufheben**. Sie können Ihr Gespräch mit dem anderen Anrufer dann fortsetzen.

Verwendung der Lautstärke-, Boost- und Ton-Funktion

Dieses Telefon verfügt über spezielle Funktionen, die den Anruf lauter und klarer machen. Während eines Anrufs können Sie die Lautstärke und den Ton des Anrufs anpassen.

Einstellung der Hörer- und Lautsprecherlautstärke

Drücken Sie diese Tasten, um die Lautstärke des Hörers oder der Freisprecheinrichtung zu erhöhen oder zu verringern.



HINWEIS: Die Lautstärkeeinstellung des Mobilteilempfängers beträgt 0–20 Dezibel (eine Erhöhung um 20 Dezibel führt zu einem viermal lauterem Klang).

Mobilteil-Boost-Funktion


Drücken Sie die BOOST-Taste , um die Lautstärke des Mobilteils weiter zu erhöhen. Wenn die Hörerlautstärke auf Maximum eingestellt ist, erhöht die BOOST-Funktion die Lautstärke um weitere 20 Dezibel.

HINWEIS: Wenn die Lautstärke des Mobilteils auf Maximum eingestellt ist und BOOST aktiviert ist, erhöht sich die Gesamtlautstärke des Telefons um 40 Dezibel (eine Erhöhung um 40 Dezibel klingt 16-mal lauter).

Wenn die BOOST-Funktion aktiviert ist, leuchtet eine ROTE LED unter der BOOST-Taste. Auf dem Display wird Handset Boost angezeigt.

Ton-Softkey

Nehmen Sie den Hörer ab und drücken Sie mehrmals den Softkey „**Ton**“, um die gewünschte Toneinstellung zu finden. Die Einstellungen sind: **Normal**, **Tief**, **Tief +**, **Hoch +**, **Hoch**.

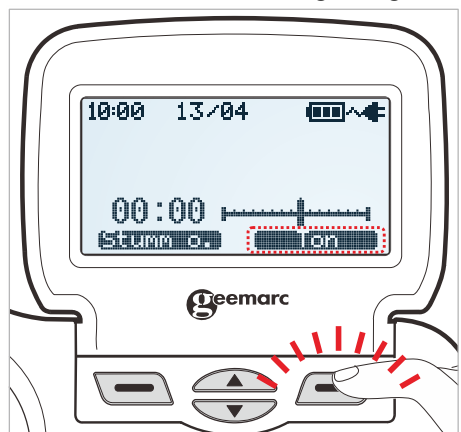

Hauptfunktionen

ACHTUNG: Dieses Telefon kann sehr laute Geräusche erzeugen. Wiederholte inkrementelle Exposition gegenüber Verstärkungspegeln über 18 dB kann für Menschen ohne Hörverlust schädlich sein. Stellen Sie den Lautstärkeregler nach Gebrauch immer auf die minimale Einstellung ein.

Nutzung des Telefons mit Hörgeräten

Dieses Telefon ist mit Hörgeräten kompatibel, die über eine Telefonspule (T-Spule) verfügen. Dadurch kann der Anruf klarer klingen. Stellen Sie den T-Schalter oder das Programm Ihres Hörgeräts auf die Position „T“. Halten Sie den Hörer nah an Ihr Hörgerät. Für eine optimale Leistung müssen Sie möglicherweise die Lautstärke am Telefon und an Ihrem Hörgerät anpassen.

HINWEIS : Wenn bei Ihren Hörgeräten die Telefonspulenfunktion nicht aktiviert ist, wenden Sie sich an Ihren Audiologen oder Hörgeräteakustiker.

Freisprech-Funktion

Wenn das Telefon klingelt, und auch während Sie telefonieren, können Sie die Freisprecheinrichtung einschalten, um den Komfort eines Freisprechgesprächs zu genießen.

Um die Freisprecheinrichtung einzuschalten, drücken Sie die Taste , wenn das Telefon klingelt oder während eines Anrufs.

Das Symbol  wird auf dem Display angezeigt

Um die Freisprecheinrichtung auszuschalten, nehmen Sie einfach den Hörer ab. Sie können das Gespräch über den Hörer fortsetzen oder die Taste  drücken, um das Gespräch zu beenden.

Das Symbol  verschwindet.

Anpassen der Freisprechlautstärke

Um die Lautstärke des Lautsprechers zu erhöhen oder zu verringern, drücken Sie die Lautstärketasten  oder  auf der Vorderseite des Telefons.

Fototasten und Direktwahltasten

Das Telefon kann drei häufig gewählte Nummern in den Foto-Kurzwahltasten und 10 Direktwahltasten auf den Tasten 0 bis 9 speichern.



Jede Speichertaste kann bis zu 20 Ziffern speichern.

HINWEIS : Das Telefon speichert automatisch alle Fotospeichernummern im Telefonbuch.

Nummern für Fototasten oder Direktwahltasten speichern

1. Geben Sie mit den Wähltasten die Nummer ein, die Sie speichern möchten. Mit dem Softkey „**Löschen**“ können Sie die Nummer bearbeiten.
2. Halten Sie eine der Fototasten oder Direktwahltasten gedrückt. Das Display zeigt die Telefonnummer an. Drücken Sie den Softkey **Speichern**. Das Display erscheint nun **Name**.
3. Geben Sie mit den Wähltasten den Namen ein, den Sie der Nummer zuordnen möchten. Sie können diesen mit dem Softkey „**Löschen**“ bearbeiten.
4. Drücken Sie den Softkey **Speichern**. Wählen Sie nun die gewünschte Klingelmelodie für Ihren Bildspeicherkontakt oder Direktwahltasten aus. Drücken Sie wiederholt die Taste  oder , um die gewünschte Klingelmelodie auszuwählen. Jedes Mal, wenn Sie die Taste  oder  drücken, klingelt das Telefon mit der ausgewählten Klingelmelodie.
5. Drücken Sie zur Bestätigung den Softkey „**Auswählen**“.

HINWEIS : Wenn Sie eine neue Nummer in eine Kurzwahl-Speichertaste eingeben, wird die zuvor gespeicherte Nummer automatisch gelöscht – siehe **Bearbeiten**.

Anruf über Fototaste oder Direktwahltaste

Drücken Sie im Standby-Modus eine der Fototasten oder halten Sie eine Direktwahltaste zwei Sekunden lang gedrückt. Das Display zeigt die entsprechende Nummer an. Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Taste . Das Telefon wählt dann automatisch die auf der Fotospeichertaste gespeicherte Nummer.

Hauptfunktionen

Verwenden der Optionen

1. Drücken Sie im Standby-Modus eine der Fotoasten oder halten Sie eine Direktwahltaste Speicher zwei Sekunden lang gedrückt.
2. Drücken Sie den Softkey **Optionen**, um die gewünschte Option auszuwählen. Diese sind:
 - **Nachricht Anhören:** Das Telefon spielt eine Sprachansage für diesen Eintrag ab. Die Sprachansage sagt den mit der Nummer verbundenen Namen an, oder wenn kein Name gespeichert ist, nur die Nummer.
 - **Nachricht Aufnahmen:** Ermöglicht Ihnen, den Namen für den ausgewählten Eintrag aufzuzeichnen (Sie können einen Sprachnamen von maximal 20 Sekunden hinterlassen).
 - **Nachricht löschen:** Ermöglicht das Löschen des Namens, den Sie für den ausgewählten Eintrag aufgezeichnet haben.
Drücken Sie den Softkey **Auswählen**, um den gesprochenen Namen zu löschen.
 - **Bearbeiten:** Ermöglicht Ihnen, den ausgewählten Eintrag zu bearbeiten.
Drücken Sie den Softkey **Auswählen**, um die Telefonnummer, den Namen und die Klingeltonmelodie zu bearbeiten.
Mit dem Softkey **Löschen** können Sie den Eintrag bearbeiten.
 - **Löschen:** Ermöglicht das Löschen des ausgewählten Eintrags.
Drücken Sie den Softkey **Auswählen**. Auf dem Display wird **LÖSCHEN?** angezeigt. Drücken Sie zum Bestätigen den Softkey **Auswählen**.

Hinweis: Wenn Sie eine Sprachansage für einen Eintrag aufzeichnen, erscheint das Symbol  auf dem Display vor dem Namen dieses Eintrags.

Blinksignal

Wenn die Leitung belegt ist, drücken Sie die **R**-Taste (Pos.11) auf der rechten Seite der Basis, um ein Blinksignal zu senden. Verwenden Sie diese Taste für Dienste (z. B. Anklopfen), die möglicherweise bei Ihrem Telefonnetzbetreiber verfügbar sind.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

HINWEIS: Damit diese Funktion in Ihrem Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie die richtige Zeit einstellen, zum Beispiel Großbritannien (100 ms), Frankreich (270 ms) und USA (600 ms).

Anrufer-ID

Dieses Telefon zeigt automatisch die Nummer / den Namen des Anrufers sowie Datum und Uhrzeit des Anrufs an. Das Telefon kann bis zu 30 Anrufe mit bis zu 15 Ziffern speichern.

WICHTIG: Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie einen Anrufer-ID-Dienst Ihres Netzbetreibers abonnieren.

Anrufliste einsehen

Verwenden Sie die Tasten , um durch die Einträge zu blättern. Die Liste zeigt die Reihenfolge der Anrufe. Der letzte Anruf wird oben in der Liste angezeigt.

Nummer aus der Anrufliste anwählen

Blättern Sie mit den Tasten  zu den Nummern. Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Taste , um eine Nummer aus der Liste zu wählen.

Anruflistenoptionen nutzen

1. Verwenden Sie die Tasten , um in der Liste nach einer Nummer zu suchen.
2. Drücken Sie den Softkey **Optionen**, um eine Nummer auszuwählen:
 - **Löschen:** Ermöglicht das Löschen einer Nummer aus der Liste. Drücken Sie den Softkey **Auswählen**. Auf dem Display wird **LÖSCHEN?** angezeigt. Drücken Sie dann zum Bestätigen den Softkey **Auswählen**.
 - **Alle löschen:** Ermöglicht das Löschen aller Nummern in der Liste. Drücken Sie den Softkey **Auswählen**. Auf dem Display wird **LÖSCHEN?** angezeigt. Drücken Sie dann zum Bestätigen den Softkey **Auswählen**.
 - **Zum Telefonbuch hinzufügen:** Ermöglicht das Hinzufügen einer Nummer zum Telefonbuch.
 - **Zu Block. hinzufügen:** Ermöglicht das Hinzufügen einer Nummer zur Sperrliste.

Hinweis: Wenn Sie die Option **Alle löschen** auswählen, wird auf dem Bildschirm die Meldung **Löschen?** angezeigt. Das Telefon fordert Sie zu einer doppelten Bestätigung auf. Drücken Sie **Auswählen** zur Bestätigung oder **Zurück**, um den Vorgang zu beenden.

Telefonbuch

Das Telefonbuch kann bis zu 30 häufig verwendete Nummern speichern. So können Sie problemlos einen Anruf tätigen, ohne sich die Telefonnummer merken oder eingeben zu müssen.

Zeichentabelle

Um ein bestimmtes alphanumerisches Zeichen einzugeben, drücken Sie ein- oder mehrmals die entsprechende Wähltaste für das gewünschte Zeichen gemäß der folgenden Tabelle, z. B. Drücken Sie einmal für das erste Zeichen, zweimal für das zweite und so weiter. Z.B. Für „R“ drücken Sie dreimal die Wähltaste 7.

Taste	Alphanumerische Bearbeitung (Zum Bearbeiten des Telefonbuchnamens und zum Umbenennen des Mobilteils)																	Nummernbearbeitung (Zur Bearbeitung von Telefonnummern und Datum/Uhrzeit)				
Tasten druckc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	1	.	,	:	;	!	¡	?	¿	*	#	&	%	\$	€	£	@	°	§			1
2	A	B	C	2	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	Ć	Č								2
3	D	E	F	3	Ď	È	É	Ê	Ë	Ě	Ė	Ĝ	Ğ									3
4	G	H	I	4	Ġ	Ì	Í	Î	Ï	Ĳ	Ĵ											4
5	J	K	L	5	Ł	Í	Ĺ															5
6	M	N	O	6	Ñ	Ň	Ń	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö										6
7	P	Q	R	7	Ř	Š	Ŝ	Š	ß													7
8	T	U	V	8	Ť	Ù	Ú	Û	Ü	Ů	Ű											8
9	W	X	Y	Z	Ŵ	Ý	Ŷ	Ÿ	Ž	Ž	Ž											9
0	Leerzeile	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	~		0, P (Pause)
*	Drücken Sie diese Taste, um von Groß auf Klein zu wechseln.																					*
#																						#
Taste	Alphanumerische Bearbeitung Kleiner Modus (zum Editieren von Telefonbuchnamen und zum Umbenennen von Mobilteilen)																	Nummernbearbeitung (zur Verarbeitung von Telefonnummern, Datum und Uhrzeit)				
Tasten druckc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	1	.	,	:	;	!	¡	?	¿	*	#	&	%	\$	€	£	@	°	§			1
2	a	b	c	2	à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	ć	č								2
3	d	e	f	3	ď	è	é	ê	ë	ě	ė	ĝ	ğ									3
4	g	h	i	4	ġ	ì	í	î	ï	ĳ	ĵ											4
5	j	k	l	5	ł	í	ĺ															5
6	m	n	o	6	ñ	ň	ń	ò	ó	ô	õ	ö	ø									6
7	p	q	r	S	ř	š	ŝ	š	ß													7
8	t	u	v	8	ť	ù	ú	û	ü	ů	ű											8

9	w	x	y	z	9	ŵ	ý	ÿ	ŷ	ÿ	ž	ž	ž									9
0	space	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	~		0, P (Pause)
*	Drücken Sie diese Taste, um von Groß auf Klein zu wechseln.																					*
#																					#	

Hinweise:

- Wenn Sie denselben Buchstaben zweimal oder einen anderen Buchstaben mit derselben Taste eingeben, warten Sie einige Sekunden, bis sich der Cursor automatisch bewegt, und wählen Sie dann den nächsten Buchstaben aus.
- Wenn Sie bei der Eingabe eines Namens oder einer Nummer einen Fehler machen, korrigieren Sie ihn mit der Softtaste **Löschen**. Dadurch wird bei jedem Drücken dieser Taste die letzte Ziffer gelöscht.

Einen Telefonbucheintrag hinzufügen

1. Geben Sie im Standby-Modus eine Telefonnummer (bis zu 20 Ziffern) ein und drücken Sie dann den Softkey **Speichern**.
2. Auf dem Display wird die Telefonnummer angezeigt. Mit dem Softkey **Löschen** können Sie die Telefonnummer ändern oder korrigieren. Drücken Sie zur Bestätigung den Softkey **Speichern**.
3. Das Display zeigt dann „Name“ an. Geben Sie den Namen ein, den Sie verwenden möchten, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Softtaste **Speichern**.
4. Wählen Sie die gewünschte Klingeltonmelodie aus (es stehen 10 Melodien zur Verfügung).
5. Drücken Sie nun den Softkey **Auswählen**, um Ihren Kontakt im Telefonbuch zu speichern.

Hinweise: Wenn Sie bei der Eingabe eines Namens oder einer Nummer einen Fehler machen, korrigieren Sie ihn mit der Softtaste **Löschen**. Dadurch wird die letzte Nummer jedes Mal gelöscht, wenn Sie diese Taste drücken.

Telefonbucheinträge einsehen

1. Drücken Sie im Standby-Modus den Softkey **Telefonbuch**, um das Telefonbuch aufzurufen.
2. Drücken Sie die Taste  oder  so oft, bis der gewünschte Eintrag angezeigt wird
3. Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Taste , um diese Nummer anzurufen

Hauptfunktionen

Hinweis: Wenn Sie die Funktion „Review Talking“ vorab aktivieren, kann das Telefon bei jedem Drücken der Taste  oder  die Nummer oder den Namen des Eintrags ansagen.

Telefonbuchoptionen nutzen

1. Drücken Sie den **Telefonbuch**-Softkey, um das Telefonbuch aufzurufen.
2. Drücken Sie wiederholt die Taste  oder , bis der Eintrag angezeigt wird.
3. Drücken Sie den Softkey **Optionen**, um die Optionen auszuwählen. Diese sind:
 - **Nachricht Anhören:** Dadurch kann das Telefon die Sprachansage dieses Eintrags abspielen. Wenn Sie den Namen für diesen Eintrag erfasst haben, sagt das System den Namen an, andernfalls nur die Nummer.
 - **Nachricht Aufnahmen :** Ermöglicht Ihnen, den Namen für den ausgewählten Eintrag aufzuzeichnen. Drücken Sie den Softkey **Auswählen**, um die Aufnahme zu starten, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**, um die Aufnahme zu stoppen. (Sie können einen Sprachnamen von maximal 20 Sekunden hinterlassen).
 - **Nachricht löschen:** Ermöglicht Ihnen, den Namen zu löschen, den Sie für den ausgewählten Eintrag aufgezeichnet haben. Drücken Sie den Softkey **Auswählen**, um den Namen der Stimme zu löschen.
 - **Bearbeiten:** Ermöglicht Ihnen, den ausgewählten Eintrag zu bearbeiten.
Drücken Sie den Softkey **Auswählen**, um die Telefonnummer, den Namen und die Klingeltonmelodie zu bearbeiten. Sie können diese mit dem Softkey **Löschen** bearbeiten.
 - **Löschen:** Ermöglicht das Löschen des ausgewählten Eintrags. Drücken Sie den Softkey **Auswählen**. Auf dem Display wird **LÖSCHEN?** angezeigt. Drücken Sie zum Bestätigen den Softkey **Auswählen**.

Hinweis: Wenn Sie eine Sprachansage für einen Eintrag aufzeichnen, erscheint das Symbol  vor dem Namen dieses Eintrags.

Menüauswahl

Um auf eine Menüoption zuzugreifen:

1. Um die Menüliste anzuzeigen, drücken Sie den **Menü**-Softkey.
2. Um durch die Menüoptionen zu blättern, drücken Sie wiederholt die Taste  oder .
3. Drücken Sie den Softkey **Auswählen**, um die gewünschte Menüoption auszuwählen, die auf dem Display angezeigt wird.
4. Bei Bedarf wiederholen.

Zum Verlassen eines beliebigen Menüs:

Wenn Sie den Softkey **Zurück** drücken, kehrt das Telefon zum vorherigen Bildschirm zurück.

Menükarte

Anzeige-Einstellungen	Sprachen (siehe Seite 26) Zeitformat (siehe Seite 26) Datumsformat (siehe Seite 27) Uhrzeit / Datum (siehe Seite 27) LCD Kontrast einstellen (siehe Seite 28) Hintergrundbeleuchtung (siehe Seite 28) Schriftgr.: X → x (siehe Seite 28)
Telefoneinstellungen	Melodie einstellen (siehe Seite 29) Tastaturtöne (siehe Seite 29) Hörverstärk. (siehe Seite 30) Tonhöhe (siehe Seite 30) Blitzdauer (siehe Seite 31) Menüsperren (siehe Seite 31) Automatik Aufl. (siehe Seite 31)

Menüfunktionen

Spracheinstellungen	Sprechende Tastatur (siehe Seite 32) Anruf ansg. (siehe Seite 32) Sprechendes Menü (siehe Seite 33)
SOS-Einstellungen	SOS-Nummer (siehe Seite 35) SOS-Sprachnachricht (siehe Seite 36) SOS-Code (siehe Seite 37) SOS-Temperaturalarm (siehe Seite 38) Warnsensor (siehe Seite 39)
Funksend. Anmelden	Anmelden (siehe Seite 40) Gerät Löschen? (siehe Seite 40) Anruf mit dem Notruf-Armband annehmen (siehe Seite 41)
Blockierte Nummern	Nummer hinzufügen (siehe Seite 42) Blockeinstellung (siehe Seite 42) Sperrliste (siehe Seite 42)

Sonderfunktionen:

Verwendung der Auto-Buchsen (siehe Seite 43)

Anrufer-CID bei Anklopfen (siehe Seite 44)

Anzeige-Einstellungen

Sie können die Displayeinstellungen anpassen, einschließlich Sprache, Stunden- und Datumsformat, Datums- und Stundeneinstellungen, Kontrast, Hintergrundbeleuchtung und kleine Schriftart.

Spracheinstellungen

Das Telefon unterstützt 6 Sprachen : Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch und Niederländisch.


Um die Sprache auf dem Display zu ändern:

1. Drücken Sie den Softkey **Menü**, um die Hauptmenüliste anzuzeigen.
2. Drücken Sie den Softkey **Auswählen**, um auf die **Anzeigeeinstellungen** zuzugreifen.
3. Drücken Sie den Softkey **Auswählen**, um **Sprachen** auszuwählen.
4. Drücken Sie wiederholt die Taste  oder , um durch die Optionen zu blättern. Das Display zeigt jede Sprachoption in ihrer eigenen Muttersprache an.
5. Drücken Sie den Softkey **Auswählen**, um die gewünschte Sprache auszuwählen.

Stundenformat einrichten

1. Drücken Sie den Softkey **Menü**, um die Hauptmenüliste anzuzeigen.
2. Drücken Sie den Softkey **Auswählen**, um auf die **Anzeigeeinstellungen** zuzugreifen.
3. Drücken Sie wiederholt die Taste  oder , um zum **Zeitformat** zu wechseln, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.
4. Drücken Sie wiederholt die Taste  oder , um das **12-Stunden-Format** oder das **24-Stunden-Format** auszuwählen, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.

Hinweis : Wenn Sie das **12-Stunden-Format** wählen, wird im Standby-Modus rechts neben der Uhrzeit **AM/PM** angezeigt.

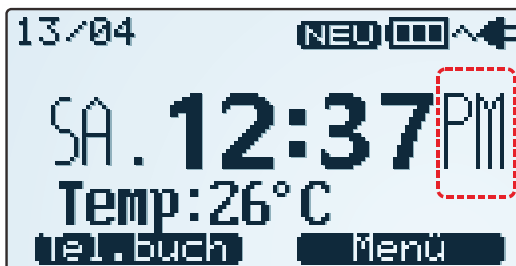

Datumsformat einrichten

1. Drücken Sie den Softkey **Menü**, um die Hauptmenüliste anzuzeigen.
2. Drücken Sie den Softkey **Auswählen**, um auf die **Anzeigeeinstellungen** zuzugreifen.
3. Drücken Sie wiederholt die Taste  oder , um zum **Datumsformat** zu wechseln, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.
4. Drücken Sie wiederholt die Taste  oder , um **MM/TT** oder **TT/MM** auszuwählen, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.

Uhrzeit & Datum einstellen

Im Standby-Modus zeigt das Display das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit an. Sie müssen Datum und Uhrzeit einstellen, damit das Telefon bei eingehenden Anrufen das korrekte Datum und die korrekte Uhrzeit des Anrufs protokolliert.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü**, um die Hauptmenüliste anzuzeigen.
2. Drücken Sie den Softkey **Auswählen**, um auf die **Anzeigeeinstellungen** zuzugreifen.
3. Drücken Sie die Taste , um zu **Uhrzeit / Datum** zu wechseln, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**. Das Display zeigt nun „**Zeit:**“ an.

Vorgehensweise für das 24-Stunden-Format:

4. Geben Sie die aktuelle Uhrzeit über die Zifferntastatur ein.
5. Geben Sie das aktuelle Datum über die Zifferntastatur ein.
6. Geben Sie das aktuelle Jahr über die Zifferntastatur ein.

Vorgehensweise für das 12-Stunden-Format:

4. Geben Sie die aktuelle Uhrzeit über die Zifferntastatur ein. Jetzt blinkt **AM** oder **PM**.
5. Sie haben 5 Sekunden Zeit, um die Taste  oder  zu drücken, um **AM** oder **PM** auszuwählen.
6. Geben Sie nach den 5 Sekunden das aktuelle Datum über die Zifferntastatur ein.
7. Geben Sie nun über die Zehnertastatur das aktuelle Jahr ein.

Hinweis:

- Sie können das Stundenformat und das Datumsformat auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter „**Einstellung des Stundenformats**“ und „**Einstellung des Datumsformats**“.

- Wir haben 22:00 bis 6:00 Uhr als „Nacht“ und 6:00 bis 22:00 Uhr als „Tag“ eingestellt.

LCD-Kontrast einstellen

1. Drücken Sie den Softkey **Menü**, um die Hauptmenüliste anzuzeigen.
2. Drücken Sie den Softkey **Auswählen**, um auf die **Anzeigeeinstellungen** zuzugreifen.
3. Drücken Sie die Taste , um zu **Kontrast** zu wechseln, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.
4. Drücken Sie wiederholt die Taste  oder , um eine von sechs Kontraststufen auszuwählen, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.

Hintergrundbeleuchtung einstellen

1. Drücken Sie den Softkey **Menü**, um die Hauptmenüliste anzuzeigen.
2. Drücken Sie den Softkey **Auswählen**, um auf die **Anzeigeeinstellungen** zuzugreifen.
3. Drücken Sie die Taste , um zu **Hintergrundbeleuchtung** zu wechseln, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.
4. Drücken Sie wiederholt die Taste  oder , um zwischen **Aus nach 10 Sekunden** oder **Immer AN** zu wählen, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.

Kleinere Schriftgröße auswählen

1. Drücken Sie den Softkey **Menü**, um die Hauptmenüliste anzuzeigen.
2. Drücken Sie den Softkey **Auswählen**, um auf die **Anzeigeeinstellungen** zuzugreifen.
3. Drücken Sie wiederholt die Taste  oder , um zu „**Schriftgr.**: X → x“ zu gelangen, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.
4. Drücken Sie wiederholt die Taste  oder , um **EIN** oder **AUS** auszuwählen, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.

Hinweis: Wenn Sie beim Vorwählen einer Nummer die Option **EIN** auswählen und die Nummer 8 Ziffern überschreitet, wird die Schriftart automatisch auf eine kleinere Größe geändert.

Telefoneinstellungen

Melodie, Lautstärke, Rufton, LED-Anzeige einstellen

In diesem Menü können Sie die Klingeltonmelodie, die Lautstärke und die Klingelanzeige einstellen.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü**, um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Taste , um zu **Telefoneinstellungen** zu gelangen, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.
3. Drücken Sie **Auswählen**, um „**Rufton**“ auszuwählen.
4. Drücken Sie **Auswählen**, um „**Melodie**“ auszuwählen.
5. Drücken Sie die  Tasten, um eine von 10 Klingelmelodien auszuwählen, und drücken Sie dann **Auswählen**.
6. Drücken Sie die Taste , um „**Lautstärke**“ auszuwählen, und drücken Sie dann **Auswählen**.
7. Drücken Sie die Tasten , um eine von vier Ruftonstufen auszuwählen, und drücken Sie dann **Auswählen** (von **AUS** bis zur Einstellung „**Lautstärke 3**“).
8. Drücken Sie die Taste , um „**Klingelanzeige**“ auszuwählen, und drücken Sie dann **Auswählen**.
9. Drücken Sie die Tasten , um **Ein** oder **Aus** für die LED-Anzeigen während des Klingelns auszuwählen, und drücken Sie dann **Auswählen**.

Auf **EIN** stellen, damit die LED an der Vorderseite des Telefons blinkt, wenn das Telefon klingelt.

Auf **AUS** einstellen, damit die LED nicht blinkt, wenn das Telefon klingelt.

WARNUNG: HALTEN SIE IHR OHR NIEMALS IN DIE NÄHE DES KLINGELTONS. DIE RUFTONLAUTSTÄRKE IST SEHR LAUT UND KANN IHR GEHÖR SCHÄDIGEN.

Tastenton einstellen

Mit dieser Funktion können Sie den Tastenton stumm schalten, wenn Sie eine beliebige Taste drücken (es sei denn, die sprechende Tastatur ist aktiviert).

1. Drücken Sie den Softkey **Menü**, um die Hauptmenüliste anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Taste , um zu **Telefoneinstellungen** zu gelangen, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.

3. Drücken Sie die Taste  oder , um **Tastaturtöne** auszuwählen, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.
4. Mit der Taste  oder  können Sie **EIN** oder **AUS** wählen, um den Tastenton zu aktivieren oder zu deaktivieren.
5. Drücken Sie zur Bestätigung den Softkey **Auswählen**.

Boost-Funktion für den Hörer

Mit dieser Einstellung wird die Hörerlautstärke automatisch erhöht, wenn Sie den Hörer abheben, um einen Anruf zu tätigen oder entgegenzunehmen.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü**, um die Hauptmenüliste anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Taste , um zu **Telefoneinstellungen** zu gelangen, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.
3. Drücken Sie die Taste , um zu **Höverstärk.** zu wechseln, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.
4. Wählen Sie mit der Taste  oder  die Option **EIN** zum Einschalten oder **AUS** zum Ausschalten der automatischen Lautstärkeerhöhungsfunktion des Mobilteils.
5. Drücken Sie zur Bestätigung den Softkey **Auswählen**.

HINWEIS: Stellen Sie zum Schutz des Gehörs die automatische Lautstärkeanhebung auf **AUS**, wenn hörende und schwerhörige Personen das Telefon benutzen.

Hörertonfunktion

Mit dieser Funktion können Sie die Toneinstellung im Mobilteilmodus auswählen.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü**, um die Hauptmenüliste anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Taste , um zu **Telefoneinstellungen** zu gelangen, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.
3. Drücken Sie die Taste , um zu **Tonhöhe** zu wechseln, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.
4. Wählen Sie mit der Taste  oder  eine der 5 Klangeinstellungen (**Tief +**, **Tief**, **Normal**, **Hoch**, **Hoch +**) aus.
5. Drücken Sie zur Bestätigung den Softkey **Auswählen**.

HINWEIS: Die Toneinstellungen **Treble+** und **Treble** verstärken die Töne *S, F* und *T*, was dazu beitragen kann, dass Anrufe klarer klingen.

Blinkzeit einstellen

1. Drücken Sie den Softkey **Menü**, um die Hauptmenüliste anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Taste , um zu **Telefoneinstellungen** zu gelangen, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.

Telefoneinstellungen

3. Drücken Sie wiederholt die Taste  oder , um zu **Blitzdauer** zu gelangen, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**. Das Display zeigt die aktuelle Einstellung an.
4. Drücken Sie wiederholt die Taste  oder , um zwischen **100 ms** (Großbritannien), **300 ms** (Frankreich) und **600 ms** (USA) zu wählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung den Softkey **Auswählen**.

Menüsperre einstellen

Mit dieser Funktion können Sie den Zugriff auf das Menü blockieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, müssen Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü**, um die Hauptmenüliste anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Taste , um zu **Telefoneinstellungen** zu gelangen, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.
3. Drücken Sie wiederholt die Taste  oder , um zur **Menüsperren** zu gelangen, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.
4. Wählen Sie mit der Taste  oder  **EIN** aus, um die Menüsperre zu aktivieren, oder **AUS**, um die Menüsperre zu deaktivieren

Automatische On-Hook Funktion

Wenn das Telefon ein Besetztzeichen erkennt, beendet es den Anruf automatisch nach 10 Sekunden. Wenn kein Besetztzeichen erkannt wird, können Sie die Zeit auf 30 oder 60 Minuten einstellen. Wenn Sie das Gespräch nicht ordnungsgemäß beendet haben, trennt das Telefon die Verbindung automatisch nach der eingestellten Zeit.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü**, um die Hauptmenüliste anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Taste , um zu **Telefoneinstellungen** zu gelangen, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.
3. Drücken Sie wiederholt die Taste  oder , um zu **Automatisches Auflegen** zu wechseln, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.
4. Drücken Sie die Taste  oder , um **EIN** oder **AUS** auszuwählen, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.
5. Nachdem Sie **EIN** ausgewählt haben, verwenden Sie die Taste  oder , um **30 Min.** oder **60 Min.** auszuwählen.
6. Drücken Sie zur Bestätigung den Softkey **Auswählen**.

Sprechende Tasten

Im Standby-Modus können Sie mit dieser Funktion die von Ihnen gewählte Nummer hören, ohne auf das Display schauen zu müssen.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü**, um die Hauptmenüliste anzuzeigen.
2. Drücken Sie wiederholt die Taste  oder , um zu den **Spracheausgarbe** zu gelangen, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.
3. Drücken Sie den Softkey **Auswählen**, um zu den **sprechenden Tasten** zu gelangen.
4. Drücken Sie die Taste  oder , um **EIN** auszuwählen, um die sprechende Tastatur einzuschalten, oder **AUS**, um die sprechende Tastatur auszuschalten.
5. Drücken Sie zur Bestätigung den Softkey **Auswählen**.

CID-Sprechfunktion

Mit dieser Funktion sagt das Telefon die Nummer eines neuen eingehenden Anrufs an (es sei denn, der Anrufer blockiert seine Nummer). Außerdem wird der Name oder Sprachname eines im Telefonbuch gespeicherten Kontakts angesagt.

Hinweis: Wenn für eine im Telefonbuch gespeicherte Nummer ein entsprechender Sprachname aufgezeichnet ist, sagt das Telefon bei einem eingehenden Anruf den mit dieser Nummer verknüpften Sprachnamen an.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü**, um die Hauptmenüliste anzuzeigen.
2. Drücken Sie wiederholt die Taste  oder , um zu den **Spracheausgarbe** zu gelangen, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.
3. Drücken Sie die Taste , um zu **Anrufansg.** zu wechseln, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.
4. Drücken Sie die Taste  oder , um **EIN** auszuwählen, um die CID-Sprechfunktion einzuschalten, oder **AUS**, um die CID-Sprechfunktion auszuschalten.
5. Drücken Sie zur Bestätigung den Softkey **Auswählen**.

Sprechendes Menü

Mit dieser Funktion kündigt das Telefon Menüoptionen an.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü**, um die Hauptmenüliste anzuzeigen.
2. Drücken Sie wiederholt die Taste  oder , um zu den **Spracheausgarbe** zu gelangen, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.
3. Drücken Sie wiederholt die Taste  oder , um zum **sprechenden Menü** zu gelangen, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.
4. Wählen Sie mit der Taste  oder  die Option **EIN** aus, um die Sprachmenüfunktion einzuschalten, oder **AUS**, um die Sprachmenüfunktion auszuschalten.
5. Drücken Sie zur Bestätigung den Softkey **Auswählen**.

SOS-Einstellungen für Notrufe

Mit dieser Funktion können Personen mit eingeschränkter Mobilität oder gesundheitlichen Problemen einen Angehörigen oder einen Notfallkontakt benachrichtigen, wenn sie sich unwohl fühlen oder stürzen. Das Notruf-SOS-System beinhaltet eine (SOS-) Sprachansage und wählt bis zu 5 gespeicherte Nummern jeweils dreimal an (Schleifenwahl).

Um das Notruf-SOS-System zu aktivieren, drücken Sie die Taste auf dem Notruf-Armband oder die **SOS-Taste** am Telefon. Dadurch wird der Notrufzyklus gestartet, beginnend mit der ersten gespeicherten Telefonnummer. Das Telefon wählt dann die zweite gespeicherte Nummer und so weiter. Das Telefon wiederholt diesen Zyklus **dreimal**, bis ein geliebter Mensch/Notfallkontakt den Anruf entgegennimmt.

Um den Notrufzyklus zu stoppen, Drücken Sie zweimal die Freisprech-Taste oder halten Sie die SOS-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

WICHTIGER HINWEIS: Die Entfernung (Reichweite), über das Notruf-Armband vom Telefon aus funktioniert, beträgt 20 bis 30 Meter, dies hängt jedoch von der Umgebung ab. Lokale Faktoren wie verwendete Materialien im Bauwesen und andere elektrische Geräte können die Reichweite verringern.

Die erste Person, die den Notruf entgegennimmt, hört die SOS-Ansage. Sie müssen die Wähltaste 0 auf ihrem Telefon drücken, um den Anruf zu bestätigen. Dadurch wird der SOS-Notruf-Wählzyklus gestoppt und automatisch der Freisprech-Freisprechmodus gestartet, um freihändige Gespräche zu ermöglichen.

HINWEIS : Wenn die SOS-Ansage fortgesetzt wird, während die Person den Anruf entgegennimmt, muss sie die Wähltaste 0 mehrmals drücken, andernfalls trennt das Notrufsystem den Anruf und wählt dann die nächste Telefonnummer im Zyklus.

WICHTIGER HINWEIS: Die Person, die den SOS-Notruf erhält, hört alle 1 Minute und 50 Sekunden Pieptöne. Nachdem sie den Signalton gehört haben, müssen sie die Wähltaste 0 auf ihrem Telefon drücken, um das Gespräch fortzusetzen. Wenn sie die 0-Taste nicht drücken, trennt das Telefon den Notruf nach 10 Sekunden automatisch.

SOS-Einstellungen

WICHTIGER HINWEIS:

- Für die Funktion des Notruf-SOS-Systems muss der Netzadapter eingesteckt sein.
- Im Falle eines Stromausfalls sorgen die wiederaufladbaren Pufferbatterien dafür, dass das Notruf-SOS-System weiterhin funktioniert. Wenn keine Akkus eingesetzt oder nicht geladen sind, funktioniert das Notruf-SOS-System bei einem Stromausfall nicht.
- Wenn dieses Telefon mit einem digitalen Telefonnetz verbunden ist (über einen digitalen Sprach- oder ADA-Adapter), funktioniert das Notruf-SOS-System während eines Stromausfalls nicht (es sei denn, der Netzbetreiber kann Notstrom bereitstellen). Für weitere Informationen und Unterstützung wenden Sie sich an Ihren Netzwerkdienstanbieter.
- Das Notruf-SOS-System funktioniert bei einem Stromausfall nur, wenn das Telefon an ein PSTN-Telefonnetz (analog) angeschlossen ist und die Akkus eingelegt sind.

SOS-Nummern speichern

1. Drücken Sie den Softkey **Menü**.
2. Drücken Sie wiederholt die Taste  oder , um zu den **SOS-Einstellungen** zu gelangen, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.
3. Drücken Sie den Softkey **Auswählen**, um die **SOS-Nummer** auszuwählen.
4. Das Telefon verfügt über bis zu 5 SOS-Nummernspeicherplätze (1~5). Drücken Sie die Taste  oder , um den ersten Speicherplatz auszuwählen, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.
5. Geben Sie die Telefonnummer über die Zifferntastatur ein (maximal 16 Ziffern für jeden Speicher). Drücken Sie bei Bedarf den Softkey **Löschen**, um die vorherige Ziffer zu löschen.
6. Drücken Sie zum Speichern den Softkey **Speichern**.

SOS-Nachricht aufnehmen

Das Telefon kann Ihre SOS-Nachricht aufzeichnen (bis zu 30 Sekunden).

1. Drücken Sie den Softkey **Menü**.
2. Drücken Sie wiederholt die Taste  oder , um zu den **SOS-Einstellungen** zu gelangen, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.
3. Drücken Sie die Taste , um **SOS-Sprachnachricht** auszuwählen, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.
4. Drücken Sie die Taste , um **Nachricht aufnehmen** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung den Softkey **Auswählen**. Die Nachricht kann bis zu 20 Sekunden lang sein.

HINWEIS:

- *In IHRER Nachricht müssen Sie den Notfallkontakt anweisen, die Wähltaste 0 (Null) auf seinem/ihrer Telefon zu drücken. Sagen Sie ihnen außerdem, dass sie nach 1 Minute und 50 Sekunden einen Piepton hören und anschließend sofort die Wähltaste 0 (Null) auf ihrem Telefon drücken müssen, um die Leitung offen zu halten.*
- *Möglicherweise möchten Sie Ihren Notfallkontakten die oben genannten Informationen im Voraus mitteilen, damit diese im Falle eines SOS-Notrufs von Ihnen wissen, was zu tun ist.*
- *Nachdem Sie Ihre Nachricht aufgezeichnet haben (die weniger als 20 Sekunden dauern kann), drücken Sie zum Bestätigen und Beenden den Softkey **Auswählen**.*

SOS-Nachricht abspielen

Mit dieser Funktion können Sie Ihre SOS-Nachricht abhören.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü**.
2. Drücken Sie wiederholt die Taste  oder , um zu den **SOS-Einstellungen** zu gelangen, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.
3. Drücken Sie die Taste , um **SOS-Sprachnachricht** auszuwählen, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.
4. Drücken Sie den Softkey **Auswählen**, um **Nachricht abspielen** auszuwählen. Sie können die Softtaste **Auswählen** drücken, um die Wiedergabe der Nachricht zu stoppen.

SOS-Nachricht löschen

Mit dieser Funktion können Sie Ihre SOS-Nachricht löschen. Dadurch wird die ursprüngliche SOS-Nachricht wiederhergestellt.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü**.
2. Drücken Sie wiederholt die Taste  oder , um zu den **SOS-Einstellungen** zu gelangen, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.
3. Drücken Sie die Taste , um **SOS-Sprachnachricht** auszuwählen, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.
4. Drücken Sie die Taste , um **Nachricht löschen** auszuwählen.
5. Drücken Sie den Softkey **Auswählen**, um Ihre SOS-Nachricht zu löschen und zu bestätigen.

SOS-Notruf

Sobald die SOS-Notfallkontaktnummer (n) und die Nachricht eingerichtet sind, können Sie die SOS-Funktion nutzen. Drücken Sie die **SOS**-Taste am Telefon oder die SOS-Taste des Notruf-Armbands. Das Telefon wählt nacheinander die ersten fünf SOS-Notrufnummern, bis jemand Ihren Anruf entgegennimmt. Erfolgt innerhalb von 30 Sekunden keine Antwort oder ist die Leitung besetzt, wählt das Telefon die zweite SOS-Nummer. Wenn von dieser Nummer innerhalb von 30 Sekunden keine Antwort erfolgt oder diese Leitung besetzt ist, wählt das Telefon die nächste Nummer, bis das Telefon alle von Ihnen eingestellten Nummern anruft. Das Telefon wählt jede Nummer dreimal.

HINWEIS: Für eine optimale Freisprechlautstärke im **SOS-Modus** stellen Sie die Lautstärke auf die hohe Position ein (wie für einen Standardanruf eingestellt).

SOS PIN-Code einrichten

1. Drücken Sie den Softkey **Menü**.
2. Drücken Sie wiederholt die Taste  oder , um zu den **SOS-Einstellungen** zu gelangen, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.
3. Drücken Sie die Taste  oder , um den **SOS-Code** auszuwählen, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.
4. Das Display zeigt **Code** an. Geben Sie einen 4-stelligen PIN-Code ein, den Sie mit der Tastatur verwenden möchten.
5. Drücken Sie zur Bestätigung den Softkey **Speichern**.

Nachdem Sie den PIN-Code festgelegt haben, können Sie diese Funktion wie folgt nutzen:

Wenn Sie jemand anruft und Sie den Hörer abheben möchten oder nicht, wechselt das Telefon in den Zustand **Automatisch abheben**, nachdem der Klingelton des Telefons zehnmal geklingelt hat. Bei **Automatisch abheben** können Sie den Anrufer nicht hören oder den Anruf nicht entgegennehmen. Der Anrufer hört zwei „Bip-Bip“-Töne, um ihn an die Eingabe des PIN-Codes zu erinnern. Nachdem der Anrufer den PIN-Code eingegeben hat, schaltet das Telefon automatisch auf Freisprecheinrichtung um, um Gespräche per Freisprecheinrichtung zu ermöglichen.

SOS-Temperatur Anruf

Mit dieser Funktion können Sie einen SOS-Alarm einstellen, wenn die Umgebungstemperatur im Raum (in dem sich das Telefon befindet) zu niedrig oder zu hoch ist. Sie können wählen, wie oft das Telefon die Temperatur misst, von einmal pro Stunde bis einmal alle 24 Stunden.

Die Person, die den Anruf entgegennimmt, hört die Meldung „**Temperatur im Raum zu niedrig oder zu hoch**“.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü**.
2. Drücken Sie wiederholt die Taste  oder , um zu den **SOS-Einstellungen** zu gelangen, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.
3. Drücken Sie die Taste  oder , um **SOS-Temperaturalarm** auszuwählen, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.
4. Drücken Sie die Taste  oder , um **AN** auszuwählen, um die Temperaturfunktion einzuschalten (wenn die Temperatur den Bereich überschreitet). SOS-Anrufe werden automatisch aktiviert. Wählen Sie **AUS**, um den Temperaturalarm auszuschalten.
5. Drücken Sie den Softkey **Auswählen** und geben Sie dann die untere Temperaturgrenze über die Wähltasten des Telefons ein. Sie können die untere Temperaturgrenze nicht über 20 Grad Celsius einstellen. Geben Sie mit den Wähltasten die gewünschte untere Temperaturgrenze ein. Drücken Sie dann den Softkey **Löschen**, um die Temperaturanzeige zu löschen.
6. Drücken Sie zur Bestätigung den Softkey **Auswählen**.

SOS-Einstellungen

7. Drücken Sie die Taste , um **Maxi Temp** anzuzeigen, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.
8. Geben Sie die Höchsttemperatur mit den Wähltasten des Telefons ein. Geben Sie mit den Wähltasten die korrekte Höchsttemperatur ein. Sie können die Hochtemperaturstufe nicht unter 25 Grad Celsius einstellen. Drücken Sie den Softkey **Löschen**, um die Temperaturanzeige zu löschen.
9. Drücken Sie die Taste , um **wiederholen 1-24 Stunden** anzuzeigen, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.
10. Geben Sie die Anzahl der Stunden mit den Wähltasten des Telefons ein. Mit dieser Zeit können Sie die Anzahl der Stunden zwischen zwei Alarmmerkennungen festlegen. Drücken Sie den Softkey **Löschen**, um die Stundeneinstellungsanzeige zu löschen.
11. Drücken Sie zur Bestätigung den Softkey **Auswählen**.
12. Drücken Sie zum Beenden den Softkey **Zurück**.

Sensoralarm

1. Drücken Sie den Softkey **Menü**.
2. Drücken Sie wiederholt die Taste  oder , um zu den **SOS-Einstellungen** zu gelangen, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.
3. Drücken Sie die Taste  oder , um **Warnsensor** auszuwählen, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.
4. Sie können den Aktivierungsmodus der Sensorerkennung wählen. Diese sind: Standard, 24-Stunden-Erkennung und AUS.

Klassisch: Wenn Sie Kontakt haben, Ihr Telefon ruft die erste SOS-Nummer an. Die Person, die den Anruf entgegennimmt, hört die Sprachnachricht „Alarm durch externen Sensor erkannt“.

24-Stunden-Erkennung: Ihr Telefon ruft die erste SOS-Nummer an, wenn nach 24 Stunden keine Erkennung erfolgt.

Auslöser: NC (Kontakt geschlossen) oder NO (Kontakt offen). Sie müssen Ihren Kontakt in Reparatur 16 verbinden.

AUS: Dieser Modus schaltet den Sensor-SOS-Modus aus.


5. Drücken Sie zur Bestätigung den Softkey **Auswählen**.

Notruf-Armband Informationen

Einen neues Notruf-Armband registrieren

Das Notruf-Armband ist beim Telefon vorregistriert (gepaart). Wenn das Notruf-Armband jedoch nicht mehr beim Telefon registriert ist, besteht die Möglichkeit, sie erneut zu registrieren.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü**.
2. Drücken Sie wiederholt die Taste  oder , um zu **Funksend. Anmelden** zu gelangen, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.
3. Drücken Sie zum **Anmelden** den Softkey **Auswählen**.
4. Die Kopplung wird auf dem Display angezeigt.
5. Drücken Sie die SOS-Taste auf dem Notruf-Armband  zum Koppeln.

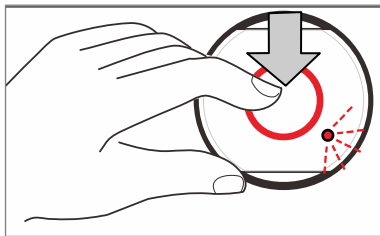

Kopplung für alle Notruf-Armbänder aufheben

Mit dieser Funktion können Sie alle Notruf-Armbänder vom Telefon abmelden.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü**.
2. Drücken Sie wiederholt die Taste  oder , um zu **Funksend. Anmelden** zu gelangen, und drücken Sie den Softkey **Auswählen**.
3. Drücken Sie die Taste , um **Gerät Löschen?** auszuwählen.
4. Auf dem Display wird **Gerät löschen** angezeigt.

Austausch der Batterie des Notruf-Armbands

Um die Batterie des Armbands auszutauschen, wenden Sie sich bitte an die deutsche Service-Hotline unter **+49 (0) 30 209 95 789** oder wenden Sie sich an einen Uhrmacher, der die Batterie austauschen kann.

Der Armband-Batterietyp ist: **CR2430**.

Reichweite

Es gibt zwei Arten von SOS-Notrufarmbändern, die mit dem Serenities100-Telefon funktionieren:

Im Lieferumfang ist das serienmäßig anthrazitfarbene Notruf-Armband enthalten. Dies funktioniert bis zu einer Entfernung von 20 bis 30 Metern vom Telefon.

Notruf-Armband Informationen

Ein optionales Extra ist das Vital Base Vibby Oak®-Fallsensor Armband. Dadurch wird erkannt, wenn jemand stürzt, und nach 40 Sekunden wird die SOS-Funktion auf dem Serenities-Telefon aktiviert.

Die **IP**-Einstufung des Armbands beträgt **67**.

Die Batterielebensdauer des Armbands beträgt etwa zwei Jahre. Wir empfehlen, jeden Monat einen Test-SOS-Anruf durchzuführen, um zu überprüfen, ob die Batterie ausreichend geladen ist.

Bitte teilen Sie der Person, die den SOS-Anruf erhält, mit, dass Sie einen Systemtest durchführen möchten.

Anruf mit dem Notruf-Armband annehmen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, aber Schwierigkeiten haben, an Ihr Mobilteil heranzukommen, drücken Sie die Taste an Ihrem Notruf-Armband, um den Anruf über die Freisprecheinrichtung anzunehmen und freihändig zu sprechen.

HINWEIS: *Sie müssen weniger als 3 Meter von Ihrem Telefon entfernt sein, um im Freisprechmodus problemlos über die Freisprecheinrichtung sprechen zu können. Wenn Sie weiter entfernt sind, kann es sein, dass Ihr Gesprächspartner Sie nicht richtig versteht und Sie ihn möglicherweise nicht hören.*

Halten Sie am Ende des Gesprächs die SOS-Taste am Telefon 3 Sekunden lang gedrückt, um den Anruf zu beenden.

Blockierte Nummern einrichten

Blockierte Nummern

Mit dieser Funktion können Sie unerwünschte Anrufe blockieren.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü**.
2. Drücken Sie wiederholt die Taste  oder , um zu **Blockierte Nummern** zu gelangen, und drücken Sie dann den Softkey **Auswählen**.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswählen**, um **Nummer hinzufügen** auszuwählen.
4. Geben Sie mit den Wähltasten des Telefons die Telefonnummern ein, die Sie blockieren möchten, und drücken Sie dann **Speichern**, um zu **Nummer hinzufügen** zurückzukehren
5. Drücken Sie die Taste  oder , um **Blockeinstellung** auszuwählen.

Drücken Sie **Auswählen** und wählen Sie dann mit der Taste  oder  **Alle blockieren, Sperr Liste, INTERN und Privat** oder **AUS** aus. Wählen Sie eine beliebige Option, um zur Blockeinstellung zurückzukehren.

Hinweis: Fügen Sie der Sperrliste keine Telefonnummern aus der Kontaktliste, Bilder im Speicher oder SOS-Nummern hinzu.

Liste mit blockierten Nummern einsehen

Mit dieser Funktion können Sie unerwünschte Anrufe blockieren.

Drücken Sie die Taste  oder , um alle in der Liste gespeicherten Telefonnummern anzuzeigen

HINWEISE: Wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken, können Sie eine oder alle aufgezeichneten Telefonnummern löschen.


Drücken Sie die Taste  oder , um alle in der Liste gespeicherten Telefonnummern anzuzeigen.

Auf dem Display wird **CONFIRM?** angezeigt. Drücken Sie zum Bestätigen den Softkey **Auswählen**.

Verwendung der Audio-Buchsen

Verwendung der Audio-Buchsen

Auf der Rückseite des Telefons befinden sich zwei 3,5-mm-Audio-Klinkenbuchsen.

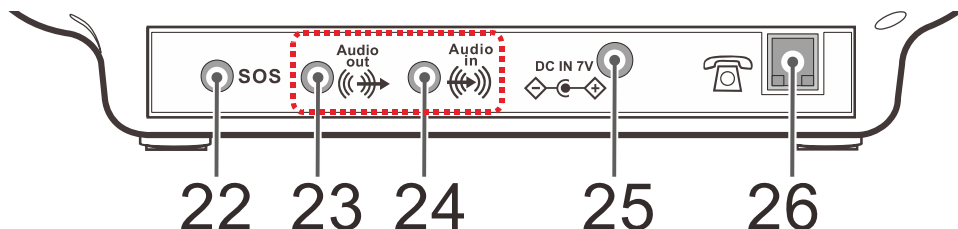

Der 3,5-mm-Audioausgang  (Markierung 23) dient dazu, ein Audiosignal Ihres Serenities 100 an ein Handy oder Tablet zu übertragen, um es mithilfe des 4-adrigen Kabels (im Lieferumfang des Serenities 100 V2T enthalten) in Text umzuwandeln, den Sie mit einer App abrufen können.

Über die Audioeingangsbuchse  können Sie das Telefon an ein Smartphone, Tablet oder einen Computer anschließen, der über eine **Speech-to-Text**-Funktion verfügt. So kann die Anwendung ein Telefongespräch transkribieren.

Sie müssen lediglich eine App auf Ihrem Empfänger installieren, die Sprache in Text umwandelt (z.B. Instant Transcription, kostenlos für Android).

Verbinden Sie das Gerät über das mitgelieferte Kabel mit Ihrem Mobiltelefon oder Tablet.

Hinweis: Wenn Sie beim Anschließen eines Geräts wie z. B. Tablet, Handy an den Audioausgang IN oder OUT ein Summen in Ihren Kopfhörern hören, ziehen Sie bitte den Netzadapter aus der Steckdose oder verwenden Sie einen qualitativ hochwertigeren.

Anrufer-ID in der Warteschleife

Anrufer-ID für Anrufe in der Warteschleife

Wenn Sie den Anklopfdienst Ihres Telefonnetzbetreibers abonnieren und die Anklopffunktion aktivieren, zeigt das Mobiltelefon während eines Gesprächs den Namen und die Nummer eines zweiten Anrufers an.

Informationen zur Anrufer-ID
werden angezeigt

Anrufer 1 436-1234

Anrufer 1 436-1234

1. Wenn Sie am Telefon sind, zeigt das Telefon automatisch den Namen und die Nummer des zweiten Anrufers an.
2. Drücken Sie die **R**-Taste + Ziffer 2, um den zweiten Anruf anzunehmen.
3. Drücken Sie die **R**-Taste, um Ihr Gespräch mit dem ersten Anrufer fortzusetzen.

Funktionsübersicht

- FSK- und DTMF-Dualsystem-Anrufer-ID
- Extra großer Anrufer-ID-Bildschirm
- Anrufer-ID-Liste mit bis zu 20 Einträgen
- Wahlwiederholungsliste mit bis zu 10 Einträgen
- Telefonbuch mit bis zu 30 Einträgen
- Verstärkungsfunktion 40 dB
- Audioeingangs- und -ausgangsbuchse 3,5 mm zum Anschluss eines Tablets oder Mobiltelefons
- Hörgerätekompatibel
- Einstellbare Lautstärke- und Tonregelung
- Einstellbarer extra lauter Klingelton
- Große Tastaturtasten
- Echtzeituhr mit Datum, Uhrzeit und Wochentag
- Blinken (R-Taste), Stumm
- 3 Fotospeichertasten
- LCD-Kontrasteinstellung
- Einstellung des Stunden- und Datumsformats
- Freisprecheinrichtung
- Wandhalterung
- Wählen und Sprechen, CID-Sprechfunktion und Menü-Sprechfunktion
- 5 SOS-Nummern werden automatisch gewählt
- SOS-Nachrichtenaufzeichnung
- Temperatur-SOS-Alarmmodus
- Kontakt-SOS-Modus (Kontakt öffnen oder schließen)
- Blockierte Nummern
- 3 Blockeinstellungsmodi (Alle blockieren, Liste blockieren, Int & privat, AUS)

Kein Klingelton

1. Überprüfen Sie, ob alle Telefonkabelverbindungen fest im Telefon und in der Telefonsteckdose eingesteckt sind.
2. Schließen Sie ein anderes Telefon an die Telefonsteckdose an, um sicherzustellen, dass Ihr Telefondienst/Ihre Telefonleitung ordnungsgemäß funktioniert.

Kein hörbarer Klingelton

1. Stellen Sie sicher, dass der Klingelton nicht ausgeschaltet ist.
2. Überprüfen Sie die Lautstärke des Ruftons.
3. Möglicherweise haben Sie zu viele Nebenstellen auf Ihrer Leitung. Versuchen Sie, andere Geräte auszustecken.
4. Überprüfen Sie, ob Ihr Mobilteil richtig am Telefon montiert ist.
5. Stellen Sie sicher, dass die Freisprecheinrichtung nicht aktiviert ist.

Keine Verstärkung

1. Überprüfen Sie, ob das Netzteil angeschlossen ist.

Rauschen, statische Aufladung, Interferenzen während der Verwendung des Mobilteils

1. Für Haushalte mit einem DSL-Anschluss (digital) oder in der Nähe von Funktürmen kann ein Filter erforderlich sein.

Informationen zur Anrufer-ID werden nicht angezeigt

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die Anrufer-ID bei Ihrem Netzanbieter abonniert haben.

SICHERHEITSHINWEISE

Allgemein

Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang des Produkts enthaltene Netzteil.

Öffnen Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich für alle Reparaturen an die Hotline.

Reinigung

Reinigen Sie das Telefon mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie niemals Polituren oder Reinigungsmittel – diese könnten die Oberfläche oder die Elektrik im Inneren des Telefons beschädigen.

Umwelt

Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

Sorgen Sie immer für einen freien Luftstrom über die Oberflächen des Telefons.

Legen Sie keine Teile des Telefons ins Wasser und verwenden Sie es nicht in feuchten oder nassen Umgebungen, z. B. in Badezimmern.

Setzen Sie das Telefon keinem Feuer oder anderen gefährlichen Bedingungen aus.

Ziehen Sie bei Gewitter den Stecker Ihres Telefons aus der Telefonsteckdose, da es sonst beschädigt werden könnte. Ihre Garantie deckt keine Gewitterschäden ab.

Das Telefon ist für den Betrieb in einem Temperaturbereich von 5 °C bis 45 °C ausgelegt.

Ab dem Zeitpunkt des Kaufs Ihres Geemarc Serenities 100 gewährt Geemarc eine Garantie von zwei Jahren. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzlieferungen (nach unserem Ermessen) kostenlos. Sollten es ein Problem geben, wenden Sie sich an unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Webseite unter **www.geemarc.com**. Die Garantie deckt keine Unfälle, Fahrlässigkeit oder Brüche an Teilen ab. Das Produkt darf nicht von Personen manipuliert oder auseinandergenommen werden, die kein autorisierter Geemarc-Vertreter sind. Die Geemarc-Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

WICHTIG : IHRE QUITTUNG IST TEIL IHRER GARANTIE UND MUSS IM FALLE EINES GARANTIEANSPRUCHS AUFBEWAHRT UND VORGELEGT WERDEN.

ERKLÄRUNG: Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Serenities 100 den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/UE entspricht.



Das Telefon funktioniert nicht, wenn der Leitungsstrom weniger als 18 mA beträgt.

*Die Konformitätserklärung kann unter **www.geemarc.com** eingesehen werden.*

Elektrischer Anschluss : Das Gerät ist nur für den Betrieb mit einer 230-V-50-Hz-Stromversorgung ausgelegt. (Einstufung als „gefährliche Spannung“ gemäß der Norm EN62368-1). Das Gerät verfügt nicht über einen integrierten Ein-/Ausschalter. Um die Stromversorgung zu unterbrechen, schalten Sie entweder die Stromversorgung an der Netzsteckdose aus oder ziehen Sie den Netzadapter ab. Stellen Sie bei der Installation des Geräts sicher, dass die Netzsteckdose leicht zugänglich ist.

Telefonanschluss: Die im Telekommunikationsnetz vorhandenen Spannungen werden gemäß der Norm EN62368-1 als TNV-3 (Telekommunikationsnetzspannung) eingestuft.

RECYCLING-RICHTLINIEN

Die WEEE-Richtlinie (Waste Electrical and Electronic Equipment) gewährleistet das ordnungsgemäße Recycling elektrischer Produkte am Ende ihrer Nutzungsdauer.

Wenn dieses Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, werfen Sie es bitte nicht in den Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Deponieren Sie das Produkt in einer entsprechenden örtlichen WEEE-Sammelstelle.
- Oder geben Sie das Produkt beim Händler ab. Wenn Sie ein neues Produkt kaufen, sollte es hier angenommen werden.

Wenn Sie diese Hinweise beachten, gewährleisten Sie den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt.



Für Produktsupport und Hilfe besuchen Sie unsere Webseite unter

www.geemarc.com

E-Mail: **help@geemarc.com**

Telefon: **+49 (0) 30 209 95 789**

Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59760 Grande-Synthe,
Frankreich.

Hergestellt für Geemarc Telecom S.A. in China

AD / DC Adapter

Hersteller	Shenzen YWK Electronics (Shenzen) co, Ltd 2/F Building 76, No.88 of industrial Zone, Xingtangkeng Village, Henggang street, 518106 Shenzen City, GuangDong, People's Republic of China.
Modell:	YWK-AD070050-E
Eingangsspannung: Ausgangsspannung:	100-240V 50/60Hz;  DC7V  0.5A, 3.5W adapter
Durchshnittliche aktive Effizienz	75.40%
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10%)	68.03%
Leerlauf Stromverbrauch	0.053W



UGSerenities100_Ge_V1.4