



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE **Fr**

Vérifiez si une version plus récente de ce guide de démarrage rapide est disponible sur notre site Internet: www.geemarc.com

ATTENTION: Utilisez uniquement la batterie fournie. Il peut y avoir un risque d'explosion si un mauvais type de pile est utilisé pour l'unité principale. La batterie ne peut pas être soumise à des températures extrêmes élevées ou basses et à une faible pression d'air à haute altitude pendant l'utilisation, le stockage ou le transport. La mise au rebut de la batterie dans le feu ou un four chaud, ou l'écrasement ou la coupe mécanique de la batterie peut entraîner une explosion. Laisser la batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Jetez la batterie usagée conformément aux instructions.

Température d'utilisation du produit (de 0 °C ~ 40°C).

Utilisez uniquement les adaptateurs et la batterie répertoriés ci-dessous.


Informations sur l'adaptateur secteur: sortie: 6V DC 0.6A, 3.6W. Ten Pao. Modèle: S005BNV0600060 (EU), S005BNB0600060 (UK).

Batterie rechargeable: Modèle: KH-AAAJ600-D x 3pcs. 1.2V DC, 600mAh. Corun.

CONTENU DU COLIS


1 unité de base téléphonique, 1 combiné sans fil, 1 adaptateur secteur, 1 cordon téléphonique, 3 batteries NiMH, 1 guide de démarrage rapide.

Base de connexion

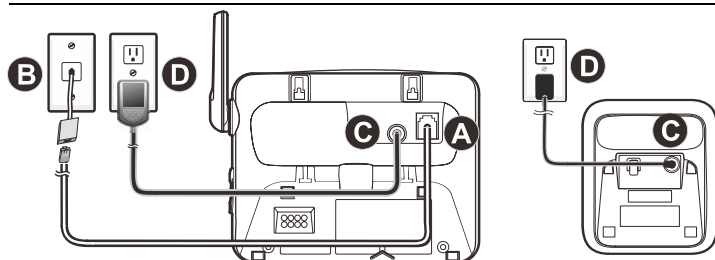

1

Unité de base / Combiné

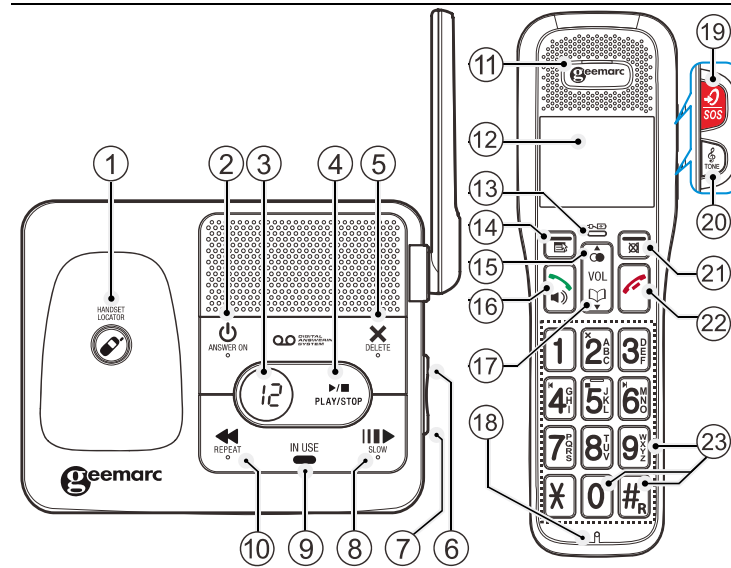

INSTALLATION

Branchement du téléphone

Branchez le câble téléphonique dans la prise téléphonique (A) et dans la prise murale téléphonique (B).

Branchez le jack de l'adaptateur secteur dans l'unité de base (C) puis branchez la fiche de l'adaptateur secteur sur le secteur (D).

Remarque: utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec le téléphone.

Branchement de la batterie

Faites glisser le couvercle des batteries vers le bas.

Installez les 3 batteries dans le compartiment, tel qu'indiqué, en respectant la polarité (+, -)

Alignez le couvercle à plat contre le compartiment des batteries, puis faites-le glisser vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans la bonne position.

Chargement des batteries

Chargez les batteries pendant au moins 16 heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Unité de base

1. LOCALISATEUR DU COMBINÉ

Lorsque le téléphone est en veille, appuyez sur la touche pour faire sonner le ou tous les combinés.

2. RÉPONDEUR ON

Appuyez sur la touche pour activer/désactiver le répondeur.

3. COMPTEUR DE MESSAGES

Clignote en cas d'appel entrant.

4. LIRE/STOP

Appuyez sur la touche pour démarrer ou arrêter la lecture d'un message.

5. SUPPRIMER

Appuyez sur la touche pour supprimer le message en cours de lecture. Appuyez longuement pour supprimer tous les anciens messages lorsque le téléphone n'est pas utilisé.

6- VOL (▲)

Appuyez sur la touche pour augmenter le volume d'écoute pendant la lecture d'un message. Lorsque l'appareil est en veille, appuyez sur la touche pour augmenter le volume de sonnerie de l'unité de base.

7- VOL (▼)

Appuyez sur la touche pour diminuer le volume d'écoute pendant la lecture d'un message. Lorsque l'appareil est en veille, appuyez sur la touche pour diminuer le volume de sonnerie de l'unité de base.

8- SLOW (Lecture lente) :

Durant l'écoute du message : Appuyez sur la touche pour ralentir la vitesse de lecture.

9. IN USE (EN LIGNE)

ACTIVÉ lorsque l'on utilise les combinés ou lorsque le système répond à un appel entrant.

CLIGNOTÉ lorsqu'un combiné est en cours d'enregistrement ou en cas d'appel entrant.

10- RÉPÉTER

Appuyez sur la touche pour répéter un message.

2

Pressez deux fois pour lire le message précédent.

Combiné

11. ÉCOUTEUR

12. ÉCRAN LCD

13. VOYANT DE CHARGE

Constamment allumé lorsque le combiné est en cours de chargement dans son chargeur.

14. MENU/OK

En mode veille: appuyez sur la touche pour accéder au menu principal.
En mode de sous-menu: appuyez sur la touche pour confirmer la sélection.
Au cours d'un appel: appuyez sur la touche pour accéder à : transfert / au répertoire / à la liste de recompositions(BIS) / Journal.

15. VERS LE HAUT/LISTE DES RECOMPOSITIONS

En mode veille: appuyez sur la touche pour accéder à la liste des recompositions.

En mode Menu: appuyez sur la touche pour faire défiler les éléments du menu.

Dans le répertoire téléphonique/la liste des recompositions/la liste des appels: appuyez sur la touche pour faire défiler la liste vers le haut.

En mode modification: appuyez sur la touche pour déplacer le curseur d'un caractère vers la gauche.

Au cours d'un appel: appuyez sur la touche pour augmenter le volume d'écoute.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour augmenter le volume de la sonnerie.

16. CONVERSATION / MAINS LIBRES

En mode Veille/de pré numérotation: appuyez sur la touche pour passer un appel.

Dans le répertoire téléphonique/la liste des recompositions / la liste des appels: appuyez sur la touche pour téléphoner à la personne sélectionnée dans la liste.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour répondre à un appel.

En ligne: appuyez sur la touche pour passer en mode Mains libres. Appuyez sur la touche pour repasser en mode normal.

17. VERS LE BAS/RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

En mode veille: appuyez sur la touche pour accéder au répertoire.

En mode Menu: appuyez sur la touche pour faire défiler les éléments du menu vers le bas.

Dans le répertoire téléphonique/la liste des recompositions/la liste des appels: appuyez sur la touche pour faire défiler la liste vers le bas.

En mode modification: appuyez sur la touche pour déplacer le curseur d'un caractère vers la droite.

Au cours d'un appel: appuyez sur la touche pour diminuer le volume d'écoute.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour diminuer le volume de la sonnerie.

18. MICRO

19. SOS AVEC AMPLIFICATION DU SON (SOS)

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour activer / désactiver la fonction d'AMPLIFICATION DU SON

En mode veille: maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour démarrer la séquence d'appel d'urgence définie sur votre combiné.

En mode d'appel : maintenez la touche enfoncée pendant 2 secondes pour arrêter l'appel d'urgence.

20. TONALITÉ

Au cours d'un appel : appuyez sur cette touche pour modifier la tonalité (GRAVE, AIGU, NORMAL).

21. ANNULER/SECRET

En mode Menu principal: appuyez sur la touche pour revenir à l'écran de veille.

En mode de sous-menu: appuyez sur la touche pour retourner au menu précédent.

En mode modification/pré numérotation: appuyez sur la touche pour supprimer un caractère/ un chiffre.

En mode modification/pré numérotation: maintenez la touche enfoncée pour supprimer tous les caractères/chiffres.

Au cours d'un appel: appuyez sur la touche pour désactiver/réactiver le micro.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour désactiver la sonnerie du combiné.

En mode Veille: appuyez sur la touche pour appeler un autre combiné, la base ou tout par interphone.

22. RACCROCHER

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour terminer un appel et revenir à l'écran de veille.

En mode Menu/ modification: appuyez sur la touche pour revenir à

3

l'écran de veille.

23. PAVÉ ALPHANUMÉRIQUE, ÉTOILE (*), DIÈSE (#)

En mode de pré numérotation ou de modification: appuyez sur la touche pour insérer un chiffre ou un caractère /*/#.

#R au cours d'un appel : maintenez la touche enfoncée pour faire un flash.

0 Touche 0 en mode veille/de pré numérotation/modification d'un numéro : Maintenez la touche enfoncée pour insérer une pause.

PREMIÈRE UTILISATION DE VOTRE COMBINÉ

Une fois les batteries insérées, un message s'affiche à l'écran vous demandant de sélectionner la langue à l'aide des touches ▼/▲, appuyez sur MENU/OK pour confirmer.

Entrez, ensuite, la date à l'aide du pavé numérique et confirmez en appuyant sur MENU/OK.

Entrez l'heure correcte à l'aide du pavé numérique et confirmez en appuyant sur MENU/OK.

RÉGLAGES DU MENU

Les réglages du téléphone sont toujours définis de manière similaire:

Appuyez sur la touche Menu/OK pour ouvrir le menu principal. Puis, utilisez les touches ▼▲ pour sélectionner une entrée ; confirmez en appuyant sur la touche Menu/OK.

Combiné

JOURNAL DES APPELS

► AFFICHER LA LISTE
sous une entrée: DÉTAILS ► AJOUTER REP ► AJOUTER BLOQ ► AJOUT M/P ► EFFACER ► SUPP TOUT

MÉM PHOTOS: M1 à M4

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

► TOUT ► MEM DIRECT ► VIP
sous une entrée: ► AJOUTER ► VOIR ► EDITER ► EFFACER ► SUPP TOUT ► AJOUT VIP ► AJOUT M/P ► AJOUT DIR ► STATUS

NUM BLOQUE

LISTE NOIRE -sous une entrée: ► AJOUTER ► VOIR ► EDITER ► EFFACER ► SUPP TOUT ► AJOUT M/P ► STATUS) RÉGLAGES (REGL BLOQ. ► SANS NUM)

TRANSFERT: ► COMBINÉ * ► BASE ► TOUT

RÉGL BASE: ► SONN BASE ► VOL. SONN. ► TPS FLASH ► 1ère SONN

RÉGL COMBINE

► RÉGL SONNERIE ► RÉGL TONALITÉ ► AMPLI AUTO ► LANGAGE ► DATE ET HEURE ► ASSOCIER ► PAR DÉFAUT

RÉGL SOS: NUMÉRO SOS ► MSG SOS ► LANGAGE (parlé)

REG ALARME

► M/A (ALARME 1 À 10) ► (UNE FOIS/QUOTIDIENNEMENT/ LUN-VEN/ SAM-DIM)

NUM VOCALE: ► MARCHÉ ► ARRET

REG APPAREILS

VERIF SIGNAL ► SONNETTE (TONALITE-SAUVER?-SONN DVRT)

APPAREILS

SONNETTE ou CARILLON ► STATUS/EVENEMENTS/RENOMMER

RÉP SYS.

► LIRE MSG ► SUP TOUT ► MEMO ► REP M/A ► REG REP (LANGAGE(parlé) ► AFF ECRAN (FILTRAGE), MESSAGE, NB DE SONNERIE, TPS ENREGISTREMENT, ACCES DISTANT, MODIF PIN, ALERTE MSG)

ENREGISTREMENT DU COMBINÉ

Remarque: le combiné et la station de base ont été pré-enregistrés en usine. Il est possible d'enregistrer jusqu'à cinq combinés à une station de base.

Enregistrement d'un combiné

Sur la **Base:** maintenez enfoncée la touche **HANDBET LOCATOR**(1) jusqu'à ce que vous entendiez un bip et entrez en mode d'enregistrement.

Sur le **combiné :** appuyez sur MENU/OK. Utilisez les touches ▼▲ pour sélectionner **RÉGL COMB** et appuyez sur MENU/OK. Utilisez les touches ▼▲ pour sélectionner **ASSOCIER**, Appuyez sur MENU/OK et APPAIRAGE s'affiche.

Après un bref délai, si l'enregistrement a réussi, un bip de confirmation sera émis et l'écran du combiné repassera en mode veille, puis le numéro du nouveau combiné s'affichera. L'unité de base retournera également en mode Veille.

4

INTERPHONE

Voir votre notice du combine additionnel.

SYSTEME ADDITIONNEL


Vous avez la possibilité de mettre au maximum 4 combinés, 3 sonnettes et plusieurs carillons sur l'AMPLI DECT595 ULE. Ils sont déjà enregistrés au téléphone si vous avez acheté un pack. Vous n'avez pas besoin de faire la procédure d'enregistrement.

Si vous devez enregistré une sonnette ou un carillon supplémentaires, veuillez vous rapprocher de la notice du dispositif.

REGLAGE SYSTEME ADDITIONNEL

Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▲/▼** pour sélectionner **REGL APPAR**

TEST SIGNAL:

Pour la **sonnette**: Appuyez sur **MENU/OK**  **(14)** et ensuite sur le bouton de sonnette pour voir la qualité du signal.

Pour le **carillon**: Appuyez sur **MENU/OK**  **(14)** pour vérifier le niveau du signal.

SONNETTE: Cette fonction vous permet de régler:

TONALITE: vous permet de régler le niveau de volume ainsi que la mélodie de sonnerie du combine lors d'une pression sur le bouton de sonnette.

SAUVER?: vous permet d'activé ou non l'enregistrement de la communication avec la sonnette.


SONN. DVRT:?

Cette fonction vous permet de renvoyer un appel de sonnette vers un numéro externe. Le socle appellera directement le numéro de destination lors de la sonnerie.

DVRT NUM: permet de définir le numéro de transfert.

MODE DVRT: permet de faire en automatique ou non le transfert.

DISPOSITIFS

Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▲/▼** pour sélectionner **APPAREIL**. Dans ce menu, vous pouvez vérifier:

STATUS: permet de savoir si la connexion est bonne ou non.

JOURNAL: permet de savoir quand le dispositif a été actionné.

RENOMMER: permet de changer le nom du dispositif.

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

Votre combiné peut stocker jusqu'à 50 entrées avec nom et numéros. Un maximum de 20 chiffres pour le numéro et de10 caractères pour le nom peuvent être enregistrés pour chaque entrée du répertoire téléphonique. Les entrées du répertoire sont stockées alphabétiquement.

Pour ajouter une nouvelle entrée

En mode veille :

Appuyez sur **MENU/OK** , et sur **▼/▲** pour sélectionner **RÉPERTOIRE** et appuyez 2 fois sur **MENU/OK**  pour accéder à la liste du répertoire (ou vide)

Appuyez sur **MENU/OK**  pour sélectionner **AJOUTER**.

Appuyez sur **MENU/OK**  et entrez le numéro.

Appuyez sur **MENU/OK**  et entrez le nom.


Appuyez sur **MENU/OK**  pour enregistrer.


APPEL D'URGENCE SOS


Réglages SOS


Les numéros SOS doivent avoir été définis avant qu'il soit possible de passer un appel d'urgence.


Utilisation du combiné:


Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▲/▼** pour sélectionner **REGL SOS**.

Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▲/▼** pour sélectionner **NUM SOS**.

Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▲/▼** pour sélectionner le numéro SOS à modifier (**SOS 1**, **SOS 2**, **SOS 3** ou **SOS 4**).

Appuyez sur **MENU/OK**  et sélectionnez **AJOUTER** pour entrer un nouveau numéro ou sur **EDITER** pour modifier le numéro déjà enregistré.

Appuyez sur **MENU/OK**  et entrez un nouveau nom ou modifiez le nom déjà enregistré.

Appuyez sur **MENU/OK**  pour confirmer ou sur la touche de

FONCTION DROITE  pour supprimer.


Passer des appels d'urgence


Sur le combiné, maintenez la touche **SOS** enfoncée pendant 3 secondes pour entrer dans la séquence d'appel d'urgence **SOS 1 à SOS 4**. Un appel sera d'abord passé au numéro **SOS 1**. Si le numéro **SOS 1** ne répond pas dans les 60 secondes, un autre appel sera effectué au numéro **SOS 2**, etc
Remarque : la personne recevant le message SOS doit appuyer sur n'importe quel numéro de son téléphone pour répondre à l'appel


d'urgence. Ensuite, le fait d'appuyer sur un numéro du téléphone toutes les deux minutes permettra de maintenir l'appel d'urgence ouvert. Sinon le téléphone raccrochera l'appel après 10 secondes.


Enregistrement du message SOS

Vous pouvez enregistrer votre propre message d'urgence qui sera diffusé lorsque vous lancerez l'appel d'urgence. Sinon, le message par défaut sera lu.

Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▲/▼** pour sélectionner **REGL SOS**.


Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▲/▼** pour sélectionner **MSG SOS**.


Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▲/▼** pour sélectionner **ENREG**.

Appuyez sur **MENU/OK**  pour démarrer l'enregistrement du message SOS ; **'ENREG** s'affichera sur l'écran.

Appuyez sur **MENU/OK**  pour sauver votre message SOS.

Lecture du message SOS

Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▲/▼** pour sélectionner **REGL SOS**.

Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▲/▼** pour sélectionner **MSG SOS**.

Appuyez sur **MENU/OK**  pour afficher **ECOUTER**.


Appuyez sur **MENU/OK**  pour lire le message d'urgence.

Appuyez sur la touche **5** pour arrêter la lecture du message SOS.


DÉFINIR LES TOUCHES DE COMPOSITION ABRÉGÉE SUR LE COMBINÉ POUR LES TOUCHES DE 1 A 9

Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▲/▼** pour sélectionner **RÉPERTOIRE**.

Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▲/▼** pour sélectionner **MEM DIRECT**.

Appuyez sur **MENU/OK**  , utilisez **▲/▼** pour sélectionner la touche de composition abrégée.

Appuyez sur **MENU/OK** , sélectionnez **AJOUTER** ou **MODIFIER**.

Appuyez sur **MENU/OK**  et entrez le numéro de téléphone.

Appuyez sur **MENU/OK**  pour entrer le NOM.

Appuyez sur **MENU/OK** ,pour confirmer.

En mode Veille, maintenez enfoncée une des touches 1 à 9 pendant 3 secondes pour pouvoir utiliser la touche de composition abrégée (vous entendrez un bip de confirmation).



TOUCHES MÉMOIRE PHOTOS

Fonction disponible seulement sur le combi dect 595.

FONCTION LISTE NOIRE

Vous pouvez bloqué certain numéro de telephone en appel entrant. Pour cela, il faut les rentrer, veuillez suivre la procedure suivante:

En mode veille:

Appuyez sur **MENU/OK** , et sur **▼/▲** pour sélectionner **NUM BLOQUE** et appuyez sur **MENU/OK**  pour accéder à **LISTE NOIRE**.

Appuyez 2 fois sur **MENU/OK**  pour sélectionner **AJOUTER**.

Appuyez sur **MENU/OK**  et entrez le numéro.

Appuyez sur **MENU/OK**  et entrez le nom.


Appuyez sur **MENU/OK**  pour enregistrer.


RÉPONDEUR TÉLÉPHONIQUE


Votre base inclut un répondeur téléphonique qui enregistre les appels non répondus lorsqu'il est activé. Le répondeur peut stocker jusqu'à 59 messages dans la période d'enregistrement maximale d'environ 30 minutes. En outre d'enregistrer les messages entrant, vous pouvez enregistrer des mémos pour les autres utilisateurs du téléphone.

Activation / désactivation du répondeur

Utilisation du combiné:

1. Appuyez sur **MENU/OK**  et sur les touches **▼/▲** pour sélectionner **RÉPONDEUR**

2. Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▼/▲** pour sélectionner **REP M/A**.


3. Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▼/▲** pour sélectionner **MARCHE** ou **ARRET**.

4. Appuyez sur **MENU/OK**  pour confirmer.


Lecture des messages sur le répondeur

Si vous avez reçu 2 nouveaux messages par ex, l'écran affichera 2 NOUVEAU MESSAGE. Les nouveaux messages sont lus en premier puis sont enregistrés comme anciens messages et restent tel quel jusqu'à ce qu'ils soient supprimés. Les anciens messages sont relus une fois que tous les nouveaux messages ont été complètement diffusés.

Utilisation du combiné:

1) Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur **▼/▲** pour sélectionner **REPONDEUR**.

2) Appuyez sur **MENU/OK**  pour afficher **LIRE MSG**.

3) Appuyez sur **MENU/OK**  une nouvelle fois pour démarrer la lecture ; l'écran affiche la date et l'heure du message reçu.

4) Au cours de la lecture du message, appuyez respectivement sur les touches **▼/▲** pour diminuer ou augmenter le volume de lecture.
REMARQUE : une fois la lecture du nouveau message terminée, il sera enregistré en tant qu'ancien message à moins qu'il ne soit supprimé.

5) Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▼/▲** pour sélectionner **ARRÊT, SUIVANT, PRÉCÉDENT** ou **EFFACER** pour exécuter les fonctions suivantes au cours de la lecture du message.

- ARRÊT**: Stop la lecture du message en cours et retourne dans le menu RÉPONDEUR.

- SUIVANT**: lit le message suivant. La date et l'heure du message suivant s'affichera.

- PRÉCÉDENT**: reprend la lecture du message en cours depuis le début. La date et l'heure du message en cours s'affiche.

- EFFACER**: supprime le message en cours et lit le message suivant.


6) Appuyez sur **MENU/OK**  pour confirmer le réglage.

Définir le délai de réponse


Vous pouvez régler le nombre de sonneries souhaitées avant que le répondeur commence à diffuser votre message enregistré. Vous pouvez programmer le répondeur de sorte à ce qu'il réponde à l'appel après plusieurs sonneries (entre deux et huit) ou définir la fonction ÉCONOMIE DE TEMPS (MODE ECO).

La fonction ÉCONOMIE DE TEMPS répond aux appels après 6 sonneries, jusqu'à ce que le premier message ait été enregistré. Puis elle répond après 2 sonneries. Cette fonction est utile si vous appelez de l'extérieur; En effet, si vous appelez le répondeur et qu'il n'y a pas eu de réponse après quatre sonneries, cela signifie qu'aucun message n'a été enregistré et que vous pouvez raccrocher avant que l'appel ne vous soit facturé.

Utilisation du combiné

1) Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur **▼/▲** pour sélectionner **REPONDEUR**.

2) Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▼/▲** pour sélectionner **REGL REP**.


3) Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur **▼/▲ pour sélectionner NB SONNERIE** (Options disponibles. **2 SONN**, **4 SONN**, **6 SONN**, **8 SONN**, **10 SONN** ou **MODE ECO (TOLL SAVE)**).


4) Appuyez sur **MENU/OK** ,pour confirmer.


Fonction message alerte


Lorsque vous avez un nouveau message, vous allez entendre un bip toutes les 10 secondes, pour la désactiver suivre la procedure:

Utilisation du combiné

1) Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur **▼/▲** pour sélectionner **REPONDEUR**.

2) Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▼/▲** pour sélectionner **REGL REP**.

3) Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▼/▲** pour sélectionner **ALERTE MSG**

4) Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▼/▲** pour sélectionner **ARRET**.

5) Appuyez sur **MENU/OK** ,pour confirmer.


REMARQUE: lorsque la mémoire de votre répondeur est pleine, l'appareil passe automatiquement en mode de RÉPONSE UNIQUEMENT.


Il reviendra automatiquement en mode RÉP ET ENREGISTRER après la suppression de plusieurs messages.


Vous ne pourrez pas supprimer les nouveaux messages avant de les avoir écoutés.rrez pas supprimer les nouveaux messages avant de les avoir écoutés.

Fonction ALARME


Vous avez la possibilité de programmer 10 alarmes.

1) Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur **▼/▲** pour sélectionner l'option **REG ALARME**.

2) Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur **▼/▲** pour sélectionner votre alarme.

3) Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur **M/A** pour sélectionner **MARCHE**.

4) Appuyez sur **MENU/OK**  et entrez l'heure.


5) Appuyez sur **MENU/OK**  et choisissez la fréquence (**1 FOIS/QUOTIDIEN/ LUN-VEN/ SAM-DIM**).


6) Appuyez sur **MENU/OK** . pour enregistrer.

Fonction AIDE VOCALE

Vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver la fonction VOCALE.

Activer: cette fonction permet d'entendre le chiffre composé.

1) Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur **▼/▲** pour sélectionner **NUM VOCALE**.

2) Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▼/▲** pour sélectionner **MARCHE** ou **ARRET**.

3) Appuyez sur **MENU/OK** . pour enregistrer.


FONCTION PREMIERE SONNERIE

Lorsque vous avez des messages sur votre messagerie vocale, vous pouvez avoir votre telephone qui ne sonne qu'une fois.

Pour retirer cette sonnerie, suivre la procedure suivante: Sur le **combiné**

1) Appuyez sur **MENU/OK**  (14) puis sur **▼/▲** pour sélectionner **RÉGL BASE**.

2) Utilisez les touches**▼▲(15/17)** pour sélectionner **1 ere SONN**

3) Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur **▼▲** pour sélectionner **ARRET**.

4) Appuyez sur **MENU/OK** . pour enregistrer.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Informations fondamentales	
Portée valide	À l'intérieur 50 m / À l'extérieur : 300 m
Durée de fonctionnement du combiné	Temps de disponibilité passive 100 heures <p>Durée de conversation environ 10 heures</p>
Paramètre RF	
Fréquence	1,88 GHz à 1,9GHz
Nombre de canaux	10
Puissance de la fréquence radio	<250 mW
Alimentation électrique	
Unité de base	Sortie 100-240V 50/60Hz; <p>Sortie DC 6V⎓ 0.6A, 3.6W adaptateur</p>
Chargeur	Sortie 100-240V 50/60Hz; <p>Sortie DC 6V⎓ 0.45A, 2.7W adaptateur</p>
Combiné	3 batteries AAA 1,2V/600mAh rechargeables

ENTRETIEN

Nettoyez la surface du boîtier avec un chiffon doux et non pelucheux. N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de solvants.

GARANTIE

Votre Geemarc AMPLIDECT595 U.L.E est garanti pendant 2 ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web : **www.geemarc.com**.

La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc.

La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

IMPORTANT: VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ÊTRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.

Remarque: la garantie est applicable en France uniquement.

DÉCLARATIONS:

Directives CE: Geemarc Telecom SA déclare par la présente que ce AMPLIDECT595 U.L.E est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE concernant les équipements hertziens.

*La déclaration de conformité peut être consultée sur **www.geemarc.com***

Directives de recyclage

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible.

Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques. Veuillez utiliser une des options suivantes: