



QUICK BRUGERVEJLEDNING **En**


Basen

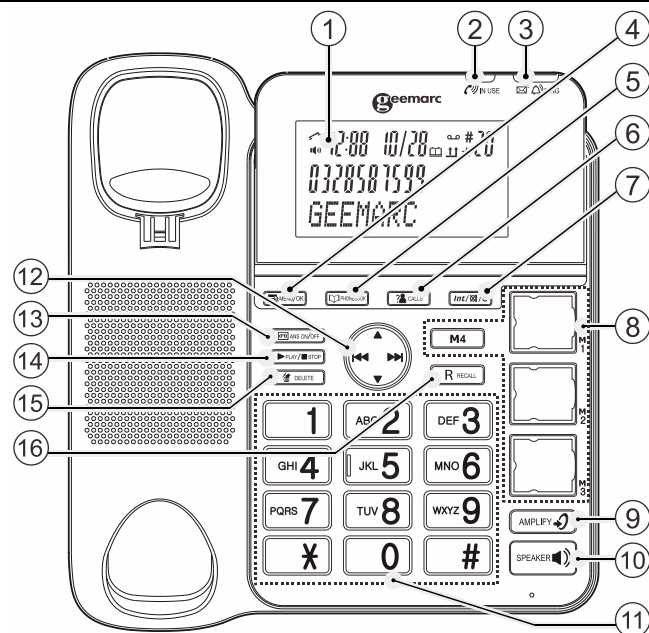


Trådløs enhed

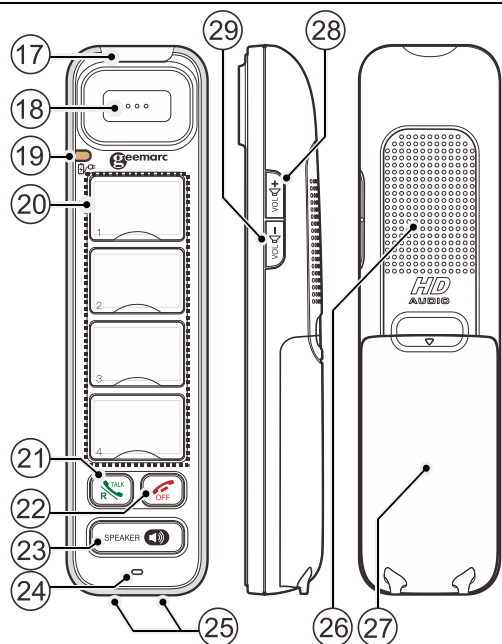


Tilslutning

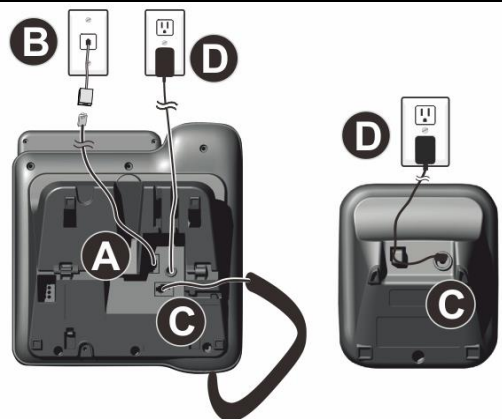

Vægmontering

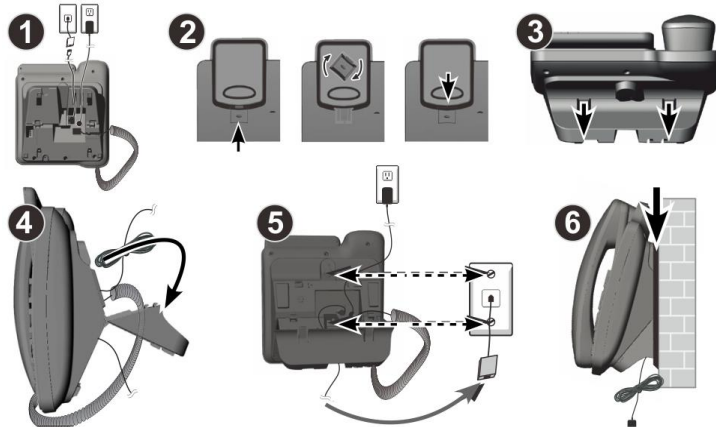

Indsæt billeder i hurtigopkalds-tasterne

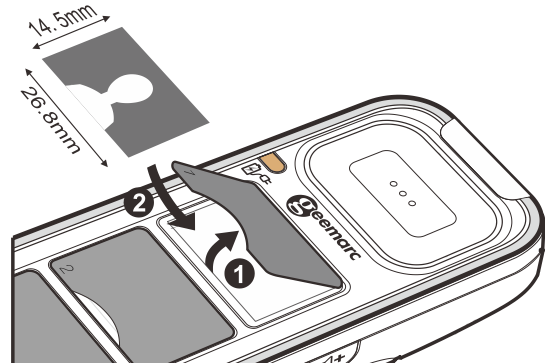

!!! Se venligst vores hjemmeside: www.geemarc.com for en opdateret brugervejledning, da der kan være vigtige opdateringer og ændringer som du bør være opmærksom på !!

Tillykke med købet af din Geemarc AMPLIDECT COMBI-PHOTO 295 telefon. Denne telefon giver dig alle fordelene ved trådløs teknologi (i overensstemmelse med Digitally Enhanced Cordless Telecommunications-DECT standard) sammen med et tastatur med store taster der er lette at se, og er dermed ideel til folk med dårligt syn. Denne telefon kan også bruges sammen med høreapparat.

Det er vigtigt at du læser instruktionerne herunder i rækkefølge, for at for mest muligt ud af din Geemarc telefon.

PACKAGE CONTENTS

1 Telefonbase, 1 håndenhed med ledning, 1 trådløs håndenhed, 2 strømadaptere, 1 oplader, 1 Telefonkabel, 1 NiMh batteripakke, 1 Quick brugervejledning.

INSTALLATION

Tilslutning af telefonen

Tilslut telefonkablet til stikket på basen (A) og til telefonstikkontakten i væggen (B).

Tilslut håndenhedens spiralledning til basen.

Tilslut strømadapterens jackstik til basen og opladeren (C) og tilslut herefter strømadapterens stik til den primære strømforsyning (D).

Bemærk: Anvend kun de strømadaptere der følger med denne telefon.

Tilslutning af batteriet

Indsæt batteristikket i håndenhedens batterirum.

Indsæt det medfølgende batteri som anvist.

Læg dækslet fladt henover batterierne, og skub det opad indtil det klikker på plads.



Opladning af batterierne

Oplad batterierne i minimum 16 timer første gang de lades op.

OVERBLIK

Base

1- LCD SKÆRM

2- I BRUG () : Lyser under opkald

3- RINGE-lys ()

Blinker når telefonen ringer.

Lyser når telefonsvarermaskinen er tændt. Blinker når der er nye beskeder i telefonsvareren.

4- MENU/OK ()

Fra startskærm: Tryk for at åbne hovedmenu.

I under-menu: Tryk for at bekræfte valg.

I Genopkaldsliste/Opkaldsoversigt: Tryk for at gemme nummer i telefonbogen.

5- TELEFONBOG ()

Fra startskærm: Tryk for at åbne telefonbog.

6- OPKALD (OPKALDSOVERSIGT) ()

Fra startskærm: Tryk for at åbne opkaldsoversigt.

7- INT/MUTE/Ryd ()

I hovedmenu: Tryk for at gå tilbage til startskærm.

I under-menu: Tryk for at gå tilbage til forrige niveau.

I under-indtastning: Tryk for at slette et tegn/tal.

Under indtastning: Hold need for at slette alle tegn/tal

Under opkald/samtale: Tryk for at slå mikrofonen på lydløs, tryk igen for at slå lyden til igen.

Når telefonen ringer: Tryk for at dæmpe ringetonen på basen.

Fra startskærm: Tryk for at kommunikere med en anden håndenhed.

8- HUKOMMELSESTASTER

(3 HURTIGOPKALDSTASTER MED BILLEDER; 1 HUKOMMELSESTAST - M4)

Fra startskærm: Indtast telefonnummeret og **hold hukommelsestasten nede** indtil der høres et bip.

For at anvende: Tryk på hukommelsestasten for at ringe til nummeret der er gemt i denne tast.

9- VOLUME BOOST ()

Under opkald/samtale: Tryk for at aktivere/deaktivere VOLUME BOOST funktionen.

10- HØJTALER ()

Fra startskærm eller i telefonbog/ opkaldsoversigt/ genopkaldsliste: Tryk for at foretage et opkald med højttaler/medhør tændt.

11- ALFANUMERISK TASTATUR, STJERNE (*), FIRKANT (#)

Under indtastning: Tryk for at indsætte et tal.

0 tasten under indtastning: Hold need for at indsætte et komma.

12- NAVIGATIONSTASTER

OP (▲)

I menu: Tryk for at gå opad i menuen.

I telefonbogen / Genopkaldslisten / Opkaldsoversigten: Tryk for at gå opad på listen.

Under indtastning: Tryk for at flytte markøren en plads til venstre.

Under opkald/samtale eller afspilning af telefonsvarerbesked: Tryk for at skrue op for lyden.

GENTAG/OGM ()

Fra startskærm: Hold need for at optage OGM.

Tryk for at afspille OGM.

Under afspilning af telefonsvarerbesked: Tryk for at gå tilbage til forrige besked.

NOTAT/FREMAD ()

Fra startskærm: Hold need for at optage et notat.

Under afspilning af telefonsvarerbesked: Tryk for at springe til næste besked.

NED/GENOPKALDSLISTE (▼)

Fra startskærm: Tryk for at åbne genopkaldslisten.

I menu: Tryk for at gå nedad i menuen.

I telefonbogen / Genopkaldslisten / Opkaldsoversigten: Tryk for at gå nedad på listen.

Under indtastning: Tryk for at flytte markøren en plads til højre.

Under opkald/samtale eller afspilning af telefonsvarerbesked: Tryk for at skrue ned for lyden.

13-ANS ON/OFF ()

Fra startskærm: Tryk for at slå telefonsvarermaskine TIL eller FRA.

14. PLAY/STOP ()

Fra startskærm: Tryk for at afspille beskeder.

Under afspilning af telefonsvarerbesked: Tryk for at stoppe afspilning af beskeder.

15. DELETE ()

Under afspilning af telefonsvarerbesked: Tryk for at slette den besked der aktuelt afspilles.

Fra startskærm: Hold nede for at slette alle gamle beskeder.

16. RECALL ()

Under opkald/samtale: Tryk for at aktivere tilbagekald.

Under afspilning af telefonsvarerbesked: Tryk for at ringe tilbage, hvis nummeret der er riget fra er tilgængeligt

Håndenhed

17. Indgående Opkald Lampe

Blinker langsomt rødt når telefonen ringer.

18. Højtaler

19. Oplader/Booster LED ()

- Lyser kontinuerligt rødt når håndenhedens batteri oplader.

- Lange røde blink når håndenhedens batteriniveau er lavt

- Hurtige røde blink når håndenheden er i gang med at registrere.

- Langsomme røde blink når håndenheden ikke er registreret eller ikke er i opladeren.

- Lyser kontinuerligt blått når booster-funktionen er aktiveret.

20. Hurtigopkaldstaster med billeder

Din håndenhed har fire hurtigopkaldstaster med billeder. Den indeholder same fotosæt eller Direkte Hukommelse hurtigopkald som der er opbevaret i AMPLIDECT295 eller AMPLIDECT COMBI 295.

Tryk for at ringe til det gemte nummer.

21. Talk ON / Flash ()

- Foretag eller besvar opkald.

- Lyser grøn når medhør ikke et slået til på håndenheden.

- Under opkald, tryk for at åbne tilbagekald/Recall (R).

22. TALK OFF ()

- Læg på/afslut opkald.

- Dæmp ringetonen midlertidigt mens telefonen ringer.

- Sæt søgetonen på lydløs.

23. SPEAKER () (Højtaler/medhør)

- Foretag eller besvar et opkald med telefonen på højttaler/medhør.

- Skift mellem højttaler/medhør og ikke-højttaler/medhør.

- Lyser Orange når højttaler/medhør er slået TIL.

24. Mikrofon

25. Opladningspol

26. Højtaler

27. Batteridækse

28. VOL+ (VOL +)

- Øger lydniveauet op til 30dB forstærkning, (eller lydniveauet af ringetonen i hviletilstand).



- Slår modtager booster-funktionen til/fra (blå LED).

29. VOL- (VOL -)

Sænker lydniveauet. (Eller lydniveauet af ringetonen i hviletilstand (indtil ringetonen slår FRA)).

OPSÆTNING AF MENU


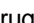

The phone settings are always set in the same manner:

Base: Tryk **Menu/OK**  knap for at åbne hovedmenuen. Tryk herefter på **▼▲** knapperne for at vælge en funktion og bekræft ved at trykke **Menu/OK** .

PIN-koden er som standard **0000**

Eksempel:

Indstil sprog på basen

Tryk **MENU / OK**,  og brug så **▼▲** for at vælge **LANGUAGE (sprog)**, tryk **MENU / OK** , og brug så **▼▲** for at vælge det ønskede sprog, og tryk **MENU / OK**  for at bekræfte.

Base

PHONEBOOK (TELEFONBOG)

►VIEW (SE)►ADD (TILFØJ)►EDIT (RET)►DELETE (SLET)►DELETE ALL (SLET ALT)►PB STATUS (TB STATUS)

CALL LOG (OPKALDSOVERSIGT): ►MISSED (UBESVARET) ►RECEIVED (INDGÅENDE) ►DIALLED (UDGÅENDE)

DATE & TIME(DATO & TID): ►TIME FORMAT (TIDSFORMAT) ►SET CLOCK (INDSTIL UR)

LANGUAGE (SPROG)

►ENGLISH ►DEUTSCH ►FRANÇAIS ►ITALIANO ►NEDERLANDS...

SETTINGS (INDSTILLINGER)

►RING SETUP (RINGETONE) ►DELETE HS (SLET HE) ►DIAL MODE (OPKALDSTILSTAND) ►FLASH TIME ►KEY TONE (TASTATURLYD) ►CHANGE PIN (ÆNDRE PIN) ►BS DEFAULT (BS STANDARD)

PAGE ALL HS (SØG ALLE HÅNDENHEDER)

REGISTRATION (REGISTRERING)

ANS. MACHINE (TLF.SVARER MASKINE)

►MSG PLAYBACK (AFSPIL BESKED) ►DELETE ALL (SLET ALLE) ►MEMO (NOTAT) ►TAM ON/OFF (TLF.SVARER TIL/FRA) ►TAM SETTINGS (TLF.SVARER INDSTILLINGER) (ANSWER MODE (SVARTILSTAND), OGM SETTINGS (UDGÅENDE BESKED INDSTILLINGER), ANSWER DELAY (FORSINKET SVAR), RECORD TIME (OPTAGELSESTIDSPUNKT), TAM LANGUAGE (TLF.SVARER SPROG), BS SCREENING (BS SCREENING), REMOTE ACC (FJERNADGANG), COMPRESSION (KOMPRESSIØN), CHANGE PIN (ÆNDRE PIN), TAM DEFAULT (TLF.SVARER STANDARD))

ANVENDELSE AF HÅNDENHEDEN

Booster tilstand

Under et opkald/samtale, kan du ved at aktivere boost-tilstand øge lydniveauet op til 30dB.

- Hold VOL+ knappen nede i 2 sekunder for at aktivere boost-tilstand (LED pæren vil lyse blå).

- Hold VOL+ knappen nede igen, for at deaktivere boost-tilstand. (LED pæren vil slukke).

Gem et nummer i en hukommelsestast med billede

På basen:

Efter indtastning af nummer: Hold billed-tasten nede for at gemme det indtastede nummer. Du vil høre et bekræftende bip.

Anvend en billed-tast

Hold billed-tasten nede, så vil håndenheten ringe det gemte nummer op, og håndenheten vil være på højtaler/medhør.

REGISTRERING & AFREGISTRERING

Bemærk: Håndenheden og basen er registreret på forhånd.

Der kan registreres op til fem håndenheder til én base. I tilfælde af at du er nødt til at registrere en enhed igen, er PIN-koden **0000**.

Registrering a foto-håndenhed

Base: Sæt først basen tilhørende AMPLIDECT295 eller AMPLIDECT COMBI 295 i registreringstilstand.

Placer foto-håndenheden i opladeren, så vil det røde LED lys blinke hurtigt for at indikere at den er i gang med at registrere.


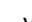
Du vil høre et bip der bekræfter at registreringen er fuldført. Det tager op til 60 sekunder at fuldføre registreringer.

Bemærk: hvis håndenheten ikke leveres uregistreret, følg denne procedure:

Håndenhed: Tryk hurtigt på [VOL+] [SPK] [VOL-] [SPK] [VOL+] [VOL-] [SPK] fra startskærmen, så vil håndenheten have en "Bi,Bi" lyd.


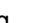
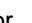

Registrering af en standard håndenhed


På håndenheten: Tryk **MENU/OK**  vælg **▼▲** REGISTRATION (REGISTRERING), tryk **MENU/OK**  vælg **▼▲**BASE(1-4), tryk **MENU/OK**  indtast PIN.

Samtidig på **basen:** Tryk **MENU/OK** , vælg **▼▲** REGISTRATION (REGISTRERING), tryk **MENU/OK**  for at se PLEASE WAIT (VENT VENLIGST)

(Hvis registreringen er succesfuld, vil der lyde et bekræftende bip).

Afregistrering

På **basen:** Tryk **MENU/OK** , brug **▼▲** for at vælge **SETTINGS (INDSTILLINGER)**, tryk **MENU/OK** . brug **▼▲** for at vælge **DELETE HS (SLET HÅNDENHED)**, tryk **MENU/OK**  indtast PIN, tryk **MENU/OK** 

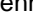brug **▼▲** for at vælge hvilken hånenhed du vil afregistrere, tryk **MENU/OK**  for at bekræfte.

KOMMUNIKATION MELLEM ENHEDER

Internt opkald




Base: Tryk **INT/Ø/RYD (Int/Ø/C)**, brug **▼▲** for at vælge **HS (HÅNDENHED) 1 - 5**, tryk **MENU /OK**  for at forbinde.

Håndenhed: Funktionen er ikke tilgængelig.

Ring til alle håndenheder

Base: Tryk **INT/Ø/RYD (Int/Ø/C)**, brug **▼▲** for at vælge **ALL HANDSETS (ALLE HÅNDENHEDER)**, tryk **MENU /OK**  for at forbinde.


Overfør eksternt opkald

Base: Tryk **MENU /OK** , vælg **▼▲** nummer på håndenhed, tryk  eller  på håndenheten. Når der er forbindelse kan du forlade opkaldet på basen.

Konference-Opkald


Base: Tryk **MENU / OK** 

Indtast nummeret på den ønskede håndenhed på tastaturet.

Når der er forbindelse, hold  tasten nede indtil der står CONFERENCE (KONFERENCE) på skærmen.


TELEFONSVARERMASKINE

Din telefonbase inkluderer en telefonsvarermaskine der optager ubesvarede opkald når den er sat til. Telefonsvareren kan indeholde op til 59 beskeder indenfor en maksimal optagelsestid på cirka 15 minutter. Den kan både optage indkomne beskeder, men du kan også selv optage beskeder til andre brugere af din telefon.

Tryk  **ANS ON/OFF** for at slå telefonsvarermaskinen TIL eller FRA.

Fjernbetjening af telefonsvarer

Hvis du er væk hjemmefra, kan du ringe til din telefonsvarermaskine og slå denne til og fra, samt aflytte dine beskeder via en anden telefon.

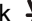- 1) Ring op fra en telefon
- 2) Når telefonsvareren besvarer opkaldet og begynder at afspille din OGM (udgående besked), tryk .
- 3) Indtast den 4-cifrede fjernadgang PIN-kode (standard-PIN er **0000**).
- 4) Tryk på følgende taster for at udføre den ønskede handling.

A	Funktioner	
	Når der IKKE afspilles en besked	Når der afspilles en besked
2		Slet den besked der aktuelt afspilles
4		Gentag den besked der aktuelt afspilles forfra. Tryk to gange for at gå tilbage til den forrige besked.
5	Afspil beskeden	
6		Spring frem til afspilning af næste besked.
7	Slå telefonsvareren TIL	
8		Stop afspilningen af den aktuelle besked.
9	Slå telefonsvareren FRA	
*	Indtast den 4-cifrede fjernadgang PIN-kode	

BEMÆRK:

Når telefonsvarerens hukommelse er fuld og maskinen står på **ANS & RECORD (SVAR & OPTAG)**, vil den automatisk skifte til **ANSWER ONLY (KUN SVAR)** tilstand.

Den vil automatisk skifte tilbage til **ANS & RECORD (SVAR & OPTAG)** tilstand når der er blevet slettet nogle beskeder.

Du kan ikke slette nye beskeder før de er blevet afspillet.

VEDLIGEHOJDELSE

Rengør overfladen med en blød fnugfri klud. Anvend ikke rengøringsmidler eller opløsningsmidler.

GARANTI

Fra det øjeblik du køber din AMPLIDECT595 U.L.E, gælder Geemarc garantien i to år. Under garantiperioden er alle reparationer (ud fra vores skøn) gratis. Oplever du problemer, kan du kontakte vores hjælpelinje, ellers besøge vores hjemmeside på **www.geemarc.com**.

Garantien dækker ikke uheld, mislighold eller brud på delene. Produktet må ikke manipuleres eller skilles ad af andre end autoriserede Geemarc repræsentanter.

Geemarc-garantien begrænser på ingen måde dine lovmæssige rettigheder.

VIGTIGT: DIN KVITTERING ER EN DEL AF GARANTIEN OG SKAL KUNNE FREMVISES I TILFÆLDE AF BENYTTELSE AF GARANTIEN.


Bemærk venligst: Garantien gælder kun i Danmark.

DEKLARATION:

CE Direktiver

Geemarc Telecom SA deklarerer hermed at denne AMPLIDECT595 U.L.E er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser indenfor Radio Equipment Directive 2014/53/UE.

*CE deklarationens overensstemmelser kan ses på **www.geemarc.com***

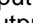RF power	< 250mW
Strømforsyning	
Base og oplader	Input 100-240V 50/60Hz; Output DC6V  0.45A, 2.7W adapter
Trådløs håndenhed	2.4V, 500mAH genopladelig NiMh batteripakke

Elektrisk tilslutning:

Dette apparat er kun lavet til 230V 50Hz tilslutning. (Klassificeret som farlig spænding ifølge EN62368-1 standarden). Apparatet har ikke en integreret tænd/sluk knap. For at slukke apparatet, skal du afkoble strømadapteren.

Når du installerer apparatet skal du sikre dig at stikkontakten er let tilgængelig.

Telefontilslutning:

Spændingerne på telecommunication network er klassificeret som TNV-3 (Telecommunication Network Voltage) ifølge EN62368-1 standarden.

Genanvendelses-direktiver

Der anvendes WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) til produkter der har nået enden af livet, og disse bliver dermed genanvendt på den bedst mulige måde.

Når dette produkt skal bortskaffes, må det ikke komme i skraldespanden, men skal bortskaffes på en af følgende måder:

- Fjern batterierne og aflever disse i en affaldsbeholder beregnet til batterier.

Aflever resten af produktet på en egnet genbrugsstation.

- Eller, aflever produktet i butikken hvor du har købt det. Hvis du køber et nyt produkt, burde de tage imod det gamle.

Hvis du respekterer disse instruktioner, er du med til at sikre folkesundheden og beskytte miljøet.



geemarcTM
Hear the Difference

For produkt-support og hjælp, besøg vores hjemmeside på

www.geemarc.com

2 rue Galilée, 59791 GRANDE-SYNTHÉ CEDEX, FRANCE

E-mail : **help@geemarc.com**

telefon **01707 387602**

henvendelse mellem 09:00 og 16:00 Man til Fre

Dette produkt er lavet i Kina for Geemarc Telecom