

Nederlands

# Sonic Alert Model SBP100

Amerika's leidende firma van visuele  
alarmeringsystemen

## SONIC ALERT'S 2-JARIGE BEPERKTE GARANTIE

De Sonic Boem Wekker Model SBP100 is tegen fabricagefouten van materialen en vakmanschap voor een periode van 2 jaar vanaf de datum van aankoop gegarandeerd. Binnen deze periode zal Sonic Alert de SBP100 volgens ons inzicht repareren of vervangen zonder kosten voor onderdelen of arbeid. Stuur de SBP100 en een kopie van uw kassabon als bewijs van aankoop franco naar:

France

Geemarc Telecom SA

Parc de l'Etoile, 2 rue Galilée, 59760 Grande-Synthe Cedex  
Tel. Service Après Vente: 03 28 58 75 99


## SONIC DRAAGBARE VIBRERENDE WEKKER



**Algemene gegevens**  
Voeding: Gelijkstroom: twee  
1,5V AA batterijen (3V) & een  
1,5V AAA batterij

## DRAAGBARE VIBRERENDE WEKKER SBP100 AFBEELDINGEN & GEBRUIKSIJNSTRUCTIES

**Belangrijk** – Lees deze instructies zorgvuldig voorafgaande aan het gebruik en bewaar deze voor raadpleging in de toekomst.

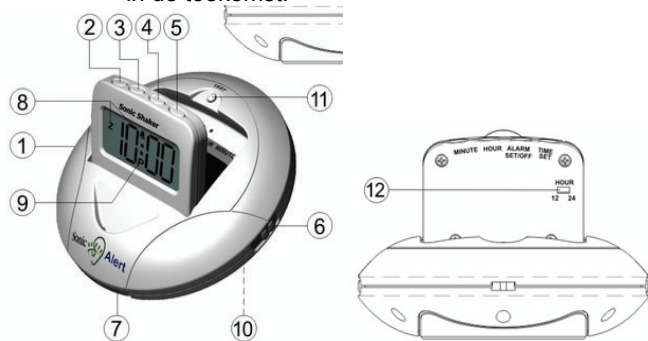

### Onderdelen:

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1) EKKER AAN/UIT               | 7) TIJDSINSTELLING             |
| 2) WEKKERINSTELLING            | 8) UUR                         |
| 3) MINUUT                      | 9) SCHAKELAAR VOOR WEKKERSTAND |
| 4) SLUIMER- & LICHTKNOPJE      | 10) WEKKERINDICATIE            |
| 5) PM (middag/avond) INDICATIE | 11) BATTERIJCOMPARTIMENT       |
| 6) TESTKNOPJE                  | 12) SCHAKELAAR VOOR UURFORMAAT |

## INSTALLATIE

(Zie de afbeelding voor extra aanwijzingen van instellingen.)

### 1) DE BATTERIJEN INSTALLEREN

- 1.1 Verwijder het BATTERIJCOMPATIMENT (10), steek er een AAA batterij in voor de klok en steek er twee AA batterijen in voor de vibrator/wekker.
- 1.2 Wanneer u de batterijen erin steekt, moet u opletten dat u de correcte positie van de polariteit zoals aangegeven aan de binnenkant van het batterijcompartment in acht neemt.

### 2) WANNEER MOET U DE BATTERIJEN VERVANGEN

- 2.1 Het is tijd om de AAA batterij te vervangen wanneer het LCD scherm wazig wordt.
- 2.2 Het is doorgaans een indicatie van zwakke batterijen wanneer de kwaliteit van het wekkergeluid zwak of het volume te laag wordt of wanneer de vibrator zeer langzaam vibreert. Vervang de zwakke batterijen om lekkage te voorkomen.

### 3) ONDERHOUD

- 3.1 Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan alle batterijen om lekkage te voorkomen.
- 3.2 Aanbevolen wordt om wanneer u met het apparaat op reis gaat de batterijen voor de vibratie/wekker (twee AA batterijen) te verwijderen om te voorkomen dat de batterijen leeglopen in het geval dat het lichtknopje per ongeluk wordt ingedrukt tijdens de reis.

## KLOK- EN WEKKERTIJD INSTELLEN (zie afbeeldingen)

### 4) KLOKTIJD INSTELLEN

- 4.1 Druk op het TIJDINSTELLING kopje (2), houd deze ingedrukt en druk dan op het UUR knopje totdat het juiste uur wordt getoond. Let erop de juiste AM (ochtend) of PM (middag/avond) in te stellen. Als PM wordt ingesteld, zal een "P" (9) op het scherm verschijnen.
- 4.2 Druk op het TIJDINSTELLING kopje (2), houd deze ingedrukt en druk dan op het MINUUT knopje totdat de juiste tijd wordt getoond.
- 4.3 Gebruik de SCHAKELAAR VOOR UURFORMAAT (12) om 12-uurs of 24-uurs display te kiezen.

### 5) WEKKERTIJD INSTELLEN

- 5.1 Druk op het WEKKERINSTELLING kopje (3), houd deze ingedrukt en druk dan op het UUR knopje totdat het juiste uur wordt getoond. Let erop de juiste AM (ochtend) of PM (middag/avond) in te stellen. Als PM wordt ingesteld, zal een "P" (9) op het scherm verschijnen.

- 5.2 Druk op het WEKKERINSTELLING kopje (3), houd deze ingedrukt en druk dan op het MINUUT knopje totdat de juiste tijd wordt getoond.

## WERKING VAN DE WEKKER (zie afbeeldingen)

### 6) Stel de wekkertijd in zoals beschreven in 'Wekkertijd Instellen'.

- 6.1 Stel de schakelaar WEKKER AAN/UIT (1) in op AAN (= ON). Een Wekker indicatie (8) zal bovenin het midden van de display verschijnen dat aangeeft dat de wekkerfunctie AAN staat. De wekker is nu ingesteld om automatisch op de gekozen tijd af te gaan.
- 6.2 U kunt de wekkerstand kiezen om wakker gemaakt te worden door de zoemer, vibrator of zoemer en vibrator door de SCHAKELAAR VOOR WEKKERSTAND (6) in de door u gewenste positie te zetten.
- 6.3 Terwijl de wekker afgaat, drukt u op WEKKER UIT (= OFF) (3) om de wekker UIT te zetten. De wekker zal de volgende dag opnieuw op dezelfde tijd afgaan.
- 6.4 Als de wekker afgaat, drukt u op het SLUIMER knopje (7) nadat de wekker is afgegaan: de wekker zal UIT gaan en opnieuw afgaan na ongeveer 4 minuten. U kunt deze cyclus zo vaak als u wilt herhalen.
- 6.5 Om de wekker permanent uit te zetten, stelt u de WEKKER AAN/UIT schakelaar (1) in op UIT (= OFF).

## Nachtlampje (zie afbeelding)

- 7) Om de kloktijd in het donker te zien drukt u op het SLUIMER- & LICHTKNOPJE (7) en houd deze ingedrukt.

## Testknopje

- 8) Het TESTKNOPJE (11) wordt gebruikt om de zoemer en vibrator af te laten gaan zonder dat u de wekker instelt. Om het TESTKNOPJE te gebruiken schuift u de functieschakelaar in de gewenste positie (bijv. zoemer, vibrator of zoemer/vibrator) en drukt u op het TESTKNOPJE om de zoemer te horen of de vibrator te voelen.

This product is made in China To Geemarc Telecom



SBP100\_DUTCH\_V1.1