




E

MANUAL DEL USUARIO

Consulte nuestro sitio web para obtener una guía del usuario actualizada, ya que puede haber actualizaciones y cambios importantes que debe tener en cuenta!

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

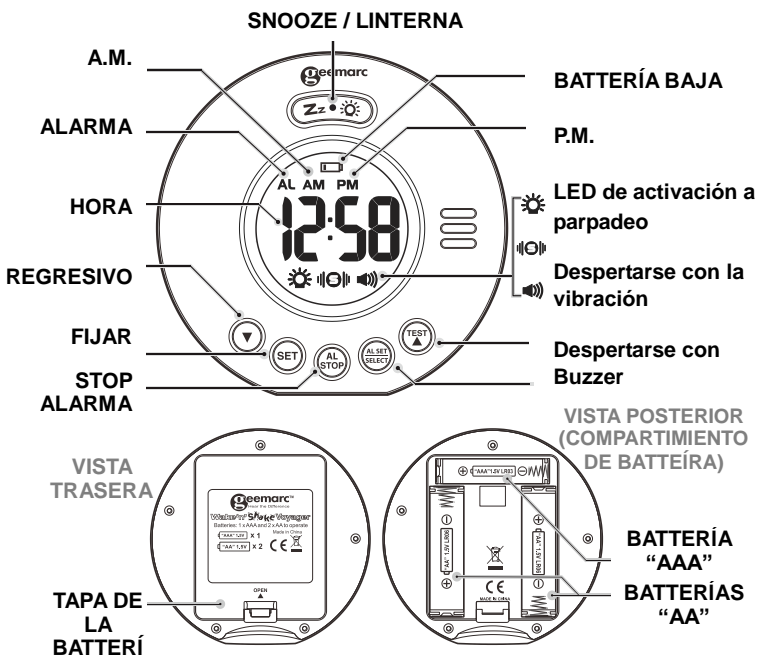

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

Su reloj requiere 1 x AAA y 2 x pilas alcalinas AA (incluidas) para funcionar.

1. Coloque su unidad boca abajo sobre una superficie plana.
2. Presione el pestillo y retire la tapa de la batería en la parte posterior de su unidad.
3. Inserte 1 x AAA y 2 x AA nuevas baterías alcalinas en el compartimiento de la batería observando la polaridad correcta "+" y "-".
4. Vuelva a colocar la tapa de la batería.

PARA CONFIGURAR EL TIEMPO Y LA DURACIÓN DE SNOOZE

1. Mantenga presionado SET, los dígitos de la hora "0" parpadean. Pulse TEST/▲ o ▼ para fijar el tiempo en horas (mantenga TEST/▲ o ▼ para avanzar rápidamente).
2. Pulse SET otra vez, los dígitos de minutos "00" titilarán. Pulse TEST/▲ o ▼ para fijar la hora en minutos. (mantenga pulsado TEST/▲ o ▼ para avanzar rápidamente).
3. Presione SET nuevamente, la pantalla muestra "24Hr" y parpadea. Pulse TEST/▲ o ▼ para seleccionar "12Hr" o "24Hr" como formato de tiempo. El ícono **AM** aparece para indicar la hora de la mañana y el ícono **PM** para indicar la hora de la tarde.
4. Presione SET nuevamente, la pantalla muestra "05" y parpadea. Pulse TIMER/▲ o ▼ para seleccionar el tiempo de snooze desde 5 hasta 60 minutos.
5. Pulse SET una vez más (o si ninguna tecla ha sido pulsada por aprox. 10 segundos) para salir del modo de configurar.

PARA CONFIGURAR LA ALARMA (por descarte es a las 6.00 AM)

1. Presione y sostenga AL SET / SELECT, la AL aparece y los dígitos de la hora de la alarma parpadean. Pulse TEST/▲ o ▼ para configurar la alarma en horas . (mantenga TEST/▲ o ▼ para avanzar rápidamente).
2. Pulse AL SET / SELECT una vez más, el dígito de minutos de la alarma titilará. Pulse TEST/▲ o ▼ para configurar la alarma en minutos. (mantenga TEST/▲ o ▼ para avanzar rápidamente).
3. Pulse AL SET / SELECT de nuevo, ||⊖|| y "HI" flash (vibración de alto nivel), pulse TEST/▲ o ▼ para seleccionar "LO" (vibración de Bajo Nivel) en caso de ser necesario..
4. Pulse AL SET / SELECT de nuevo y , ||⊕|| "HI" flash (Sonido de Alto nivel), pulse TEST/▲ o ▼ para seleccionar "LO" (Sonido de bajo nivel) si fuera necesario
5. Pulse AL SET/SELECT una vez más o ningún botón por 10 segundos para salir del modo de configuración de alarma. Para administrar la configuración de alarma, pulse SET una vez para salir y regresar al modo de visualización normal de la hora.

PARA SELECCIONAR EL MODO DE ALARMA

En el modo de visualización de la hora normal, presione **AL SET / SELECT** uno por uno para activar la(s) alarma(s), los indicadores correspondientes a la alarma del lado derecho de la pantalla se encenderán:

solo se activa la alarma sonora	solo se activa la alarma del agitador	solo se activa la alarma de luz estroboscópica	tanto la alarma de sonido como la vibración están activadas	tanto la luz estroboscópica como la alarma sonora están activadas

Pulse **AL SET / SELECT** una vez más para apagar todas las alarmas. Todos los indicadores de alarmas desaparecerán.

Observación : uso de la vibración y luz del flash acortan la vida de la batería.

PARA PARAR Y RESTABLECER LA ALARMA PARA EL PRÓXIMO DÍA

Quando suena la alarma, el indicador de alarma correspondiente parpadea. Pulse **AL/STOP** una vez para detener la alarma y pasarla al próximo día Después de eso, el indicador de alarma correspondiente permanece en la pantalla.

PARA USAR SNOOZE

Quando suena la alarma, pulse **Zz • ☀** una vez, la alarma se detendrá temporalmente y el indicador de la alarma correspondiente seguirá titilando. La alarma se activará nuevamente después de que finalice la duración de la repetición programada.

PARA USAR LA LUZ DE FONDO

Presione **Zz • ☀** una vez para activar la luz de fondo por 5 segundos.


PARA UTILIZAR LINTERNA

Presione y mantenga presionado **Zz • ☀** para activar la linterna. Presione y mantenga presionado **Zz • ☀** para desactivar la linterna.

MODO DE PRUEBA

Presione y mantenga pulsado TEST/▲ botón la luz estroboscópica parpadeará, el vibrador vibrará y el zumbador sonará durante 5 segundos y luego se detendrá.

ALERTA DE BATERÍA BAJA

Cuando el nivel de la batería baja, aparecerá un ícono de batería baja  en el centro superior de la pantalla LCD. Reemplace las baterías con baterías alcalinas nuevas.

Observación: el uso frecuente de la alarma de vibración acortará rápidamente la vida útil de la batería.

DETECCIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si su reloj muestra una hora irrelevante o no funciona correctamente, lo que puede deberse a una descarga electrostática u otra interferencia, abra la tapa de la batería, saque las baterías y vuelva a instalarlas observando la polaridad +/- correcta. Su reloj se restablecerá a la configuración predeterminada y deberá configurarlo nuevamente.

El nivel bajo de la batería disminuirá la vibración y el sonido de la alarma. Una vez que esto sucede, reemplace las baterías por otras nuevas.

CUIDADO DE SU PRODUCTO

1. Coloque su reloj en una superficie estable, lejos de fuentes de luz solar directa o calor o humedad excesivos.
2. Proteja tus muebles cuando coloques tus unidades sobre una madera natural y un acabado lacado usando un paño o material protector entre ellos y los muebles.
3. Limpie su unidad con un paño suave humedecido solo con agua y jabón suave. Los agentes más fuertes como el benceno, los disolventes o materiales similares pueden dañar la superficie de la unidad. Asegúrese de que la unidad esté desenchufada antes de limpiarla.
4. Si la unidad no se va a utilizar durante un período prolongado, como un mes o más, retire las baterías para evitar la posible corrosión. Si el compartimento de la batería se corroe o ensucia, limpie el compartimento a fondo y reemplace las baterías.

ESPECIFICACIONES

Duración de la alarma	: 1 minuto	
Duración ajustable del snooze	. 5 a 60 minutos	
Configuraciones por defecto	Tiempo normal	24 horas
	Tiempo	0:00
	Alarma	6:00
	Nivel del vibrador	Alto
	Duración del snooze	05 (5 minutos)
	Tiempo de conteo hacia arriba/abajo	23 horas 59 minutos
Alarma audible	Hasta 75 dB a 1m	

GARANTÍA

Desde el momento de su compra Geemarc garantiza el producto por un periodo de 2 años. Durante ese tiempo, todas las reparaciones (a nuestra discreción) serán sin costo. Si llegara a experimentar un problema, contacto nuestra línea de ayuda o visite el sitio www.geemarc.com. La garantía no cubre accidentes, negligencia o roturas de las partes. El producto no puede ser maltratado ni desarmado por ninguna persona no autorizada por el representante Geemarc. La garantía Geemarc no limita sus derechos legales.

IMPORTANTE: Su recibo de compra es parte de su garantía y deberá ser conservado y presentado en el caso de un reclamo de garantía.

Favor note: La garantía se aplica sólo en España.

DECLARACIONES:

Directivas CE Geemarc Telecom SA declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva de equipos terminales de radio 2014/53/UE.


La declaración de conformidad CE se puede consultar en www.geemarc.com

Directivas de reciclaje: Los RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) se han implementado para que los productos al final de su vida útil se reciclen de la mejor manera.

Cuando termine este producto, no lo coloque en su basurero doméstico. Utilice una de las siguientes opciones de eliminación:

- Retire las baterías y déselas en un contenedor WEEE apropiado. Deposite el producto en un contenedor WEEE apropiado.
- O, entregue el producto antiguo al minorista. Si compra uno nuevo, deberían aceptarlo.

Por lo tanto, si respeta estas instrucciones, garantiza la salud humana y la protección del medio ambiente.

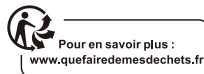

Para obtener asistencia y asistencia sobre el producto, visite nuestro sitio web en www.geemarc.com

Geemarc Telecom
2 rue Galilée
Parc de L'étoile
59791 GRANDE-SYNTHÉ Cedex
France

teléfono 01707 387602

Email: help@geemarc.com

(las líneas permanecen abiertas desde las 10:00 hasta las 16:00 de lunes a viernes)

Este producto está hecho en China Para Geemarc Telecom