

geemarc™ CL7370/opti
Hear the Difference

AURICULARES INALÁMBRICOS DIGITALES PARA TV

(El producto admite 2 auriculares)




www.geemarc.com

Español


Índice

Asegúrese de leer el manual detenidamente antes de usar el producto!

Consulte nuestro sitio web **www.geemarc.com** para obtener una guía del usuario actualizada, ya que pueden existir actualizaciones y modificaciones importantes que debe conocer!

INTRODUCCIÓN.....	3
 CONSEJOS DE SEGURIDAD Y CUIDADO.....	5
COMPONENTES DEL PAQUETE	6
IDENTIFICACIÓN DE FUNCIÓN	7
• Identificación de función: Auriculares receptores.....	7
• Identificación de función: Soporte de carga	9
INSTALACIÓN.....	10
• Transmisor	10
• Auriculares	11
USO	12
• Operaciones iniciales.....	12
• Operación de rutina	12
• Control del tono (graves y agudos).....	14
• Ajuste del balance de sonido (izquierda-derecha)	14
• Uso del botón silenciador y del micrófono para la conversación.....	15
• Carga de la batería	15
• Emparejamiento de auriculares adicionales.....	16



LOCALIZACIÓN DE FALLAS	18
• No hay sonido.....	18
• Distorsión	18
Limpieza y mantenimiento.....	19
Piezas de repuesto	19
Asistencia al cliente	19
GARANTÍA	20
DECLARACIÓN UKCA.....	20
 ADVERTENCIAS SOBRE LA BATERÍA	20
INFORMACIÓN SOBRE DESCARTE.....	21
CARACTERÍSTICAS	21
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	22

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

El receptor de audio inalámbrico digital Geemarc es un sistema de amplificación de audio diseñado específicamente para personas con dificultades auditivas.

El receptor de audio Geemarc se puede utilizar con todo tipo de sistemas de audio para disfrutar de la escucha sin interferencias: **Televisor, smartphone, reproductor de DVD, reproductor de CD, sistema de alta fidelidad, iPod u otros.**

La salida de audio de un televisor o dispositivo de audio es transmitida por el soporte de carga (base); los auriculares inalámbricos reciben la señal y amplifican el sonido de audio para el oyente.

Una base puede emparejarse con hasta 4 auriculares.

Una base puede cargar 2 auriculares.

La comodidad y el disfrute a largo plazo del oyente están incorporadas a todas las funciones del receptor de audio inalámbrico Geemarc:

- Auriculares inalámbricos livianos, equipados con tapones blandos de silicona, para escuchar prolongadamente con comodidad;
- Calidad de audio rica y ajustable:
 - Gran ancho de banda de audio, sonido de alta calidad.
 - Ecualizador y balance ajustables para compensar la pérdida de audición.
- Escuche, pero manteniendo el contacto con el entorno:
 - Se pueden emparejar varios auriculares con un único soporte de carga;
 - La función de silenciado de un solo toque convierte al receptor de audio en una ayuda para la conversación, que le permite hablar y escuchar a las personas que le rodean con los auriculares encendidos. Se aprovecha así el amplificador de audio integrado para escuchar todo mejor.

- La batería recargable dura hasta 6 horas con una carga completa. No pierda nunca la banda sonora durante el programa;
- Solo 3 horas para recargar completamente los auriculares; basta colocarlos en su soporte de carga.
- Los auriculares se apagan automáticamente al volver a colocarlos en el soporte de carga.
- Los auriculares se encienden simplemente sacándolos de su soporte de carga. Si no se sacan en el plazo de 5 minutos, se deben encender manualmente pulsando el botón de apagado/encendido.

AVISOS IMPORTANTES:

Esta serie de productos CL7370 está disponible en dos modelos, así como también auriculares adicionales como se indica a continuación. Este manual de instrucciones los abarca a todos.

1. CL7370_Versión analógica: tiene solo entrada de audio analógica.
2. CL7370_Versión óptica: Tiene tanto entrada de audio analógica como entrada óptica de audio digital.
3. Auriculares adicionales CL7370. Consulte la sección “Emparejamiento de auriculares adicionales” por información sobre esta operación en particular.

CONSEJOS DE SEGURIDAD Y CUIDADO



CONSEJOS DE SEGURIDAD Y CUIDADO

Para hacer el mejor uso de este producto y utilizarlo de forma segura, lea estas instrucciones detenidamente antes de utilizarlo y guárdelas en lugar seguro para futuras consultas.

Advertencia: Este producto puede tener un volumen muy elevado. Cuide que otras personas no utilicen este producto, si no tienen el mismo nivel de pérdida de la audición. Una presión acústica excesiva generada por los auriculares puede causar pérdida de audición.

Precaución: Descarga eléctrica. **NO** inserte los cabezales de conexión no acoplados en las tomas de corriente. Los cabezales del enchufe **DEBEN** estar instalados en el adaptador de corriente.

Conexión eléctrica: La unidad está diseñada para funcionar alimentada con 100 a 240 VCA - 50/60 Hz. (Clasificado como "tensión peligrosa" según la norma EN 62368-1).

Precaución: Las baterías solo deben ser reemplazadas por Geemarc o por un proveedor autorizado. Consulte el capítulo: <Piezas de repuesto> por más información.

Mantenga la unidad alejada de fuentes de calor.

NO exponga la unidad a la luz solar directa.

No exponga los auriculares, que contienen baterías, a un calor excesivo tal como luz solar, fuego, etc.




Limpie los auriculares y los tapones periódicamente. Por más información sobre la limpieza, consulte el capítulo: <Limpieza y mantenimiento>.

NO modifique la unidad de manera alguna.

Nota importante: La unidad puede estar sujeta a interferencia producida por aparatos que generan fuertes campos eléctricos o magnéticos, por ejemplo, enrutadores de Internet inalámbricos, microondas, teléfonos móviles, transformadores de iluminación, etc. Para evitar esta interferencia, coloque la unidad de soporte y carga lejos de dichas fuentes.

COMPONENTES DEL PAQUETE

COMPONENTES DEL PAQUETE

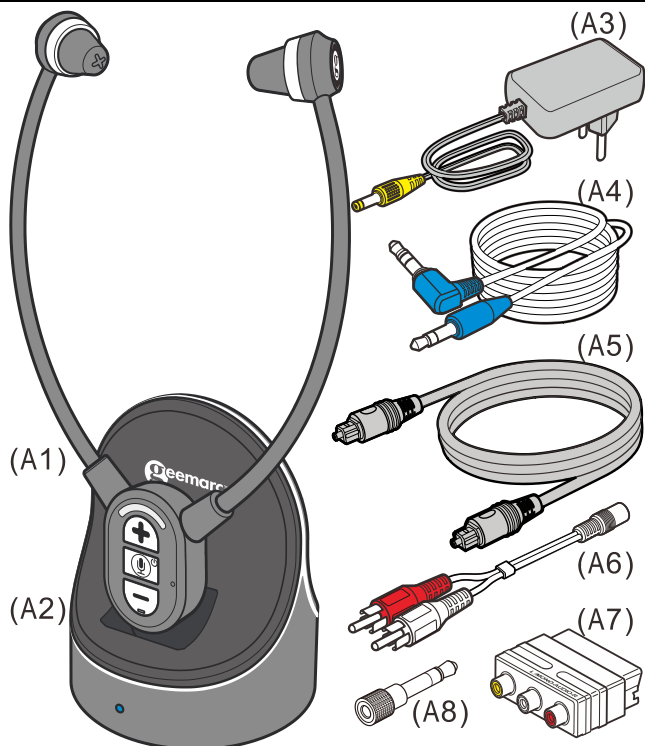


- (A1) Auriculares receptores
- (A2) Soportes de carga y transmisor
- (A3) Fuente de alimentación
- (A4) Cable de audio (ambos extremos con conector estéreo de 3,5 mm)
- (A5) Cable Toslink para conexión de audio digital óptico (solo versión óptica). **IMPORTANTE: Antes de utilizar el cable, retire las cubiertas protectoras de plástico transparente de ambos extremos.**
- (A6) Cable adaptador de 3,5mm a RCA de 2 pines (**Opcional**)
- (A7) Adaptador SCART (solo para la versión analógica) (**Opcional**)
- (A8) Enchufe adaptador de 3,5 mm a 6,3 mm (**Opcional**)

IDENTIFICACIÓN DE FUNCIÓN

IDENTIFICACIÓN DE FUNCIÓN

Identificación de función: Auriculares receptores

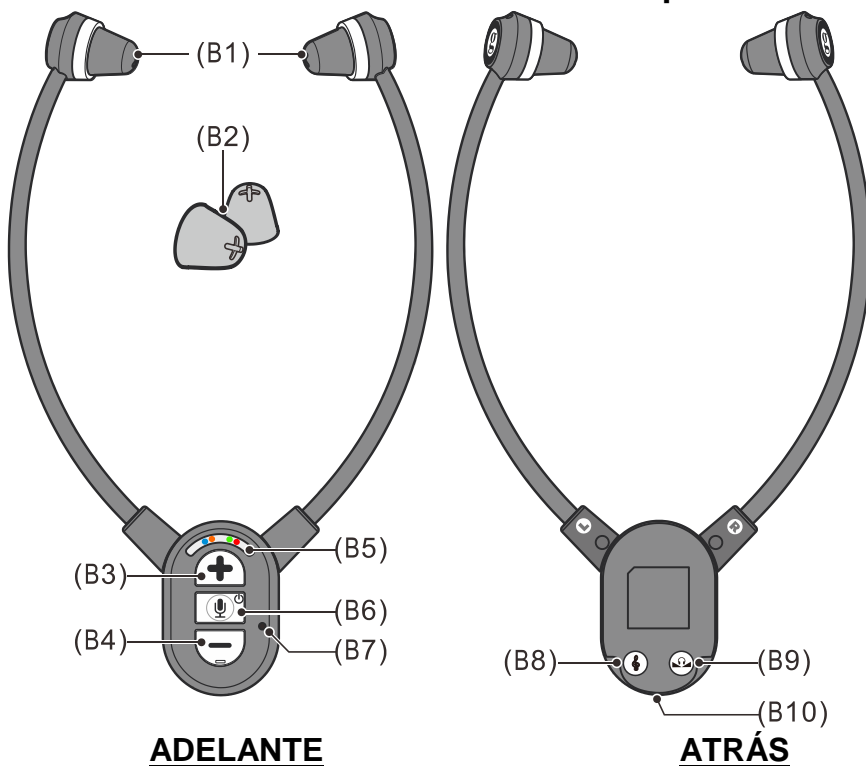

ADELANTE

ATRÁS

- (B1) Tapones de los oídos
(B2) Tapones de oídos de repuesto Hay 2 tipos de tapón de oídos
(B3) Mando de aumento de volumen, Mando de balance
(B4) Mando de disminución de volumen, Mando de balance
(B5) Indicadores LED de alimentación/señal/carga/micrófono local:
 - Carga de la batería (**Rojo** = en carga, **Verde** = carga completa)
 - Indicador LED (**naranja**): Amplificación de micrófono local para comunicaciones verbales.
 - Indicador LED (**se ilumina con color azul**): Emparejado con el transmisor.

IDENTIFICACIÓN DE FUNCIÓN

- Indicador LED (**azul intermitente, lento**): No está emparejado con el transmisor o el transmisor está apagado.
- Indicador LED (**parpadeo azul rápido**): en modo de emparejamiento.




- (B6) Botón de encendido y botón de silenciado para comunicaciones verbales
- Pulse prolongadamente para APAGAR los auriculares.
 - Pulse brevemente para ENCENDER los auriculares.
 - Pulse brevemente para cambiar entre la escucha de televisión inalámbrica y la amplificación del micrófono local para las comunicaciones verbales.
- (B7) Micrófono
- (B8) Ajuste del tono
- (B9) Control del balance de sonido
- (B10) Contactos de carga

IDENTIFICACIÓN DE FUNCIÓN

Identificación de función:

Soporte y base de cargas (transmisor)

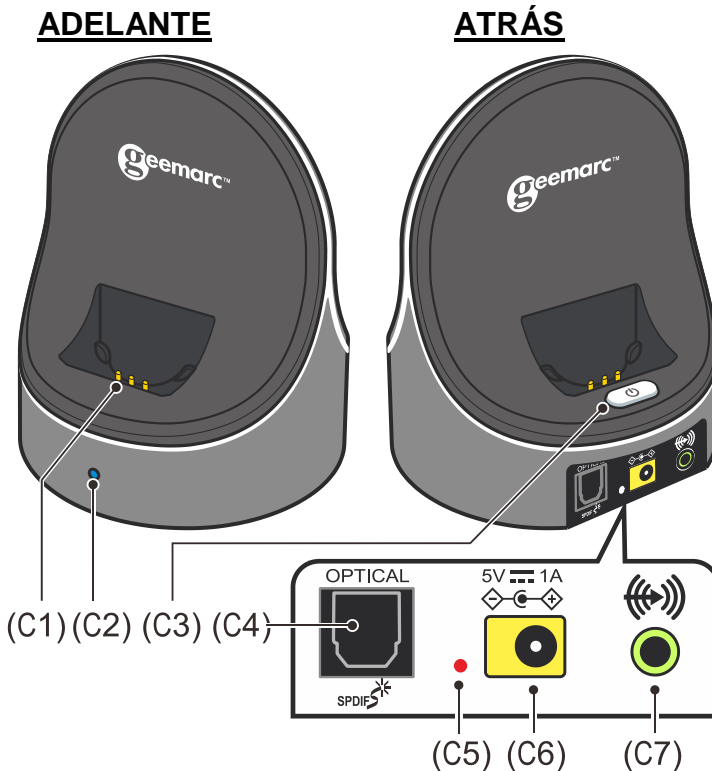

(C1) Pines de carga

(C2) Indicador LED de emparejamiento:

- **Se enciende la luz azul:** se hallaron auriculares emparejados;
- **Azul, parpadeo lento:** no se hallaron encontrado dispositivos emparejados;
- **Azul, parpadeo rápido:** no se hallaron dispositivos emparejados, o no hubo entrada de sonido durante más de 10 minutos.

(C3) Interruptor de apagado/encendido

(C4) Entrada óptica de audio digital (solo para la versión óptica)


(C5) Indicador LED de ENCENDIDO/APAGADO: **Rojo** = Encendido.

(C6) Toma de entrada de CC 5 V/1 A

(C7) Entrada de audio analógico

INSTALACIÓN

Transmisor

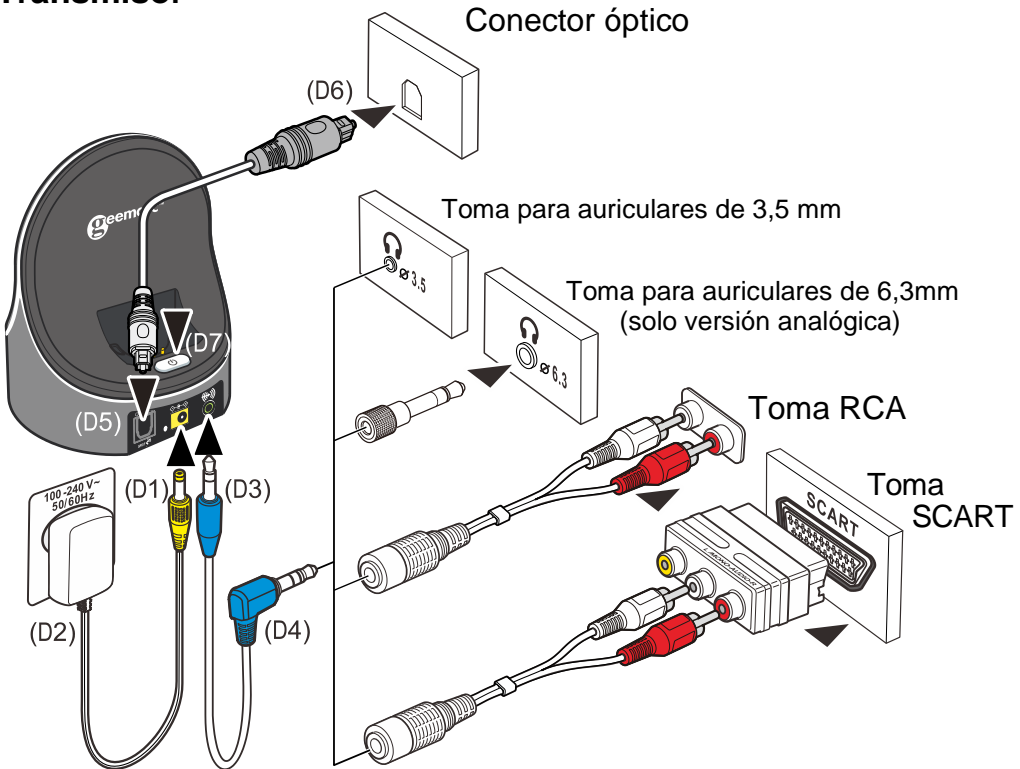

- (D1) Conecte la fuente de alimentación a la toma amarilla (5 V/1 A) situada en el panel posterior del soporte de carga.
- (D2) Conecte la fuente de alimentación a una toma de corriente (100 a 240 V ~ 50/60 Hz).
- (D3) Conecte un extremo del cable de audio a la entrada de audio analógica del panel posterior del soporte de carga.
- (D4) Conecte el otro extremo del cable de audio a la fuente de audio (por ejemplo: TV, sistema de alta fidelidad, MP3 o iPod).

Si la fuente de audio no tiene una toma adecuada para el conector estéreo de 3,5 mm del cable de audio, utilice uno de los adaptadores suministrados:

INSTALACIÓN

- Cable adaptador RCA (solo versión opcional y analógica);
- Enchufe adaptador de 3,5 mm a 6,3 mm (opcional, solo versión analógica);
- Adaptador SCART (opcional, solo versión analógica);;


Con la versión CL7370 Digital, también puede :

- (D5) Conectar un extremo del **cable Toslink** a la entrada de audio digital del panel posterior del soporte de carga.
- (D6) Conectar el otro extremo del **cable Toslink** a la fuente de audio con salida óptica de audio digital (por ejemplo TV, sistema de alta fidelidad).
- (D7) En la parte posterior del soporte de carga, pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO para encender el dispositivo y el LED rojo se iluminará.

Nota: Cuando se utiliza la versión digital del CL7370 con una señal de entrada de audio digital, la salida de audio del televisor debe estar en modo PCM. El CL7370 no es compatible con Dolby Digital. La configuración con PCM se puede generalmente realizar con el menú de configuración de audio del televisor. Consulte el manual del usuario del televisor/DVD/satélite/receptor por cable para obtener instrucciones sobre cómo configurar en modo PCM.

Auriculares




Asegúrese de que la batería interna de los auriculares esté completamente cargada antes de usarlos por primera vez; consulte a continuación Operaciones iniciales.

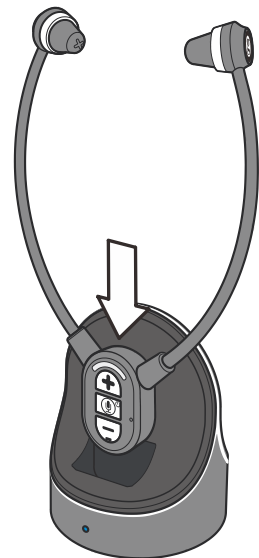

OPERACIÓN

Operaciones iniciales

1. Asegúrese de que el CL7370 esté enchufado a la red eléctrica.
2. Encienda el CL7370: parte posterior del soporte de carga (consulte la figura (1) a la derecha).
3. Coloque los auriculares en el soporte de carga durante al menos tres horas para que se carguen por completo.
 - Los auriculares se apagan automáticamente cuando se colocan en el soporte de carga.
 - El indicador LED se ilumina en rojo durante la carga.
 - Se iluminará en verde cuando la batería esté completamente cargada (consulte la figura (2) de la derecha).
4. Después de tres horas y cuando el LED de carga se haya vuelto verde, puede continuar con la operación de rutina.

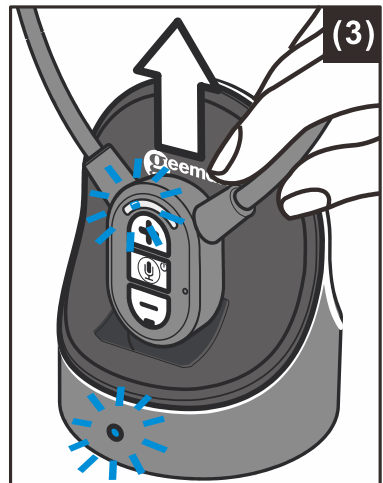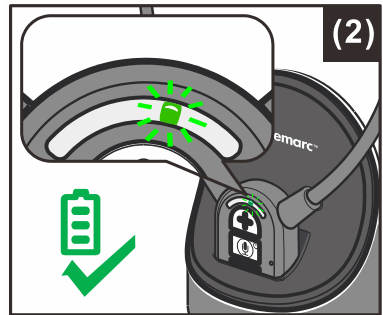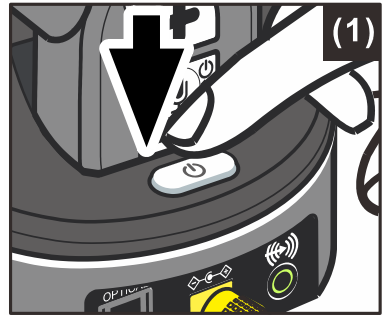


Operación de rutina

1. Encienda la fuente de audio (televisor o dispositivo de audio) a la que está conectado el transmisor.
2. Saque los auriculares receptores del soporte de carga; se encenderán automáticamente (si no es así, pulse brevemente el botón MIC para encenderlos); los indicadores LED azules, tanto de la base como de los auriculares se iluminarán de forma continua. (Consulte la figura (3) a la derecha).

OPERACIÓN

3. Ajuste el volumen al nivel de sonido deseado (consulte la figura (4) a la derecha), pulse el botón "+" para aumentar el volumen y el botón "-" para disminuirlo. El auricular emite un pitido cuando el volumen alcanza el máximo o el mínimo. A continuación, coloque los auriculares en los oídos.

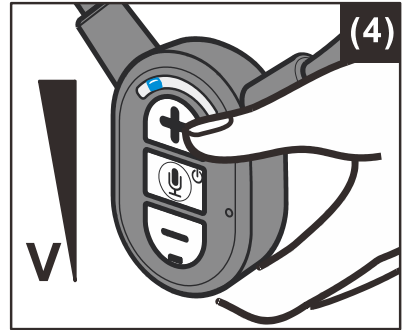

NOTA: Asegúrese de que el volumen de la fuente de audio (televisor u otro dispositivo de audio) esté al menos a la mitad de su máximo volumen para obtener una buena calidad de sonido en los auriculares.



NOTA:

1. Los auriculares se apagarán automáticamente en unos **15 minutos** si no hay señal de audio de la fuente de audio (televisor, etc.) o la señal es demasiado débil. Si desea reanudar el funcionamiento de los auriculares en este caso, pulse brevemente el botón MIC para encender los auriculares.
2. Los auriculares se apagan automáticamente al volver a colocarlos en el soporte de carga.
3. Los auriculares se encienden automáticamente al quitarlos del soporte de carga. - Solo está disponible cuando se vuelven a colocar auriculares encendidos en el soporte de carga.
4. Si coloca auriculares apagados en su base de carga, no se encenderán automáticamente cuando vuelva a tomarlos. En este caso, pulse brevemente el botón MIC para encender los auriculares.


Control del tono (graves y agudos)

Puede ajustar el tono del audio que está escuchando y mejorar el placer de escucha amplificando los agudos o los graves en los auriculares receptores.

Pulse el botón Tono de la parte posterior de los auriculares para cambiar cíclicamente entre:

1. Agudos realzados,
2. Graves realzados,
3. Tono plano (graves y agudos realzados igualmente).

Los auriculares emiten un pitido cuando el ajuste del tono alcanza la configuración predeterminada (el tono plano).

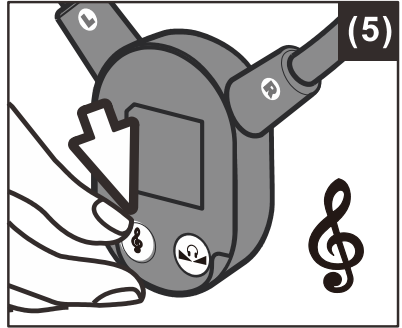


Ajuste del balance de sonido (izquierda-derecha)

Puede ajustar el sonido para que se adapte a su audición en cada oído. Con los auriculares encendidos, pulse el botón Balance de su parte posterior para acceder al modo de balance. Pulse el botón '+' para disminuir el sonido en el lado DERECHO. Pulse el botón '-' para disminuir el sonido en el lado IZQUIERDO. (Consulte la figura (6) a la derecha).

Los auriculares emiten un pitido cuando el balance alcanza el máximo, medio o mínimo. Pulse nuevamente el botón Balance para salir del modo de balance y volver al modo normal.

Nota: Si olvida salir del modo de balance durante más de 6 segundos, la unidad volverá al modo normal automáticamente.

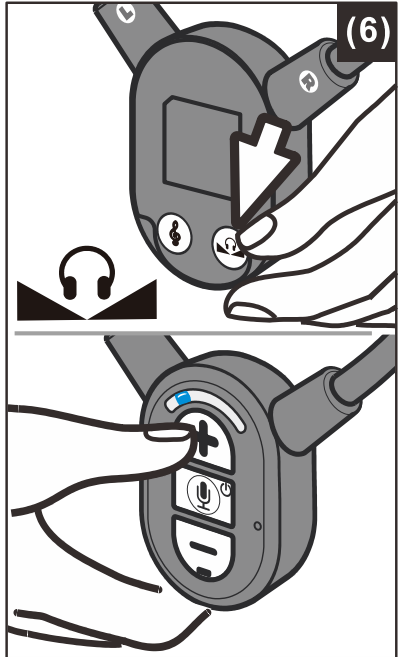

OPERACIÓN


Uso del botón MIC para conversar

Puede cambiar del modo Escucha al modo Conversación sin quitarse los auriculares.

Para hablar o escuchar a alguien:


1. Pulse brevemente el botón MIC (consulte la figura (7) a la derecha). Esto apagará la fuente de audio y los auriculares se convertirán en un amplificador activando el micrófono.
2. Para volver a escuchar el dispositivo de audio, pulse otra vez brevemente el botón Silencio. El micrófono se apagará y se reanudará el audio.

Nota: Si pulsa el botón Silencio prolongadamente, los auriculares se apagarán; solo tiene que pulsar otra vez brevemente el botón Silencio para volver a encender los auriculares.

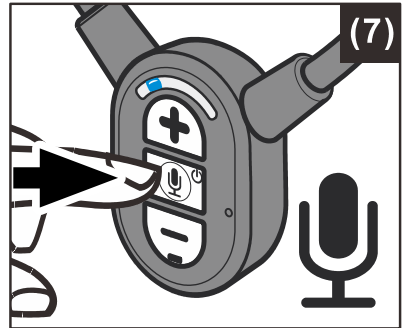

Carga de la batería

1. Los auriculares receptores emitirán un pitido cuando el nivel de la batería sea bajo. En este momento quedan unos 20 minutos de funcionamiento antes de que los auriculares se apaguen. Recargue la batería.
2. Coloque los auriculares en el soporte de carga (consulte la figura (8) de la derecha) y asegúrese de que el contacto de carga toca los pines de carga del soporte de carga.
3. El proceso de carga se inicia automáticamente.
 - El indicador LED se ilumina en rojo durante la carga.
 - Se iluminará en verde después de que la batería esté completamente cargada.

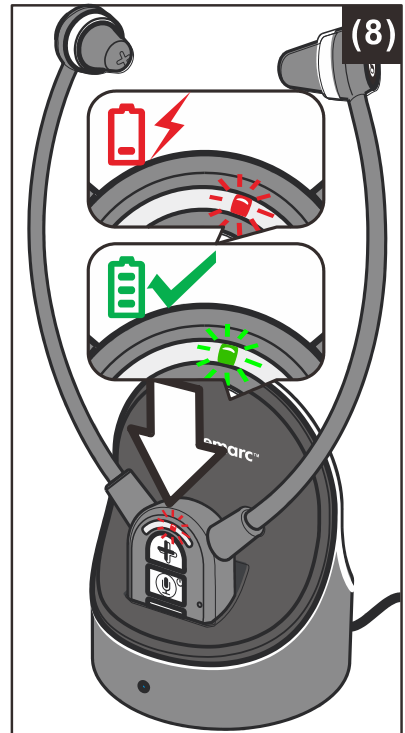

ADVERTENCIA:

La batería no debe estar expuesta a un calor excesivo tal como luz solar, fuego, etc.

No intente sustituir la batería recargable original.

La batería siempre debe estar completamente cargada antes de utilizarla por primera vez. Se requiere una carga inicial de 3 horas para garantizar una vida útil aceptable de la batería recargable.

Una presión acústica excesiva generada por los auriculares puede causar pérdida de audición.

IMPORTANTE:



Esta unidad solo debe funcionar con pilas recargables incorporadas. Al sustituir la batería o al desechar la unidad, cumpla siempre con las leyes vigentes relativas a descartar la batería. Colóquelos en un recipiente de desechos adecuado para asegurarse de que se descarten de forma segura y respetuosa con el medio ambiente.

Emparejamiento de auriculares adicionales:

Nota: Se pueden emparejar hasta 4 auriculares con cada base.

Para emparejar la base y los auriculares, asegúrese de que las baterías estén completamente cargadas y de que la base esté conectada a la red eléctrica (consulte en la sección **Operación inicial** cómo cargar los auriculares). Proceda de la siguiente manera:


1. Apague todos los auriculares emparejados. Apague la base. (pulsando 3 segundos el botón trasero de la base).
2. Tome y encienda los auriculares adicionales, mantenga pulsados los botones **TONO** y **BALANCE** al mismo tiempo hasta que el LED azul

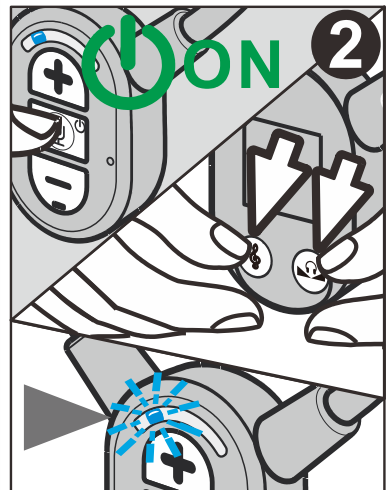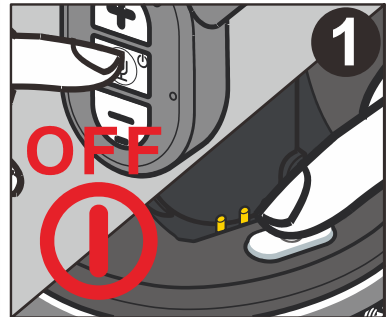

OPERACIÓN

de la parte delantera de los auriculares parpadee rápidamente, y a continuación suelte los botones.


3. Encienda la base y el LED azul comenzará a parpadear rápidamente; cuando el LED azul deje de parpadear y se ilumine, el emparejamiento se ha completado automáticamente.

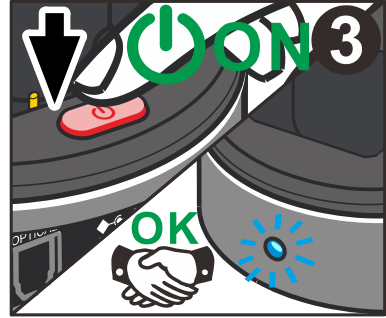

Nota:

1. Una vez que los auriculares entren en modo de emparejamiento, debe encender la base lo antes posible (no más de 20 segundos).
2. Si el proceso de emparejamiento no se realiza correctamente, apague los auriculares y la base y, a continuación, repita el proceso de emparejamiento.

Los auriculares adicionales se pueden cargar en el soporte de carga posterior de la base; en este caso, debe retirar la cubierta del soporte de carga posterior y colocar los auriculares adicionales en el soporte de carga posterior. Consulte las figuras (9)

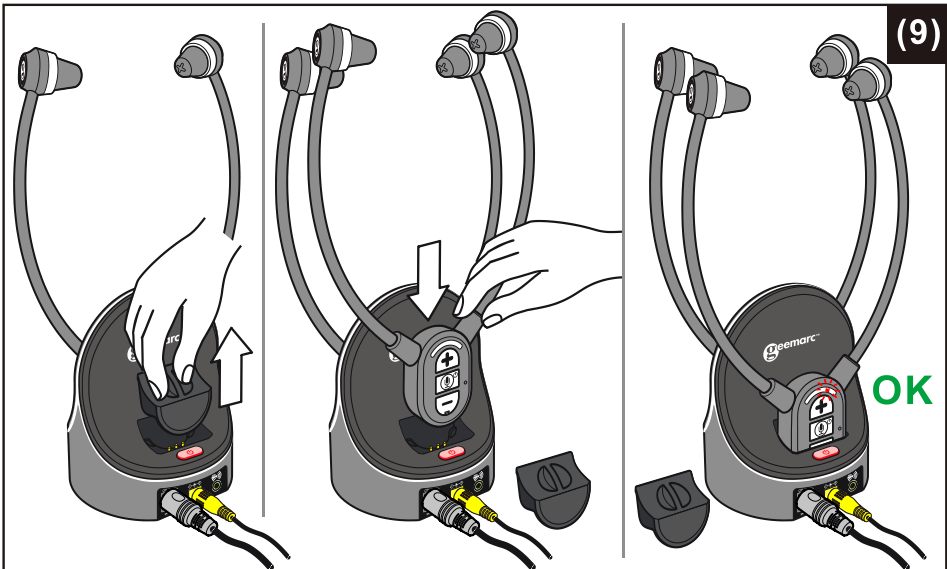

LOCALIZACIÓN DE FALLAS



LOCALIZACIÓN DE FALLAS

No hay sonido

- Asegúrese de que la fuente de alimentación esté enchufada correctamente en la toma de corriente y de que el cable esté conectado correctamente al conector amarillo de 5 V/1 A del soporte de carga.
- Asegúrese de que los auriculares estén encendidos (LED azul fijo).
- Compruebe el estado de carga de la batería en los auriculares: colóquelos en el soporte de carga y recargue la batería hasta que el LED de carga de la batería se ilumine en verde.
- Asegúrese de que el televisor, el sistema de alta fidelidad o el componente de audio estén encendidos y puestos en un canal que emita una señal de audio.
- Asegúrese de que el volumen del componente de audio conectado esté al menos a la mitad de su volumen completo.
- Es posible que el equipo de audio/vídeo conectado no esté en modo de reproducción. Inicie la reproducción en el equipo.
- Utilice el botón + de los auriculares para subir el volumen.

Distorsión

- Puede que sea necesario cargar la batería interior de los auriculares. Recargue la batería.
- Es posible que los auriculares estén demasiado lejos del transmisor dentro del soporte de carga. Acérquelos más.
- El nivel de entrada de la señal de audio proveniente de la fuente de audio es demasiado bajo. Aumente el volumen en la fuente de audio.

Limpieza y mantenimiento.

Piezas de repuesto. Asistencia al cliente


Limpieza y mantenimiento

Nota: NO utilice productos de limpieza en base a alcohol o productos químicos.

Limpie la base y los auriculares con un paño húmedo.

Retire periódicamente (consulte la figura (10) a la derecha) y limpie los tapones con agua jabonosa tibia.

Se suministran dos tipos de tapones; seleccione los más adecuados para usted.

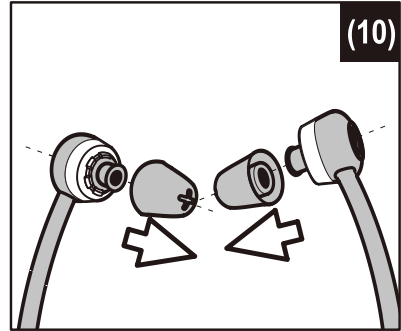

Piezas de repuesto

Las piezas de repuesto están disponibles en el lugar de compra original o llamando a la línea telefónica de asistencia al cliente:

01707 387602

1. Auriculares adicionales
2. Tapones para los oídos

Para reemplazar la batería de los auriculares, póngase en contacto con Asistencia al cliente.

Asistencia al cliente

Para obtener ayuda y asistencia sobre productos, visite nuestro sitio web en **www.geemarc.com**

Correo electrónico: **help@geemarc.com**

Nuestra línea telefónica de asistencia al cliente:

01707 387602

GARANTÍA

Geemarc garantiza por dos años su producto Geemarc CL7370 a partir del momento en que lo adquiere. Durante este tiempo, todas las reparaciones o sustituciones (a nuestra discreción) son gratuitos. Si experimenta algún problema, póngase en contacto con nuestra línea de asistencia o visite nuestro sitio web en www.geemarc.com. La garantía no cubre accidentes, negligencia o rotura de piezas. El producto no debe ser manipulado indebidamente ni desarmado por ninguna persona que no sea un representante autorizado de Geemarc.

La garantía de Geemarc no limita en modo alguno sus derechos legales.

Importante: SU RECIBO FORMA PARTE DE SU GARANTÍA, Y DEBE SER CONSERVADO PARA PRESENTARLO EN CASO DE RECLAMACIÓN BAJO GARANTÍA.

Tome nota: La garantía solo rige en España.

DECLARACIÓN CE.

Geemarc Telecom SA declara por el presente que este CL7370 cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva sobre equipos radioeléctricos 2014/53/UE.

La declaración de conformidad se puede consultar en www.geemarc.com



ADVERTENCIAS SOBRE LA BATERÍA

- **NO** intente desarmarla.
- **NO** la arroje al fuego.
- **NO** la trague.
- Manténgala alejada de los niños.
- **NO** cortocircuite los bornes de la batería.
- Las baterías agotadas deben ser reemplazadas únicamente por un técnico de servicio certificado de Geemarc.
- **Precaución:** Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye incorrectamente o si se utiliza un tipo de batería incorrecto. Deseche las baterías usadas según las instrucciones.



INFORMACIÓN SOBRE DESCARTE FUNCIONES

INFORMACIÓN SOBRE DESCARTE



Descarte de equipos eléctricos y electrónicos antiguos (aplicable a la Unión Europea y a otros países europeos con sistemas de recolección independientes)

El símbolo sobre el producto o su embalaje indica que este producto no puede tratarse como un residuo doméstico. En lugar de ello se debe entregar al punto de recolección correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían deberse a un tratamiento inadecuado de este producto como residuo.


Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la oficina del consejo local, el servicio de eliminación de residuos domésticos o la tienda en la que adquirió el producto.

CARACTERÍSTICAS:

1. Transmisión digital a 2,4 GHz AFHSS (salto de frecuencia adaptativo): calidad de sonido de CD.
2. 16 canales de salto.
3. Amplificación de recepción: hasta 120 dBspl.
4. Respuesta de frecuencia: 100 a 16000 Hz.
5. Alcance en interiores: hasta 25 metros del transmisor.
6. Tiempo de uso continuo: hasta 6 horas.
7. Se carga cuando lo necesita: los auriculares se recargan automáticamente al volver a colocarlos en la unidad base.
8. Los auriculares se apagan automáticamente cuando se vuelven a colocar en la unidad base.
9. Los auriculares se encienden automáticamente cuando se quitan de la unidad base.
10. Toma de entrada de audio estereofónico en la unidad base.
11. Toma de entrada óptica de audio estereofónico digital en la unidad base (opcional).
12. Peso: 50 g.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modo de transmisión	Digital a 2,4 GHZ AFHSS (salto de frecuencia adaptativo): calidad de sonido de CD
Frecuencia de portadora	2,4 GHz
Respuesta de frecuencia	100 Hz a 16000 Hz
Canales de salto	16
Amplificación de recepción	Hasta 120 dBspl
Alcance	Hasta 25 metros (área abierta)
Peso de los auriculares	50 gramos
Tensión de trabajo	Soporte de carga: 5 VCC  1,0 A, 5 W Auriculares: Batería de polímero de litio, 3,7 V, 500 mAh
Tiempo de trabajo de la batería	Hasta 6 horas
Potencia de radiofrecuencia	<20 dbm



Para obtener ayuda y asistencia sobre productos visite nuestro sitio web en **www.geemarc.com**

Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59791 Grande-Synthe, Francia

Correo electrónico: **help@geemarc.com**

Producto fabricado en China para Geemarc Telecom



UGCL7370_Es_v1.2

