



GUÍA RÁPIDA PARA EL USUARIO **Esp**

Consulte nuestro sitio web: www.geemarc.com para obtener una guía de usuario actualizada, ya que pueden haber actualizaciones importantes y cambios que deberá tener en cuenta!

PRECAUCIÓN: Utilice solo la batería proporcionada. Puede haber riesgo de explosión si se utiliza un tipo de batería incorrecto para la unidad de padres. La batería no puede someterse a temperaturas extremas altas o bajas y a baja presión de aire a gran altitud durante su uso, almacenamiento o transporte. Tirar la batería al fuego o en un horno caliente, o aplastar o cortar mecánicamente la batería puede provocar una explosión. Dejar la batería en un entorno circundante de temperatura extremadamente alta puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable. La batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable. Deseche la batería usada de acuerdo con las instrucciones.

Temperatura de funcionamiento normal del producto (por ejemplo, 0 °C ~ 40°C).

Utilice solo los adaptadores y la batería que se enumeran a continuación.


⚠️ **Información del adaptador de corriente : (Cargador)**
Salida: 6V DC 0.45A, 2.7W. Vtech Telecommunications Limited.
Modelo: VT05EEU06045 (EU)

⚠️ **Batería recargable: Modelo: KH-AAAJ600-D x 3 piezas.**
1.2V DC, 600mAh. Corun.

CONTENIDO DEL EMPAQUE


1 auricular inalámbrico, 1 adaptador de corriente, 1 cable de línea telefónica, 3 baterías de NiMH, 1 Guía rápida para el usuario.

Base de conexión

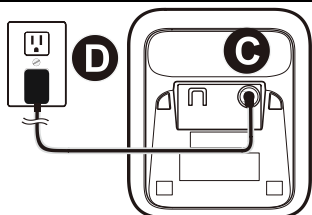

1

AURICULA

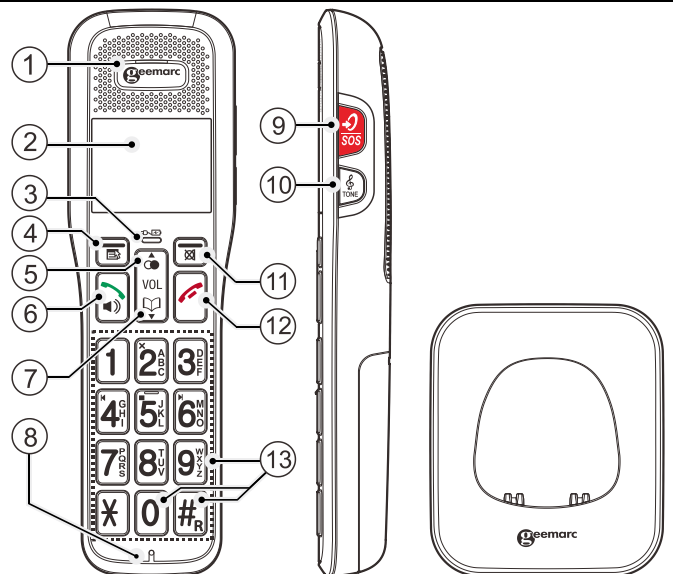

INSTALACIÓN

Connecting the telephone

Conecte el conector del adaptador de alimentación a la base (y al cargador de CC) (C) y luego conecte el enchufe del adaptador de alimentación a la red eléctrica (D).

Nota: Utilice únicamente los adaptadores de corriente suministrados con el teléfono.

Conectando la batería

Deslice la tapa de la batería hacia abajo.

Instale las 3 baterías en el zócalo como se indica, coincidiendo con la polaridad correcta (+, -).

Alinee la tapa contra el compartimiento de la batería y luego deslícela hacia arriba hasta que encaje en su lugar.

Cargando las baterías

Cargue las baterías durante al menos 16 horas cuando las cargue por primera vez.

PRIMER USO DE SU AURICULAR

Después de insertar las baterías, la pantalla le pide que seleccione su idioma con las teclas ▼/▲ (5/7), pulse **MENÚ/OK (4)** para validar.

A continuación, visualice REGISTER, realice el procedimiento del capítulo "Registro de un auricular"

Luego ingrese la fecha con el teclado y validela pulsando **MENÚ/OK (4)**

Ingrese la hora correcta con el teclado y valide pulsando **MENÚ/OK (4)**.

Seleccione su idioma de conversación con las teclas ▼/▲ (5/7),

Pulse **MENÚ/OK (4)** para validar

.REGISTRO DE AURICULARES

Nota: Se pueden registrar hasta cuatro terminales a una sola estación base

Registro de un auricular

En la **Base:** pulse y mantenga pulsado **LOCALIZADOR DE AURICULAR** en la base hasta que escuche un beep para ingresar al modo de registro.

Simultáneamente **En el Auricular:** Pulse **MENÚ/OK** Use ▼▲ para seleccionar **AJUSTE AUR** y pulse **MENÚ/OK**. Use ▼▲ para seleccionar **REGISTRO**, Pulse **MENÚ/OK** y se muestra la pantalla de REGISTRANDO.

Después de una breve demora, si el registro se realiza correctamente, se escuchará un pitido de confirmación y la pantalla del auricular volverá al modo inactivo con el nuevo número de auricular mostrado. La pantalla base también volverá al modo inactivo.

PERSPECTIVA GENERAL

Auricular

1. AURICULAR

2. PANTALLA LCD

3. LUZ DE CARGA ()

Encendido de forma continua cuando el teléfono se está cargando en el cargador.

2

4. MENU/OK ()

En modo inactivo: Pulse para acceder al menú principal.

En modo submenú: Pulse para confirmar la selección.

Durante una llamada: Pulse para acceder al Intercom / Directorio telefónico / Lista de remarcación / Registro de llamadas.

5. HACIA ARRIBA / LISTADO DE LLAMADAS ()

En modo inactivo: Pulse para acceder a la lista de remarcación.

En el modo de menú: Pulse para desplazarse hacia arriba en los elementos del menú.

En la lista de la agenda / lista de rellamadas / lista de llamadas: Pulse para desplazarse hacia arriba en la lista.

En modo de edición: Pulse para mover el cursor un carácter hacia la izquierda.

Durante una llamada: Pulse para aumentar el volumen de escucha.

Durante el timbre: Pulse para aumentar el volumen del timbre.

6. HABLAR EN () ALTAVOZ ()

En modo inactivo / pre-marcaje: Pulse para hacer una llamada en el modo de auricular.

En la agenda / lista de rellamadas / lista de llamadas: Pulse para hacer una llamada a la entrada seleccionada en la lista en el modo de auricular.

Durante el timbre: Pulse para contestar una llamada en el modo de auricular.

En línea: Pulse nuevamente para pasar al modo de altavoz. Pulse nuevamente para cambiar al modo de auricular.

7. HACIA ABAJO/DIRECTORIO TELEFÓNICO ()

En modo inactivo: Pulse para acceder al directorio.

En el modo de menú: Pulse para desplazarse hacia abajo en los elementos del menú.

En la lista de la agenda / lista de rellamadas / lista de llamadas: Pulse para desplazarse hacia abajo en la lista.

En modo de edición: Pulse para mover el cursor un carácter a la derecha.

Durante una llamada: Pulse para disminuir el volumen de escucha.

Durante el timbre: Pulse para disminuir el volumen del timbre.

8. MICRÓFONO

9. AUMENTO DE VOLUMEN/SOS ()/SOS ()

Durante una llamada: Presione para activar / desactivar la función AUMENTO DE VOLUMEN.

En modo inactivo: Mantenga pulsado durante 3 segundos para ingresar la secuencia de llamadas de emergencia establecida en su teléfono.

En el modo de llamada: mantenga pulsado durante 2 segundos para detener la llamada de emergencia.

10. TONO

Durante una llamada: pulse esta tecla para aumentar la frecuencia alta o baja.

11. CANCELAR/ ENMUDECER ()

En el modo de menú principal: Pulse para volver a la pantalla inactiva.

En modo submenú: Pulse para volver al menú anterior.

En modo edición / pre-marcaje: Pulse para borrar un carácter / dígito.

En modo edición / pre-marcaje: Mantenga pulsado para borrar todos los caracteres / dígitos.

Durante una llamada: Presione para silenciar/renovar el timbre del auricular.

Durante el timbre: Pulse para silenciar el timbre del auricular.

En modo inactivo: Presione para intercomunicarse con otro auricular.

12. SILENCIAR LA LLAMADA ()

Durante una llamada: Pulse para finalizar una llamada y volver a la pantalla inactiva.

En el modo de menú / edición: Pulse para volver a la pantalla inactiva.

13. TECLADO ALFANUMÉRICO, ESTRELLA(0), NUMERAL(#R)

En modo premarcaje o edición: Pulse para insertar un dígito / carácter / * / #.

#R durante una llamada: Pulse y mantenga pulsado para recuperar tono (Remarcar).


0 Tecla 0 en modo inactivo / premarcación / modo de edición de números: Pulsar y mantener pulsado para insertar una pausa.

FUNCIONES


Encontrará todas las funcionalidades en la guía del usuario principal AMPLIDECT595 U.L.E o AMPLIDECT595 Photo.

INTERCOMUNICADOR

Llamada interna

1) Pulse **MENÚ/OK** (), y **▼ ▲** para seleccionar **INTERCOM**, Pulse

MENÚ/OK (),

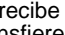2) Elija el número de auricular deseado, **Base** o **TODAS** y pulse **MENÚ/OK** ().


Si recibe una llamada en la base en el modo de altavoz, la llamada se transfiere automáticamente al auricular cuando se retira el auricular del cargador.

Llamada a todos los auriculares

Realice el punto 1 en el capítulo de llamada interna y elija **TODAS**.


Transferir una llamada externa

Realice el punto 1 en el capítulo acerca de llamadas internas y elija el número de auricular deseado con la tecla **ARRIBA / ABAJO**.

Después de la conexión salga de la llamada en el auricular pulsando .

Llamada en Conferencia

Realice el punto 1 en el capítulo acerca de llamadas internas y elija el número de auricular deseado con las teclas **▼ / ▲**.

Después de la conexión, mantenga pulsado  hasta que aparezca **CONFERENCIA**.

NOTA: Cualquier parte que cuelgue durante una llamada de conferencia dejará a la otra parte aún conectada con la llamada externa.

MANTENIMIENTO

Limpie la superficie de la carcasa con un paño suave y sin pelusas. No utilice productos de limpieza o disolventes.

GARANTÍA

Desde el momento en que se compra su Geemarc AMPLIDECT™595 ULE Handset, la garantía de Geemarc es por el período de dos años. Durante este tiempo, todas las reparaciones o reemplazos (a nuestra discreción) son gratuitos. Si llegara a tener algún problema, póngase en contacto con nuestra línea de ayuda o visite nuestro sitio www.geemarc.com.

La garantía no cubre accidentes, negligencia o roturas en ninguna parte. El producto no debe ser manipulado o desarmado por nadie que no sea un representante autorizado de Geemarc.

La garantía Geemarc de ninguna manera limita sus derechos legales.

IMPORTANTE: SU RECIBO ES PARTE DE SU GARANTÍA Y DEBE SER RETENIDO Y PRESENTADO EN CASO DE UNA RECLAMACIÓN DE GARANTÍA.

DECLARACIONES:


Directivas CE

Geemarc Telecom SA declara por la presente que este AMPLIDECT™595 Photo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva de equipos de radio 2014/53 / UE.

La declaración de conformidad CE se puede consultar en www.geemarc.com

Poder radiante < 250mW

Fuente de alimentación

Cargador	Entrada 100-240V 50 / 60Hz; Salida DC6V  0.45A, 2.7W Adaptador
Auricular	3 pilas AAA 1.2V / 600mAh recargables

Directivas de reciclaje

El WEEE (Residuos de equipos eléctricos y electrónicos) se ha puesto en marcha para que los productos al final de su vida útil se reciclen de la mejor manera.

Cuando haya terminado de utilizar este producto, no lo ponga en su contenedor de basura doméstica. Utilice una de las siguientes opciones de eliminación:

- Retire las baterías y deposítelas en un recipiente colector WEEE adecuado.

Deposite el producto en un recipiente WEEE apropiado.

- O entregue el producto viejo al vendedor. Si compras uno nuevo, deberían aceptarlo.

Por lo tanto, si respeta estas instrucciones, asegurará la salud humana y la protección del medio ambiente.



Para soporte de productos y ayuda, visite nuestro sitio web en www.geemarc.com

E-mail : help@geemarc.com

Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, France.

Fabricado para Geemarc Telecom S.A. en China



QUGAMPLIDECT595 U.L.E_HS_Sp_A4_V1.5