

## Receptor de alerta portátil



**Español**


Consulte nuestro sitio web: [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com) para obtener una guía de usuario actualizada, ya que puede haber actualizaciones y cambios importantes que debe tener en cuenta.



## CONTENIDO DEL PAQUETE

La caja AMPLICALL™150 contiene los siguientes elementos:

- ✧ 1 Estación base AC150 (AMPLICALL™150)
- ✧ 1 base de carga
- ✧ 1 batería recargable (preinstalada)
- ✧ 1 Adaptador de corriente CA/CC
- ✧ 1 Adaptadores de enchufe UK y 1 VDE
- ✧ 1 manual de usuario
- ✧ 1 set (8 uds) pegatinas de icono de alarma

## DESCRIPCIÓN

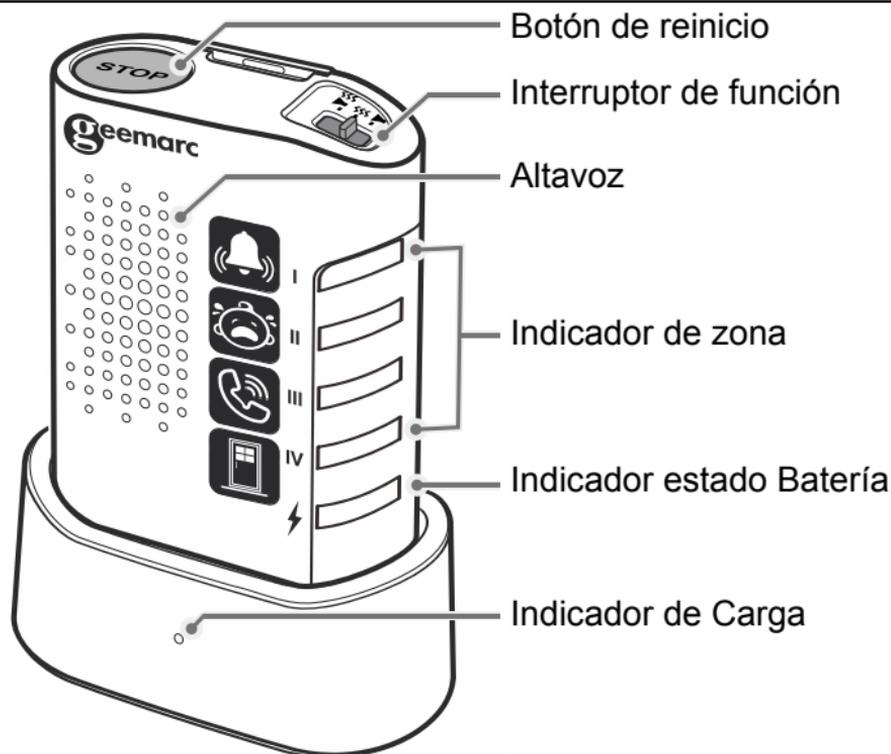


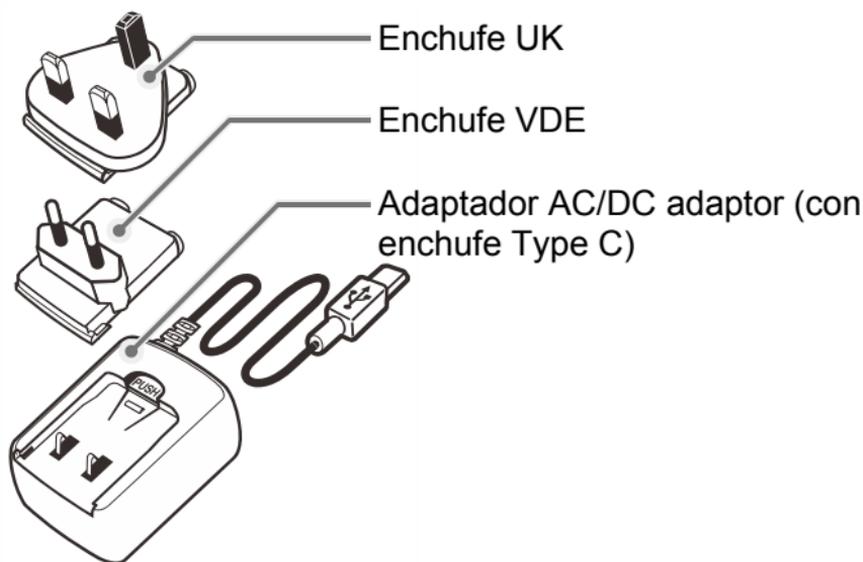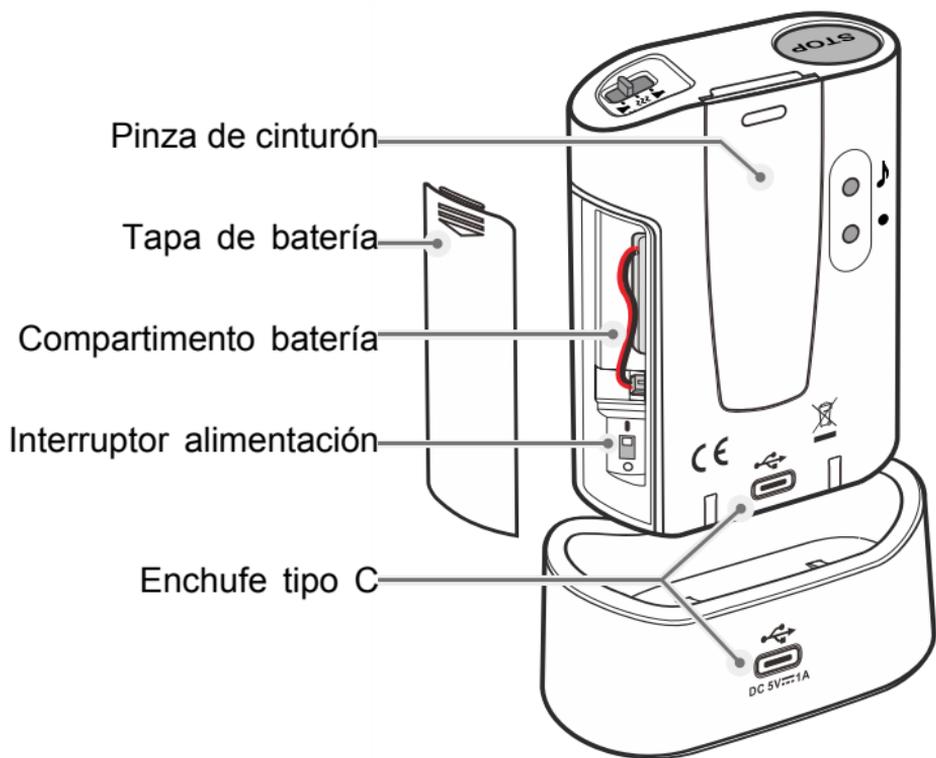

## ENCENDER / APAGAR

El receptor incorporó una batería de polímero de litio de reemplazo. Cuando lo use por primera vez, debe encender el interruptor de encendido dentro de la tapa de la batería (I).

Cuando no se utilice durante un período prolongado, se recomienda colocar el interruptor en la posición de APAGADO (O).

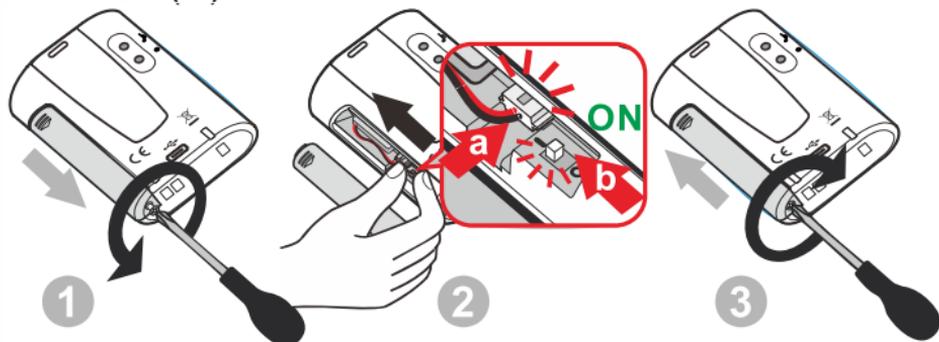


1 Afloje el tornillo con un destornillador Phillips pequeño.

2 Conecte la batería y deslice el interruptor a la posición de encendido.

3 Cierre la tapa de la batería y apriete el tornillo con el destornillador.

## CARGADOR DE BATERÍA

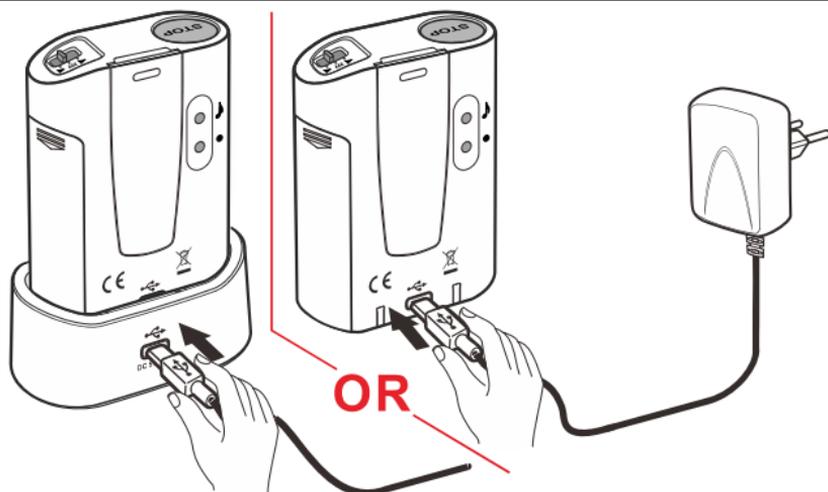

**Carga con acoplamiento:** conecte el enchufe USB tipo C al acoplamiento, coloque el receptor AC150 en el acoplamiento.

**Carga sin acoplamiento:** conecte directamente el enchufe USB tipo C a la unidad receptora AC150.



### Indicador estado batería


	Modo de Carga	Modo de espera
Luz LED	Cargando	
LED Apagada	Completa	Normal
Parpadeo del LED cada 10S		Batería local baja

**Indicador de batería baja** – Si una luz LED de zona parpadea cada 10 S, indica que la batería de este transmisor está baja. Debe recargar la batería lo antes posible..

## EMPAREJAMIENTO Y MELODÍA DE ALARMA

Para vincular un nuevo dispositivo, siga estos pasos:

1. Ingrese al modo de emparejamiento para el AC150. Mantenga presionado el botón **CONFIGURACIÓN** (●) durante 3 segundos. El LED en la zona #1 parpadeará.
2. Presiona el botón **CONFIGURACIÓN** (●) de nuevo para pasar a la zona con la que desea emparejarse. Pulse el botón de la selección de **melodía** (♪) para desplazarse por las melodías. Una vez que escuche una melodía que le guste, no presione ningún botón durante la melodía.
3. Una vez seleccionada la zona y la melodía, presione una vez el botón del dispositivo (AC101, AC110, AC140) para emparejar. Si tiene éxito, el AMPLICALL150 generará dos tonos cortos.
4. Presiona el botón **CONFIGURACIÓN** (●) para salir del modo de emparejamiento; el sistema ya está listo para usar.

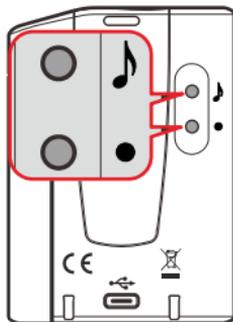

## **Suprimir un emisor de la memoria AC150**

---

- ✧ Primero, mantenga presionado el botón (●) durante 3 segundos para entrar en el modo de emparejamiento.
- ✧ Presione el botón (●) para pasar a la zona que se va a borrar.
- ✧ Mantenga presionada las teclas (●) y (🎵) juntos durante 3 segundos
- ✧ El receptor generará un tono para indicar que el transmisor de esta zona ha sido eliminado.

## **CAMBIAR LA MELODÍA EN LA ZONA DESEADA**

---

- ✧ Primero, mantenga presionado el botón (●) durante 3 segundos para entrar en el modo de emparejamiento.
- ✧ Presione el botón (●) para moverse a la zona, luego presione el botón (🎵) para seleccionar la melodía requerida.
- ✧ Presione el botón (●) hasta que se salga del modo de emparejamiento.

## **USO**

---

Cuando el AC150 recibe una señal de activación, reproducirá una melodía y vibrará (depende de la posición de configuración de la alarma). El LED de zona se encenderá para mostrar qué sensor se activa. El LED de zona seguirá encendido hasta que se presione el botón de reinicio.

## **GARANTÍA**

---

Desde el momento en que compra su Geemarc AMPLICALL™150, la garantía de Geemarc es por un período de tres años. Durante este tiempo, todas las reparaciones o sustituciones (a nuestra discreción) son gratuitas. Si tiene algún problema, comuníquese con nuestra línea de ayuda o visite nuestro sitio web en **[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)**. La garantía no cubre accidentes, negligencias o roturas de alguna pieza. El producto no debe ser manipulado ni desarmado por nadie que no sea un representante autorizado de Geemarc. La garantía de Geemarc no limita de ninguna manera sus derechos legales.

**IMPORTANT:** SU FACTURA ES PARTE DE SU GARANTÍA Y DEBE CONSERVARSE Y ENVIARSE EN CASO DE UNA RECLAMACIÓN DE GARANTÍA.

## **DECLARACIONES:**

---

### **Directivas CE**

Geemarc Telecom SA declara por la presente que este AMPLICALL™150 cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva de equipos de radio 2014/53/UE.

La declaración de conformidad CE se puede consultar en **[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)**

---

RF power : < 250mW

---

### **Directivas de reciclaje**

Se ha puesto en marcha la WEEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) para que los productos al final de su vida útil se reciclen de la mejor manera.

Cuando termine este producto, no lo tire a la basura doméstica. Utilice una de las siguientes opciones de eliminación:

- Retire las pilas y deposítelas en un contenedor WEEE adecuado. Depositar el producto en un contenedor RAEE adecuado.
- O entregue el producto viejo al minorista. Si compra uno nuevo, deberían aceptarlo. Por lo tanto, si respeta estas instrucciones, garantizará la salud humana y la protección del medio ambiente.



For product support and help visit our website at  
**[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)**



Fabricado en China para Geemarc Telecom S.A.

UGAMPLICALL150\_Sp\_v1.0