

Instalación de la batería de respaldo

Su reloj requiere una pila de litio CR2032 (no incluida) para proporcionar energía de reserva para el reloj en el caso de una interrupción de energía temporal. Coloque su unidad hacia abajo sobre una superficie plana.

1. Utilice un destornillador para abrir la tapa de la batería de reserva situada en la parte posterior de la unidad. El tornillo quedará retenido en la tapa de la batería.
2. Inserte una nueva batería de litio CR2032 en el compartimiento de la batería con el signo '+' hacia arriba como se indica.
3. Apriete la tapa de la batería.
4. Vuelva a colocar la tapa de la batería y apriete el tornillo de la tapa de la batería.

No es necesario insertar una batería de respaldo para que el reloj funcione; Sin embargo, al colocar la batería de respaldo permitirá mantener los ajustes de hora y alarma en caso de un corte de corriente o que el adaptador DC que se desconecte.

Si se interrumpe el suministro de potencia o si el adaptador está desconectado, la pantalla LED del reloj se pagará y las alarmas no funcionarán.

Por favor, cambie la batería cada año para asegurarse de que el dispositivo no se dañe.

INSTALACIÓN

Enchufe el adaptador de Corriente Alterna / Corriente Continua a una toma de corriente de CA y, a continuación, conecte la toma de CC en la parte posterior de la unidad. Su reloj está listo para trabajar para usted.

AJUSTE DE LA HORA Y DURACIÓN DE LA REPETICIÓN DE ALARMA

1. Pulse **ajustar (SET)** una vez, los dígitos de la hora '00' comenzarán a titilar. Pulse ▲ o ▼ para ajustar el tiempo en horas (mantenga para avanzar rápidamente).
2. Pulse **ajustar (SET)** de nuevo, los dígitos de los minutos '00' titilarán. Pulse ▲ o ▼ para ajustar el tiempo en minutos. (Mantener pulsado para avanzar rápidamente).
3. Pulse **ajustar (SET)** de nuevo, la pantalla mostrará "24 Horas" y parpadeará. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el formato de hora '12Hr' o '24Hr' El LED **PM** aparecerá en la parte inferior derecha para indicar la hora en la tarde; no existe un indicador **AM**.
4. Pulse **ajustar (SET)** de nuevo, la pantalla muestra '05' y parpadeará Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tiempo de pausa de alarma entre 5 a 60 minutos.
5. Pulse **ajustar (SET)** de nuevo o si ninguna tecla es pulsada durante unos 10 segundos saldrá del modo de ajuste.

PARA AJUSTAR LA ALARMA

1. Pulse y mantenga pulsado **ajuste de alarma / seleccionar** **AL SET SELECT**, el LED mostrado **||⊕||** y la hora de 4 dígitos parpadeará. Pulse ▲ o ▼ para ajustar la alarma en horas (Mantener pulsado para avanzar rápidamente).
2. Pulse nuevamente **ajuste de alarma / seleccionar** **AL SET SELECT**, los dígitos de minutos parpadearán Pulse ▲ o ▼ para ajustar la alarma en minutos. (Mantener pulsado para avanzar rápidamente).
3. Pulse **ajuste de alarma / seleccionar** **AL SET SELECT** nuevamente, el LED muestra **Alto (HI)** (vibración a nivel alto), pulse ▲ o ▼ para seleccionar **bajo (LO)** (vibración a nivel bajo)
4. Pulse **ajuste de alarma / seleccionar** **AL SET SELECT** nuevamente, el LED muestra Presione **F-1 (ej. 800 Hz)** y parpadea, pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tono de alarma (frecuencia):
F-1 (tono bajo, 1,5 KHz)
F-2 (tono medio, 1 KHz)
F-3 (tono alto, 800 Hz)
5. Pulse **ajuste de alarma / seleccionar** **AL SET SELECT** nuevamente o ningún botón alrededor de 10 segundos para salir del modo de ajuste de alarma.

PARA ENCENDER/APAGAR Y SELECCIONAR EL MODO DE ALARMA

1. En el modo de visualización de la hora normal, pulse **ajuste de alarma / seleccionar (AL SET / SELECT)** uno a la vez para activar la(s) alarma(s) y encienda el/ los indicador(es) de alarma(s) en el lado izquierdo de la pantalla de la hora:

- ||⊕|| Sólo el vibrador estará activado
- ||⊕|| ||⊕|| Tanto el sonido como vibrador estarán activados
- ||⊕|| ☀ Tanto la luz estroboscópica como el vibrador estarán activados
- ||⊕|| ||⊕|| ☀ La luz estroboscópica, el sonido y el vibrador estarán activados

2. Pulse **ajuste de alarma / seleccionar** **AL SET SELECT** una vez más para apagar todas las alarmas, todas los ||⊕||, ||⊕|| y ☀ indicadores de alarmas se apagarán.

Nota:

Para utilizar el vibrador, favor conecte la toma del agitador en la parte posterior del reloj. Si el usuario no desea utilizar el vibrador, desconecte el enchufe del mismo del reloj. J.

PARA AJUSTAR EL VOLUMEN DE LA ALARMA (ZUMBADOR)

Se puede activar el control de volumen del lado derecho de su reloj para ajustar el volumen de la alarma.

Este despertador puede ajustarse a niveles de volumen altos - favor tenga cuidado. Aumente el volumen de forma gradual hasta un nivel cómodo.

PARA DETENER Y REINICIAR LA ALARMA PARA EL SIGUIENTE DÍA

Cuando la alarma esté sonando, el indicador de alarma correspondiente parpadea. Pulse **ajuste de alarma / selecciona** una vez para apagar la alarma y reestablecer que suene al día siguiente Después de eso, el indicador de alarma correspondiente permanece en la pantalla.

PARA USAR EL REPOSO

(La duración de la repetición predeterminada es de cada 5 minutos)

Cuando la alarma suene, pulse **Zz** ☀ una vez, la alarma se detendrá temporalmente y el indicador correspondiente a la alarma seguirá parpadeante. La alarma se encenderá de nuevo después de que el período de tiempo establecido para dormir se termine.

USAR EL ATENUADOR ALTO-MEDIO-BAJO (TIEMPO DE LOS DÍGITOS LED)

Existen 3 nivel de brillo para la pantalla LED del reloj Pulse **Zz** ☀ para ajustar el brillo (**HI / MED / LO**) de la pantalla LED Esto sólo se puede realizar cuando la alarma no esté sonando Al principio, el brillo ha sido fijado en la posición alta.

CARGUE SU CELULAR CON EL PUERTO USB

Conectar el cable de carga del teléfono móvil al puerto USB situado en la parte posterior del reloj y luego conecte el otro extremo a la toma de carga micro USB en su teléfono móvil El reloj cargará su teléfono móvil de forma automática.

Nota:

1. Asegúrese de que el cable suministrado con el teléfono móvil se puede utilizar para la carga
2. Asegúrese de que el adaptador suministrado con este reloj (5V 1.2A) se pueda utilizar para alimentar el mismo
3. No es posible cargar un iPad® o Notepad desde la toma USB de este reloj.

Detección y eliminación de fallas

Si su reloj muestra la hora incorrecta o no funciona correctamente, lo que puede ser causado por la descarga electrostática u otras interferencias. Toma de corriente eléctrica usa mucha corriente cuando el temporizador en el calentador conmuta de encendido / apagado (filtrado pobre de la red). El adaptador de red para el reloj sólo debe ser conectado a una toma de corriente mural. El adaptador de red para el reloj sólo debe ser conectado a una toma de corriente mural - no deberá ser una extensión de la red que se comparte con el calentador eléctrico (u otro equipo de alto consumo).

CUIDADO DE SU PRODUCTO

1. Coloque el reloj sobre una superficie estable, lejos de fuentes de luz directa del sol o de calor o humedad excesivos.
2. Proteja sus muebles al colocar la unidad sobre una madera natural con acabado de laca mediante el uso de una tela o material de protección entre la unidad y el mueble.
3. Limpie su unidad con un paño suave humedecido con jabón suave y agua. Los agentes más fuertes como benceno, disolventes o materiales similares, pueden dañar la superficie de la unidad. Asegúrese de que la unidad esté desconectada antes de limpiarla.
4. Retire la batería de reserva si el reloj no va a ser utilizado durante un mes o más para evitar la posible corrosión. En caso de que el compartimiento de la batería se corra o esté sucio, limpie el compartimiento a fondo y cambie la batería.

ESPECIFICACIONES

Duración de la alarma:	1 hora
Duración del tiempo para dormir	5 a 60 minutos
Configuraciones por defecto	Formato de hora: 24 horas
	Hora 00:00
	Alarma 06:00
	Nivel de alarma y vibrador Alto
	Frecuencia del sonido de la alarma F-1
Duración del tiempo para dormir	05 (5 minutos)
Alarma audible	95 dB a 1m

GARANTÍA

Desde el momento que su producto Geemarc es adquirido, Geemarc le brinda garantía por un año. Durante éste tiempo, todas las reparaciones o sustituciones (a nuestro criterio) son totalmente gratuitas. Si experimentara algún problema contacte a nuestra línea de ayuda o visite nuestro sitio de Internet www.geemarc.com.

La garantía no cubre accidentes, negligencia ni roturas de cualquiera de los componentes. El producto no puede haber sido manipulado ni desarmado por personas que no sean representantes autorizados Geemarc

La garantía Geemarc no limita en ningún aspecto sus derechos legales. **IMPORTANTE: SU RECIBO ES PARTE DE SU GARANTÍA Y DEBERÁ GUARDARSE Y PRESENTARSE EN CASO DE UN RECLAMO DE GARANTÍA.**

Tenga en cuenta que: La garantía se aplica en España

DECLARACIONES

DIRECTIVAS de La CE

CE Geemarc Telecom SA declara por la presente, que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las Directivas 2014/53/UE La declaración CE de conformidad puede ser consultada en el sitio Internet www.geemarc.com

Conexión eléctrica: El aparato está diseñado para funcionar sólo con suministro de 230V 50Hz. (Clasificación de "tensión peligrosa" según la norma EN62368-1). El aparato no incorpora un interruptor integral de corriente. Para apagar el aparato, desconecte el adaptador de corriente. Al instalar el aparato, asegúrese de que el enchufe sea fácilmente accesible.

Directivas de reciclaje

La WEEE (RAEE) (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) se ha puesto en marcha para poder reciclar de la mejor manera los productos al final de su vida útil.

Cuando este producto no se utilice más, por favor no lo ponga en su basurero doméstico. Favor utilice una de las siguientes opciones de desecho:

- Retire las baterías y deposítalas en un recolector WEEE apropiado. Deposite el producto en un recolector WEEE apropiado.
- O, entregue el producto antiguo a la tienda minorista. Si usted compra uno nuevo, deben aceptarlo.

Así, si usted respeta estas instrucciones se asegura la salud humana y la protección ambiental.



Para el soporte y ayuda del producto, visite nuestro sitio de Internet www.geemarc.com.


E-mail : help@geemarc.com
Geemarc Telecom

2 rue Galilée, Parc de l'Etoile, 59760 Grande-Synthe, France

Este producto está fabricado en China para Geemarc Telecom

Huaxu Electronics Factory.
Room 103, No. 200, Shijie Technology East Road, Shijie Town, DongGuan City, Guangdong, P.R. China
HX18H-0901500-AG / HX18H-0901500-AB
AC100 - 240V ~ 50/60Hz
DC9V 1.5A 13.5W
Average active efficiency : ≥83.59%
Efficiency at low load (10%) : 84.71%
No-load power consumption : ≤0.1W

Consulte o nosso website: www.geemarc.com para aceder a um manual do utilizador atualizado, pois pode haver atualizações e alterações importantes de que deve estar ciente.

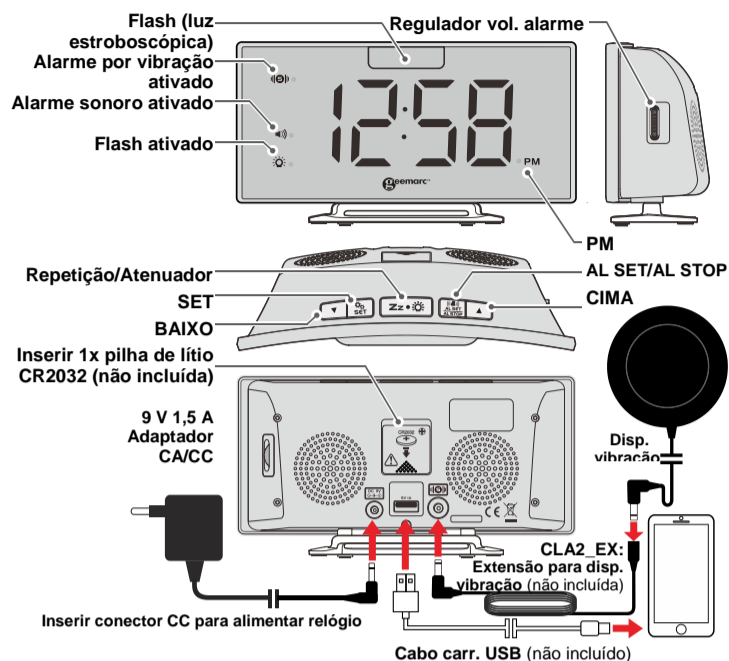

INSTALAÇÃO DA PILHA DE RESERVA

O seu relógio despertador precisa de uma pilha de lítio CR2032 (não incluída) para fornecer alimentação de reserva ao relógio caso haja uma interrupção temporária da energia. Coloque a sua unidade virada para baixo, numa superfície plana.

1. Use uma chave de fendas para abrir a tampa da pilha de reserva localizada na parte de trás da unidade. O parafuso ficará retido na tampa da pilha.
2. Deslize e retire a tampa da pilha.
3. Instale uma pilha de lítio CR2032 nova no compartimento da pilha com o lado "+" virado para cima, conforme indicado.
4. Volte a colocar a tampa da pilha e aperte o respetivo parafuso.

Não é necessário inserir uma pilha de reserva para que o relógio funcione. Contudo, inserir a mesma manterá as definições de hora e alarme se houver um corte de eletricidade ou caso o adaptador CC se desligue da tomada.

Se a alimentação elétrica for interrompida ou se o adaptador for desligado da tomada, o visor LED do relógio irá desligar-se e o alarme não funcionará.

Substitua a pilha anualmente, para garantir que o seu dispositivo não é danificado.

INSTALAÇÃO

Ligue o adaptador CA/CC a uma tomada CC doméstica e, em seguida, ligue o conector CC à parte de trás da unidade. O seu relógio despertador está pronto a funcionar.

PARA ACERTAR A HORA E DEFINIR A DURAÇÃO DA REPETIÇÃO

1. Prima **SET** e os dígitos das horas "00" piscam. Prima ▲ ou ▼ para acertar as horas (prima continuamente para avançar rapidamente).
2. Prima **SET** novamente e os dígitos dos minutos "00" piscam. Prima ▲ ou ▼ para acertar os minutos (prima continuamente para avançar rapidamente).
3. Prima **SET** novamente, o visor mostra "24Hr" e pisca. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o formato de hora "12Hr" ou "24Hr". O LED **PM** aparecerá no canto inferior direito para indicar a hora da tarde/noite; não há indicador **AM** (madrugada/manhã).
4. Prima **SET** novamente, o visor mostra "05" e pisca. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o seu intervalo de repetição do alarme, entre 5 e 60 minutos.
5. Prima **SET** novamente ou aguarde cerca de 10 segundos sem premir nenhuma tecla para sair do modo de definição.

PARA DEFINIR O ALARME

1. Prima continuamente **AL SET / AL STOP**, o LED e os dígitos das horas piscam. Prima ▲ ou ▼ para definir a hora do alarme (prima continuamente para avançar rapidamente).
2. Prima novamente **AL SET / AL STOP** e os dígitos dos minutos piscam. Prima ▲ ou ▼ para definir os minutos do alarme (prima continuamente para avançar rapidamente).
3. Prima novamente **AL SET / AL STOP**, o LED mostra "HI" (vibração no nível alto), prima ▲ ou ▼ para selecionar "LO" (vibração no nível baixo)
4. Prima novamente **AL SET / AL STOP**, o LED mostra "F-1 (ex. 800 Hz)" e pisca, prima ▲ ou ▼ para selecionar o tom do alarme (frequência):
F-1 (tom baixo, 800 Hz), F-2 (tom médio, 1 KHz), F-3 (tom alto, 1,5 KHz)

Prima novamente **AL SET / AL STOP** ou não prima nenhum botão durante cerca de 10 segundos para sair do modo de definição do alarme.

PARA LIGAR/DESLIGAR E SELECIONAR O MODO DE ALARME

1. No modo de visualização das horas normal, prima **AL SET / AL STOP** um de cada vez para ativar o(s) alarme(s) e ligar o(s) indicador(es) correspondente(s) no lado esquerdo do visor:
 : só é ativada a vibração
 : ativação do alarme sonoro e da vibração
 : ativação do alarme por luz estroboscópica e por vibração
 : ativação do alarme por luz estroboscópica, som e vibração
2. Prima **AL SET / AL STOP** uma vez mais para desativar todos os alarmes e todos os indicadores de alarme e e são desativados.

Nota: para usar o alarme por vibração ligue a ficha correspondente na parte de trás do relógio. Se o utilizador não quiser usar o alarme por vibração, desligue a ficha de vibração do relógio.

PARA AJUSTAR O VOLUME DO ALARME (SINAL SONORO)

Pode girar o regulador de volume no lado direito do relógio para ajustar o volume do alarme. Este relógio despertador pode ser configurado para níveis de volume altos – utilize com cuidado. Aumente o volume gradualmente até atingir um nível confortável.

PARA PARAR E REPOR O ALARME PARA SER ATIVADO NO DIA SEGUINTE

Quando o alarme está a soar, o indicador de alarme correspondente pisca. Prima **AL SET / AL STOP** uma vez para parar o alarme e repô-lo para ser ativado no dia seguinte. Depois disso, o indicador de alarme correspondente permanece no visor.

PARA USAR A REPETIÇÃO

(a duração predefinida da repetição são 5 minutos)

Quando o alarme estiver a soar, prima **Zz** uma vez; o alarme irá parar temporariamente e o indicador de alarme correspondente continuará a piscar. O alarme será novamente ativado após o final da duração definida para a repetição.

PARA USAR O ATENUADOR ALTO-MÉDIO-BAIXO (DÍGITOS DAS HORAS LED)

Há um controlo de brilho com 3 níveis para o visor LED do relógio. Prima **Zz** para ajustar o brilho (**ALTO / MÉDIO / BAIXO**) do visor LED. Só pode fazer isto quando a unidade não estiver a executar um alarme.

No início, a definição de brilho está na posição Alto.

CARREGAR O SEU TELEMÓVEL COM A PORTA USB

Ligue o cabo de carregamento do seu telemóvel à porta USB na parte de trás do relógio despertador e, em seguida, ligue a outra extremidade à entrada de carregamento micro USB no seu telemóvel. O relógio carregará o telemóvel automaticamente.

Nota: 1. Certifique-se de que utiliza o cabo fornecido com o seu telemóvel para carregar.

2. Certifique-se de que utiliza o adaptador fornecido com este relógio (9 V 1,5 A) para o alimentar.

3. Não é possível carregar um iPad® ou notepad a partir da entrada USB deste relógio.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o seu relógio despertador apresentar a hora incorreta ou não funcionar corretamente, isto pode ser causado por descargas eletrostáticas ou outras interferências. O adaptador de corrente do relógio despertador só deve ser ligado a uma tomada de corrente elétrica, e não a uma extensão que seja partilhada com um aquecedor elétrico (ou outro equipamento elétrico).

CUIDAR DO SEU PRODUTO

1. Coloque o relógio numa superfície estável, afastado de fontes de luz solar direta ou calor ou humidade excessivos.
2. Proteja a sua mobília quando colocar a unidade sobre madeira natural ou um acabamento lacado, ao usar um pano ou material protetor entre a unidade e a mobília.
3. Limpe a sua unidade com um pano macio, humedecido apenas com sabão neutro e água. Os agentes mais agressivos, como o benzeno, diluentes ou materiais semelhantes podem danificar a superfície da unidade. Certifique-se de desligar a unidade da tomada antes de a limpar.
4. Retire a pilha de reserva se não planear usar o relógio durante um mês ou mais, para evitar a possível corrosão. Caso o compartimento da bateria fique corroído ou sujo, limpe-o cuidadosamente e substitua a pilha.

ESPECIFICAÇÕES

Duração do alarme	: 1 hora
Duração da repetição Ajustável	: 5 a 60 minutos
Predefinições	Formato de hora: 24 horas
	Hora: 0:00
	Alarme: 06:00
	Nível do alarme e da vibração: Alto
	Frequência do alarme sonoro: F-1
	Duração da repetição: 05 (5 minutos)
Alarme sonoro	: 95 dB a 1 m

GARANTIA

A partir do momento em que compra o seu produto Geemarc, a empresa garante-o pelo prazo de dois anos. Durante este prazo, todas as reparações ou substituições (ao nosso critério) serão gratuitas. Caso surja um problema, contacte a nossa linha de ajuda ou visite o nosso website em www.geemarc.com.

A garantia não cobre acidentes, negligência ou danos nas peças. O produto não pode ser adulterado ou desmontado por uma pessoa que não seja um representante autorizado da Geemarc.

A garantia da Geemarc não limita, de forma alguma, os seus direitos legais.

IMPORTANTE: O SEU RECIBO FAZ PARTE DA SUA GARANTIA E DEVE CONSERVÁ-LO E APRESENTÁ-LO EM CASO DE UMA RECLAMAÇÃO AO ABRIGO DA GARANTIA.

Tenha em atenção: a garantia aplica-se exclusivamente a Portugal.

DECLARAÇÕES:

Diretivas:

a Geemarc Telecom SA declara que este Wake 'n' shake Curve cumpre os requisitos da Diretiva 2014/53/UE.

A declaração de conformidade com a diretiva pode ser consultada em www.geemarc.com

Ligação elétrica: a aparelho foi concebido para funcionar exclusivamente com uma alimentação de 230 V 50 Hz (classificada como tensão perigosa segundo a norma EN62368-1). O aparelho não dispõe de um interruptor para ligar/desligar a alimentação. Para desligar o aparelho, desligue o adaptador de corrente.

Ao instalar o aparelho, certifique-se de que tem uma tomada elétrica facilmente acessível.

Diretivas de reciclagem

A diretiva REEE (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos) foi implementada para garantir que os produtos são reciclados da melhor forma quando atingem o fim da vida útil.

Quando este produto já não servir, não o coloque no seu caixote do lixo doméstico. Utilize uma das seguintes opções para o eliminar:

- Retire as pilhas e coloque-as num contentor apropriado para REEE.

Coloque o produto num contentor apropriado para REEE.

- Em alternativa, entregue o produto antigo ao retalhista. Se comprar um produto novo, o retalhista deve aceitá-lo.

Assim, se respeitar estas instruções, garante a proteção da saúde humana e do ambiente.



Para obter apoio e ajuda relativamente a produtos, visite o nosso website em

www.geemarc.com

E-mail: help@geemarc.com

Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, França

Huaxu Electronics Factory. Room 103, No. 200, Shijie Technology East Road, Shijie Town, DongGuan City, Guangdong, P.R. China HX18H-0901500-AG / HX18H- 0901500-AB AC100 – 240V ~ 50/60Hz DC9V 1.5A 13.5W Average active efficiency : ≥83.59% Efficiency at low load (10%) : 84.71% No-load power consumption : ≤0.1W
