

geemarc™ AMPLICALL™ 110
Hear the Difference

Amplificador de Teléfono Inalámbrico





Español

Por favor, consulte nuestra web: www.geemarc.com para obtener una guía de usuario actualizada, ya que puede haber actualizaciones y cambios importantes que debe tener en cuenta.

Contenido:

| | |
|---|---------------------------------|
| El AC110 (AMPLICALL™110) contiene lo siguiente: | |
| 1 manual de usuario | 2 tornillos y 2 anclajes |
| 1 AC110 (AMPLICALL™110) | 2 x AA, 1.5V baterías Alcalinas |
| 1 RJ11/RJ11 cable | 1 Plantilla para taladrar |


DESCRIPCIÓN:

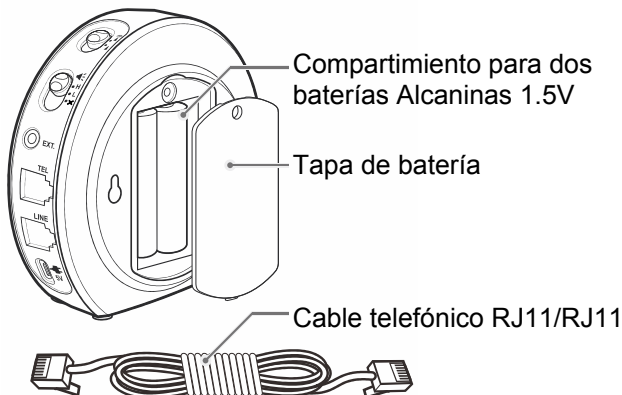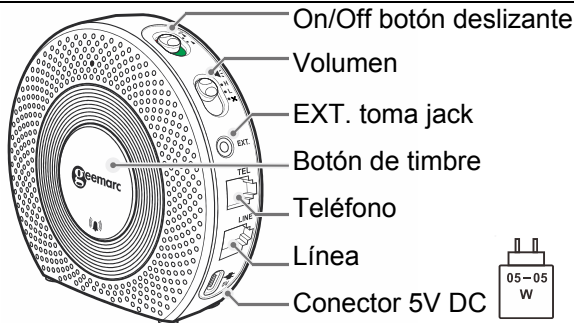

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

AMPLICALL™110 funciona con dos baterías Alcalinas AA 1.5V (no suministradas).

Por favor, siga el procedimiento indicado para insertar las baterías.

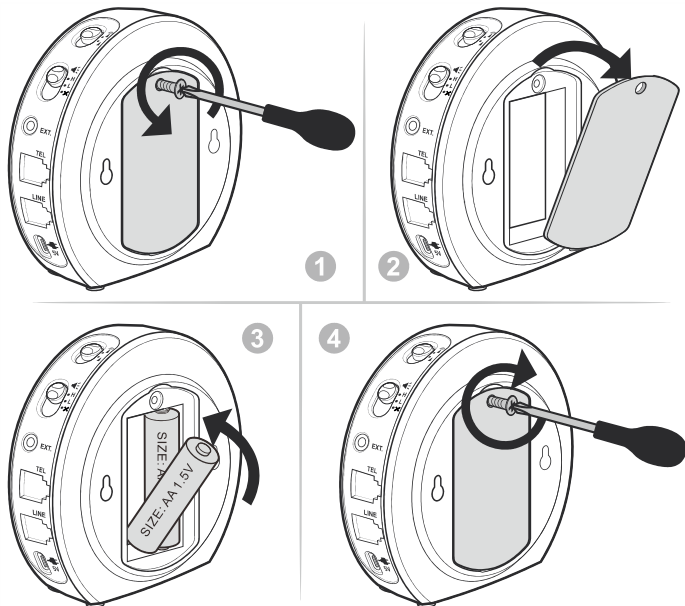


- 1.Desatornillar el tornillo de la tapa de las baterías.
- 2.Abrir la tapa de las baterías.
- 3.Insertar las 2 baterías AA en el compartimento.
- 4.Cerrar la tapa de la batería y fijarla usando el tornillo.

Batería baja

Si su dispositivo está bajo de batería o si no se han insertado las baterías, su AMPLICALL™110 enviará una señal al receptor que hará que el icono de luz se ilumine.

Conexión de AC110 a la red eléctrica (Opcional)

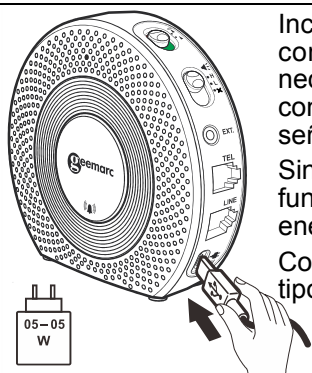

Incluso si su AMPLICALL™110 está conectado a la red eléctrica, es necesario insertar las baterías, de lo contrario el dispositivo enviará una señal de batería baja al receptor.

Sin embargo, estas baterías solo funcionarán en caso de un corte de energía.


Conecte el cable de alimentación USB tipo C al conector de entrada de CC.

Emparejar su AC110 con los receptores de AMPLICALL

El AC110 puede funcionar por sí solo, amplificará el timbre y parpadeará cuando reciba una llamada. También tiene la posibilidad de registrar su AMPLICALL™110 con los receptores AMPLICALL. Si están emparejados, los receptores recibirán la información del AMPLICALL™110 y también el anillo y flash. Introduzca el modo de emparejamiento para los receptores AMPLICALL.

1. Presionar y mantener el botón de **CONFIGURACIÓN** (●) durante 3 segundos. La luz LED del icono #1 parpadeará.
2. Presionar el botón **CONFIGURACIÓN** (●) de nuevo para desplazarse al icono de zona con el que desea emparejar el AC110.
Presionar el botón de **selección de melodía** (🎵) para desplazarse por las melodías. Una vez que escuche una melodía que le guste, no presionar ningún botón durante la melodía.
3. Pulsar una vez el botón de timbre del AC110 para emparejar.
4. Si tiene éxito, los receptores AMPLICALL generarán dos tonos cortos.


Conexión del AC110 a una toma telefónica

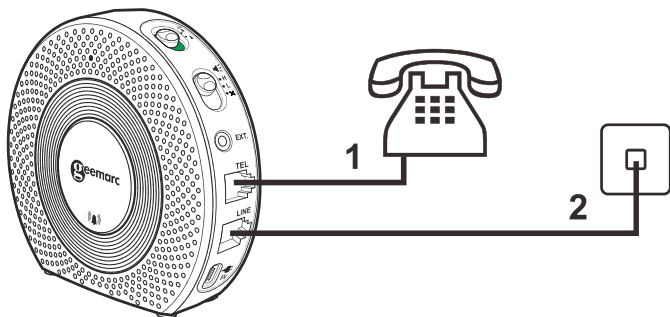

1. Conecte un extremo del cable RJ11 suministrada a la toma de teléfono y el otro al conector de entrada "Tel" del AC110.
2. Conecte un extremo del cable telefónico original al conector de entrada "Line" del AC110 y el otro a la toma de corriente.


Montaje a pared

El AC110 puede colocarse sobre una superficie plana o montarse en una pared.

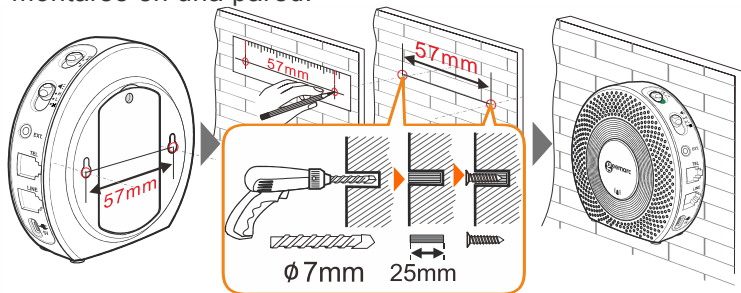

Marque dos agujeros en la pared con una plantilla de lápiz y taladro. Monte la unidad en la pared utilizando los anclajes y tornillos proporcionados.

Carga de los ajustes del AC110

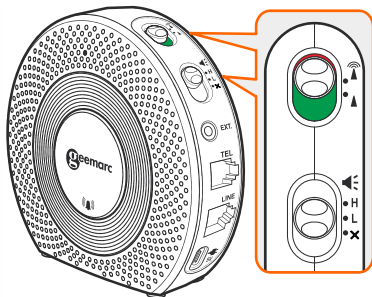


On/Off botón deslizante
Volumen

On (▲) / Off (▼) botón deslizante: Deslice a la posición **Off (▼)** cuando no se utilice ningún receptor.

Volumen (🔊): Puede ajustar el volumen del timbre deslizando este botón, puede cambiar entre la posición **H** (alto), **L** (bajo) y **X** (silencio).

Conexión de un sensor externo al AC110

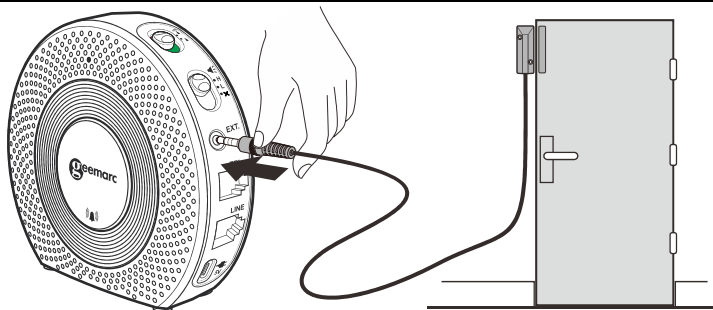

El AC110 es compatible con dispositivos externos como alfombras de caída y otros tipos de sensores que se pueden conectar al AC110 mediante la toma de jack "EXT". Una vez conectado, el dispositivo enviará una señal al receptor cada vez que se active.

GARANTÍA

Desde el momento en que se compra su Geemarc AMPLICALL110, la garantía de Geemarc es por un período de tres años. Durante este tiempo, todas las reparaciones o reemplazos (a nuestra discreción) son gratuitos. Si experimenta un problema, comuníquese con nuestra línea de ayuda (distribuidor) o visite nuestro sitio web en www.geemarc.com. La garantía no cubre accidentes, negligencias o roturas de ninguna de las piezas. El producto no debe ser manipulado o desmontado por nadie que no sea un representante autorizado de Geemarc. La garantía de Geemarc de ninguna manera limita sus derechos legales.

IMPORTANTE : SU FACTURA ES PARTE DE SU GARANTÍA Y DEBE CONSERVARSE Y ADJUNTARSE EN CASO DE UNA RECLAMACIÓN DE GARANTÍA.

DECLARACIONES:

CE Directivas

Geemarc Telecom SA declara por la presente que este AMPLICALL™110 cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva de equipos de radio 2014/53/UE.

La declaración de conformidad CE se puede consultar en www.geemarc.com

RF power : < 250mW

Directivas de Reciclaje

Se ha puesto en marcha la WEEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) para que los productos al final de su vida útil se reciclen de la mejor manera.

Cuando termine este producto, no lo tire a la basura doméstica. Utilice una de las siguientes opciones de eliminación:

- Quitar las pilas y depositarlas en un contenedor WEEE adecuado. Depositar el producto en un contenedor RAEE adecuado.
- O entregue el producto viejo al minorista. Si compra uno nuevo, deberían aceptarlo. Por lo tanto, si respeta estas instrucciones, garantizará la salud humana y la protección del medio ambiente.



Fabricado en China para Geemarc Telecom S.A.

UGAMPLICALL110_Sp_v1.1