

geemarc™ AMPLICALL™ 101

Hear the Difference



Draadloze deurbel



Nederlands P1

!!! Raadpleeg onze website: www.geemarc.com voor een actuele gebruikershandleiding, aangezien er mogelijk belangrijke updates en wijzigingen zijn waarvan u op de hoogte moet zijn !!!

INHOUD VAN DE VERPAKKING

De verpakking bevat de volgende onderdelen:


1 gebruikershandleiding

1 AMPLICALLTM101 (AC101)

2 schroeven en 2 bevestigingsgaten


1 muurbeugel en 1 bevestigingsbeugel voor draagkoord.

BESCHRIJVING

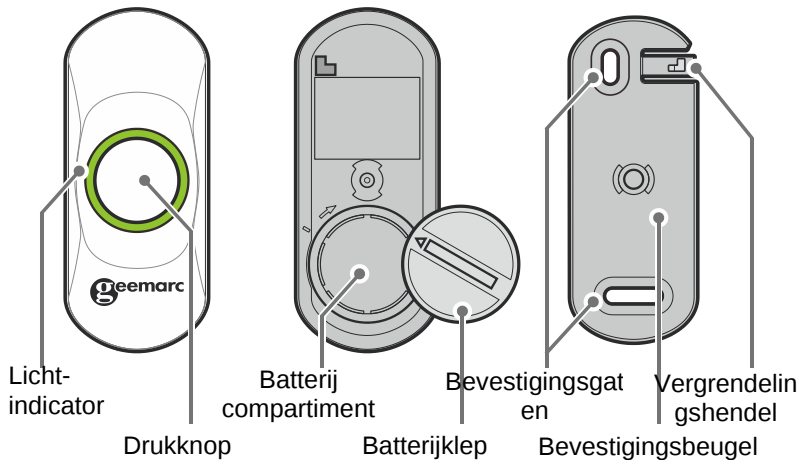

INSTALLATIE

Installatie of vervanging van de batterij in de afstandsbediening
AMPLICALL™101

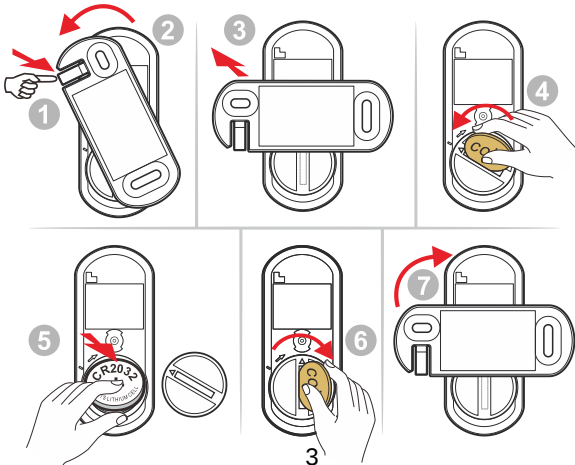


1. Gebruik uw vinger om de vergrendelingshendel te ontgrendelen (afb. ❶).
2. Draai de montagebeugel 90 graden (afb. ❷).
3. Verwijder de montagebeugel van het apparaat (afb. ❸).
4. Draai het batterijklepje met een muntstuk (afb. ❹).
5. Plaats een CR2032-batterij in het batterijcompartiment met de polariteit + naar boven. (afb. ❺).
6. Sluit het batterijklepje met een muntstuk. (afb. ❻).
7. Plaats de montagebeugel terug in een hoek van 90 graden.(afb. ❼).
8. Draai de montagebeugel totdat het onderdeel vergrendelt.

Note: Low Battery Signal

When the AC101 is running low on battery, it will send a signal to the AMPLICALL™100 or AMPLICALL™150 which will make the corresponding zone icon light up. To replace the battery, you will need to follow the 8 steps procedure described above.

CODE CONFLICT

Als de codering van de belknop hetzelfde is als die van een andere zender, moet u de code wijzigen. Nadat u de code hebt gewijzigd, moet u de belknop opnieuw koppelen.

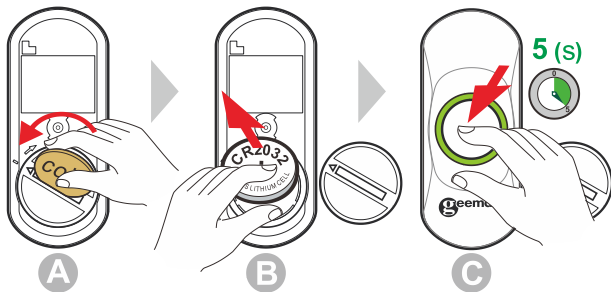

(A) Open het batterijklepje.

(B) Haal de batterij eruit.

(C) Houd de testknop ingedrukt en plaats de batterij terwijl u de knop 5 seconden ingedrukt houdt. De LED knippert 5 keer wanneer een nieuwe code wordt gegenereerd.


Koppelen met AMPLICALLTM100/AMPLICALLTM150

Ga naar de koppelingsmodus op de AC100 of AC150:

1. Houd de LEARNING-knop (●) 3 seconden ingedrukt. Het LED-lampje in zone-pictogram #1 gaat knipperen.
2. Druk nogmaals op de LEARNING-knop (●) om naar het zone-icoontje te gaan waarmee u de AC101 wilt koppelen. Druk op de melodiekeuzeknop (🎵) om door de melodien te bladeren. Als u een melodie hoort die u bevalt, druk dan tijdens het afspelen van de melodie op geen enkele knop.
3. Druk eenmaal op de deurbelknop van de AC101 om te koppelen.
4. If successful, the AMPLICALL100 or 150 will generate two short tones.


Zone-keuzeschakelaar
Leerknop

Melodie-selector

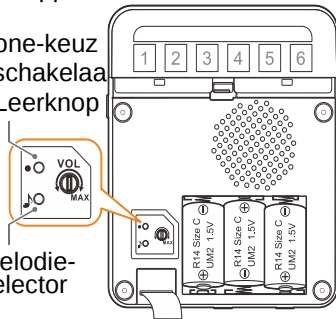


WANDMONTAGE

Bevestiging met schroeven

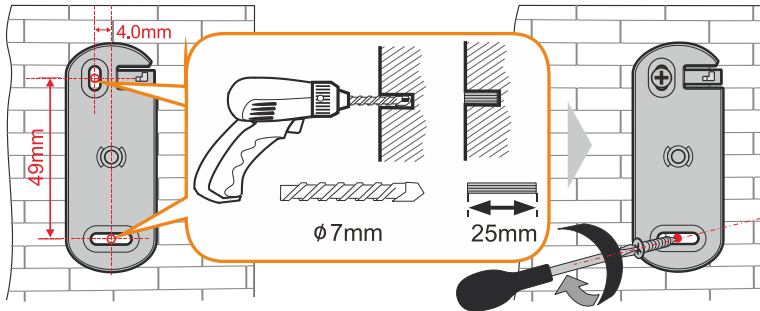


Er is een elektrische boormachine nodig om de AC101 met de meegeleverde pluggen en schroeven aan de muur te bevestigen.

Bevestiging met dubbelzijdig plakband

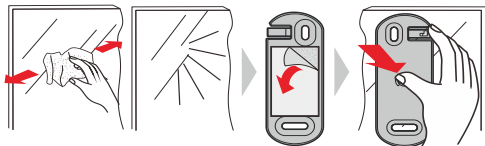


U kunt uw ~~AMPLICALL~~ TM101 aan de muur bevestigen.
Volg hiervoor de onderstaande aanbevelingen.

Bevestig de deurbel aan de montagebeugel.

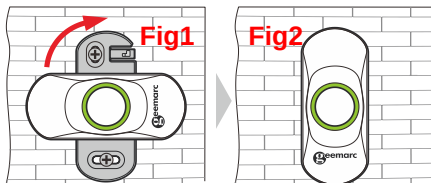

1. Plaats de montagebeugel terug in een hoek van 90 graden. (Afb.1).
2. Draai de montagebeugel totdat het onderdeel vastklikt. (Afb.2).

Plaats de belknop op de koordbeugel.

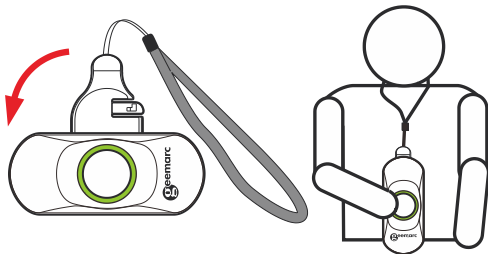

1. Plaats de lanyardbeugel in een hoek van 90 graden.
2. Draai de montagebeugel totdat het onderdeel vergrendelt.

GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc AMPLICALL™101 aanschaft, geldt de Geemarc-garantie voor een periode van twee jaar. Gedurende deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (naar ons oordeel) kosteloos. Mocht u een probleem ondervinden, neem dan contact op met onze helpdesk of bezoek onze website op

www.geemarc.com.

De garantie dekt geen ongelukken, nalatigheid of breuken aan onderdelen. Het product mag niet worden gemanipuleerd of uit elkaar worden gehaald door iemand die geen geautoriseerde vertegenwoordiger van Geemarc is.

De garantie van Geemarc beperkt op geen enkele wijze uw wettelijke rechten.

BELANGRIJK: UW AANKOOPBON MAAKT DEEL UIT VAN UW GARANTIE EN MOET WORDEN BEWAARD EN GETOOND IN GEVAL VAN EEN GARANTIEAANVRAAG.

VERKLARINGEN:

UKCA-richtlijnen

Geemarc Telecom SA verklaart hierbij dat deze AMPLICALL™101 voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de Richtlijn radioapparatuur 2014/53/EU.

De UKCA-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op www.geemarc.com.

RF power : < 250mW

Recyclingrichtlijnen

De WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment) is ingevoerd om ervoor te zorgen dat producten aan het einde van hun levensduur op de best mogelijke manier worden gerecycled.

Wanneer dit product aan het einde van zijn levensduur is, mag u het niet in de huisvuilbak gooien. Maak gebruik van een van de volgende verwijderingsopties:

- Verwijder de batterijen en deponeer deze in een daarvoor bestemde WEEE-container. Deponeer het product in een daarvoor bestemde WEEE-container.

- Of lever het oude product in bij de winkel. Als u een nieuw product koopt, moeten zij het oude product accepteren.

Door deze instructies op te volgen, draagt u bij aan de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu.



Voor productondersteuning en hulp kunt u terecht op onze website

www.geemarc.com

E-mail: kundendienst@geemarc.com Telefoon +49(0)30 209 95 789
de lijnen zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur.

2 Rue Galilée, Parc de l'Etoile, 59760 Grande-Synthe, Frankrijk

Dit product is gemaakt in China Aan Geemarc Telecom

UGAMPLICALL101_NI_A7_V1.1