

Videobabyfoon met
schudfunctie, flitslicht en
luide alarmsignalen




Raadpleeg onze website: **www.geemarc.com** voor een actuele gebruikershandleiding, aangezien er mogelijk belangrijke updates en wijzigingen zijn waarvan u op de hoogte moet zijn.

Opmerking : Deze gebruikershandleiding bevat alle informatie die u nodig hebt om uw product optimaal te gebruiken.



Voordat u de babyfoon kunt gebruiken, raden wij u aan de batterij in de babyfoon te plaatsen en volledig op te laden, zodat deze blijft werken als u hem loskoppelt van het lichtnet om hem naar een andere locatie te verplaatsen. Lees de veiligheidsinstructies op pagina 2 voordat u de apparaten installeert.

Inhoud van de verpakking

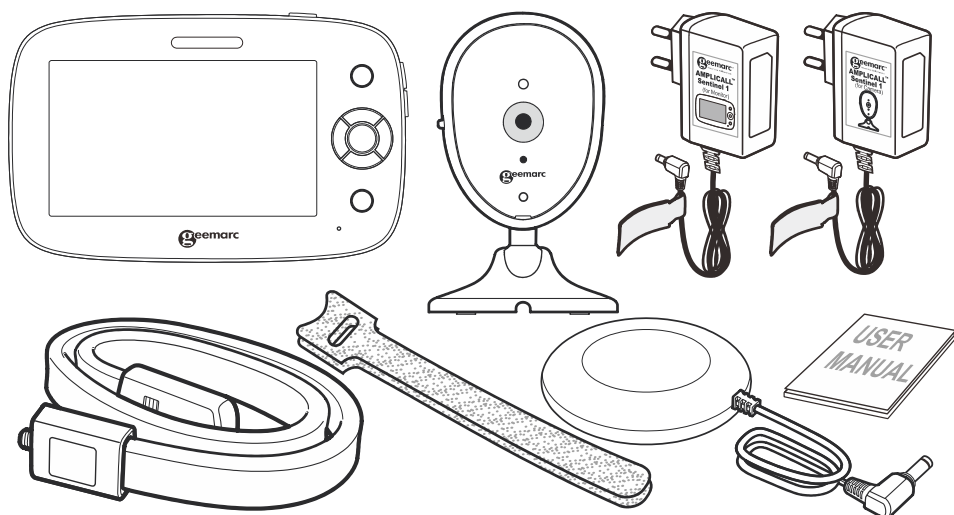

De AC Sen1 (AMPLICALL™ Sentinel 1) doos bevat de volgende items:

- 1 babyfoon
- 1 babyunit (camera)
- 2 AC/DC-voedingsadapters
- 1 opvouwbaar standaard
- 2 magneetbandjes
- 1 shaker
- 1 gebruikershandleiding

Inhoudsopgave

1. Veiligheidsinstructies	2
2. Overzicht van uw babyfoon	3
3. Uw videobabyfoon instellen	5
3.1 Stroomvoorziening camera	5
3.2 Stroomvoorziening babyfoon	5
4. Pictogrammen op het monitoringscherm	6
5. Menufunctie (babyfoon)	6
5.1 Camera	6
5.2 Bekijken	7
5.3 Slaapliedjes	7
5.4 Voedingstime	8
5.5 Instellingen	8
6. Technische kenmerken	12
7. Garantie	13
8. Verklaringen	13

1. Veiligheidsinstructies




WAARSCHUWING:

Deze babyfoon voldoet aan alle relevante normen met betrekking tot elektromagnetische velden en is veilig in gebruik wanneer deze wordt gebruikt zoals beschreven in de gebruikershandleiding.

Lees daarom altijd zorgvuldig de instructies in deze gebruikershandleiding voordat u het apparaat in gebruik neemt. Adult assembly is required. Keep small parts away from children when assembling.

- Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen.
- Deze babyfoon is geen vervanging voor verantwoord toezicht door volwassenen.
- Plaats de camera of kabels niet in het bedje of binnen handbereik van de baby (minstens 1 meter afstand).
- Houd de snoeren buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik de babyfoon niet in de buurt van water of een warmtebron.
- Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapters.
- Raak de stekkercontacten niet aan met scherpe of metalen voorwerpen.

2. Overzicht van uw babyfoon

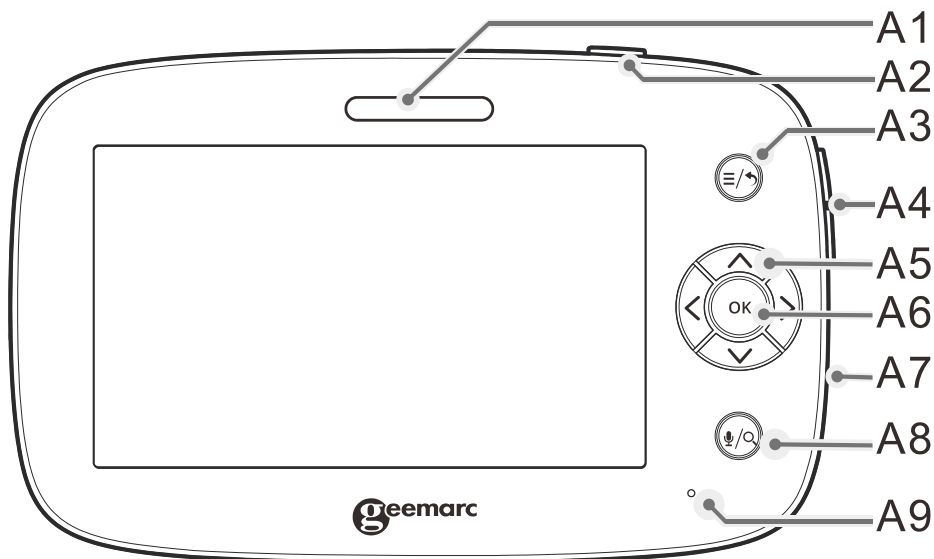


A1. Flits / Indicatoren
 A2. Aan / uit - knop
 A3. Menu / Terugknop
 A4. Volume +/-
 A5. Navigatiesleutel

A6. OK-knop
 A7. Spreker
 A8. Talk / Zoom-knop
 A9. Microfoon

Babyfoon – Basisbediening van de toetsen

	Aan/uit-knop	In-/uitschakelen - 3 seconden ingedrukt houden Scherm slaapstand/activeren - Eenmaal indrukken
	Menuknop	Indrukken om verschillende menuopties te openen
	Terugknop	Indrukken om terug te gaan naar de vorige map
	Navigatiesleutel	Indrukken om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te gaan om een optioneel item op het scherm te selecteren
	OK-knop	Indrukken om de selectie te bevestigen of te accepteren
	Talk-knop	Ingedrukt houden om te spreken
	Zoom-knop	Indrukken om digitaal in te zoomen
	+/- knop	Indrukken om het volumeniveau aan te passen

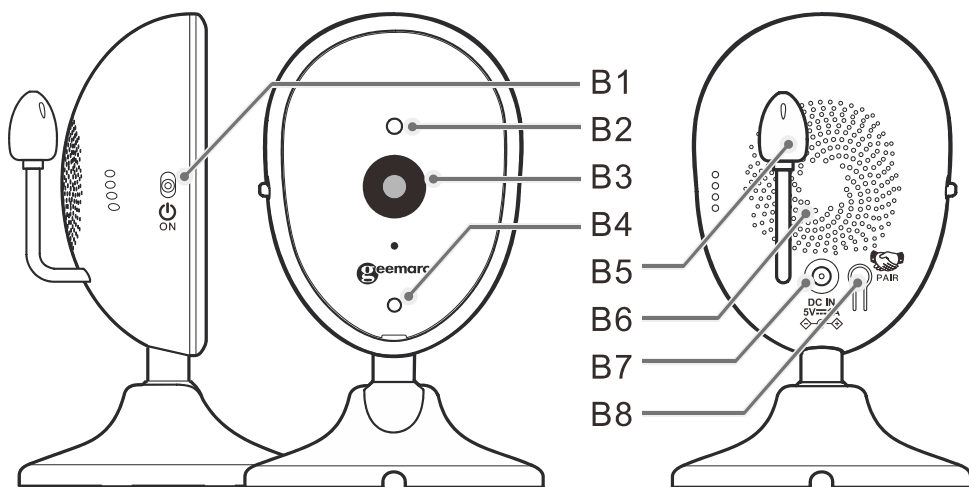

B1. Aan / uit - knop

B2. Lichtsensor

B3. Lens

B4. Indicator

B5. Temperatuursensor

B6. Luidspreker

B7. DC - ingang

B8. Koppelingsknop

Camera – Basisbediening van de toetsen



Aan / uit - knop :

Schuif om in / uit te schakelen.



PAIR-knop :

Druk hierop om de babyfoon te koppelen.

Opmerking:


De meegeleverde camera is al gekoppeld. U hoeft deze niet opnieuw te registreren, tenzij de camera de verbinding met de babyfoon verliest. Zie paragraaf “5.1 Camera” voor meer informatie.

3. Uw videobabyfoon instellen

3.1 Stroomvoorziening van de camera

- Aansluiten van de stroomadapter voor de camera.

- Sluit de kleine stekker van de adapter aan op de camera en het andere uiteinde op het stopcontact.
- Gebruik alleen de meegeleverde adapter (5 V DC/1 A).

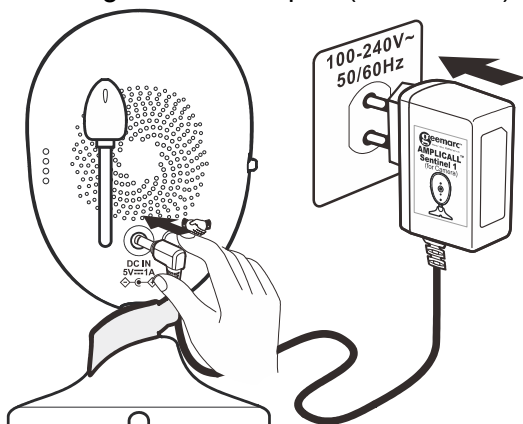


WAARSCHUWING:

Plaats de camera of kabels niet in het bedje of binnen handbereik van de baby (minstens 1 meter afstand).


3.2 Voeding van de babyfoon

- Sluit de voedingsadapter voor de babyfoon aan als de batterij bijna leeg is.

- Sluit de kleine stekker van de adapter aan op de babyfoon en het andere uiteinde op het stopcontact.
- Gebruik alleen de meegeleverde adapter (5V DC/ 1,5A).
- Houd de **POWER-knop**  op de babyfoon ingedrukt om deze in te schakelen.

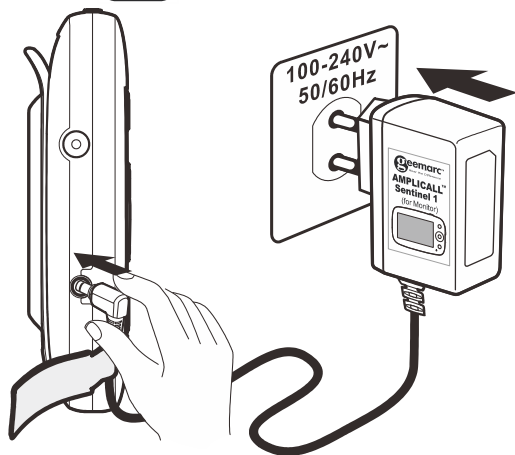

4. Pictogrammen op het bewakingsscherm



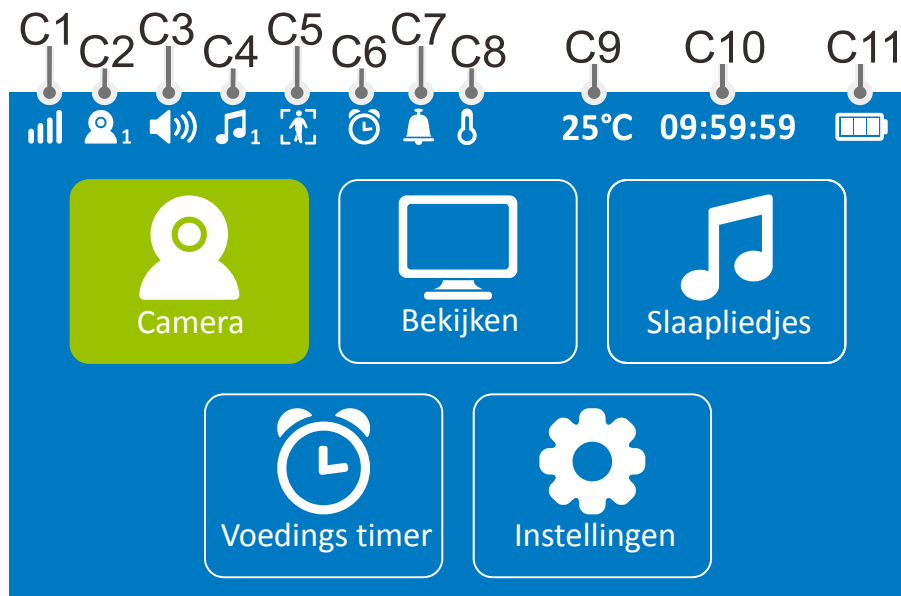


- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| C1. Signaalsterkte - indicator | C7. VOX - modus |
| C2. Camerannummer | C8. Temperatuuralarm |
| C3. Spraak- / dempenmodus | C9. Temperatuur babykamer |
| C4. Slaapliedjes | C10. Tijd |
| C5. Bewegingsdetectie | C11. Batterij - indicator |
| C6. Voedingstimer | |

5. Menufunctie (Babyfoon)


5.1 Camera

- De gebruiker kan maximaal 4 camera's toevoegen.
- Selecteer “**Camera**” → Selecteer “**Camera toevoegen**” → Druk op “**OK**”
→ Druk op de **koppelingsknop** op de camera.

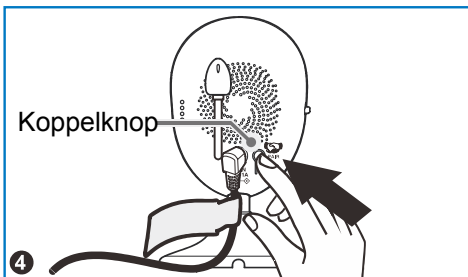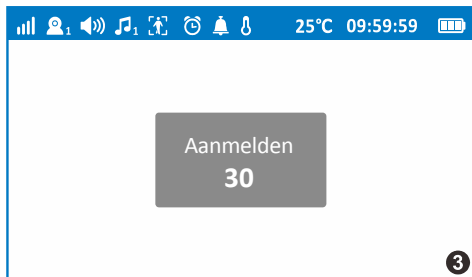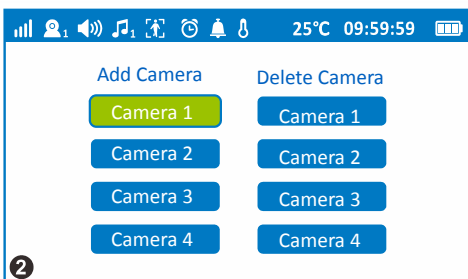


5.2 Bekijken

De gebruiker kan de weergave van verschillende camera's wijzigen (indien verschillende camera's zijn toegevoegd).

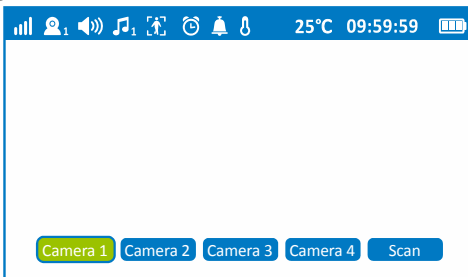


5.3 Slaapliedjes

De gebruiker kan een slaapliedje kiezen uit de lijst met slaapliedjes. Zodra u een slaapliedje hebt gekozen, wordt dit automatisch één keer afgespeeld. Als u 'Alle' kiest, worden alle slaapliedjes automatisch herhaald. Druk op de knop OK om uw keuze te bevestigen.

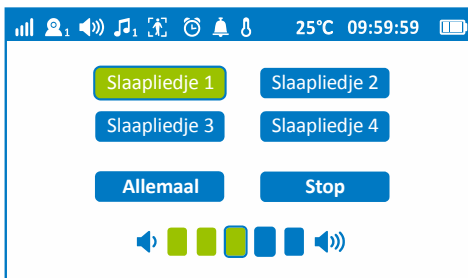

5.4 Voedingstimer

De gebruiker kan het tijdstip kiezen waarop hij herinnerd wil worden aan het voeren van kinderen. Na selectie verschijnt er een aftelbalk in de videoweergave-interface. Wanneer de vooraf ingestelde tijd is verstreken, geeft het scherm gedurende 5 seconden een alarm. Druk op de OK-knop om uw selectie te bevestigen.


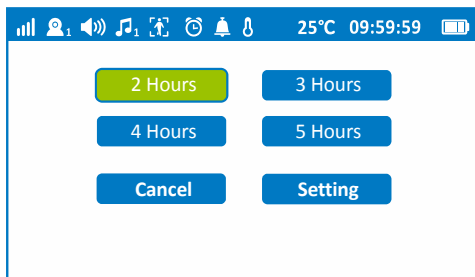


5.5 Instellingen




5.5.1 Taalinstelling

Voeg 5 talen toe (**Engels, Spaans, Frans, Duits, Nederlands**). Druk op de knop **OK** om uw selectie te bevestigen.

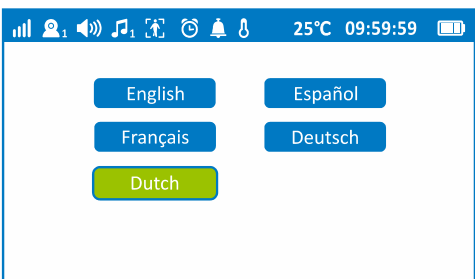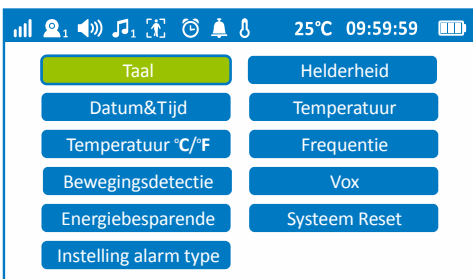

5.5.2 Helderheidsinstelling


Selecteer het helderheidsniveau (1~5 niveaus) met de pijl naar rechts of naar links. Druk op de OK-knop om uw selectie te bevestigen.

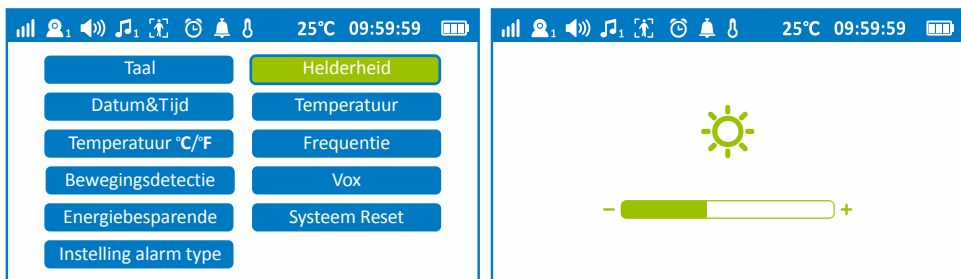

5.5.3 Datum en tijd


Stel de datum (jaar / maand / dag) en tijd (uur / minuut / seconde) in.

Druk op de pijl omhoog of omlaag om de datum in te stellen en gebruik de pijl naar rechts of naar links om door de instellingen te bladeren. Druk op de **OK**-knop om uw instellingen te bevestigen.

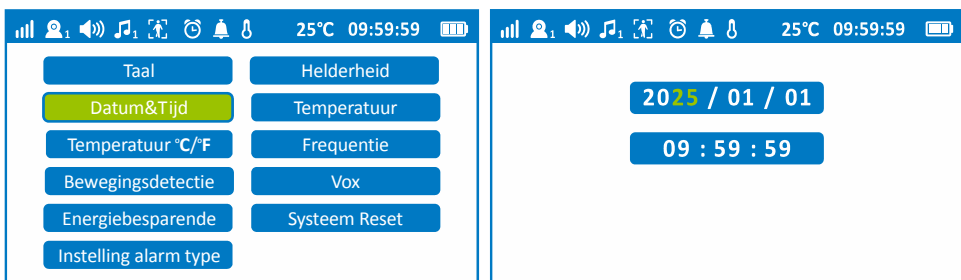


5.5.4 Temperatuuralarm

De babycamera detecteert de temperatuur in de babykamer. De gebruiker kan de temperatuurlimiet instellen. Bij overschrijding of onderschrijding van de limiet gaat er gedurende 5 seconden een alarm af. Druk op de pijl omhoog of omlaag om de temperatuur in te stellen en gebruik de pijl naar rechts of naar links om door de instellingen te bladeren. Selecteer **AAN** en druk op de **OK**-knop om de functie te activeren.

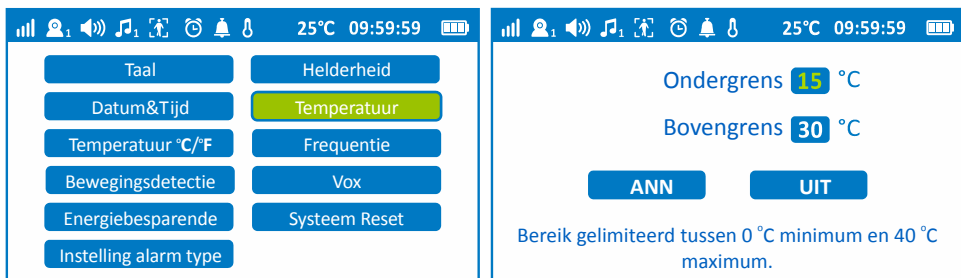


5.5.5 Temp. °C / °F

Selecteer de temperatuurweergave in Celsius / Fahrenheit (°C / °F). Druk op de OK-knop om uw instelling te bevestigen.

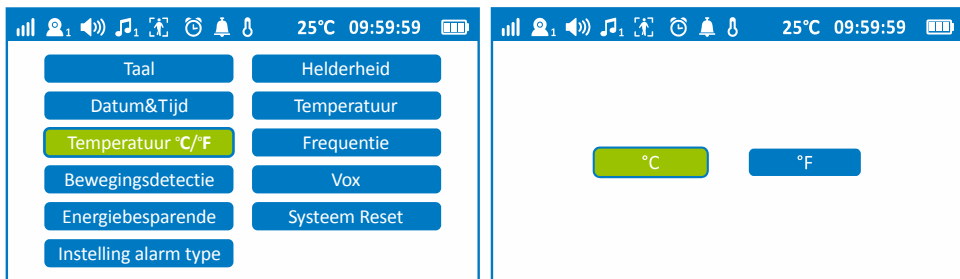


5.5.6 Frequentie

De gebruiker kan de draadloze frequentie schakelen tussen 60 Hz en 50 Hz. 60 Hz is vloeiender dan 50 Hz, maar verbruikt meer batterijvermogen. Druk op de **OK**-knop om uw instelling te bevestigen.

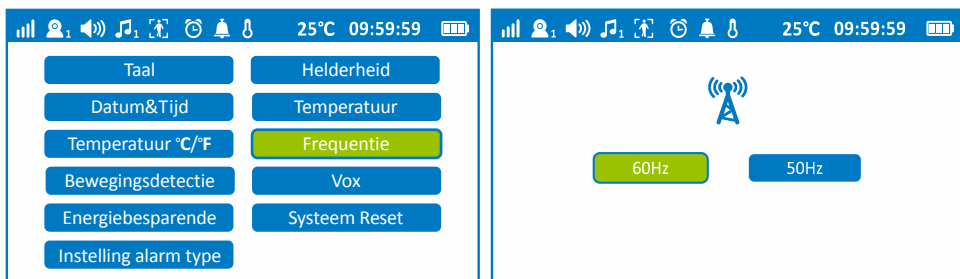


5.5.7 Bewegingsdetectie

Door deze functie op **AAN** te zetten, hoort de gebruiker een alarm zodra er beweging wordt gedetecteerd. Druk op de **OK**-knop om uw instelling te bevestigen.

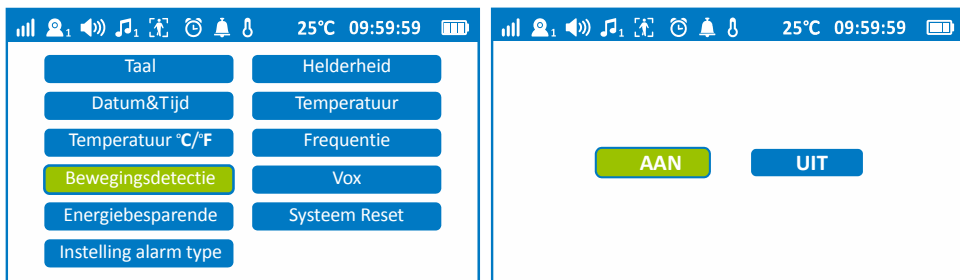

5.5.8 Geluidsgevoeligheidsniveau (VOX)


Selecteer het gevoeligheidsniveau (**Hoog**: zeer hoge gevoeligheid, **Midden**: Standaard, **Laag**: zeer lage gevoeligheid) met de pijltjestoetsen Omhoog of Omlaag. De gebruiker hoort een alarm wanneer er een abnormaal geluid of lawaai wordt gedetecteerd. Druk op de **OK**-knop om uw selectie te bevestigen.

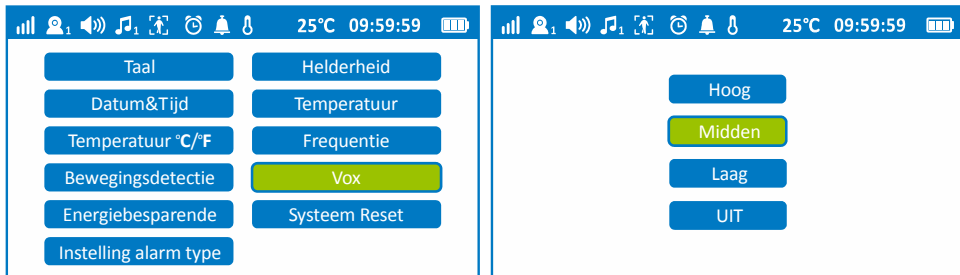

5.5.9 Energiebesparende


Selecteer AAN of UIT met de pijltjestoetsen naar rechts of naar links. Druk op de **OK**-knop om te bevestigen.

Als **AAN** is geselecteerd, blijft het display aan. Als **UIT** is geselecteerd (het batterijpictogram wordt oranje ) , gaat het display na 40 seconden in de stand-bymodus automatisch uit. Druk op een willekeurige toets om het display weer in te schakelen.

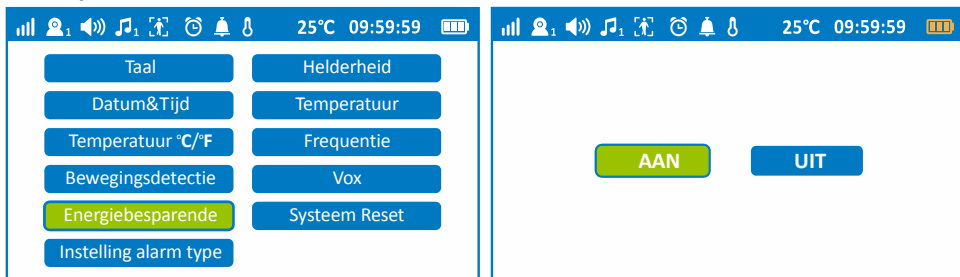

5.5.10 Systeem reset

Selecteer **AAN / UIT** om de fabrieksinstellingen te herstellen met de pijltoetsen rechts of links. Druk op de knop **OK** om uw instelling te bevestigen.

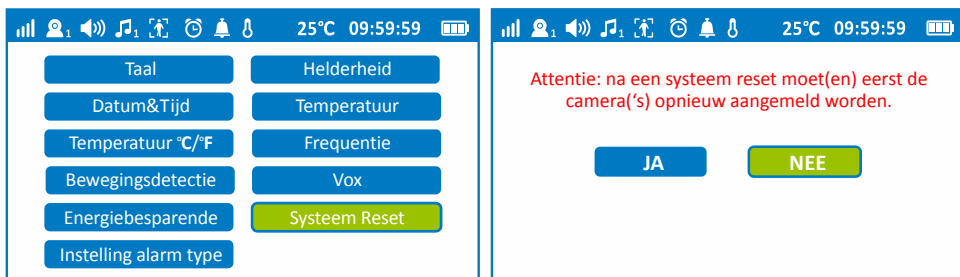


5.5.11 Instelling alarm type

Stel het **alarmgeluidsniveau** in (uit, 1 tot 5 niveaus) met behulp van de pijl naar rechts of naar links.

Druk op de pijl naar beneden om **Heldere Flits** te selecteren.

Selecteer **AAN / UIT** met de pijltjestoetsen naar rechts of naar links.

Druk op de **OK**-knop om uw selectie te bevestigen.

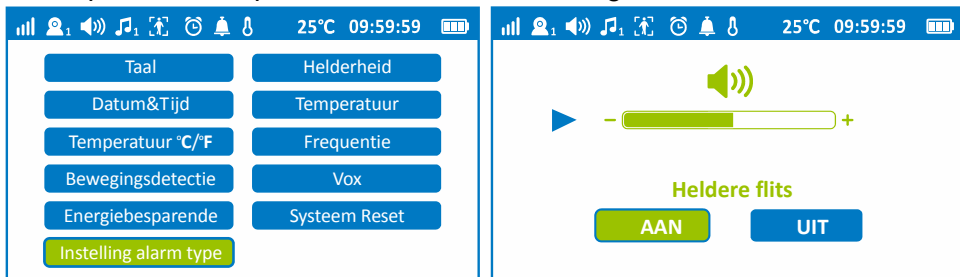

Opmerking : Deze twee instellingen worden toegepast op 3 alarmdetectiemodi: **temperatuur, bewegingsdetectie en geluidsgevoeligheid**.

6. Technische kenmerken

Kenmerken	Parameters
Tweewegluidspreker	Monitor: Luidspreker: 1 W; Microfoon: -42 ± 3 dB Camera: Luidspreker: 1 W; Microfoon: -34 ± 3 dB
Temperatuurdetectie	0 °C - 40 °C
H/L temperatuuralarm	Lage temperatuur : 15 °C Hoge temperatuur : 30 °C
Frequentie aanpassen	50Hz / 60Hz
Geluidsgevoeligheidsniveau	Hoog / Midden / Laag
Bewegingsdetectie	ON / OFF
Voedingstimer	2 uur, 3 uur, 4 uur, 5 uur instelling
Slaapliedjes	4 slaapliedjes
Helderheid	5 niveaus
Lichtbalk	5 niveaus
Volume	5 niveaus
Meertalig	5 talen (Engels, Spaans, Frans, Duits, Nederlands)
Omgekeerd beeld	180° draaien
LCD altijd aan	Het LCD-scherm gaat automatisch in slaapstand na 40 seconden inactief te zijn geweest wanneer deze is ingesteld op UIT.
Trilling	Spanning: 5V
Zoom	x 2
RF-vermogen	< 250mW

7. GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc AMPLICALL™ Sentinel 1 (AC Sen1) aanschaft, geldt de Geemarc-garantie voor een periode van twee jaar. Gedurende deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (naar ons goeddunken) gratis. Als u een probleem ondervindt, neem dan contact op met onze hulplijn of bezoek onze website op **www.geemarc.com**. De garantie dekt geen ongelukken, nalatigheid of breuken aan onderdelen. Het product mag niet worden gemanipuleerd of uit elkaar worden gehaald door iemand die geen geautoriseerde vertegenwoordiger van Geemarc is. De garantie van Geemarc beperkt op geen enkele wijze uw wettelijke rechten.

BELANGRIJK: UW AANKOOPBON MAAKT DEEL UIT VAN UW GARANTIE EN MOET WORDEN BEWAARD EN GETOOND IN GEVAL VAN EEN GARANTIEAANVRAAG.

8. DECLARATIONS:

UE-richtlijnen

Geemarc Telecom SA verklaart hierbij dat deze AMPLICALL™ Sentinel 1 (AC Sen1) voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de Richtlijn 2014 / 53 / EU betreffende radioapparatuur.

*De UE-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op **www.geemarc.com***

Recyclingrichtlijnen

De WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment) is ingesteld om ervoor te zorgen dat producten aan het einde van hun levensduur op de best mogelijke manier worden gerecycled.

Wanneer dit product aan het einde van zijn levensduur is, mag u het niet in de huisvuilbak gooien. Maak gebruik van een van de volgende verwijderingsopties:

- Verwijder de batterijen en deponeer ze in een daarvoor bestemde WEEE-container. Deponeer het product in een daarvoor bestemde WEEE-container.
- Of lever het oude product in bij de winkel. Als u een nieuw product koopt, moeten zij het oude product accepteren. Door deze instructies op te volgen, draagt u bij aan de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu.



Voor productondersteuning en hulp kunt u terecht op onze website
www.geemarc.com

E-mail : **kundendienst@geemarc.com**

telefoon **+49(0)30 209 95 789**

de lijnen zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur.

Geemarc Telecom

Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, Frankrijk

Gemaakt voor Geemarc Telecom S.A. in China





UGACSen1_NL_v1.5