

geemarc™ AMPLICALL™ 100

Hear the Difference

Multi-alarmontvanger met deurbel

Nederlands P2



!!! Raadpleeg onze website: www.geemarc.com voor een actuele gebruikershandleiding, aangezien er mogelijk belangrijke updates en wijzigingen zijn waarvan u op de hoogte moet zijn !!!


INHOUD VAN DE VERPAKKING

Het pakket bevat de volgende items:

1 gebruikershandleiding
1 AMPLICALLTM100 (AC100) basisstation
1 AMPLICALLTM101 (AC101)
afstandsbediening

1 wisselstroomadapter
5 schroeven en 5 bevestigingsgaten
1 muurbeugel en 1 lanyardbeugel.

BESCHRIJVING

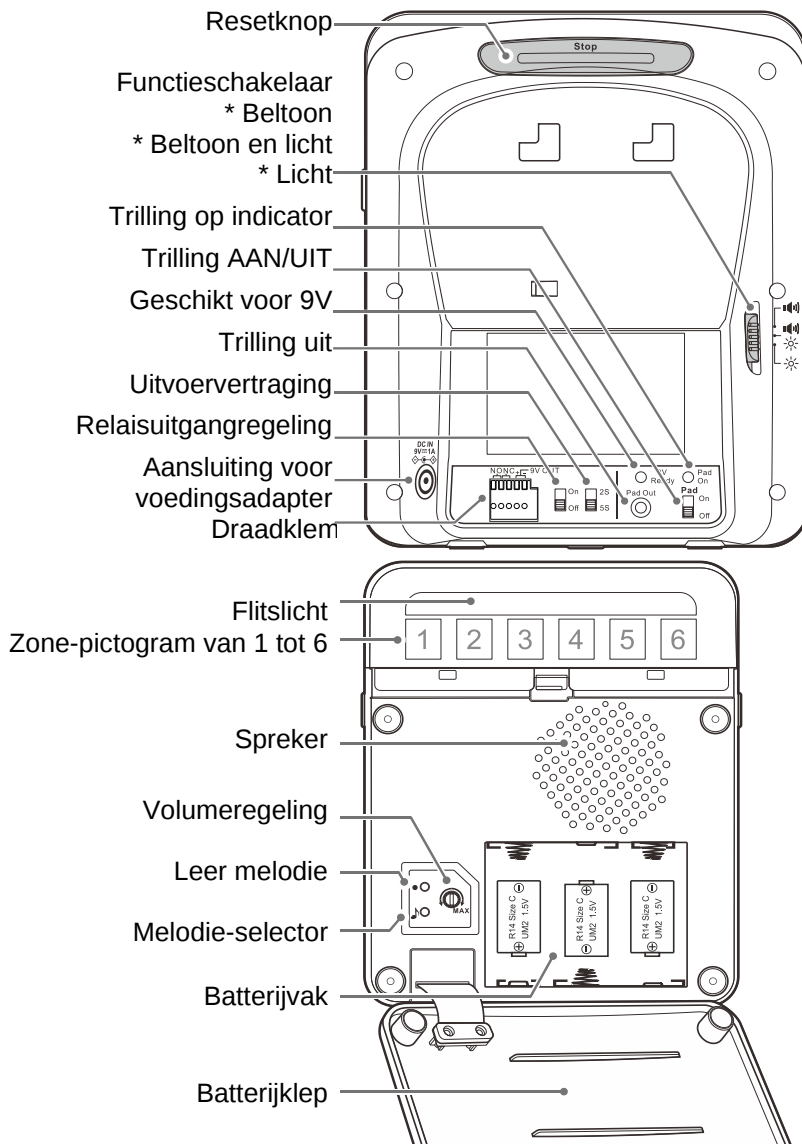


INSTALLATIE

Batterij in de basis plaatsen (nodig in geval van stroomuitval)

1. Open het batterijklepje door eraan te trekken.
2. Plaats drie 1,5 V LR14-alkalinebatterijen (niet meegeleverd) (C) in het batterijvak en let daarbij op de polariteit (+/-).
3. Sluit het batterijklepje.
4. Steek de stroomkabel in de aansluiting voor de stroomadapter aan de zijkant van de AMPLICALL100 (A). Steek de adapter in het stopcontact (B).

9V-gereedheidsindicator: deze indicator gaat branden wanneer de 9V-adapter correct is aangesloten.

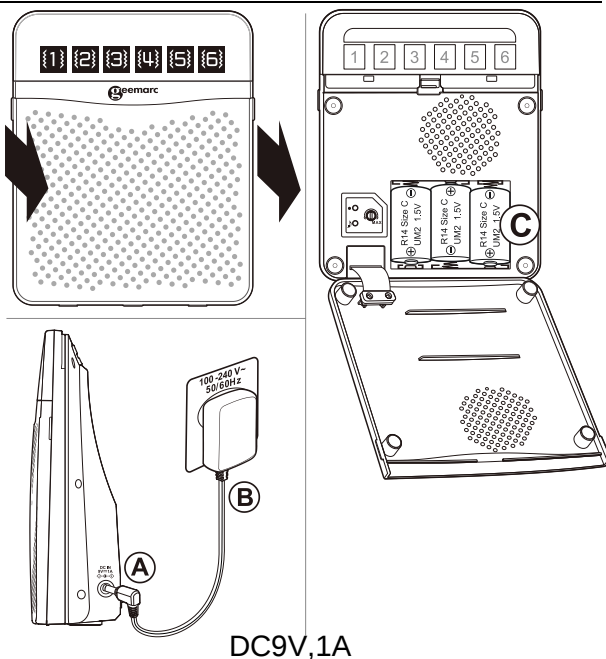

INDICATOR VOOR LAGE BATTERIJSPANNING OP DE AC100


Als het LED-lampje van een zone-icoontje knippert, betekent dit dat de batterij van het betreffende apparaat (AC101, AC110 of AC140) bijna leeg is. U moet de batterij zo snel mogelijk vervangen.

Als het lampje van uw AMPLICALL100 elke 15 seconden knippert, betekent dit dat de batterij van de AMPLICALL100 te laag is of dat er geen batterijen zijn geplaatst. Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening en plaats nieuwe batterijen.

AMPLICALL™101

Bevestig de belknop aan de muurbeugel of de koordbeugel

1. Plaats de door u gekozen montagebeugel (Afb. 1 voor de muurbeugel of Afb. 2 voor de koordbeugel) in een hoek van 90 graden.
2. Draai de montagebeugel totdat het onderdeel vergrendelt.

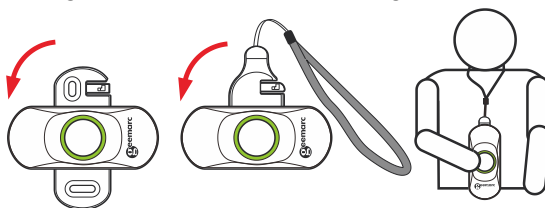



Batterij in de afstandsbediening plaatsen

1. Ontgrendel de vergrendelingshendel met uw vinger (Afb. 1).
2. Draai de montagebeugel 90 graden (Afb. 2).
3. Verwijder de montagebeugel van het apparaat (Afb. 3).
4. Draai het batterijklepje met een muntstuk (Afb. 4).
5. Plaats een CR2032-batterij in het batterijcompartiment met de +pool naar boven. (Afb. 5).
6. Sluit het batterijklepje met een muntstuk. (Afb. 6).
7. Plaats de montagebeugel terug in de hoek van 90 graden. (Afb. 7).
8. Draai de montagebeugel totdat het onderdeel vergrendelt.



WANDBEVESTIGING



U kunt uw AMPLICALLTM100 aan de muur bevestigen.
Volg hiervoor de onderstaande aanbevelingen.

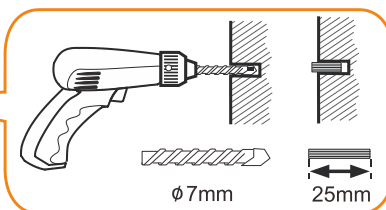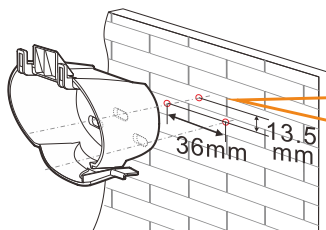

1. Plaats de muursteun tegen de muur en markeer de drie gaten van de muursteun op de muur.

2. Boor twee gaten horizontaal, 36 mm uit elkaar, en boor het derde gat tussen de 2 gaten op 13,5 mm boven de virtuele lijn tussen de eerste twee gaten.


3. Plaats drie muurpluggen in de drie gaten.

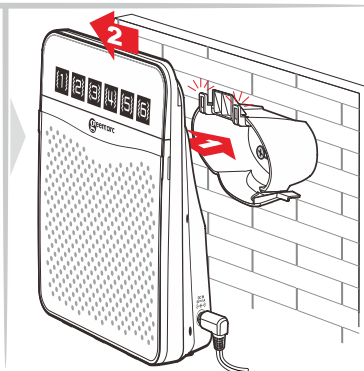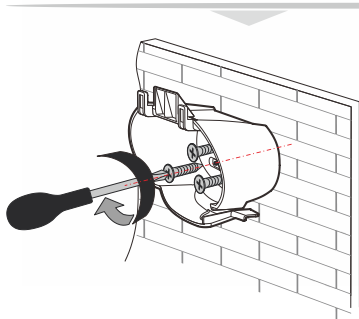

4. Draai drie schroeven in de pluggen, hang de basis aan de steun en schuif deze naar links om hem te vergrendelen.

Een nieuw apparaat AMPLICALLTM101/110 of 140 koppelen met AMPLICALLTM100

Opmerking: Wanneer u uw AMPLICALLTM100 met de AMPLICALLTM101-deurbel ontvangt, zijn de apparaten al gekoppeld. U hoeft dus de volgende stappen niet te volgen.

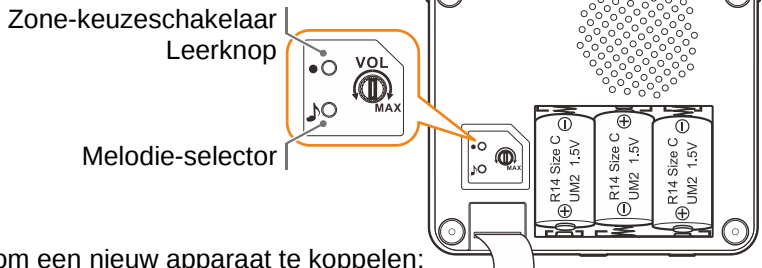

Volg deze stappen om een nieuw apparaat te koppelen:

Stap 1: Ga naar de koppelingsmodus voor de AC100. Houd de **LEARNING**-knop (●) 3 seconden ingedrukt. Het LED-lampje in zone-icoontje #1 gaat knipperen.

Stap 2: Druk nogmaals op de **LEARNING**-knop (●) om naar het zone-icoontje te gaan dat u wilt koppelen.

Druk op de melodiekeuzeknop (🎵) om door de melodieën te bladeren. Als u een melodie hoort die u bevalt, druk dan tijdens de melodie op geen enkele knop.

Stap 3: Nadat u het zone-icoontje en de melodie hebt geselecteerd, drukt u één keer op de knop van het apparaat (AC101, AC110 of AC140) om te koppelen. Als dit lukt, geeft de AC100 twee korte tonen.

Druk op de **LEARNING**-knop (●) om de koppelingsmodus te verlaten; het systeem is nu klaar voor gebruik.

Om het geluidssignaal te stoppen terwijl de AMPLICALLTM100 een waarschuwing geeft, drukt u op de resetknop aan de bovenkant achterop.


Eén apparaat verwijderen uit het geheugen van de AMPLICALLTM100

- Houd eerst de knop 'Learning' 3 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te openen.
- Druk op de knop 'Learning' om de zone te selecteren die u wilt verwijderen.
- Houd de knoppen 'Learning' en 'Melody' 3 seconden ingedrukt.
- De AMPLICALLTM100 geeft een geluidssignaal om aan te geven dat het apparaat voor deze zone is verwijderd.
- Druk op de resetknop aan de achterkant om af te sluiten.

De melodie/toon van het gewenste zone-icoontje opladen


- Houd eerst de 'Learning'-knop 3 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te openen.
- Druk op de 'Learning'-knop om het zone-icoontje te selecteren dat u wilt wijzigen.
- Druk op de knop 'Melody' om de nieuwe melodie/toon te selecteren en druk vervolgens op de leerknop. U hoort een toon die aangeeft dat de wijziging is gelukt.
- Druk op de resetknop aan de achterkant om af te sluiten.

Vergeet niet om na het koppelen van uw apparaat (AC101, AC110 of AC140) de zone-pictogramafbeelding te wijzigen die bij het apparaat (AC101, AC110 of AC140) wordt geleverd.

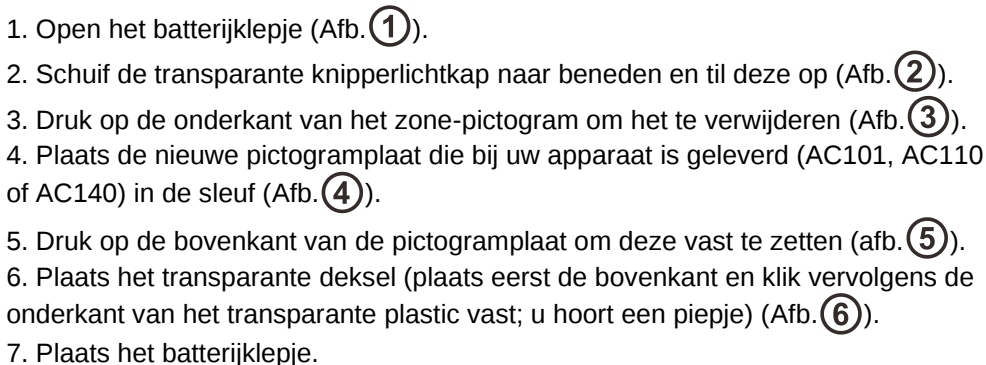

Schudden (optioneel)

Opmerking: Als u de schudfunctie wilt gebruiken, wordt aanbevolen om naast de batterijen ook een voedingsadapter (9V 1A, AC/DC) aan te sluiten. Deze schudfunctie trilt telkens wanneer de basis een waarschuwing ontvangt.

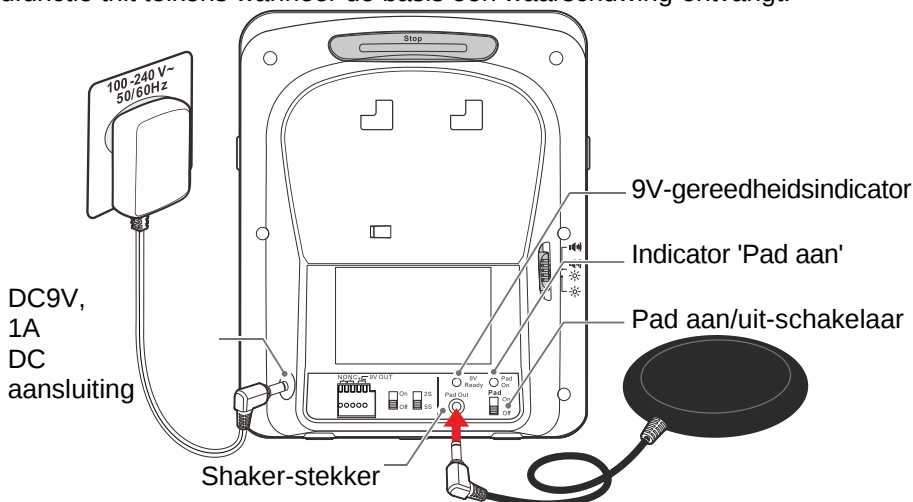

Pad aan/uit: Schuif de PAD-schakelaar om de trilfunctie in of uit te schakelen.

Pad aan-indicator: Als de schakelaar voor de shaker in de stand 'aan' staat, gaat het LED-lampje branden om aan te geven dat de trilfunctie is geactiveerd.

Pad OUT: Sluit de Shaker aan op deze aansluiting.


Opmerking:

- De Shaker kan worden gebruikt voor alle zone-pictogrammen.
- De Shaker kan afzonderlijk worden aangeschaft (CLA2).

BEDRADING EN INSTELLING van de deuropeningsfunctie

U hebt de mogelijkheid om uw deur automatisch te openen als de sensor van zone-icoon 5 of 6 een triggersignaal ontvangt. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw poorttrigger om uw deuropeningsapparaat aan te sluiten op de AMPLICALLTM100.

Druk met een kleine schroevendraaier op de hendel en steek de draad in het gat. Laat vervolgens de hendel los om de draad vast te houden.

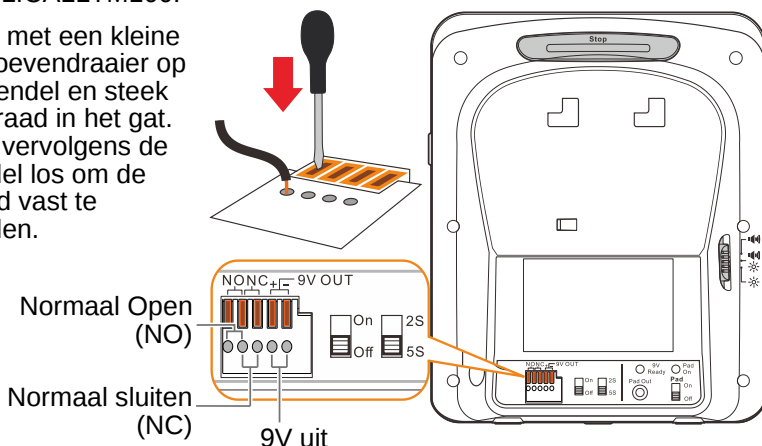

Relaisuitgangsschakelaar

Schuif de schakelaar aan/uit-knop naar de stand 'Aan': het relais wordt geactiveerd wanneer zone-icoon 5 of 6 een triggersignaal ontvangt.

Schuif de schakelaar naar de stand 'Uit': het relais wordt niet geactiveerd wanneer zone-icoon 5 of 6 een triggersignaal ontvangt.

Duur van de relaisuitgangscontrole

Schuif de schakelaar naar de stand '2': het relais wordt 2 seconden geactiveerd wanneer zone-icoon 5 of 6 een triggersignaal ontvangt.

Schuif de schakelaar naar de stand '5': het relais wordt 5 seconden geactiveerd wanneer zone-icoon 5 of 6 een triggersignaal ontvangt.

GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc AMPLICALLTM100 aanschaft, geldt de Geemarc-garantie voor een periode van twee jaar. Gedurende deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (naar ons oordeel) kosteloos. Mocht u een probleem ondervinden, neem dan contact op met onze helpdesk of bezoek onze website op www.geemarc.com. De garantie dekt geen ongelukken, nalatigheid of breuken aan onderdelen. Het product mag niet worden gemanipuleerd of uit elkaar worden gehaald door iemand die geen geautoriseerde vertegenwoordiger van Geemarc is. De garantie van Geemarc beperkt op geen enkele wijze uw wettelijke rechten. **BELANGRIJK: UW AANKOOPBON MAAKT DEEL UIT VAN UW GARANTIE EN MOET WORDEN BEWAARD EN GETOOND IN GEVAL VAN EEN GARANTIEAANVRAAG.**

DECLARATIONS:

UKCA-richtlijnen

Geemarc Telecom SA verklaart hierbij dat deze AMPLICALL100 voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de Richtlijn 2014/53/EU betreffende radioapparatuur.

De UKCA-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op www.geemarc.com
RF vermogen: < 250mW

Recyclingrichtlijnen

De WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment) is ingesteld om ervoor te zorgen dat producten aan het einde van hun levensduur op de best mogelijke manier worden gerecycled.

Wanneer dit product aan het einde van zijn levensduur is, mag u het niet in de huisvuilbak gooien. Maak gebruik van een van de volgende verwijderingsopties:

- Verwijder de batterijen en deponeer deze in een daarvoor bestemde WEEE-container. Deponeer het product in een daarvoor bestemde WEEE-container.
- Of lever het oude product in bij de winkel. Als u een nieuw product koopt, moeten zij het oude product accepteren.

Door deze instructies op te volgen, draagt u bij aan de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu.

Voor productondersteuning en hulp kunt u terecht op onze website www.geemarc.com

E-mail: kundendienst@geemarc.com telefoon +49(0)30 209 95 789

de lijnen zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur.

2 Rue Galilée, Parc de l'Etoile, 59760 Grande-Synthe, Frankrijk

Dit product is gemaakt in China Aan Geemarc Telecom



QUGAMPLICALL100_NI_A5_V1.1