

Draadloze telefoonmelder



Nederlands P2


Raadpleeg onze website: www.geemarc.com voor een actuele gebruikershandleiding, aangezien er mogelijk belangrijke updates en wijzigingen zijn waarvan u op de hoogte moet zijn.

Inhoud van de doos

De AC110 (AMPLICALL™110) doos bevat de volgende items:

1 gebruikershandleiding	2 schroeven en 2 pluggen
1 AC110 (AMPLICALL™110)	2 x AA, 1,5 V alkalinebatterijen
1 RJ11/RJ11-kabel	1 boorsjabloon


BESCHRIJVING

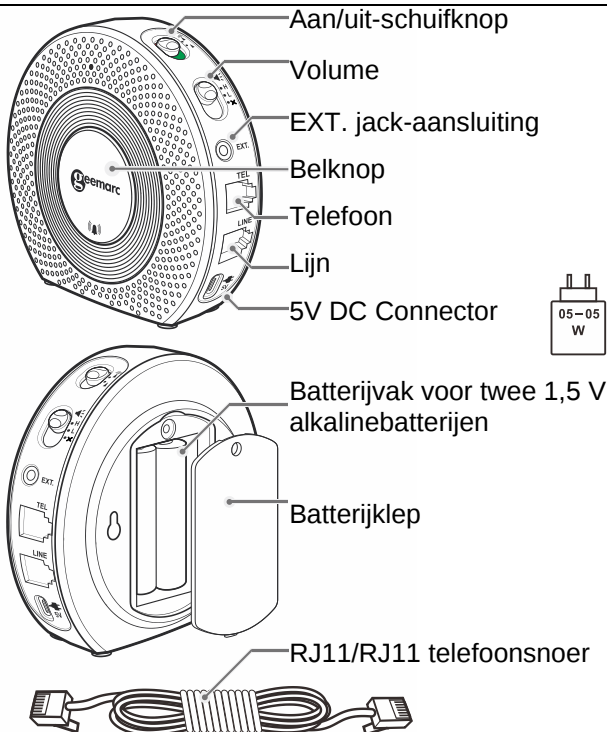

INSTALLATIE VAN BATTERIJEN

Uw AMPLICALL™110 werkt op twee alkaline AA-batterijen van 1,5V (niet meegeleverd).

Volg de onderstaande procedure om de batterijen te plaatsen.

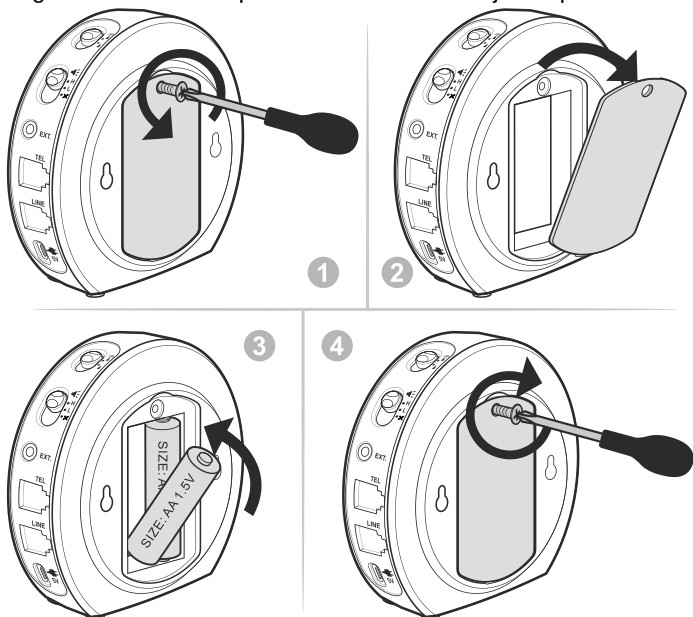


1. Draai de schroef op het batterijklepje los.
2. Open het batterijklepje.
3. Plaats de 2 AA-batterijen in het compartiment.
4. Sluit het batterijklepje en zet het vast met de schroef.

Lage batterijspanning

Als de batterij van uw apparaat bijna leeg is of als er geen batterij is geplaatst, stuurt uw AMPLICALL™110 een signaal naar de ontvanger, waardoor het zone-pictogram gaat branden.

Uw AC110 aansluiten op het lichtnet (optioneel)

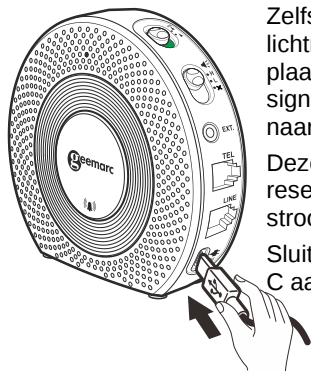

Zelfs als uw AMPLICALL™110 op het lichtnet is aangesloten, moet u batterijen plaatsen, anders stuurt uw apparaat een signaal voor een lage batterijspanning naar uw ontvanger.

Deze batterijen werken echter alleen als reservebatterijen in geval van een stroomstoring.

Sluit de USB-voedingskabel van het type C aan op de DC-ingangsaansluiting.



Uw AC110 koppelen aan de AMPLICALL-ontvangers

De AC110 kan op zichzelf werken, hij versterkt de beltoon en knippert wanneer u een oproep ontvangt. U kunt uw AMPLICALL™110 ook registreren bij de AMPLICALL-ontvangers. Als ze gekoppeld zijn, ontvangen de ontvangers de informatie van de AMPLICALL™110 en gaan ze ook over en knippen ze.


Ga naar de koppelingsmodus voor de AMPLICALL-ontvangers.

1. Houd de LEARNING-knop (●) 3 seconden ingedrukt. Het LED-lampje in zone-icoontje #1 gaat knipperen.
2. Druk nogmaals op de LEARNING-knop (●) om naar het zone-icoontje te gaan waarmee u de AC110 wilt koppelen.

Druk op de knop voor melodiekeuze (🎵) om door de melodieën te bladeren. Als u een melodie hoort die u bevalt, druk dan tijdens de melodie op geen enkele knop.

3. Druk eenmaal op de belknop van de AC110 om te koppelen.
4. Als dit gelukt is, geven de AMPLICALL-ontvangers twee korte tonen.


Uw AC110 aansluiten op een telefoonaansluiting

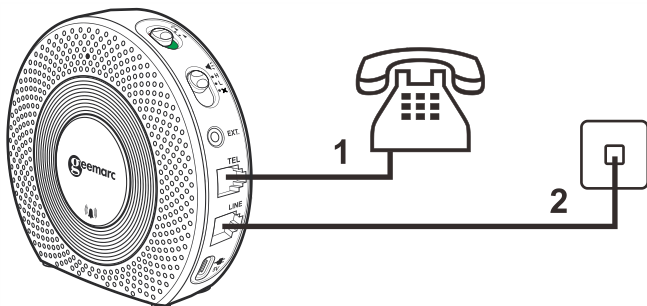

1. Sluit het ene uiteinde van de meegeleverde RJ11-kabel aan op uw telefoonaansluiting en het andere uiteinde op de "Tel"-ingang van uw AC110.
2. Sluit het ene uiteinde van uw originele telefoonkabel aan op de "Line"-ingang van uw AC110 en het andere uiteinde op uw wandcontactdoos.

Wandmontage


De AC110 kan op een vlakke ondergrond worden geplaatst of aan de muur worden bevestigd.

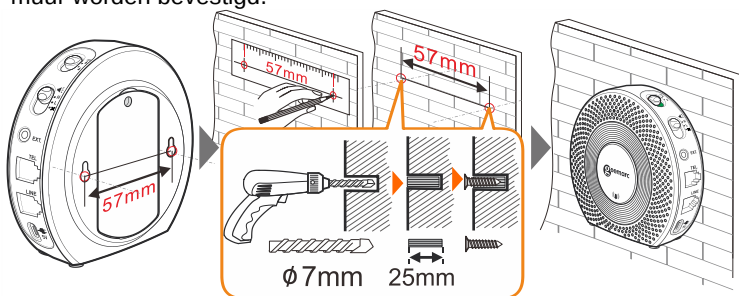

Markeer twee gaten op de muur met een potlood en een boorsjabloon.

Bevestig het apparaat aan de muur met de meegeleverde pluggen en schroeven.


De instellingen van uw AC110 opladen

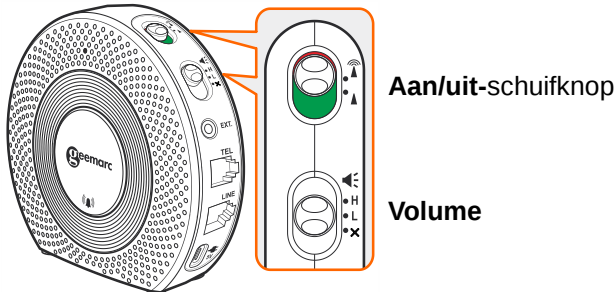

Aan () / **Uit** () **schuifknop**: Schuif naar de **Uit** () stand wanneer er geen ontvanger wordt gebruikt.

Volume (): U kunt het volume van de beltoon aanpassen door deze knop te verschuiven. U kunt schakelen tussen de standen **H** (hoog), **L** (laag) en **X** (stil).

Een externe sensor aansluiten op uw AC110

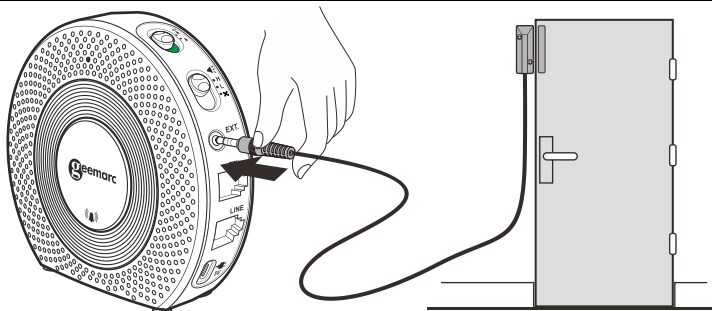

De AC110 is compatibel met externe apparaten zoals valmatten en andere soorten sensoren die via de 'EXT'-aansluiting op de AC110 kunnen worden aangesloten. Zodra het apparaat is aangesloten, stuurt het bij elke activering een signaal naar de ontvanger.

GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc AMPLICALL™110 aanschaft, geldt de Geemarc-garantie voor een periode van twee jaar.

Gedurende deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (naar ons oordeel) kosteloos. Mocht u een probleem ondervinden, neem dan contact op met onze helpdesk of bezoek onze website op www.geemarc.com. De garantie dekt geen ongelukken, nalatigheid of breuken aan onderdelen. Het product mag niet worden gemanipuleerd of uit elkaar worden gehaald door iemand die geen geautoriseerde vertegenwoordiger van Geemarc is. De garantie van Geemarc beperkt op geen enkele wijze uw wettelijke rechten.

BELANGRIJK: UW AANKOOPBON MAAKT DEEL UIT VAN UW GARANTIE EN MOET WORDEN BEWAARD EN GETOOND IN GEVAL VAN EEN GARANTIEAANSPRAAK.

VERKLARINGEN:

CE-richtlijnen

Geemarc Telecom SA verklaart hierbij dat deze AMPLICALL™110 voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de Richtlijn radioapparatuur 2014/53/EU.

De CE-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op www.geemarc.com.

RF-vermogen: < 250mW

Recyclingrichtlijnen

De WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment) is ingesteld om ervoor te zorgen dat producten aan het einde van hun levensduur op de best mogelijke manier worden gerecycled.

Wanneer dit product aan het einde van zijn levensduur is, mag u het niet in de huisvuilbak gooien. Maak gebruik van een van de volgende verwijderingsopties:

- Verwijder de batterijen en deponeer deze in een daarvoor bestemde WEEE-container. Deponeer het product in een daarvoor bestemde WEEE-container.
- Of lever het oude product in bij de winkel. Als u een nieuw product koopt, moeten zij het oude product accepteren. Door deze instructies op te volgen, draagt u bij aan de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu.



Voor productondersteuning en hulp kunt u terecht op onze website
www.geemarc.com

E-mail: **kundendienst@geemarc.com**

telefoon **+49(0)30 209 95 789**

de lijnen zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot
16.00 uur.

Geemarc Telecom

Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59760 Grande-Synthe,
Frankrijk

Gemaakt voor Geemarc Telecom S.A. in China



UGAMPLICALL110_NI_v1.2



Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée,
59760 Grande-Synthe,
France

www.geemarc.com