

## Draagbare alarmontvanger



Nederlands

Raadpleeg onze website: **www.geemarc.com** voor een actuele gebruikershandleiding, aangezien er mogelijk belangrijke updates en wijzigingen zijn waarvan u op de hoogte moet zijn.

## Inhoud van de verpakking


---



De AMPLICALL™150-doos bevat de volgende items:

- 1 basisstation AC150 (AMPLICALL™150)
- 1 oplaadstation
- 1 oplaadbare batterij (vooraf geïnstalleerd)
- 1 AC/DC-voedingsadapter (5V DC/ 1A/ 1W)
- 1 Britse en 1 VDE-stekkeradapter
- 1 gebruikershandleiding
- 1 set (8 stuks) alarmpictogramstickers

## DESCRIPTION

---

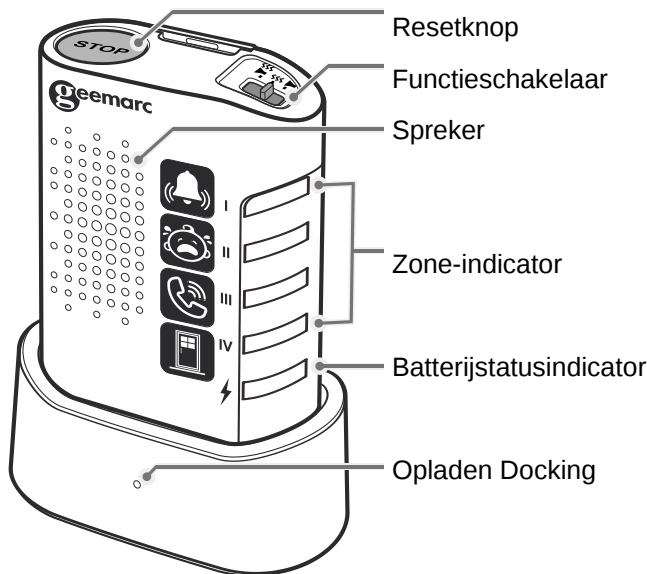


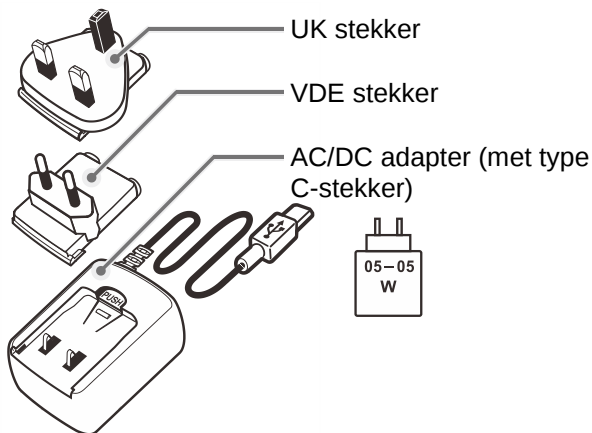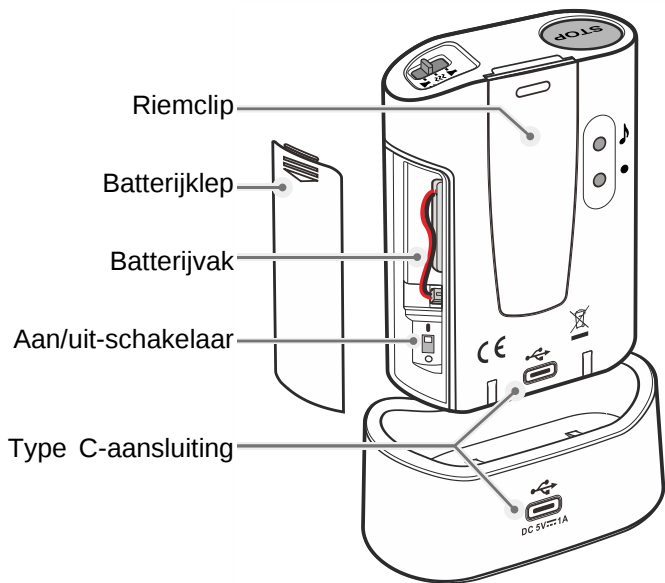

## AAN/UIT SCHAKELN

De ontvanger heeft een ingebouwde vervangbare lithium-polymeerbatterij. Wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt, moet u de aan/uit-schakelaar in het batterijklepje op **ON ( I )** zetten.

Wanneer u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, is het raadzaam om de schakelaar op **OFF ( O )** te zetten.

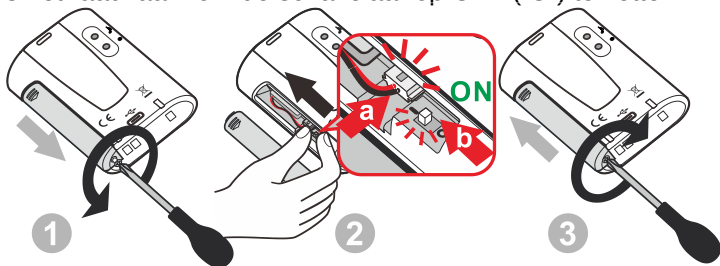


Draai de schroef los met een kleine kruiskopschroevendraaier.

Sluit de batterij aan en zet de schakelaar in de stand 'aan'.


Sluit het batterijklepje en draai de schroef vast met de schroevendraaier.

## BATTERIJ OPLADEN

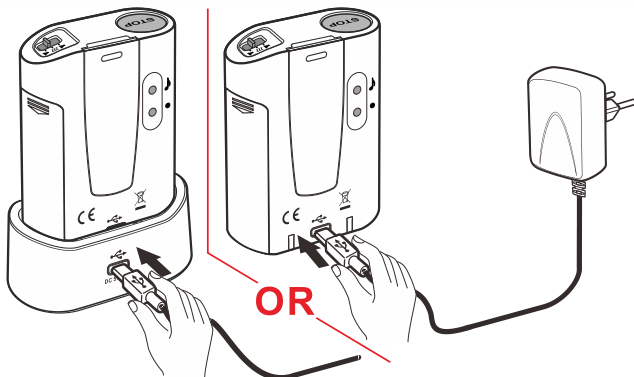

**Opladen met dockingstation** – Sluit de USB-stekker van type C aan op het dockingstation en plaats de AC150-ontvanger in het dockingstation.

**Opladen zonder dockingstation** – Sluit de USB-stekker van type C rechtstreeks aan op de AC150-ontvanger.

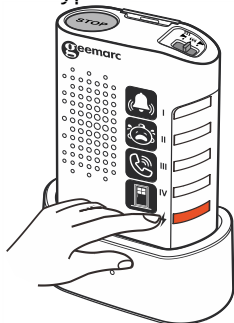

| Batterijstatusindicator       |             |                            |
|-------------------------------|-------------|----------------------------|
|                               | Oplaadmodus | Stand-by modus             |
| LED-lamp                      | Opladen     |                            |
| LED UIT                       | Volledig    | Normaal                    |
| LED knippert elke 10 seconden |             | Lokale batterij bijna leeg |

**Indicator voor lage batterijspanning** – Als een zone-LED-lampje elke 10 seconden knippert, geeft dit aan dat de batterij van deze zender bijna leeg is. U moet de batterij zo snel mogelijk opladen.

## KOPPELEN & ALARMMELODIE

Volg deze stappen om een nieuw apparaat te koppelen:


1. Ga naar de koppelingsmodus voor de AC150.

Houd de LEARNING-knop (●) 3 seconden ingedrukt. Het LED-lampje in zone #1 gaat knipperen.

2. Druk nogmaals op de LEARNING-knop (●) om naar de zone te gaan die u wilt koppelen.

Druk op de knop voor melodiekeuze (♪) om door de melodieën te bladeren. Als u een melodie **hoort** die u bevalt, druk dan tijdens de melodie op geen enkele knop.

3. Zodra de zone en melodie zijn geselecteerd, drukt u één keer op de knop van het apparaat (AC101, AC110, AC140)

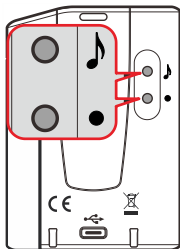

om te koppelen. Als dit lukt, geeft de AMPLICALL™150 twee korte tonen.

4. Druk op de **LEARNING**-knop (●) om de koppelingsmodus te verlaten; het systeem is nu klaar voor gebruik

## **. Verwijderen en verzenden van het AC150-geheugen**

---

- ✧ Houd eerst de knop (●) 3 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te openen.
- ✧ Druk op de knop (●) om naar de zone te gaan die u wilt verwijderen.
- ✧ Houd de knoppen (●) en (♪) tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt.

De ontvanger geeft een geluidssignaal om aan te geven dat de zender van deze zone is verwijderd.

## **DE MELODIE IN DE GEWENSTE ZONE WIJZIGEN**

---

- ✧ Houd eerst de knop (●) 3 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te openen.
- ✧ Druk op de knop (●) om naar de zone te gaan en druk vervolgens op de knop (♪) om de gewenste melodie te selecteren.
- ✧ Druk op de knop (●) totdat de koppelingsmodus wordt verlaten.

## **GEBRUIK**

---

Wanneer de AC150 een triggersignaal ontvangt, speelt hij een melodie af en trilt hij (afhankelijk van de instelling van het alarm). De zone-LED gaat branden om aan te geven welke sensor is geactiveerd. De zone-LED blijft branden totdat de resetknop wordt ingedrukt.

## GUARANTEE

---

From the moment your Geemarc AMPLICALL™150 is purchased, Geemarc guarantee is for the period of two years. During this time, all repairs or replacements (at our discretion) are free of charge. Should you experience a problem then contact our help line or visit our website at [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com). The guarantee does not cover accidents, negligence or breakages to any parts. The product must not be tampered with or taken apart by anyone who is not an authorized Geemarc representative. The Geemarc guarantee in no way limits your legal rights.

**IMPORTANT:** YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR GUARANTEE AND MUST BE RETAINED AND PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY CLAIM.

## VERKLARINGEN:

### EU-richtlijnen

Geemarc Telecom SA verklaart hierbij dat deze AMPLICALL™150 voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de Richtlijn radioapparatuur 2014/53/EU.

De EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com).

|                      |
|----------------------|
| RF-vermogen: < 250mW |
|----------------------|

### Recyclingrichtlijnen

De WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment) is ingesteld om ervoor te zorgen dat producten aan het einde van hun levensduur op de best mogelijke manier worden gerecycled.

Wanneer dit product aan het einde van zijn levensduur is, mag u het niet in de huisvuilbak gooien. Maak gebruik van een van de volgende verwijderingsopties:

- Verwijder de batterijen en deponeer deze in een daarvoor bestemde WEEE-container. Deponeer het product in een daarvoor bestemde WEEE-container.
- Of lever het oude product in bij de winkel. Als u een nieuw product koopt, moeten zij het oude product accepteren. Door deze instructies op te volgen, draagt u bij aan de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu.



Voor productondersteuning en hulp kunt u terecht op onze website  
[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)  
E-mail: **kundendienst@geemarc.com**  
telefoon **+49(0)30 209 95 789**  
de lijnen zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot  
16.00 uur.  
Geemarc Telecom  
Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59760 Grande-Synthe,  
Frankrijk  
Gemaakt voor Geemarc Telecom S.A. in China



UGAMPLICALL150\_NI\_v1.1



Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée,  
59760 Grande-Synthe,  
France  
[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)