

Forstærket foto-ID-telefon



Danish

CONTENTS

INDHOLD	1
INTRODUKTION	2
Udpakning af telefonen	3
BESKRIVELSE.....	4
Generel beskrivelse	4
INDSTILLINGER.....	6
Opsætning.....	6
Ringetoneindstillinger.....	6
Indstilling af flash (tilbagekaldelse)	6
Indstilling af modtagevolumen	6
Indstilling af højttalertelefonvolumen	7
BRUG AF TELEFONEN.....	8
Foretagelse af et opkald	8
Modtagelse af et opkald	9
Gentagelse af sidste nummer	9
Brug af høreapparat.....	9
Flash-Signal	9
HUKOMMELSE	10
Gemning af et nummer i hukommelsen.....	10
Opkald af et nummer fra hukommelsen.....	10
PROBLEMLØSNING.....	11
SIKKERHEDSOPLYSNINGER	12
ENHEDER.....	13
GARANTI.....	14
GENANVENDELSESDIREKTIVER	15

INDHOLD

!!! Se vores hjemmeside: www.geemarc.com for en opdateret brugervejledning, da der kan være vigtige opdateringer og ændringer, du skal være opmærksom på.!!!

Tillykke med købet af din Geemarc **PHOTOPHONE110**. Dette er en forstærket telefon med store taster. Det store tastatur er let at se og bruge, hvilket hjælper med at forhindre forkert opkald. Der er fotoknapper, der også er designet til at gøre opkald nemmere, da du kan identificere disse hurtigopkaldsknapper med billeder af dine venner og familie. Denne telefon er kompatibel med høreapparater.

Det er vigtigt, at du læser nedenstående instruktioner for at kunne udnytte din Geemarc-telefon fuldt ud. Opbevar denne brugervejledning på et sikkert sted til fremtidig reference.

Denne vejledning forklarer, hvordan du bruger følgende telefon:

PHOTOPHONE 110

INTRODUKTION

Udpakning af telefonen

Når du pakker telefonen ud, skal du finde følgende i kassen:

- 1 PHOTOPHONE 110-enhed
- 1 PHOTOPHONE 110-håndsæt med krøllet ledning
- 1 Telefonledningskabel
- 1 Brugervejledning



For produktsupport og hjælp, besøg vores hjemmeside på
www.geemarc.com

E-mail : **help@geemarc.com**


Telefon : **01707 387602**

linjerne er åbne 09h00 til 16h00 Man til Fre
2 rue Galilée, Parc de l'Etoile, 59760 Grande-Synthe,
Frankrig


BESKRIVELSE

Generel beskrivelse

- | | | |
|--------------|-------------------|---------------------|
| 1) M3 | 8) Håndfri | 15) Håndsætets |
| 2) M4 | 9) Ringer Rød LED | lydstyrke |
| 3) M7 | 10) M2 | 16) Linje |
| 4) SOS | 11) M1 | 17) Flash (100-300) |
| 5) Butik | 12) M6 | 18) Forstærkning |
| 6) Flash | 13) M5 | (OFF/ON) |
| 7) Genopkald | 14) Numerisk tast | |

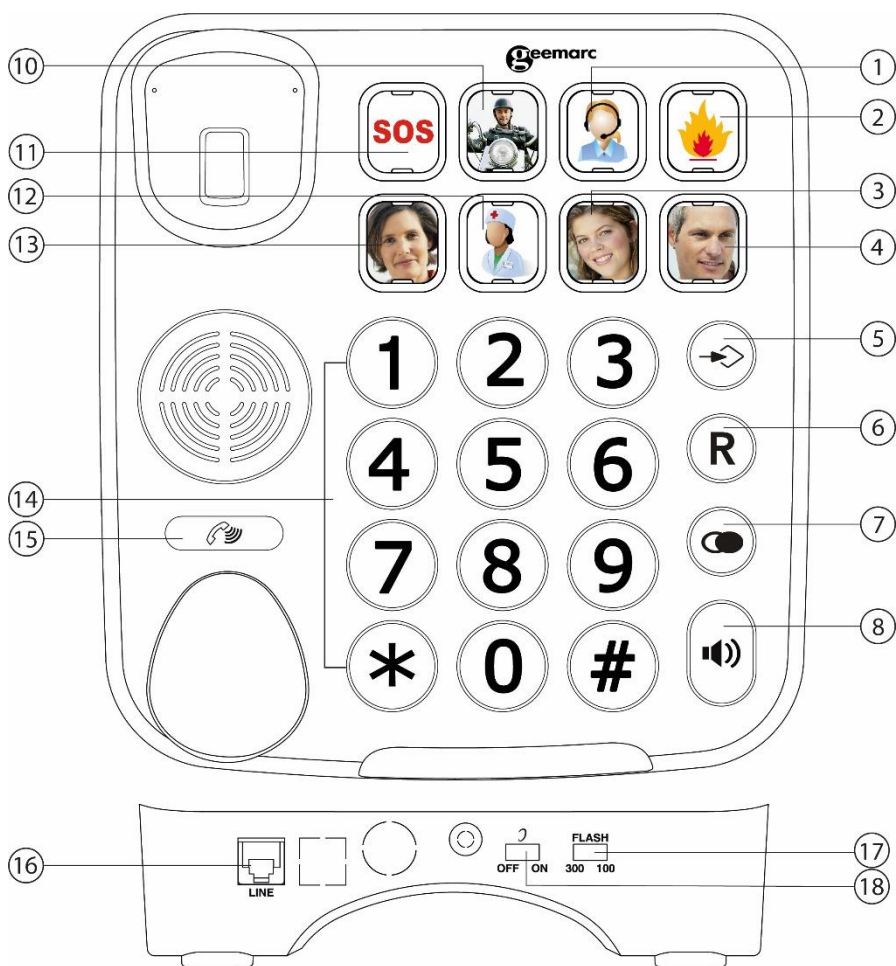

BESKRIVELSE

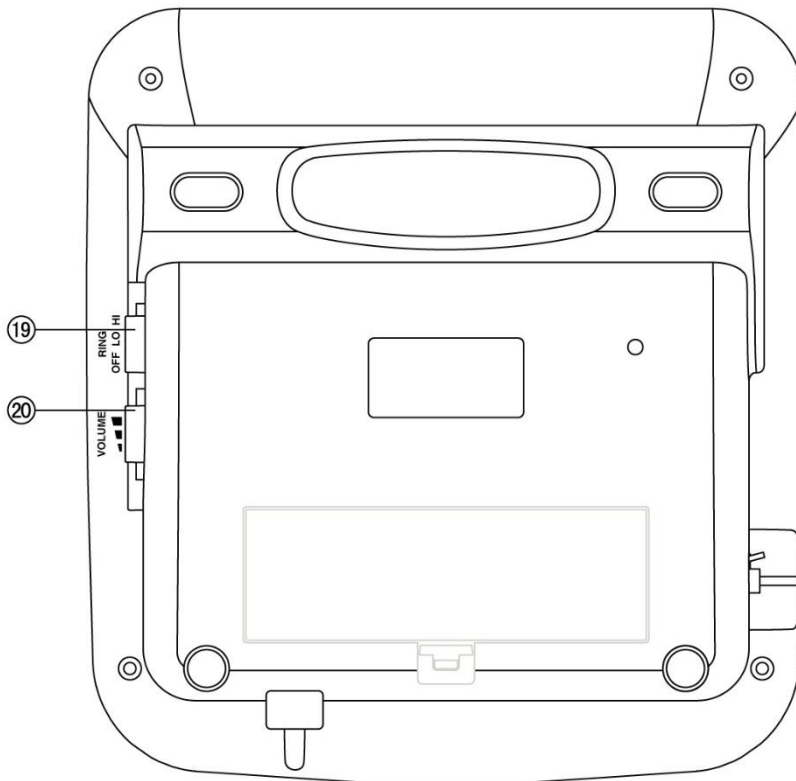

19) Ringeknap (OFF/LO/High)

20) Lydstyrke (Lo, Middle, Hi)

INDSTILLINGER

Opsætning

Tilslut håndsættet til den ene ende af det krøllede ledning. Sæt den anden ende af det krøllede ledning i stikket på venstre side af PHOTOPHONE110-enheden. Placer håndsættet på holderen. Tilslut ledningen til stikket på bagsiden af telefonen, og sæt derefter stikket i den anden ende af ledningen i stikkontakten eller internetboksen*.

(*) Klassificeret TNV-3 i henhold til standarden EN62368-1

Ringetoneindstillinger

En kontakt på højre side af PHOTOPHONE110-enheden gør det muligt at skifte ringetonevolumen til **HI** (maksimalt volumen), **LO** (laveste volumen) eller **OFF** (hvis du ikke ønsker at blive forstyrret).

Indstilling af flash (tilbagekaldelse)

Du kan justere flashtiden ved hjælp af kontakten på bagsiden af din telefon. Der er to niveauer til rådighed, 100 ms og 300 ms. Din telefon fungerer med en flashtid for Storbritannien og Europa (R=100 ms) og Frankrig (300 ms). Når FLASH-kontakten 100/300 flyttes, skal telefonens fastnetkabel være frakoblet i 10 minutter, før ændringen træder i kraft.

Indstilling af modtagevolumen

Du kan ændre modtagevolumenet under en samtale i henhold til dine hørebehov.

Brug volumeskydereglatoren  **VOL.** på højre side af telefonbasen til at justere niveauet. Volumenjusteringen kan indstilles mellem 6 og 9 dB.

AMPLIFY-knappen  på telefonens base giver en ekstra forstærkning på 18 dB, dvs. lydstyrken kan justeres mellem 12 og 30 dB. Når forstærkningsfunktionen er aktiveret, lyser Amplify-LED'en.

INDSTILLINGER



Indstilling af standard for forstærkning.

Med forstærkningsknappen **ON/OFF**  på bagsiden kan du indstille forstærkningen til at være slået til eller fra som standard, hver gang du bruger telefonen.

AMPLIFY ON/OFF-knap i position ON

Den ekstra forstærkning aktiveres automatisk, hver gang du bruger telefonen.

Hvis du trykker på forstærkningstasten  under et opkald, slås den ekstra forstærkning fra. Du kan dog stadig justere håndsættets modtagevolumen med lydstyrkeskyderen.

Uanset hvor mange gange du trykker på forstærkningstasten  under et opkald, aktiveres disse funktioner igen, næste gang du løfter håndsættet for at foretage et nyt opkald.

AMPLIFY ON/OFF-kontakt i OFF-position

Den ekstra forstærkning deaktiveres, hver gang du bruger telefonen.

Hvis du trykker på Amplify-tasten  én gang under et opkald, aktiveres den ekstra forstærkning. Hvis du trykker på Amplify-tasten  én gang til, slås den ekstra forstærkningsfunktion fra igen.

Uanset hvor mange gange du trykker på forstærkningstasten  under et opkald, vil disse funktioner blive slået fra igen, næste gang du løfter håndsættet.

Speakerphone Volume Setting

I håndfri tilstand kan du justere højttalerens lydstyrke ved hjælp af lydstyrkeknapperne  **VOL.** på højre side af telefonen.

BRUG AF TELEFONEN

Foretage et opkald

Løft røret.

Når du hører klartonen, trykker du nummeret på tastaturet.

For at afslutte samtalen ligger du ganske enkelt bare røret på

Foretage et opkald – Håndfrit

Tryk på knappen  for at få en klartone

Tast telefonnummeret ind på telefonen.

For at afslutte samtalen trykker du bare på  igen

For at aktivere funktionen Håndfri under en samtale trykker du på knappen **SPEAKER**  og lægger røret på telefonen samtidigt.

For at deaktivere funktionen Håndfri under en samtale løfter du røret.

Bemærk: Når telefonen er i Håndfri-status kan kun en person tale ad gangen. Vekslingen mellem mikrofon og højttaler sker automatisk. Dette er afhængig af lydniveauet på den indkommende samtale og mikrofonen. Derfor er det vigtigt, at der ikke er nogle høje lyde som f.eks. musik i nærheden af telefonen, da det vil forstyrre den håndfri funktion.

BRUG AF TELEFONEN

Modtagelse af et opkald

Ved indkommende samtale ringer telefonen og LED-lysene for indkommende samtaler lyser op.

Løft røret og tal

For at afslutte samtalen ligger du ganske enkelt bare røret på

Indkommende samtale – Håndfri

Tryk på  for at snakke håndfrit

For at afslutte opkaldet skal du trykke på 

Ring tilbage til sidste nummer

Løft røret og tryk på  for håndfrit brug

Tryk på  for at ringe til det sidst oprigede nummer.

Brug af høreapparat

Denne telefon er kompatibel med høreapparater. Vælg T-tilstand på dit høreapparat for at aktivere denne funktion.

Flash-Signal

FLASH-knappen kan bruges med særlige tjenester såsom opkaldsventning (hvis dette tilbydes af din tjenesteudbyder) eller viderestilling af eksterne opkald til en anden lokalnummer inden for en privat omstillingscentral.

HUKOMMELSE

Gem et nummer i hukommelsen

Der er 8 hukommelsesknapper med billeder (8 fotoknapper). Du kan lægge dit kontakts foto under perspexet på knappen. Dette er meget nyttigt, hvis du har tendens til at glemme telefonnumre eller navne.

Lad håndsættet ligge på basen. Indtast det telefonnummer, du ønsker at gemme (op til 16 cifre). Hvis det er nødvendigt, kan du bruge knappen  til at indsætte en pause.

Tryk på  igen.

Tryk på den ønskede hukommelsesplacering (1 af de 8 fotoknapper). Telefonnummeret gemmes på den pågældende hukommelsesplacering.

Hvis du indtaster et nyt nummer i en hukommelsesplacering, der i øjeblikket gemmer et nummer, slettes det oprindelige nummer automatisk.

Bemærk: Hvis du gemmer familiemedlemmers eller venners numre i fototasten, kan du indsætte deres foto i den.

Opkald til et nummer fra hukommelsen

Løft håndsættet, eller lad være, hvis du vil ringe i højtalertilstand.

Tryk på den ønskede hukommelsesplacering (1 af de 8 fotoknapper).

Telefonnummeret vil blive ringet op automatisk.

PROBLEMLØSNING

PHOTOPHONE110 ringer ikke

- Sørg for, at telefonledningen er tilsluttet korrekt og ikke er beskadiget.
- Tilslut en anden telefon til telefonens PTT-stik, eller flyt din telefon til et andet stik for at finde ud af, om fejlen skyldes din telefon eller dit PTT-stik.
- Der kan være for mange kommunikationsenheder tilsluttet en enkelt telefonlinje, f.eks. en anden telefon, et modem eller en faxmaskine. Kontakt din netværksudbyder for at få hjælp til at beregne grænsen for din hjemme- eller forretningslinje.
- Sørg for, at ringetoneindstillingen ikke er slået fra.

Ingen klartone

- Sørg for, at telefonledningen er tilsluttet korrekt og ikke er beskadiget.
- Tilslut en anden telefon til telefonens PTT-stik, eller flyt din telefon til et andet stik for at finde ud af, om fejlen skyldes din telefon eller dit PTT-stik.
- Der kan være for mange kommunikationsenheder tilsluttet en enkelt telefonlinje, f.eks. en anden telefon, et modem eller en faxmaskine. Kontakt din netværksudbyder for at få hjælp til at beregne grænsen for din privat- eller forretningslinje.

One-touch-hukommelsestasten virker ikke

- Kontroller, om du har gemt et nummer i den. Hvis ikke, skal du gemme nummeret igen.

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Generelt

Når du bruger dit telefonudstyr, skal følgende grundlæggende sikkerhedsforholdsregler altid overholdes for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskaade:

1. Læs, forstå og følg alle advarsler og instruktioner
2. Frakobl produktet fra stikkontakten, før det rengøres. Brug ikke flydende rengøringsmidler eller aerosolrengøringsmidler. Brug en blød, fugtig klud til rengøring.
3. Placer ikke dette produkt på ustabile overflader. Produktet kan falde ned og blive alvorligt beskadiget.
4. Overbelast ikke stikkontakter og forlængerledninger, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød.
5. Skub aldrig fremmedlegemer af nogen art ind i dette produkt gennem kabinets åbninger, da de kan påvirke farlige spændingspunkter eller kortslutte dele, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød. Spild aldrig væsker af nogen art på produktet.
6. Undgå at flytte eller frakoble denne enhed under kraftig storm, da der kan være en fjern risiko for elektrisk stød fra lyn og torden.
7. Ufaglærte personer må ikke åbne telefonen, selvom der opstår problemer. Send den til et servicecenter.

FUNKTIONER

- Store taltaster designet til ældre
- Kompatibel med høreapparat (valgfrit)
- Håndsætmodtagerforstærkerfunktion
- 8 one-touch-hukommelser (inklusive 4 fototaster)
- Flash- og genopkaldsfunktion
- Flash-tid valgt med kontakt
- Hovedtelefon- og håndfri lydstyrke justeres med potentiometer
- Ringetone lydstyrke høj, lav og slukket kontakt
- Håndfri opkald og tale
- Lys ring LED-indikator

GARANTI

Fra det øjeblik, du køber din Geemarc Photophone110, giver Geemarc to års garanti på produktet. I denne periode er alle reparationer eller udskiftninger (efter vores skøn) gratis. Hvis du oplever et problem, skal du kontakte vores hjælpelinje eller besøge vores hjemmeside på www.geemarc.com.

Garantien dækker ikke uheld, uagtsomhed eller brud på dele. Produktet må ikke manipuleres eller skilles ad af andre end en autoriseret Geemarc-repræsentant.

Geemarc-garantien begrænser på ingen måde dine juridiske rettigheder.

VIGTIGT: DIN KØBSBEVIS ER EN DEL AF DIN GARANTI OG SKAL OPBEVARES OG FREMVISES I TILFÆLDE AF ET GARANTIANMELDELSE.

CE-direktiver

Geemarc Telecom SA erklærer herved, at dette produkt er godkendt og CE-mærket i overensstemmelse med CE-direktivet 2014/53/UE.

Du kan finde overensstemmelseserklæringen på
www.geemarc.com

Genanvendelsesdirektiver

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) er blevet indført for at sikre, at produkter, der er udtjente, genanvendes på den bedst mulige måde.

Når dette produkt er udtjent, må det ikke smides i skraldespanden. Brug en af følgende bortskaffelsesmuligheder:

- Fjern batterierne og aflever dem i en passende WEEE-container.

Aflever produktet i en passende WEEE-container.

- Eller aflever det gamle produkt til forhandleren. Hvis du køber et nyt, skal de acceptere det.

Ved at følge disse instruktioner sikrer du menneskers sundhed og miljøbeskyttelse.



For produktsupport og hjælp, besøg vores hjemmeside på

www.geemarc.com

E-mail: **help@geemarc.com** Telephone : **01707 387602**
linjerne er åbne fra kl **10:00-12:00** og derefter kl. **13:00-14:30**
mandag til fredag

2 rue Galilée, Parc de l'Etoile, 59760 Grande-Synthe,
Frankrig.

Dette produkt er fremstillet i Kina for Geemarc Telecom





UGPhotoPHONE110_Da_v1.1

Geemarc Telecom SA
Parc de l'Etoile
2 Rue Galilée
59760 Grande-Synthe
FRANCE