

Téléphone Amplifié à Synthèse Vocale et Appel d'Urgence

Français



ATTENTION:

Ce téléphone peut être destiné aux personnes ayant des problèmes auditifs. Il possède un écouteur à volume variable. A la première utilisation, assurez-vous que le volume du combiné soit réglé au minimum. Les personnes malentendantes pourront par la suite augmenter le volume pour l'adapter à leur besoin.



Sommaire

Vérifiez si une version plus récente de ce guide de démarrage rapide est disponible sur notre site Internet : www.geemarc.com

| | |
|---|-----------|
| Sommaire | 1 |
| Félicitations | 4 |
| Consignes de sécurité | 5 |
| Branchements | 6 |
| Emplacement des contrôles | 8 |
| Description des touches | 10 |
| Description de l'écran LCD | 11 |
| Fixation murale | 13 |
| Fonctions basiques | 14 |
| - Passer un appel | 14 |
| - Rappel du dernier numéro composé ou un des 10 derniers | 14 |
| - Recevoir un appel | 15 |
| - Couper le microphone | 16 |
| - Utiliser la fonction Tonalité et amplification du combiné... .. | 16 |
| - Utiliser votre téléphone avec une prothèse auditive | 17 |
| Utilisation du téléphone en mode Mains libres..... | 18 |
| Réglages de la Sonnerie | 19 |
| Touches mémoires photos et indirectes | 20 |
| Fonction Rappel « R » | 22 |
| Affichage du numéro de l'appelant | 23 |
| Répertoire Téléphonique..... | 24 |
| - Ajouter un contact dans le répertoire | 25 |
| - Consultation du répertoire | 25 |
| - Utilisation des options du répertoire | 26 |

| | |
|--|-----------|
| Accès aux fonctions du menu | 27 |
| - Navigation dans les menus | 27 |
| Détail des différents menus | 28 |
| Réglages de l'afficheur | 29 |
| - Choix du langage | 29 |
| - Réglage du format de l'heure | 29 |
| - Réglage du format de la date | 30 |
| - Réglage de la date et L'heure | 30 |
| - Réglage du contraste de l'écran | 31 |
| - Réglage du rétroéclairage | 31 |
| - Agrandir la taille des caractères | 31 |
| Réglages du téléphone | 32 |
| - Réglage du Volume et de la mélodie de sonnerie | 32 |
| - Réglage du bip clavier | 32 |
| - Réglage de l'amplification du combiné | 33 |
| - Réglage de la tonalité d'écoute du combiné | 33 |
| - Réglage du temps Flash de coupure | 33 |
| - Verrouillage du menu | 34 |
| - Raccroché automatique | 34 |
| Réglages vocaux | 35 |
| - Numérotation vocale | 35 |
| - Identité vocale | 35 |
| - Menu vocale | 36 |
| Réglage de la fonction SOS | 37 |
| - Enregistrer des numéros SOS | 38 |
| - Enregistrer un message vocal SOS | 38 |
| - Vérification du message vocal SOS | 39 |
| - Suppression du message vocal SOS | 39 |
| - Code sécurité | 39 |

Sommaire

| | |
|--|-----------|
| - Alerte de température SOS | 40 |
| - Fonction capteur d'alerte SOS | 41 |
| Utilisation de votre Télécommande | 42 |
| - Enregistrement d'une télécommande supplémentaire | 42 |
| - Suppression des télécommandes | 43 |
| - Prendre un appel avec la télécommande | 43 |
| Réglages de la fonction blocage d'appel | 44 |
| - Ajouter un numéro bloqué | 44 |
| - Choix du mode de blocage | 44 |
| - Contrôle des numéros bloqués..... | 45 |
| Utilisations des connecteurs audios | 46 |
| Fonctions avancées | 47 |
| - Double appel..... | 47 |
| Fonctions Principales | 48 |
| Dépannage | 49 |
| Informations générales | 50 |

Félicitations

Vous venez de faire l'acquisition d'un équipement de qualité. Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice, pour découvrir en détail toutes les fonctionnalités de votre nouveau téléphone Serenities100.



Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

Pour limiter le risque d'électrocution et de blessure, nous vous invitons à respecter ces quelques règles de sécurité de base avant d'utiliser votre téléphone :

1. Lisez attentivement et suivez les instructions de cette notice.
2. L'appareil peut amplifier la réception du combiné jusqu'à un volume très élevé. Assurez-vous que chaque personne utilisant le téléphone connaisse bien le fonctionnement de l'amplificateur. Nous conseillons de régler le volume au minimum (faible) lorsque vous n'utilisez pas le téléphone. Avertissez les personnes pouvant être amenées à se servir de l'appareil qu'une mauvaise utilisation pourrait entraîner une perte d'audition.
3. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer à l'aide d'un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de produit nettoyant liquide ou en aérosol.
4. N'utilisez pas le téléphone dans une pièce humide, ni dans un environnement présentant un risque d'explosion.
5. En cas de panne, débranchez le téléphone de la prise murale, et faites-le vérifier par un réparateur agréé.
6. Raccordez uniquement le téléphone à son adaptateur secteur du type indiqué dans la notice d'utilisation.
7. Ne posez aucun objet sur les cordons d'alimentation. Installez le téléphone à un endroit où personne ne risque de marcher ni de trébucher sur les cordons.
8. Ne surchargez pas les prises murales ou blocs multiprises : cela augmente le risque d'incendie ou d'électrocution.
9. N'insérez aucun objet dans les ouvertures du téléphone. Vous risqueriez de toucher des points de contact électrique, ou de mettre certaines pièces en court-circuit, et de provoquer ainsi un incendie ou un court-circuit.
10. Veillez à ne jamais renverser de liquide sur le téléphone.
11. Maintenez l'appareil hors de portée des enfants.
12. Respectez les conditions d'utilisation données dans la notice.
13. Cessez d'utiliser le téléphone s'il a été endommagé.

Branchements

Vérifiez le contenu de la boîte du téléphone

Vous devez y trouver les éléments suivants :

- 1 combiné avec son cordon, 1 base de téléphone
- 1 cordon de ligne téléphonique

ANNONCES IMPORTANTES

** Aujourd'hui, la plupart des utilisateurs finaux ont un modem / routeur / box internet à la maison. C'est pourquoi Geemarc a décidé de supprimer les prises téléphoniques qui se trouvaient auparavant dans les boîtes de tous ses produits liés à la téléphonie fixe.*

*** Ces prises seront optionnelles et disponibles sur demande des utilisateurs finaux.*

- 1 notice d'utilisation
- 1 télécommande appels SOS (fourni dans la version Serenities 100 et Pack Serenities 100)
- 1 adaptateur secteur (7V DC / 0.5A / 3.5W)
- 1 câble pour la sortie audio (audio out) (fourni pour la version Serenities 100 V2T seulement)

Choisir un emplacement

Choisissez pour l'appareil un emplacement permettant de voir facilement l'écran d'affichage et le voyant lumineux de sonnerie. Choisissez un emplacement qui ne gêne pas vos activités quotidiennes.

Installation de l'adaptateur secteur

Vous devez connecter l'adaptateur secteur pour avoir un fonctionnement correct ainsi que les informations et menus affichés à l'écran (l'icône secteur s'allume).

ATTENTION : Commencez toujours par brancher le cordon d'alimentation au dos du téléphone avant de raccorder l'adaptateur à une prise électrique 230V.

Pour débrancher l'appareil, commencez toujours par retirer l'adaptateur de la prise secteur 230V avant de le déconnecter de la base du téléphone.

Branchements

Installation des batteries dans la base

Vous n'êtes pas obligé de mettre des batteries dans votre téléphone pour pouvoir l'utiliser.

Placez 4 batteries standard rechargeables AAA de 1.2V/600-800mA (non fournies) qui permettront de garantir le fonctionnement de l'appareil durant quelques heures lors d'une coupure secteur.

L'icône batterie est allumée et clignote lorsque la batterie est en charge et fixe si elles sont chargées (adaptateur secteur branché).

En cas de coupure secteur, l'icône batterie devient fixe avec indication par les 3 barres du niveau de charge des batteries.

ATTENTION : Ne jamais utiliser des piles non rechargeables qui risqueraient de couler et donc de détruire l'appareil.

Il faut quelques heures après le branchement de l'appareil pour avoir les batteries correctement chargées et permettre ainsi le fonctionnement correct en cas de coupure secteur.


Branchement du cordon de ligne téléphonique

Branchez la petite extrémité du cordon téléphonique à l'arrière du téléphone. Branchez l'autre extrémité du cordon à une prise téléphonique murale (avec l'adaptateur PTT si nécessaire).

ATTENTION : Le cordon PTT doit toujours être branché en dernier, c'est-à-dire une fois l'adaptateur secteur branché et les batteries insérées.


Allumage de la Télécommande

Appuyer sur le bouton pendant environ 10 secondes jusqu'à l'allumage du voyant en rouge.

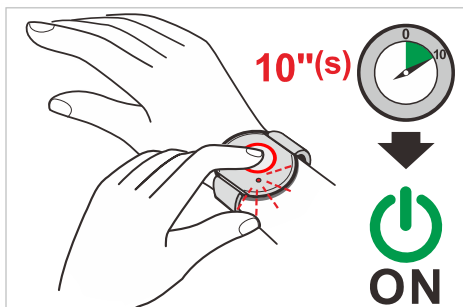

Emplacement des contrôles


Emplacement des contrôles

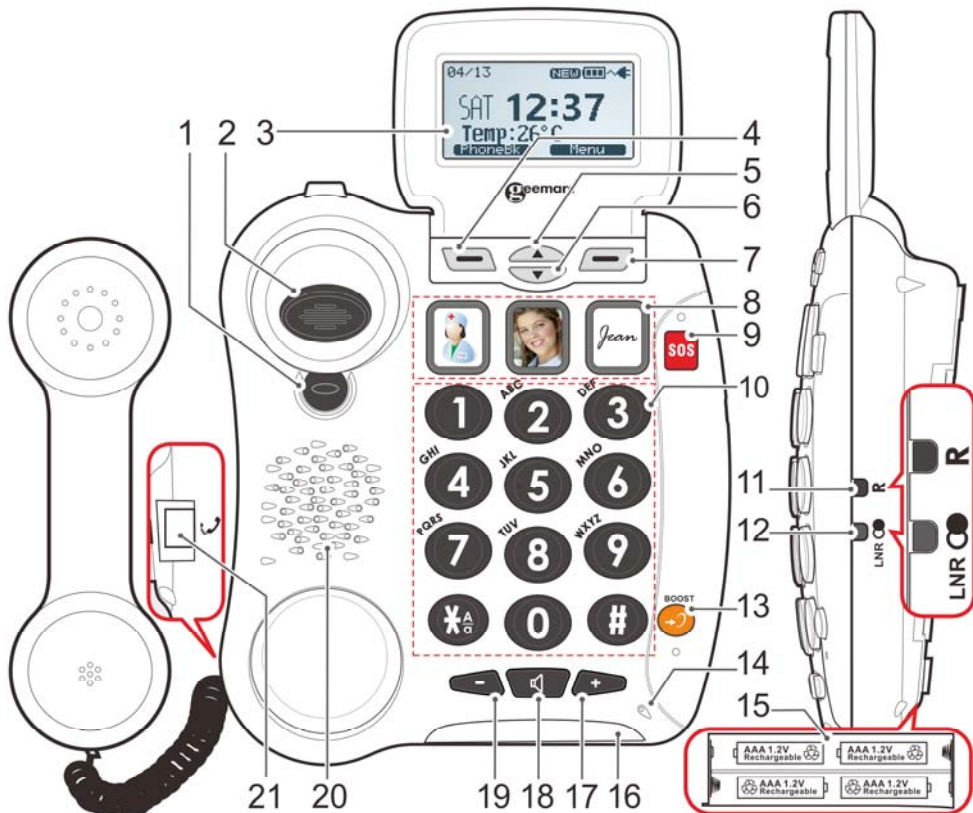

- | | |
|--|--|
| <p>1. Ergot de position murale</p> <p>2. Commutateur de ligne</p> <p>3. Ecran LCD grand format</p> <p>4. Touche de fonction écran à gauche</p> <p>5. Défilement Haut</p> <p>6. Défilement Bas</p> <p>7. Touche de fonction écran à droite</p> <p>8. 3 Mémoires photos</p> <p>9. Touche SOS + LED (appel d'urgence)</p> <p>10. Clavier alphanumérique</p> <p>11. Touche Rappel «R» (fonction opérateur)</p> | <p>12. Touche Bis (accès au dernier numéros composés)/ Touche pause «P» lors de la numérotation</p> <p>13. Touche Boost</p> <p>14. Microphone</p> <p>15. Compartiment batterie</p> <p>16. Indicateur lumineux de sonnerie / nouveau appel / utilisation</p> <p>17. Touche d'augmentation du volume haut-parleur ou combiné</p> <p>18. Touche main libre</p> <p>19. Touche de diminution du volume haut-parleur ou combiné</p> <p>20. Haut-Parleur</p> <p>21. Prise Combiné</p> |
|--|--|

Emplacement des contrôles

Emplacement des contrôles (suite)

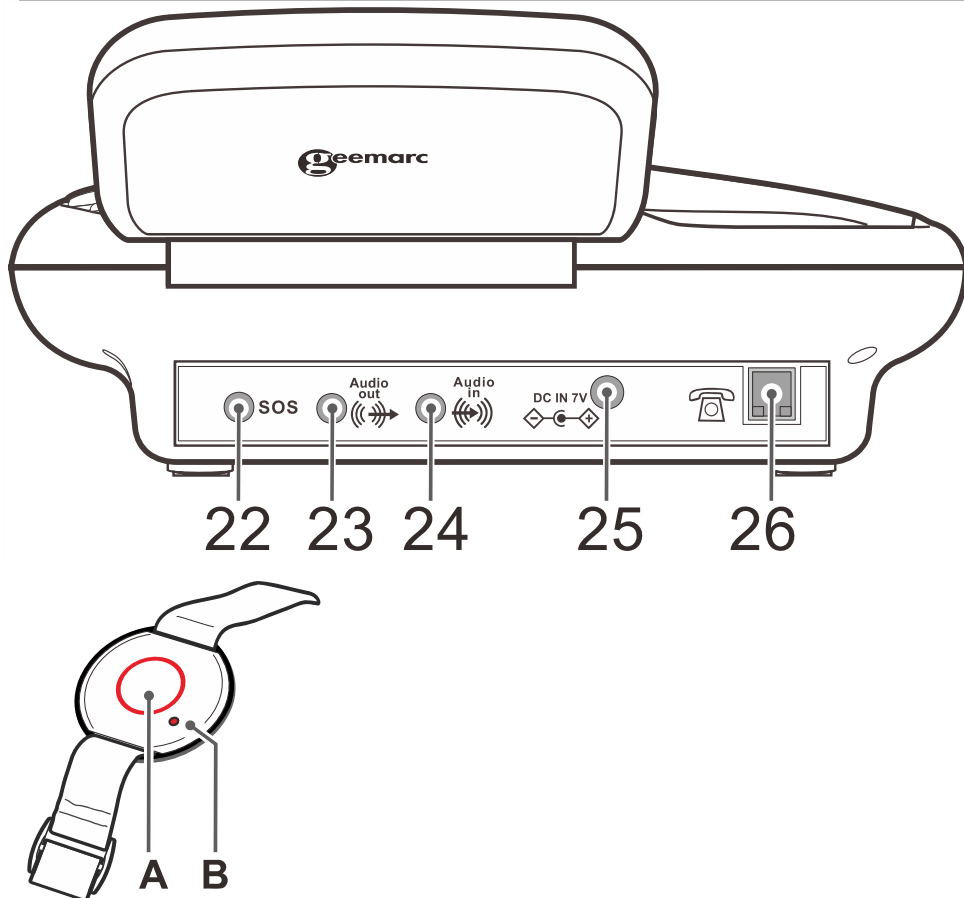

- 22. Connecteur capteur SOS (contact ouvert ou fermé)
- 23. Sortie audio 3.5 mm
- 24. Entrée audio 3.5 mm
- 25. Prise d'alimentation 7VDC/ 0.5A (adaptateur secteur)
- 26. Prise pour Cordon de ligne PTT










A -> Bouton SOS télécommande (ce bouton est utilisé pour lancer l'appel SOS ou pour son enregistrement)

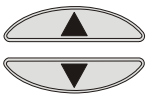B -> Voyant télécommande (chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le voyant s'allume en rouge)

Description des touches

Description des touches


Remarque : certaines touches ont plusieurs fonctions.

| | |
|---|---|
|  | Navigateur : accès aux différentes options des menus. Accès à la liste des appels entrants, voir page 20. |
|  | Exécutent la fonction indiquée par le texte affiché juste au-dessus (sur la ligne du bas de l'écran). |
|  | Ces trois touches sont utilisées comme touche de raccourci de numérotation indirectes. |
|  | Cette touche permet de lancer la procédure d'appel d'urgence (numéros SOS). |
|  | Cette touche vous permet d'activer ou non l'amplification dans le combiné. |
|  | Appeler / Répondre / Raccrocher (fonction mains libres). Active le haut-parleur en cours de conversation, voir page 17 |
|  | Ces touches vous permettent d'ajuster le volume d'écoute en mode combiné ou main libre. |
|  | Rappel des derniers numéros « BIS », (maxi 10 numéros) voir page 14. Insère une pause pendant la pré numérotation. |
|  | Cette touche permet de transférer une conversation sur un standard, ou de passer d'un correspondant à un autre si la fonction double appel est souscrite. |

Description de l'écran LCD

Description de l'écran LCD


En veille, l'écran LCD affiche les informations suivantes :

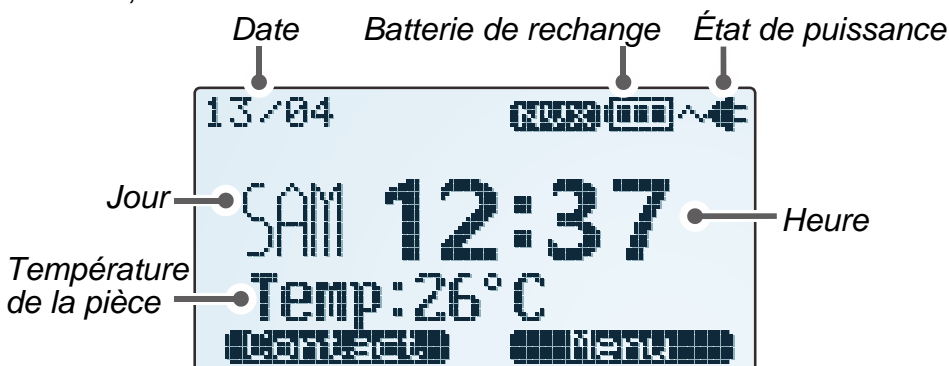

Date / Heure / Jour / Température de la pièce et le rôle des touches de fonction gauche et droite en bas de l'écran.

Si vous avez oublié de brancher le cordon de ligne, le texte **Pas de ligne!** s'affiche à l'écran.




Quand vous appuyez sur la touche de fonction **Menu**, l'écran affiche le menu principal. Utilisez la touche  pour faire défiler les options du menu et sélectionner un menu. Ensuite, appuyez sur **Select** pour confirmer.



Lorsque vous recevez un appel, l'écran affiche le numéro de téléphone et / ou le nom de l'appelant (si abonnement au service).



Lorsqu'un numéro de téléphone est dans la liste des numéros bloqués, l'icône  apparaît à côté de l'icône batterie.



Si l'appelant a choisi de masquer son nom et son numéro, Privé s'affichera à l'écran.

Le message "**Indisponible**" s'affiche si un correspondant vous appelle

Depuis une zone sur laquelle l'opérateur téléphonique ne propose pas de service d'identifiant de l'appelant ou ne gère pas encore l'envoi d'informations sur les numéros d'appel vers votre zone (comme certains appels depuis l'étranger).



Fixation murale

Fixation murale

1. Faites tourner l'ergot de maintien du combiné de 180°. (voir **figure 1**). De cette façon, le combiné restera bien en place une fois l'appareil fixé au mur.
2. Percez deux trous au mur, espacés de 80 mm sur une ligne verticale. Fixez-y deux chevilles et deux vis (non fournies). Laissez dépasser la tête des vis de 5 mm environ.
3. Engagez les trous situés à l'arrière du téléphone sur les têtes de vis et appuyez l'appareil vers le bas, pour le positionner fermement (voir **figure 2**).

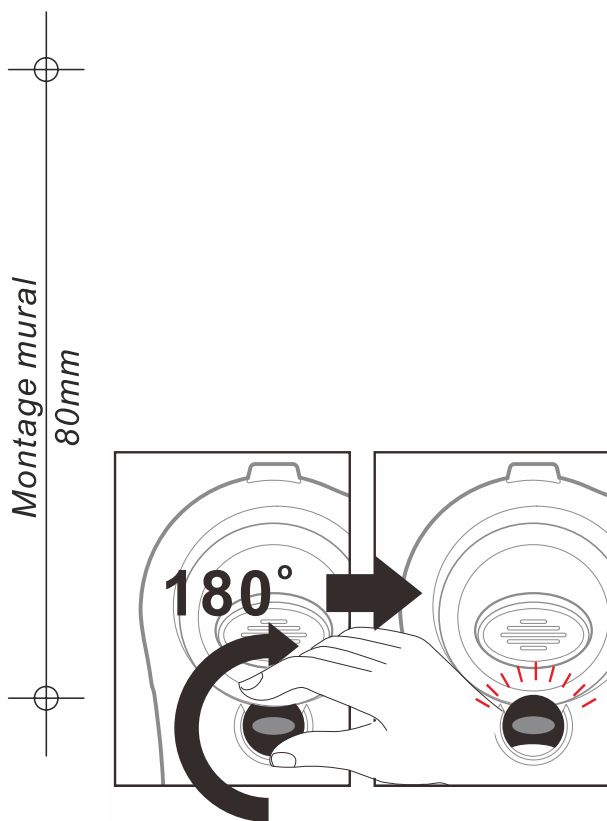


Figure 1

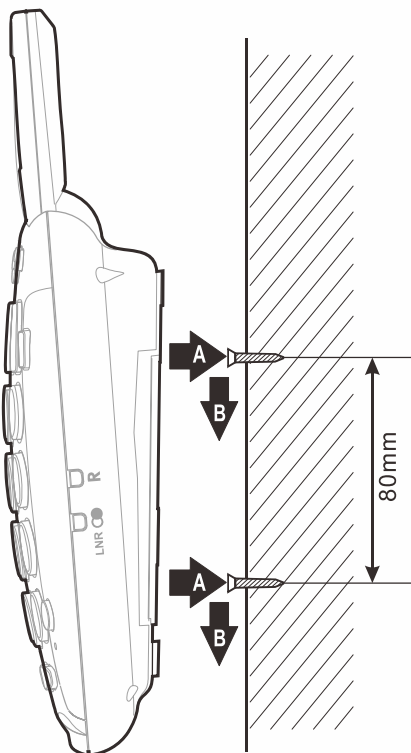



Figure 2


Passer un appel


1. Pour passer un appel, décrochez le combiné, vérifiez la tonalité et réglez le son du téléphone (voir **page 16**).
2. Vous pouvez composer votre numéro à l'aide du clavier (0 à 9).
3. Pour terminer un appel, reposez simplement le combiné sur la base.

Vous pouvez également composer le numéro de téléphone de votre correspondant lorsque l'appareil est en veille, ce qui vous permet éventuellement de le corriger en cas d'erreur avant la numérotation. Voici comment faire :

1. Combiné raccroché, composez un numéro de téléphone (jusqu'à 32 chiffres). Vérifiez-le. Si vous avez fait une erreur en composant le numéro, appuyez sur la touche de fonction **Effacer** pour le modifier ou appuyez sur une des 3 mémoires photos (voir **page 20**).
2. Une fois que le numéro affiché à l'écran est correct, vous pouvez décrocher le combiné ou bien appuyer sur la touche  pour passer en conversation mains libres.



Rappel du dernier numéro composé (BIS)

La touche **LNR**  (BIS) permet de rappeler rapidement le dernier numéro que vous avez composé.

1. Décrochez le combiné pour obtenir la tonalité.
2. Appuyez sur la touche **LNR** . Le téléphone peut recomposer automatiquement le dernier numéro.



Nota: Les numéros supérieurs à 32 chiffres ainsi que le numéro 119 (enfance maltraitée) ne seront pas mémorisés dans la mémoire BIS

Composer un numéro à partir du journal des 10 derniers numéros composés


1. Appuyez sur la touche **LNR**  à partir de l'écran de veille.
2. Appuyez plusieurs fois sur les touches  pour afficher le numéro que vous voulez composer.
3. Décrochez le combiné pour démarrer l'appel.

Utiliser les options du journal des derniers numéros composés

Les options du journal des appels vous permettent d'enregistrer un numéro dans le répertoire ou d'effacer un numéro de la liste des appels.

1. Appuyez sur la touche **LNR** .
2. Appuyez plusieurs fois sur les touches  pour afficher le numéro souhaité.
3. Lorsque l'écran affiche le numéro, appuyez sur la touche de fonction **Options** pour sélectionner l'option de votre choix :
 - **Supprimer**: vous permet de supprimer le numéro sélectionné.
 - **Tout supprimer** : vous permet de supprimer intégralement le journal des 10 derniers numéros composés.
 - **Ajout au contact**: vous permet d'ajouter le numéro au répertoire téléphonique. Vérifier le numéro de téléphone puis valider par la touche de fonction **Sauver**.

Saisissez le nom que vous voulez associer à ce numéro, puis appuyez sur la touche de fonction **Sauver**.

Choisissez la mélodie de sonnerie pour votre contact à l'aide des touches  puis appuyer sur la touche de fonction **Sauver**.
4. Pour quitter, appuyez sur la touche **Sortir**.

Recevoir un appel

Lorsque vous recevez un appel, la sonnerie du téléphone retentit, et le voyant lumineux de sonnerie clignote.

1. Pour prendre la communication, décrochez le combiné ou appuyez sur la touche haut parleur puis parlez.
2. Réglez le son de l'appareil si nécessaire (voir **page 16**).
3. Pour mettre fin à la communication, reposez simplement le combiné sur la base ou appuyez sur la touche haut parleur.

Couper le microphone (Secret)

Pendant un appel vous pouvez couper ponctuellement le microphone en cours de communication : votre correspondant ne pourra plus vous entendre.

Pour couper le microphone, appuyez sur la touche de fonction **Secret** en cours de conversation. Le texte « **MUET** » s'affiche à l'écran.

Pour désactiver le mode secret, appuyez sur la touche de fonction **Normal**. Le téléphone fonctionne de nouveau normalement.

Utiliser la fonction tonalité et amplification du Combiné

Votre téléphone est équipé d'un système d'amplification de la réception du combiné pour répondre à vos besoins.

Pendant une conversation, vous pouvez ajuster la réception du combiné suivant vos besoins. Vous pourrez régler le niveau du Volume et la Tonalité pour adapter le son à votre audition.


La touche de fonction **TONALITE** permet de renforcer en réception les graves ou les aigus du combiné. (**Grave+**, **Grave**, **Normal**, **Aigu**, **Aigu+**)

BOOST Button

Le volume de réception dans le combiné peut être ajusté de 0 à 40dB.

Lorsque l'amplification n'est pas activée, le volume d'écoute est entre 0 et 20dB.

Lorsque l'amplification est activée, le volume d'écoute est entre 20 et 40dB. L'information « **Mode amplifié** » sera affichée pendant 5 secondes).

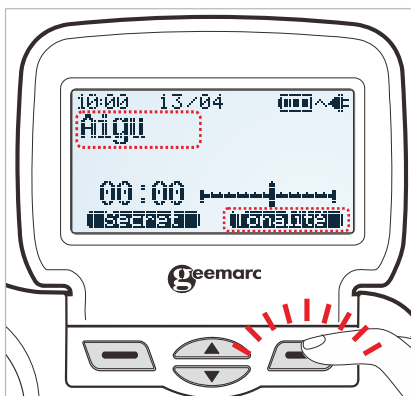

ATTENTION : Ce téléphone permet d'obtenir un niveau sonore très élevé (fort). L'exposition répétée à un son amplifié de plus de 18 dB peut être dangereuse pour les personnes ne souffrant pas de problèmes d'audition ou les enfants . Réglez le volume sonore au minimum lorsque vous n'en avez pas le besoin.


Utiliser votre téléphone avec un appareil auditif

Le combiné du téléphone est compatible avec les appareils auditifs équipés d'une boucle magnétique (télécoil ou T-coil).


Réglez votre appareil auditif sur la position "T" et maintenez bien le combiné contre votre appareil auditif.

Mode mains libres

Au repos :

Pour activer le mode mains libres, appuyer sur la touche  , un symbole haut-parleur apparaît sur l'écran à droite de l'indicateur de Volume. Le téléphone est alors en mode mains libres et vous pouvez débiter votre appel sans utiliser le combiné.




En Conversation :

Pour basculer en mode Mains libres, appuyer sur la touche  , le symbole haut-parleur sur l'écran à droite de l'indicateur de volume combiné apparaît, raccrocher alors le combiné pour basculer la conversation du mode combiné en mode mains libres.

Pour désactiver le mode mains libres et reprendre la conversation normalement, il vous suffit de décrocher le combiné. Le symbole haut-parleur disparaît de l'écran.

Sinon appuyer sur la touche  , pour désactiver le mode mains libres et libérer la ligne (retour au mode repos).

Réglage du volume du haut-parleur







Vous pouvez régler le volume du haut-parleur à l'aide des touches  et  situées autour de la touche  .

Le niveau de réglage du haut-parleur en mains libres est visualisable sur l'écran.

Réglages de la sonnerie

Réglages de la sonnerie

Vous pouvez choisir une mélodie et régler le volume de sonnerie. Vous pouvez également couper la sonnerie (**Silencieux**).

1. Appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Sélectionner **Régl. Téléphone** et appuyer sur la touche **Select**.
3. Appuyez sur la touche **Select** pour sélectionner **Sonnerie**. Appuyez une nouvelle fois sur la touche **Select** pour choisir **Mélodie**. Appuyez plusieurs fois sur les touches  pour sélectionner la mélodie de votre choix parmi les 10. À chaque pression sur les touches , le téléphone sonne pour vous faire entendre la mélodie choisie.
4. Appuyez sur la touche de fonction **Select** pour confirmer votre choix.
5. Appuyez sur la touche  pour choisir **Volume** puis confirmez avec la touche de fonction **Select**.
6. Quatre réglages sont disponibles : (Silencieux) et les niveaux de sonnerie de faible à fort (1 à 3). À chaque pression sur les touches , le téléphone sonne pour vous faire entendre le niveau de volume choisi puis appuyez sur la touche **Select** pour confirmer votre choix.
7. Appuyez sur la touche  pour choisir **Indicateur LED** puis confirmez avec la touche de fonction **Select**.
8. Appuyez sur les touches  pour choisir **Activer** ou **Désactiver** la fonctionnalité, puis appuyez sur la touche de fonction **Select**.

Activer : sur le devant de la base, les LEDS clignoteront lorsque le téléphone sonnera

Désactiver : sur le devant de la base, les LEDs ne clignoteront pas lorsque le téléphone sonnera.

ATTENTION : le volume de sonnerie est très puissant, et peut entraîner des pertes d'audition. Ne placez jamais votre oreille trop près du haut-parleur.

Touches mémoires Photo

Touches mémoires Photos et indirectes


Le téléphone vous permet de programmer 3 numéros que vous utilisez fréquemment en mémoires photo et 10 mémoires indirectes dans les chiffres de 0 à 9.



Chaque mémoire peut enregistrer un numéro comportant jusqu'à 20 chiffres.


Attention : en affectant un numéro de téléphone à ses mémoires, le numéro sera automatiquement enregistré dans votre répertoire.

Affecter un numéro à une touche Mémoire Photo ou indirecte

1. En mode raccroché, utilisez le clavier numérique pour composer le numéro que vous voulez enregistrer. La touche **Effacer** vous permet de modifier la saisie.
2. Appuyez sur une des touches mémoires photos ou le numéro de votre mémoire indirecte et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche alors **Num** ainsi que le numéro de téléphone. Appuyez sur **Sauver** ou **Effacer** pour modifier.
3. L'écran affiche alors **Nom**: entrez le nom que vous voulez associer à ce numéro. La touche **Effacer** vous permet de modifier la saisie.
4. Appuyez sur la touche **Sauver** pour confirmer votre choix.
5. Choisissez la mélodie que vous désirez affecter à ce numéro en utilisant les touches , et appuyer sur Select pour valider.

Remarque: Si vous entendez un bip, cela signifie qu'il y a déjà un numéro enregistré.


Utiliser une mémoire photo ou mémoire indirecte

A partir de l'écran de veille, appuyez sur l'une des touches mémoires photo ou le nombre de votre mémoire indirecte pendant 2 secondes. L'écran affiche alors le numéro correspondant. Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche  pour composer le numéro.

Utiliser les options pour une Mémoire photo ou indirecte

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur l'une des touches mémoires photos ou le nombre de votre mémoire indirecte pendant 2 secondes.
2. Appuyez sur la touche **Options** pour sélectionner l'option de votre choix :
 - **Ecouter le nom vocal** : Permet d'écouter les informations associées au contact sélectionné, par synthèse vocale. Le nom vocal si un enregistrement vocal du nom a été fait (voir ci-après « Enreg Le nom »), sinon, il annoncera uniquement le numéro.
 - **Enregistrer un nom vocal** : permet de faire un enregistrement vocal du nom pour le contact de la mémoire sélectionnée. (Vous avez au maximum 20 secondes pour le nom vocal).
 - **Effacer le nom vocal** : permet de supprimer le nom vocal que vous avez enregistré pour le contact sélectionné.
 - **Modifier** : permet de modifier le contact sélectionné.
 - **Supprimer** : permet de supprimer la mémoire photo que vous avez sélectionnée.

Remarque :

- Si vous avez enregistré un nom vocal pour un contact, le symbole  s'affiche en bas à gauche de l'écran.
- Si vous n'entendez pas le nom ou numéro vocalement, vérifier les réglages vocaux.

Fonction rappel « R »

Une fois la communication établie, une pression sur la touche **R** (repair 11) déclenche la fonction rappel. Cette fonction vous donne accès à certains services proposés par votre opérateur (ou votre PABX) ; par exemple le double appel, la conversation à 3, le transfert d'appel

Pour en savoir plus sur les services, contactez votre opérateur téléphonique.

Remarque :

*Le temps du Flash de coupure de ligne pour le rappel **R** doit être réglé à 300ms pour la **France**. (Par défaut dans le menu, Temps Flash =>300ms)*

Affichage du numéro de l'appelant


Affichage du numéro de l'appelant

Ce téléphone affiche automatiquement le numéro / nom de l'appelant, ainsi que la date et l'heure de l'appel. Le journal des appels peut enregistrer jusqu'à 30 entrées de 15 chiffres.



Les entrées du journal peuvent être transférées vers le répertoire (ou liées avec sa liste des contacts du répertoire => nom+ information vocale du contact).

Important: pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez avoir souscrit au service de présentation du numéro / nom auprès de votre opérateur.


Consultation du journal des appels entrants

Utilisez les touches  pour parcourir le journal. Les appels sont affichés par ordre chronologique.

Appel d'un numéro à partir du journal des appels entrants

1. Utilisez les touches  pour sélectionner le numéro souhaité.
Ensuite;
2. Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche  pour composer ce numéro.

Options du journal des appels entrants

1. Utilisez les touches  pour sélectionner le contact souhaité.
2. Appuyez sur la touche **Options** pour choisir l'option de votre choix :
 - **Supprimer** : permet de supprimer le contact sélectionné du journal.
 - **Tout Supprimer** : permet de supprimer toutes les entrées du journal.
 - **Ajouter un contact** : permet d'ajouter des numéros au répertoire du téléphone.
 - **Ajout au bloqué** : permet d'ajouter des numéros à liste des numéros bloqués.

Remarque : si vous sélectionnez l'option **Tout Effacer**, l'écran affichera le message « Confirmer ? », pour vous inviter à confirmer votre choix. Appuyez sur la touche **Select** pour confirmer ou **Retour** pour annuler.

Répertoire téléphonique

Répertoire téléphonique

Votre téléphone possède un répertoire (30 contacts maximum) qui vous permet d'enregistrer les numéros et noms des contacts que vous appelez le plus souvent: vous ne risquez plus de les oublier, et vous n'aurez plus à les composer au clavier !

Tableau des caractères

Pour saisir un caractère, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche correspondante, en vous aidant du marquage sur le clavier ou du tableau suivant : une pression pour saisir le premier caractère de la touche, deux pressions pour le deuxième caractère et ainsi de suite.


Touches Caractères, par ordre d'affichage

| Touche | Édition alphanumérique en mode majuscule (Pour le nom du répertoire édition et renommer le combiné) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Chiffre (pour l'édition numéro de téléphone, date / heure édition) |
|---------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Appuyez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 1 | 1 | . | , | : | ; | ! | i | ? | ¿ | * | # | & | % | \$ | € | £ | @ | ° | § | | | 1 |
| 2 | A | B | C | 2 | À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | Ć | Č | | | | | | | | 2 |
| 3 | D | E | F | 3 | Ď | È | É | Ê | Ë | Ě | Ė | Ė | | | | | | | | | | 3 |
| 4 | G | H | I | 4 | Ğ | Ì | Í | Î | Ï | Ĭ | Ĳ | | | | | | | | | | | 4 |
| 5 | J | K | L | 5 | Ł | Ł | Ł | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 6 | M | N | O | 6 | Ń | Ń | Ń | Ô | Ó | Ô | Õ | Ö | | | | | | | | | | 6 |
| 7 | P | Q | R | S | 7 | Ř | Ř | Š | Š | Š | ß | | | | | | | | | | | 7 |
| 8 | T | U | V | 8 | Ť | Ů | Ú | Ů | Ů | Ů | Ů | Ů | | | | | | | | | | 8 |
| 9 | W | X | Y | Z | 9 | Ű | Ý | Ý | Ý | Ý | Ž | Ž | Ž | | | | | | | | | 9 |
| 0 | espace | 0 | - | + | = | _ | (|) | " | ' | [|] | { | } | < | > | / | \ | ^ | ~ | | 0, P (Pause) |
| * | Appuyez sur la touche pour basculer du mode majuscule en minuscule et vise et versa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * |
| # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # |
| Touche | Édition alphanumérique en mode minuscule (Pour le nom du répertoire édition et renommer le combiné) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Chiffre (pour l'édition numéro de téléphone, date / heure édition) |
| Appuyez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 1 | 1 | . | , | : | ; | ! | i | ? | ¿ | * | # | & | % | \$ | € | £ | @ | ° | § | | | 1 |
| 2 | a | b | c | 2 | à | á | â | ã | ä | å | æ | ç | ć | č | | | | | | | | 2 |
| 3 | d | e | f | 3 | ď | è | é | ê | ë | ě | ė | ė | | | | | | | | | | 3 |
| 4 | g | h | i | 4 | ğ | ì | í | î | ï | ĭ | ĳ | | | | | | | | | | | 4 |
| 5 | j | k | l | 5 | ł | ł | ł | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 6 | m | n | o | 6 | ñ | ń | ň | ò | ó | ô | õ | ö | ø | | | | | | | | | 6 |
| 7 | p | q | r | S | 7 | ř | ř | š | š | š | ß | | | | | | | | | | | 7 |
| 8 | t | u | v | 8 | ť | ů | ú | ů | ů | ů | ů | ů | | | | | | | | | | 8 |
| 9 | w | x | y | z | 9 | Ű | ý | ý | ý | ý | ž | ž | ž | | | | | | | | | 9 |
| 0 | espace | 0 | - | + | = | _ | (|) | " | ' | [|] | { | } | < | > | / | \ | ^ | ~ | | 0, P (Pause) |
| * | Appuyez sur la touche pour basculer du mode majuscule en minuscule et vise et versa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * |
| # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # |



Remarque :

- Si vous devez taper deux fois la même lettre, ou taper une autre lettre à l'aide de la même touche, il vous suffit d'attendre quelques secondes : le curseur passera automatiquement au caractère suivant.
- Si vous faites une erreur pendant la saisie du nom ou du numéro, vous pouvez appuyer sur la touche de fonction **Effacer** pour corriger. À chaque pression sur cette touche, le caractère précédant le curseur est effacé.


Ajouter un contact dans le répertoire

1. À partir de l'écran de veille, composez le numéro de téléphone du nouveau contact (20 chiffres maximum), puis appuyez sur la touche **Sauver**. La touche **Effacer** vous permet de modifier la saisie.
2. L'écran affiche alors **Num** et le numéro du contact. Appuyez sur **Sauver** pour confirmer.
3. L'écran affiche alors **Nom** : Saisissez le nom du contact que vous voulez utiliser puis appuyez sur la touche de fonction **Sauver** pour confirmer. La touche **Effacer** vous permet de modifier la saisie.
4. Choisissez la mélodie que vous désirez affecter à ce numéro en utilisant les touches  puis appuyez sur **Select** pour valider.


Consultation du répertoire

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche **Contact** pour accéder au répertoire téléphonique.
2. Appuyez plusieurs fois sur les touches  jusqu'à sélectionner le contact souhaité.
3. Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche  pour composer le numéro.

Remarque :

- Si vous avez activé la fonctionnalité **CID vocal**, à chaque pression sur les touches , le téléphone annoncera le nom vocal ou le numéro du contact en surbrillance.
- Une recherche alphanumérique sur le nom se fait en pressant la touche de numérotation dont le lettrage correspond à la première lettre du nom (recherche uniquement sur le 1^{er} caractère).

Utilisation des options du répertoire

1. Appuyez sur la touche de fonction **Contact** pour accéder au répertoire téléphonique.
2. Appuyez plusieurs fois sur les touches  jusqu'à sélectionner le contact de votre choix.
3. Appuyez sur la touche **Options** pour sélectionner l'option de votre choix :
 - **Ecouter le Nom** : Si un enregistrement vocal du nom a été fait (voir ci-après - Enreg Le nom), cela vous permet d'écouter les informations associées au contact sélectionné par synthèse vocale. Sinon, il annoncera uniquement le numéro.
 - **Enreg le Nom vocal** : permet de faire un enregistrement vocal du nom pour le contact sélectionné du répertoire. (Vous avez au maximum 20 secondes pour le nom vocal).
 - **Effacer le Nom vocal** : permet de supprimer le nom vocal que vous avez enregistré pour le contact sélectionné.
 - **Modifier** : permet de modifier le contact sélectionné.
 - **Supprimer** : permet de supprimer le contact sélectionné.

Remarque :

Si vous avez enregistré un nom vocal pour un contact, le symbole




s'affiche en bas à gauche de l'écran.

Accès aux fonctions du menu

Navigation dans les menus

Accéder aux options des menus :

1. Pour afficher la liste déroulante d'un menu, appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Pour parcourir les options du menu, utilisez les touches .
3. Pour sélectionner une fonction ou un réglage du menu, appuyez sur la touche de fonction **Select** lorsque le menu de votre choix apparaît en surbrillance.
4. Répétez l'opération si nécessaire.

Quitter un menu :

Si vous appuyez sur la touche **Retour**, le téléphone reviendra à l'écran précédent.

Détail des menus


| | |
|-------------------------------|---|
| Rég Ecran | Langages (voir page 29) Format heure (voir page 29) Format date (voir page 30) Heure & Date (voir page 30) Contraste (voir page 31) Rétroéclairage (voir page 31) Dim: X → x (voir page 31) |
| Rég Téléphone | Sonnerie (voir page 32) Bip Clavier (voir page 32) Mode Amplifié (voir page 33) Tonalité combiné (voir page 33) Temps flash (voir page 33) Menu Verrouillé (voir page 34) Raccroché Auto (voir page 34) |
| Réglages Vocaux | Clavier Vocal (voir page 35) CID vocal (voir page 35) Menu Vocal (voir page 35) |
| Réglages SOS | Numéros SOS (voir page 38) Message SOS vocal (voir page 38) Code SOS (voir page 39) SOS Température (voir page 40) Capteur d'Alerte (voir page 41) |
| Nouveau Dispositif SOS | (voir page 38) |
| Numéros Bloqués | Ajouter Numéro (voir page 44) Réglages (voir page 44) Bloquer liste (voir page 44) |

Réglage de l'afficheur



Cette fonctionnalité vous permet de personnaliser les réglages de l'écran, pour adapter l'affichage à vos goûts et à vos besoins (langue, contraste, format de l'heure, format de la date, réglage de l'heure et de la date, rétroéclairage et la dimension des caractères).

Choix du langage

Le téléphone propose un affichage dans six langues prédéfinies : **Anglais, Français, Allemand, Néerlandais, Italien et Espagnole**. Vous pouvez modifier la langue d'affichage des textes des menus.

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur la touche **Select** pour sélectionner «**Régl. Ecran**».
3. Appuyez sur la touche **Select** pour sélectionner «**Langages**».
4. Appuyez plusieurs fois sur les touches  pour parcourir les langues. Appuyez sur la touche de fonction **Select** pour sélectionner la langue de votre choix.



Réglage du format de l'heure

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur la touche **Select** pour sélectionner «**Régl. Ecran**».
3. Appuyez plusieurs fois sur les touches  pour sélectionner l'option «**Format Heure**», puis appuyez sur la touche de fonction **Select**.
4. Appuyez sur les touches  pour sélectionner le format «**12 Heures**» ou «**24 Heures**», puis confirmez avec **Select**.

Remarque: Si vous avez choisi le format «**12 heures**», les lettres **AM** ou **PM** s'afficheront à droite de l'heure sur l'écran de veille.




Réglage du format de la date

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur la touche **Select** pour sélectionner «**Régl. Ecran**».
3. Appuyez plusieurs fois sur les touches  pour sélectionner l'option «**Format Date**», puis appuyez sur la touche de fonction **Select**.
4. Appuyez sur les touches  pour sélectionner le format «**MM / JJ**» ou «**JJ / MM**», puis confirmez avec **Select**.

Réglage de la date et de l'heure


Lorsque le téléphone est en veille, l'écran affiche la date et l'heure. Le réglage se fera automatiquement avec le premier appel reçu par la fonction identifiant de l'appelant si vous avez souscrit à ce service, sinon ce réglage peut également se faire par le menu du téléphone de la manière suivante.

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur la touche **Select** pour sélectionner «**Régl. Ecran**».
3. Appuyez plusieurs fois sur les touches  pour sélectionner l'option «**Heure / Date**», puis appuyez sur la touche de fonction **Select**.

Procédure pour un format de l'heure en 24H :

4. Entrez l'heure exacte à l'aide du clavier numérique.
5. Entrez le jour et le mois à l'aide du clavier numérique.
6. Entrez l'année à l'aide du clavier numérique, puis appuyez sur la touche **Sauver**.



Procédure pour un format de l'heure en 12H :

4. Entrez l'heure exacte à l'aide du clavier numérique puis **AM** ou **PM** clignote, vous avez 3 secondes pour modifier le mode à l'aide des touches .
5. Entrez le jour et le mois à l'aide du clavier numérique.
6. Entrez l'année à l'aide du clavier numérique, puis appuyez sur la touche **Sauver**.



Réglage de l'afficheur

Remarque : Vous pouvez choisir le format de la date et de l'heure. Consultez la section *Réglage du format de l'heure et Réglage du format de la date*.



Réglage du contraste de l'écran

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur la touche **Select** pour sélectionner «**Régl. Ecran**».
3. Appuyez sur la touche  pour sélectionner le choix «**Contraste**» puis sur **Select**.
4. Appuyez sur les touches  pour choisir l'un des 6 niveaux de contraste disponibles, puis appuyez sur la touche **Select**.

Réglage du rétroéclairage

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur la touche **Select** pour sélectionner «**Régl. Ecran**».
3. Appuyez sur la touche  pour sélectionner le choix «**Rétroéclairage**» puis sur **Select**.
4. Appuyez sur les touches  pour choisir **Arrêt après 10 sec** (le rétroéclairage s'éteint après 10 secondes d'inactivation) ou **Toujours Activer** (le rétroéclairage reste toujours allumé) puis appuyez sur **Select** pour confirmer.

Agrandir la taille des caractères

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur la touche **Select** pour sélectionner «**Régl. Ecran**».
3. Appuyez plusieurs fois sur les touches  pour sélectionner l'option «**Dim:X → x**», puis appuyez sur la touche de fonction **Select**.
4. Appuyez plusieurs fois sur les touches  pour choisir **Activer** ou **Désactiver** la fonctionnalité, puis appuyez sur la touche de fonction **Select**.







Remarque : Si vous avez choisi d'activer la fonction, lorsque vous composez un numéro en pré numérotation, la taille des caractères sera automatiquement réduite si le numéro comporte plus de 8 chiffres.

Réglages du téléphone




Cette fonctionnalité vous permet de personnaliser les réglages du téléphone, pour adapter la sonnerie, l'amplification automatique, la tonalité à votre goût et à vos besoins (Sonnerie, Bip clavier, Mode amplifié, tonalité Combiné, Temps flash, verrouillage du menu et raccroché automatique).

Réglage du Volume et de la Mélodie de sonnerie

Ce menu vous permet de régler la mélodie, le volume ainsi que l'indicateur de sonnerie.




1. Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner «**Régl. Téléphone**». Puis appuyez sur **Select**.
3. Appuyez sur **Select** pour sélectionner «**Sonnerie**».
4. Appuyez sur **Select** pour sélectionner «**Mélodie**».
5. Appuyez sur les touches  pour choisir l'une des 10 mélodies de sonnerie disponibles, puis appuyez sur la touche **Select**.
6. Appuyez sur la touche  pour sélectionner «**Volume**» puis appuyez sur **Select**.
7. Appuyez sur les touches  pour choisir l'un des 4 niveaux de sonnerie disponibles, puis appuyez sur la touche **Select**.
8. Appuyez sur la touche  pour sélectionner «**Indicateur LED**» puis appuyez sur **Select**.
9. Appuyez sur les touches  pour sélectionner **Activer** ou **Désactiver** les voyants lumineux durant la sonnerie puis confirmez avec **Select**.

Réglage du bip clavier

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner «**Régl. Téléphone**». Puis appuyez sur **Select**.
3. Appuyez sur la touche  pour sélectionner «**Bip Clavier**» puis appuyez sur **Select**.
4. Appuyez sur les touches  pour sélectionner **Activer** ou **Désactiver** les Bips Clavier puis confirmez avec **Select**.

Réglage de l'amplification du combiné




Cette fonction vous permet d'activer automatiquement l'amplification du combiné à chaque décroché.

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner «**Régl. Téléphone**». Puis appuyez sur **Select**.
3. Appuyez sur la touche  pour sélectionner «**Mode Amplifié**» puis appuyez sur **Select**.
4. Appuyez sur les touches  pour sélectionner **Activer** ou **Désactiver** la fonction puis confirmez avec **Select**.

REMARQUE : Pour des raisons de sécurité auditive, réglez l'amplification automatique du volume sur **Désactiver** si des personnes entendant ou malentendant utilisent le téléphone.

Réglage de la tonalité d'écoute du combiné



Cette fonction vous permet de choisir la tonalité d'écoute du combiné.

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner «**Régl. Téléphone**». Puis appuyez sur **Select**.
3. Appuyez sur la touche  pour sélectionner «**Tonalité Combiné**» puis appuyez sur **Select**.
4. Appuyez sur les touches  pour sélectionner le type de correction de tonalité que vous souhaitez (**Grave+**, **Grave**, **Normal**, **Aigu** ou **Aigu+**) puis confirmez avec **Select**.

REMARQUE : Les réglages améliorent les sons, ce qui peut contribuer à rendre les appels plus clairs.

Réglage du temps Flash de coupure (rappel R)




Permet d'accéder à certains services proposés par votre opérateur (double appel, conversation à trois, transfert d'appel)

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur la touche  puis **Select** pour choisir «**Régl. Téléphone**».
3. Appuyez sur les touches  Pour sélectionner «**Temps Flash**», puis confirmez avec **Select**. L'écran affiche alors les réglages enregistrés.

4. Appuyez sur les touches  pour choisir le temps de coupure: **100ms**, **300ms** (France) ou **600ms** puis confirmez avec **Select**.





Verrouillage du Menu

Cette fonction vous permet de bloquer l'accès au Menu. Pour accéder au menu, vous devrez rester appuyer sur la touche Menu pendant 3 secondes.

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner «**Régl. Téléphone** ». Puis appuyez sur **Select**.
3. Appuyez sur la touche  pour sélectionner «**Menu Verrouillé**» puis appuyez sur **Select**.
4. Appuyez sur les touches . Pour sélectionner **Activer** ou **Désactiver** la fonction puis confirmez avec **Select**.

Raccroché Automatique



Cette fonction permet le raccrocher automatique du téléphone au bout de 10 secondes si la tonalité de raccrocher est détectée. Si la ligne de votre correspondant est occupée ou si le combiné a mal été reposé, cela évitera dans ce cas d'avoir votre ligne toujours occupée. Si le signal de raccroché n'est pas détecté par le téléphone, vous pouvez forcer le raccrocher après 30 ou 60 minutes.

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur la touche  puis **Select** pour choisir «**Régl. Téléphone** ».
3. Appuyez sur les touches  pour sélectionner «**Raccroché Auto**», puis confirmez avec **Select**.
4. Appuyez sur les touches  pour choisir **Activer** ou **Désactiver** la fonction Raccroché Auto puis confirmez avec **Select**.
5. Après avoir choisi **Activer**, appuyez sur les touches  Pour choisir **30 Min** ou **60 min** puis appuyez sur **Select** pour confirmer.

Réglages vocaux

Numérotation vocale



En mode pré-numérotation, cette fonctionnalité vous permet d'entendre par annonce vocale le numéro que vous composez sans avoir à vérifier à l'écran.

1. Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur la touche  puis **Select** pour choisir «**Régl. Vocaux**».
3. Appuyez sur **Select** pour sélectionner «**Clavier vocal**».
4. Utilisez les touches  pour choisir **Activer** ou **Désactiver** la fonction puis appuyez sur la touche **Select** pour confirmer.


Identité vocale

La fonction Identité vocale permet la vocalisation des contacts du répertoire, des numéros dans le journal et du numéro de l'appel entrant (ou du nom vocal si associé aux contacts du répertoire); cette fonctionnalité vous permet donc de connaître le numéro (ou le nom) du correspondant lorsque vous recevez un nouvel appel, sans avoir à regarder l'écran.




Si ce numéro de téléphone reçu est enregistré dans votre répertoire avec un nom vocal associé, le téléphone annoncera automatiquement le nom vocal associé au numéro (et non le numéro) suivie d'un train de sonnerie.

1. Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur la touche  puis **Select** pour choisir «**Régl. Vocaux**».
3. Appuyez sur **Select** pour sélectionner «**CID vocal**» et appuyez sur la touche **Select** pour valider.
4. Utilisez sur les touches  Pour choisir **Activer/Désactiver** la fonction puis appuyez sur la touche **Select** pour confirmer.

Menu vocal

Le téléphone peut lire à voix haute les différentes fonctions du menu. En faisant défiler les menus à l'aide des touches , votre téléphone vous donnera à voix haute la fonction.

Pour activer cette fonctionnalité :

1. Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur les touches  pour sélectionner «**Régl Vocaux**», puis sur **Select**.
3. Appuyez sur les touches  pour sélectionner «**Menu Vocal**», puis appuyez sur la touche **Select**.
4. Utilisez sur les touches  pour choisir **Activer** ou **Désactiver** la fonction puis appuyez sur la touche **Select** pour confirmer.

Réglages de la fonction SOS

Aide à la Personne: Réglage de la fonction SOS

Cette fonction permet aux personnes à mobilité réduite ou atteintes de problèmes de santé d'alerter facilement un proche en cas de malaise ou de chute.

Le système d'appel d'urgence comprend une annonce vocale (SOS) et une numérotation en boucle (3 boucles maximum) de 5 numéros différents jusqu'à l'aboutissement de l'appel.

Une simple pression sur le bouton de la télécommande d'urgence (ou sur le bouton **SOS** de la base) déclenche le cycle d'appel d'urgence sur le premier numéro SOS enregistré.

En cas d'erreur, appuyez sur la touche haut parleur 2 fois ou pendant 3 secondes sur la touche SOS pour stopper l'appel d'urgence.

(La portée de la télécommande est de 20 à 30 mètres suivant l'environnement).

L'annonce SOS pourra alors être écoutée par la première personne qui décrochera sur le cycle d'appel d'urgence.

Cette annonce sera transmise après le décroché de l'appel et la personne devra alors confirmer la réception de l'appel d'urgence en appuyant sur la touche 0 du clavier pendant l'annonce SOS, ce qui permettra d'arrêter le cycle de numérotation SOS, de valider le mode Mains libres et d'autoriser la conversation en mains libres.



(Ré-appuyer plusieurs fois sur la touche 0 si l'annonce continue).

Sinon la ligne sera coupée et le numéro SOS suivant sera composé automatiquement.

IMPORTANT :

- *L'adaptateur secteur doit être branché pour assurer le fonctionnement du téléphone en appel d'urgence.*
- *En cas de coupure secteur, les batteries rechargeables sont nécessaires pour assurer le fonctionnement du système.*
- *Les Box ADSL ne garantissent pas une qualité de service compatible avec la fonction d'appel d'urgence.*
- *Cette fonction n'est garantie que si l'appareil est connecté au réseau téléphonique commuté RTC.*
- *Ensuite, toutes les 1 minute 50, l'appelant entendra des bips. Il lui faudra alors appuyer sur la touche 0 pour continuer la conversation. S'il n'appuie pas sur une touche, la communication sera coupée automatiquement 10 secondes après.*




Enregistrer des Numéros SOS (5 maxi)

1. Appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Appuyez sur les touches  pour sélectionner «**Régl SOS**», puis sur **Select**.
3. Appuyez sur la touche **Select** pour sélectionner «**Numéros SOS**».
4. Le téléphone possède 5 emplacements mémoires paramétrables pour les numéros SOS (1 à 5). Appuyez sur les touches . Pour choisir une touche mémoire, puis sur **Select**.
5. Utilisez le clavier numérique pour entrer le numéro (16 chiffres maximum pour chaque mémoire). Vous pouvez à tout moment utiliser la touche **Effacer** pour supprimer le chiffre précédent si nécessaire.
6. Appuyez sur la touche **Sauver** pour enregistrer le numéro.

Enregistrer un Message vocal SOS

Exemple d'annonce SOS : «*Allo, c'est mamie, j'ai besoin d'aide, appuyez sur la touche 0 pour me parler et confirmer que vous avez bien reçu mon appel de détresse*».



Votre téléphone permet d'enregistrer un message SOS (jusqu'à 20 secondes).

1. Appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Appuyez sur les touches  pour sélectionner «**Régl SOS**», puis sur **Select**.
3. Appuyez sur la touche  pour sélectionner «**MSG SOS Vocal**», puis sur **Select**.
4. Appuyez sur la touche  pour sélectionner «**Enregistrer MSG SOS**», puis appuyez sur la touche de fonction **Select** pour confirmer votre choix. Après le bip sonore vous disposez maintenant de 20 secondes pour enregistrer un message. Appuyez sur la touche **Select** une fois l'enregistrement terminé.

N'oubliez pas d'informer les personnes appelées qu'après 1min 50, ils entendront des bips et qu'il faudra appuyer de nouveau sur la touche 0 sinon l'appel se terminera.



Vérification de message vocal SOS

Cette fonction vous permet d'écouter le message diffusé lorsque la fonction SOS est activée.

1. Appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Appuyez sur les touches  pour sélectionner «**Régl SOS**», puis confirmez avec **Select**.
3. Appuyez sur la touche  pour sélectionner «**MSG SOS Vocal**», puis sur **Select**.
4. Appuyez sur la touche **Select** pour sélectionner «**Ecouter SOS**». Vous pouvez appuyer sur la touche **Select** pour stopper la lecture en cours.

Suppression du message vocal SOS

Cette fonction vous permet d'effacer le message que vous avez enregistré et revenir au message par défaut.

1. Appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Appuyez sur les touches  pour sélectionner «**Régl SOS**», puis confirmez avec **Select**.
3. Appuyez sur la touche  pour sélectionner «**MSG SOS Vocal**», puis sur **Select**.
4. Appuyez sur la touche **Select** pour sélectionner «**Effacer MSG**». Un bip est émis pour vous signaler que votre annonce est supprimée.



Code sécurité

Cette fonction permet à quelqu'un d'extérieur d'appeler la personne dont elle a la charge de la surveillance et de converser avec celle-ci. (La personne à mobilité réduite ne doit pas se déplacer pour décrocher : Le décrochage à distance se fait automatiquement).

Après avoir défini le «**Code SOS**», vous pouvez utiliser la fonction. Le téléphone décroche automatiquement la ligne en mode mains libres après 10 sonneries puis l'appareil émet des "**bip-bip**" pour inviter l'appelant à saisir le code de sécurité pour autoriser la communication.






Une fois le code de sécurité composé et reconnu, la conversation peut commencer.

Réglages de la fonction SOS

1. Appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Appuyez sur les touches  pour sélectionner «**Régl SOS**», puis confirmez avec **Select**.
3. Appuyez sur les touches  pour sélectionner «**Code SOS**», puis sur **Select**.
4. L'écran affiche le code de sécurité actuel. Saisissez le nouveau code à 4 chiffres que vous voulez utiliser, et confirmez avec la touche **Sauver**.



Alerte de température SOS

Cette fonction vous permet de régler une température de déclenchement basse et haute. Vous aurez la possibilité de choisir la fréquence des tests de 1 à 24 heures.

1. Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur les touches  pour sélectionner «**Régl SOS**», puis sur **Select**.
3. Appuyez sur les touches  pour sélectionner «**SOS Température** », puis appuyez sur la touche **Select**.
4. Utilisez les touches  pour choisir **Activer** ou **Désactiver** la fonction Température SOS puis appuyez sur la touche **Select** pour confirmer.
5. Une fois que vous avez choisi Activer, vous pouvez voir à l'écran **Temp min**, appuyez sur **Select** puis entrez là la température souhaitée à l'aide du clavier. Vous ne pouvez pas mettre plus de 20°C pour la température basse. Appuyez sur **Sauver**.
6. Appuyez sur la touche  pour afficher **Temp Maxi** puis sur la touche **Select**. Entrez la température souhaitée à l'aide du clavier. Vous ne pouvez pas mettre moins de 25°C pour la température haute. Appuyez sur **Sauver**.
7. Appuyez sur la touche  pour afficher **Durée 1 à 24H** puis sur la touche **Select**. Entrez la cadence souhaitée à l'aide du clavier entre 1 et 24h. Cette cadence permet de régler le temps entre 2 alarmes. Appuyez sur **Sauver**.
8. Appuyez plusieurs fois sur **Retour** pour sortir.

Fonction Capteur d'Alerte SOS

Cette fonction vous permet de connecter un capteur avec 2 types de détection (par contact ouvert ou fermé).

1. Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur les touches  pour sélectionner «**Régl SOS**», puis sur **Select**.
3. Appuyez sur les touches  pour sélectionner «**Capteur Alerte**», puis appuyez sur la touche **Select**.
4. Vous pouvez choisir le mode d'activation de votre capteur de détection, Réglage **Classique**, **Détection 24H** ou **Désactiver**.

Classique : Si contact, votre téléphone appellera le premier numéro SOS puis vous avertira par un message vocal qu'il s'agit d'une alerte capteur SOS.

Détection 24H : Votre téléphone lancera un appel SOS seulement s'il n'y a pas de détection pendant 24H.

Mode Activation : 2 types de détection sont disponibles.

NC (contact fermé) ou **NO** (contact ouvert)

Votre capteur doit être connecté au repaire 22.



Désactiver : La fonction est désactivée même si votre capteur est connecté.


5. Appuyez sur la touche **Select** pour valider.

Utilisation de votre Télécommande

Enregistrement de la télécommande

La télécommande est déjà enregistrée avec sa base. Si vous ne parvenez pas à utiliser la télécommande pour lancer l'appel SOS, ou si vous voulez enregistrer une nouvelle télécommande, appliquer la procédure suivante.

1. Appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Appuyez sur les touches  pour sélectionner «**Nouv dispositif**», puis sur **Select**.
3. Appuyez sur **Select** pour sélectionner «**Enregistrer**».
4. Sur l'écran vous avez le message «**Appairer**».
5. Appuyez sur le bouton  sur la télécommande à enregistrer.

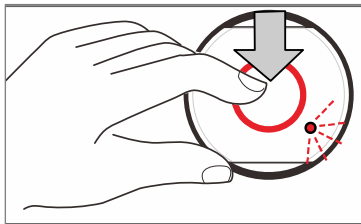



Remarque :

- Votre télécommande est IP67.
- La durée de vie de la pile est environ 24 mois suivant l'utilisation : vérifier périodiquement le fonctionnement correct de la pile et de la télécommande en déclenchant un appel d'urgence. (N'oubliez pas de stopper l'appel dans les 10 secondes avant que le cycle de numérotation commence).
- Lorsque la pile ou la télécommande est remplacée, la programmation avec la base est perdue. Vous devez réenregistrer la télécommande.
- Après changement de la pile **CR2430**, l'étanchéité de la télécommande n'est plus garantie.
- La portée de la montre est comprise entre 20 et 30 mètres.
- Il existe un autre type de télécommande à détection de chute, elle possède 2 façons pour lancer l'appel d'urgence :
 - La première en appuyant sur son bouton
 - La seconde en détectant une chute suivie d'une immobilisation au sol de 40 secondes minimum.

Suppression des télécommandes

Cette fonction vous permet de supprimer toutes les télécommandes enregistrées sur votre téléphone.

1. Appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Appuyez sur les touches  pour sélectionner «**Nouv dispositif**», puis sur **Select**.
3. Appuyez sur la touche  pour sélectionner «**Effacer ?**», puis sur **Select**.
4. Sur votre écran vous pouvez voir le message «**Tout effacer**» pour confirmer l'effacement.

Prendre un appel à l'aide de la télécommande

Lorsque vous recevez un appel et avez du mal à vous déplacer jusqu'à votre appareil, appuyez sur le bouton de votre télécommande et vous serez en communication en mode mains libres.

Attention :


Vous devez être à une distance inférieure à 3 mètres de votre téléphone pour pouvoir communiquer correctement en mode mains libres avec votre interlocuteur.

A la fin de la conversation, un appui long (3secondes) sur le bouton SOS de la base ou de la télécommande raccrochera l'appareil.

Réglages de la fonction blocage d'appel

Ajouter un numéro bloqué



Cette fonction vous permet de bloquer les appels entrants de différentes façons (les appels internationaux et privé, de tous les bloquer ou seulement votre liste de numéro définis).

1. Appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Appuyez sur les touches  pour sélectionner «**Numéros Bloqués**», puis sur **Select**.
3. Appuyez sur **Select** pour choisir **Ajouter numéro**.
4. Composez le numéro de téléphone que vous souhaitez bloquer puis appuyez sur la touche **Sauver**.


Remarque : N'ajoutez pas un numéro de téléphone de la liste des contacts, des touches photos ou un numéro SOS à la liste de blocage.

Vous entendrez un double bip si le numéro est dans une de vos mémoires.

Choix du mode de blocage




1. Appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Appuyez sur les touches  pour sélectionner «**Numéros Bloqués**», puis sur **Select**.
3. Appuyez sur la touche  pour choisir **Réglages** puis sur **Select**.

Appuyez sur les touches  pour choisir le mode de blocage, **Tout Bloquer**, **Bloquer liste**, **Inter et Privé** ou **Désactiver**.

Appuyez sur **Select** et choisissez Activer ou Désactiver à l'aide des touches  puis validez en appuyant sur **Select**.

Contrôle des numéros bloqués

Cette fonction vous permet de visualiser la liste des numéros bloqués.

1. Appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Appuyez sur les touches  pour sélectionner «**Numéros Bloqués**», puis sur **Select**.
3. Appuyez sur les touches  pour sélectionner «**Liste Bloqué**», puis sur **Select**.
4. Appuyez sur les touches  pour faire défiler la liste des numéros bloqués.

Remarque : En appuyant sur **Options**, vous pouvez supprimer un numéro ou tous les contacts de la liste.


Appuyez sur les touches  pour choisir **Supprimer** ou **Tout supprimer** puis appuyez sur **Select**.


L'écran affiche «**Confirmer ?**», appuyez sur **Select** pour confirmer la suppression.


Utilisation des connecteurs audio

Utilisation des connecteurs audio

Vous avez 2 connecteurs audio situés à l'arrière de votre téléphone.

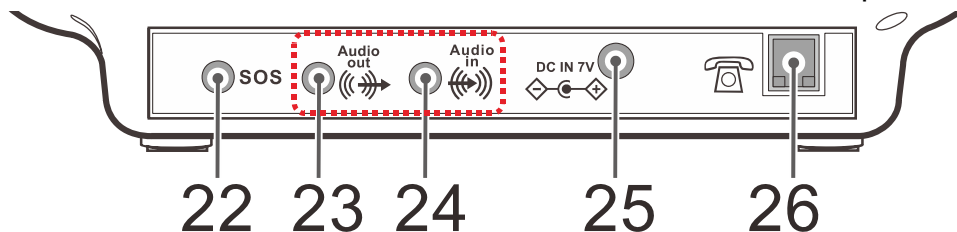

L'entrée audio 3.5mm en repaire 24  est pour connecter un signal audio entrant provenant d'un portable ou d'une tablette (écrire le texte puis l'envoyer en signal audio grâce à une application) pour l'écouter dans votre écouteur ou haut-parleur.

La sortie audio 3.5mm repaire 23  est pour connecter un signal sortant provenant de votre Sérénities 100 à un portable ou une tablette pour le convertir en texte grâce à une application avec le câble 4 contacts (fourni dans le Serenities 100 V2T).

Il vous suffira juste d'installer une application sur votre récepteur qui permet de transformer la voix en texte (par ex Transcription instantanée sur Google Play Store qui est gratuite sur Android).

Il vous faut utiliser le câble fourni dans la boîte pour le connecter à votre portable ou tablette.

Note : si vous entendez un buzz dans votre écouteur en connectant un système sur la sortie audio IN ou OUT, veuillez débrancher votre adaptateur secteur de la prise électrique ou en utilisez un de meilleur qualité.

Fonctions avancées

Double appel

- Lorsque vous êtes en communication avec votre interlocuteur N°1.
- Vous êtes averti de l'arrivée d'un second appel par un bip sonore. Les informations concernant cet interlocuteur N°2 (Numéro / nom) sont alors affichées.
- Vous pouvez prévenir votre interlocuteur N°1 de l'arrivée d'un autre appel.
- Appuyez sur la touche **R+** chiffre **2** pour prendre le nouvel appel. (Pendant ce temps, l'interlocuteur N°1 est mis en attente).
- Appuyez sur la touche **R+** chiffre **2** pour passer d'un correspondant à un autre.
- Une fois terminer votre appel avec la seconde personne, appuyez sur la touche **R**. (La conversation normale sera alors rétablie avec l'autre ligne).

Note : *si vous ne prenez pas l'interlocuteur N°2, ce dernier est enregistré dans le journal des appelants. Vous pourrez ainsi par la suite facilement le rappeler.*

Fonctions Principales

1. Double système d'identification de l'appelant FSK et DTMF.
2. Ecran extra large avec Identifiant de l'Appelant, Journal des appels reçus : 20 numéros, sortants jusqu'à 10 numéros.
3. Présentation du numéro / Signal d'appel.
4. Répertoire, jusqu'à 30 contacts.
5. Fonction amplification du combiné 40dB.
6. Entrée et sortie audio.
7. Compatible appareils auditifs.
8. Volume et tonalité réglable.
9. Sonnerie puissante réglable.
10. Clavier grandes touches.
11. Horloge temps réel indiquant la date, l'heure et le jour.
12. Rappel R, secret, mise en attente.
13. 3 touches photos de numérotation rapide.
14. Réglage du contraste de l'écran.
15. Réglage du format de la date et de l'heure.
16. Fonction Mains libres.
17. Fixation Murale.
18. Numérotation, menu et Identité vocale.
19. Fonction appel d'urgence avec 5 numéros SOS.
20. Enregistrement d'un message SOS.
21. Mode capteur SOS (Détection par contact ouvert ou fermé).
22. Mode d'alarme temperature.
23. Fonction blocage d'appel (tout, liste, privé et international).

Dépannage

Pas de tonalité

1. Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur, le cordon de ligne du téléphone et le cordon du combiné sont correctement raccordés.
2. Branchez un autre téléphone dans la prise murale, pour vérifier que votre ligne téléphonique fonctionne.

Absence de sonnerie

1. Vérifiez le branchement du cordon de ligne.
2. Vérifiez que le volume de la sonnerie n'est pas désactivé.
3. Un trop grand nombre d'appareils est peut-être raccordé à votre ligne. Essayez de débranchez quelques appareils.
4. Vérifiez que votre combiné est correctement repositionné sur la base ou que vous n'êtes pas en main libre.

Bruit, parasites, interférences pendant l'utilisation du combiné

1. Il est parfois nécessaire d'installer un autre filtre ADSL pour connecter le cordon PTT.
2. Vérifier si la base n'est pas trop proche d'un équipement pouvant perturber l'appareil par rayonnement électromagnétique (micro onde, ordinateur, boîte WiFi...).

L'identifiant de l'Appelant ne s'affiche pas

1. Vérifiez que vous avez bien souscrit au service de présentation du nom / du numéro auprès de votre opérateur.
2. Il est possible que la présentation ne fonctionne pas avec le téléphone relié à un central téléphonique privé ou derrière certaines boîtes ADSL.

CONDITIONS DE GARANTIE :

Geemarc garantit le SERENITIES 100 pour une durée de deux ans pièces et main-d'œuvre à partir de la date d'achat. Pendant cette période, Geemarc réparera (ou remplacera si nécessaire) votre appareil gratuitement. En cas de problème, n'hésitez pas à contacter notre service client ou à consulter notre site Internet sur **www.geemarc.com**.

La garantie ne couvre pas les accidents, les pièces cassées, les problèmes causés par l'orage, par les liquides renversés, ni par la négligence de l'utilisateur. Seuls les techniciens agréés Geemarc sont autorisés à intervenir sur votre appareil.

La garantie Geemarc ne limite en aucun cas les droits que vous accorde la loi.

Important : VOTRE FACTURE D'ACHAT EST UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DE VOTRE GARANTIE. ELLE VOUS SERA DEMANDÉE EN CAS D'INTERVENTION SOUS GARANTIE.

Remarque : La garantie s'applique uniquement en France.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ : Le SERENITIES 100 respecte les exigences de compatibilité électromagnétique et de sécurité électrique demandées par la directive européenne RED 2014 / 53 / UE.

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site :
www.geemarc.com



Exclusions de garantie :

Sont exclus de la garantie les pannes ou les dysfonctionnements dus :

- au non-respect des consignes d'installation et d'utilisation, où
- à une cause extérieure au matériel (choc, foudre, incendie, vandalisme, malveillance, dégât des eaux de toute nature, contacts avec des liquides divers ou tout agent nuisible, tension électrique non appropriée...), où
- à des modifications du matériel effectué sans accord écrit de **GEEMARC TELECOM** où
- à un défaut d'entretien courant, tel que décrit dans la documentation remise avec le matériel, de surveillance ou de soins, où
- aux mauvaises conditions de stockage, ou d'environnement du matériel (notamment celles liées aux conditions de température et d'hydrométrie, effets des variations de tensions électriques, parasites provenant du réseau électrique ou de la terre), où
- encore à une réparation, une intervention (ouverture ou tentatives d'ouverture du matériel) ou un entretien effectué par des personnes non-agrées par **GEEMARC TELECOM**.

Sous réserve des dispositions légales impératives, Geemarc Télécom n'assume aucune garantie, explicite ou implicite, autre que celle expressément prévue ci-dessus.

Notamment, GeemarcTélécom ne prend aucun engagement et ne consent aucune garantie sur la qualité ou la performance du matériel pour quel qu'usage particulier que ce soit.

La responsabilité de Geemarc Télécom, quelle qu'en soit la cause, est limitée au prix payé par le Client pour le matériel.

En aucun cas, Geemarc Télécom ne répondra des dommages moraux et/ou immatériels et/ou indirects (en ce compris notamment perte de commandes, perte de bénéfices, perte de données, manque à gagner, atteinte à l'image, interruption de service ou tout autre préjudice financier ou commercial) au titre ou non de la garantie.

Les dispositions ci-dessus sont applicables uniquement en France. Dans le cas où l'une de ces dispositions serait, en tout ou en partie, contraire à une règle impérative de droit dont pourraient bénéficier les consommateurs au titre de la législation française, cette disposition ne leur serait pas applicable, toutes les autres dispositions restant valables par ailleurs.

Recommandations pour le recyclage : La directive DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) a été mise en place dans le but d'assurer la collecte sélective en vue de la valorisation, réutilisation ou recyclage des produits en fin de vie.

Lorsque votre produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas dans votre poubelle ménagère.

Suivez l'une des procédures décrites ci-dessous :

- Déposez les batteries et votre ancien appareil dans un lieu de collecte approprié.
- Ou rapportez votre ancien appareil au magasin où vous achèterez le nouveau. Il devra l'accepter.

Ainsi, si vous respectez ces instructions vous faites un geste pour l'environnement et vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.



Raccordement électrique : l'appareil est prévu pour fonctionner avec un adaptateur secteur 230V 50Hz. (Tension classée "dangereuse" selon les critères de la norme EN62368-1) ou éventuellement 4 batteries rechargeables (type AAA 1.2V / 600 - 800mA).

Par précaution en cas de danger, le bloc alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230V. Il doit être installé à proximité du matériel et être aisément accessible.

Informations générales

Raccordement téléphonique : les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT-3 (Tension de Réseau de Télécommunication) au sens de la norme EN62368-1.

Ce produit respecte les exigences de compatibilité électromagnétique et de sécurité électrique demandées par la directive européenne RTTE. Par ailleurs, il est compatible avec les différents réseaux téléphoniques européens (normes TBR21 / 37 / 38).

Le fonctionnement de l'appareil n'est pas garanti si le courant de ligne est inférieur à 18 mA.



Consulter notre site Internet pour obtenir la notice détaillée ou des informations et de l'aide sur nos produits : **www.geemarc.com**



Email : **sav@geemarc.fr**

Téléphone : **03 28 58 75 99**

Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59760 Grande-Synthe,
France

Fabriqué en Chine pour Geemarc Telecom S.A.

Adaptateur AC / CC

| | |
|--|--|
| Fabricant | Shenzen YWK Electronics (Shenzen) co, Ltd 2/F Building 76, No.88 of industrial Zone, Xingtangkeng Village, Henggang street, 518106 Shenzen City, GuangDong, People's Republic of China. |
| Modèle : | YWK-AD070050-E |
| Entrée : Sortie : | 100-240V 50/60Hz;  CC7V  0.5A, 3.5W |
| Rendement moyen en mode actif | 75.40% |
| Rendement à faible charge (10%) | 68.03% |
| Consommation électrique hors charge | 0.053W |



UGSeren100_Fr_V1.4