

geemarc™ AMPLICALL™ 140
Hear the Difference

Alarma inalámbrica con sensor de sonido
(vigilabebés)



Español


Consulte nuestro sitio web: www.geemarc.com para obtener el manual de usuario actualizado, ya que es posible que haya actualizaciones y cambios importantes que deba conocer.


Contenido del embalaje

La caja del AC140 (AMPLICALLTM140) contiene los siguientes artículos:

- 1 estación base AC140
- 1 adaptador de corriente CA/CC de 5 V CC/1 A/1 W
- 1 adaptador de enchufe británico y 1 adaptador de enchufe VDE
- 1 microsensor (50 cm)
- 1 adhesivo de doble cara para el montaje del microsensor
- 1 cable externo con conector de 3,5 mm para el microsensor (1,5 m)
- 1 manual de usuario
- 2 tornillos y 2 tacos
- 1 plantilla de taladrado
- 2 iconos de timbre y 2 iconos de bebé

BESCHRIJVING

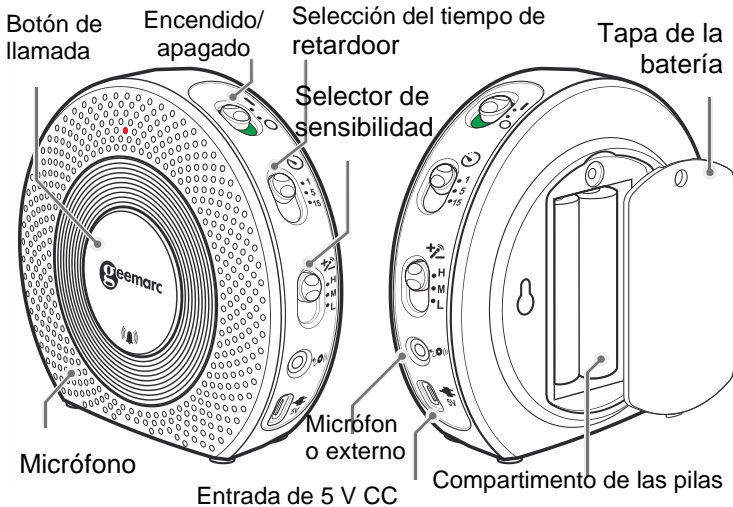


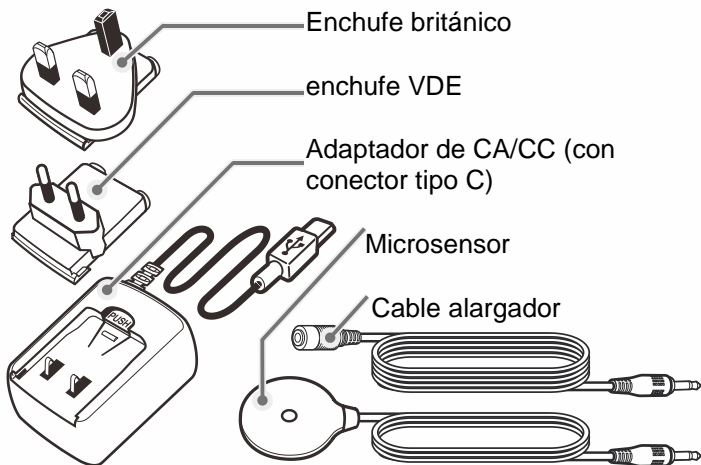


Conecta tu dispositivo

El AC140 se suministra con un adaptador de corriente. Debe conectarlo a la toma de CA/CC situada en la parte inferior derecha.

Si utiliza la fuente de alimentación de CA/CC, también debe colocar las pilas. **De lo contrario, aparecerá un mensaje en el AC140 indicando que la batería está casi agotada.**

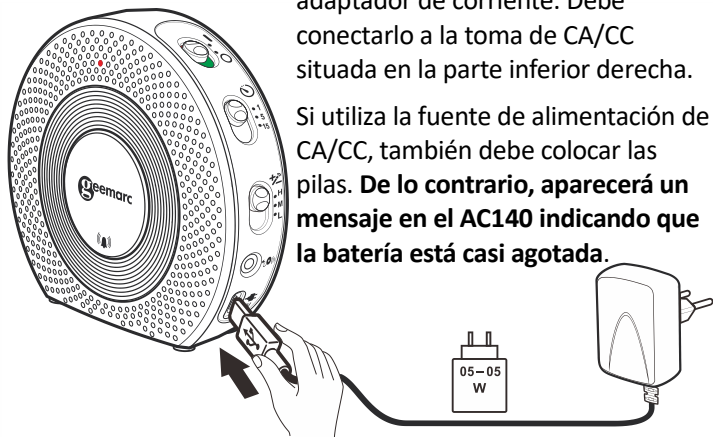

Puede introducir 2 pilas alcalinas AA de 1,5 V (no incluidas) si desea que el dispositivo funcione en modo de alimentación de emergencia o sin el adaptador de corriente. Siga el procedimiento que se indica a continuación para colocar las pilas.

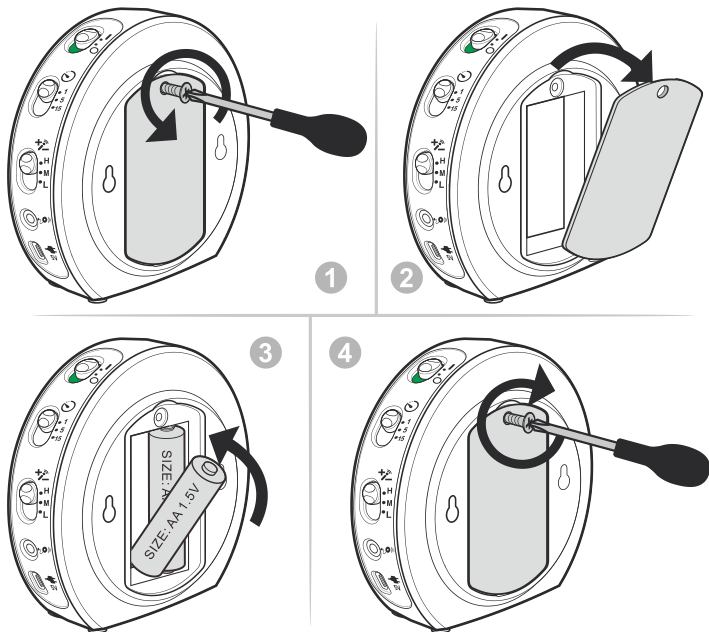

1. Desatornille el tornillo de la tapa del compartimento de las pilas.
2. Abra la tapa del compartimento de las pilas.
3. Coloque las 2 pilas alcalinas AA de 1,5 V respetando la polaridad.
4. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas.
5. Vuelva a atornillar el tornillo.

Emparejamiento con los receptores AMPLICALL

El AC140 funciona con los receptores AMPLICALL y debe emparejarse antes de poder utilizarlo.

Sigue estos pasos para emparejar un nuevo dispositivo:

1. Accede al modo de emparejamiento de los receptores AMPLICALL.

Mantenga pulsado el botón LEARNING (●) durante 3 segundos.


El LED del icono de zona n.º 1 comenzará a parpadear.

2. Vuelva a pulsar el botón LEARNING (●) para ir al icono de zona con el que desea emparejarlo.

Pulse el botón de selección de melodía () para desplazarse por las melodías. Cuando escuche una melodía que le guste, no pulse ningún botón mientras suena.

3. Una vez seleccionados el icono de zona y la melodía, pulse una vez el botón AC140 del dispositivo para realizar el emparejamiento. Si se realiza correctamente, los receptores AMPLICALL emitirán dos tonos cortos.

Pulse el botón LEARNING (●) para salir del modo de emparejamiento; el sistema ya está listo para su uso.

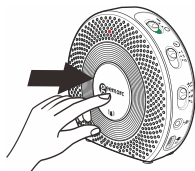


Configuración

Encendido/apagado: Coloque el interruptor en la posición «Apagado» (O) cuando no utilice el aparato.

Retardo: Con este interruptor puede ajustar un tiempo de retardo de 5, 10 o 15 segundos. Si selecciona 5 segundos, los receptores AMPLICALL se activarán tras detectar sonido continuo durante 5 segundos.


Sensibilidad: Con este selector puede ajustar la sensibilidad del micrófono a Alta, Media o Baja.

Mic. externo: puede conectar el micrófono externo a esta toma. El micrófono interno se desactiva cuando de externe microfoon is aangesloten.

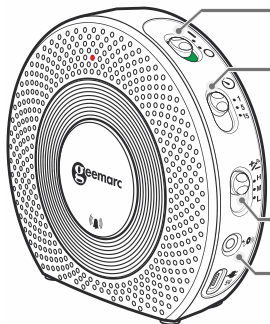

Operación

Cómo utilizar el micrófono **interno**:

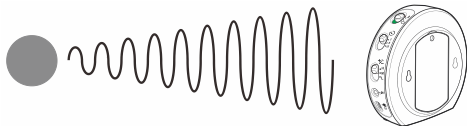

Cómo utilizar el micrófono **externo**:




Ajusta la distancia (entre el micrófono y la fuente de sonido) y la sensibilidad en función del tipo de fuente de sonido y de su intensidad.

Conflicto de códigos


Si el código AC140 es el mismo que el de otro emisor, deberá cambiarlo. Para ello, siga el procedimiento que se indica a continuación. Una vez cambiado el código, deberá volver a emparejar el pulsador de llamada.



1 Pon el interruptor de encendido/apagado en la posición OFF.

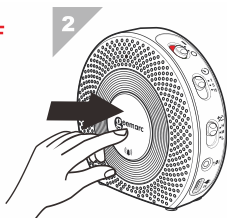


2 Mantén pulsado el botón de llamada.

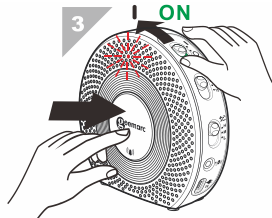

3 Pon el interruptor de encendido en la posición ON y mantén pulsado el botón de llamada hasta que el LED parpadee 6 veces.

Montaje en pared

El AC140 se puede colocar sobre una superficie plana o fijarse a la pared.

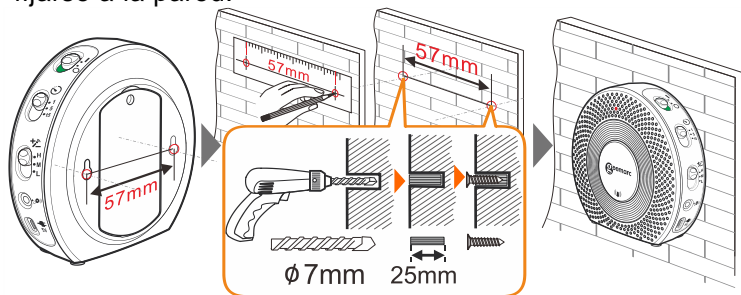

Marca dos agujeros en la pared con un lápiz y una plantilla de taladrado.

Fija el aparato a la pared con los tacos y tornillos incluidos.

GARANTÍA

Desde el momento en que adquiera su Geemarc AMPLICALLTM140, la garantía de Geemarc tendrá una vigencia de dos años. Durante este periodo, todas las reparaciones o sustituciones (a nuestro criterio) serán gratuitas. Si tiene algún problema, póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia o visite nuestra página web en www.geemarc.com. La garantía no cubre accidentes, negligencia ni roturas de piezas. El producto no debe ser manipulado ni desmontado por ninguna persona que no sea un representante autorizado de Geemarc. La garantía de Geemarc no limita en modo alguno sus derechos legales.

IMPORTANTE: SU RECIBO DE COMPRA FORMA PARTE DE SU GARANTÍA Y DEBE CONSERVARSE Y PRESENTARSE EN CASO DE QUE SE PRESENTE UNA

RECLAMACIÓN DE GARANTÍA.

EXPLICACIONES:

Directivas de la UE

Geemarc Telecom SA declara por la presente que este AMPLICALLTM140 cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva sobre equipos radioeléctricos 2014/53/UE.

La declaración de conformidad de la UE puede consultarse en **www.geemarc.com**.

Potencia de RF: < 250mW

Directrices de reciclaje

La Directiva RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) se ha establecido para garantizar que los productos se reciclen de la mejor manera posible al final de su vida útil.

Cuando este producto llegue al final de su vida útil, no lo tire a la basura doméstica. Utilice una de las siguientes opciones de eliminación:

- Retire las pilas y deposítelas en un contenedor RAEE específico. Deposite el producto en un contenedor RAEE específico.

- O entregue el producto usado en la tienda. Si compra un producto nuevo, deben aceptar el producto usado. Al seguir estas instrucciones, contribuye a la protección de la salud humana y del medio ambiente.



Si necesita asistencia técnica o ayuda con nuestros productos, visite nuestra página web www.geemarc.com

E-mail: help@geemarc.com

Geemarc Telecom

Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59760 Grande-Synthe,
Francia

Fabricado para Geemarc Telecom S.A. en China

