

Sonic Alert

Réveil double alarme Sonic Boom avec vibreur pour lit

Modèle SBD375ss-v3



MODE D'EMPLOI

IMPORTANT – Veuillez lire attentivement cette notice et la conserver pour toute consultation ultérieure. Voir les instructions de fonctionnement au verso du document.
- Utilisez exclusivement l'adaptateur fourni ou recommandé Sonic Alert pour brancher l'unité.

Avertissement : pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Avant de raccorder l'appareil au réseau électrique, assurez-vous que les exigences spécifiées sur l'appareil correspondent à l'alimentation électrique disponible dans le pays, soit CA100-240V~, 56/60 Hz.

- La ventilation ne doit pas être entravée, les orifices d'aération doivent rester libres de tout objet, tel que des journaux, des nappes, des rideaux, etc. ;
- Aucune source de flamme nue, comme une bougie allumée ne doit être placée sur l'appareil.
- L'appareil ne sera pas installé à proximité d'un dispositif qui goutte ou soumis à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide ne doit être placé sur l'appareil, tel qu'un vase par exemple.
- Ne placez pas l'appareil dans un meuble fermé ou sur un rack ne disposant pas d'une ventilation adéquate.
- Lorsque la fiche secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, celle-ci doit toujours être facilement accessible.

MODE D'EMPLOI

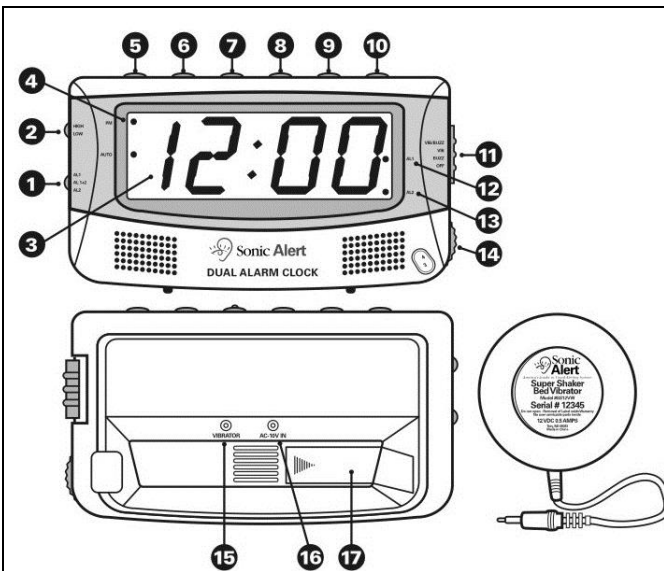


Figure B

Les caractéristiques du produit figurent dans le schéma ci-dessus :

- 1) Sélecteur d'alarme
- 2) Réglage de l'intensité du vibreur
- 3) Affichage de l'heure
- 4) Indicateur PM
- 5) Bouton de RÉGLAGE/DÉSACTIVATION de l'alarme / Durée de l'alarme
- 6) Bouton de défilement rapide des min./heures / Sélecteur 12 h. ou 24 h.
- 7) Bouton de défilement lent des min./heures
- 8) Bouton de rappel d'alarme/ Durée du rappel d'alarme/ Variateur
- 9) Commutateur de réglage de l'heure
- 10) Sélecteur rotatif de tonalité
- 11) Commutateur du mode Alarme
- 12) Indicateur d'alarme-1 (AL1)
- 13) Indicateur d'alarme-2 (AL2)
- 14) Sélecteur rotatif du volume
- 15) Entrée du vibreur / Vibreur pour lit
- 16) Alimentation d'entrée CC
- 17) Logement de la pile de secours

Réglage correct de l'heure –

- 1) Appuyez sur le bouton « **TIME** » (heure) (9) et maintenez-le enfoncé, puis simultanément, appuyez sur le bouton « **FAST** » (défilement rapide) (6) ou sur le bouton « **SLOW** » (défilement lent) (7) pour faire défiler l'heure jusqu'au réglage voulu.
- 2) Un point lumineux (4) logé dans le coin supérieur gauche du réveil indique les heures de l'après-midi au format américain (12h). Pour les heures matinales (AM), le point lumineux ne s'allume pas.

Réglage de l'heure de déclenchement de l'alarme –

Réglage de l'alarme 1

- 1) Faites glisser le « **SÉLECTIONNEUR D'ALARME** » (1) sur la position AL1, l'indicateur d'alarme « **AL1** » (12) s'allume.
- 2) Appuyez sur le bouton « **RÉGLAGE/DÉSACTIVATION de l'alarme** (5) et maintenez-le enfoncé, puis simultanément, appuyez sur le bouton « **FAST** » (défilement rapide) (6) ou sur le bouton « **SLOW** » (défilement lent) (7) pour faire défiler les heures jusqu'au réglage d'alarme voulu.
- 3) Vérifiez que l'heure de déclenchement de l'alarme est correctement réglée pour le matin ou l'après-midi (4).

Réglage de l'alarme 2

- 4) Une fois l'alarme AL1 réglée, faites glisser le « **SÉLECTIONNEUR D'ALARME** » (1) sur la position AL2. , l'indicateur d'alarme « **AL2** » (13) s'allume..
- 5) Appuyez sur le bouton « **RÉGLAGE/DÉSACTIVATION de l'alarme** (5) et maintenez-le enfoncé, puis simultanément, appuyez sur le bouton « **FAST** » (défilement rapide) (6) ou sur le bouton « **SLOW** » (défilement lent) (7) pour faire défiler les heures jusqu'au réglage d'alarme voulu.
- 6) Vérifiez que l'heure de déclenchement de l'alarme est correctement réglée pour le matin ou l'après-midi (4).

Sélection du format 12 heures ou 24 heures – Le réglage de l'heure par défaut est 12 heures

Appuyez sur le **bouton Fast (défilement rapide) (9)** et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes pour entrer en mode de sélection de l'heure. Relâchez le **bouton Fast (9)** lorsque l'écran affiche « 12 H » ou « 24 H ». Appuyez sur le bouton **Fast (9)** pour basculer entre les formats 12 heures et 24 heures. Si aucune sélection n'est faite dans les 4 secondes, le dernier format d'heure s'affichera et l'appareil reviendra en mode normal.

Alarme –

Activer les alarmes :

- 1) Pour activer l'alarme 1, faites glisser le « **SÉLECTIONNEUR D'ALARME** » (1) sur la position AL1. L'indicateur d'alarme « **AL1** » (12) s'allume..
- 2) Pour activer l'alarme 2, faites glisser le « **SÉLECTIONNEUR D'ALARME** » (1) sur la position AL2, l'indicateur d'alarme « **AL2** » (13) s'allume.
- 3) Pour activer les deux alarmes, faites glisser le « **SÉLECTIONNEUR D'ALARME** » (1) sur la position AL2, les indicateurs d'alarme « **AL1** » (12) et « **AL2** » (13) s'allument.

Pour sélectionner le mode de réveil

Pour sélectionner le mode de réveil, faites glisser le « **commutateur du mode Alarme** » (11) vers la position souhaitée :-

a) « BUZZ » pour le son b) « VIB » pour le vibreur de lit c) « VIB/ BUZZ » pour aussi bien le son que le vibreur de lit

REMARQUE : une fois le mode de réveil choisi, il sera appliqué aux deux alarmes.

Modèles d'alarme –

Lorsque l'alarme est activée, le modèle d'alarme de l'avertisseur sonore et de l'affichage clignotant ne sont pas synchronisés avec le vibreur. Cela signifie que lorsque l'avertisseur sonore et l'affichage clignotant sont ACTIVÉS, le vibreur est DÉSACTIVÉ et lorsque l'avertisseur sonore et l'affichage clignotant sont DÉSACTIVÉS, le vibreur est ACTIVÉ.

ALARME 1 - Lorsque l'alarme 1 est activée, 3 bips retentissent pour l'avertisseur sonore, puis le vibreur est activé. Le modèle se répète jusqu'à ce que l'alarme soit arrêtée.

ALARME 2 - Lorsque l'alarme 2 est activée, 4 bips retentissent pour l'avertisseur sonore, puis le vibreur est activé. Le modèle se répète jusqu'à ce que l'alarme soit arrêtée.

Régler la durée de l'alarme

Le paramètre par défaut pour la durée de l'alarme est de 30 minutes ; vous pouvez régler ce paramètre entre 1 minute et 59 minutes. Pour régler la durée de l'alarme :

- Appuyez sur le bouton **AL. SET (réglage de l'alarme) (5)** puis maintenez-le enfoncé pendant six secondes. L'afficheur du réveil montrera la durée d'alarme par défaut sous la forme suivante : '30'. Relâchez le bouton de réglage de l'alarme.
- Appuyez sur le **bouton « MIN » (10)** pour régler la durée de l'alarme sur la valeur souhaitée (entre 1 et 59 minutes).
- Lorsque l'afficheur indique la durée d'alarme souhaitée, l'appareil, après trois secondes, retourne en mode normal. Le nouveau paramètre de durée d'alarme devient la nouvelle valeur par défaut et restera en mémoire jusqu'à ce que vous le changiez à nouveau.

Fonctionnement du rappel d'alarme –

1. Lorsque l'alarme se déclenche le matin, vous pouvez appuyer sur le **bouton SNOOZE (rappel d'alarme) (8)** pour l'arrêter temporairement. L'alarme s'arrêtera pendant 9 minutes ou pendant la durée sélectionnée (entre 1 et 30 minutes), puis se réenclenchera. L'opération peut être répétée indéfiniment jusqu'à ce que l'alarme soit arrêtée.
2. La fonction SNOOZE (rappel d'alarme) des alarmes 1 et 2 est indépendante d'une alarme à l'autre.

Réglage de la durée du rappel d'alarme

Le paramètre par défaut pour la durée du rappel d'alarme est de 9 minutes, mais vous pouvez régler ce paramètre entre 1 minute et 30 minutes. Pour régler la durée du rappel d'alarme :

- Appuyez sur le **bouton SNOOZE (rappel d'alarme) (8)** et maintenez-le enfoncé pendant quatre secondes. L'afficheur du réveil indiquera la durée d'alarme par défaut sous la forme suivante : '9'. Relâchez le bouton de rappel d'alarme.
- Appuyez sur le bouton « **SLOW** » (**défilement lent**) (7) pour régler la durée du rappel d'alarme sur la valeur souhaitée (entre 1 et 30 minutes).
- Lorsque l'afficheur indique la durée du rappel d'alarme souhaitée, l'appareil, après trois secondes, retourne en mode normal. Le nouveau paramètre de la durée du rappel d'alarme devient la nouvelle valeur par défaut et restera en mémoire jusqu'à ce que vous le changiez à nouveau.

Arrêter l'alarme –

L'alarme peut être arrêtée temporairement pour la journée ou de manière permanente.

- 1) Lorsque l'alarme s'arrête, appuyez sur le bouton « **ALARM SET/OFF** » (**RÉGLAGE/DÉSACTIVATION de l'alarme**) (5). L'alarme se désactive automatiquement pour la journée et sera réactivée le lendemain à la même heure si le paramètre de l'alarme n'est pas modifié.
- 2) Pour arrêter définitivement l'alarme, faites glisser vers le bas le « **Commutateur du mode Alarme** » (11) jusqu'à la position OFF. L'alarme ne sera pas réactivée tant que le « **commutateur du mode Alarme** » (11) n'aura pas été repositionné sur l'une des positions « VIB », «BUZZ » ou « VIB/BUZZ ».

REMARQUE : la fonction de désactivation des alarmes 1 et 2 est indépendante d'une alarme à l'autre.

Fonctionnement du variateur

Il existe un réglage de la luminosité à 5 niveaux pour l'affichage DEL. Appuyez une fois sur le bouton de RAPPEL D'ALARME pour modifier la luminosité de l'écran. La luminosité suivra le cycle suivant en partant de 5-4-3-2-1-2-3-4-5 (de claire à sombre, puis de sombre à claire).

***REMARQUE ***: la fonction du variateur ne marche pas lorsque le réveil se trouve en mode de rappel d'alarme.

Réglage du volume –

- 1) Pour régler le volume, faites pivoter la **molette de VOLUME (12)** qui se trouve sur le coin inférieur droit du réveil.

Réglage de la tonalité –

- 1) Pour régler la TONALITE, faites pivoter la **molette de TONALITE (10)** qui se trouve sur le coin supérieur droit du réveil.

Vibreur pour lit / vibreur –

- 1) Fixez le connecteur du vibreur pour lit au dos du réveil, sur « **l'entrée du VIBRATEUR** » (15).
- 2) Pour activer le vibreur, faites glisser le « **commutateur du mode Alarme** » (11) sur la position « VIB/BUZZ » ou « VIB ».
- 3) Placez le vibreur entre le matelas et le sommier.

Réglage de l'intensité du vibreur

Faites glisser la commande **d'intensité du vibreur (2)** pour la régler, le paramètre « Hi » correspondant à l'intensité la plus forte et le paramètre « Lo » indiquant l'intensité la plus faible.

Batterie de secours –

Afin d'utiliser la batterie de secours, vous pouvez installer une pile alcaline de 9-volts au dos du réveil, sous le **couvercle du logement de la pile (17)**. La pile doit être achetée séparément. **Veillez noter que lors d'une panne de courant l'écran DEL n'affiche pas l'heure, mais l'horloge continue de fonctionner et affichera l'heure correcte dès le retour du courant électrique.** Lors d'une coupure de courant, la pile alcaline ne peut faire fonctionner que l'IC du réveil et ceci jusqu'à un maximum de 30 jours. **(Lors d'une coupure électrique, l'afficheur DEL ne montre pas l'heure.)**

REMARQUE : pour des résultats optimaux, il est recommandé de changer la batterie tous les 6-8 mois. Si le réveil n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de retirer la pile afin d'éviter les fuites d'acide susceptibles de l'endommager.

Alimentation d'entrée CC 9V –

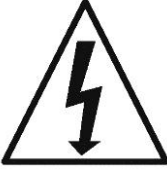

Fixez-« **L'ENTRÉE D'ALIMENTATION CC** » (16) sur l'arrière de DC9V IN à proximité de « **L'ENTRÉE DU VIBRATEUR** » (15) ; il s'agit de l'entrée la plus petite des deux.

REMARQUE : IMPORTANT : ne confondez pas « L'ENTRÉE D'ALIMENTATION CC » (16) et « L'ENTRÉE DU VIBRATEUR » (15).

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Adaptateur secteur homologué UL : CA100-240V~, 50/60Hz


Consommation électrique : sortie de l'adaptateur : CC9V, 650mA

 <p>L'éclair et la flèche qui clignotent à l'intérieur du triangle sont des symboles d'alerte qui vous préviennent d'une tension dangereuse présente dans l'enceinte du produit.</p>	MISE EN GARDE : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAR LE COUVERCLE (OU LA PARTIE ARRIÈRE) DU PRODUIT. AUCUNE PIÈCE REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR N'EST INTÉGRÉE AU PRODUIT. VEUILLEZ VOUS ADRESSER A VOTRE REVENDEUR SONIC ALERT.	 <p>Le point d'exclamation à l'intérieur du triangle est un symbole d'avertissement qui vous signale la présence d'instructions importantes sur le produit.</p>
---	--	--

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

- Nous attirons votre attention sur les aspects environnementaux à prendre en compte, lorsque vous vous débarrassez des piles ;



-  les points de collecte sont différents s'il s'agit d'appareils électriques ou électroniques.

La fonction normale peut être affectée par de fortes interférences électromagnétiques (à partir d'autres appareils). Si cela se produit, essayez de déplacer l'appareil vers un autre emplacement. La fonction normale devrait reprendre, mais vous devrez peut-être réinitialiser l'unité en suivant la procédure décrite dans le manuel d'instructions.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN SUR LE PRODUIT SONIC ALERT

Le réveil Sonic Boom SBD375ss est garanti pendant un (1) an, à compter de la date d'acquisition, contre les défauts de fabrication et matériels. Au cours de cette période Sonic Alert réparera ou remplacera sans aucun frais sur les pièces et la main d'œuvre et à sa seule discrétion le modèle SBD375ss.

Contactez notre service clients afin d'obtenir un RA (numéro d'autorisation de retour) et des informations sur la manière de procéder pour retourner votre produit. Appelez le No 1-888-864-2446 ou envoyez un courriel à RMA@sonicalert.info. Une copie de la quittance d'achat est nécessaire pour l'obtention du numéro d'autorisation.

Sonic Alert Inc., Troy MI 48083, USA.

Sonic Alert

Fabriqué en Chine

Sonic Alert, Troy, MI 48083

www.SonicAlert.com 1-888-864-2446