



AMPLIDECT™260



Español

AMPLIDECT™260

CONTENIDO

CONTENIDO	1
INTRODUCCIÓN	4
Desembalaje	5
DESCRIPCIÓN	6
Descripción General.....	6
Descripción de los Íconos de la Ventana LCD	11
INSTALACIÓN	13
Conectando los cables	13
Instalación de Baterías.....	15
Carga del microteléfono	17
Uso del gancho de transporte del microteléfono	17
FUNCIONES BÁSICAS	19
Encendido/apagado del microteléfono.....	19
Navegación por el menú	20
Realizar una llamada	21
Recibir una llamada	22
Silenciar el micrófono	23
Función de amplificación.....	23
Ajuste del timbre	25

Identificador parlante de llamadas	26
Rellamada al último número	27
Bloqueo del teclado.....	30
Respuesta automática	31
Selección de un idioma	31
Nombre del Microteléfono	32
Alcance de la alarma y otros tonos	33
Buscador	34
Modo de marcación.....	35
Manos Libres.....	36
Señal de Flash (volver a tener línea para marcar)....	37
FUNCIONES AVANZADAS	38
Directorio CID.....	38
Guía telefónica	42
Memorias de un solo toque.....	48
Ajuste de la Base	48
Ajustes del microteléfono	51
Registro	57
Llamadas con más de un microteléfono	58
Identificación de llamadas (Caller ID) de llamadas en espera	60

LISTADO DE FUNCIONES	61
DETECCIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS	63
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	65
FILTROS DSL.....	66
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD.....	67
GARANTÍA	69
DIRECTIVAS DE RECICLAJE	71

INTRODUCCIÓN

Felicitaciones por la compra de su teléfono Geemarc AD260 Este teléfono le ofrece todas las ventajas de la tecnología inalámbrica (que cumple con el estándar DECT – Telecomunicaciones inalámbricas mejoradas digitalmente) conjuntamente con un teclado con pulsadores grandes, ideales para quienes sufren problemas visuales Este teléfono también es compatible con el uso de audífonos.

Es importante que lea las siguientes instrucciones para aprovechar todo el potencial de su teléfono Geemarc. Mantenga esta guía del usuario en un lugar seguro para futuras consultas.

Esta guía explica cómo utilizar el siguiente teléfono:

AD260



AMPLIDECT™ 260

Desembalaje

Cuando desempaque el teléfono, usted deberá encontrar dentro de la caja lo siguiente:

- 1 microteléfono AD260
- 1 base del AD260
- 1 Adaptador principal de corriente
- 2 Baterías AAA Ni-MH
- 1 Cable de la línea telefónica
- 1 Gancho de transporte del microteléfono
- 1 Guía del usuario

* La forma de los enchufes puede variar de acuerdo a las especificaciones de cada país.





Para el soporte al producto y ayuda, visite nuestro sitio web en www.geemarc.com
Teléfono 01707.384438.
O por fáj al 01707 832529

DESCRIPCIÓN

Descripción General

Frente del Microteléfono

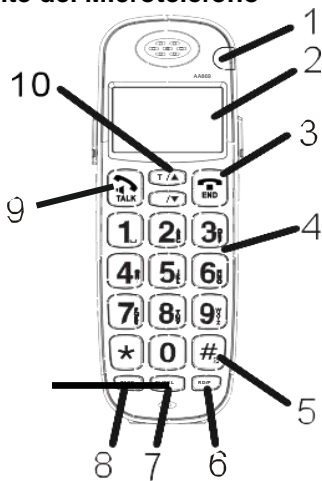

1. Indicador de En uso / timbre/flash / Correo de Voz / Indicador de llamada perdida
2. Pantalla LCD
3.  Tecla Pulse para finalizar una llamada o volver a fuera de línea
4. Teclado



5. tecla: Mantenga pulsada por 5 segundos, habilita el “No molestar”



6. Tecla RD/P: Remarcar/Pausa


7. Tecla FL/DEL Tecla Flash/Borrar Generar una señal de "flash" para activar la llamada en espera Borra un dígito al ingresar texto. Retrocede un nivel en el sistema del menú


8. Clave de LOCALIZAR Pulse para el intercomunicador o transferir una llamada



9. tecla: Pulse para llamar o contestar una llamada Durante una llamada, pulse para activar el altavoz

10. Teclas  y : Pulse para controlar el tono o navegar por opciones del menú.


24.  Tecla Presione y mantenga pulsado para activar/desactivar la función de bloqueo del teclado. Configurar una conferencia telefónica.

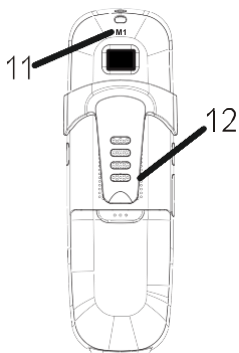

Parte posterior del microteléfono

- 11. **M1** Tecla Memoria de un toque que también activa el altavoz
- 12. Altavoz

Lado del microteléfono

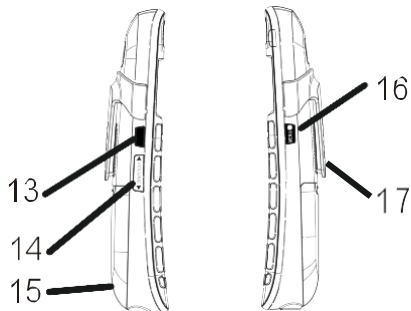


13. Tecla de AMP Pulse para recibir la amplificación adicional del receptor

14. Aumentar o disminuir el volumen

15. Tapa del compartimiento de baterías

16. Tecla del Menú Pulse para acceder opción del menú o submenú. Pulse para activar / desactivar el micrófono durante una llamada

17. Gancho de cinturón

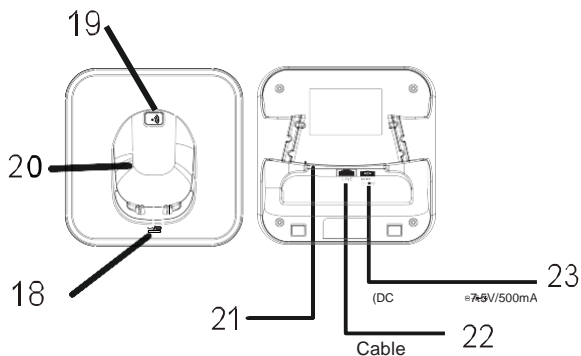

Frente de la base

- 18. Indicador de uso/indicador de carga
- 19. Tecla de localizar Pulse para localizar todos los microteléfonos registrados
- 20. Cuna

Inferior de la base

- 21. Timbre de la base
- 22. Conexión del teléfono Para conectar la línea telefónica
- 23. Toma del adaptador AC Para conexión a la red de energía eléctrica

Descripción de los Íconos de la Ventana LCD






La pantalla LCD se divide en dos áreas distintas:

Área de iconos. Esto se encuentra en la parte superior de la pantalla. Se muestran los diversos iconos del sistema que le ayudan a utilizar el teléfono.

Área principal. Esto se encuentra en la parte central de la pantalla. Se muestra lo siguiente:

- El número que está siendo marcado
- información de la pantalla de llamadas
- Guía Telefónica
- Información del menú
- En modo de espera, número del microteléfono



NUEVO	Nueva llamada Indica que se ha perdido una o más llamadas.
 Llamada en espera	Mensaje esperando Indica que tiene uno o más mensajes de voz.
HABLAR	Descolgado Indica que la línea está activa
PARLANTE	Manos libres Indica la función de manos libres está activada.
	Icono de la batería Este siempre se muestra cuando su teléfono está encendido. Muestra el nivel de carga de la batería. Más barras indican que hay más carga de la batería
	Icono de señal Indica la intensidad de la señal actual. Más barras indican que hay señal con más fuerza Si el microteléfono está demasiado lejos de la base, este icono parpadeará en la pantalla LCD.
	Icono de alarma Este icono aparece cuando se programa una alarma para que suene a una hora determinada.
	Bloqueo del teclado Este icono aparece cuando el teclado está bloqueado.

INSTALACIÓN

Conectando los cables


1. Conecte un extremo del cable de la línea telefónica a la toma de la línea telefónica de la base, y el otro extremo a una toma de teléfono estándar.
2. Conecte el extremo modular del adaptador de alimentación de CA al conector de alimentación de la base, a continuación, conecte el adaptador de CA a una toma de corriente estándar CA.

Asegúrese de ubicar el teléfono lo suficientemente cerca de la toma de corriente para que el cable alcance de manera segura sin necesidad de estirarlo. Además, la red eléctrica debe ser de fácil acceso en caso de que necesite desconectar la alimentación.

Asegúrese de que el teléfono esté al menos 1 metro de distancia de otros productos eléctricos por ejemplo televisores, radio y monitores con el fin de evitar interferencias. También, evite el calor y la luz solar directa.

Le aconsejamos colocar el teléfono sobre un mantel o similar, ya que los pies de goma en la base pueden marcar algunas superficies.

Hacia la toma de teléfono de pared

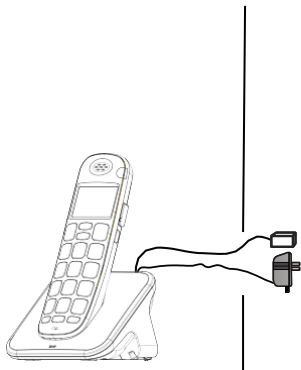


Hacia la toma de pared de corriente AC

Instalación de Baterías

Las baterías de Ni-MH recargables (tamaño AAA) vienen con el teléfono. Instale las dos baterías antes de usar el teléfono.

1. Deslice la cubierta de la batería en la dirección de la flecha y tire de ella.
2. Inserte pilas nuevas como se indica, con la polaridad correcta (+,-).

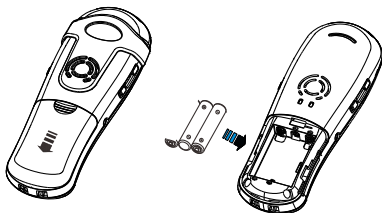

3. Para volver a colocar la tapa de la batería, deslice la cubierta hacia arriba hasta que encaje en su lugar.



Notas:

Las baterías deben ser reemplazadas si no recuperan sus capacidades de carga completa después de la recarga.

Al sustituir las baterías, utilice siempre baterías de Ni-MH recargables de buena calidad. Nunca utilice otras baterías o pilas alcalinas convencionales.

Las baterías totalmente cargadas del microteléfono pueden proporcionar 80 horas de espera u 8 horas de tiempo de conversación.

La base se puede utilizar 4 baterías AAA NiMH recargables en caso de falla de alimentación en la red. Estas baterías no se proporcionan. Nunca use baterías no recargables.

Las baterías completamente cargadas de la base pueden proporcionar 4 horas de respaldo en caso de corte de corriente AC.

Las baterías del microteléfono y de la base son intercambiables. En el caso de que las baterías del microteléfono se están agotando, es aceptable cambiarlas por dos de las baterías de la base. Esto elimina tiempo de recarga de las batería del microteléfono. Sin embargo, asegúrese de desconectar el cable telefónico a la toma de pared antes de intercambiar las baterías.

Carga del microteléfono

Nota Importante: Antes de la operación inicial, **ES NECESARIO CARGAR COMPLETAMENTE EL MICROTELÉFONO** durante aproximadamente 15 horas.

Para cargar el microteléfono, debe colocarlo en la base.


Resultado: Cuando se coloca el microteléfono en la base, el mismo se enciende automáticamente.

Uso del gancho de transporte del microteléfono

El gancho de transporte del microteléfono suministrado le permite llevar cómodamente el microteléfono con usted. Se engancha fácilmente a su cinturón, banda de cintura o bolsillo de la camisa.

Si desea eliminar el gancho de transporte:


Inserte un destornillador en el borde de uno de sus brazos y suelte el clip. Luego levántelo.

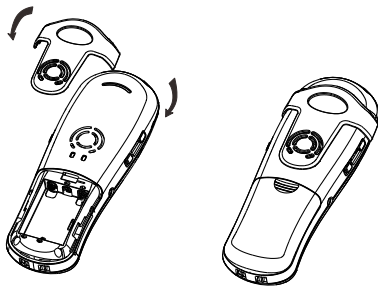


FUNCIONES BÁSICAS

Encendido/apagado del microteléfono

Si el microteléfono está en el modo de apagado, cuando se coloca el mismo en la base, se enciende automáticamente. Para activar el microteléfono encendido o apagado en modo de espera, siga estos pasos:

1. Para activar el microteléfono cuando está apagado, presione y sostenga la tecla  hasta que se encienda la pantalla. Al encenderse, el microteléfono entrará en el modo de suscripción y buscará a una base registrada.


Nota: Si el microteléfono tiene éxito en la búsqueda de una base, el mismo entrará en el modo de espera, la pantalla mostrará el número del microteléfono y su nombre (si tiene uno grabado), el icono de la señal, icono de la batería y la hora actual. Si el teléfono no tiene éxito en la búsqueda de una base, el teléfono se comportará de acuerdo a la condición de **Fuera de alcance**.

2. Para apagar el microteléfono, mantenga pulsada la tecla  hasta que se apague la pantalla.

Nota:



Nada aparece en la pantalla LCD cuando la energía de la batería está muy baja. **ES NECESARIO RECARGAR**

COMPLETAMENTE EL MICROTELÉFONO ANTES DE USARLO.


Todas las descripciones de este manual asumen que el microteléfono está en modo de espera. Ajuste el teléfono al modo de espera pulsando la tecla .

Navegación por el menú

Para acceder a una opción de menú:

1. Para mostrar la lista del menú, presione la tecla **Menú**.
2. Para desplazarse por las opciones del menú, pulse la tecla  y  repetidamente.
3. Para seleccionar un menú, presione la tecla **Menú** cuando aparezca el menú deseado en la pantalla LCD.

Para regresar al modo de espera desde cualquier menú:


Para regresar al modo de espera desde cualquier menú, pulse la tecla .

Además, el teléfono volverá automáticamente al modo de espera desde cualquier menú si no se pulsa ninguna tecla durante unos 40 segundos.


Para retroceder un nivel

Para retroceder un nivel en el sistema de menús, pulse la tecla **FL/DEL**.

Realizar una llamada

1. Levante el auricular y presione la tecla . El ícono de **HABLAR** aparecerá en la pantalla LCD.


2. Marcar un número de teléfono.

3. Para finalizar la llamada, o bien pulse la tecla  o cuelgue el microteléfono en la base.

También puede introducir el número de teléfono deseado en modo de espera. Este le permite realizar correcciones antes de marcar. Siga estos pasos:

1. Introduzca un número de teléfono (hasta 32 dígitos). Revíselo. Puede utilizar la tecla **RD/P** para insertar una segunda pausa (a veces requerida para acceder a una línea externa en algunos sistemas telefónicos de empresas).

Nota: Si comete un error al introducir un número, pulse la tecla **FL/DL** para borrar el último dígito.


2. Cuando el número aparezca correctamente, presione la tecla .


Recibir una llamada

Cuando se recibe una llamada, la información acerca de la **Llamada** aparecerá y el LED parpadeará.

Si la persona que llama puede ser identificada, se mostrará el número telefónico de la persona que llama.

Si la persona que llama no puede ser identificada, aparece sólo la información la **Llamada**. Si usted tiene un mensaje de voz, el mensaje "**Mensaje de voz**" aparecerá en la pantalla LCD.

1. Para responder a la llamada, pulse la tecla . Si ha activado la función de respuesta automática, cuando el microteléfono está en la base, simplemente levántelo para contestar.

2. Para finalizar la llamada, o bien pulse la tecla  o cuelgue el microteléfono en la base..

Después de colgar la llamada, la pantalla LCD mostrará la duración de la llamada.

Notas: Puede seleccionar el volumen del timbre usando la tecla Vol +/- cuando suene el teléfono con una llamada entrante.

Silenciar el micrófono

Durante una conversación, puede apagar temporalmente el micrófono del teléfono, de forma que la otra parte no le pueda oír hablar.

Ejemplo: Usted le quiere decir algo a otra persona en la habitación, pero no desea que la otra parte lo escuche. Para silenciar el micrófono, pulse la tecla "**Silenciar**" durante la conversación. Aparece "**Llamada silenciada**" en la pantalla LCD.

Para activar de vuelta el micrófono, pulse de nuevo la tecla de función **silenciar**. Se restarurará el estado normal.

Función de amplificación



Control del volumen (Microteléfono y parlante)

Mientras está en una llamada, presione la tecla de volumen en el lado izquierdo del microteléfono para cambiar el ajuste de volumen. El ajuste de volumen se indica en la pantalla VL1 hasta VL5. El volumen ajustado del receptor podrá ser de 0 a 18 dB.

Aumento de la amplificación


Su teléfono está equipado con una función de amplificación especializada diseñada para adaptarse a sus necesidades auditivas.. Durante una conversación puede activar la tecla **AMP** en el lado izquierdo del micro-teléfono Esto aumentará el volumen durante una llamada. Para apagar el aumento de la amplificación de volumen, basta con pulsar de nuevo la tecla **AMP**. Cuando esta función se encuentra encendida, el volumen del receptor del microteléfono será de 32dB.

Control de tono

También puede ajustar el control del tono para ajustarlo a los niveles de sus necesidades auditivas. Cuando esté en una llamada y cuando el **AMP** ha sido seleccionado, el control digital de tono se activa. Utilizando las teclas  y , pueden desplazarse a través de las cuatro opciones de tonos disponibles. El ajuste de tono se indica en la pantalla como T1 a T4.

Amplificación Automática

La función **AMP** puede ser ajustada en ON de forma automática cada vez que se utiliza el teléfono

1. Pulse la tecla **Menú**
2. Pulse  hasta que se muestre **AJUSTES del MICROTELÉFONO**, a continuación, pulse la tecla **Menú**.



3. Pulse **T/▼** hasta que se muestre **AJUSTES de AUDIO**, a continuación, pulse la tecla **Menú**.
4. Pulse **T/▼** hasta que se muestre **AMPLIFICACIÓN**, a continuación, pulse la tecla **Menú**.
5. Pulse **T/▼** hasta que se muestre **ON**, a continuación, pulse la tecla **Menú** para confirmar.


Ajuste del timbre

Usted puede seleccionar su propio timbre de llamada externa (desde la red telefónica) o interna (de otros teléfonos registrados en la misma base) y ajustar el volumen.

1. Pulse la tecla **Menú**.
2. Pulse las teclas **T/▼** y **T/▲** para elegir menú de **Ajustes del microteléfono**, luego pulse la tecla **Menú**.
3. Pulse las teclas **T/▼** y **T/▲** para elegir el **Ajuste del timbre**, pulse la tecla **Menú**.
4. Pulse la tecla **Menú** para elegir **Intensidad del timbre** o pulse la tecla **T/▼** para seleccionar **Timbre externo**, pulse la tecla **Menú**.

5. Pulse la tecla **Menú** para elegir **Melodía**

Nota: Puede seleccionar la **melodía** del 1 al 10. utilizando  y . Al ajustar la configuración del timbre, el teléfono reproduce la melodía seleccionada, pulse la tecla **Menú** para confirmar el sonido deseado.

En el paso 4, pulse  para seleccionar **Volumen**, y pulse la tecla **Menú**, podrá ajustar el volumen del timbre desde **el Volumen 1** al **Volumen 5**, o **Volumen Apagado** para desactivar el timbre. Pulse la tecla **Menú** para confirmar.

Notas:



- Si ajusta el volumen en "Apagado", cuando entre una llamada, aparecerá sólo la información de nueva llamada en la pantalla LCD.
- Puede también utilizar las teclas de control + o - para ajustar el volumen del timbre cuando se recibe una llamada.



Identificador parlante de llamadas



El AD260 es capaz de hablar los números que se pulsan en el teclado numérico y también anunciar el número de teléfono de cualquier llamada entrante.

1. Pulse la tecla **Menú**.

2. Pulse las teclas  y  varias veces para elegir **Ajustes del microteléfono** del menú, luego pulse la tecla **Seleccionar**.

3. Pulse las teclas  y  para seleccionar **Ajuste de Audio**, pulse la tecla **Menú**.

4. Pulse las teclas  y  para seleccionar **identificador parlante**, pulse la tecla **Menú**.

5. Utilice la tecla  y  para seleccionar **On/Off** para habilitar/deshabilitar el identificador parlante, luego pulse la tecla **Menú**, escuchará un bip continuo.

Rellamada al último número

1. Pulse la tecla  para obtener línea.

2. Pulse la tecla **RD/P**.

La pantalla LCD muestra el último número marcado y el teléfono marca ese número.




1. Pulse la tecla  bajo modo de espera


2. Pulse la tecla  para marcar el número.

Buscar y marcar un número de la Guía de rellamadas

Su teléfono le permite recuperar los últimos 10 números que ha marcado.

1. Pulse la tecla  bajo modo de espera

2. Si desea desplazarse a través de la memoria, pulse la tecla  de forma repetida hasta que encuentre el número que desea marcar.





3. Pulse la tecla  para marcar el número deseado.

Notas:


- Si no se encuentran ningún número, aparece la palabra "**vacío**" en la pantalla.
- Cuando la guía de rellamadas está llena, cada vez que marque un nuevo número, el número más antiguo almacenado en la guía se borra automáticamente y se sustituye con el último número.

Utilice las opciones de rellamada de la guía

Con las opciones de las guías de rellamada, puede agregar un número a la guía telefónica o borrar un número en la guía de rellamada.


1. Pulse la tecla .
2. Desplazarse hasta el número deseado utilizando las teclas  y .
3. Cuando aparezca el número deseado en la pantalla, pulse la tecla **Menú** para elegir la opción.
 - **Agregar a la guía telefónica:** le permite añadir el número a la guía telefónica. Complete almacenando la entrada comenzando desde el paso "Añadiendo las Entradas a la guía telefónica", (obviamente encontrará el número ya introducido en el campo correspondiente).
 - **Eliminar:** le permite borrar el número seleccionado.
 - **Eliminar todo:** le permite borrar toda la guía de llamadas.
4. Para volver al modo de espera, pulse la tecla .



Nota:



- En el paso 3, al seleccionar la opción de **Eliminar o Eliminar todo**, aparece un mensaje para "**¿Confirmar?**" para volver a preguntar una vez más y confirmar la eliminación. Para confirmar pulse la tecla **Menú**, para escapar pulse la tecla .

Bloqueo del teclado

Si activa esta función, todas las teclas se bloquearán.

Puede responder a las llamadas utilizando la tecla  del teléfono. Pero cuando cuelgue, el teléfono vuelve al modo de bloqueo. Esta función es útil para evitar presionar teclas por error.

Para bloquear las teclas, en el modo de espera sólo debe mantener la tecla  pulsada hasta que se muestre "Microteléfono trabajo", luego aparecerá el ícono 







Para desbloquear las teclas, mantenga la tecla  pulsada hasta que el ícono de tecla trabada  desaparezca de la pantalla.

Nota:

- En el modo bloqueado, si se pulsa cualquier tecla, el teléfono generará un tono de error, y el mensaje "**Microteléfono bloqueado**" se vuelve a mostrar.

Respuesta automática







Con esta función, puede contestar una llamada con sólo levantar el microteléfono de la base sin pulsar ninguna tecla.

1. Pulse la tecla **Menú**.
2. Pulse las teclas  y  repetidamente para seleccionar **Ajuste del microteléfono**, pulse la tecla **Menú**.
3. Use las teclas  y  para elegir **Respuesta automática**, pulse la tecla **Menú**.
4. Use las teclas  y  para elegir **On/Off** para activar/desactivar la función, pulse la tecla **Menú**, se escuchará un pitido de confirmación.

Selección de un idioma





El microteléfono es compatible con varios idiomas predefinidos. Se puede cambiar el idioma utilizado para mostrar los mensajes de menú.

1. Pulse la tecla **Menú**

2. Pulse las teclas  y  para elegir **Ajuste del microteléfono**, luego pulse la tecla **Menú**.
3. Use las teclas  y  para elegir el **Idioma**, luego pulse la tecla **Menú**.
4. Se muestran todos los idiomas. Use las teclas  y  para navegar a través de las opciones. Cada idioma se mostrará en su propia traducción nativa.
5. Pulse la tecla **Menú** para seleccionar el idioma deseado y se escuchará un pitido de confirmación.

Nombre del Microteléfono

Con esta función se puede definir un nombre para el microteléfono. Esto le permite reconocer fácilmente su microteléfono si tiene más de uno registrado con la misma base. Para ajustar el nombre del microteléfono:







1. Pulse la tecla **Menú**
2. Pulse las teclas  y  para seleccionar **Ajuste del microteléfono**, pulse la tecla **Menú**.
3. Use las teclas  y  para seleccionar **Nombre del Microteléfono**, luego pulse la tecla **Menú**.



4. Puede introducir el nombre del teléfono (hasta 12 caracteres) mediante el uso de las teclas alfanuméricas (usar la tecla agregar entradas a la guía telefónica), use la tecla **FL/DEL** para borrar cualquier carácter incorrecto, luego pulse la tecla **Menú** para confirmar y salir.

Una vez que haya asignado un nombre del teléfono, se mostrará HS1 durante 5 segundos y luego el nombre del teléfono asignado durante unos 5 segundos.

Alcance de la alarma y otros tonos

Un pitido sonará cuando el microteléfono está fuera del alcance de la base. Usted podrá seleccionar si desea activar/desactivar esta advertencia audible.

1. Pulse la tecla **Menú**.
2. Pulse las teclas  y  para seleccionar **Ajuste del microteléfono**, pulse la tecla **Menú**.
3. Use la tecla  o  para elegir el **Ajuste del tono**, luego pulse la tecla **Menú**.
4. Utilizar la tecla  o  para elegir **Alcance de la alarma**, a continuación, presione la tecla **Menú**.

5. Use la tecla  o  para elegir **On/Off** para activar/desactivar esta advertencia audible, a continuación, pulse la tecla **Menú**, se escuchará un pitido de confirmación.


Hay otras dos tonos que se pueden activar o desactivar en el AD260:


- **Tono de tecla** -Cada vez que se pulsa una tecla, el teléfono reconoce esta acción con un tono de tecla. Puede desactivar los tonos de las teclas para el uso en silencio. En ciertas condiciones de error, un tono de advertencia sonará cuando se pulsa una tecla incorrecta. **Nota:**Para el uso normal, se recomienda dejar el tono de las teclas activado. Esto hace que el teléfono sea más fácil de usar.
- **Batería baja** - Si las baterías del microteléfono están bajas, habrá un bip audible

Para cambiar cualquiera de estos encendido o apagado, seleccione Tono de tecla o batería baja en lugar de Gama de alarma en el anterior conjunto de instrucciones


Buscador

Usted puede buscar el microteléfono desde la unidad base. El microteléfono sonará con un tono especial. Esto es útil para localizar un microteléfono perdido.

Pulse la tecla  en la unidad base (menos de 5 segundos), todos los microteléfonos registrados a la base sonarán por aproximadamente 60 segundos.







Para detener la búsqueda, pulse la tecla  en la base una vez mas o cualquier tecla del microteléfono.

Nota:

- Si se pulsa largamente la tecla  por igual o más que 5 segundos, la base entrará en modo de subscripción. Para más detalles

Modo de marcación

Puede cambiar el modo de marcación mediante los pasos siguientes:

1. Pulse la tecla **Menú**
2. Pulse las teclas  y  para elegir **Ajuste BS** y pulse la tecla **Menú**.
3. Use la tecla  o  para elegir **Modo de marcación**, a continuación, **pulse la tecla Menú**.
4. Pued pulsar la tecla  o  para seleccionar las opciones del modo de marcación requerido (**Tono /**


Pulso) y pulse la tecla **Menú**. Se escuchará un pitido de confirmación.


Nota:

Si no está seguro de qué modo de marcación seleccionar, póngase en contacto con su proveedor de servicios local. El ajuste predeterminado es Tono.

Manos Libres

Durante una llamada, puede activar el altavoz interno del microteléfono.. En este modo se puede simplemente poner el teléfono en una superficie (por ejemplo, un escritorio) y disfrutar de la comodidad de la conversación con manos libres.

Para activar la función, pulse la tecla  durante una llamada (línea ocupada). El ícono del PARLANTE aparecerá en la pantalla LCD.

Para desactivar la función, y seguir hablando en modo normal, presione la tecla  de nuevo. El icono PARLANTE desaparecerá.

Notas:

- Antes de poner el teléfono cerca de los oídos, asegúrese de que ha desactivado el altavoz.
- Para ajustar el volumen del parlante, utilice las teclas Vol + y Vol-

Señal de Flash (volver a tener línea para marcar)

Cuando la línea está ocupada, al pulsar la tecla **FL / DEL** envía la señal de flash (la pantalla mostrará **F**). Esta tecla se utiliza junto con los servicios especiales (por ejemplo, llamada en espera) que podrían estar disponibles en su red telefónica. Para más información, póngase en contacto con su compañía telefónica.

FUNCIONES AVANZADAS

Directorio CID



Cuando recibe una llamada, si la información de la persona que llama se transmite desde la red sobre la cual se realizó la llamada (y la persona que llama no lo oculta), se muestra el número telefónico de la persona que llama. Más aun, cuando hay una llamada recibida que se ha perdido, el ícono NUEVO aparecerá en la pantalla LCD. Si la memoria CID está llena, el ícono NUEVO parpadeará en la pantalla LCD.

Fuera del área - Este mensaje aparecerá cuando alguien llama desde un área donde la compañía telefónica no ofrezca los servicios de identificación de llamadas o aún no está proporcionando la entrega del número a su zona.

P - Si su interlocutor ha elegido la opción para impedir que tanto su nombre como el número sean enviados, el mensaje se mostrará en la pantalla.

Ver el registro de los CID

1. Pulse la tecla **Menú**.
2. Pulse la tecla Menú de nuevo para elegir **Registro de llamadas (Call Log)**.





3. Pulse la tecla **Menú** de nuevo para elegir **Recibidas**
4. El Registro CID se mostrará. Utilice  y  para desplazarse sobre la lista.
5. En la pantalla aparece **Vacío** si no hay entradas del registro CID.

Marcación de un número desde la guía telefónica (CID Log)

Averigüe el número que desea marcar. Ver el registro de la guía telefónica (CID Log) A continuación, pulse la tecla




Agregar números a la guía telefónica

1. Pulse la tecla **Menú**.
2. Pulse la tecla **Menú** de nuevo para elegir **Registro de llamadas (Call Log)**.
3. Pulse la tecla **Menú** de nuevo para elegir **Recibidas**.
4. El Registro CID se mostrará. Use  y  para desplazarse por la lista hasta encontrar el número que desea añadir a la guía telefónica. Pulse la tecla **Menú**.
5. Pulse  y  para elegir **¿Añadir a la PB ?**, pulse la tecla **Menú**.



6. La pantalla muestra "**¿Nombre?**". Introduzca el nombre que desea utilizar (ver Añadir entradas a la Guía telefónica), a continuación, pulse la tecla **Menú**.
7. El número CID se mostrará, pulse la tecla **Menú**.
8. Use la tecla y para seleccionar el timbre que desea asociar con el número, presione la tecla **Menú** para confirmar.


Eliminación de una entrada en la guía (CID)

1. Pulse la tecla **Menú**.
2. Pulse la tecla **Menú** de nuevo para elegir **Registro de llamadas (Call Log)**.
3. Pulse la tecla **Menú** de nuevo para elegir **Recibidas**.
4. El Registro CID se mostrará. Utilice y para desplazarse por la lista hasta encontrar la entrada requerida en la Guía que desea eliminar.
5. Pulse la tecla **Menú**.
6. Pulse y para elegir **Borrar**, pulse la tecla **Menú**.

7.La pantalla LCD mostrará **Confirmar**. Usted puede pulsar la tecla **Menú** para borrar la entrada o pulsar la tecla  para cancelar y salir.

Borrar todos los registros del CID

1. Pulse la tecla **Menú**.
2. Pulse la tecla **Menú** de nuevo para elegir **Registro de llamadas (Call Log)**.
3. Pulse la tecla **Menú** de nuevo para elegir **Recibidas**.
4. El Registro CID se mostrará.
5. Pulse la tecla **Menú**.
6. Pulse  y  para elegir **Borrar todos**, pulse la tecla **Menú**.

7.La pantalla LCD mostrará **Confirmar**. Usted puede pulsar la tecla **Menú** para borrar todas las entradas o pulsar la tecla  para cancelar y salir.

Guía telefónica

La guía telefónica creada en su teléfono inalámbrico le permite almacenar los números utilizados con frecuencia para que usted pueda realizar una llamada a esos números sin tener que recordar o introducir el número de teléfono manualmente.





Mapa de caracteres

Para introducir un carácter alfanumérico específico, pulse una o varias veces el carácter correspondiente de acuerdo a la siguiente tabla: una vez para el primer carácter, dos veces para el segundo y así sucesivamente.

Tecla	Caracteres en el orden que se muestran				
0	0	SP	+	-	@ = / . []
1	Sp	1	;	?	? ! ' " ()
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9

SP = Espacio

Añadiendo entradas a la guía telefónica

1. Pulse la tecla **Menú**.
2. Pulse  para seleccionar **Guía telefónica (phonebook)**, pulse la tecla **Menú**.
3. Pulse  para elegir **Nueva entrada**, pulse la tecla **Menú**.
4. La pantalla muestra "**¿Nombre?**". Introduzca el nombre que desea utilizar y, a continuación, presione la tecla **Menú** para confirmar. La pantalla muestra "**¿Número?**". Introduzca el número deseado (hasta 20 dígitos), presione la tecla **Menú**.
5. Use la tecla  o  para seleccionar el **timbre que desea asociar con el número**, presione la tecla **Seleccionar** para confirmar.




Nota:

- Si comete un error al introducir un nombre o un número, use la tecla **FL/DEL** para editarlo. Cada vez que se pulsa esta tecla, se borra el último dígito. Para borrar todos los dígitos, presione y mantenga presionado la tecla **FL/DEL**.


Uso de una pausa

Una pausa es útil cuando tiene acceso a un sistema de respuesta de voz interactiva, por ejemplo un sistema bancario automatizado. Una pausa proporciona un retardo de 3 segundos. Si desea insertar una pausa al marcar un número en modo de espera o almacenar un número en la memoria, presione la tecla **RD/P**. La letra **P** aparecerá en la entrada de la pausa.






Visualización de las entradas de la guía telefónica



1. Pulse la tecla **Menú**.
2. Pulse la tecla **Abajo**  para elegir **Guía telefónica**, presione la tecla **Seleccionar**.
3. Aparecerá en la pantalla **Listado**, pulse la tecla **Menú**.
4. Se mostrarán las entradas de la guía telefónica. Utilice  y  para desplazarse sobre la lista. Las entradas se muestran en orden alfabético.
5. Si en la pantalla aparece **Vacío** si no hay entradas en la guía telefónica.

Marcación de un número desde la guía telefónica






Averigüe el número que desea marcar. Consulte "Visualización de las entradas de la guía telefónica". A continuación, pulse la tecla .

Edición de las entradas de la guía telefónica

1. Pulse la tecla **Menú**.
2. Pulse la tecla **Abajo**  para elegir **Guía telefónica**, presione la tecla **Seleccionar**.
3. Pulse  y  para elegir **Editar**, pulse la tecla **Menú**.
4. Use  y  para desplazarse por la lista de números de la guía telefónica hasta que encuentre el número que desea editar, pulse la tecla **Menú**.
5. Editar el nombre. Si es necesario, pulse la tecla **FL/DEL** para borrar el/los digito(s) y luego ingrese el nombre correcto deseado, pulse **Menú** para guardar.
6. Edición del número. Si es necesario, pulse la tecla **FL/DEL** para borrar el/los digito(s) y luego ingrese el número correcto deseado, pulse **Menú** para guardar.


7. Use la tecla  y  para seleccionar el timbre que desea asociar con el número, pulse **Menú** para confirmar.



Eliminar una entrada en la Guía Telefónica

1. Pulse la tecla **Menú**.
2. Pulse  para seleccionar **Guía telefónica**, pulse la tecla **Menú**.
3. Pulse  y  para elegir **Borrar registro**, pulse la tecla **Menú**.
4. Use  y  para desplazarse por la lista de números de la guía telefónica hasta que encuentre el número que desea borrar, pulse la tecla **Menú**.
5. La pantalla LCD mostrará **Confirmar**. **Usted puede presionar la** tecla seleccionar para eliminar todas las entradas o presione la tecla **Atrás** para cancelar y salir.

Eliminar todas las entradas en la Guía Telefónica

1. Pulse la tecla **Menú**.

2. Pulse  para seleccionar **Guía telefónica**, pulse la tecla **Menú**.

3. Pulse  y  para elegir **Borrar todos**, pulse la tecla **Menú**


4. La pantalla LCD mostrará **Confirmar**. Usted puede pulsar la tecla **Menú** para borrar todas las entradas o

pulsar la tecla  para cancelar y salir.

Estatus de la memoria

El estatus de la memoria muestra el número de entradas ya almacenadas en la guía.

1. Pulse la tecla **Menú**.

2. Pulse  para seleccionar **Guía telefónica**, pulse la tecla **Menú**.

3. Pulse  y  para elegir **Estatus de la memoria**, pulse la tecla **Menú**.

4. La pantalla muestra el estatus actual de la guía telefónica por ejemplo, **07/150 Utilizado**. Significa 150 registros pueden ser almacenados en el directorio telefónico. De los 150, 7 han sido almacenados.

Memorias de un solo toque

Usted puede almacenar 1 número en la memoria directa.

Almacenamiento de números de la memoria

Marque el número deseado y luego pulse y mantenga pulsado el botón M1 para almacenar. Una vez que se ha almacenado, se oirá un bip de confirmación y retornará a en espera.

Marcación desde las memorias de un toque

En el modo de espera, pulse **M1** para marcar el número. El número se marcará y el modo de manos libres se iniciará automáticamente.


Esta es una tecla útil en caso de emergencia y vale la pena almacenar el número de alguien que le ayudaría en un caso de emergencia.

Ajuste de la Base



Eliminar microteléfono

Esta función le permite eliminar un microteléfono registrado a la base.

1. Pulse la tecla **Menú**

2. Pulse las teclas  y  para seleccionar **Ajustes de la Base**, luego pulse la tecla **Menú**.

3. Pulse la tecla **Menú** para elegir la opción **eliminar microteléfono** del menu. La pantalla muestra "¿PIN?" para pedirle que introduzca el código PIN (el código PIN predeterminado es "0000"). Pulse la tecla **Menú**.



4. Use la tecla hacia arriba  y  para seleccionar un auricular, pulse la tecla **Menú** para confirmar. Después de eso, el microteléfono eliminado no podrá ser utilizado con la base, se puede re-registrar a la base si es necesario. Si selecciona el microteléfono actual, se escuchará un tono de advertencia.



Duración del flash

Usted puede seleccionar para cambiar el tiempo de duración del flash siguiendo los siguientes pasos:

1. Pulse la tecla **Menú**.

2. Pulse las teclas  y  para seleccionar **Ajustes de la Base**, luego pulse la tecla **Menú**.

3. Utilizar las teclas  y  para elegir el menú **Duración del flash**. Pulse la tecla **Menú**.

4. La pantalla mostrará la configuración actual. Utilizar las teclas  y  para seleccionar **flash-1 (100 ms) / flash-2 (300 ms) / flash-3 (600 ms)**, pulse la tecla **Menú** para confirmar.

Modificar el PIN

Esta función le permite cambiar el número PIN de la Base activo actualmente. El PIN predeterminado es 0000.

1. Pulse la tecla **Menú**.

2. Pulse las teclas  y  para seleccionar **Ajustes de la Base**, luego pulse la tecla **Menú**.

3. Utilizar las teclas  y  para elegir el menú **Modificar PIN**. Pulse la tecla **Menú**.





4. La pantalla muestra "**¿PIN?**". Introduzca el PIN actual, a continuación, luego pulse la tecla **Menú** Si se valida el viejo código PIN, se le pedirá que introduzca un nuevo código PIN. Si no se valida el PIN antiguo, sonará un pitido de aviso y regresará al menú de **Modificar PIN**.

5. Introduzca el nuevo PIN, pulse la tecla **Menú**. Se le solicitará que confirme el código PIN. Introduzca el nuevo PIN otra vez y luego pulse la tecla **Menú** para confirmar y salir.

Ajustes del microteléfono


Ajuste de la alarma

Usted es capaz de ajustar la alarma en el microteléfono y ajustar la configuración de la alarma.

1. Pulse la tecla **Menú**.
2. Pulse las teclas  y  para elegir **Ajuste de microteléfono**, luego pulse la tecla **Menú**.
3. Pulse la tecla **Menú** para elegir del menú **Alarma**.
4. La pantalla mostrará la configuración actual. Use las teclas  y  para seleccionar **On/Off** (activar/desactivar), pulse la tecla **Menú**.
5. Si selecciona **On (activar)**, la pantalla le indica que ingrese el tiempo en formato **HH:MM** Use el teclado numérico para introducir, pulse la tecla **Menú**.
6. Cuando suene la alarma, pulse cualquier tecla para detener el sonido de la misma.







Notas:

- En el paso 5 es necesario introducir la hora en formato 24 horas.







- Para detener la alarma pulse cualquier tecla..
- Si decide **encender el repetidor**, la alarma sonará a intervalos regulares de 5 minutos. Si pulsa cualquier tecla  del microteléfono cuando suene la alarma, la alarma no sonará de nuevo hasta el día siguiente. Sin embargo, si se pulsa cualquier otra tecla, el sonido de la alarma se detendrá, pero seguirá sonando cada 5 minutos.

Ajuste de la Fecha y Hora

Formato de Fecha y hora

1. Pulse la tecla **Menú**.
2. Pulse las teclas  y  para elegir **Ajuste del microteléfono**, luego pulse la tecla **Menú**.
3. Pulse las  y  para seleccionar **Fecha y hora**, pulse la tecla **Menú**.
4. Pulse la tecla **menú** para seleccionar el **Formato de hora**.
5. Puede utilizar las teclas  y  para elegir el formato de fecha de hora (**12 - Horas/24 - Horas**), pulse la tecla **Menú** para guardar la elección.

Ajuste de la Fecha y Hora

1. Pulse la tecla **Menú**.
2. Pulse la tecla  o  key para elegir **Ajuste del** microteléfono, luego pulse la tecla **Seleccionar**.
3. Pulse las teclas  y  para seleccionar **Fecha y hora**, pulse la tecla **Menú**.
4. Pulse las teclas  y  para seleccionar el menú **Ajustar Fecha** o **Ajustar hora**, pulse la tecla **Menu** para seleccionar la opción deseada.
5. Introduzca la fecha/ hora actual mediante el teclado numérico y pulse la tecla **Menú** para guardar y salir.



Notas:

- Si selecciona Reloj de **12-Horas**, aparecerá **AM/PM** a la derecha de la hora en el modo de espera.



Selección de una base

Esta función le permite seleccionar una base de entre las ya registradas para el microteléfono.

1. Pulse la tecla **Menú**.

2. Pulse la tecla  o  key para elegir **Ajuste del microteléfono**, luego pulse la tecla **Seleccionar**.

3. Pulse las teclas  y  para seleccionar **Seleccionar Base** del menu, pulse la tecla **Menú**.



4. Puede utilizar las teclas  y  para seleccionar la base que desea utilizar, a continuación pulse la tecla **Menú**.

5. Aparece "**BS Seleccionado**" después de "**Búsqueda**".

Por descarte

Si restablece el microteléfono, todas las características se restaurarán a los ajustes iniciales de fábrica.

1. Pulse la tecla **Menú**.

2. Pulse las teclas  y  para elegir **Ajuste del microteléfono**, luego pulse la tecla **Menú**.

3. Pulse las teclas  y  para elegir el menú del **microteléfono por descarte**, luego pulse la tecla **Menú**.

4. Ingrese el código PIN code (el código por descarte es 0000), luego pulse la tecla **Menú**.





Resultado: Después de resetear, todos los ajustes del microteléfono se restaurarán a los valores de fábrica.



Existe también una opción por defecto en la configuración de base. Después de resetear, todos los ajustes se restaurarán a los valores de fábrica.

Restricción de llamadas

La restricción de llamadas permite al usuario prevenir ciertos números de teléfono con los prefijos específicos sean marcados por ejemplo 0845.



Por otra parte, todas las llamadas salientes pueden ser restringidas.

1. Pulse la tecla **Menú**.
2. Pulse las teclas  y  para elegir **Ajuste del microteléfono**, luego pulse la tecla **Menú**.
3. Pulse las teclas  y  para seleccionar el menú **Restricción**, pulse la tecla **Menú**. La pantalla muestra "**¿PIN?**" para pedirle que introduzca el código PIN (el código PIN predeterminado es "0000"). Pulse la tecla **Menú**.

4. Puede utilizar las teclas  y  para seleccionar **Externo** para detener todas las llamadas salientes, luego pulse la tecla **Menú**.
5. O pulse **Seleccionar Num** pulse la tecla **Menú**.
6. Pulse la tecla **menú** para seleccionar **número 1**, pulse la tecla **Menú**. Existen 4 registros disponibles para almacenar 4 prefijos diferentes para ser restringidos.
7. Ingrese el prefijo que desea restringir ej. 0845 o 07 o 09.
8. Pulse la tecla **Menú** para guardar y salir.

No Molestar

Esta función se apaga el timbre del microteléfono y permite al usuario ignorar todas las llamadas entrantes (excepto las del intercomunicador).

1. Pulse y mantenga pulsado la tecla  por 5 segundos para entrar en el modo No molestar. La pantalla mostrará para no molestar.
2. Para desactivar la función No Molestar,. Pulse y mantenga pulsado la tecla  de nuevo por 5 segundos.

Registro

El microteléfono suministrado ya se ha registrado en la base suministrada (configuración de fábrica). Cada microteléfono adicional que adquiera debe registrarse con la base. Se pueden registrar hasta 5 microteléfonos a la unidad base. Esto significa que usted puede hacer llamadas internas entre teléfonos registrados, transferir una llamada entre microteléfonos y contestar una llamada en cualquier lugar de la oficina/hogar en cualquier momento ya que todos los microteléfonos sonarán al mismo tiempo.

1. Antes de registrar un microteléfono a la base, debe presionar y mantener presionado la tecla de la unidad base **•))** por espacio de aproximadamente 5 segundos. Suéltelo una vez que la luz del indicador en uso / Indicador de carga en la base comience a parpadear. La base está ahora lista para registrar microteléfonos. Los siguientes pasos deben ser completados dentro de los 120 segundos.

2. Pulse la tecla **Menú**

Pulse las teclas **T/▲** y **T/▼** para elegir **REGISTRO**, después presione la tecla **Menú**.

Seleccione **base 1** luego pulse la tecla **Menú**.

En la pantalla, usted tiene la información BUSCANDO A 1.


3. Introduzca el **código PIN 0000** El registro tardará unos 10 segundos para completar otra señal acústica le avisará que el registro ha sido completado con éxito.

Llamadas con más de un microteléfono

Si tienes más de un microteléfono registrado en la misma base, puede realizar llamadas internas y transferir una llamada externa entre los microteléfonos registrados.

Cómo hacer una llamada interna



1. Pulse la tecla **LOCALIZAR (PAGE)**, a continuación, introduzca el número del microteléfono al que desea llamar.

2. Si el microteléfono introducido es válido, el microteléfono llamado sonará. La persona a la que llamó puede pulsar la tecla  para contestar la llamada interna.

3. Al final de la conversación, pulse la tecla 



Nota:

Durante la llamada interna, si llegara una llamada externa, la pantalla LCD mostrará el número de la

persona que llama. Usted debe pulsar la tecla  para finalizar la llamada interna y luego pulsar la tecla  para contestar la llamada.

Transferencia de llamadas entre microteléfonos


Puede transferir una llamada externa entre los microteléfonos que están registrados a la misma base.


1. Durante una llamada externa, pulse la tecla **LOCALIZAR (PAGE)** y luego el número del microteléfono al que desea transferir la llamada.
2. Si la persona que recibe la llamada puede responder a su llamada, él/ ella pueden presionar la tecla  para hablar con usted. En este momento se le puede informar de la llamada entrante.
3. Pulse la tecla  o cuelgue el microteléfono a la base para completar la transferencia.


Configuración de una llamada de conferencia de 3 vías

Cuando tiene ambas tanto una llamada externa como una llamada interna en curso, se puede establecer una llamada de conferencia a tres bandas, como sigue:

1. Durante una llamada externa, pulse la tecla **LOCALIZAR (PAGE)** y luego el número del microteléfono al que desea unirse en una llamada de 3 vías.

2. La persona que recibe la llamada debe presionar la tecla  para responder.

3. La persona que llama puede presionar la tecla  para comenzar una llamada de 3 vías.

4. Cualquiera de los dos microteléfonos internos puede pulsar la tecla  para salir de la llamada de conferencia en cualquier momento.

Nota: Si uno de los microteléfonos sale de la conferencia telefónica, los microteléfonos restantes continuarán la conferencia.

Identificación de Llamadas (Caller ID) de llamadas en espera

Cuando usted se suscribe al servicio de Llamada en espera de su compañía telefónica local, el teléfono mostrará el nombre y número de la segunda llamada, mientras usted mantiene una conversación (con la primera llamada).


LISTADO DE FUNCIONES

1. Tecnología DECT asegura conversación con calidad cristalina
2. Hasta 50 dB de amplificación recibida (5 niveles de volumen)
3. La tecla "AMPLIFICADOR" que establece el volumen del receptor para amplificar por defecto.
4. 4 ajustes de control de tonos digitales
5. Parlantes de alto rendimiento
6. CID parlante y teclado parlante (Inglés o Francés)
7. Gran pantalla LCD con luz de fondo
8. Amplia variedad de idiomas de visualización
9. timbre alto en el microteléfono y en la base
10. Flash brillante de timbre en el microteléfono y en la base
11. luz intermitente del microteléfono indica nuevo correo de voz y llamada nueva
12. Compatible con CID del FSK (Tipo 11) y las señales de correo de voz
13. Botones del teclado extra grandes
14. Un solo toque de teclado de emergencia (marca el número y enciende el parlante)
15. Listado de 40 llamadas entrantes en la memoria, listado de 10 llamadas salientes.
16. memoria de la guía telefónica de 150 números
17. Se pueden registrar hasta 5 microteléfonos a una unidad base.

- 18. Función de no molestar
- 19. Advertencia de voz de batería baja, alarma de fuera del alcance
- 20 Respuesta automática al levantar el auricular fuera de la base
- 21. 10 tonos de llamada del microteléfono y 5 tonos de llamada de la base
- 22. Función de intercomunicador:
- 23. Llamada conferencia de tres personas
- 24. Botones en línea y fuera de línea
- 25. Batería de respaldo opcional en la base
- 26. Disponibilidad de intercambio de baterías entre el microteléfono y la base

DETECCIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS

Síntomas	Chequeos y remedios
Sin funcionamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que el adaptador de corriente está conectado correctamente. • Compruebe que el cable del teléfono está conectado correctamente. • Compruebe que las baterías de los microteléfonos están totalmente cargadas. • Compruebe que las baterías de los microteléfonos están instaladas correctamente.
Si no hay tono de marcación	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que el cable del teléfono está conectado correctamente. • Compruebe que el adaptador de corriente está conectado correctamente. • Asegúrese de que está lo suficientemente cercano a la base • Si el microteléfono es nuevo, asegúrese de que está registrado en la base
No aparece nada en la pantalla	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que las baterías de los microteléfonos están instaladas correctamente. • Compruebe que las baterías de los microteléfonos están totalmente cargadas. • Compruebe que el microteléfono esté encendido.
Microteléfono parece tener vida muy corta de las baterías	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe los contactos de carga. • Una corta duración consistentemente e la batería puede indicar que es necesario reemplazar las baterías. • Asegúrese de que se utilizan las baterías correctas.

<p>El número del llamante no se muestra</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que ha suscrito a un servicio de identificación de llamadas a través de su proveedor de red. • La persona que llama puede haber ocultado sus detalles. • Deje el teléfono sonar un par de veces ya que puede haber una demora en la recepción de la información de identificación de llamadas.
<p>Si pulso  no hay tono de marcación</p>	<p>Microteléfono probablemente necesita re-sincronización con la base. Apagar el microteléfono, esperar 10 segundos y luego volver a encenderlo. Ellos deben sincronizarse en unos 5-30 segundos</p>
<p>La señal intermitente del microteléfono funciona, pero el microteléfono no está funcionando</p>	<p>Segure que el volumen del timbre del microteléfono no está ajustado al mínimo</p> <p>Asegúrese que la función de no molestar no está activa</p>
<p>Luz intermitente roja siempre parpadeando</p>	<p>Correo de voz en espera en el servidor de correo de voz de su proveedor</p> <p>Una llamada perdida, al revisar el listado de llamadas entrantes se borra este indicador</p>
<p>Ruido estático de la línea</p>	<p>Asegure que su teléfono no se encuentra demasiado cerca de una lámpara de toque, microondas, etc.</p> <p>Asegúrese de que ha applied filtros DLS si se utiliza el servicio módem DSL</p>

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tiempo de carga	15 horas
Temperatura ambiente:	Normal: 10°C ~ 30°C, Extremos: -10°C ~ 40°C
Humedad	0% 90%
Peso (oz)	Base: 16; Microteléfono 5,7
Dimensiones (pulgadas)	Base: 6.7 x 3,1 x 5,0; Microteléfono 7.0 x2.1 x 1.2
Fuente de poder	Adaptador AC UL listed 7.5vdc, 500MA Batería de la Base 4 xAAA NIMH (Opcional, no suministrado) Batería del microteléfono 2 x AAA NIMH (incluidas)
Nivel de amplificación en dB (AMP apagado)	0-18 dB in 5 pasos
Nivel de amplificación en dB (AMP encendido)	32-50 dB
Tono	T1-T4
Idioma de la pantalla	Inglés, francés, español, alemán, Italiano, Holandés, Pyccknn, Portugues, Polski, Svenska, Dansk, Norsk, Emhnika, Turkce, Ykpaihclkn, Magyar
Voz parlante	Inglés, Francés, (voz Inglés en modo español)

Diseño y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.


FILTROS DSL




Si se suscribe a un servicio DSL

Añada un filtro de ruido (comuníquese con su proveedor de DSL) a la línea telefónica entre la unidad base y la conexión de la línea telefónica en caso de ocurrir lo siguiente:

- Se escucha ruido durante las conversaciones.
- Las características del identificador de llamadas no funcionan correctamente.

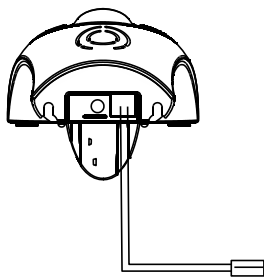

Para una sola línea
toma de teléfono

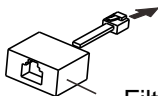

Filtro de ruido

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

General

Utilice únicamente la fuente de alimentación que se incluye con el producto.

Utilice únicamente las baterías recargables aprobadas suministradas.

No abra la unidad portátil (excepto para reemplazar las baterías de los microteléfonos) o de la base. Póngase en contacto con la línea de ayuda para todas las reparaciones.

Nunca arroje las baterías al fuego. Existe un grave riesgo de explosión y / o la liberación de productos químicos tóxicos.

No coloque objetos sobre el cable de la línea o cable de alimentación que pueden causar daños.

Si está seguro de que no va a utilizar el teléfono durante más de un mes, extraiga las pilas.

Limpieza

Desconecte el Teléfono Limpie el teléfono con una toalla suave. Mantenga los contactos e carga de la base y del microteléfono limpios. Nunca utilice abrillantadores o

agentes de limpieza - que podrían dañar el acabado o el sistema eléctrico en el interior.

Ambientales

No exponer a la luz directa del sol.

Asegúrese que siempre exista un libre flujo de aire sobre las superficies del teléfono.

No coloque ninguna parte de su producto en el agua y no lo utilice en condiciones de humedad, por ejemplo baños.

No exponga su producto al fuego u otras condiciones peligrosas.

Desconecte el teléfono de la toma del teléfono durante tormentas eléctricas, ya que podría dañar el teléfono. Su garantía no cubre los daños causados por tormentas

No utilice el teléfono para informar acerca de una fuga de gas estando cerca de la fuga.

El teléfono ha sido diseñado para trabajar dentro de un rango de temperatura The telephone is designed for working within a temperature range of 5°C a 45°C.

GARANTÍA

Desde el momento que su producto Geemarc es adquirido, Geemarc le brinda garantía por un año. Durante éste tiempo, todas las reparaciones o sustituciones (a nuestro criterio) son totalmente gratuitas. En caso de tener algún problema contacte nuestra línea de ayuda o visite nuestro sitio de Internet www.geemarc.com. La garantía no cubre accidentes, negligencia ni roturas de cualesquiera de los componentes. El producto no puede haber sido manipulado ni desarmado por personas que no sean representantes autorizados Geemarc La garantía Geemarc no limita en ningún aspecto sus derechos legales.

IMPORTANTE: SU RECIBO ES PARTE DE SU GARANTÍA Y DEBERÁ GUARDARSE Y PRESENTARSE EN CASO DE UN RECLAMO DE GARANTÍA.

Tenga en cuenta que: La garantía se aplica al Reino Unido solamente



DECLARACIÓN: Geemarc Telecom SA declara por la presente, que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las Directivas de Equipos Terminales de Radio y

Telecommunications 1999/5/EEC y en particular la sección 1a, 1b y la sección 3 del artículo 2. El teléfono no funciona si la corriente de línea es inferior a 18 mA.

La declaración de conformidad se puede consultar en www.geemarc.com

Conexión eléctrica: El aparato está diseñado para funcionar sólo con suministro de 230V 50Hz. (Clasificación de "tensión peligrosa" según la norma EN60950). El aparato no incorpora un interruptor integral de corriente. Para desconectar la corriente, bien sea desconecte todas las tomas de corriente o desenchufe el adaptador de corriente alterna AC. Al instalar el aparato, asegúrese de que el enchufe sea fácilmente accesible.

Conexión telefónica: Los voltajes presentes en la red de telecomunicaciones se clasifican como TNV-3 (Voltaje de red de telecomunicaciones) de acuerdo con la norma EN60950.

DIRECTIVAS DE RECICLAJE

La WEEE (RAEE) (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) se ha puesto en marcha para poder reciclar de la mejor manera los productos al final de su vida útil. Cuando este producto no se utilice más, por favor no lo ponga en su basurero doméstico.

Favor utilice una de las siguientes opciones de desecho:

- Retire las baterías y depositarlas en un recolector WEEE apropiado. Deposite el producto en un recolector WEEE apropiado.
- O, entregue el producto antiguo a la tienda minorista. Si usted compra uno nuevo, deben aceptarlo.

Así, si usted respeta estas instrucciones se asegura la salud humana y la protección ambiental.



Para el soporte al producto y ayuda, visite nuestro sitio web en www.geemarc.com
Teléfono 01707.384438.
O por fáj al 01707 832529



UGAD260_Sp_v1.7

geemarc United Kingdom

5 Swallow Court
Swallowfields
Welwyn Garden City
Hertfordshire, AL7 1SB
For product support.
01707 384438

www.geemarc.com

geemarc France

Parc de l'Etoile
2, rue Galilée BP20061
59791 GRANDE SYNTHÉ CEDEX
TEL. SERVICE APRES VENTE.
03 28 58 75 99

www.geemarc.com

geemarc Deutschland

Siemensstrasse 10,
53121 Bonn
Deutschland
Tel: +49(0)228/ 74 87 09 0
Fax: +49(0)228/ 74 87 09 20

www.geemarc.com