

**geemarc™ AMPLIDECT™ 260**  
Hear the Difference

## Téléphone sans fil amplifié avec aide vocale



AMPLIDECT™260  
[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

**Français**

# TABLES DES MATIERES

Vérifiez si une version plus récente de ce guide d'utilisation est disponible sur notre site Internet [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com) !

<b>TABLE DES MATIERES</b> .....	<b>1</b>
Introduction .....	3
<b>DESCRIPTION</b> .....	<b>5</b>
Description générale .....	7
Description des icônes de l'écran LCD .....	9
<b>INSTALLATION</b> .....	<b>11</b>
Connexion des cordons .....	11
Installation des piles.....	12
Charge du combiné.....	14
Utilisation du clip de transport du combiné .....	15
<b>FONCTIONS DE BASE</b> .....	<b>16</b>
Mise en marche/arrêt du combiné .....	16
Navigation dans le menu .....	17
Passer un appel .....	18
Recevoir un appel .....	19
Couper le micro.....	19
Fonction d'amplification .....	20
Réglage de la sonnerie .....	22
Aide vocale à la numérotation.....	23
Présentation vocale de l'appelant.....	24
Réglage du volume de réception et du Haut-Parleur... ..	25
Recomposition du dernier numéro.....	26
Verrouillage du clavier .....	28

# TABLES DES MATIERES

Réponse automatique.....	28
Sélection de la langue.....	29
Nom du combiné.....	30
Alarme et autres tonalités.....	31
Recherche du combiné.....	32
Mode de composition.....	33
Mains libres.....	34
Flash.....	34
<b>FONCTIONS AVANCEES.....</b>	<b>35</b>
Répertoire des appels entrant.....	35
Répertoire téléphonique.....	35
Touche mémoire.....	44
Réglages Base.....	45
Réglage de la mélodie de base.....	47
Réglages Combiné.....	47
Enregistrement.....	53
Appeler avec plus d'un combiné.....	54
ID de l'appelant lors d'un appel en attente.....	55
<b>LISTE DES FONCTIONNALITES.....</b>	<b>56</b>
<b>DEPANNAGE.....</b>	<b>58</b>
<b>SPECIFICATIONS TECHNIQUES.....</b>	<b>60</b>
<b>ADSL.....</b>	<b>61</b>
<b>INFORMATIONS DE SECURITE.....</b>	<b>62</b>
<b>GARANTIE.....</b>	<b>64</b>
<b>DIRECTIVES DE RECYCLAGE.....</b>	<b>66</b>

# INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté votre téléphone Geemarc AD260. Ce téléphone offre tous les avantages de la technologie sans fil (conforme à la norme Digitally Enhanced Cordless Telecommunications-DECT), ainsi qu'un clavier comportant de grosses touches, idéal pour ceux qui souffrent de problèmes de vue. Ce téléphone est également compatible avec les appareils auditifs.

Il est important de lire les instructions ci-dessous afin de pouvoir exploiter tout le potentiel offert par téléphone Geemarc. Conservez ce guide d'utilisation dans un endroit sûr pour toute référence ultérieure.

Ce guide explique comment utiliser le téléphone suivant :

## **AD260**



AMPLIDECT™ 260

# INTRODUCTION

## Déballage

---

En déballant le téléphone, vérifiez que tous les éléments suivants sont présents :

- 1 combiné AD260
- 1 unité de base AD260
- 1 adaptateur secteur
- 2 piles AAA Ni-MH
- 1 cordon d'alimentation du téléphone
- 1 clip de transport
- 1 Guide d'utilisation

\* La forme des prises peut varier suivant les spécifications du pays.



N'hésitez-pas à consulter notre site Internet pour obtenir des informations et de l'aide sur nos produits :

**[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)**


Téléphone **0328587599**

Ou fax **0328587576**

# DESCRIPTION





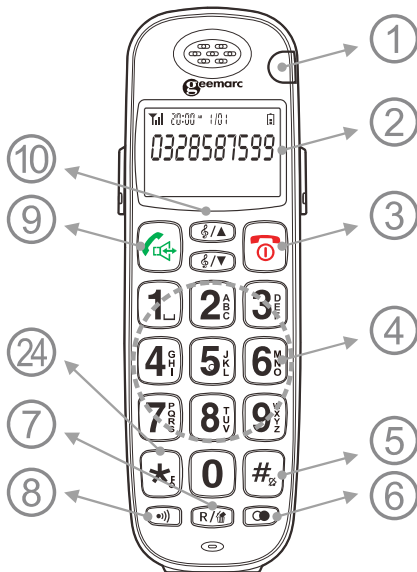



## Description générale

### Face avant du combiné




1. En cours d'utilisation/Flash de sonnerie/Boîte vocale/Indicateur d'appel manqué.
2. Écran LCD

# DESCRIPTION


3.  Touche : appuyez sur cette touche pour terminer un appel ou revenir en mode hors ligne. Touche marche/arrêt.
4. Clavier
5. Touche:  maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes pour activer le mode « Ne pas déranger » »NON DISTURB «.
6. Touche : Bis/Pause.
7. Touche : flash/touche d'effacement. Génère un signal « flash » pour activer le mode de mise en attente de l'appel. Supprime un caractère lors de l'entrée de texte. Revient d'un niveau en arrière dans le système de menu.
8. Touche PAGE : pressez-la pour utiliser l'interphone ou transférer un appel.
9. Touche  : pressez-la pour passer un appel ou y répondre. Pressez-la pour activer le haut-parleur au cours d'un appel.
10. Touches  et : pressez-les pour régler la tonalité ou défiler dans les options de menu.
24. Touche  : pressez-la et maintenez-la enfoncée pour activer/désactiver la fonction de verrouillage clavier. Configurer une audioconférence.




# DESCRIPTION
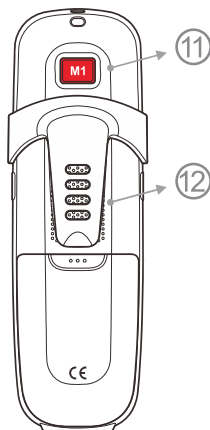
## Dos du combiné

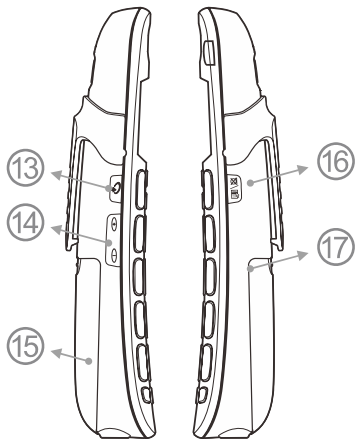


## Côté du combiné



11. **M1** touche mémoire qui lance l'appel en mode haut-parleur
12. Haut-parleur
13. Touche  : Pressez-la pour amplifier le son du récepteur en communication
14. Réglage du volume
15. Couvercle du compartiment de piles
16. Touche de menu ( /  ) : pressez-la pour accéder aux options du menu ou du sous-menu. Pressez-la pour désactiver/activer le micro au cours d'un appel.
17. Clip de ceinture



# DESCRIPTION

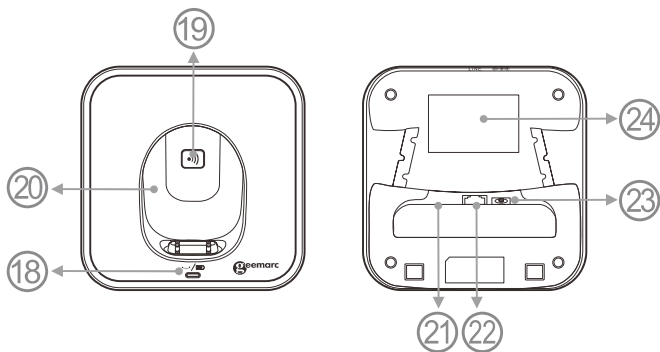

## Face avant de la base

- 18. Indicateur d'utilisation/charge
- 19. Touche Page : pressez-la pour rechercher tous les combinés enregistrés
- 20. Emplacement du combiné

## Dessous de la base

- 21. Sonnerie
- 22. Emplacement pour cordon téléphonique : pour le branchement à la ligne téléphonique
- 23. Emplacement pour adaptateur secteur : pour le branchement au bloc secteur.
- 24. Compartiment à batterie.

# DESCRIPTION


## Description des icônes de l'écran LCD

L'écran LCD est divisé en trois zones distinctes :

**Le secteur des icônes.** Il se trouve en haut de l'écran. Il affiche la variété d'icônes du système qui vous aideront à utiliser le téléphone.

**Le secteur principal.** Il figure au centre de l'écran. Il affiche les éléments suivants :

- le numéro composé
- les informations d'affichage de l'appel
- le répertoire téléphonique
- les informations de menu
- le mode veille, le numéro du combiné

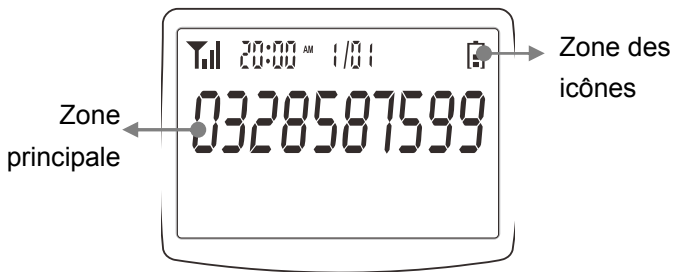

# DESCRIPTION

<b>NEW</b>	<b>Nouvel appel</b> Indique que vous avez manqué un ou plusieurs appels
<b>VMWI</b>	<b>MSG en attente</b> Indique que vous avez un ou plusieurs messages vocaux.
<b>TALK</b>	<b>Décrochage</b> Indique que la ligne est occupée.
<b>SPEAKER</b>	<b>Mains libres</b> Indique que la fonction mains libres est activée.
	<b> Icône de batterie</b> Elle s'affiche automatiquement si votre téléphone est activé. Elle montre l'état de charge de la batterie. Plus le nombre de barres est élevé, plus la batterie est chargée.
	<b>Icône de signal</b> Indique la force actuelle du signal. Plus le nombre de barres est élevé, plus le signal est fort. Si le combiné est trop éloigné de la base, l'icône se met à clignoter à l'écran LCD.
	<b>Icône d'alarme</b> Cette icône apparaît lorsque vous programmez une alarme afin qu'elle se déclenche à une heure spécifique.
<b>COMB BLOQUE</b>	<b>Verrouillage du clavier</b> Ce message apparaît lorsque le clavier est verrouillé si vous appuyez sur une touche.

# INSTALLATION

## Connexion des cordons

---


1. Branchez une extrémité du cordon téléphonique dans l'emplacement prévu pour la prise téléphonique de la base et l'autre extrémité à une prise téléphonique murale standard ou derrière une box internet.
2. Branchez l'extrémité modulaire de l'adaptateur secteur à l'emplacement prévu pour la prise électrique sur la base, puis branchez l'adaptateur secteur dans une prise électrique.

Veillez à placer le téléphone à proximité de la prise d'alimentation de sorte à ce que le câble ne soit pas trop tendu. La prise de courant doit également être facilement accessible si vous devez débrancher l'appareil.

Vérifiez que le téléphone se trouve à au moins 1 m des autres appareils électriques, par ex. la TV, la radio et les écrans pour éviter toute interférence. Evitez d'exposer l'appareil aux rayons directs du soleil.

# INSTALLATION

À la prise  
électrique  
murale

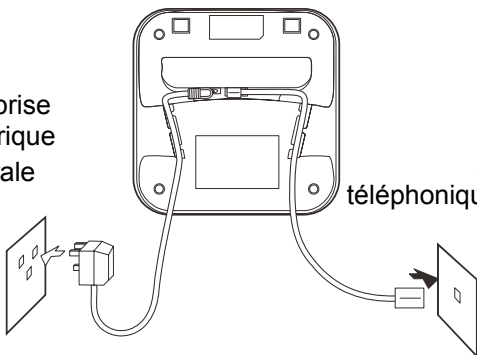


À la prise  
téléphonique  
murale

## Installation des piles


Les piles rechargeables Ni-MH (taille AAA) sont livrées avec votre téléphone. Installez les deux piles avant d'utiliser votre téléphone.

1. Faites glisser le couvercle du compartiment des piles dans le sens de la flèche (vers le bas) et retirez-le.
2. Insérez les nouvelles piles comme indiqué en faisant correspondre la polarité correcte (+,-).

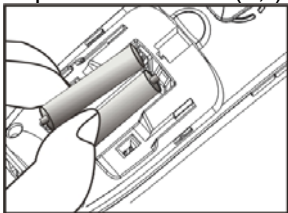

# INSTALLATION

3. Pour remettre le couvercle du compartiment des piles en place, faites-le glisser jusqu'à sa position d'enclenchement.

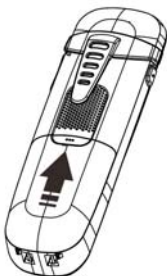

## Remarques :

Les piles rechargeables doivent être remplacées si elle n'ont pas retrouvé leur capacités de charge complète après avoir été chargées.

Utilisez toujours des piles rechargeables NI-MH de bonnes qualités en remplacement des anciennes.

N'utilisez pas d'autres piles ou des piles alcalines conventionnelles.

Les piles du combiné entièrement chargées peuvent offrir 80 heures en mode veille ou 8 heures de conversation.

# INSTALLATION

## Charge du combiné

---

**Remarque importante** : avant d'utiliser le combiné pour la première fois, **VOUS DEVEZ ENTIEREMENT LE CHARGER** pendant environ **15 heures**.

Pour charger le combiné, vous devez le placer sur sa base.


**Résultat** : le combiné placé sur sa base s'allume automatiquement.

## Installation de la batterie dans le socle (option)

---

La base peut utiliser une batterie rechargeable spéciale NiMh en cas de coupure de secteur. Cette batterie n'est pas fournie. Ne jamais utiliser de pile non rechargeable.

Cette batterie entièrement chargée peut offrir 4 heures d'alimentation électrique de secours.

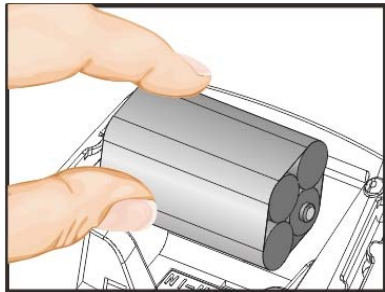

Veillez contacter le service après-vente si vous souhaitez en commander une au 03 28 58 75 99.

# INSTALLATION


## Utilisation du clip de transport du combiné

---

Le clip de transport du combiné vous permet d'emmener le combiné avec vous. Il s'agrafe aisément à votre ceinture, ou à la poche de votre chemise.

Si vous souhaitez retirer le clip de transport :

Insérez un tournevis sur le bord de l'un de ses bras et retirez-le en le soulevant.

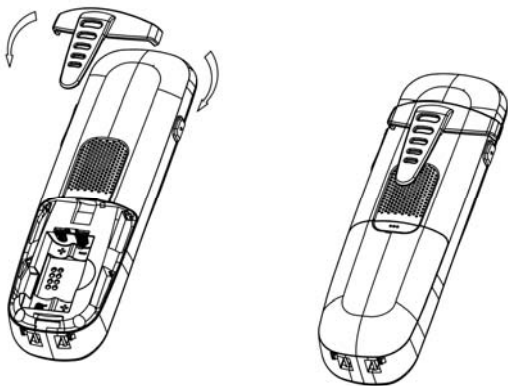



# FONCTION DE BASE

## Mise en marche/arrêt du combiné

---

Si le combiné est éteint, pour qu'il s'allume automatiquement, placez-le sur la base. Pour mettre le combiné en marche ou à l'arrêt en mode veille, procédez comme suit :

1. Pour mettre en marche le combiné, pressez la touche



et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran s'allume. Une fois en marche, le combiné entrera en mode d'inscription et recherchera une base enregistrée.

**Remarque** : s'il trouve une unité de base, il se mettra en mode de veille, l'écran affichera le numéro du combiné et son nom (si vous en avez enregistré un), l'icône du signal, l'icône de batterie et l'heure actuelle. Si le combiné ne trouve pas d'unité de base, il agira comme s'il se trouvait **hors de portée** du signal.

2. Pour mettre le combiné à l'arrêt, maintenez la touche



enfoncée jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

**Remarque** : Si les batteries sont très faibles, rien n'apparaît à l'écran. **VOUS DEVEZ CHARGER COMPLETEMENT LE COMBINÉ AVANT DE L'UTILISER.**







Toutes les descriptions dans ce manuel concernent un appareil en mode de veille. Mettez le téléphone en mode de veille en pressant la touche

# FONCTION DE BASE


## Navigation dans le menu

---

### Pour accéder à une option du menu :


1. Pour afficher les options du menu, appuyez sur la touche **Menu** (/ ).
2. Pour défiler dans les options du menu, pressez plusieurs fois les touches  ou .
3. Pour choisir un menu ou une option, appuyez sur la touche / , lorsque le menu souhaité s'affiche à l'écran.

### Pour retourner en mode veille depuis n'importe quel menu :

Pour revenir en mode veille depuis un menu, appuyez sur la touche .

Le téléphone reviendra aussi automatiquement en mode veille si aucune touche n'est pressée après environ 40 secondes.



### Pour revenir un niveau en arrière

Pour revenir un niveau en arrière dans le système de menus, appuyez sur la touche .


# FONCTION DE BASE


## Passer un appel


---

1. Prenez le combiné et appuyez sur la touche . L'icône TALK apparaît à l'écran.
2. Composez un numéro de téléphone.
3. Pour terminer un appel, appuyez sur la touche  ou remettez le combiné sur l'unité de base.

Vous pouvez également entrer le numéro de téléphone souhaité en mode veille. Ceci vous permet d'apporter des modifications avant la composition du numéro. Procédez comme suit :

1. Composez le numéro de votre correspondant (jusqu'à 32 chiffres). Vérifiez-le. Vous pouvez utiliser la touche  pour insérer une pause de 2 secondes (requis certaines fois pour accéder à une ligne externe sur certains téléphones commerciaux).

**Remarque :** si vous faites une erreur en composant le numéro, appuyez sur la touche  pour effacer le dernier chiffre.

2. Lorsque le numéro correct apparaît, pressez la touche .



# FONCTION DE BASE

## Recevoir un appel

---

Lorsqu'un correspondant vous appelle, les informations **d'appel** s'affichent et le voyant DEL se met à clignoter.

Si l'appelant peut être identifié, son numéro s'affiche. Sinon, seules les informations **d'appel** apparaissent. Si vous avez reçu un message vocal, la mention « **VMWI** » apparaîtra à l'écran.

1. Pour répondre à l'appel, appuyez sur la touche .  
Si vous avez activé la fonction de réponse automatique, lorsque le combiné se trouve sur l'unité de base, soulevez-le simplement pour répondre.
2. Pour terminer un appel, appuyez sur la touche  ou remettez le combiné sur le socle de charge.  
Une fois le téléphone raccroché, l'écran LCD affiche la durée de l'appel.

**Remarques** : vous pouvez régler le volume de la sonnerie en utilisant la touche Vol +/- lorsque le téléphone sonne.


## Couper le micro

---

Vous pouvez, au cours d'une conversation, couper temporairement le micro du téléphone afin que votre correspondant ne puisse plus vous entendre.

**Exemple** : vous voulez dire quelque chose à quelqu'un dans la pièce mais vous ne souhaitez pas que votre correspondant vous entende.

# FONCTION DE BASE

Pour couper le micro, appuyez sur la touche **Secret** () (🔒/🔓), la touche est située sur le côté droit du combiné, pendant la conversation. Le message « **Mode secret** » apparaît à l'écran.

Pour réactiver le micro, ré appuyez sur la même touche. Le téléphone reviendra en condition normale d'utilisation.



## Fonction d'amplification

---

### Réglage du volume (combiné et micro)



Pendant une conversation, appuyez sur la touche de volume placée à gauche du combiné pour modifier les réglages de volume. Le réglage de volume est indiqué de la manière suivante à l'écran VL1 à VL5. Il est possible de régler le volume entre 0 et 18dB.

### Stimulation de l'amplification


Votre téléphone est équipé d'une fonction d'amplification spécialisée, conçue pour s'adapter à votre audition. Au cours d'une conversation, vous pouvez activer la fonction  placée à gauche du combiné. Ceci augmentera le volume pendant une conversation. Pour désactiver la fonction d'amplification, ré appuyez sur la touche . Lorsque cette fonction est activée, le volume du récepteur peut être défini entre 32-50dB.








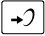

### Réglage de la tonalité
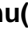
# FONCTION DE BASE

Vous pouvez également régler la tonalité afin qu'elle soit adaptée à votre niveau d'audition. Au cours d'une conversation et si la fonction d'amplification a été sélectionnée, la commande de tonalité numérique est activée. À l'aide des touches  ou  vous pouvez défiler dans les quatre options de tonalité disponibles. Le réglage de tonalité numérique apparaît de la manière suivante à l'écran, T1 à T4.

## Amplification automatique

La fonction  peut être définie automatiquement sur Activée chaque fois que le téléphone est utilisé.

1. Appuyez sur la touche **Menu** .
2. Appuyez sur  jusqu'à ce que l'option de **RÉG. COMB** s'affiche, puis pressez la touche .
3. Appuyez sur  jusqu'à ce que l'option de **RÉG. AUDIO** s'affiche, puis pressez la touche .
4. Appuyez sur  jusqu'à ce que la fonction **AMPLIFIER** s'affiche, puis pressez la touche .
5. Appuyez sur  jusqu'à ce que **ACTIF** s'affiche, puis pressez la touche .

# FONCTION DE BASE

## Réglage de la sonnerie

---

Vous pouvez sélectionner votre propre sonnerie externe (depuis le réseau téléphonique) ou interne (à partir des autres combinés enregistrés auprès de la même unité de base) et régler le volume.

1. Appuyez sur la touche **Menu** (☒/☒).
2. Pressez les touche (🎵/▲) ou (🎵/▼) pour choisir le menu des **Rég. COMB**, puis appuyez sur la touche ☒/☒.
3. Pressez les touches (🎵/▲) ou (🎵/▼) pour choisir **Reg Sonnerie**, puis appuyez sur la touche ☒/☒.
4. Pressez la touche ☒/☒ pour choisir la **sonnerie Interne** ou pressez la touche (🎵/▼) pour choisir la **sonnerie Externe**, appuyez sur la touche ☒/☒.
5. Pressez la touche ☒/☒ pour choisir la **Mélodie**

**Remarque** : vous pouvez sélectionner une des **10 mélodies** en utilisant les touches (🎵/▲) ou (🎵/▼). Lorsque vous sélectionnez une sonnerie, le téléphone joue la mélodie choisie, appuyez sur la touche ☒/☒ pour confirmer la sonnerie souhaitée.

À l'étape 5, pressez sur la touche (🎵/▼) pour sélectionner le **volume**, puis appuyez sur la touche ☒/☒. Vous pouvez choisir le niveau de la sonnerie parmi les **5 réglages de volume** proposé ou **Vol Eteint**

# FONCTION DE BASE

pour mettre l'appareil sous silence. Appuyez sur la touche **Menu pour confirmer**.

















## Remarques :

- Si vous réglez le volume sur « **Vol Eteint** », lors d'un appel entrant, seule l'information d'un nouvel appel apparaîtra à l'écran.
- Vous pouvez également utiliser les commandes + ou - pour régler le volume de la sonnerie lorsque vous recevez un appel.

## Aide vocale à la numérotation

---

L'AD260 est en mesure d'énumérer vocalement les numéros que vous pressez sur le clavier.

1. Appuyez sur la touche **Menu**(/).
2. Pressez les touches  ou  pour choisir le menu des **Rég. COMB**, puis appuyez sur la touche /.
3. Pressez les touches  ou  pour choisir la **REGL AUDIO**, puis appuyez sur la touche /.
4. Pressez les touches  ou  pour choisir **NUM VOCALE** puis appuyez sur la touche /.
5. Utilisez les touches  ou  pour choisir **ACTIF** ou **INACTIF** pour activer ou désactiver la fonction.



# FONCTION DE BASE

## Présentation vocale de l'appelant

---

L'AD260 est en mesure d'annoncer le numéro de téléphone d'un appel entrant.

1. Appuyez sur la touche **Menu** (☒/☒).
2. Pressez les touches (☒/▲) ou (☒/▼) pour choisir le menu des **Rég. COMB**, puis appuyez sur la touche ☒/☒.
3. Pressez les touches (☒/▲) ou (☒/▼) pour choisir la **REGL AUDIO**, puis appuyez sur la touche ☒/☒.
4. Pressez les touches (☒/▲) ou (☒/▼) pour choisir **CID VOCALE**, puis appuyez sur la touche ☒/☒.
5. Utilisez les touches (☒/▲) ou (☒/▼) pour choisir **ACTIF** ou **INACTIF** pour activer ou désactiver la fonction annonce vocale d'un appel entrant, puis appuyez sur la touche ☒/☒, vous entendrez un bip de confirmation.



Vous avez la possibilité de choisir le nombre de répétition du numéro de téléphone en choisissant 1 Fois/2 Fois/ 3 Fois pour trois fois par exemple ou Toujours (sans arrêter).



# FONCTION DE BASE



## Réglage du Volume de réception et du haut parleur



---

Vous avez la possibilité de régler le volume au décroché pour le haut-parleur ainsi que le volume de réception.

Pour le réglage du volume de réception, suivre les instructions du chapitre précédent et au point 4 choisir **Vol. ECOUTE** au lieu de **CID VOCALE**, puis appuyez sur la touche **Menu**(/).

Choisir le volume d'écoute puis appuyez sur la touche / pour valider, vous entendrez un bip de confirmation.

Pour le réglage du volume du Haut-parleur, suivre les instructions du chapitre précédent et au point 4 choisir **VOLUME HP** au lieu de **CID VOCALE**, puis appuyez sur la touche /.

Choisir le volume du HP puis appuyez sur la touche / pour valider, vous entendrez un bip de confirmation.

# FONCTION DE BASE



## Recomposition du dernier numéro

---

1. Appuyez sur la touche  pour décrocher.
2. Pressez la touche .


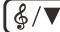

L'écran affiche le dernier numéro composé et le téléphone recompose le numéro.

### Ou

1. Appuyez sur la touche  en mode veille.
2. Appuyez sur la touche  pour composer le numéro.

## Recherche d'un numéro dans le répertoire et recomposition de celui-ci

Le téléphone vous permet de récupérer les 10 derniers numéros composés.

1. Appuyez sur la touche  en mode veille.
2. Si vous souhaitez utiliser la mémoire, appuyez plusieurs fois sur la touche  jusqu'à ce que vous trouviez le numéro à composer.
3. Appuyez sur la touche  pour composer le numéro souhaité.






### Remarques :



- Si aucun numéro n'est trouvé, la mention « **vide** » s'affiche.
- Lorsque le répertoire est plein, chaque fois que vous composez un nouveau numéro, le numéro le plus ancien stocké dans le répertoire est automatiquement effacé et remplacé par le numéro le plus récent.

# FONCTION DE BASE

## Utilisation des options du répertoire de recomposition

Ces options permettent d'ajouter ou de supprimer des numéros de téléphone dans la liste de recomposition.


1. Appuyez sur la touche  .
2. Faites défiler l'écran jusqu'au numéro souhaité à l'aide des touches  ou .
3. Lorsque celui-ci apparaît à l'écran, appuyez sur la touche **Menu** () pour sélectionner une option :
  - **Ajout d'un numéro dans le répertoire** : permet d'ajouter le numéro dans le répertoire téléphonique. Pour enregistrer l'entrée, procédez comme décrit dans la section « Ajout d'une entrée dans le répertoire téléphonique » (vous trouverez le numéro déjà enregistrée dans le champ approprié).
  - **Effacer** : permet de supprimer le numéro sélectionné.
  - **Tout effacer** : permet de supprimer toutes les entrées du répertoire de recomposition.
4. Pour revenir en mode veille, appuyez sur la touche .


**Remarque** : Lorsque vous sélectionnez les options de **suppression** à l'étape 3, un message « **Confirmer ?** » vous demande de confirmer la suppression. Pour confirmer, appuyez sur la touche , pour quitter pressez la touche .


# FONCTION DE BASE

## Verrouillage du clavier

---

Si vous activez cette fonctionnalité, toutes les touches seront verrouillées. Vous pouvez répondre aux appels en utilisant la touche  du téléphone. Mais si vous raccrochez, le téléphone retourne en mode verrouillé. Cette fonction est utile pour éviter de presser des touches par erreur.

Pour verrouiller les touches en mode de veille, maintenez enfoncée la touche  jusqu'à ce que l'écran affiche « COMB BLOQUE ».





Pour déverrouiller le clavier, maintenez la touche  enfoncée jusqu'au message COMB DEBLOQ.

**Remarque :** En mode verrouillé, si vous appuyez sur une touche, le téléphone émettra une tonalité d'erreur et le message « COMB BLOQUE » **s'affichera à nouveau.**







## Réponse automatique

---

Avec cette fonction, vous pouvez répondre à un appel en retirant simplement le combiné de l'unité de base, sans appuyer sur aucune touche.

1. Appuyez sur la touche **Menu** ().
2. Pressez plusieurs fois les touches  ou  pour choisir les **REGL.COMB**, puis appuyez sur la touche .


# FONCTION DE BASE

3. Utilisez les touches  ou  pour choisir l'option de **Réponse auto**, puis appuyez sur la touche .
4. Utilisez la touche  ou  pour choisir **Actif ou Inactif** activer/désactiver la fonction, puis appuyez sur la touche , vous entendrez un bip de confirmation.

## Sélection de la langue

---

Le combiné prend en charge une multitude de langues prédéfinies. Vous pouvez modifier la langue utilisée pour l'affichage des messages du menu.










1. Appuyez sur la touche **Menu**().
2. Pressez les touches  ou  pour choisir les **REGL.COMB**, puis appuyez sur la touche .
3. Utilisez les touches  ou  pour choisir **CHOIX LANGUE**, puis appuyez sur la touche .
4. Les langues s'affichent. Utilisez les touches  ou  pour faire défiler les langages. Le contenu du téléphone a été traduit de manière professionnelle dans chacune des langues affichées.
5. Appuyez sur la touche  pour sélectionner la langue requise, vous entendrez un bip de confirmation.

# FONCTION DE BASE

## Nom du combiné

---

Vous pouvez attribuer un nom au combiné en utilisant cette fonction. Ceci vous permet de reconnaître facilement votre téléphone si plus d'un appareil est enregistré auprès de la même unité de base. Pour attribuer un nom au combiné :

1. Appuyez sur la touche **Menu**(/☰).
2. Pressez plusieurs fois les touches /▲ ou /▼ pour choisir **REGL.COMB**, puis appuyez sur la touche /☰.
3. Pressez les touches /▲ ou /▼ pour choisir **NOM COMBINE** puis appuyez sur la touche /☰.
4. Vous pouvez entrer le nom du combiné (jusqu'à 12 caractères) en utilisant le pavé numérique (voir la section Ajout d'entrées dans le répertoire téléphonique). Utilisez la touche  pour supprimer les caractères incorrects, puis appuyez sur la touche /☰ pour confirmer et quitter.

Une fois que vous avez attribué un nom au combiné, la mention COMB1 s'affiche pendant environ 5 secondes,

puis le nom donné à l'appareil apparaît pendant environ 5 secondes.

# FONCTION DE BASE

## Alarme et autres tonalités

---

Un bip retentit lorsque le combiné se trouve hors de portée de l'unité de base. Vous pouvez activer/désactiver cet avertissement sonore.

1. Appuyez sur la touche **Menu** (☒/☑).
2. Pressez plusieurs fois les touches (🎵/▲) ou (🎵/▼) pour choisir **REGL.COMB**, puis appuyez sur la touche ☒/☑.
3. Utilisez les touches (🎵/▲) ou (🎵/▼) pour choisir le **REG.TONALITE**, puis appuyez sur la touche ☒/☑.
4. Utilisez les touches (🎵/▲) ou (🎵/▼) pour choisir **SIGN.FAIBLE**, puis appuyez sur la touche ☒/☑.
5. Utilisez la touche (🎵/▲) ou (🎵/▼) pour choisir **Actif/Inactif** pour activer/désactiver cet avertissement sonore, puis appuyez sur la touche ☒/☑, vous entendrez un bip de confirmation.

Deux autres tonalités peuvent être activées/désactivées sur le modèle AD260 :

- **BIP CLAVIER** – Chaque fois que vous appuyez sur une touche, le combiné émet un son. Vous pouvez désactiver la tonalité des touches pour une utilisation silencieuse du clavier. Pour certaines conditions d'erreur, une tonalité d'avertissement sera tout de même émise si une touche incorrecte est pressée.



# FONCTION DE BASE

**Remarque** : pour une utilisation normale, nous vous recommandons de laisser la tonalité des touches actives. Le téléphone est ainsi plus facile à utiliser.

- **Bat. faible** – Si les piles du combiné sont déchargées, un bip sonore est émis.

Pour les activer ou les désactiver et vis versa, sélectionnez l'option de tonalité de touche ou de batterie faible au lieu de la fonction d'alarme dans le groupe ci-dessus d'instructions.

## Recherche du combiné

---

Vous pouvez rechercher le combiné depuis l'unité de base. Le combiné émettra une tonalité spéciale, ce qui est utile pour le localiser en cas de perte. Appuyez sur la touche ●))) sur l'unité de base (pendant moins de 5 secondes), tous les combinés enregistrés auprès de l'unité de base sonneront pendant environ 60 secondes.

Pour désactiver la fonction de recherche, ré appuyez sur la touche ●))) de l'unité de base ou sur n'importe quelle touche du combiné.



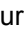










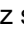






**Remarque** : En cas de pression sur la touche ●))) d'une durée égale ou supérieure à 5 secondes, l'unité de base entrera en mode d'enregistrement.

# FONCTION DE BASE

## Mode de composition

---

Vous pouvez modifier le mode de composition en procédant comme suit :

1. Appuyez sur la touche **Menu** (/ ).
2. Appuyez sur les touches /  ou /  pour sélectionner les **REGL.BASE**, puis pressez la touche / .
3. Utilisez les touches /  ou /  pour choisir le **MODE NUM.**, puis appuyez sur la touche **Menu** (/ .
4. Vous pouvez appuyer sur la touche /  ou /  pour sélectionner les options requises du mode de composition (**FREQ VOCALES/DECIMAL**) et appuyez sur la touche / . Un bip de confirmation est émis.


**Remarque :** Si vous n'êtes pas sûr du mode de composition à utiliser, veuillez contacter votre fournisseur de services local. Le paramètre par défaut est **FREQ VOCALES**.


# FONCTION DE BASE

## Mains libres

---

Au cours d'un appel téléphonique, vous pouvez activer le bloc micro/haut-parleur intégré au combiné. Dans ce mode, vous pouvez poser votre combiné sur un meuble (par exemple un bureau) et profiter d'une conversation en mode mains libres.

Pour activer cette fonctionnalité, appuyez sur la touche  pendant une conversation téléphonique. Le message SPEAKER apparaît à l'écran.


Pour désactiver la fonction et continuer à parler en mode normal, ré-appuyez sur la touche . Le message disparaîtra.

### Remarques :

- Avant d'approcher le combiné de votre oreille, assurez-vous d'avoir désactivé le main libre.
- Pour régler le volume du haut-parleur, utilisez les touches Vol + et Vol -.

## Flash

---

Si la ligne est occupée, une pression sur la touche  permet d'envoyer le signal de flash (**F sera affiché à l'écran**). Cette touche est employée en conjonction avec des services spéciaux (par ex. mise en attente de l'appel) susceptibles d'être utilisés sur votre réseau téléphonique. Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec votre opérateur téléphonique.

# FONCTION AVANCEES

## Répertoire des appels entrant









---

Lorsque vous recevez un appel, si les informations de l'appelant sont transmises par le réseau sur lequel l'appel a été passé (et que l'appelant ne les a pas masquées), le numéro de téléphone de l'appelant s'affiche. En outre, s'il s'agit d'un appel manqué, l'icône D'UN NOUVEL APPEL apparaîtra à l'écran. Si la mémoire des appels entrant est pleine, l'icône D'UN NOUVEL APPEL clignotera à l'écran.

**Hors zone** - Ce message s'affiche à l'écran si un correspondant vous appelle depuis une zone sur laquelle l'opérateur téléphonique ne propose pas de services d'identification de l'appelant ou ne gère pas encore l'envoi des numéros d'appel pour votre région.

**P** - Si l'appelant a choisi l'option de masquer son nom et son numéro de téléphone, l'écran affichera la mention P à l'écran.


## Affichage du journal des appels entrant

1. Appuyez sur la touche **Menu** (/ .
2. Ré appuyez sur la touche /  pour choisir **JOURNAL**.
3. Ré appuyez sur la touche /  pour choisir l'option **RECU**.
4. Le journal des appels entrant s'affiche. Utilisez les touches  ou  pour faire défiler la liste
5. La mention **Vide** s'affiche à l'écran s'il n'existe aucune entrée dans le journal des appels entrant.

















# FONCTION AVANCEES

## Composition d'un numéro à partir du journal des appels entrant



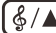

Recherchez le numéro à composer. Référez-vous à la section intitulée «Affichage du journal des appels entrant».

Puis appuyez sur la touche  .












## Ajouter une entrée du journal des appels entrant dans le répertoire téléphonique

1. Appuyez sur la touche **Menu** (/ .
2. Ré appuyez sur la touche /  pour choisir **JOURNAL**.
3. Ré appuyez sur la touche /  pour choisir l'option **RECU**.
4. Le journal des appels entrant s'affiche. Utilisez les touches  ou  pour faire défiler la liste et trouver le numéro à ajouter dans le répertoire téléphonique. Appuyez sur la touche / .
5. Appuyez sur  ou  pour choisir l'option **AJOUT.REPERT**, appuyez sur la touche / .
6. L'écran affiche « **Nom ?** » Entrez le nom que vous souhaitez utiliser (voir la section intitulée Ajout d'entrées dans le répertoire téléphonique), puis appuyez sur la touche / .

# FONCTION AVANCEES
















7. Le numéro d'appel entrant s'affiche, appuyez sur la touche .
8. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner la sonnerie à associer au numéro, appuyez sur la touche  pour confirmer.

## Suppression d'un appel entrant

1. Appuyez sur la touche **Menu** ()
2. Ré appuyez sur la touche  pour choisir le **JOURNAL**.
3. Ré appuyez sur la touche  pour choisir l'option **RECU**.
4. Le journal des appels entrant s'affiche. Utilisez les touches  ou  pour faire défiler la liste et trouver le numéro à supprimer,
5. Appuyez sur la touche .
6. Appuyez sur  ou  pour choisir l'option **EFFACER**, appuyez sur la touche .
7. L'écran affiche la mention « **Confirmer?** ». Vous pouvez appuyer sur la touche  pour supprimer l'entrée ou presser la touche  pour annuler et quitter.

# FONCTION AVANCEES

## Suppression de toutes les entrées du journal des appels entrant

1. Appuyez sur la touche **Menu** (/ ).
2. Ré appuyez sur la touche /  pour choisir le **JOURNAL**.
3. Ré appuyez sur la touche /  pour choisir l'option **RECU**.
4. Le journal des appels entrant s'affiche.
5. Appuyez sur la touche / .
6. Appuyez sur  ou  pour choisir l'option **TOUT EFFACER**, appuyez sur la touche / .
7. L'écran affiche la mention « **Confirmer ?** ». Vous pouvez appuyer sur la touche /  pour supprimer toutes les entrées ou presser la touche  pour annuler et quitter.

# FONCTION AVANCEES

## Répertoire téléphonique

Le répertoire téléphonique inséré dans votre téléphone sans fils vous permet d'enregistrer les numéros fréquemment utilisés de sorte à pouvoir passer un appel sans avoir à vous en rappeler ou à le recomposer manuellement.

## Table des caractères

Pour entrer un caractère alphanumérique spécifique, appuyez une fois ou plusieurs fois sur la touche pertinente pour le caractère requis en vous référant à la table suivante : une pression pour le premier caractère, deux pressions pour le second, etc.

Touche	Caractères dans l'ordre affiché										
0	0	SP	+	-	@	=	/	\	[	]	
1	Sp	1	;	?	?	!	!	'	"	(	)
2	A	B	C	2							
3	D	E	F	3							
4	G	H	I	4							
5	J	K	L	5							
6	M	N	O	6							
7	P	Q	R	S	7						
8	T	U	V	8							
9	W	X	Y	Z	9						

SP = Espace



# FONCTION AVANCEES


## Ajout d'entrées dans le répertoire téléphonique

1. Appuyez sur la touche **Menu** (☒/☒).
2. Appuyez sur (☒/▼) pour choisir le **REPertoire**, appuyez sur la touche ☒/☒.
3. Appuyez sur (☒/▼) pour choisir **AJOUT.ENTREE**, appuyez sur la touche ☒/☒.
4. L'écran affiche « **Nom ?** » Entrez le nom que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur la touche ☒/☒ pour confirmer. L'écran affiche « **Numéro ?** ». Entrez le numéro souhaité (jusqu'à 20 chiffres), appuyez sur la touche ☒/☒.
5. Utilisez les touches (☒/▲) ou (☒/▼) pour sélectionner la sonnerie à associer au numéro, appuyez sur la touche ☒/☒ pour confirmer.





**Remarque :** Si vous faites une erreur en entrant un nom ou un numéro, appuyez sur la touche (R/☒) pour le modifier. Chaque fois que vous appuierez sur cette touche, le dernier chiffre sera supprimé. Pour effacer tous les caractères, maintenez enfoncée la touche (R/☒).

# FUNCTION AVANCEES

## Utilisation de la fonction Pause


La fonction pause est utile lorsque vous accédez à un système de réponses vocales interactives, par ex. un système bancaire automatisé. La pause offre un délai de 3 secondes. Si vous souhaitez insérer une pause lors de la composition d'un numéro en mode veille ou stocker un numéro dans le répertoire téléphonique, appuyez sur la touche . La lettre **P** apparaît dès que la fonction de pause a été activée.

## Affichage des entrées du répertoire téléphonique

1. Appuyez sur la touche **Menu** .
2. Appuyez sur  pour choisir le **REPertoire**, appuyez sur la touche .
3. La mention **Liste** s'affiche, appuyez sur la touche .
4. Les entrées du répertoire téléphonique s'affichent.  
Utilisez les touches  ou  pour faire défiler la liste. Les entrées sont répertoriées par ordre alphabétique.
5. La mention **Vide** s'affiche à l'écran s'il n'existe aucune entrée dans le répertoire téléphonique.

# FONCTION AVANCEES

## Composition d'un numéro à partir du répertoire téléphonique








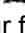





Recherchez le numéro à composer. Référez-vous à la section intitulée « Affichage des entrées du répertoire téléphonique ». Puis appuyez sur la touche .

## Modification des entrées du répertoire téléphonique












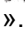

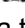

1. Appuyez sur la touche **Menu** (/.
2. Appuyez sur  pour choisir le **REPertoire**, appuyez sur la touche /.
3. Appuyez sur  ou  pour choisir l'option **MODIF.ENTREE**, appuyez sur la touche /.
4. Utilisez les touches  ou  pour faire défiler la liste des numéros du répertoire téléphonique et trouver le numéro à modifier, appuyez sur la touche /.
5. Modifiez le nom. Le cas échéant, appuyez sur la touche  pour effacer les caractères, puis entrez le nom correct souhaité, appuyez sur la touche / pour enregistrer.
6. Modifiez le numéro. Le cas échéant, appuyez sur la touche  pour effacer les caractères, puis entrez le nom correct souhaité, appuyez sur la touche / pour enregistrer.
7. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner la sonnerie à associer au numéro, appuyez sur la touche / pour confirmer.

# FONCTION AVANCEES

## Suppression d'une entrée dans le répertoire téléphonique

1. Appuyez sur la touche **Menu**(/).
2. Appuyez sur / pour choisir le **REPertoire**, appuyez sur la touche /.
3. Appuyez sur / ou / pour choisir l'option **EFFAC.ENTREE**, appuyez sur la touche /.
4. Utilisez les touches / ou / pour faire défiler la liste des numéros du répertoire téléphonique et trouver le numéro à supprimer, appuyez sur la touche /.
5. L'écran affiche la mention « **Confirmer ?** ». Vous pouvez appuyer sur la touche / pour supprimer l'entrée ou presser la touche  pour annuler et quitter.

## Suppression de toutes les entrées dans le répertoire téléphonique

1. Appuyez sur la touche **Menu**(/).
2. Appuyez sur / pour choisir le **REPertoire**, appuyez sur la touche /.
3. Appuyez sur / ou / pour choisir l'option **TOUT EFFACER**, appuyez sur la touche /.
4. L'écran affiche la mention « **Confirmer ?** ». Vous pouvez appuyer sur la touche / pour supprimer toutes les entrées ou presser la touche  pour annuler et quitter.

# FONCTION AVANCEES

## État de la mémoire

L'état de la mémoire affiche le nombre d'entrées déjà stockées dans le répertoire téléphonique.

1. Appuyez sur la touche **Menu** (☒/☑).
2. Appuyez sur (☎/▼) pour choisir le **REPertoire**, appuyez sur la touche ☒/☑.
3. Appuyez sur (☎/▲) ou (☎/▼) pour choisir l'option **ETAT REPERT.**, appuyez sur la touche ☒/☑.
4. L'écran affiche l'état actuel du répertoire téléphonique, par exemple, **07/150 utilisées**. Cela signifie que le répertoire téléphonique peut contenir 150 entrées. Sur les 150, 7 ont été utilisées.

## Touche mémoire

---

Vous pouvez enregistrer un numéro dans la mémoire directe,

### Stockage en mémoire des numéros

Saisissez le numéro souhaité, pressez le bouton **M1** et maintenez-le enfoncé pour enregistrer. Une fois le numéro stocké, un bip de confirmation est émis et vous retournerez au mode de veille.

### Composition à partir des mémoires

En mode veille, appuyez sur **M1** pour composer le numéro. Le numéro sera composé et le mode mains libres s'activera automatiquement.

Il s'agit d'une touche d'urgence utile et il est important de stocker le numéro d'une personne susceptible de vous aider en cas d'urgence.



















# FONCTION AVANCEES

## Réglages BS

---












### Suppression d'un combiné

Cette fonction vous permet de supprimer un combiné enregistré dans l'unité de base.




1. Appuyez sur la touche **Menu**(/).
2. Pressez les touches / ou / pour choisir les **REGL.BASE**, puis appuyez sur la touche /.
3. Appuyez sur la touche / pour choisir le menu de **EFFAC.COMB.**. L'écran affiche « **CODE PIN?** » pour vous inviter à entrer le code PIN (Le code PIN par défaut « 0000 »). Puis appuyez sur la touche /.
4. Utilisez les touches / ou / pour sélectionner un combiné, appuyez sur la touche / pour confirmer. Après cela, le combiné supprimé ne pourra plus être utilisé avec l'unité de base. Il est tout de même possible de le réenregistrer dans l'unité de base le cas échéant. Si vous sélectionnez le combiné actuel, une tonalité d'avertissement retentira.

### Durée du flash

Vous pouvez modifier la durée du flash, en procédant comme suit:

1. Appuyez sur la touche **Menu**(/).
2. Pressez les touches / ou / pour choisir les **REGL.BASE**, puis appuyez sur la touche /.
3. Utilisez les touches / ou / pour sélectionner le menu **TEMPS FLASH**. Appuyez sur la touche /.

# FONCTION AVANCEES

4. L'écran affiche le réglage actuel. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **100ms /300ms /600ms**, appuyez sur la touche  pour confirmer.

## Modification du code PIN










Cette fonction vous permet de modifier le numéro PIN de l'unité de base actuellement active. Le code PIN par défaut est 0000.

1. Appuyez sur la touche **Menu**().
2. Pressez les touches  ou  pour choisir **REGL.BASE**, puis appuyez sur la touche .
3. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner le menu **CHANGE PIN**. Appuyez sur la touche .
4. L'écran affiche « **CODE PIN ?** ». Entrez le code PIN actuel, puis appuyez sur la touche . Si l'ancien code PIN est validé, vous serez invité à entrer un nouveau code PIN. Si l'ancien code PIN n'est pas validé, un bip d'avertissement retentira et vous reviendrez au menu de **CHANGE PIN**.
5. Entrez le nouveau code PIN, puis appuyez sur la touche . Il vous sera demandé de confirmer le code PIN. Ressaisissez le nouveau code PIN, puis appuyez sur la touche  pour confirmer et quitter.

# FONCTION AVANCEES
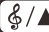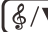
## Réglage de la mélodie de base

---

1. Appuyez sur la touche **Menu**(/).
2. Pressez les touches  ou  pour choisir **REGL.BASE**, puis appuyez sur la touche .
3. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner le menu **Reg.Sonnerie**. Appuyez sur la touche .
4. Choisir la mélodie parmi les 5 souhaitées puis appuyez sur la touche .










**Remarque :** Il n'est pas possible d'éteindre la sonnerie émise par la base.

## Réglages Combiné

---



### Réglage de l'alarme

Vous pouvez régler l'alarme sur le combiné et ajuster les paramètres de l'alarme.


1. Appuyez sur la touche **Menu**(/).
2. Pressez les touches  ou  pour choisir les **REGL.COMB** puis appuyez sur la touche .
3. Pressez la touche  pour choisir le menu **ALARME**.
4. L'écran affiche le réglage actuel. Utilisez les touches  ou  pour choisir **ACTIF/INACTIF**, puis appuyez sur la touche .



# FUNCTION AVANCEES











5. Si vous sélectionnez **ACTIF**, vous serez invité à entrer l'heure dans le format suivant : **HH:MM**. Utilisez le pavé numérique pour entrer l'heure, appuyez sur la touche / .
6. Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur une touche pour l'arrêter.

## Remarques :





- À l'étape 5, vous devez entrer l'heure en format de 24 heures.
- Appuyez sur une touche quelconque pour arrêter l'alarme.
- Si vous choisissez l'option **VEILLE ACT.**, l'alarme se déclenche à intervalles réguliers de 5 minutes. Si vous appuyez sur la touche  du combiné alors que l'alarme sonne, elle ne se déclenche pas avant le jour suivant. Par contre, si vous appuyez sur n'importe quelle autre touche, l'alarme s'arrêtera de sonner mais se déclenche toutes les 5 minutes.

## Réglage de l'heure et de la date

### *Format de l'heure et de la date*

1. Appuyez sur la touche **Menu**(/ .
2. Pressez les touches  ou  pour choisir les **REGL.COMB**, puis appuyez sur la touche / .
3. Appuyez sur les touches  ou  pour choisir le menu **DATE/HEURE**, appuyez sur la touche / .

# FONCTION AVANCEES

- Appuyez sur la touche / pour sélectionner le **FORMAT HEURE**
- Vous pouvez utiliser les touches  ou  pour choisir le format de l'heure (**12H /24H**), appuyez sur la touche **Menu** pour enregistrer.

## *Réglage de l'heure et de la date*

- Appuyez sur la touche **Menu**(/).
- Pressez les touches  ou  pour choisir les **REGL.COMB**, puis appuyez sur la touche /.
- Appuyez sur les touches  ou  pour choisir le menu **DATE/ HEURE**, appuyez sur la touche /.
- Appuyez sur les touches  ou  pour choisir le menu **REGL.DATE** ou **REGL.HEURE**, appuyez sur la touche / pour sélectionner l'option requise.
- Entrez la date/heure actuelle à l'aide du pavé numérique et appuyez sur la touche / pour enregistrer et quitter.

**Remarques :** Si vous choisissez le format de **12 heures**, **AM/PM** apparaîtra à droite de l'heure lorsque l'appareil est en mode de veille.

# FONCTION AVANCEES

## Sélection d'une unité de base

Cette fonction vous permet de sélectionner une unité de base parmi celles déjà jumelées au combiné.

1. Appuyez sur la touche **Menu** (☒/☒).
2. Pressez les touches (♫/▲) ou (♫/▼) pour choisir les **REGL.COMB**, puis appuyez sur la touche ☒/☒.
3. Appuyez sur les touches (♫/▲) ou (♫/▼) pour choisir le menu **CHOISIR BASE**, appuyez sur la touche ☒/☒.
4. Vous pouvez utiliser les touches (♫/▲) ou (♫/▼) pour sélectionner l'unité de base à utiliser, puis appuyez sur la touche ☒/☒.
5. L'écran affiche la mention « **Recherche** », puis « **CHOISIR BASE** ».

## Paramètres par défaut

Si vous réinitialisez le combiné, toutes les fonctions reviendront sur leurs réglages initiaux d'usine.

1. Appuyez sur la touche **Menu** (☒/☒).
2. Pressez les touches (♫/▲) ou (♫/▼) pour choisir les **REGL.COMB**, puis appuyez sur la touche ☒/☒.
3. Appuyez sur les touches (♫/▲) ou (♫/▼) pour choisir **RAZ COMBINE**, puis appuyez sur la touche ☒/☒.

# FONCTION AVANCEES

4. Entrez le code PIN (le code par défaut est 0000), puis appuyez sur la touche .

**Résultat** : après la réinitialisation, tous les paramètres du combiné seront restaurés sur leurs valeurs par défaut.

Il existe également une option par défaut dans les réglages de l'unité de base. Après la réinitialisation, tous les paramètres de l'unité de base seront restaurés sur leurs valeurs par défaut.





## Interdiction d'appel INACTIF ?

L'interdiction d'appel permet à l'utilisateur d'empêcher la composition de certains numéros dotés de préfixes spécifiques, par ex. 0845.

Alternativement, tous les appels sortant peuvent être interdits.



1. Appuyez sur la touche **Menu**()
2. Pressez les touches  ou  pour choisir les **REGL.COMB**, puis appuyez sur la touche .
3. Appuyez sur les touches  ou  pour choisir le menu **BLOQUER**, appuyez sur la touche . L'écran affiche « **CODE PIN?** » pour vous inviter à entrer le code PIN (Le code PIN par défaut « 0000 »). Puis appuyez sur la touche .
4. Vous pouvez utiliser les touches  ou  pour choisir la fonction **Externe** et empêcher tous les appels sortant, appuyez sur la touche .

# FUNCTION AVANCEES

5. Ou appuyez sur **Select NUM**, appuyez sur la touche .
6. Appuyez sur la touche  pour sélectionner le **numéro 1**, appuyez sur la touche . 4 enregistrements sont disponibles pour interdire 4 différents préfixes.
7. Entrez le préfixe à interdire, par ex. 0845, 07 ou 09.
8. Appuyez sur la touche  pour enregistrer et quitter.

## Ne pas déranger

Cette fonction désactive la sonnerie du combiné et permet à l'utilisateur d'ignorer tous les appels entrant (sauf les appels de l'interphone).







1. Pressez la touche  et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes pour entrer dans le mode Ne pas déranger. L'écran affiche la mention Ne pas déranger.
2. Pour désactiver la fonction Ne pas déranger. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes.

# FONCTION AVANCEES

## Enregistrement d'un combiné

---

Le combiné est déjà jumelé avec l'unité de base fournie (réglage par défaut). Chaque combiné supplémentaire acheté doit être enregistré auprès de l'unité de base. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 combinés sur votre base. Cela signifie que vous pouvez passer des appels internes aux combinés enregistrés, transférer un appel entrant entre les combinés et répondre à un appel à n'importe quel endroit au bureau, ou à domicile, à tout moment, puisque tous les combinés passeront simultanément l'appel.



1. Avant d'enregistrer un combiné, appuyez sur la touche ●)) de l'unité de base et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. Vous pourrez la relâcher sitôt que l'indicateur d'utilisation/de charge sur l'unité de base commencera à clignoter. L'unité de base est maintenant prête pour l'enregistrement du combiné. La procédure suivante doit être complétée dans les 120 secondes.
2. Appuyez sur la touche / .  
Pressez les touches  ou  pour choisir l'option **ENREGISTRER**, puis appuyez sur la touche **Menu**.  
Choisissez **base 1** puis appuyez sur la touche / .  
L'écran affiche la mention RECHERCHE 1.
3. Entrez le **code PIN 0000**. L'enregistrement prendra environ 10 secondes et un second bip sonore vous indiquera que l'enregistrement a réussi.

# FUNCTION AVANCEES



## Appeler avec plus d'un combiné

Si plus d'un combiné est enregistré sur la même base, vous pouvez passer des appels internes et transférer un appel externe entre les combinés enregistrés.

### Passer un appel interne


1. Appuyez sur la touche **PAGE** de votre combiné, puis entrez le numéro de combiné à appeler.
2. Si le numéro entré est correct, le combiné appelé se mettra à sonner. La personne appelée peut appuyer sur la touche  pour répondre à l'appel interne.
3. À la fin de votre conversation, appuyez sur la touche .

**Remarque** : Au cours d'un appel interne, si on vous appelle de l'extérieur, l'écran affichera le numéro de l'appelant.

Appuyez sur la touche  pour terminer la conversation interne, puis pressez la touche  pour répondre à l'appel.

### Transfert d'appel entre les combinés

Vous pouvez transférer un appel externe entre les combinés enregistrés auprès de la même base.




1. Au cours d'un appel externe, appuyez sur la touche **PAGE**, puis entrez le numéro du combiné vers lequel vous souhaitez transférer l'appel.
2. Si la personne appelée peut répondre à votre appel, elle appuiera sur la touche  pour parler avec vous. À ce moment vous pourrez l'informer de l'appel entrant.

# FONCTION AVANCEES

3. Appuyez sur la touche  ou replacez le combiné dans l'unité de base pour terminer le transfert.

## Configurer une conférence à 3

Lorsque vous avez deux appels en cours, l'un en provenance de l'interphone, l'autre issu de l'extérieur, vous pouvez configurer une audioconférence tri directionnelle, en procédant comme suit :

1. Au cours d'un appel externe, appuyez sur la touche **PAGE**, puis entrez le numéro du combiné que vous souhaitez ajouter à la conférence à 3.
2. La personne appelée doit appuyer sur la touche  pour répondre à l'appel.
3. La personne appelée peut appuyer sur la touche  pour débiter la conférence à 3.
4. La touche  peut être pressée sur chacun des deux combinés internes pour quitter l'audioconférence à tout moment.

**Remarque** : si l'un des participants quitte la conférence à 3, les deux autres parties pourront poursuivre la communication.

## ID de l'appelant lors d'un appel en attente

Si vous vous êtes abonné au service de mise en attente des appels auprès de votre opérateur téléphonique local, le téléphone affichera le nom ainsi que le numéro du second appelant pendant la conversation.



# LISTE DES FONCTIONNALITES

1. La technologie DECT garantit une conversation claire comme du cristal
2. Amplification reçue allant jusqu'à 50dB (5 niveaux de volume)
3. Touche « D'AMPLIFICATION » qui amplifie par défaut le volume du récepteur.
4. 4 réglages numériques de commande de tonalité
5. Haut-parleur et micro hautes performances
6. Annonce vocale d'un appel entrant et saisie vocale (anglais ou français)
7. Grand écran LCD rétroéclairé
8. Vaste choix de langues d'affichage
9. Sonnerie forte dans le combiné et l'unité de base
10. Flash lumineux dans le combiné et l'unité de base
11. Le flash du combiné indique un nouveau message vocal ou entrant
12. Compatible FSK CID (type 1) et signaux de messages vocaux
13. Touches extra larges
14. Mémoire d'urgence (compose le numéro et active le micro et haut parleur)
15. 40 appels entrant en mémoire, mémorise 10 appels sortant


# LISTE DES FONCTIONNALITES

16. Mémoire pour 150 entrées dans le répertoire téléphonique
17. 5 combinés au max. peuvent être enregistrés auprès de l'unité de base
18. Fonction Ne pas déranger
19. Avertissement vocal en cas de batterie faible, alarme si le combiné se trouve hors de portée
- 20 Décrochage automatique en retirant le combiné de l'unité de base
21. 10 tonalités de sonnerie pour le combiné et 5 pour l'unité de base
22. Fonction d'interphone
23. Conférence à 3
24. Touches En ligne et Hors ligne
25. Option pour une batterie de secours sur l'unité de base
26. Echange de piles entre le combiné et l'unité de base possible

# DEPANNAGE

Symptôme	Vérification et solution
L'appareil ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que l'adaptateur électrique est correctement connecté.</li><li>• Vérifiez que le cordon téléphonique est correctement branché.</li><li>• Vérifiez que les piles du combiné sont entièrement chargées.</li><li>• Vérifiez que les piles du combiné sont correctement insérées.</li></ul>
Aucune tonalité	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que le cordon téléphonique est correctement branché.</li><li>• Vérifier que l'adaptateur électrique est correctement connecté.</li><li>• Assurez-vous d'être à proximité de l'unité de base</li><li>• S'il s'agit d'un nouveau combiné, vérifiez qu'il est bien enregistré auprès de l'unité de base.</li></ul>
Rien ne s'affiche à l'écran	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que les piles du combiné sont correctement insérées.</li><li>• Vérifiez que les piles du combiné sont entièrement chargées.</li><li>• Vérifiez que le combiné est en marche.</li></ul>
La durée de vie des piles semblent très courte dans le combiné	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez les contacts de charge.</li><li>• Il est conseillé de remplacer les piles si leur durée de vie est constamment écourtée.</li><li>• Vérifiez que les bonnes piles sont utilisées.</li></ul>

# DEPANNAGE

<p>Le numéro de l'appelant ne s'affiche pas</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contrôlez si vous êtes bien abonné au service d'identification de l'appelant</li><li>• auprès de votre opérateur local.</li><li>• L'appelant a peut-être masqué ses informations.</li><li>• Laissez sonner deux à trois fois le téléphone, car il peut y avoir un délai avant de recevoir les informations d'identification de l'appelant.</li></ul>
<p>Si j'appuie sur  il n'y a aucune tonalité de composition</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il est probablement nécessaire d'effectuer une nouvelle synchronisation entre l'unité de base et le combiné. Éteignez le combiné, attendez environ 10 secondes et rallumez-le. La synchronisation devrait se terminer dans les 5-30 secondes</li></ul>
<p>Le flash du combiné fonctionne mais pas le combiné</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que le volume de la sonnerie du combiné n'est pas réglé sur arrêt.</li><li>• Vérifiez que la fonction Ne pas déranger n'est pas activée</li></ul>
<p>La lumière rouge n'arrête pas de clignoter</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il y a un message vocal en attente sur le serveur de messagerie vocale de votre opérateur</li><li>• Vous avez manqué un appel, vérifier la liste des appels entrant permet de désactiver cet indicateur.</li></ul>
<p>Interférences sur la ligne</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que le téléphone n'est pas placé trop près d'une lampe d'ambiance, d'un four à micro-ondes, etc.</li><li>• Vérifiez que des filtres ADLS ont été installés si vous utilisez un modem ADSL</li></ul>

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Temps de charge	<ul style="list-style-type: none"><li>• 15 heures</li></ul>
Température ambiante	<ul style="list-style-type: none"><li>• Normale : 10°C~ 30°C, Extrême : -10°C ~ 40°C</li></ul>
Humidité	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0%~90%</li></ul>
Poids (oz)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Unité de base : 16 ; Combiné : 5.7</li></ul>
Dimensions (pouces)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Unité de base : 6,7 x 3,1 x 5 ; Combiné : 7 x 2,1 x 1,2</li></ul>
Alimentation électrique	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adaptateur CA : Homologué UL, 7.5vdc, 500MA</li><li>• Piles de l'unité de base : 4 x AAA NIMH (en option, non fournies)</li><li>• Piles du combiné : 2 x AAA NIMH (incluses)</li></ul>
Niveau de dB amplifié (AMP off)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0-18 dB en 5 étapes</li></ul>
Niveau de dB amplifié (AMP on)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 32-50 dB</li></ul>
Tonalité	<ul style="list-style-type: none"><li>• T1-T4</li></ul>
Langues d'affichage	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anglais, Français, Espagnol, Allemand, Italien, Néerlandais, Pyccknn, Portugais, Polski, Svenska, Dansk, Norsk, Emhnika, Turkce, Ykpaihclkn, Magyar</li></ul>
Voix	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anglais, français, (voix en anglais dans le mode espagnol)</li></ul>

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.


# ADSL



## Si vous êtes inscrit à un service ADSL

Veillez insérer un filtre (contactez votre fournisseurs de services ADSL) sur la ligne téléphonique entre l'unité de base et la prise téléphonique, si :

- Vous entendez du bruit pendant les conversations.
- Les fonctionnalités d'identification de l'appelant ne fonctionnent pas correctement.

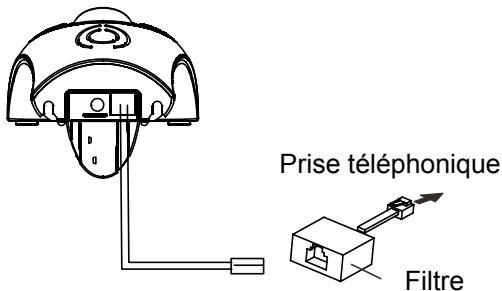

# INFORMATIONS DE SECURITE

## Généralités

Utilisez uniquement le bloc électrique livré avec le produit.

Utilisez uniquement les piles rechargeables fournies.

N'ouvrez pas le combiné (sauf pour remplacer les piles) ou l'unité de base. Contactez le service d'assistance pour toutes les réparations.

Ne jetez pas les piles au feu. Il existe un risque sérieux d'explosion et/ou de fuite de produits chimiques toxiques.

Ne placez pas d'objets sur le cordon téléphonique ou le câble d'alimentation qui pourraient l'endommager.

Si vous êtes sûr que vous n'allez pas utiliser le téléphone pendant plus d'un mois, retirez les piles.

## Nettoyage

Débranchez le téléphone. Nettoyez le téléphone avec un chiffon doux. Maintenez les contacts de charge de l'unité de base et du combiné propres. N'utilisez jamais de détergents ou de matières à polir car ils pourraient endommager la finition ou les parties électroniques logées à l'intérieur.

## Exigences environnementales

Ne pas exposer l'appareil au rayonnement direct du soleil.

# INFORMATIONS DE SECURITE

Assurez-vous que l'air peut toujours circuler librement sur les surfaces du téléphone.

N'exposez aucune partie de votre produit à une source d'eau et ne l'utilisez pas dans des conditions ou des endroits extrêmement humides, par exemple dans la salle-de-bains.

N'exposez pas votre produit au feu ou à toute autre condition dangereuse.

En cas d'orage, débranchez le téléphone qui pourrait être endommagé. Votre garantie ne couvre pas les dommages causés par la foudre.

N'utilisez pas le téléphone pour rapporter une fuite de gaz si vous vous trouvez à proximité de la fuite.

Le téléphone est conçu pour fonctionner dans une gamme de températures comprises entre 5°C et 45°C.



# GARANTIE

Votre produit Geemarc est garanti pendant 2 ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web : **www.geemarc.com**.

La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

**IMPORTANT** : VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ETRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.

**Veillez noter: la garantie est applicable en France uniquement.**

**DÉCLARATION** : Geemarc Telecom SA déclare par la présente que son produit est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres directives pertinentes de la norme 2014/53/UE traitant des équipements terminaux de radio et télécommunications, en particulier à l'article 3, sections 1a, 1b et section 2. L'appareil ne fonctionne pas si le courant de ligne est inférieur à 18 mA.

*La déclaration de conformité peut être consultée sur [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)*



# GARANTIE

**Branchement électrique** : l'appareil est conçu pour fonctionner avec une source électrique de 230V 50Hz uniquement. (Répertorié comme affichant une tension dangereuse sous les termes de la norme EN60950). L'appareil n'incorpore aucun interrupteur intégral Marche/Arrêt. Pour déconnecter l'appareil, coupez l'alimentation au niveau de la prise secteur ou débranchez l'adaptateur secteur. Lors de l'installation de l'appareil, veillez à ce que la prise secteur soit facilement accessible.

**Branchement du téléphone** : les tensions présentes sur le réseau de télécommunications sont répertoriées en tant que TNV-3 (Telecommunication Network Voltage), conformément à la norme EN60950.

# DIRECTIVE DE RECYCLAGE

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible. Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques.

Veillez utiliser une des options suivantes :

- Retirez les piles et jetez-le dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.
- Ou rapportez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien devrait être accepté.

Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique et à la protection de l'environnement.



Pour en savoir plus :

[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



N'hésitez-pas à consulter notre site Internet pour obtenir des informations et de l'aide sur nos produits:

**[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)**  
Téléphone **0328587599**  
ou fax **0328587576**



UGAMPLIDECT™260\_Fr\_v1.1

**geemarc™ FRANCE**  
Telecom SA

Parc de l'Etoile  
2 rue Galilée  
59791 GRANDE-SYNTHÉ Cedex  
TEL.SERVICEAPRESVENTE:  
03 28 58 75 99

[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)