

AMPLIDECT™280/285

Verstärktes schnurlosestelefon



Deutsch

VOR DER BENUTZUNG

Vor der Benutzung	1
Herzlichen Glückwunsch	4
Sicherheitsmaßnahmen	4
Auspacke	6
Gerätebeschreibung und Tastenfunktion	7
Tastenbeschreibung	12
Symbole LCD-Anzeige	15
Leitungen anschließen	17
Batterien einlegen	17
Aufladen des Mobilteils	19
Verwendung des Mobilteil Trageclips	20
Verwendung des Kopfhörers (Optionsweise)	20
Wandaufhängung	21
An-/Ausschalten des Mobilteils	22
Grundfunktionen	24
Anruf tätigen	24
Anruf erhalten	25
Stummfunktion	27
Verstärkerfunktion	27
Einstellung Klingel	28
Wahlwiederholung	30
CID Buch	32
Taschenlampe	36
Tastensperre	36

VOR DER BENUTZUNG

o-Antwort	37
Sprachauswahl	38
Name Mobilteil	39
Alarm Empfangsbereich	40
Ortungsfunktion	41
Anwählmodus	42
Freisprechanlage	43
Flashsignal	44
Erweiterte Funktionen	45
Navigieren des Menüs	45
Menüplan	46
Telefonbuch	47
Direktwahlspeichertasten	52
Einstellungen Basisstation	53
Einstellungen Mobilteil	56
Registrierung	65
eines Mobilteils	66
Anruferkennung bei Anklopffunktion	68
AB-Funktionen	
(nur für AMPLIDECT™285)	69
Ansage	69
Nachricht	74
AB Einstellung	77

VOR DER BENUTZUNG

Fernbedienung	82
Funktionsliste	84
Problemlösungen	86
Anrufbeantworter	88
(nur für AMPLIDECT™285)	
Technische Spezifikationen	88
Garantie	91
Recyclinganweisungen	93

!!!Prüfen Sie auf unserer Website ob
eine neuere Version dieser
Bedienungsanleitung verfügbar ist!!!

VOR DER BENUTZUNG

Herzlichen Glückwunsch

zum Kauf eines hochwertigen Qualitätsprodukts aus unserem Hause.

Bitte lesen Sie sich diese Betriebsanleitung aufmerksam durch. Sie wird Ihnen dabei helfen, alle wesentlichen Merkmale und Funktionen Ihres Telefons kennen zu lernen. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr Telefon bestmöglich anzuwenden.

Sicherheitsmaßnahmen

Um die Gefahr eines Elektroschocks oder einer Verletzung zu vermeiden, befolgen Sie bitte diese grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen vor der Benutzung Ihres Telefons.

1. Lesen und befolgen Sie die Anweisungen in dieser Betriebsanleitung aufmerksam.
2. Befolgen Sie alle Warnhinweise an dem Gerät.
3. Das Telefon zur Reinigung bitte zunächst vom Netz nehmen, dann mit einem feuchten Tuch vorsichtig reinigen. Bitte keine Flüssigkeiten oder Aerosolreiniger verwenden.
4. Keine Gegenstände auf dem Stromversorgungskabel anbringen, die Schäden verursachen könnten.
5. Dieses Telefon bitte nicht in nasser Umgebung oder in Nassbereichen verwenden, in denen es zu einer Explosion kommen könnte.

VOR DER BENUTZUNG

6. Flüssigkeiten jeder Art bitte vom Telefon fernhalten.
7. Bei Reparaturen Telefon aus dem Wandanschluss ziehen und nur von Fachpersonal warten, bzw. überprüfen lassen.
8. Bitte auf Polarität der Batterien achten, die wiederaufladbaren Batterien stets nach Polaritätssymbolen ausgerichtet einlegen (die Anleitung dazu finden Sie im Teil „Batterien“).
9. Bitte keine anderen gewöhnlichen oder alkalischen Batterien verwenden. Dadurch kann es nicht nur zu Verletzungen sondern auch zu Beschädigungen am Gerät kommen.
10. Bitte verbrauchte Batterien nicht mit aufgeladenen Batterien gemischt verwenden. Verbrauchte Batterien nicht im normalen Hausmüll entsorgen oder verbrennen.
11. Falls Sie das Mobilteil für mehr als einen Monat nicht benutzen sollten, bitte die Batterien aus dem Batterieteil herausnehmen.
12. Bitte nur für die in der Betriebsanleitung angegebene Stromspannung verwenden.
13. Telefon für Kinder unzugänglich aufstellen.
14. Telefon nur in der beschriebenen Art und Weise verwenden.
15. Telefon nicht mehr verwenden, wenn es beschädigt ist.

VOR DER BENUTZUNG

Auspacken

Sobald Sie Ihr Telefon ausgepackt haben, gehen Sie bitte sicher, dass alle aufgeführten Teile auch vorhanden sind. Falls Teile fehlen oder beschädigt sind, rufen Sie bitte sofort Ihren Fachhändler an.

- Mobilteil
- Basisstation
- Betriebsanleitung
- AAA Ni-MH Batteries
- Adapter*
- Trageclip
- Telefonanschlusskabel*

* Die Form der Anschlusskabel kann je nach Spezifikation der einzelnen Länder unterschiedlich sein.



Produktbetreuung und Hilfe finden Sie unter

www.geemarc.com/de

E-mail : **kontakt@geemarc.com**

Telefon : **00 49 (0)228 548 89 932**


VOR DER BENUTZUNG

Gerätebeschreibung und Tastenfunktion


Mobilteil



VOR DER BENUTZUNG

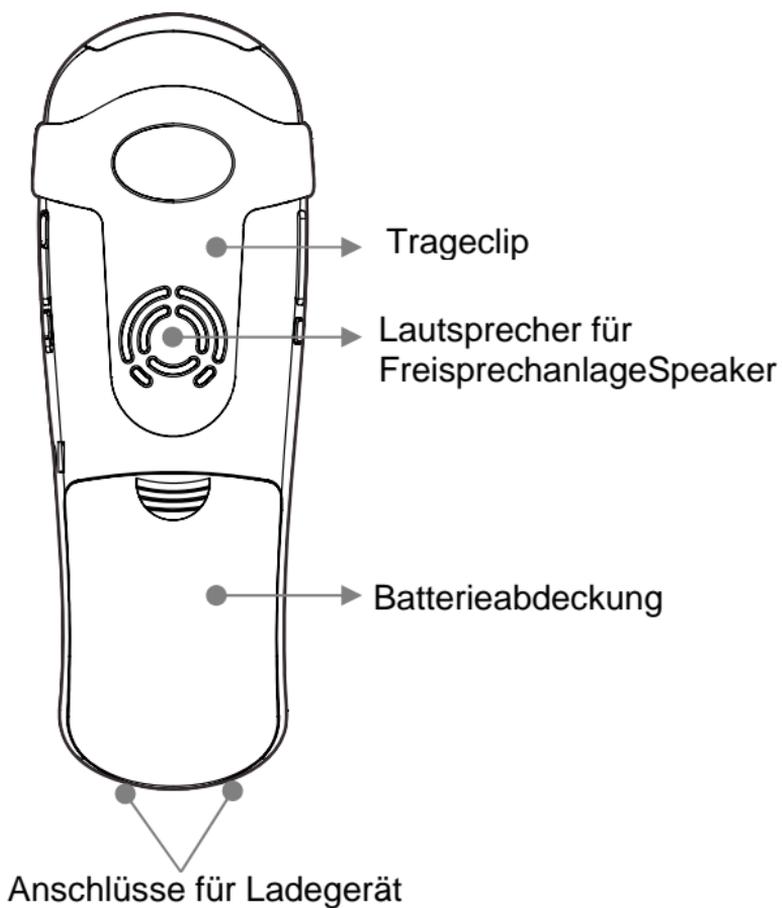


VOR DER BENUTZUNG

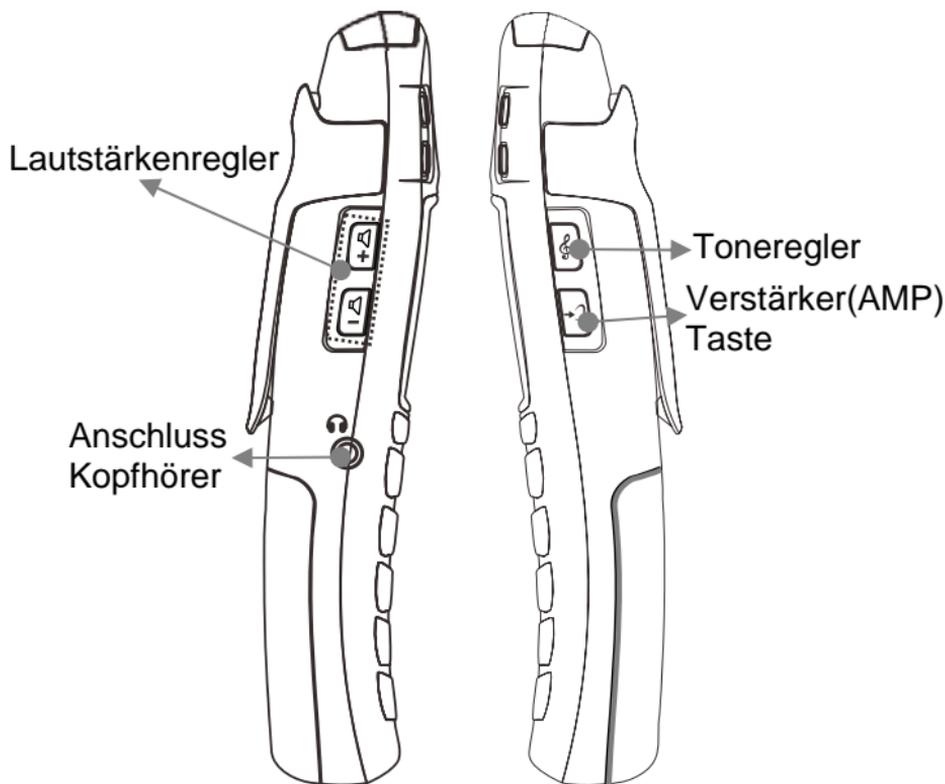


AMP : Extra Verstärkung für Mobilteil bis zu 15 dB
Vol +/- : Lautstärkerkenregelung für Kopfhörer und Freisprecheinrichtung
Ton : Tonregelung (Laut/Normal/Leise)

VOR DER BENUTZUNG

Beschreibung - und Funktionsliste (Forts.)

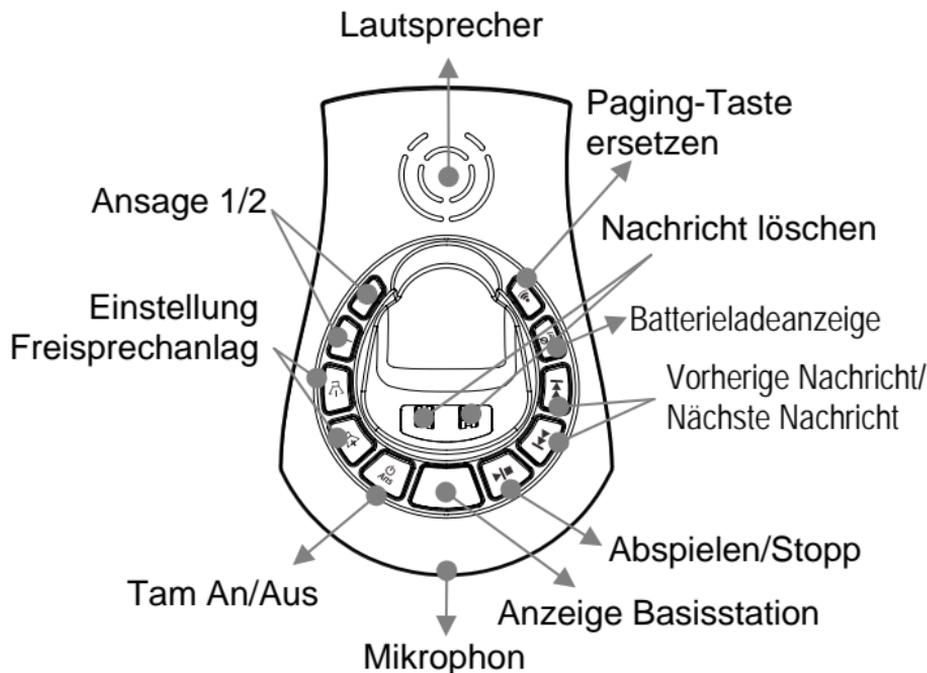


Rückwärtige Ansicht

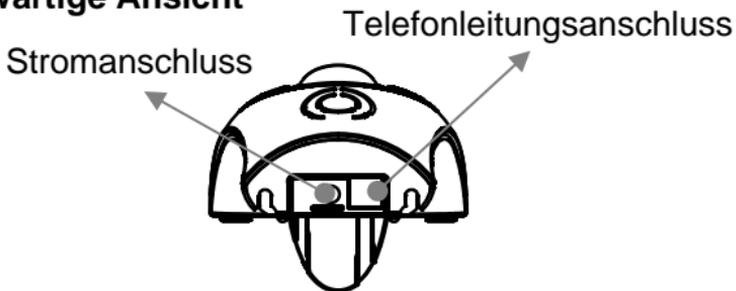

VOR DER BENUTZUNG

Basisstation : AMPLIDECT™ 280

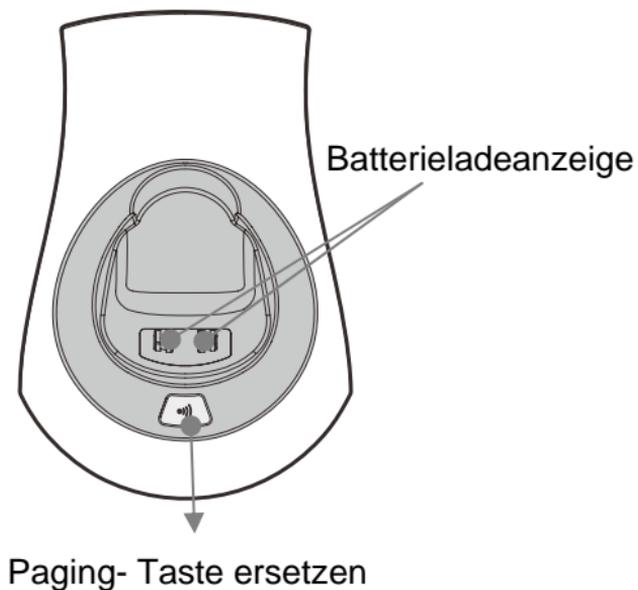

VOR DER BENUTZUNG

Tastenbeschreibung

Mobilteil

	<p>Anruftaste Anruf entgegennehmen/tätigen.</p>
	<p>Auflegetaste Anruf beenden. Durch langes Drücken Gerät an-/abschalten, wie auf Seite 13 beschrieben.</p>
	<p>Navigationstasten:</p> <p> Pfeiltaste nach oben Listen und Menüoptionen nach oben hin durchscrollen. Während eines Anrufs Hörer - oder Sprecherlautstärke erhöhen. Zugang zu CID Buch, wie auf Seite 20 beschrieben.</p> <p> Pfeiltaste nach unten Listen und Menüoptionen nach unten hin durchscrollen. Während eines Anrufs Hörer- oder Sprecherlautstärke verringern. Zugang zu Telefonbuch, wie auf Seite</p>

VOR DER BENUTZUNG

	<p>30 beschrieben.</p> <p> Pfeiltaste nach links Internes Gespräch mit anderem Mobilteil einrichten. Eingehendes Gespräch an anderes Mobilteil verbinden. Konferenzgespräch mit extrem Teilnehmer und einem internen Mobilteil einrichten.</p>
	<p> Pfeiltaste nach rechts Zugang zum Wahlwiederholungsbuch, wie auf Seite 18 beschrieben. Bei Vorauswahl einer Nummer Pause eingeben.</p>
 	<p>Softkey rechts/links Ausführung der Funktionen, die im Text unmittelbar über der Taste (in der untersten Bildschirmzeile des Displays) angegeben sind. Diese ändern sich je nach Kontext.</p>
	<p>Sterntaste Gedrückt halten, um Tastensperre ein-/auszuschalten. Einrichten eines Konferenzgesprächs, wie auf Seite 41 beschrieben.</p>

VOR DER BENUTZUNG

	Direktwahlspeichertasten In den Direktwahl-tasten können bis zu 4 Telefonnummern gespeichert werden (M1 bis M4).
	0-Taste Im Standby-Modus diese Taste solange gedrückt halten, bis das  Symbol erscheint, um den Vibrationsalarm und die visuelle Klingelfunktion zu aktivieren. Zur Deaktivierung diese Taste solange weiter gedrückt halten, bis das Symbol verschwindet.

Basisstation (nur für AMPLIDECT™285)

	Antwort an/aus Taste Drücken, um Antwort/Aufzeichnungsfunktion an-/auszuschalten, und das Telefon sagt „Antwort an“ oder „Antwort aus“.
	Annc1/Annc2 Taste Drücken, um Ansage1 oder Ansage2 abzuspielen. Gedrückt halten, um Ansage1 oder Ansage2 aufzuzeichnen.
	Spiel/Stopp-Taste Drücken, um Abspielen der Nachricht oder Mitteilung zu beginnen oder zu beenden.

VOR DER BENUTZUNG

	Löschtaste Beim Abspielen einer eingehenden Nachricht (ICM) diese Taste gedrückt halten, um derzeitige Nachricht zu löschen. Im Aktiv-Modus (alle Leuchtanzeigen an) diese Taste gedrückt halten, um alle Nachrichten zu löschen.
	Wiederholungs-/Auslassungstaste Drücken, um laufende oder nächste Nachricht abzuspielen. (Wiederholungstaste zweimal drücken, um vorhergehende Nachricht zu spielen.)
	Lautstärkenregler nach oben/unten Beim Spielen einer Ansage oder Nachricht diese Tasten drücken, um Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Beschreibung der Symbole auf der LCD-Anzeige

	Neuer Anruf Zeigt an, dass Sie einen oder mehrere Anrufe versäumt haben.
	Neue Nachricht Zeigt an, dass Sie eine oder mehrere neue Nachrichten erhalten haben.


VOR DER BENUTZUNG

	Besetzt Zeigt an, dass die Leitung besetzt ist.
	Freisprechanlage Zeigt an, dass die Freisprechanlage eingeschaltet ist.
	Batterieladesymbol Zeigt die Höhe der Batterieladung an.
	Vibrationssymbol Zeigt an, dass die Vibrationsfunktion und das visuelle Klingelanzeichen eingeschaltet sind.
	Signalstärkensymbol Zeigt die derzeitige Signalstärke an. Falls das Mobilteil zu weit von der Basisstation entfernt ist, so blinkt dieses Symbol an der LCD-Anzeige auf.
	Wecksymbol Dieses Symbol erscheint, wenn Sie den Wecker auf eine bestimmte Uhrzeit einstellen.
	Tastensperre Dieses Symbol erscheint, wenn die Tastatur gesperrt ist.
	ICM Symbol (nur für AMPLIDECT285™) Dieses Symbol erscheint, wenn Sie (eine) neue Nachricht(en) auf Ihrem Anrufbeantworter haben.

VOR DER BENUTZUNG

Leitungen anschließen

1. Ein Ende der Telefonleitung im Telefonanschluss an der Basisstation anschließen, das andere Ende an den Telefonanschluss in der Wand.
2. Den Anschluss des Wechselstromadapters an den Stromanschluss in der Basisstation anschließen, und den Wechselstromadapter selbst an eine normale Wandsteckdose anschließen.

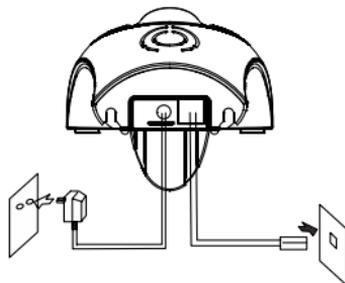

zu Wandsteckdose

zu Telefonanschluss
in der Wand


Batterien einlegen

Die wiederaufladbaren Ni-MH Batterien (Größe AAA) werden zusammen mit Ihrem Telefon geliefert. Batterien bitte einlegen, bevor Sie Ihr Telefon benutzen.

1. Batterieabdeckung in Pfeilrichtung nach unten schieben und abnehmen.

VOR DER BENUTZUNG

2. Neue Batterien wie gezeigt einlegen und dabei auf richtige Polarität achten (+,-).

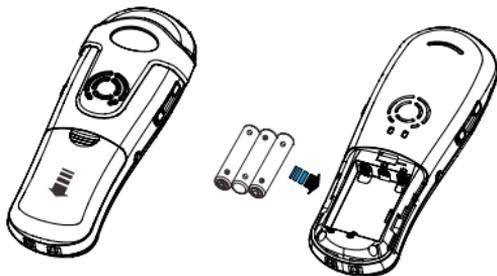

3. Zum Schließen Batterieabdeckung bitte soweit nach oben schieben, bis sie einklickt.



Bitte beachten:

- Wenn die Batterien nach dem Wiederaufladen ihre volle Batterieleistung nicht erreichen, so müssen sie ausgetauscht werden.
- Dazu bitte stets hochwertige wiederaufladbare Ni-MH AAA Batterien von guter Qualität verwenden. Niemals andere Batterietypen verwenden


VOR DER BENUTZUNG

Aufladen des Mobilteils

!Wichtig! Bitte beachten: Vor dem erstmaligen **Betrieb MUSS DAS MOBILTEIL CA. 15 STUNDEN LANG VOLL AUFGELADEN WERDEN.**

Mobilteil zum Aufladen auf Basisstation stellen.

Ergebnis: Wenn das Mobilteil auf die Basisstation gestellt wird, schaltet es sich automatisch ein.

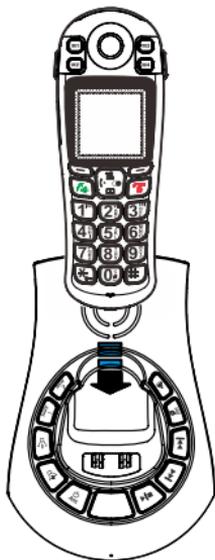


VOR DER BENUTZUNG

Verwendung des Mobilteil Trageclips

Mit dem Trageclip, der zusammen mit dem Mobilteil geliefert wird, haben Sie die Möglichkeit, das Mobilteil überall mit hinzunehmen. Der Trageclip kann einfach an Ihrem Gürtel, Ihrem Taillenbund oder in Ihrer Hemdtasche befestigt werden.

Falls Sie den Trageclip entfernen wollen:

Einen Schraubenzieher an einer der Halterungen entlang schieben und den Clip freigeben. Dann den Clip abnehmen.

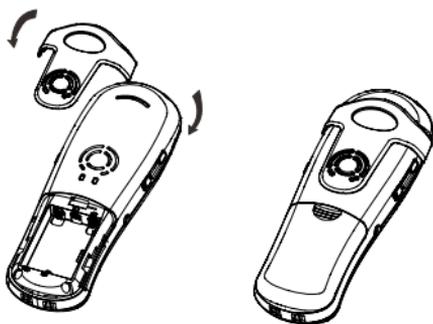


Verwendung des Kopfhörers (Optionsweise)

Der Anschluss für den Kopfhörer befindet sich an der linken Seite des Mobilteils und hat einen

VOR DER BENUTZUNG

Standardanschluss von 2,5mm. Den Kopfhörer einfach in diesen Anschluss stecken, so dass er aktiviert werden kann.

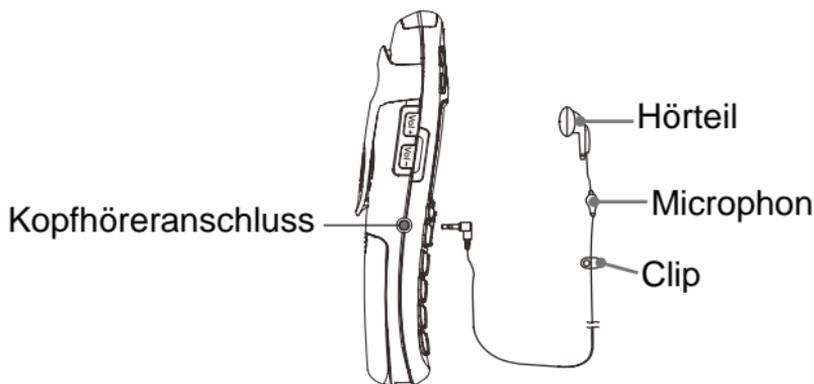


Hinweis:

- Wenn der Kopfhörer an das Mobilteil angeschlossen ist, wird das Mikrophon am Mobilteil außer Funktion gesetzt

Wandaufhängung

Auflageblech zur Wandaufhängung unter dem Telefon anbringen. Zwei Löcher im Abstand von 60mm in die Wand bohren, dann Dübel und Halteschrauben einführen. Die Schrauben sollten 6-7mm herausragen. Basisstation auf den Schraubenköpfen ausrichten, nach unten schieben und sichern.

VOR DER BENUTZUNG

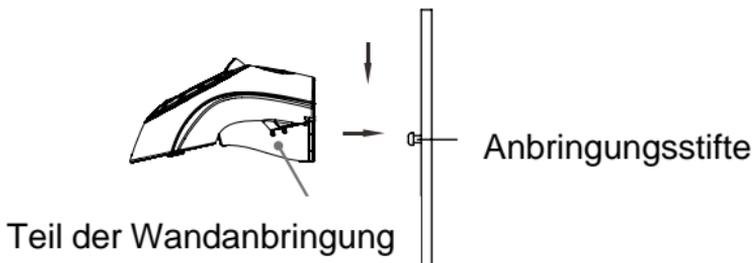


Mobilteil An-/Auswalten

Falls das Mobilteil abgeschaltet ist und Sie stellen es auf die Basisstation, so schaltet es sich automatisch wieder ein. Um das Mobilteil im Standby-Modus ein- oder auszuschalten, müssen Sie Folgendes tun:

1. Zum Einschalten des Mobilteils aus dem Aus-Zustand

die  Taste solange gedrückt halten, bis die Anzeige eingeschaltet wird. Während des Einschaltvorgangs geht das Mobilteil in den Subskriptionsmodus über und sucht nach einer registrierten Basisstation. Auf der Anzeige erscheint die folgende Nachricht, und das Signalsymbol erscheint als Blinkzeichen.

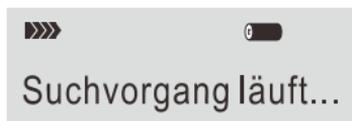

VOR DER BENUTZUNG

Hinweis:

- Falls das Mobilteil seine Basisstation findet, so geht es in Standby-Modus über. Auf der Anzeige erscheint die Nummer und der Name des Mobilteils (falls Sie einen Namen, wie auf Seite 24 beschrieben, gespeichert haben), sowie das Signalsymbol, die Batterieladeanzeige und die aktuelle Uhrzeit. Falls das Mobilteil keine Basisstation findet, so verhält es sich wie im Zustand **außerhalb des Empfangsbereichs**.

2. Zum Ausschalten des Mobilteils die  Taste solange gedrückt halten, bis die Anzeige ausgeschaltet wird.

Hinweis:

- Auf dem LCD erscheint keine Anzeige, wenn die Batterieleistung sehr niedrig ist. **DAS MOBILTEIL MUSS VOR SEINER BENUTZUNG VOLL AUFGELADEN WERDEN.**

Für alle Beschreibungen in dieser Betriebsanleitung wird davon ausgegangen, dass sich das Mobilteil im

Standby-Modus befindet. Durch Drücken der  Taste geht das Telefon in Standby-Modus über.

Einen Anruf tätigen

1. Mobilteil in die Hand nehmen und die  Taste drücken.

Ergebnis : Auf der LCD-Anzeige erscheint das  Symbol.

2. Telefonnummer wähle.

Hinweis:

- Sie können bis zu 10 Telefonnummern zum automatischen Anwählen in 4 Direkwtastenspeichern.

3. Um das Gespräch zu beenden, entweder Die  Taste drücken oder das Mobilteil wieder auf die Basisstation stellen.

Hinweis:

- Um die letzte von Ihnen gewählte Nummer anzurufen, benutzen Sie bitte die Wahlwiederholungstaste. Weiter Einzelheiten dazu finden Sie auf Seite 18.

Sie können die gewünschte Telefonnummer im Standby-Modus eingeben, dadurch haben Sie die Möglichkeit, Korrekturen vorzunehmen, bevor Sie die Nummer anwählen. Bitte dazu die folgenden Schritte befolgen:

GRUNDFUNKTIONEN

1. Geben Sie eine Telefonnummer ein (bis zu 32 Stellen). Überprüfen Sie die Nummer. Sie können mit der **Pfeiltaste nach rechts** eine Pause einfügen.

Hinweis :

- Falls Ihnen bei der Eingabe der Nummer ein Fehler unterläuft, so können Sie die jeweils letzte Zahl über den Erase löschen.

2. Wenn die Nummer richtig angezeigt wird, drücken Sie bitte  Taste.

Einen Anruf entgegennehmen

Wenn ein Anruf eingeht, so erscheint die Information **Neues Gespräch**.

Wenn der Anrufer festgestellt werden kann, so wird die Nummer des Teilnehmers angezeigt. Kann der Anrufer nicht festgestellt werden, so erscheint nur die Information **Neues Gespräch**. Falls jemand eine gesprochene Nachricht aufgesprochen wurde, so erscheint „**Neue Nachricht**“ und das  Symbol erscheint auf der LCD-Anzeige.

1. Um das Gespräch anzunehmen, drücken Sie bitte die  Taste. Falls die Auto-Ansage Funktion

GRUNDFUNKTIONEN

eingeschaltet war, als das Mobilteil auf der Basisstation stand, nehmen Sie es einfach ab, um zu antworten.

2. Sie können sprechen. Um das Gespräch zu beenden,

bitte entweder die  Taste drücken oder das Mobilteil wieder auf die Basisstation stellen.

Ergebnis: Nach Beendigung Ihres Gesprächs wird auf dem LCD die Gesprächsdauer angezeigt.

Hinweise:

- Sie können die Klingellautstärke über die Vol +/- Taste regeln, wenn das Telefon bei eingehendem Anruf klingelt.
- Um das  Symbol zu löschen, bitte **Pfeiltaste nach oben** im Standby-Modus drücken, dann die  Taste gedrückt halten. Danach die  Taste drücken, um zum Standby-Modus zurückzukehren. (Das Mobilteil muss für die Basisstation registriert sein.)
- Wenn ein polyphoner Klingelton eingestellt ist, so kann der Klingelton 4 Sekunden länger andauern, nachdem der Teilnehmer aufgelegt oder nachdem ein parallel geschaltetes Telefon das Gespräch angenommen hat.

Stummfunktion

Während eines Gesprächs können Sie das Mikrofon Ihres Telefons vorübergehend abschalten, so dass der andere Teilnehmer Sie nicht hören kann.

Beispiel: Sie wollen einer anderen Person im Raum etwas mitteilen, möchten jedoch nicht, dass der andere Teilnehmer Sie hören kann..

Zum Abschalten des Mikrofons, während des Gesprächs **Stumm** drücken. Die Anzeige „**Stummfunktion**“ erscheint auf dem LCD.

Zum Einschalten des Mikrofons, **Stumm** nochmals drücken. Dadurch wird der Normalzustand wieder hergestellt.

Verstärkerfunktion

Ihr Telefon ist mit einer besonderen Verstärkerfunktion ausgestattet, um all Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Während eines Gesprächs können Sie die Lautstärkenregler **Vol+** oder **Vol-** auf der linken Seite des Mobilteils und die **AMP** Taste auf der rechten Seite des Mobilteils verwenden. Sie können die Tonstärke auch über die **Ton** Regelung verstellen, so wie dies Ihren

GRUNDFUNKTIONEN

Höranforderungen entspricht. Die gewählte Lautstärke erscheint auf der LCD-Anzeige.

Wenn Sie die **AMP** Taste während eines Gesprächs drücken, so leuchtet die Verstärkeranzeige am Mobilteil auf. Bei nochmaligem Drücken der **AMP** Taste erlischt die Anzeige wieder.

Sie können auch die Hörlautstärke oder die Sprechlautstärke über **Audio-Einstellungen** im Menü unter **Einstellungen Mobilteil** einstellen, wie dies auf Seite 38 näher beschrieben .

Einstellung des Klingeltons

Sie können Ihren eigenen externen (vom Telefonnetz) oder internen (von anderen Mobilteilen, die mit gleicher Basisstation registriert sind) Klingelton einrichten und seine Lautstärke regeln.

1. **Menu** drücken.

2. Die  Taste wiederholt drücken, um das Menü **Mobilteil Einstellungen** auszuwählen, dann **Wählen** drücken.

GRUNDFUNKTIONEN

3. Die  Taste drücken, um **Rufton-Einstellung** auszuwählen, dann **Wählen** drücken.

4. **Auswahl** drücken, um **Interner Klingelton** auszuwählen oder **Pfeiltaste nach unten** drücken, um **Externer Klingelton** auszuwählen, dann **Wählen** drücken.

5. Die  Taste drücken, um **Melodie** oder **Lautstärke** auszuwählen, dann **Wählen** drücken.

Ergebnis: Sie können Klingeltöne von Melodie 1 bis 10 auswählen oder die Lautstärke von Volume 1 bis 5 regeln. Sie können den Klingelton auch ganz abstellen. Jedes

Mal, wenn Sie die  Taste drücken, spielt das Mobilteil die gewählte Melodie in entsprechender Lautstärke.

6. Speichern zur Bestätigung drücken.

Hinweis:

- Wenn Sie bei eingehendem Gespräch den Klingelton ganz abstellen, so erscheint bei eingehenden Gesprächen nur Neuer Anruf auf dem LCD.

Wahlwiederholung

1. Die  Taste in Standby-Modus drücken.

Ergebnis: Auf der LCD-Anzeige erscheint die zuletzt von Ihnen gewählte Nummer.

2. Die  Taste drücken, um diese Nummer neu anzuwählen.

Mit Ihrem Telefon können Sie die letzten 10 von Ihnen angewählten Nummern abrufen und neu anwählen.

Nummer im Wahlwiederholungsbuch suchen und neu anwählen

1. Die  Taste im Standby-Modus drücken.
2. Falls Sie den Speicher durchscrollen wollen, die  Taste wiederholt drücken, bis Sie die Nummer finden, die Sie neu anwählen möchten.
3. Die  Taste drücken, um diese Nummer neu anzuwählen.

Hinweise:

GRUNDFUNKTIONEN

- Wenn keine Nummern gefunden werden, erscheint die Anzeige **“Leer“**.
- Wenn das Wahlwiederholungsbuch voll ist, so wird jedes Mal, wenn Sie eine neue Nummer wählen, die älteste gespeicherte Nummer aus dem Wahlwiederholungsbuch automatisch gelöscht und aktualisiert.

Optionen im Wahlwiederholungsbuch verwenden

Wenn Sie die Optionen im Wahlwiederholungsbuch verwenden, können Sie dem Wahlwiederholungsbuch eine Nummer hinzufügen oder eine Nummer im Wahlwiederholungsbuch löschen.

1. Die  Taste drücken.
2. Unter Verwendung der  Taste bis zur gewünschten Nummer durchscrollen.
3. Wenn die Nummer auf der Anzeige erscheint, **Mehr** drücken, um gewünschte Option zu wählen.

Telefonbuch hinzufügen: Hiermit können Sie die Nummer dem Telefonbuch hinzufügen.

Eingabespeicherung abschließen, indem Sie bei Schritt 4 beginnen (siehe Beschreibung im Abschnitt 4 „Telefonbucheinträge hinzufügen“. Selbstverständlich erscheint die Nummer bereits in dem entsprechenden Feld.

GRUNDFUNKTIONEN

Löschen : Hiermit können Sie die gewählte Nummer löschen.

Alle löschen : Hiermit können Sie das Wahlwiederholungsbuch insgesamt löschen.

4. Die  Taste drücken, um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Hinweis:

- Beim Schritt 3, wenn Sie **Löschen** oder **Alle löschen** wählen, erscheint die Nachricht „**Bestätigung?**“ so dass Sie den Löschvorgang bestätigen müssen.
- Zur Bestätigung drücken Sie bitte den **Del** oder **Del All** Softkey, um die Funktion zu verlassen, bitte den Softkey für **Abbrechen**

CID Buch

Wenn Sie ein Gespräch entgegennehmen, und die Anruferkennungsdaten des Teilnehmers werden aus dem Netzwerk übertragen, aus dem der Anruf erfolgt (und der Anrufer unterdrückt diese Angaben nicht), so wird die Telefonnummer des Anrufers angezeigt.

Außerdem wird ein eingehendes Gespräch auch dann angezeigt, wenn Sie es verpasst haben sollten, dazu

erscheint das Symbol  auf der LCD-Anzeige. Falls der

GRUNDFUNKTIONEN

CID-Speicher voll ist, so blinkt das  Symbol auf der LCD-Anzeige auf.

Außerhalb des Bereichs – Diese Nachricht erscheint, wenn jemand aus einem Netzwerk anruft, für das die Telefongesellschaft keinen Anruferkennungsdienst anbietet oder noch keine Telefonnummernanzeige in Ihrem Empfangsbereich anbietet.

Privatnummer – Falls der Anrufer von der Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, seinen Namen und seine Telefonnummer nicht zu senden, so erscheint diese Nachricht auf der LCD-Anzeige.

Alle Anruferkennungsnummer (CID-Nummern) sehen und anwählen

1. **Menü** drücken.
2. **Wählen** drücken, um **CID Speicher** zu wählen, und falls verfügbar, so werden die Nummern angezeigt. (Direkten Zugang zum CID-Buch erhalten Sie auch, wenn Sie die Pfeiltaste nach **oben** im Standby-Modus drücken.)
3. Die  Taste verwenden, um die Nummern anzuzeigen, Sie können einen Anruf tätigen, indem Sie die  Taste drücken. Sie können die Eintragung auch dem Telefonbuch hinzufügen.

GRUNDFUNKTIONEN

Hinweis:

- Bei schritt 3 ist jeder Teil der eingehenden Anrufliste mit dem  Symbol gekennzeichnet, falls das Gespräch bereits angesehen wurde, oder mit dem  Symbol, falls die Nummer noch nicht angesehen wurde.

CID Nummer dem Telefonbuch hinzufügen

1. Schritte 1 und 2 des vorherigen Abschnitts durchführen.
2. Die  Taste verwenden, um die Nummern anzusehen. Wenn die gewünschte Nummer auf der LCD-Anzeige erscheint, **Mehr** drücken und in Menü **Dem Telefonbuch hinzufügen** gehen.
3. **Wählen** drücken, Sie werden zur Namenseingabe aufgefordert.
4. Namen eingeben und **Weiter** drücken, so dass Sie die Nummer, die Sie speichern wollen, modifizieren können.
5. **Weiter** drücken, so dass Sie die Möglichkeit haben, einen Klingelton von Melodie 1 bis Melodie 10 auszuwählen. Dann zur Bestätigung **Speichern** drücken und diese Funktion verlassen. Sie hören einen Piepton zur Bestätigung.

Nummer im CID-Buch löschen

GRUNDFUNKTIONEN

1. Schritte 1 und 2 des Abschnitts „CID-Nummern ansehen und neu anwählen“ (Seite 22) durchführen.
2. Mit der  Taste bis zur Nummer durchscrollen, die Sie löschen wollen.
3. Wenn die gewünschte Nummer auf der Anzeige erscheint, **Mehr** Softkey drücken.
4. Mit der  Taste **Löschen** wählen, dann **Wählen** drücken. Auf der Anzeige erscheint „**Bestätigen?**“. **Lösch-** zur Bestätigung drücken, es ertönt ein Piepton und auf dem LCD erscheint die nächste Nummer.

Alle Nummern im CID Buch löschen

1. Schritte 1 und 2 des Abschnitts „CID-Nummern ansehen und neu anwählen“ durchführen.

2. **Mehr** drücken und mit der  Taste das Menü **Alle löschen** wählen, dann **Wählen** drücken.

3. Auf der Anzeige erscheint „**Bestätigen?**“, dann **Alle löschen** zur Bestätigung drücken.

Ergebnis: Sie hören einen Piepton und das Telefon geht nach Löschen der CID-Nummern wieder in den Standby-Modus über.

Taschenlampe

Taschenlampe

Wenn Sie diese Funktion einschalten, leuchtet die visuelle Klingel gleich bleibend wie eine Lampe. Sie können das Telefon als Taschenlampe verwenden.

Um diese Funktion einzuschalten, müssen Sie die

 Taste im Standby-Modus gedrückt halten, bis die visuelle Klingel leuchtet.

Um diese Funktion auszuschalten, müssen Sie die

 Taste solange gedrückt halten, bis die visuelle Klingel erlischt.

Tastensperre

Wenn Sie diese Funktion einschalten, werden alle Tasten gesperrt. Sie können Gespräche entgegennehmen und die Tasten auf dem Telefon verwenden. Sobald Sie jedoch das Gespräch beenden, setzt die Tastensperre wieder ein. Diese Funktion ist sinnvoll, um zu vermeiden, dass Tasten aus Versehen gedrückt werden.

GRUNDFUNKTIONEN

Um die Tasten zu sperren, halten Sie im Standby-Modus einfach die  Taste gedrückt, bis auf der Anzeige „**Mobilteil gesperrt**“ erscheint, danach erscheint das  Symbol.

Um die Tasten zu entsperren, halten Sie einfach die  Taste gedrückt, bis das  Symbol auf der Anzeige erlischt.

Hinweis:

- Bei eingeschalteter Tastensperre gibt das Telefon einen Fehlerton von sich, wenn eine Taste gedrückt wird und die Anzeige Mobilteil gesperrt erscheint auf der LCD-Anzeige.

Automatische Gesprächsannahme

Mit dieser Funktion können Sie einen Anruf einfach durch Aufnahme des Mobilteils von der Basisstation beantworten, ohne eine Taste betätigen zu müssen.

1. **Menü** drücken.

GRUNDFUNKTIONEN

2. Die  Taste wiederholt drücken, um **MT Settings** (Einstellungen Mobilteil) zu wählen, dann **Wählen** drücken.

3. Die  Taste drücken, um **Auto Annahme** zu wählen, dann **Wählen** drücken.

4. Die  Taste drücken, um **Ein** oder **Aus** zu wählen und diese Funktion ein- oder auszuschalten, dann zum Speichern **Wählen** drücken, zur Bestätigung hören Sie einen Piepton.

Hinweis:

- Wenn der Anrufbeantworter beginnt, wird diese Funktion deaktiviert.

Sprache auswählen

Mit dem Mobilteil können mehrere vorgegebene Sprachen verwendet werden. Sie können die Sprache ändern, die zur Anzeige der Menümitteilungen verwendet wird.

1. **Menü** drücken.

2. Die  Taste drücken, um **MT-Einstellungen** zu wählen, dann **Wählen** drücken.

GRUNDFUNKTIONEN

3. Die  Taste drücken, um **Sprache** zu wählen, dann **Wählen** drücken.

4. Die verfügbaren Sprachen werden angezeigt. Die

 Taste verwenden, um die Optionen zu durchscrollen. Jede Sprache erscheint in ihrer eigenen Übersetzung.

5. **Wählen** drücken, um die gewünschte Sprache zu wählen, zur Bestätigung hören Sie einen Piepton.

Benennung eines Mobilteils

Mit dieser Funktion können Sie Ihrem Mobilteil einen Namen geben. Damit haben Sie die Möglichkeit, Ihr Mobilteil auf einfache Weise zu erkennen, insbesondere, wenn mehr als ein Mobilteil für die gleiche Basisstation registriert ist. Zur Neueinstellung des Namens des Mobilteils verfahren Sie bitte wie folgt:

1. **Menü** drücken.

2. Die  Taste wiederholt drücken, um **MT-Einstellungen** zu wählen, dann **Wählen** drücken

GRUNDFUNKTIONEN

3. Die  Taste drücken, um **Name Mobilteil** zu wählen, dann **Wählen** drücken.

4. Sie können den Namen des Mobilteils (bis zu 12 Buchstaben) über die alphanumerischen Tasten eingeben (fehlerhafte Eingaben bitte mit Erase (Löschen) Softkey entfernen, dann zum Speichern Save (Speichern) Softkey drücken und diese Funktion verlassen. Der Name des Mobilteils erscheint oben auf der LCD-Anzeige über der Nummer des Mobilteils im Standby-Modus.

Anzeige der Empfangsgrenze

Ein Piepton wird hörbar, wenn sich das Mobilteil außerhalb des Empfangsbereichs der Basisstation befindet. Diesen hörbaren Warnton können Sie entweder ein- oder ausschalten.

1. **Menü** drücken.

2. Die  Taste wiederholt drücken, um **MT-Einstellungen** zu wählen, dann **Wählen** drücken.

3. Die  Taste drücken, um Ton-Einstellung zu wählen, dann **Wählen** drücken.

GRUNDFUNKTIONEN

4. Die  Taste drücken, um **Reichweite** zu wählen, dann **Wählen** drücken.

5. Die  Taste drücken, um **Ein oder Aus** zu wählen und den hörbaren Warnton ein- oder auszuschalten, dann zum **Speichern** drücken, zur Bestätigung hören Sie einen Piepton.

Ortungs-Funktion

Sie können das Mobilteil von der Basisstation aus pagen. Das Mobilteil antwortet mit einem besonderen Klingelton. Dies ist sehr nützlich, wenn Sie ein abhanden gekommenes Mobilteil suchen.

Die  Taste an der Basisstation drücken (weniger als 5 Sekunden), und alle Mobilteile, die für diese Basisstation registriert sind, klingeln ca. 60 Sekunden lang.

Um Paging zu beenden, die  Taste an der Basisstation nochmals oder jede andere Taste am Mobilteil drücken.

Hinweis:

GRUNDFUNKTIONEN

- Wenn die  Taste 5 Sekunden oder länger gedrückt wird, geht die Basisstation in Subskriptionsmodus über. Einzelheiten dazu finden Sie auf Seite 38.

Anwählmodus

Sie können den Anwählmodus wie folgt ändern:

1. **Menü** drücken.

2. Die  Taste wiederholt drücken, um **BS-Einstellungen** zu wählen, dann **Wählen** drücken.

3. Die  Taste drücken, um **Wahlverfahren** zu wählen, dann **Wählen** drücken.

4. Sie können die  Taste drücken, um den gewünschten Anwählmodus zu wählen **Ton/Impulswahl**, dann zum Speichern **Wählen** drücken. Sie hören einen Piepton zur Bestätigung.

Hinweis:

- Falls Sie nicht sicher sind, welchen Anwählmodus Sie auswählen sollen, so wenden Sie sich bitte an Ihren Serviceanbieter vor Ort.

Freisprecheinrichtung

Während eines Gesprächs können Sie das Mobilteil auf Lautsprecher umschalten. Hierbei können Sie das Mobilteil einfach auf einer Oberfläche ablegen (z.B. Ihrem Schreibtisch) und das Gespräch über eine Freisprechanlage führen.

Um diese Funktion einzuschalten, bitte die  Taste während des Gesprächs drücken (Leitung besetzt). Auf der LCD-Anzeige erscheint das  Symbol.

Um diese Funktion abzuschalten, und um in normalem Gesprächsmodus weiter zu sprechen, bitte die  Taste noch einmal drücken. Das  Symbol verschwindet.

Hinweise:

- Bevor Sie das Mobilteil ans Ohr halten, gehen Sie bitte sicher, dass Sie den Lautsprecher abgeschaltet haben.
- Um die Stärke des Lautsprechers zu regeln, lesen Sie bitte Seite 16 oder 36.

Rückfragetaste (Flash-funktion)

Wenn die Leitung besetzt ist, wird durch Drücken des **Flash** das Flash-Signal gesendet. Diese Taste wird zusammen mit verschiedenen Funktionen (z.B. Anklopffunktion) verwendet, die in Ihrem Telefonnetzwerk angeboten werden können. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Telefongesellschaft.

Um diese speziellen Servicefunktionen zu verwenden, drücken Sie einfach den **Flash**, während die Leitung besetzt ist: Auf der Anzeige erscheint **R**.

Menü-Navigation

Auswahl einer Menüoption:

1. Zur Anzeige von Menüoptionen **Menü** drücken.
2. Zum Durchscrollen von Menüoptionen die  Taste wiederholt drücken.
3. Zur Auswahl einer Menüoption **Wählen** drücken, wenn die gewünschte Option auf der LCD-Anzeige erscheint.
4. Gegebenenfalls wiederholen.

Rückkehr aus jedem Menü in Standby-Modus:

Durch Drücken **Zurück**) geht das Telefon aus jedem Menü auf die vorherige Anzeige zurück.

Um aus einem Menü zum Standby-Modus

zurückzukehren, drücken Sie bitte die  Taste.

Außerdem kehrt das Telefon automatisch zum Standby-Modus zurück, wenn 40 Sekunden lang keine Taste gedrückt wurde.

Hinweis : Im Standby-Modus könne Sie die  Taste drücken, um die Hintergrundbeleuchtung an/aus zu schalten.

Menüplan

- 1. CID-Speicher** siehe Seite 22
- 2. Telefonbuch** siehe Seite 31
 - Neu (siehe Seite 32)
 - Bearbeiten (siehe Seite 33)
 - Löschen (siehe Seite 33)
 - PB Status (siehe Seite 33)
- 3. Einstellungen Basisstation** siehe Seite 35
 - Mobilteil entfernen (siehe Seite 35)
 - Wählmodus (siehe Seite 27)
 - Flashzeit (siehe Seite 35)
 - Pin ändern (siehe Seite 36)
 - Werkseinstellung Basisstation (siehe Seite 36)
- 4. Einstellung Mobilteil** siehe Seite 37
 - Wecker (siehe Seite 37)
 - Einstellung Audiofunktionen (siehe Seite 38)
 - Einstellung Klingelton (siehe Seite 19)
 - Toneinstellung (siehe Seite 26, 38)
 - Sprache (siehe Seite 25)
 - Benennung eines Mobilteils (siehe Seite 26)
 - Automatische Gesprächsannahme (siehe Seite 25)
 - LCD-Kontrast (siehe Seite 39)
 - Datum & Uhrzeit (siehe Seite 39)
 - Auswahl Basisstation (siehe Seite 40)

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Werkseinstellung Mobilteil (siehe Seite 40)
Verstärker (siehe Seite 41)

5. Registrierung siehe Seite 42

6. AB(nur für AMPLIDECT™285) siehe Seite 46
Ansaage (siehe Seite 43)
Nachricht (siehe Seite 46)
TAM-Einstellung (siehe Seite 48)

Telefonbuch

Telefonbuch

Durch das in Ihrem schnurlosen Telefon eingebaute Telefonbuch haben Sie die Möglichkeit, Telefonnummern, die Sie häufig benutzen, zu speichern, so dass Sie sie nicht jedes Mal eingeben oder nachschauen müssen, wenn Sie diese Nummern anrufen wollen.

Zeichen-/Buchstabenübersicht

Um ein gewünschtes alphanumerisches Zeichen einzugeben, drücken Sie bitte die entsprechende Taste ein - oder mehrmals, bis das gewünschte Zeichen erscheint. Dabei gilt die folgende Tabelle: Einmal für das erste Zeichen, zweimal für das zweite, usw.

Taste Buchstaben/Zeichen in angezeigter Folge

ERWEITERTE FUNKTIONEN

0	(spc)	0	?	&	/	.	,	!	
1	1	_	+	-	"	()	%	
2	A	B	C	a	b	c	2		
3	D	E	F	d	e	f	3		
4	G	H	I	g	h	i	4		
5	J	K	L	j	k	l	5		
6	M	N	O	m	n	o	6		
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8		
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9

Telefonbucheintragungen hinzufügen

1. **Menü** drücken.

2. Die  Taste wiederholt drücken, um **Telefonbuch** zu wählen, dann **Wählen** drücken.

3. **Wählen** drücken und **Neuer Eintr.** auswählen.

4. Auf der Anzeige erscheint „**Name ?**“. Geben Sie den Namen ein, den Sie verwenden wollen, dann **Speich.** zur Bestätigung drücken. Auf der Anzeige erscheint „**Nummer ?**“. Geben Sie die gewünschte Nummer ein (bis zu 20 Stellen), dann Softkey **Wählen** zur Bestätigung drücken.

ERWEITERTE FUNKTIONEN



5. Die  Taste drücken, um den Klingelton für diese Nummer auszuwählen, dann zum Speichern **Wählen** drücken.

6. Gegebenenfalls wiederholen.

Hinweis:

- Wenn Ihnen beim Eintragen der Nummer ein Fehler unterläuft, so können Sie ihn mit dem löschen, um die Eintragung zu korrigieren. Jedes Mal wenn Sie die Taste drücken, wird die letzte Zahl gelöscht. Um alle Zahlen zu löschen, bitte Löschen Taste gedrückt halten.

Pausenfunktion

Pausen sind sehr nützlich, wenn Sie es mit einem interaktiven Voicesystem, wie z.B. bei einem automatisierten Banksystem zu tun haben. Durch eine Pause ergibt sich eine Verzögerung von 3 Sekunden. Falls Sie beim Wählen einer Nummer im Standby-Modus eine Pause eingeben oder eine Nummer speichern wollen, bitte Pfeiltaste nach rechts drücken. An der Stelle, an der die Pause eingegeben wurde, erscheint der Buchstabe **P**.

Telefonbucheintragungen ansehen

ERWEITERTE FUNKTIONEN

1. Im Standby-Modus Pfeiltaste nach unten drücken.



2. Die  Taste wiederholt drücken, bis die gewünschte Eintragung erscheint.

Eine Nummer aus dem Telefonbuch wählen

Finden Sie die Nummer, die Sie anrufen möchten. Bitte beziehen Sie sich dazu auf den Abschnitt

„Telefonbucheintragungen ansehen“. Drücken Sie die



Taste oder **Wählen**.

Telefonbucheintragungen bearbeiten

1. Schritte 1 und 2 aus dem Abschnitt

„Telefonbucheintragungen hinzufügen“ durchführen.



2. Die  Taste drücken, um Menü **Ändern** zu wählen, dann **Wählen** Softkey drücken.



3. Die  Taste wiederholt drücken, bis die gewünschte Eintragung angezeigt wird, die Sie bearbeiten wollen, dann Softkey zur Bestätigung drücken.

ERWEITERTE FUNKTIONEN

4. Falls notwendig, bitte **Löschen** drücken, um einen Eintrag zu entfernen, dann den gewünschten Namen und die gewünschte Nummer eingeben und durch Drücken **Weiter** bestätigen.



5. Die  Taste drücken, um den Klingelton für diese Nummer auszuwählen, dann zum **Speichern** Speichern drücken.

Telefonbucheintragen löschen

1. Schritte 1 und 2 aus dem Abschnitt „Telefonbucheintragen hinzufügen“ (S. 32) durchführen.



2. Die  Taste drücken, um **Löschen**, zu wählen, dann **Wählen** drücken.



3. Die  Taste wiederholt drücken, bis der gewünschte Name angezeigt wird, den Sie löschen wollen, dann **Wählen** drücken.

4. Falls Sie im Schritt 2 das Menü **Alle löschen** wählen, und dann **Wählen** drücken.

Telefonbuch Status

Im Status werden die bereits im Telefonbuch gespeicherten Eintragungen angezeigt. Wenn **PB Status**

ERWEITERTE FUNKTIONEN

auf der Anzeige erscheint, drücken Sie den **Wählen** um das Telefonbuch zu öffnen.

Direktwahlspeichertasten

In den Direktwahltasten können bis zu 4 Nummern gespeichert werden. Alle Nummern sind im Telefonbuch gespeichert.

Direktwahlnummern speichern

1. Speichertasten (**M1** bis **M4**) im Standby-Modus drücken.
2. Auf dem Display erscheint „**Nummer?**“ Gewünschte Nummer (bis zu 20 Stellen) eingeben, dann Softkey **Wählen** drücken.
3. Die  Taste drücken, um den Klingelton für diese Nummer zu wählen, dann zum Speichern **Wählen** drücken.

Direktwahlnummern ansehen

1. Im Standby-Modus Pfeiltaste nach **unten** drücken.
2. Die  Taste wiederholt drücken, bis die gewünschte Nummer erscheint.

Über Direktwahltasten anwählen

Im Standby-Modus **M1** bis **M4** Tasten drücken, um jeweilige Nummer anzuwählen.

Direktwahlnummern bearbeiten

Schritte im Abschnitt „Telefonbucheintragungen bearbeiten“ durchführen.

Hinweis:

- Die standardmäßige Bezeichnung der Direktwahltasten ist M1: bis M4, Sie können diesem Namen zwar eine Bezeichnung hinzufügen, jedoch können Sie die standardmäßige Bezeichnung nicht ändern, z.B. können Sie M1 auf M1: Privat abändern.

Direktwahlnummern löschen

Schritte im Abschnitt „Telefonbucheintragungen löschen“ durchführen.

Einstellungen Basisstation

Mobilteil entfernen

Mit dieser Funktion können Sie die Registrierung eines Mobilteils zu einer Basisstation löschen.

1. **Menü** drücken.

ERWEITERTE FUNKTIONEN

- Die  Taste wiederholt drücken, um **BS-Einstellungen** zu wählen, dann **Wählen** drücken.
- MT abmelden** wählen. Auf der Anzeige erscheint „PIN?“, so dass Sie die PIN-Nummer eingeben können (die Werkseinstellung lautet „0000“). Dann **OK** drücken.
- Die  Taste drücken, um ein Mobilteil zu wählen. Wenn Sie das aktuelle Mobilteil oder ein Mobilteil wählen, das nicht existiert, so hören Sie einen Warnton.
- Zur Bestätigung **Wählen** drücken, und das ausgewählte Mobilteil verhält sich nun so als sei es außerhalb des Empfangsbereichs.

Flashzeit

Die Einstellung der Flashzeit können Sie wie folgt ändern:

- Schritte 1 und 2 wie im vorherigen Abschnitt durchführen.
- Die  Taste drücken, um Menü **Flashzeit** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.

ERWEITERTE FUNKTIONEN

3. Auf der Anzeige erscheint die derzeitige Einstellung.

Die  Taste drücken, um **Flash-1(100ms für UK) / Flash-2(270ms)** zu wählen, dann zum Speichern **Wählen** drücken.

Änderung der PIN-Nummer

Mit dieser Funktion können Sie die PIN-Nummer der zurzeit aktiven Basisstation ändern. Die Werkseinstellung der PIN ist 0000.

1. Schritte 1 und 2 des Abschnitts „Mobilteil entfernen“ durchführen.

2. Die  Taste drücken, um Menü **PIN ändern** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.

3. Auf der Anzeige erscheint „**PIN?**“. Geben Sie die aktuelle PIN-Nummer ein, dann Taste **Wählen** drücken. Wenn die alte PIN-Nummer richtig ist, werden Sie nun aufgefordert, eine neue PIN-Nummer einzugeben. Wenn die alte PIN-Nummer nicht richtig ist, so ertönt ein Warnton und Sie kehren zum Menü **PIN ändern** zurück.

4. Geben Sie die neue PIN-Nummer ein, dann Taste **Wählen** drücken. Nun werden Sie aufgefordert, die PIN-Nummer zu bestätigen. Geben Sie die neue

ERWEITERTE FUNKTIONEN

PIN-Nummer noch einmal ein, dann zum Speichern **Wählen** drücken und diese Funktion verlassen.

Werkseinstellung Basisstation

Mit dieser Funktion können Sie das Telefon wieder auf Werkseinstellung zurücksetzen.

1. **Menü** drücken.



2. Die Taste drücken, um **RückEinstellung** zu wählen, dann **Wählen** drücken. Nun werden Sie aufgefordert, die PIN-Nummer einzugeben.

3. Geben Sie die PIN-Nummer ein (die Werkseinstellung der PIN ist 0000), dann **Werkseinstellung** drücken. Wenn Sie die richtige PIN-Nummer eingegeben haben, erscheint : Bestät., drücken Sie : **Wählen**.

Ergebnis: Nach Durchführung dieser Funktion wird die Basisstation wieder auf Werkseinstellung gesetzt und das Mobilteil geht in Standby-Modus über.

Einstellungen Mobilteil

Wecker stellen

Sie können auf dem Mobilteil eine Weckuhr einstellen, und Weckeinstellungen ändern.

ERWEITERTE FUNKTIONEN

1. **Menü** drücken.



2. Die  Taste drücken, um **MT-Einstellungen** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.

3. **Wählen** drücken, um im Menü, **Alarm** zu wählen.

4. Auf dem Display erscheint die aktuelle Einstellung. Die



 Taste verwenden, um **Ein/Aus** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.

5. Wenn Sie **Ein** wählen, werden Sie über die Anzeige aufgefordert, die Uhrzeit im **HH:MM** Format einzugeben. Bitte dazu die numerische Tastatur verwenden.

6. **Wählen** drücken, es ertönt ein Piepton und auf der Anzeige erscheint **Schlummern Ein/Aus**. Über die



 Taste können Sie die Schlummerfunktion an der Weckuhr ein- oder ausschalten, dann zum Speichern **Wählen** drücken.

7. Wenn der Wecker klingelt, können Sie jede Taste drücken, um ihn abzuschalten.

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Hinweise:

- Für Schritt 6 muss die Eingabe im 24-Stunden Format erfolgen.
- Der Wecker kann über jede Taste abgeschaltet werden.
- Falls Sie Schlummern An wählen, klingelt der Wecker alle 11 Minuten. Durch Drücken der Taste , wenn der Wecker klingelt, wird diese Option auf Schlummern Aus umgeschaltet.

Audio Einstellung

Sie können das Menü auch verwenden, um die Audio Lautstärke einzustellen.

1. Schritte 1 und 2 des vorherigen Abschnitts (Seite 37) durchführen.

2. Die Taste  drücken, um das Menü **Rufton-Einstellung** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.

3. Die Taste  drücken, um **Lautstärke** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.

4. Auf der Anzeige erscheint die derzeitige Einstellung.

Die Taste  drücken, um die Höhe der Lautstärke

ERWEITERTE FUNKTIONEN

einzustellen (Volume 1-Volume 5) zum Speichern
Speichern Softkey drücken.

Tastentöne

Jedes Mal, wenn Sie eine Taste drücken, wird dies durch einen Tastenton vom Mobilteil bestätigt. Sie können die Tastentöne auch auf leise setzen. Bei bestimmten Fehleingaben ertönt ein Warnton, wenn die falsche Taste gedrückt wurde.

1. Schritte 1 und 2 des Abschnitts „Wecker stellen“ durchführen.

2. Die Taste  drücken, um das Menü **Ton-Einstellung** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.

3. **Auswahl** nochmals drücken, um **Tastenton** zu wählen.

4. Sie können die  Taste verwenden, um **Ein** oder **Aus** zu wählen und diese Funktion ein- oder auszuschalten.

5. **Wählen** drücken.

Hinweis:

ERWEITERTE FUNKTIONEN

- Bei normaler Verwendung empfehlen wir, die Tastenton-Funktion eingeschaltet zu lassen. Dadurch ist das Telefon einfacher zu bedienen.

LCD Kontrasteinstellung

Durch eine entsprechende Anpassung haben Sie die Möglichkeit, die Deutlichkeit und Sichtbarkeit der Anzeige durch Änderung des Kontrastes entsprechend der Umgebungsverhältnisse zu verbessern.

1. Schritte 1 und 2 des Abschnitts „Wecker stellen“ (Seite 37) durchführen.

2. Die Taste  wiederholt drücken, und **LCD Kontrast** wählen, dann **Auswahl** drücken.

3. Die Taste  wiederholt drücken, um zwischen 17 verschiedenen Kontraststufen zu wählen, dann **speichern** drücken.

4. Die Taste  drücken, um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Datums- & Zeiteinstellung

1. Datums- & Uhrzeitformat

1. Schritte 1 und 2 des Abschnitts „Wecker stellen“ durchführen.

ERWEITERTE FUNKTIONEN

- Die Taste  drücken, um Menü **Datum & Uhrzeit** zu wählen, dann **Wählen** drücken.
- Die Taste  drücken, um **Datumsformat** oder **Zeitformat** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
- Sie können die  Taste verwenden, um das Datumsformat (**TT-MM/MM-TT**) oder das Uhrzeitformat (**12-Std./24-Std.**) zu wählen, dann zum Speichern Speichern drücken.

2. Datums- & Zeiteinstellung

- Schritte 1 und 2 des vorherigen Abschnitts durchführen.
- Die Taste  drücken, um Menü **Datum einstellen** oder **Zeit einstellen** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
- Aktuelles Datum/aktuelle Zeit über numerische Tastatur eingeben, Die Taste  drücken, um über Speichern zu **speichern** und diese Funktion verlassen.

Hinweise:

- Falls Sie die 12stündige Anzeige wählen, so erscheint AM/PM rechts neben der Zeitangabe im Standby-Modus.

ERWEITERTE FUNKTIONEN

- Bei Schritt 3 müssen Sie die Zeit im 24-Stunden Format eingeben.

Basisstation auswählen

Mit dieser Funktion können Sie eine Basisstation aus all denen auswählen, die bereits für das Mobilteil registriert sind. Die Optionen können Sie über das Menü durchscrollen.

1. Schritte 1 und 2 aus dem Abschnitt „Wecker stellen“ (Seite 37) durchführen.

2. Taste  drücken, um Menü **Basis** zu erhalten, dann **Wählen** drücken.

3. Sie können die  Taste verwenden, um die von Ihnen gewünschte Basisstation auszuwählen, dann **Auswahl** drücken. Wenn Sie eine nicht vorhandene Basisstation wählen, so gibt das Mobilteil einen Warnton von sich.

4. Auf der Anzeige erscheint **Basis X.gewählt** Zur Bestätigung **Auswahl** drücken. Sie hören einen Bestätigungston.

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Verstärker

Ihr Telefon ist mit einer besonderen Verstärkerfunktion ausgestattet, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Wenn Sie diese Funktion einschalten, so liegt die Lautstärkenregelung des Hörers am Mobilteil zwischen 15-30dB. Ansonsten liegt sie bei 0-15dB.

1. **Menü** drücken.

2. Taste  nach oben oder Taste  nach unten wiederholt drücken, um **MT-Einstellung** zu wählen, dann **Wählen** drücken.

3. Taste  nach oben oder Taste  nach unten drücken, um Menü **Verstärkt** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.

4. Sie können die Taste  nach oben oder die Taste  nach unten verwenden, um **Ein** oder **Aus** zu wählen und diese Funktion ein- oder auszuschalten.

5. **Speichern** drücken.

Registrierung

Das mitgelieferte Mobilteil wurde schon als Nummer 1 registriert. Mit Ihrer Basisstation können Sie bis zu 5 Mobilteile registrieren lassen, so dass Sie den gleichen Anschluss mit anderen Teilnehmern teilen können.

Vor der Registrierung eines Mobilteils auf eine Basisstation, sollten Sie die Basisstationstaste 5 Sekunden lang gedrückt halten und dann freigeben.

1. **Menu** drücken.

2. Die  Taste wiederholt drücken, um das Menü **Registrierung** auszuwählen, dann **Auswahl** drücken.

3. Mit der  Taste die Basisstationsnamensliste durchscrollen, dann Softkey drücken, um eine Basisstation auszuwählen. Das Mobilteil sucht nach der gewünschten Basisstation und die entsprechende Information wird auf dem LCD durch Blinkzeichen angezeigt.

4. Nach Auffindung der Basisstation und vollständiger Registrierung des Mobilteils werden Sie aufgefordert, die PIN-Nummer einzugeben (die Werkseinstellung ist 0000).

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Nach Bestätigung der PIN-Nummer wird ein Registrierungston hörbar und die Basisstation vergibt eine Nummer an das Mobilteil. Falls die eingegebene PIN-Nummer ungültig ist, so ertönt ein Warnsignal und das Mobilteil verbleibt in dem vorherigen Registrierungsmodus.

5. Wird keine Basisstation aufgefunden, so verhält sich das Mobilteil genauso, als sei es außerhalb des Empfangsbereichs.

Gespräche mit mehr als einem Mobilteil

Falls Sie mehr als ein Mobilteil für die gleiche Basisstation registriert haben, so können Sie auch interne Gespräche führen oder externe Gespräche zwischen den registrierten Mobilteilen verbinden.

Ein internes Gespräch führen

1. Die  Taste drücken, die LCD-Anzeige erscheint wie folgt, dann die Nummer des Mobilteils eingeben, das Sie anrufen möchten :
2. Falls das Empfängermobilteil nicht verfügbar ist, so geht das Mobilteil wieder zurück auf Standby-Modus. Falls die eingegebene Mobilteilnummer richtig ist, so klingelt das angerufene Mobilteil und es erscheint die

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Anzeige Mobilteil X ruft an. Der Benutzer des Mobilteils kann die  Taste drücken, um das interne Gespräch anzunehmen.

3. Am Ende des Gesprächs  Taste drücken.

Hinweis :

Während des internen Gesprächs zeigt das LCD, falls ein anderer Anruf eingeht, die Nummer des zweiten

Teilnehmers an. Bitte drücken Sie die  Taste, um zunächst das interne Gespräch zu beenden und dann die  Taste, um den Anruf entgegenzunehmen.

Gesprächsverbindungen zwischen Mobilteil

Sie können ein externes Gespräch zwischen Mobilteilen verbinden, die für die gleiche Basisstation registriert sind.

1. Während eines externen Gesprächs drücken sie bitte die  Taste und dann die Nummer des Mobilteils, zu dem Sie das Gespräch durchstellen möchten.

2. Wenn der angerufene Teilnehmer Ihr Gespräch annehmen kann, so kann er/sie die  Taste drücken, um mit Ihnen zu sprechen. Zu diesem Zeitpunkt können Sie den Teilnehmer/die Teilnehmerin von dem eingehenden Gespräch unterrichten.

ERWEITERTE FUNKTIONEN

3. Wenn das angerufene Mobilteil antwortet, drücken Sie bitte die  Taste oder stellen Sie das Mobilteil wieder auf die Basisstation, um die Verbindung vorzunehmen.

Einrichtung einer 3-Wege Konferenzschaltung

Wenn Sie gerade sowohl ein externes als auch ein internes Gespräch führen, so können Sie auf folgende Art und Weise ein Drei-Wege-Konferenzgespräch einrichten:

1. Während eines externen Gesprächs die  Taste drücken und dann die Nummer des Mobilteils eingeben, das an dem Drei-Wege-Konferenzgespräch teilnehmen soll.

2. Der angerufene Teilnehmer drückt die  Taste um zu antworten.

3. Der anrufende Teilnehmer kann die  Taste drücken, um das Drei-Wege-Konferenzgespräch zu beginnen..

4. Jedes der beiden internen Mobilteile kann die  Taste drücken, um sich jederzeit aus dem Konferenzgespräch zu verabschieden.

ERWEITERTE FUNKTIONEN


Hinweis:

- Falls eines der Mobilteiles aus des Konferenzgespräch ausscheidet, so führen die anderen beiden Teilnehmer das Konferenzgespräch fort.

Anruferkennung in Anklopffunktion

Sollten Sie die Anklopffunktion über Ihre Telefongesellschaft vor Ort angefordert haben, so zeigt das Telefon den Namen und die Rufnummer des zweiten Anrufers an, während Sie noch ein anderes Telefongespräch führen.

Anruferkennung angezeigt

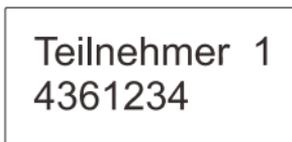

Caller two's information is displayed



1. Wenn Sie gerade auf dem Apparat sprechen, so erscheinen auf der Anzeige automatisch der Name und die Rufnummer des zweiten Anrufers.

2. **Flash** Softkey drücken, um mit dem zweiten Teilnehmer zu sprechen.

3. Nach Beendigung des Gesprächs **Flash** Softkey nochmals drücken, um Ihr Gespräch mit dem ersten Teilnehmer fortzusetzen.

Hinweis :

- Falls Sie ein externes Gespräch an ein anderes Mobilteil durchgestellt haben, so können Sie die Anklpffunktion über das zweite Mobilteil nicht benutzen.

Ansage (nur für AMPLIDECT™285)

Die Ansage, die notwendig ist, damit ein Anrufer bei Abwesenheit des Teilnehmers eine Nachricht hinterlassen kann, muss aufgezeichnet werden. Die Ansage- und Aufzeichnungsnachricht (Ansage1) und die einfache Ansagenachricht (Ansage2) können jeweils bis zu 3 Minuten lang sein.

Aufzeichnung Ansage1

Bei der Auto-Ansage1 handelt es sich um eine herkömmliche Nachricht, die Sie dazu auffordert, eine Nachricht zu hinterlassen. Falls Sie keine persönliche Ansage1 aufgezeichnet haben, so spielt das Gerät die Werkseinstellung: „**Hallo, Ihr Gespräch kann zurzeit leider nicht angenommen werden, um eine Nachricht zu hinterlassen, sprechen Sie bitte nach dem Signalton**“.

Falls Sie Ansage1 ändern möchten, so können Sie dies wie folgt tun:

1. **AB** im Standby-Modus drücken.
2. **Wählen** drücken, um **Ansage** zu wählen.
3. **Wählen** nochmals drücken, um **Mit Aufz.** zu wählen.
4. Die  Taste wiederholt drücken, um **Nachr. Aufzeichnen** zu wählen, dann **Wählen** drücken.
5. Sie können Ihre Mitteilung nach einem Signalton aufzeichnen. Die Aufzeichnung endet automatisch nach 3 Minuten. Sie können die Aufzeichnung auch durch Drücken der **OK** Taste zum bestätigen

Ansage2 aufzeichnen

Über die Ansagefunktion Ansage2 können nur Ansagen aufgezeichnet und keine Nachrichten hinterlassen werden. Falls Sie keine persönliche Ansage2 aufgezeichnet haben, so spielt das Gerät die Werkseinstellung: „**Hallo, Ihr Gespräch kann zurzeit leider nicht angenommen werden, bitte rufen Sie später noch einmal an**“.

Falls Sie Ansage 2 ändern möchten, so können Sie dies wie folgt tun:

1. **AB** im Standby-Modus drücken.
2. **Auswahl** drücken, um **Ansage** zu wählen.

- Die  Taste wiederholt drücken, um **Ohne Aufz.** zu wählen, dann mit **Auswahl** Taste bestätigen.
- Die  Taste wiederholt drücken, um **Aufzeichnen** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
- Sie können Ihre Mitteilung nach einem Signalton aufzeichnen. Die Aufzeichnung endet automatisch nach 3 Minuten. Sie können die Aufzeichnung auch durch Drücken der **OK** Taste bestätigen und beenden.

Ansage1/Ansage2 über Basisstation aufzeichnen

Die  oder  Taste solange gedrückt halten, bis die Systemansage beginnt. Bitte nach dem Signalton mit dem Sprechen beginnen. Die  Taste verwenden, um jederzeit abubrechen.

Hinweise:

- Beim Aufzeichnen der Ansage bitte in das Mikrophon an der Basisstation sprechen. Um eine bestmögliche Aufzeichnung zu erhalten, gehen Sie bitte sicher, dass Sie ca. 20 cm von dem Mikrophon entfernt sind.
- Beim Aufzeichnen/Abspielen/Wiederherstellen von Ansage1 oder Ansage2 wird der Ansagemodus (siehe

Abschnitt **Auswahl Ansage-Modus**) automatisch auf den gewünschten Modus umgeschaltet.

Abspielen Ansage1/Ansage2

Abspielen aktuelle Ansage1/Ansage2.

1. Möglichkeit: Über das Menü

1. **AB** im Standby-Modus drücken.
2. **Auswahl** drücken, um **Ansage** zu wählen.
3. **Auswahl** drücken, um **Mit Aufz.** zu wählen oder Pfeiltaste nach unten drücken, um **Ohne Aufz.** auszuwählen, dann mit **Wählen** Taste bestätigen.
4. **Auswahl** drücken, um **Abspielen** auszuwählen.
5. Die aktuelle Ansage1/2 wird abgespielt. Während der Wiedergabe, haben Sie die Möglichkeit, mit dem **Zurück** das Abspielen zu unterbrechen und diese Funktion zu verlassen.

2. Möglichkeit: Über die Basisstation

Im Aktiv-Modus (alle Leuchtanzeigen an)  Taste an der Basisstation drücken, um aktuelle Ansage1/Ansage2

abzuspielen. Die  Taste verwenden, um das Abspielen jederzeit zu unterbrechen.

Ansage1/Ansage2 wiederherstellen

1. Möglichkeit: Über das Menü

1. **AB** im Standby-Modus drücken.
2. **Wählen** drücken, um **Ansage** zu wählen.
3. **Wählen** drücken, um **Mit Aufz.** zu wählen oder Pfeiltaste nach unten drücken, um **Ohne Aufz.** auszuwählen, dann mit **Wählen** Taste bestätigen.
4. Die  Taste wiederholt drücken, um **Abspielen** zu wählen, dann **Zurück** Taste drücken, um dies abzubrechen und dadurch die Werkeinstellung wiederherzustellen.

2. Möglichkeit: Über die Basisstation

Im Aktiv-Modus  (alle Leuchtanzeigen an) Taste an der Basisstation drücken, um

Ansage1/Ansage2 abzuspielen, dann  Taste gedrückt halten, um Werkseinstellung wiederherzustellen, Sie hören einen Signalton zur Bestätigung. Die werksseitige Ansage1 oder Ansage2 wird danach wieder abgespielt.

Nachrichten (nur für AMPLIDECT™285)

Neue/Gespeicherte Nachrichten abspielen

1. Möglichkeit: Über das Menü

1. **AB** im Standby-Modus drücken.
2. Pfeiltaste nach unten drücken, um **Nachricht** auszuwählen, dann mit **Wählen** Taste bestätigen.
3. **Wählen** Taste nochmals drücken, um **Abhören** auszuwählen, dann mit **Auswahl** Taste bestätigen.
4. Das Telefon sagt an: „Sie haben N neue Nachricht(en)“ oder „Sie haben N gespeicherte Nachricht(en)“. Die entsprechenden Nachrichten werden jeweils eine nach der anderen abgespielt. Sie können die Taste verwenden, um die jeweils aktuelle Nachricht zu löschen oder mit dem Zurück das Abspielen unterbrechen und diese Funktion verlassen.

2. Möglichkeit: Über die Basisstation

Wenn Sie eine oder mehrere neue Nachrichten haben,

 Taste drücken, um sie abzuspielen. Die  oder

 Taste drücken, um die gewünschte Nachricht

abzuspielen. Die Taste  einmal drücken, um die aktuelle Nachricht noch einmal abzuspielen, oder zweimal drücken, um die vorherige Nachricht abzuspielen. Falls keine neue Nachricht mehr vorhanden

ist, bitte die  Taste drücken, um die gespeicherten

Nachrichten abzuspielen. Die  Taste noch einmal drücken, um diese Funktion zu verlassen.

Hinweis: Während des Abspielens könne Sie die  oder  Taste verwenden, um die Lautstärke zu regeln.

Alle Nachrichten löschen

1. Möglichkeit: Über das Menü

1. **TAM** im Standby-Modus drücken.
2. Pfeiltaste nach unten drücken, um **Nachricht** auszuwählen, dann mit **Auswahl** Taste bestätigen.
3.  Taste wiederholt drücken, um **Alle löschen** auszuwählen, dann mit **Auswahl** Taste bestätigen.
4. Auf der LCD-Anzeige erscheint **Bestätigen?**. **OK Taste drücken, um alle Nachrichten zu löschen oder Abbrechen drücken, um diese Funktion zu verlassen.**

2. Möglichkeit: Über die Basisstation

Im Aktiv-Modus (alle Leuchtanzeigen an)  Taste an der Basisstation drücken, um alle Nachrichten zu löschen. Eine Sprechanzeige ist ebenfalls hörbar. Wenn Sie diese Taste während des Abspielvorgangs gedrückt halten, wird die aktuelle Nachricht gelöscht.

Bitte beachten:

Nachrichten von bis zu 15 Minuten können aufgezeichnet werden.

Memo aufzeichnen

Sie können Ihr Telefon dazu verwenden, Mitteilungen (von jeweils bis zu 3 Minuten Länge) für einen anderen Benutzer Ihres Telefons aufzuzeichnen. Die Mitteilung kann dann als Nachricht abgespielt werden.

1. **AB** im Standby-Modus drücken.
2. Pfeiltaste nach unten drücken, um **Nachricht** auszuwählen, dann mit **Wählen** Taste bestätigen.
3.  Taste wiederholt drücken, um **Memo** auszuwählen, dann mit **Wählen** Taste bestätigen.
4. Sie können Ihre Mitteilung nach einem Signalton aufzeichnen. Die Aufzeichnung endet automatisch nach 3 Minuten. Sie können die Aufzeichnung auch durch Drücken der OK Taste bestätigen und beenden.

Bitte beachten:

- Falls Ihnen jemand eine Nachricht hinterlassen hat, so erscheint das  Symbol im Standby-Modus auf der LCD-Anzeige.

AB-Einstellung (nur für AMPLIDECT™285)

AB An/Aus

Hiermit können Sie den Anrufbeantworter an-oder ausschalten.

1. Möglichkeit: Über das Menü

1. **AB** im Standby-Modus drücken.



2. Taste wiederholt drücken, um **AB-Einstellung** auszuwählen, dann mit **Wählen** Taste bestätigen.

3. **Wählen** Taste nochmals drücken, um **AB- Ein/Aus** zu wählen.



4. Taste verwenden, um **Ein** oder **Aus** zu wählen, dann **Wählen** Taste drücken.

2. Möglichkeit: Über die Basisstation



Im Aktiv-Modus (alle Leuchtanzeigen an) Taste an der Basisstation drücken, um diese Funktion ein- oder auszuschalten, der aktuelle Zustand wird angezeigt.

Aufnahme Dauer

Sie können die Dauer der Aufnahme zwischen 60 Sek und unbegrenzt festlegen;
Im Standby-Modus wählen Sie AB



2. Taste wiederholt drücken, um **AB-Einstellung** auszuwählen, dann mit **Wählen** Taste bestätigen.

3. Pfeiltaste nach unten drücken, um **Aufnahmezeit** auszuwählen, dann **Wählen** Taste drücken.

4.  Taste verwenden, um die Aufnahmezeit zu wählen, dann **Wählen** Taste drücken

Auswahl Ansage-Modus

Der Anrufbeantworter arbeitet in zwei Modi, „Ansprache und Aufzeichnung (Ansprache1)“ oder „nur Ansage (Ansprache2)“. Jeder Modus enthält eine bereits festgehaltene Ansage, die Ihre Anrufer hören können.

Sie können den gewünschten Modus wie folgt auswählen:

1. **AB** im Standby-Modus drücken.

2.  Taste drücken, um **Ansprache-modus** auszuwählen, dann **Wählen** Taste drücken.

3. Über  Taste **Mit Aufz.** oder **Ohne Aufz.** wählen, dann **Wählen** Taste drücken.

Bitte beachten:

- Wenn Sie **Ohne Aufz.** wählen, dann kann der Anrufer zwar Ihre Ansage hören, ist jedoch nicht in der Lage, eine Nachricht zu hinterlassen.

Ohne Aufz. wird auch dann abgespielt, wenn Ihr Anrufbeantworter voll ist.

Einstellung der Klingelzeit

Unter der Klingelzeit versteht man die Anzahl der Freizeichen, nach denen der Anrufbeantworter ein eingehendes Gespräch annimmt und Ihre Ansage abspielt. Sie können 2 bis 6 Freizeichen einstellen oder den Sparmodus auswählen. Wenn Sie **Sparmodus** auswählen, nimmt der Anrufbeantworter die eingehenden Nachrichten nach 3 Freizeichen entgegen, ansonsten nach 6 Freizeichen.

1. **AB** im Standby-Modus drücken.

2.  Taste wiederholt drücken, um **AB-Einstellung** auszuwählen, dann mit **Wählen** Taste bestätigen.

3.  Taste wiederholt drücken, um **Anz. Ruftöne** auszuwählen, dann **Wählen** Taste drücken.

4. Über  Taste die Anzahl der Freizeichen auswählen (**2 x klingeln ~ 6 x klingeln oder Toll Saver**), dann **Wählen** Taste drücken.

Sprachauswahl für Anleitungen mit Sprechstimme

Sie können die Sprache auswählen, in der die Anleitungen über Sprechstimme gegeben werden.

1. **AB** im Standby-Modus drücken.

-  Taste wiederholt drücken, um **AB-Einstellung** auszuwählen, dann mit **Wählen** Taste bestätigen.
-  Taste wiederholt drücken, um **AB-Sprache** auszuwählen, dann **Wählen** Taste drücken.
- Die Sprachen werden angezeigt. Optionen über  Taste durchscrollen. Jede Sprache erscheint in der jeweiligen Übersetzung.
- Wählen** Taste drücken, um die gewünschte Sprache auszuwählen. Sie hören einen Piepton zur Bestätigung.

Fernbedienungscode

Um Ihren Anrufbeantworter von einem anderen Telefon aus bedienen zu können, müssen Sie den Fernbedienungscode eingeben. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie diesen Code ändern, werksseitig ist er auf 0000 eingestellt. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt **Fernbedienung**.

- AB** im Standby-Modus drücken.
-  Taste wiederholt drücken, um **AB-Einstellung** auszuwählen, dann mit **Wählen** Taste bestätigen.
-  Taste wiederholt drücken, um **PIN Ändern** auszuwählen, dann **Wählen** Taste drücken.

4. In der LCD-Anzeige erscheint der derzeitige Fernbedienungscode. Geben Sie den neuen Code ein, den Sie verwenden wollen, dann **Bestätigen** und drücken Sie die **OK** Taste.

Einstellung Wochentage

Vor Abspielen einer Nachricht werden jeweils der Wochentag und die Zeit angegeben, an dem die Nachricht eingegangen ist. Das Datum (oder den Wochentag) können Sie über die Basisstation einstellen.

Im Aktiv-Modus (alle Leuchtanzeigen an)  Taste an der Basisstation solange gedrückt halten, bis die derzeitige Einstellung angesagt wird.  Taste wiederholt drücken, um neue Einstellung vorzunehmen, durch Drücken der  Taste bestätigen. Jedes Mal, wenn Sie auf die  Taste drücken, sagt das System den entsprechenden Wochentag an.

Bitte beachten :

- Wenn Sie die Batterie herausnehmen oder den Adapter vom Netz nehmen, so müssen Sie das Datum (oder den Wochentag) neu einstellen.

Fernbedienung (nur für AMPLIDECT™285)

Zahlreiche Funktionen Ihres Anrufbeantworters sind über Fernbedienung von jedem Tastentelefon aus zugänglich. Um Zugang zum System zu erhalten, ist ein vierstelliger Sicherheitscode (Fernbedienungscode) erforderlich, die Werkseinstellung ist 0000. Die Eingabe des Fernzugangscode ist wie folgt:

1. Wählen Sie Ihre Telefonnummer von jedem Tastentelefon aus an.
2. Wenn Ansage 1/Ansage 2 abspielt, können Sie den Fernzugangscode durch Eingabe des Fernbedienungscode eingeben.
3. Nach Eingabe des Fernbedienungscode wird das System das Befehlsmenü ab. Sie können nun den Bedienungsbefehlen folgen.

Bitte beachten:

- Bei Eingabe eines falschen Fernbedienungscode werden Sie vom Anrufbeantworter aufgefordert, den Code noch einmal einzugeben. Danach haben Sie noch zwei Versuche, den richtigen Code einzugeben, bevor das Gespräch abgebrochen wird.

Befehle bei Fernzugriff

<i>Taste</i>	<i>Funktion</i>
1	Hauptmenü abspielen
2	Neue nachrichten abspielen
3	Gespeicherte Nachrichten abspielen
0	Alle Nachrichten abspielen
5	Anrufbeantworter an-/ausschalten
6	Ansage 1/2 aufzeichnen (je nach Einstellung). Nach der Aufzeichnung der Nachricht 1 / Nachricht 2, drücken Sie die Taste # oder * um die Nachricht abzuspielen.

Während des Abspielens, drücken Sie bitte die **3** um die nächste Aufzeichnung abzuspielen. Drücken Sie die **1** um die derzeitige Aufzeichnung noch einmal zu spielen. Drücken Sie die **2** um die Wiedergabe abubrechen, und drücken Sie die **0** um die derzeitige Nachricht zu löschen.

Bemerkung: Vor dem Auflegen sollten abgespielte Nachrichten beendet werden.

FEATURE LIST

- 1,8GHz DECT Technologie mit GAP Große 2,0" LCD Anzeige (128 x 64 Punktmatrixanzeige)
- Bis zu 5 Mobilteile optionsweise für eine Basisstation
- Bis zu 4 Basisstationen optionsweise für ein Mobilteil
- LCD Kontrasteinstellung
- Telefonbuch bis zu 50 Einträge
- Einstellung 10 wichtiger Rufnummern (VIP Nummern) aus Telefonbuch
- Wahlwiederholungsbuch mit bis zu 10 Eintragungen
- Auswahl von 10 Klingeltönen und Lautstärken (5 Stärken + Aus)
- Vibrationsalarm und visuelle Klingelanzeige
- 4 Direktwahlspeichertasten
- Tastenton An/Aus wählbar
- Telefon mit Freisprechanlage
- Interne Anrufe
- Anrufvermittlung
- 3-Wege-Konferenzschaltung
- Einstellbare Hör /Freisprechlautstärkenregelung
- Stummfunktion
- PIN Schutz
- Vorabwahl (Pre-Dial) Service
- Wahlwiederholung, Pause
- DTMF/PULSE Wählverfahren wählbar
- Flashzeit einstellbar

FEATURE LIST

- Anzeige Anrufdauer
- Realzeituhr (vorgegebene Zeit)
- Tastensperre
- Mehrere Sprachen wählbar
- Automatischer Anrufbeantworter AN/AUS wählbar
- Wecker mit Schlummertaste
- Benutzername Mobilteil
- Hintergrundbeleuchtung LCD-Anzeige und Tastatur

Anruferkennung

- FSK und DTMF Dualsystem Anruferkennung
- Anruferkennung / Anklopffunktion
- Anruferkennungsliste mit bis zu 40 Eintragungen
- Eingehende Anrufer können zurückgerufen / dem Telefonbuch hinzugefügt / gelöscht werden
- Anzeige neuer Anruf
- Neue Nachricht vorhanden

PROBLEMLÖSUNGEN

Anzeichen	Prüfen & Fehlerbehebung
Telefon funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none">• Prüfen, ob das Stromkabel richtig angeschlossen ist.• Prüfen, ob das Telefonkabel richtig angeschlossen ist.• Prüfen, ob die Batterien des Mobilteils voll aufgeladen sind.• Prüfen, ob die Batterien richtig eingelegt sind.
Kein Wählton	<ul style="list-style-type: none">• Prüfen, ob das Telefonkabel richtig angeschlossen ist.• Prüfen, ob das Stromkabel richtig angeschlossen ist.
Nichts erscheint auf der Anzeige	<ul style="list-style-type: none">• Prüfen, ob die Batterien des Mobilteils richtig eingelegt sind.• Prüfen, ob die Batterien des Mobilteils voll aufgeladen sind.• Prüfen, ob das Mobilteil angeschaltet ist.
Mobilteil scheint eine sehr kurze Batteriedauer	<ul style="list-style-type: none">• Die Ladkontakte überprüfen.• Kontinuierlich kurze Batteriedauer weist auf die Notwendigkeit hin, die Batterien zu wechseln.• Sicherstellen, dass die richtigen

er zu haben	Batterien verwendet werden.
Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt	<ul style="list-style-type: none">• Sicherstellen, dass Sie den Anruferkennungsdienst Ihres Telefonanbieters in Anspruch nehmen.• Der Anrufer könnte seine Angaben unterdrücken.• Das Telefon mehrmals klingeln lassen, da eine Verzögerung der Übertragung der Anruferdaten vorliegen könnte.

Nachrichten, akustische Signaltöne, usw. nicht hörbar.

- **Ansagelautstärke erhöhen.**

Das System spielt immer nur Ansage 2 ab.

- **Möglicherweise ist der Speicher des Anrufbeantworters voll.**

Eingehende Nachrichten sind unvollständig.

- **Speicher des Anrufbeantworters ist voll.**

Das Display der Basisstation zeigt TT

Dies bedeutet, dass die Zeit nicht aktualisiert wird.

Gehen Sie zum Menü, MT Einstellung sowie Datum & Zeit

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Frequenzbereich	1,88 – 1,90 GHz
Kanäle	120 Duplex-Kanäle
Trägerleistung	<250 mW
Modulation	GFSK
Frequenzstabilität	< i 50 Khz
Ladezeit	15 Stunden
Umgebungstemperatur	Normal: 15 ~ 35 Grad C, Extrem: 0c ~ 40 Grad C
Luftfeuchtigkeit	0 % ~ 90 %
Gewicht (Gramm)	Basisstation: 197, Mobilteil: 117,4
Maße (mm)	Basisstation: 124.4 x 114 x 78; Mobilteil: 133 x 46 x 19.5
Stromversorgung	Eingang Basisstation: 7,5 V, 500 mA; Eingang Mobilteil: Ni-MH 1,2 V x 3, 600 mA

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Frequency Range	1.88~1.90GHz
Channels	120 Duplex channels
Carrier Power	<250mW
Modulation	GFSK
Frequency Stability	< ± 50 KHz
Charging time	15 hours
Ambient temperature	Normal: 15°C ~ 35°C, Extreme: 0°C ~ 40°C
Humidity	0%~90%
Weight (grams)	Base: 197; Handset: 117.4
Dimensions (mm)	Base: 124.4 x 114 x 78; Handset: 133 x 46 x 19.5
Power Supply	Base input: 7.5V, 500mA; Handset input: Ni-MH: 1.2V x 3, 600mAh


Spezifikationen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden



Falls Sie eine DSL-Dienstleistung in Anspruch nehmen

Bitte installieren Sie einen Geräuschfilter (kontaktieren Sie dazu Ihren DSL-Anbieter) in Ihrer Telefonleitung zwischen der Basisstation und dem Telefonleitungsanschluss, falls Folgendes bei Ihnen auftritt:

- Sie hören Geräusche während Telefongesprächen.
- Die Anruferkennung funktioniert nicht einwandfrei.

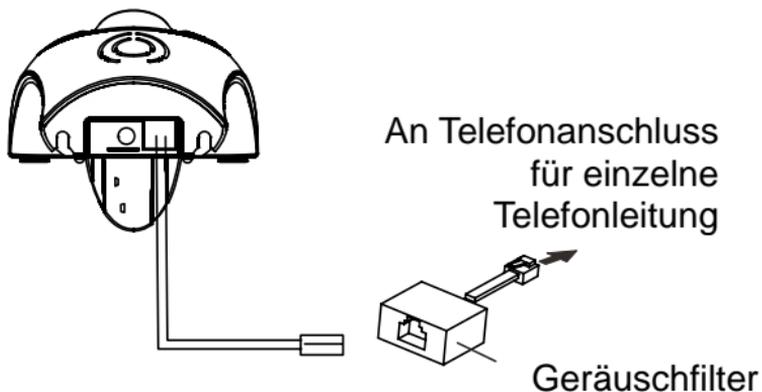

GARANTIE

Allgemeine Informationen

Garantie

Ab dem Kauf Ihres Geemarc-Produkts gewährt Geemarc Ihnen eine zweijährige Garantie. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen und Auswechslungen (nach unserem Ermessen) kostenlos. Falls ein Problem auftreten sollte, kontaktieren Sie unsere Helpline oder besuchen Sie unsere Website unter www.geemarc.com/de. Die Garantie gilt nicht bei Unfällen, dem Vorhandensein von Flüssigkeiten, Fahrlässigkeit oder der willfährigen Beschädigung von Einzelteilen. Das Produkt darf nicht manipuliert oder auseinanderggebaut werden von Personen, die keine autorisierten Vertreter von Geemarc sind. Die Garantie von Geemarc schränkt keinesfalls Ihre gesetzlichen Rechte ein.

WICHTIG: IHR KAUFBELEG IST TEIL IHRER GARANTIE UND MUSS AUFBEWAHRT UND IM FALL EINES GARANTIEANSPRUCHS VORGELEGT WERDEN.

Bitte beachten: Die Garantie gilt nur für Deutschland.

ERKLÄRUNG:

Hiermit erklärt Geemarc Telecom SA, dass dieses

GARANTIE

Produkt die Mindestanforderungen und andere relevante Vorgaben der Richtlinie 2014/53/UE über Funkanlagen und im Besonderen Artikel 3, Sektion 1a, 1b und Sektion 2 erfüllt. Das Telefon funktioniert nicht, wenn die Stromversorgung weniger als 18 mA beträgt.

Die Konformitätserklärung kann unter www.geemarc.com/de eingesehen werden.



Stromanschluss:

Der Apparat ist ausschließlich für den Betrieb mit einer Stromversorgung von 230 V und 50 Hz vorgesehen. (Klassifiziert als "gefährliche Spannung" gemäß EN60950).

Der Apparat verfügt nicht über einen integrierten Stromschalter. Um den Strom abzuschalten, schalten Sie entweder den Strom an der Steckdose ab oder ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose. Wenn Sie den Apparat einrichten, stellen Sie sicher, dass der Stromzugang frei zugänglich ist.

Telefonanschluss:

Die im Telekommunikationsnetzwerk vorhandenen Spannungen sind klassifiziert als TNV-3 (Telecommunication Network Voltage) gemäß EN60950.

RECYCLINGANWEISUNGEN

Die WEEE-Richtlinie (Elektro- und Elektronikaltgeräte) wurde aufgestellt, damit Altgeräte auf beste Art und Weise verwertet werden.

Wenn dieses Produkt defekt ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren Hausmüll. Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Batterien und werfen Sie diese in einen geeigneten Rücknahmecontainer.

Geben Sie das Produkt bei einer Altgerätesammelstelle ab.

- Oder geben Sie das alte Produkt dem Händler zurück. Bei Kauf eines neuen Gerätes sollte der Händler das Altgerät annehmen.

Wenn Sie sich an diese Anweisungen halten, stellen Sie den Schutz der Gesundheit und Umwelt sicher.



Produktbetreuung und Hilfe finden Sie unter

www.geemarc.com/de

E-mail : **kontakt@geemarc.com**

Telefon : **00 49 (0)228 548 89 932**



UGAD280-285_Ge_v1.9

geemarc™ Deutschland
Telecom SA

Produktsupport und Hilfe
erhalten Sie auf unserer Webseite unter
www.geemarc.com/de

E-mail : kontakt@geemarc.com
Telefon : 00 49 (0)228 548 89 932