

GEEMARC

CLEAR SOUND™

HEAR THE DIFFERENCE

CL1200

MULTI-FUNCTIONELE TELEFOON



Nederlands

geemarc™
Telecom SA

INLEIDING

INHOUD	1
INLEIDING	3
De telefoon uitpakken	4
OMSCHRIJVING	5
Algemene omschrijving	5
INSTALLATIE	10
Opstelling	10
Monteren op de muur	11
Instellingen van het belsignaal	12
Instelling van de Flash (= seintje voor herroeping)	12
Instellingen van het ontvangstvolume en de toon	12
Instelling van het volume van de luidspreker	14
Instelling van het spreekvolume	14
DE TELEFOON GEBRUIKEN	15
Iemand bellen	15
Een gesprek aannemen	16
Laatste nummer opnieuw bellen	16
Stilmodus (MUTE) functie	16
Gebruik van gehoorapparaten	17
Flash signaal	17
GEHEUGEN	18
Een nummer in het telefoonboek opslaan	18
Een nummer uit het telefoonboek bellen	18

INLEIDING

OPSPOREN EN OPLOSSEN VAN FOUTEN	19
VEILIGHEIDSINFORMATIE	20
ALGEMENE INFORMATIE	21
RECYCLE RICHTLIJNEN	22

INLEIDING

Gefeliciteerd met het aanschaffen van uw Geemarc CL1200. Dit is een versterkte telefoon met grote knoppen. Het toetsenbord met de grote knoppen is goed te zien en gemakkelijk te gebruiken. Dit voorkomt dat u het verkeerde nummer draait. De telefoon heeft snelkiesknoppen speciaal ontworpen om kiezen gemakkelijker te maken, zodat u in staat bent uw vrienden, familie of andere mensen die u belangrijk vindt te bellen door slecht één toets in te drukken. Deze telefoon is compatibel met gehoorapparaten.

Om de mogelijkheden van uw Geemarc telefoon volledig te benutten, is het van belang dat u eerst de onderstaande instructies leest. Bewaar deze gebruikshandleiding voor toekomstige raadpleging op een veilige plek.

Deze handleiding legt u uit hoe u de telefoon moet gebruiken.

CL1200



INLEIDING

De telefoon uitpakken

Wanneer u de telefoon uitpakt, moet u het volgende vinden in de verpakking:

- 1 CL1200 eenheid
- 1 CL1200 handset met gedraaid koord
- 1 Telefoon aansluitsnoer
- 1 Gebruikshandleiding



Bezoek ons op

www.geemarc.com


voor productondersteuning en hulp

telefoon 03.28.58.75.99

of fax 03.28.58.75.76


OMSCHRIJVING

Algemene omschrijving

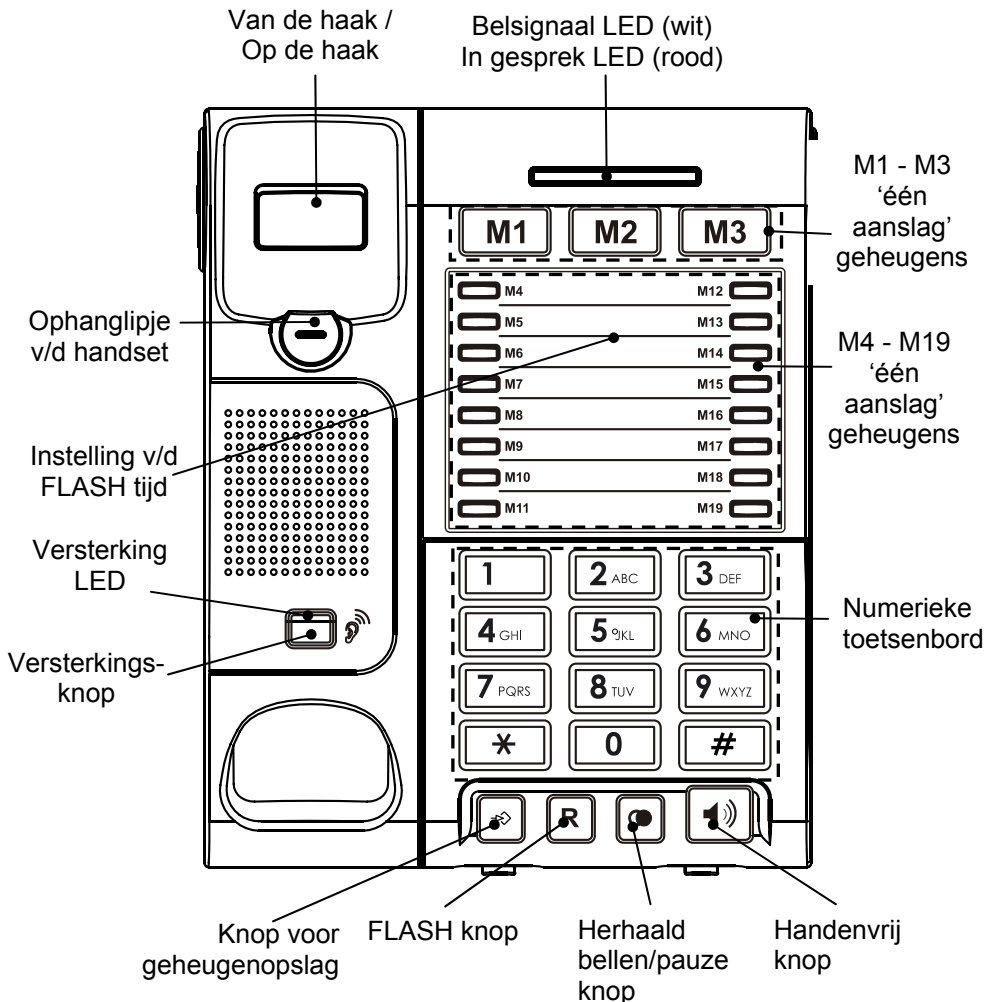


OMSCHRIJVING

Omschrijving van de handset

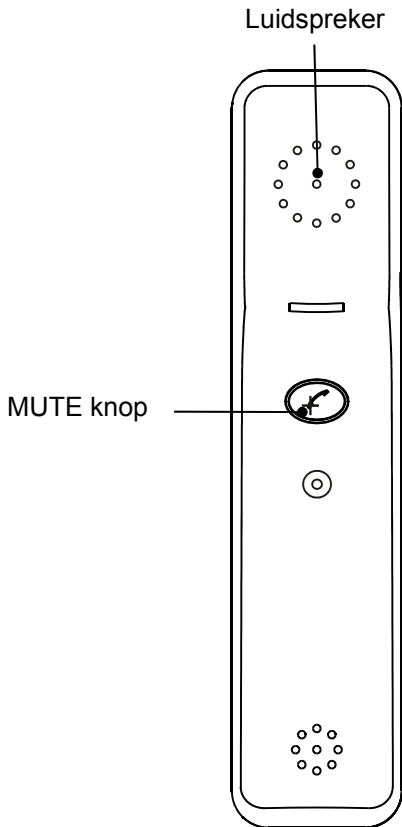

OMSCHRIJVING

Omschrijving van de achterkant

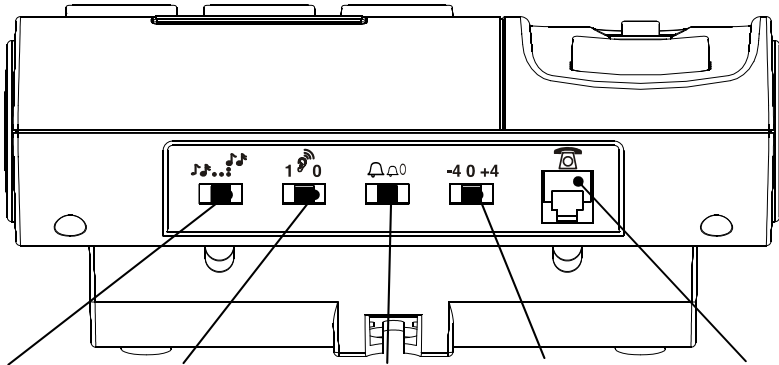

Schakelaar
v/d toon v/h
belsignaal

Versterkings-
schakelaar

Schakelaar
v/h volume
v/h belsignaal


Schakelaar
v/h
spreekvolume

Stekerbuis v/h
aansluitsnoer

Omschrijving van de voorkant


Toonschuifschakelaar

Volumeschuifschakelaar

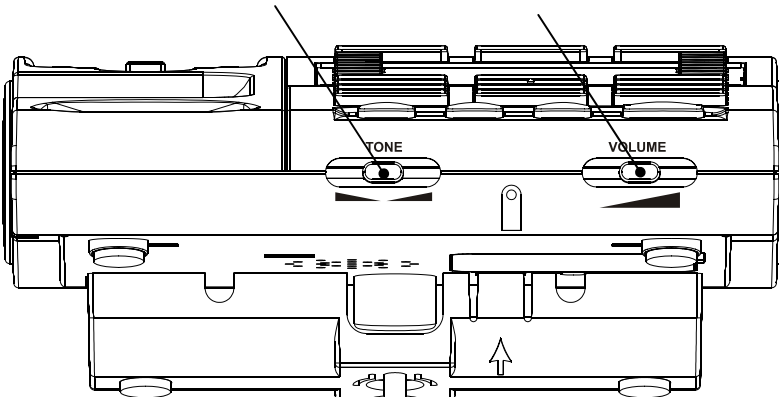


OMSCHRIJVING

Omschrijving van de linkerkant

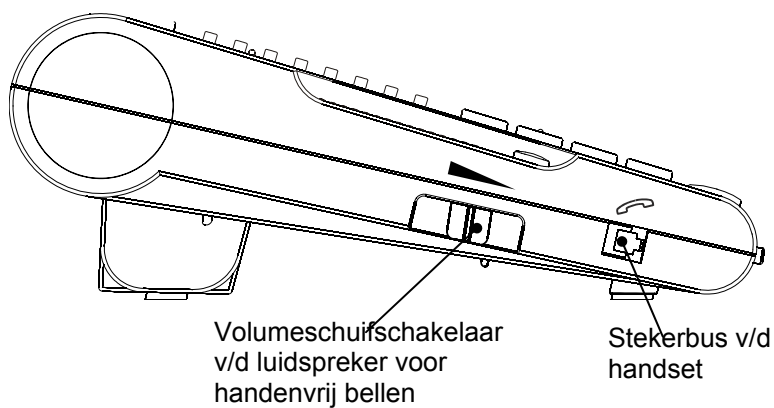


Omschrijving van de rechterkant

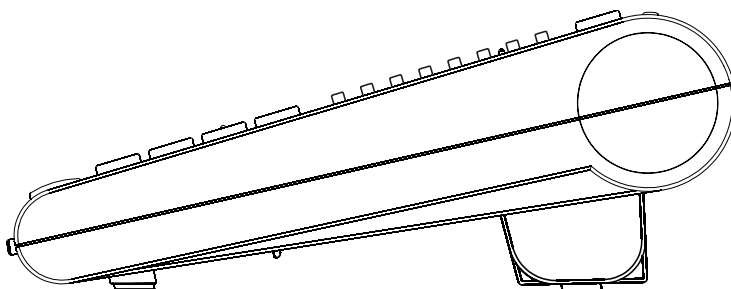


OMSCHRIJVING


Omschrijving van de onderkant

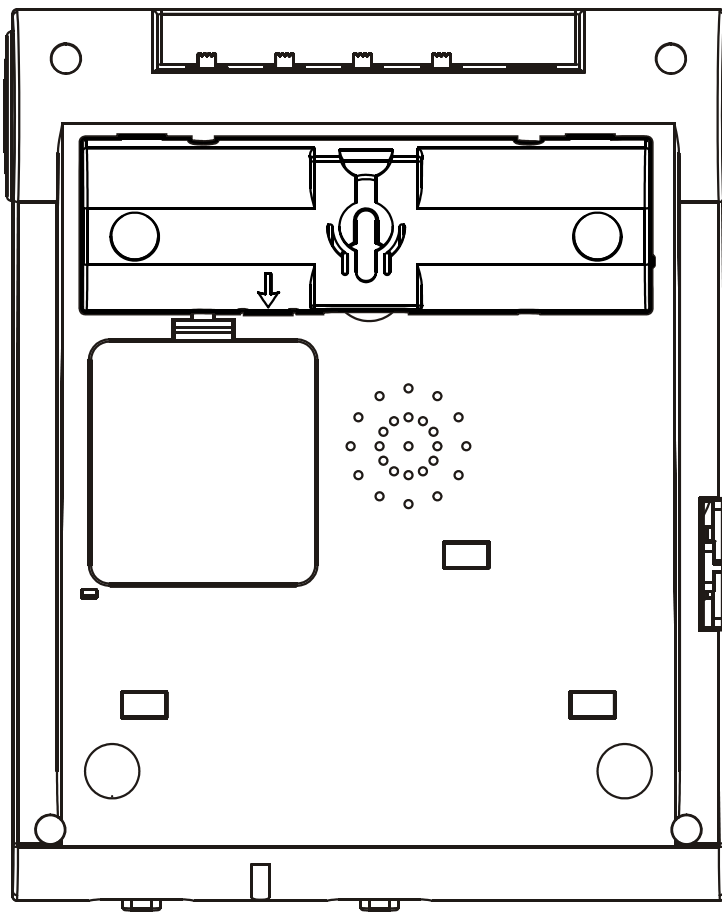

INSTALLATIE

Opstelling

Verbind het ene uiteinde van het gedraaide koord met de handset. Steek het andere uiteinde van het gedraaide koord in de stekerbuis aangeduid met  aan de linkerkant van het CL1200 eenheid. Leg de handset in het basisstation.

Steek het aansluitsnoer in de stekerbuis aangeduid met  aan de achterkant van de telefoon. Steek het andere uiteinde van het aansluitsnoer in de wandcontactdoos.*


Neem de handset ter hand en luister of u een kiestoon hoort.

(*) TNV-3 classificatie volgens EN60-950 norm

INSTALLATIE


Monteren op de muur


Draai het ophanglipje van de handset om (draai het 180°). Dit voorkomt dat de handset uit het basisstation valt wanneer de telefoon op de muur is gemonteerd.

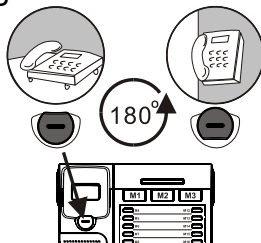

Monteer twee schroeven in de muur op een afstand van 83 mm van elkaar in een verticale lijn. Laat de schroeven 5 mm uit de muur steken.


Steek de geleidelipjes van de bevestigingsbeugel in de gleuven (t.o. het sleutelgat) aan de onderkant van de telefoon. Druk en schuif de beugel naar boven totdat het op zijn plaats klikt.


Steek het ene uiteinde van het aansluitsnoer in de stekerbuis aangeduid met  aan de achterkant van de telefoon en het andere uiteinde in de wandcontactdoos.

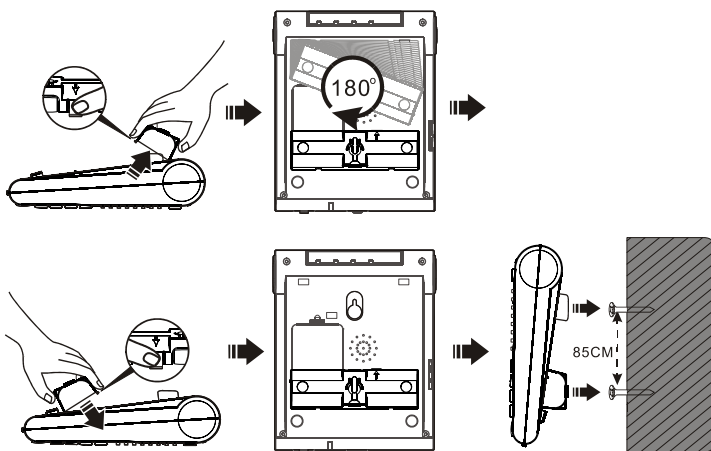

INSTELLINGEN

Instellingen van het belsignaal

Een schakelaar aan de achterkant van het CL1200 eenheid aangeduid met  maakt het mogelijk om het volume van het belsignaal op HI (maximaal volume), LO (laagste volume) of OFF (= UIT voor als u niet gestoord wenst te worden) te zetten.


Een schakelaar aan de achterkant van het CL1200 eenheid aangeduid met  stelt u in staat om de toon van het belsignaal te kiezen. U heeft de keuze uit 3 tonen: HIGH (hoog), MID (medium) en LOW (laag).


Instelling van de Flash (= seintje voor herroeping)

U kunt de FLASH tijd veranderen m.b.v. de schakelaar die zich onder het beschermkapje boven aan de eenheid bevindt. U heeft twee mogelijkheden: 100ms en 270ms. Uw telefoon is ingesteld op de FLASH tijd voor GB (R=100ms).


Instellingen van het ontvangstvolume en de toon

U kunt tijdens een conversatie het ontvangstvolume en de toon veranderen volgens uw gehoorsbehoeften.

Het volume van het gehoordedeelte van de handset kan veranderd worden tijdens een gesprek m.b.v. de volumeschuifregelaar () die zich aan de voorkant van de telefoon bevindt. Het volume kan veranderd worden van 0dB tot 15dB.


Het volume van de luidspreker kan veranderd worden m.b.v. de volumeschuifregelaar () die zich aan de linkerkant van de telefoon bevindt.

INSTELLINGEN

De  knop op de telefoon levert extra versterking van 15dB, d.w.z. de volumeverandering zal 15-30dB worden. Wanneer de **versterkingsfunctie** geactiveerd is, zal de **AMPLIFY (= Versterking)** LED oplichten.



Standaard instelling voor versterking

De  schakelaar aan de achterkant maakt het mogelijk om de versterking standaard AAN of UIT te zetten elke keer dat u de telefoon gebruikt. '1' is AAN.

AMPLIFY AAN/UIT schakelaar in de AAN stand

De extra versterking en toonregelaar worden automatisch geactiveerd elke keer dat u de telefoon gebruikt. De AMPLIFY LED zal oplichten wanneer u de telefoon gebruikt.

Een druk op de Amplify knop tijdens een conversatie zal de extra versterking- en toonregelaar uitschakelen. U kunt echter het ontvangstvolume van de handset nog steeds veranderen m.b.v. de volumeschuifregelaar.

Onafhankelijk van hoeveel keer u tijdens een conversatie de Amplify knop indrukt, zullen deze functies opnieuw geactiveerd worden bij de volgende keer dat u de handset oppakt om iemand te bellen.

AMPLIFY AAN/UIT schakelaar in de UIT stand

De extra versterking en toonregelaar worden automatisch uitgeschakeld elke keer dat u de telefoon gebruikt. De AMPLIFY LED zal uitstaan elke keer dat u de telefoon gebruikt.

Een enkele druk op de Amplify knop tijdens een conversatie zal de toonregelaar en extra versterking inschakelen. De LED zal


INSTELLINGEN

oplichten om deze verandering weer te geven. Als u de Amplify knop nog een keer indrukt, zullen de extra versterking en toonregelaar opnieuw uitgeschakeld worden. De LED zal uitgaan om deze verandering weer te geven.

Onafhankelijk van hoeveel keer u tijdens een conversatie de Amplify knop indrukt, zullen deze functies opnieuw uitgeschakeld worden bij de volgende keer dat u de handset oppakt.

Aanpassing van de ontvangsttoon

Als het ontvangstvolume versterkt is, kan ook de toonregelaar

 aangepast worden. U kunt de lage en hoge frequentiegeluiden aanpassen m.b.v. de toonschuifregelaar boven aan het basisstation.

Bass +10db max  Treble +10db max

NB: De functie van toonaanpassing zal niet werken als het ontvangstvolume op het normale niveau is ingesteld.

Instelling van het volume van de luidspreker

In de handenvrij stand kan het luidsprekervolume worden aangepast m.b.v. de volumeschuifregelaar aan de linkerkant van de telefoon.

Instelling van het spreekvolume

Als u zachtjes praat of als de andere kant van de lijn u moeilijk kan verstaan, kunt u het spreekvolume harder maken m.b.v. de **-4/0/+4** schakelaar aan de achterkant van de telefoon.

DE TELEFOON GEBRUIKEN


Iemand bellen

Neem de handset ter hand. De rode LED indicator zal aan gaan.

Wanneer u de kiestoon hoort, toets u het nummer in op het toetsenbord.


Leg de handset terug om het gesprek te beëindigen.

Iemand handenvrij bellen

Druk de  knop in om een kiestoon te krijgen. De rode LED zal aan gaan.

Toets het telefoonnummer in op het toetsenbord.

Druk nogmaals op de  knop om het gesprek te beëindigen.

Om tijdens een gesprek de Handenvrij functie te activeren, druk u op de  knop en legt u de handset tegelijkertijd terug op de basis.

Om tijdens een gesprek de Handenvrij functie uit te schakelen, neemt u de handset ter hand.

NB: Wanneer de telefoon in de handenvrij stand staat, mag er slechts één persoon praten. De overschakeling van luidspreker naar microfoon is automatisch. Dit is afhankelijk van het geluidsniveau van respectievelijk de binnenkomende oproep en de microfoon. Het is daarom essentieel dat er geen harde geluiden (bijv. muziek) in de onmiddellijke omgeving van de telefoon zijn, omdat dit de handenvrij functie zal verstoren.

DE TELEFOON GEBRUIKEN


Een gesprek aannemen

Wanneer een inkomend gesprek wordt ontvangen, dan geeft de telefoon een belsignaal en de LED van inkomende gesprekken zal oplichten.

Neem de handset ter hand en spreek. De rode LED indicator zal aan gaan.


Leg de handset terug om het gesprek te beëindigen.


Een gesprek handenvrij aannemen

Druk om handenvrij te spreken één seconde lang de  knop in. De rode LED indicator zal aan gaan.

Druk nogmaals op de  knop om het gesprek te beëindigen.


Laatste nummer opnieuw bellen

Neem de handset ter hand of druk de  knop in om handenvrij te bellen.

Druk op  om het laatst ingetoetste nummer opnieuw te bellen.


Stilmodus (MUTE) functie

Als u dit wenst, kunt u privé met iemand anders in de kamer praten zonder dat degene aan de andere kant van de lijn u kan horen. U kunt nog steeds degene aan de andere kant van de lijn horen, maar zij kunnen u niet horen zolang de stilmodus werkzaam is.

Om tijdens een gesprek de stilmodus in te schakelen, drukt u op de zich aan de onderkant van de handset bevindende  knop

DE TELEFOON GEBRUIKEN

en houdt deze ingedrukt. Degene aan de andere kant van de lijn zal u niet meer kunnen horen.

Laat de  knop los om de conversatie met degene aan de andere kant van de lijn te hervatten.

Gebruik van gehoorapparaten

Deze telefoon is compatibel met gehoorapparaten. Kies de T-modus op uw gehoorapparaat om deze functie in te schakelen.

Flash signaal



De **R** knop kan gebruikt worden met speciale services zoals Wachtstand (indien uw telefoondienst dit levert) of om externe gesprekken naar een ander op een privé telefooncentrale aangesloten toestel over te zetten. Deze knop dient als een elektronische schakelaar voor 'van de haak / op de haak'.

GEHEUGEN

Een nummer in het telefoonboek opslaan

De CL1200 heeft 19 'één aanslag' geheugenknoppen.

Neem de handset ter hand.

Druk op de  knop en voer het telefoonnummer in dat u wenst op te slaan (tot 32 cijfers). Indien nodig kunt u de  knop gebruiken om een pauze in te lassen.

Druk nogmaals op .

Druk het gewenste geheugen (**M1 - M19**) in.

Een nieuw nummer invoeren in het geheugen, waarin al een nummer is opgeslagen, zal automatisch het originele nummer wissen.

Een indexkaart van het telefoonboek bevindt zich op het basisstation zodat u het bijbehorende geheugen van de telefoonnummers kunt registreren.

Een nummer uit het telefoonboek bellen

Neem de handset ter hand.

Druk het gewenste geheugen (**M1 - M19**) in.

Het telefoonnummer zal automatisch gebeld worden.

NB: Deze 'één aanslag' geheugens zullen opgeslagen blijven zelfs als de telefoonverbinding fysiek verbroken wordt.

De CL1200 gaat niet over

- Zorg ervoor dat het aansluitsnoer correct is aangesloten en niet beschadigd is.
- Verbind een andere telefoon met de PTT stekkerdoos of verplaats uw telefoon naar een andere stekkerdoos om te controleren of de storing aan uw telefoon ligt of aan de PTT stekkerdoos.
- Er kunnen teveel communicatieapparaten (bijv. modem, fax of een tweede telefoon) met één telefoonlijn verbonden zijn. Neem contact op met uw telefoondienst om het maximale aantal aansluitingen voor uw telefoonlijn (privé of zakelijk) te bepalen.
- Zorg ervoor dat de instelling van het belsignaal is niet in de UIT stand.

Geen kiestoon

- Zorg ervoor dat het aansluitsnoer correct is aangesloten en niet beschadigd is.
- Verbind een andere telefoon met de PTT stekkerdoos of verplaats uw telefoon naar een andere stekkerdoos om te controleren of de storing aan uw telefoon ligt of aan de PTT stekkerdoos.
- Er kunnen teveel communicatieapparaten (bijv. modem, fax of een tweede telefoon) met één telefoonlijn verbonden zijn. Neem contact op met uw telefoondienst om het maximale aantal aansluitingen voor uw telefoonlijn (privé of zakelijk) te bepalen.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Algemeen

Maak het toestel niet open. Neem voor alle reparaties contact op met de helpdesk.

Schoonmaken

Maak de telefoon met een zachte doek schoon. Nooit polijst- of schoonmaakmiddelen gebruiken: deze kunnen de afwerklaag of de elektrische onderdelen aan de binnenkant beschadigen.

Omgeving

Nooit aan direct zonlicht blootstellen.

Zorg er altijd voor dat er een vrije luchtstroom over de oppervlakten van de telefoon is.

Zet geen enkel deel van uw product in water en gebruik het niet in vochtige of natte omstandigheden zoals bijvoorbeeld in badkamers.

Stel uw product niet bloot aan vuur of andere gevaarlijke condities.

Haal tijdens onweer het aansluitsnoer van uw telefoon uit de stekkerdoos omdat dit uw telefoon kan beschadigen. Uw garantie geldt NIET voor schade veroorzaakt door onweer.

De telefoon is ontworpen te werken bij een temperatuurbereik van 5°C tot 45°C.

ALGEMENE INFORMATIE

VERKLARING: Hierbij verklaart Geemarc dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de Richtlijn 1999/5/EG betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en in het bijzonder aan Artikel 3, paragraaf 1a, 1b en 2. De telefoon werkt niet als de lijnvoeding lager dan 18 mA is.



De nakomingsverklaring kan ingezien worden op www.geemarc.com.

Telefoonverbinding: Voltages aanwezig op het telecommunicatienetwerk zijn geclassificeerd TNV-3 (Telecommunicatie Netwerk Voltage) volgens de EN60950 norm.

RECYCLE RICHTLIJNEN

De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) is opgesteld om producten die aan het einde van hun nut zijn gekomen op de beste manier te recyclen.

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet in uw huishoudelijke afvalbak.

Gebruik liever een van de volgende stortingsopties:

- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA container. Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA container.

- Of overhandig het oude product aan uw detailhandelaar. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren.

Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt u het milieu.



Bezoek ons op

www.geemarc.com

voor productondersteuning en hulp

telefoon 03.28.58.75.99

of fax 03.28.58.75.76



UGL1200_NL_v1.1

geemarc™
Telecom SA **United Kingdom**

**5 Swallow Court
Swallowfields
Welwyn Garden City
Hertfordshire, AL7 1SB
For product support:
01707 384438
www.geemarc.com**

geemarc™
Telecom SA **FRANCE**

**Parc de l'Etoile
2, rue Galilée BP20061
59791 Grande Synthe CEDEX
Tél. service après vente :
03 28 58 75 99
www.geemarc.com**

geemarc™
Telecom SA **Deutschland**

**Siemensstrasse 10,
53121 Bonn
Deutschland
Tel: +49(0)228/ 74 87 09 0
Fax: +49(0)228/ 74 87 09 20
www.geemarc.com**