

# AMPLICALL20



Amplificador de timbre de teléfono con luz  
intermitente y del timbre de puerta



**Español**


# DESCRIPCIÓN

## Descripción

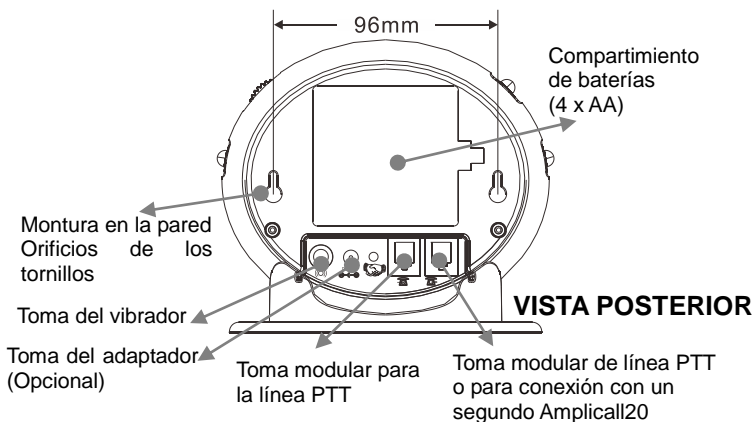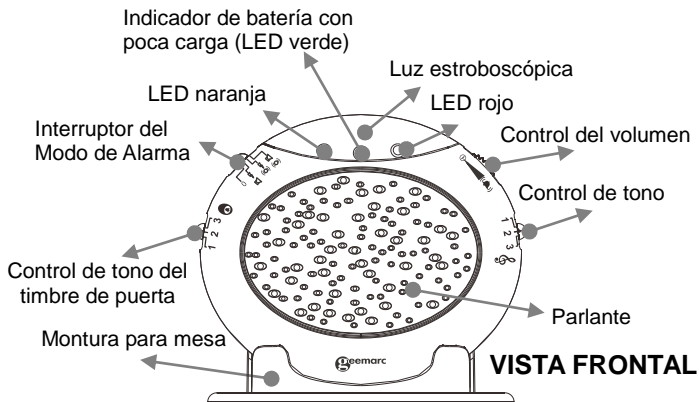


# INSTALACIÓN

(Ver dibujo).

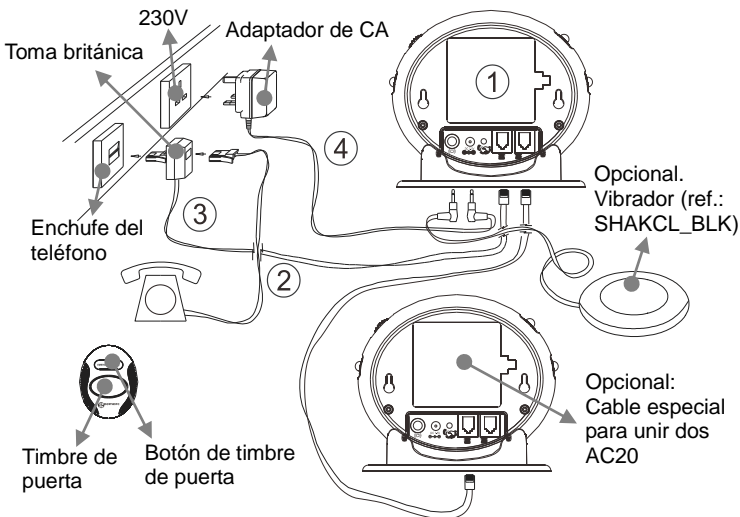

- 1 - Inserte 4 pilas AA en el compartimiento de la batería
- 2 - Conecte el cable de la línea Británica a su teléfono y al conector equipado de la Amplicall 20 en la toma de PTT.
- 3 - Conecte el cable de la línea Británica desde el Amplicall 20 y de la toma de pared del PTT.
- 4 - Conecte el cable de alimentación en el enchufe del adaptador de corriente que se encuentra en la parte trasera del Amplicall 20. Conecte el adaptador a la red eléctrica en la pared (opcional adicional)
- 5 - Inserte la batería 23A 12V en el timbre de la puerta.

## Segundo método:

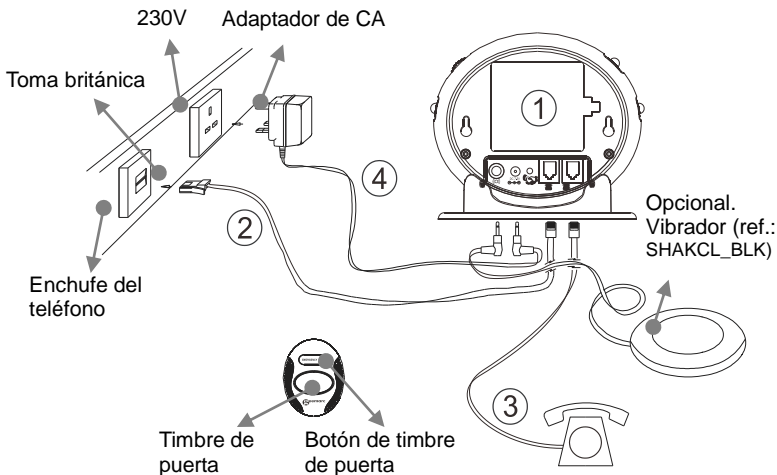

- 1) Inserte 4 baterías AA en el compartimento de la batería
- 2) Conecte un extremo del cable de la línea telefónica al equipo Amplicall 20 y el otro extremo a la toma de corriente.
- 3) Conecte el cable RJ11 entre el Amplicall 20 y el teléfono.
- 4) Conecte el cable de alimentación en el enchufe adaptador de corriente que se encuentra en la parte trasera del Amplicall 20. Conecte el adaptador a la red eléctrica en la pared (opcional adicional)
- 5 - Inserte la batería 23A 12V en el timbre de la puerta.

**Conexión eléctrica:** El aparato está diseñado para funcionar sólo con suministro de 230V 50Hz. (Clasificación de "tensión peligrosa" según la norma EN60950). El aparato no contiene un interruptor integral de corriente.


Interruptor ON/OFF Para desconectar la corriente, bien sea desconecte todas las tomas de corriente o desenchufe el adaptador de corriente alterna AC. Al instalar el aparato, asegúrese de que el enchufe sea fácilmente accesible.

**Conexión telefónica:** Los voltajes presentes en la red de telecomunicaciones se clasifican como TNV-3 (Voltaje de red de telecomunicaciones) de acuerdo con la norma EN60950.

## Configuración del Timbre de la puerta

---

1. El timbre de la puerta puede ser utilizado por las personas que necesitan asistencia.
2. El timbre de la puerta se puede fijar en una pared o en el marco de la puerta. Taladre dos agujeros en horizontal, con 15 mm de distancia entre ellos y coloque los anclajes suministrados en los dos orificios. Cuelgue el timbre de la puerta en los dos anclajes e luego inserte y apriete los tornillos. Pegue la etiqueta LLAMADA DE EMERGENCIA sobre los dos agujeros.

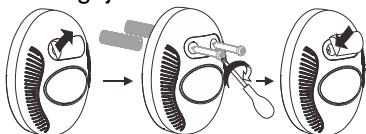

3. El timbre de la puerta se puede pegar en una puerta o ventana utilizando la cinta adhesiva fuerte suministrada. Retire el papel protector de la cinta adhesiva en la parte posterior del timbre de la puerta y adhiéralo a la puerta o ventana requerida.

## Montura en la pared

---

1. Taladre dos agujeros en horizontal, con 96 mm de distancia entre ellos, y dejar los tornillos de manera que sobresalgan de la pared unos 5 mm.
2. Cuelgue la base sobre los dos tornillos y tire de la base hacia abajo para que encaje

## Montura sobre la Mesa

---


Si desea montar la unidad sobre una mesa, simplemente colóquela sobre el soporte de la base y coloque el soporte de la base sobre la mesa.


## Configuración del modo de alarma –


---

Elija con cuál modo de alarma desea ser despertado moviendo el interruptor de modo de alarma a una de las siguientes posiciones:

0 : sin alarma

 : tanto el flash estroboscópico como la alarma se activan por sonido

 : tanto el flash estroboscópico como el agitador (si está conectado) están activados

 : tanto la alarma de sonido y agitador (si está conectado) están activados.

## **Control deslizante lateral del Volumen**

---

Utilice el control deslizante para ajustar el volumen del timbre de la puerta, timbre del teléfono o apagar el dispositivo

## **Interruptor de Control de tono (3 posiciones)**

---

Ajusta el tono del sonido de la alarma.

## **Control de tono del Timbre de la puerta**

---

El interruptor de tres posiciones permite configurar un tono diferente cuando suena el timbre de la puerta.

## **Cambie la batería de la unidad interior (opcional)**

---

La unidad requiere 4 x baterías AA

1. Abra la tapa del compartimiento de la batería.
2. Inserte 4 baterías AA en el compartimiento de la batería.
3. Encaje la tapa del compartimiento de la batería en su lugar.

**Nota:** cuando parpadea el LED **verde**, es el momento de cambiar las pilas.

Mientras se cambian las baterías, desconecte todos los cables de la línea telefónica de los jacks modulares de pared.

## **Amplicall 20 adicional**


---

Otra unidad Amplicall 20 se puede añadir al sistema (llamar 01707 384483)


## Instalar y cambiar la batería del timbre de la puerta

---

Instale la batería 23A 12V en el timbre de la puerta

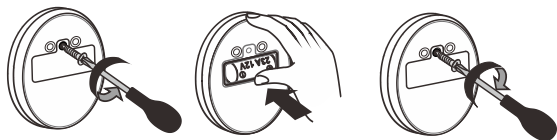

Para cambiar la batería, destornille el timbre de la puerta de la pared, y desenrosque el tornillo situado en la parte posterior para acceder al compartimiento de la batería. Cambie la batería vuelva a colocar la tapa del compartimiento de la batería y el tornillo y vuelva a montar.

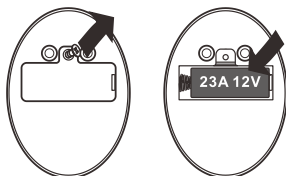

**Nota:** No utilice una batería recargable. No disponga la batería usada junto con la basura doméstica, favor prestar atención a las normas relacionadas con el deshecho de baterías.

## El procedimiento de emparejamiento

---

1. Mantenga pulsado el botón de Emparejamiento / Prueba hasta que la unidad emita un sonido de pitido, luego suelte el botón de Emparejamiento / Prueba. Las primeras luces LED indican que el modo de emparejamiento se ha introducido.



2. Mantenga pulsado el botón de Emparejamiento/Prueba de nuevo hasta que parpadee el primer LED, a continuación, presione y mantenga presionado el botón del control remoto al mismo tiempo hasta que el flash estroboscópico parpadee. La unidad hace un sonido de pitido para confirmar que el Emparejamiento ha tenido éxito.
3. Si el usuario desea emparejar una 2<sup>da</sup> y 3<sup>era</sup> unidad remota, cuando la 1<sup>era</sup> luz LED esté encendida, pulse el botón de Emparejamiento/Prueba una vez, la luz de la 1<sup>era</sup> LED se apagará, luego la 2<sup>da</sup> luz LED. El usuario es entonces capaz de emparejar el 2<sup>do</sup> mando a distancia. Repita el mismo procedimiento para el 3<sup>er</sup> control remoto
4. Repita lo anterior, las 3 LEDS estarán intermitentes juntas para realizar el emparejamiento del 4<sup>to</sup> equipo remoto.

### **Des-registrar el emparejamiento:**

---

1. Pulse y Mantenga pulsado el botón de Emparejamiento/Prueba durante 5 segundos para entrar en el modo de des-registrar, los 3 LED parpadean juntos.
2. Si el usuario desea des-registrar el 1<sup>er</sup> timbre de la puerta, pulse el botón de Emparejamiento/Prueba una vez, el 1<sup>er</sup> LED parpadeará (las otras 2 LED estarán encendidas), a continuación, pulse y mantenga pulsado el botón de Emparejamiento/Prueba hasta que el 1<sup>er</sup> LED se apague, escuchará un pitido para confirmar. El 1<sup>er</sup> timbre de lpuerta está ahora des-registrado.

3. Si el usuario quiere mantener 1<sup>er</sup> timbre de la puerta, pero eliminar el registro del timbre de la segunda o tercera puerta, cuando el primer LED parpadee, pulse el botón de Emparejamiento/Prueba de nuevo, el segundo LED parpadea (los otros LED están encendidos), seleccione cual timbre de puerta quiere des-regstrar.
4. Repita lo anterior, los 3 LEDS intermitentes juntos para des-registrar el cuarto timbre de puerta.

Para comprobar si la unidad funciona con normalidad, puede pulsar el botón del timbre de la puerta, la unidad sonará la alarma y el flash.

## **Operación**

---

Una vez que la unidad interior y el timbre de la puerta se han colocado en los lugares requeridos y todas las baterías requeridas se han insertado, ya el dispositivo está listo para ser utilizado.

Para utilizar el dispositivo como un timbre de puerta, la persona que necesita ayuda debe presionar el botón del timbre de la puerta. La unidad interior sonará una alarma y flash (dependiendo de la configuración del modo de alarma).

Para utilizar el dispositivo como un amplificador de timbre del teléfono mientras se recibe una nueva llamada, la unidad interior sonará una alarma y flash (dependiendo de la configuración del modo de alarma)

# DETECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE FALLAS:

Síntomas	C4ISR
<p>No hay llamada entrante sin embargo, el timbre del Amplicall20 suena forma automática o continuamente.</p> <p>El agitador vibra de forma automática o de forma continua.</p> <p>Las luz estroboscópica LED parpadea de forma automática o de forma continua.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asegúrese de que las baterías están insertadas correctamente.</li> <li>2) Compruebe que el adaptador de corriente esté conectado correctamente.</li> <li>3) Desconecte la alimentación durante 10 minutos y luego vuelva a encenderla.</li> </ol>
<p>El LED verde indicador de baja carga de la batería parpadea automáticamente.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Cambie las baterías</li> <li>2) Desconecte la alimentación del equipo durante 10 minutos y luego vuelva a encenderlo.</li> </ol>
<p>Cuando hay una llamada entrante, no se escucha ningún timbre</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Compruebe que está conectado al adaptador de alimentación correctamente.</li> <li>2) Asegúrese de que las baterías están insertadas correctamente.</li> <li>3) Compruebe el interruptor</li> </ol>

	<p>de volumen está activado.</p> <p>4) Compruebe que está conectado al cable de línea correctamente.</p> <p>5) Compruebe que la posición del interruptor de selección de modo de alarma es correcta</p>
<p>Cuando hay una llamada entrante, el vibrador no vibra.</p>	<p>1) Compruebe que esté conectado correctamente al vibrador.</p> <p>2) Compruebe la toma del vibrador para ver si se ha dañado.</p> <p>3) Compruebe si la posición del interruptor de selección de modo de alarma es correcta.</p>
<p>El Amplicall20 no suena cuando se pulsa el timbre de la puerta</p>	<p>1) Compruebe que la luz roja en el timbre parpadea cuando se presiona. Si no lo hace, cambiar la batería.</p> <p>2) Registre el timbre a la AmpliCALL20 otra vez</p> <p>3) Compruebe si la posición del interruptor de selección de modo de alarma es correcto es decir, no en "0"</p>

# GARANTÍA

Desde el momento que su producto Geemarc es adquirido, Geemarc le brinda garantía por un año. Durante éste tiempo, todas las reparaciones o sustituciones (a nuestra opción) son totalmente gratuitas. En caso de tener algún problema contacte nuestra línea de ayuda o visite nuestro sitio de Internet [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com). La garantía no cubre accidentes, negligencia ni roturas de cualesquiera de los componentes. El producto no puede haber sido manipulado ni desarmado por personas que no sean representantes autorizados Geemarc. La garantía Geemarc de ninguna manera limita sus derechos legales.

**IMPORTANTE: SU RECIBO ES PARTE DE SU GARANTÍA Y DEBERÁ GUARDARSE Y PRESENTARSE EN CASO DE UN RECLAMO DE GARANTÍA.**

**Tenga en cuenta:** La garantía se aplica al Reino Unido solamente

**DECLARACIÓN:** Geemarc Telecom SA declara por la presente, que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las Directivas de Equipos Terminales de Radio y Telecommunications 1999/5/EEC y en particular la sección 1a, 1b y la sección 3 del artículo 3.

La declaración de conformidad se puede consultar en [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)



# DIRECTIVAS DE RECICLAJE

La WEEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) ha puesto en marcha un plan para reciclar los productos al final de su vida útil de la mejor manera posible. Cuando deje de utilizar este producto por favor no lo ponga junto con el resto de la basura. Utilice una de las siguientes opciones de desecho:

-Retire las baterías y depositarlas en un recolector WEEE apropiado. Deposite el producto en un recolector WEEE apropiado.

-O, entregue el producto antiguo a la tienda minorista. Si usted compra uno nuevo, deben aceptarlo. Así, si usted respeta estas instrucciones se asegura la salud humana y la protección ambiental.



Para el soporte al producto y ayuda, visite nuestro sitio web

en [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

teléfono 01707.384438.

O por fáj al 01707 832529





UGAmplicall 20\_Sp\_v1.7

**geemarc** UNITED KINGDOM

5 Swallow Court  
Swallowfields  
Welwyn Garden City  
Hertfordshire, AL7 1SB  
For product support,  
01707 384438

[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

**geemarc** FRANCE

Parc de l'Etoile  
2, rue Galilée 59791  
GRANDE SYNTHÉ CEDEX  
TEL. SERVICE APRES VENTE,  
03 28 58 75 99

[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)