



Despertador con pantalla grande y vibrador de cama

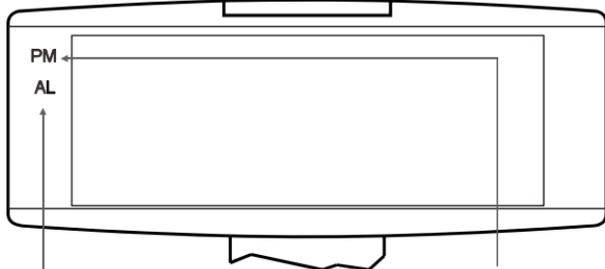

Botón de repetidor / Flash / Atenuador

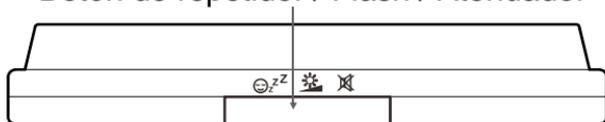

Indicador LED de alarma

Indicador LED de PM

Interruptor del vibrador bajo/alto


Interruptor del modo de alarma

Función de timbre de alarma

Volumen de la alarma
y timbre

+ timbre apagado

Tono de la alarma

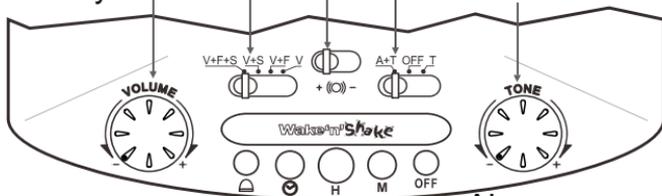


Configuración de alarma

Para ajustar el reloj

Configuración de horas y minutos


Alarma apagada para
las siguientes 24H.

(*) Toma modular

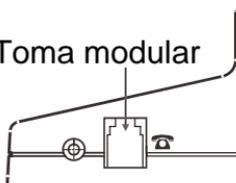


(*) Toma del vibrador

(*) Toma del
adaptador

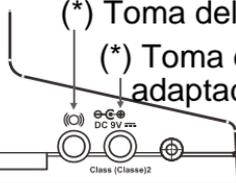

(*) Clasificación TVN-3 según la norma EN60950.

1- CONEXIÓN DEL TELÉFONO

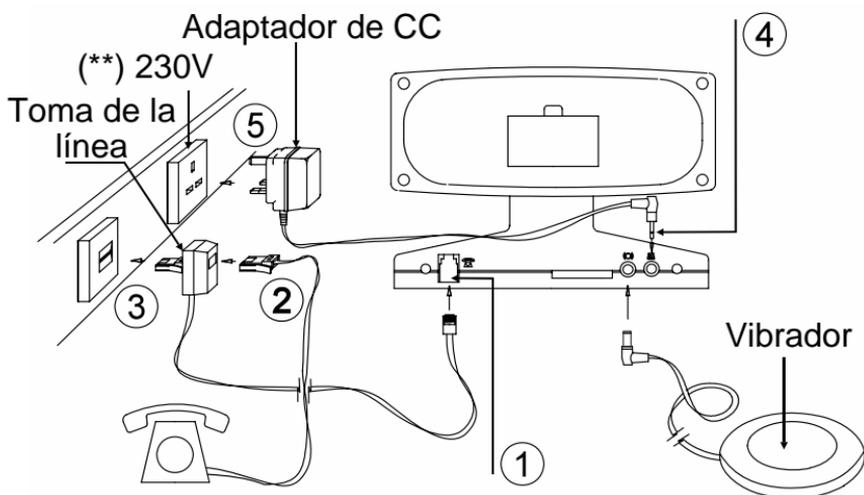

- 1 - Conectar el cable de la línea de conexión telefónica.
- 2 - Podrá a su elección conectar su teléfono en el enchufe doble.
- 3 - Conecte el enchufe doble PTT en la toma de corriente en la pared.
- 4 - Conecte el adaptador del cable.
- 5 - Conecte el adaptador a la toma de pared. (**)

(**) Clasificación de "tensión peligrosa" según la norma EN60950.

Conexión eléctrica: El aparato está diseñado para funcionar a DC9V, 650mA. El adaptador de corriente suministrado opera desde AC100 - 240V, entrada de 50/60Hz.

El aparato no incorpora un interruptor integral de corriente. Para desconectar la corriente, bien sea desconecte todas las tomas de corriente o desenchufe el adaptador CC. Al instalar el aparato, asegúrese de que el enchufe sea fácilmente accesible.

Conexión telefónica: Los voltajes presentes en la red de telecomunicaciones se clasifican como TNV-3 (Voltaje de red de telecomunicaciones) de acuerdo con la norma EN60950.

2- AJUSTE DE LA HORA ()

- Pulse y mantenga pulsado el botón  ajuste del reloj (set clock).
- Pulse **H** (horas) y **M** (minutos) hasta que tanto la hora correcta y los minutos correctos aparezcan en la pantalla.
- Suelte el botón ajuste del reloj  (set clock).
- Para la hora p.m. aparecerá el indicador p.m. en la pantalla cerca de la inscripción **PM**.

Formato de 12 o 24 horas

El usuario puede seleccionar el formato de hora que desee utilizar. Para seleccionar:

- Mantenga pulsado el botón **H** (Hora) durante 6 segundos para entrar en el modo de selección de horas, la pantalla muestra "12H" o "24H" suelte el botón de la hora.
- Pulse el botón de la hora (**H**) para seleccionar 12 o 24 horas.

Nota: Si no se realiza una selección dentro de 4 segundos, el último formato de hora visualizado será el seleccionado y la pantalla regresará al modo de tiempo normal.

3- AJUSTE DE LA HORA DE ALARMA ()

- Pulse y mantenga pulsado el botón  ajuste de la alarma (set alarm).
- Pulse **H** (horas) y **M** (minutos) hasta que tanto la hora correcta y los minutos correctos aparezcan en la pantalla.
- Suelte el botón ajuste de la alarma  (set alarm).
- Pulse , **H** y **M** para reajustar el reloj de alarma a 12.

4- CONFIGURACIÓN DEL MODO DE ALARMA

Ponga el selector de función en la posición **A+T**.

Elija con cuál modo de alarma desea ser despertado moviendo el interruptor de modo de alarma a una de las siguientes selecciones:


V : sólo el agitador de cama activado

V+S : el sonido y el agitador de la alarma están activados

V+F : el agitador y la luz estroboscópica están activados

V+F+S: el sonido, la luz estroboscópica y el agitador de la alarma están activados

Nota: si el usuario no utiliza la función de vibrador (V), por favor desconecte el enchufe del vibrador del reloj.

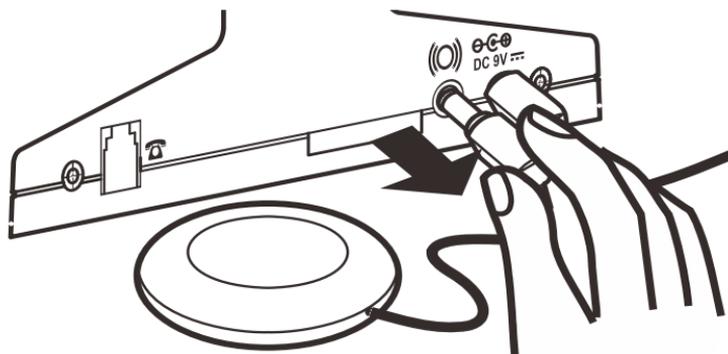

Cuando la alarma se configure en uno de los modos de alarma, la misma aparecerá en el indicador de alarma en la pantalla cerca de la inscripción **AL**.

La siguiente tabla muestra cómo los modos de alarma indicarán una llamada entrante en la alarma del reloj.

MODO DE ALARMA	ACTION	ALARMA DEL RELOJ	LLAMADA ENTRANTE
SONIDO	Zumbador	With pauses	With pauses
VIBRADOR	Vibra	With pauses	With pauses
LUZ ESTROBOSCÓPICA	Titila	With pauses	With pauses

El tiempo por defecto de duración de la alarma es de 30 minutos. El usuario puede ajustar el tiempo de duración de la alarma desde **1 hasta 59** minutos.

Para ajustar la duración de la alarma:

- Mantenga pulsado el botón de configuración de la alarma  durante 6 segundos para entrar en modo de ajuste. El reloj mostrará "30", suelte el botón de configuración de alarma.
- Pulse el botón **M** para ajustar el tiempo de duración de la alarma al tiempo deseado, desde 1 hasta 59 minutos.
- Esta nueva configuración se convertirá en el nuevo valor por defecto, hasta que el usuario la vuelva a cambiar.
- Si no se realiza ninguna acción durante 3 segundos, el reloj volverá al modo de hora normal.

5- TECLA DE REPETICIÓN (SNOOZE) (~~X~~)

Cuando el modo de alarma tiene activado el ajuste de hora de la alarma, al pulsar el botón ~~X~~ detendrá el modo de alarma durante aproximadamente 9 minutos. La alarma luego cambiará a modo de alarma o a una nueva dentro de 9 minutos. Esta secuencia se puede llevar a cabo durante un máximo de 59 minutos luego de la cual el modo de alarma se apaga automáticamente.

El usuario puede ajustar el tiempo de repetición de **1 a 30 minutos**.

- Pulse y mantenga pulsado el botón de **REPETICIÓN (SNOOZE)** por 4 segundos para ingresar al modo de ajuste de repetición. Cuando el reloj muestre "9" suelte el botón Repetición (Snooze).
- Pulse el botón **M** (minutos) para ajustar el tiempo del repetidor (SNOOZE) a la configuración deseada, desde 1 hasta 30 minutos.

Esta nueva configuración se convertirá en el nuevo valor por defecto, hasta que el usuario la vuelva a cambiar. Si no se realiza ninguna acción durante 3 segundos, el reloj volverá al modo de hora normal.

6- APAGAR LA ALARMA POR 24H. (OFF)

Pulse el botón de apagar la alarma (**OFF**), la alarma funcionará entonces a la misma hora al día siguiente. Si la alarma no se apaga continuará sonando durante un máximo de 59 minutos y luego se apagará automáticamente.

7- INTERRUPTOR PARA ENCENDER/APAGAR EL TIMBRE (A+T / OFF / T)

- **A+T** (alarma + teléfono): para la posición del timbre de alarma y teléfono.
- **OFF**: Tanto la alarma como el timbre estarán apagados.
- **T** (teléfono): para la posición del timbre del teléfono.

8- TELEPHONE OPERATION

- Asegúrese de que el teléfono se ha configurado de acuerdo con la guía del usuario del teléfono y se ha conectado como se muestra en la sección de instalación.
- Seleccione On/Off el interruptor del timbre en la posición **A+T** o **T** del timbre.
- Elegir cuál de los modos de alarma desea que le avise de las llamadas telefónicas entrantes (consulte la página 4: **V**, **V+S**, **V+F**, **V+S+F**).
- Cuando el modo de alarma seleccionado indica que hay una llamada telefónica entrante, levante el auricular del teléfono y responda la llamada. Cuando haya terminado la llamada cuelgue el auricular y la alarma estará lista para indicar la siguiente llamada.

9- FUNCIÓN DE ATENUACIÓN ()

Hay un control de 5 niveles de brillantez para la pantalla LED. En modo de tiempo normal, pulse el botón **Snooze (repetición)** una vez para cambiar la brillantez de la pantalla. El brillo hará un ciclo de brillante a tenue y luego desde tenue hasta brillante, (el ciclo se repite).

NOTA : La función de atenuación no va a funcionar, cuando el reloj se encuentre en modo de snooze (repetición).

10- VOLUMEN (VOLUME)

Ajusta el volumen del timbre y el sonido de la alarma.

11- TONO (TONE)

Ajusta el tono del sonido de la alarma.

12- INTERRUPTOR DEL VIBRADOR DE CAMA

(+ (⊖)) -)

Fije el movimiento del vibrador de cama en bajo (Lo) (-) o alto (Hi) (+).

13- RESPALDO MEDIANTE LAS BATERÍAS

No es necesario insertar una batería para que el reloj funcione. Con la batería de respaldo instalada, el reloj mantendrá la hora y la alarma en caso de un corte de energía o que el adaptador DC se encuentre desenchufado.

Compruebe el estado de la batería después de un año, cambiando la batería vieja. Una batería con fugas puede llegar a destruir su reloj.

GARANTÍA

Desde el momento que su producto Geemarc es adquirido, Geemarc le brinda garantía por dos años. Durante este tiempo, todas las reparaciones o reemplazos (a nuestra opción) serán sin cargo. Si llegara a tener algún problema póngase en contacto con nuestra línea de ayuda o visite nuestro sitio web en www.geemarc.com. La garantía no cubre accidentes, negligencia ni roturas de cualesquiera de los componentes. El producto no puede haber sido manipulado ni desarmado por personas que no sean representantes autorizados Geemarc. La garantía Geemarc de ninguna manera limita sus derechos legales.

IMPORTANTE: SU RECIBO ES PARTE DE SU GARANTÍA Y DEBERÁ GUARDARSE Y PRESENTARSE EN CASO DE UN RECLAMO DE GARANTÍA.

Tenga en cuenta que: La garantía se aplica al España solamente.

Declaración: Geemarc Telecom SA declara por la presente, que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las Directivas de Equipos Terminales de Radio y Telecomunicaciones 2014/53/UE y en particular la sección 1a, 1b y la sección 3 del artículo 2.

La declaración de conformidad se puede consultar en www.geemarc.com



Precaución: La interferencia de radiofrecuencia puede causar sonido perceptible en la unidad. El sonido terminará cuando desaparezca la interferencia.

DIRECTIVAS DE RECICLAJE

La WEEE (RAEE) (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) se ha puesto en marcha para poder reciclar de la mejor manera los productos al final de su vida.

Cuando este producto no se utilice más, por favor no lo ponga en su basurero doméstico.

Favor utilice una de las siguientes opciones de desecho:

- Retire las baterías y depositarlas en un recolector WEEE apropiado. Deposite el producto en un recolector WEEE apropiado.
- O, entregue el producto antiguo a la tienda minorista. Si usted compra uno nuevo, deben aceptarlo.

Así, si usted respeta estas instrucciones se asegura la salud humana y la protección ambiental.



Para el soporte al producto y ayuda, visite nuestro sitio web en www.geemarc.com



UGJWNS-V3_Sp_v1.2

geemarc™ FRANCE
Telecom SA

Parc de l'Etoile
2 rue Galilée
59791 GRANDE-SYNTHE Cedex
www.geemarc.com