

Bluetooth Versterkte Handsfree kit

Nederlands



Raadpleeg onze website: www.geemarc.com voor een bijgewerkte gebruikershandleiding, aangezien er belangrijke herzieningen en wijzigingen kunnen zijn waarvan u op de hoogte dient te zijn.

INHOUDSOPGAVE	1
ALGEMEEN	3
Introductie	3
De iB10 uitpakken	4
BESCHRIJVING	5
Algemene beschrijving.....	5
STAP 1: DE BATTERIJ PLAATSEN EN OPLADEN	7
De batterij plaatsen.....	7
De batterij opladen	8
Batterij bijna leeg	9
STAP 2: SLUIT DE OORDOPJES OF NEKLUS AAN	9
Oordopjes (niet-hoortoestelgebruikers).....	9
Neklus (iBT10 LUS)	9
STAP 3: DE iBT10 KOPPELEN	11
De iBT10 met uw smartphone koppelen.....	11
De iBT10 koppelen aan een Smart-tv.....	12
voor meer informatie.	

De iBT10 koppelen met een apparaat zonder een display / menu	13
De iBT10 gebruiken met twee apparaten	14
STAP 4: LUISTER NAAR MUZIEK / TV VANAF EEN GEKOPPELD APPARAAT....	16
Volumeregeling	17
Toonregeling	18
DE iB10 MET NEKLUS GEBRUIKEN	19
Microfoon	20
OPROEPEN PLAATSEN/ONTVANGEN	21
Een oproep plaatsen met de iBT10	21
Een oproep ontvangen	21
INKOMENDE OPROEPEN TIJDENS HET LUISTEREN NAAR MUZIEK / TV	22
DE iBT10 UITSCHAKELEN EN ECO STAND	23
TECHNISCHE SPECIFICATIES	23
PROBLEEMOPLOSSING.....	24
VEILIGHEID & WEGGOOIEN VAN DE BATTERIJEN	24
GARANTIE	25
RICHTLIJNEN VOOR RECYCLEN	26

INTRODUCTIE

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Geemarc iBT10 versterkte Bluetooth digitale headset.

Deze gebruikershandleiding is voor de **iBT10** met oordopjes en de **iBT10 LUS** voor gebruik met gehoorapparaten met een **luisterspoel (T-coil)**.


De iBT10 / iBT10 LUS kan worden gekoppeld aan andere apparaten met Bluetooth™, waaronder smartphones, smart-tv's, tablets en computers.

De iBT10 is oplaadbaar en wordt geleverd met een Type-C USB-oplaadkabel.

Om optimaal gebruik te maken van uw iBT10, dient u alle stappen en secties van deze gebruikershandleiding te lezen.

Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstige raadpleging op een veilige plek.

Waarschuwing: Voor gebruikers met een pacemaker

 Als u een pacemaker heeft dan wordt aanbevolen dat u met uw arts of gezondheidsadviseur spreekt voordat u dit product gebruikt.

NB: Het is belangrijk dat u de onderstaande instructies leest om uw iBT10 optimaal te benutten. Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstige raadpleging op een veilige plek.

De iBT10 uitpakken

De volgende onderdelen worden meegeleverd met de iBT10:

- iBT10 Bluetooth™ apparaat
- Oordopjes met rubber oorkussentjes
- 3,7V Li-ion oplaadbare batterij
- USB type C / USB A oplaadkabel
- Magnetische Neklus (**iBT10 LUS optioneel**)
- Koord
- Een riemclip
- 1 Gebruikershandleiding



Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op www.geemarc.com.

E-mail: help@geemarc.com


Telefoon: **+49(0)30 209 95 789**

De lijnen staan open van 9:00 – 16:00 uur op maandag t/m vrijdag.

Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée,
59760 Grande-Synthe, Frankrijk


Gemaakt in China voor Geemarc S.A.

Bedieningselementen, aansluitingen en indicatoren (leds)

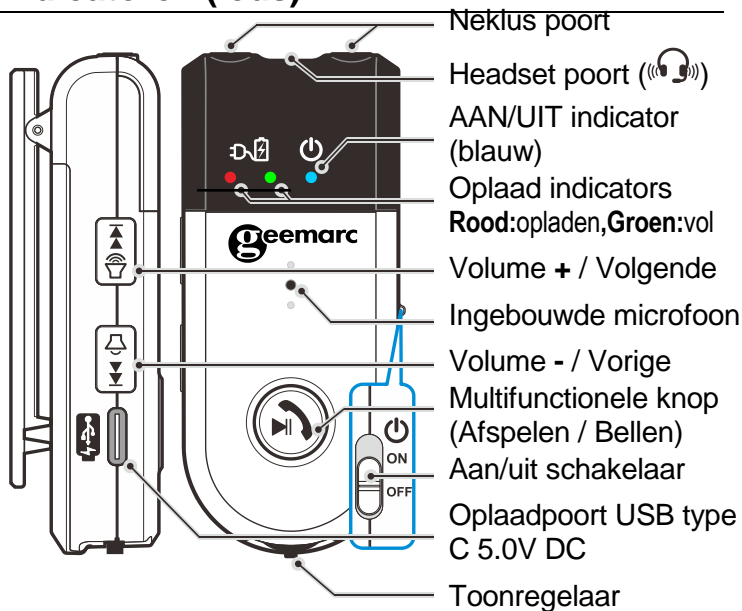

NB (Indicatoren):

- **UIT:** led staat uit.
- **AAN:** led is blauw.
- **Batterij is bijna leeg:** led is rood.
- **Batterij is aan het opladen:** led is rood.
- **Batterij is volledig opgeladen:** led is groen.
- **Koppelen:** rode en blauwe led knipperen

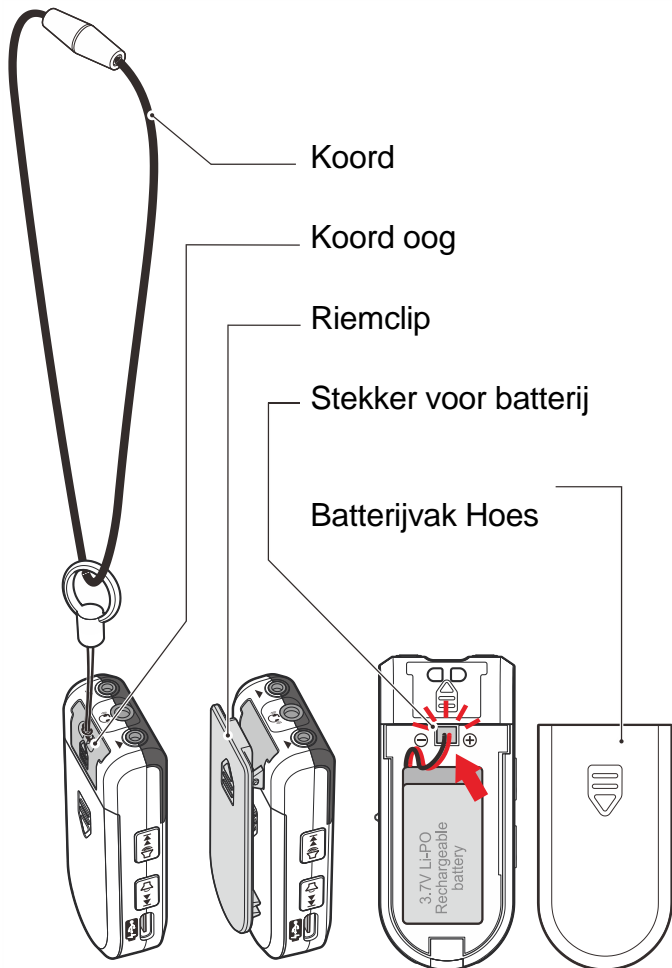

STAP 1: DE BATTERIJ PLAATSEN EN OPLADEN

De iBT10 wordt geleverd met een oplaadbare lithiumbatterij.


NB:

- *Gebruik geen ander type oplaadbare batterij voor dit product.*
- *Vóór gebruik moeten de batterijen ongeveer 7 uur opgeladen worden.*

De batterij plaatsen


BELANGRIJK: Voordat u de batterij plaatst, moet u ervoor zorgen dat de **AAN/UIT-schakelaar aan de zijkant van de iBT10 in de UIT-stand staat.**

- Verwijder de riemclip en schuif het batterijklepje open.
- Sluit de korte **zwarte (-)** en **rode (+)** voedingsdraden van de batterij voorzichtig aan op de aansluiting in het batterijvak (gemarkeerd met - en +).
- Plaats het batterijklepje terug.

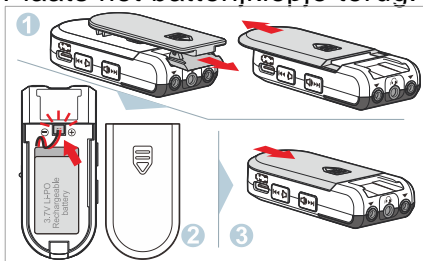

De batterij opladen

Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de USB Type-C-connector aan de zijkant van de iBT10. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een goedgekeurde standaard USB 5V-voedingsadapter (niet meegeleverd).

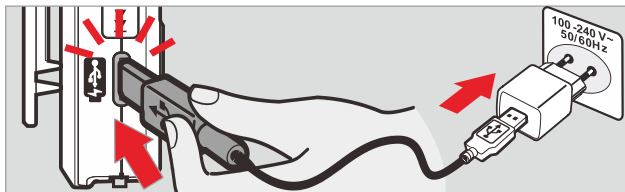

Steek de USB-adapter in een stopcontact. De LED oplaadindicator op de iBT10 zal ROOD zijn. Dit betekent dat de batterij wordt opgeladen.



Ga door met opladen totdat de oplaadindicator op de iBT10 GROEN is. Dit betekent dat de batterij volledig is opgeladen.

Koppel de USB-oplaadkabel los van de iBT10.

NB: We raden u aan om ook de USB-adapter uit te schakelen en uit het stopcontact te halen.

Batterij bijna leeg


Wanneer de batterij bijna leeg is en moet worden opgeladen, hoort u 5 **piepjes** via de oordopjes / neklus.

Laad deze zo snel mogelijk op om de levensduur van de batterij te verlengen.


STAP 2: SLUIT DE OORDOPJES OF NEKLUS AAN

Oordopjes (niet-hoortoestelgebruikers)

Steek de oordopjes in de 3,5 mm jack-aansluiting [🎧] aan de bovenkant van de iBT10.

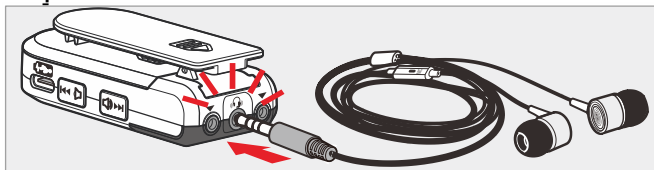

Neklus (iBT10 LUS)

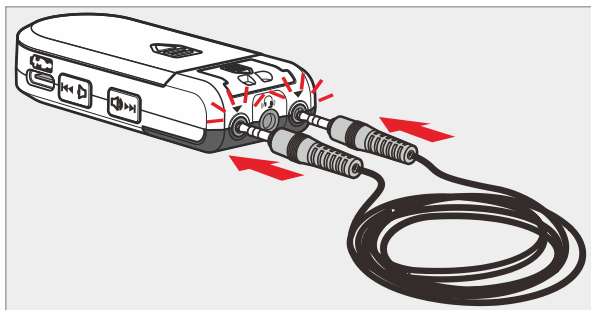


De neklus is voor gebruik met hoortoestellen die een luisterspoel (T-coil) hebben. Steek de neklus in de twee kleine 2,5 mm audio-aansluitingen die zich aan de weerszijden van de koptelefoonaansluiting bevinden.

Plaats de neklus over uw hoofd zodat deze op de achterkant van uw nek en schouders rust.

Zet uw hoortoestel op de **T**-stand / instelling.

Het kan nodig zijn om de volume-instelling op de iBT10 en/of uw hoortoestel aan te passen om optimale prestaties te bereiken.

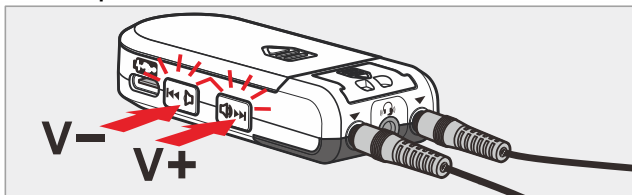

NB:

- *Niet alle gehoorapparaten hebben een T instelling of deze is mogelijk niet ingeschakeld. Raadpleeg uw audioloog / audiocien voor meer advies.*
- *De neklus komt los van de iBT10 als deze verstrikt raakt. Sluit de neklus weer aan om de werking te hervatten.*
- *Sluit de oordopjes en de neklus niet tegelijkertijd aan op de iBT10.*

STAP 3: DE iBT10 KOPPELEN


Om de iBT10 te kunnen gebruiken, moet deze worden gekoppeld aan uw Bluetooth™-apparaat, zoals uw smartphone, smart-tv, computer of tablet.

De iBT10 kan verbinding maken met twee apparaten met Bluetooth™ versie 5.1 – zie het gedeelte **De iBT10 met twee apparaten gebruiken**.

De iBT10 met uw smartphone koppelen:

1. Zet de **AAN/UIT-schakelaar** aan de zijkant van de iBT10 in de **AAN**-stand (blauwe led knippert aan en uit).



2. Houd de **AFSPELEN / BELLEN**-knop [] ingedrukt totdat de RODE en BLAUWE leds knipperen.




3. Ga op uw smartphone naar **Instellingen** → **Verbindingen** → **Bluetooth** en start het scannen.
4. **U zult iBT10** zien onder **beschikbare apparaten**

- klik / selecteer **iBT10** om te koppelen. Als u een pincode moet invoeren, gebruikt u 0000.
5. De iBT10 hoort nu vermeld te staan onder **gekoppelde apparaten** op uw smartphone.
***NB:** de exacte procedure kan variëren, afhankelijk van het merk en model van uw smartphone.*

6. De BLAUWE LED [] staat **AAN**.
De iBT10 is nu gekoppeld aan uw smartphone voor oproepen en geluid.
***NB:** Om de iBT10 aan een ander apparaat te koppelen, herhaalt u de bovenstaande procedure vanaf (1) en raadpleegt u de handleiding van dit apparaat voor Bluetooth-koppeling. Zorg ervoor dat u zich buiten het bereik bevindt van een apparaat dat al aan de iBT10 is gekoppeld, of schakel de Bluetooth-verbinding van dat apparaat uit.*

De iBT10 koppelen aan een Smart-tv

Veel smart-tv's hebben Bluetooth™.

1. Zet de **AAN/UIT-schakelaar** aan de zijkant van de iBT10 in de **AAN**-stand (blauwe led knippert aan en uit).
2. Houd de **AFSPELEN / BELLEN**-knop [] ingedrukt totdat de RODE en BLAUWE leds knipperen.
3. Druk op de afstandsbediening van uw tv op de MENU-knop en ga vervolgens naar het



INSTELLINGENMENU van de tv.

4. Zoek in het instellingenmenu naar 'Bluetooth-afstandsbedieningen en -accessoires' of een vergelijkbare menuvermelding. Volg de aanwijzingen op het scherm van uw tv om te koppelen met de iBT10.

De exacte procedure hierboven kan variëren, afhankelijk van het merk en model van uw tv. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw tv voor meer informatie.

De iBT10 koppelen met een apparaat zonder een display / menu

***NB:** Controleer of het apparaat 0000 pincodes accepteert. Deze informatie moet worden vermeld in de gebruikershandleiding van het apparaat.*

1. Zet de **AAN/UIT-schakelaar** aan de zijkant van de iBT10 in de **AAN**-stand (blauwe led [ •] knippert aan en uit).
2. Houd de **AFSPELEN / BELLEN**-knop [] ingedrukt totdat de RODE en BLAUWE leds knipperen.
3. Activeer de zoekmodus op het Bluetooth™ apparaat waarmee u de iBT10 wilt koppelen.
4. Als de blauwe led [ •] BRANDT, betekent dit dat de iBT10 is gekoppeld aan uw Bluetooth™-apparaat.

De iBT10 gebruiken met twee apparaten

Het is mogelijk om de iBT10 met twee apparaten te koppelen en eenvoudiging tussen deze twee te schakelen.

Koppel de iBT10 eerst met **APPARAAT A** (bijvoorbeeld een smartphone zoals hierboven beschreven).

Schakel de Bluetooth-functie op APPARAAT A **UIT**.


Koppel nu de iBT10 met een ander apparaat – **APPARAAT B** (bijvoorbeeld een smart-tv zoals hierboven beschreven).


Schakel de Bluetooth-functie op APPARAAT A **IN**.

Controleer of beide apparaten zijn gekoppeld en verbonden met de iBT10.

Speel geluiden af van zowel APPARAAT A als B. De iBT10 speelt het geluid van **APPARAAT B** af.

Druk tweemaal op de **AFSPELEN / BELLEN**-knop

[] om het geluid van APPARAAT A af te spelen, druk nogmaals tweemaal op de

AFSPELEN / BELLEN-knop [] om terug te schakelen naar APPARAAT B.

NB:

1. Zowel APPARAAT A als APPARAAT B moeten geluiden afspelen om ertussen te kunnen

schakelen.

2. *De iBT10 behandelt oproepen als een prioriteit. Als bijvoorbeeld **APPARAAT A** een **smartphone** is en **APPARAAT B** een **smart-tv**, en u luistert naar de smart-tv, schakelt de iBT10 automatisch over naar APPARAAT A wanneer er een oproep is. Wanneer het gesprek wordt beëindigd, schakelt de iBT10 automatisch terug naar APPARAAT B.*


STAP 4: LUISTER NAAR MUZIEK / TV VANAF EEN GEKOPPELD APPARAAT

Nadat u de iBT10 heeft gekoppeld aan uw smartphone / smart-tv / een ander apparaat, kunt u naar muziek / tv luisteren. Steek de kabel van de meegeleverde oordopjes in de **3,5 mm**


audio-aansluiting [] aan de bovenkant van de iBT10, of, als u een hoortoestel gebruikt, steek de neklus (**iBT10 LUS-optie**) in de twee kleinere **2,5**

mm audio-aansluitingen [ ] aan weerszijden van de koptelefoonaansluiting. Misschien wilt u het volume en de toon aanpassen - zie het gedeelte over volume- en toonaanpassing.


Bij sommige apparaten, zoals een smartphone, kunt u het geluid **pauseren** met de **AFSPELEN /**

BELLEN-knop [], en naar het **volgende** nummer gaan met behulp van de volumeregelaars [

 **Vorige** /  **Volgende**] op de iBT10 (dit werkt mogelijk niet met alle bestandsformaten, besturingssystemen en apparaten).

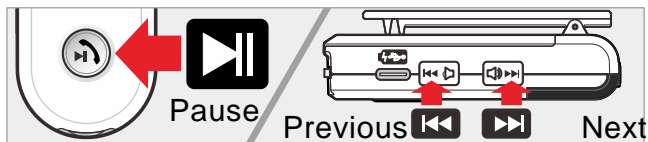



Het geluid PAUZEREN Druk op de **AFSPELEN /**


BELLEN-knop [] op de iBT10. Om het afspelen van de audio te hervatten,



drukt u nogmaals op de **AFSPELEN / BELLEN**-knop [].

Om naar het volgende of vorige nummer te gaan,

houdt u de VOLUME-knoppen [ **Vorige /**  **Volgende**] aan de zijkant van de iBT10 ingedrukt.

Houd de [ **Volgende**] knop ingedrukt om naar het volgende nummer te gaan.

Houd de [ **Vorige**] knop ingedrukt om naar het vorige nummer te gaan.


NB: U kunt het volumeniveau van het apparaat ook aanpassen met behulp van de VOLUME-knoppen [ / ] aan de zijkant van de iBT10.

Volumeregeling

U kunt het geluidsniveau aanpassen vanaf de oordopjes / neklus terwijl u naar de audio luistert door op de VOLUME-knoppen aan de zijkant van de iBT10 te drukken.

Druk op de [ **Volume+**] knop om het

volumeniveau te verhogen.


Druk op de [ **Volume -**] knop om het volumeniveau te verlagen.

NB: U hoort een pieptoon tijdens het aanpassen van het volume. Eén hoge toon tijdens het aanpassen van het volume betekent dat het volume maximaal is. Eén lagere toon tijdens het aanpassen van het volume betekent dat het volume minimaal is.

GEHOORADVIES: Stel het volume in op een niveau dat comfortabel is. Als u gedurende langere tijd naar harde geluidsniveaus luistert, kan dit gehoorschade veroorzaken.

Toonregeling

U kunt de toon aanpassen vanaf de oordopjes / neklus terwijl u naar de audio luistert door de toonregelaar aan de onderkant van de iBT10 te verschuiven. U kunt de regelaar gebruiken om de hoge tonen (treble/hoge frequentie) of lage tonen (bas/lage frequentie) te verhogen.

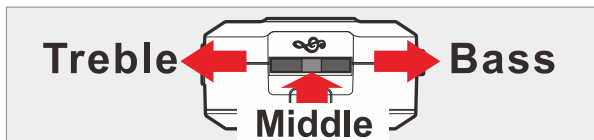

Schuif de regelaar naar **links** om de **hoge tonen (treble)** te verhogen (bas verlagen).

Schuif de regelaar naar **rechts** om de hoge tonen

(treble) te verlagen (**bas** verhogen).


Druk op de regelaar om de toon in te stellen op de standaardinstelling (**midden toon**).

NB: Tijdens het aanpassen van de toon is een dubbele **pieptoon** hoorbaar bij de maximale instellingen voor hoge en lage tonen. Bij de standaardinstelling (middentoon) hoort u één enkele **pieptoon**.

De iBT10 met neklus gebruiken:

Luisteren naar muziek / tv, bellen / gebeld worden

- Koppel de iBT10 met uw smartapparaat.
- Zet uw gehoorapparaat in de **T-stand**.
- Steek de 2,5 mm hoofden van de neklus in de

nekluspoort [] aan de bovenkant van het iBT10 Bluetooth-apparaat en plaats de lus vervolgens om uw nek.

- Nu kunt u de muziek beluisteren vanaf uw smartapparaat. U kunt bellen met uw iBT10 wanneer deze gekoppeld is aan uw smartphone.
- Knoppen en bedieningselementen zijn hetzelfde als hierboven beschreven.

Microfoon

De iBT10 heeft een ingebouwde microfoon die het mogelijk maakt telefoongesprekken te voeren wanneer u het neklussysteem gebruikt.



NB: Om verwonding van uw hals/nek te vermijden komen de connectoren van de neklus los als het apparaat verward raakt met de kabels. Als dit gebeurt, sluit u de connectoren weer aan op de aansluitingen om de normale werking te hervatten.

OPROEPEN PLAATSEN / ONTVANGEN

Indien de iBT10 gekoppeld is aan uw smartphone, kunt u oproepen plaatsen en ontvangen via de iBT10 (via de oordopjes of neklus).

NB: De iBT10 heeft een ingebouwde microfoon waarmee u met uw beller kunt praten.

Een oproep plaatsen met de iBT10

Zet de **AAN/UIT-schakelaar** aan de zijkant van de iBT10 in de **AAN**-stand.

Selecteer uw contactpersoon of toets het telefoonnummer op uw smartphone en start het gesprek. U kunt het gesprek automatisch starten met uw iBT10.


Mogelijk moet u het volumeniveau op de iBT10 aanpassen om het gesprek beter te horen.

Een oproep ontvangen

Zet de **AAN/UIT-schakelaar** aan de zijkant van de iBT10 in de **AAN**-stand.

Bij het ontvangen van een oproep knipperen de rode en blauwe leds en hoort u de

beltoon of melodie van de smartphone via de oordopjes / neklus. Druk op de **AFSPELEN /**

BELLEN-knop [] om de oproep aan te nemen.

NB: Als de beltoon op uw smartphone is ingesteld




op **UIT / ALLEEN TRILLEN**, is de beltoon hoorbaar via de oordopjes / neklus wanneer er een inkomende oproep is.


INKOMENDE OPROEPEN TIJDENS HET LUISTEREN NAAR MUZIEK / TV

Als u wordt gebeld (vanaf uw gekoppelde smartphone) terwijl u naar muziek of de tv luistert (de iBT10 is gekoppeld aan uw smartphone en smart-tv – ZIE STAP 3: **De iBT10 gebruiken met twee apparaten**), zullen de RODE en BLAUWE leds knipperen en zal de beltoon van de smartphone hoorbaar zijn via de oordopjes / neklus. Druk op de **AFSPELEN /**



BELLEN-knop [] om de oproep aan te nemen. U kunt nu met de beller praten via de iBT10 (via de oordopjes of de neklus, afhankelijk van welke u gebruikt).

Aan het einde van het gesprek, drukt u op de **AFSPELEN / BELLEN**-knop []. De iBT10 keert automatisch terug naar het afspelen van de muziek van uw gekoppelde apparaat / geluid van uw smart-tv.

NB: Als de iBT10 niet automatisch terugkeert naar het afspelen van muziek/smart TV geluid, drukt u nogmaals op de **AFSPELEN / BELLEN**-knop [].

De iBT10 uitschakelen en ECO stand

Om de iBT10 uit te schakelen, schuift u de **AAN/UIT-schakelaar** aan de zijkant van de iBT10 naar de UIT-stand.



Als er langer dan 15 minuten geen Bluetooth-verbinding is, wordt de iBT10 automatisch uitgeschakeld.

Om weer in te schakelen, schuift u de AAN/UIT-schakelaar naar de

UIT-stand en schuift u deze vervolgens naar de **AAN**-stand.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Batterij : Li-ion oplaadbare batterij 3.7V/400mA

Oplaadtijd: Ongeveer 2,5 uur

Bluetooth Versie : Bluetooth 5.1

Bluetooth Chipset : QCC3024

Frequentiebereik: 2,402GHz/-2,480GHz

Bluetooth bereik: 10 meter

PROBLEEMOPLOSSING

Als de iBT10 niet lijkt te werken, controleer dan het volgende:

- Zorg ervoor dat de batterij op de juiste manier is geplaatst.
- Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen.
- Zorg ervoor dat de iBT10 is gekoppeld aan een apparaat (smartphone, smart-tv, een ander apparaat).
- Zorg ervoor dat de oordopjes goed zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat de nekbus goed is aangesloten en dat het gehoorapparaat is ingesteld op de T-stand.
- Als de batterij van de iBT10 niet wordt opgeladen (er branden geen leds), controleer dan of de USB-oplaadkabel goed is aangesloten op de USB-voedingsadapter en de iBT10. Zorg ervoor dat de USB-voedingsadapter goed is aangesloten op het stopcontact.

VEILIGHEID & WEGGOOIEN VAN DE BATTERIJEN

Gebruik alleen de batterij die bij dit product is geleverd. Zie RICHTLIJNEN VOOR RECYCLING voor het weggooien van het product en batterijen.

GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc product heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u problemen ondervinden, neem dan contact op met onze Helpline of ga naar onze website op **www.geemarc.com**. Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is. De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.

Belangrijk: UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE EN MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.

NB: De garantie is alleen maar geldig in het Nederland.

CE VERKLARING

Hierbij verklaart Geemarc dat dit iBT10 voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de radioapparatuur Richtlijn 2014/53/UE betreffende.

*De nakomingsverklaring kan ingezien worden op **www.geemarc.com***

De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) richtlijn is opgesteld om producten die aan het einde van hun nuttig gebruik zijn gekomen op de beste manier voor hergebruik geschikt te maken.

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet weg met uw huisvuil. Gebruik liever een van de volgende stortingsopties:

- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA container.

Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA container.

- Of overhandig het oude product aan uw detailhandelaar. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren.

Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt u het milieu.



Bezoek ons op www.geemarc.com
voor productondersteuning en hulp

Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59760 Grande-
Synthe,
France

Telefon: **+49(0)30 209 95 789**

E-mail : **sav@geemarc.fr**

geemarc™
Hear the Difference



UGiBT10™_NL_Ver0.1

geemarc™
Hear the Difference

Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée,
59760 Grande-Synthe,
France
www.geemarc.com